



Zitzi
Active G2

Brugervejledning

Brugermanual, monterings-/justeringsanvisning,
service og vedligeholdelse samt genbrug



Denne brugervejledning omhandler siddesystemet Zitzi Active med tilbehør.
For komplet oversigt over tilbehør, se produktets bestillingsgsunderlag.

Indholdsfortegnelse

Producent og forhandler.....	3	Justering av ryg med justeringshåndtag.....	18
Specialtilpasning.....	3	Hoftebælte	19
Introduktion	4	Kropssele.....	20
Indledning	4	Brystbælte	21
Korrespondence - mærkning	4	Hovedstøtte	21
CE-mærkning - klassificering	4	Ankelbepænding.....	22
Overensstemmelseserklæring.....	4	Fodrem.....	22
Kort om produktet.....	4	Armlæn fra ryg	23
Symbolliste.....	5	Støttebord	24
Produktmærkning.....	6	Fodstøtte, hel	25
Sikkerhedsinstruktioner	7	Delt fodstøtte med kugleled.....	26
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Lægstøtte	27
Advarsler og forholdsregler.....	7	Knæstøtte	28
Kontrol før brug	9	Støttehåndtag.....	29
Begrænsninger.....	9	Kørebøjle	29
Andre risici	10	Indendørsstel Flipper G2.....	30
Godkendte kombinationer.....	10	Resumé og opfølgning	32
Afviselser/tilbud.....	10	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner	33
Tekniske data/Ydeevne	11	Kontrol før brug	33
Tilpasning og specialtilpasning.....	12	Service og vedligeholdelse.....	34
Monterings- og justeringsinstruktioner	13	Renovering	35
Justering af siddesystem.....	14	Affaldssortering	38
Montering/afmontering af ryg.....	15	Garanti og retur.....	38
Justering af rygvinkel.....	16	Revision.....	39
Justering af ryghøjde	17		
Justering af ryg i dybden.....	17		

Producent og forhandler

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 75

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at kunne udnytte Zitzi Active til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk.

Kort om produktet

Zitzi Active G2 er et modulopbygget dynamisk siddesystem til børn og unge med siddeproblematikker. Siddesystemet er beregnet til at blive brugt sammen med kørestolsstel fra Anatomic SITT.


Zitzi Activei G2 kan bruges flere gange.

Symbolliste

 Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.	 Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
 Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.	 Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
 Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.	 Angiver producentens referencenummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk. www.anatomicstt.com	 Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
 Angiver at brugervejledningen skal læses for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information om f.eks. advarsler som ikke findes på produktets medicintekniske etiket.	 Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
 Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato.	 Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
 Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.	

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt

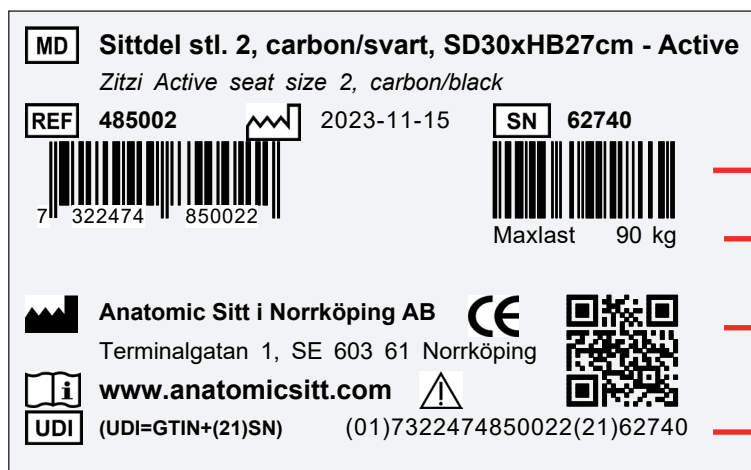

Produkt navn


Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)

Max belastningsvægt

UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)

UDI= GS1-128

Etiket på tilbehør

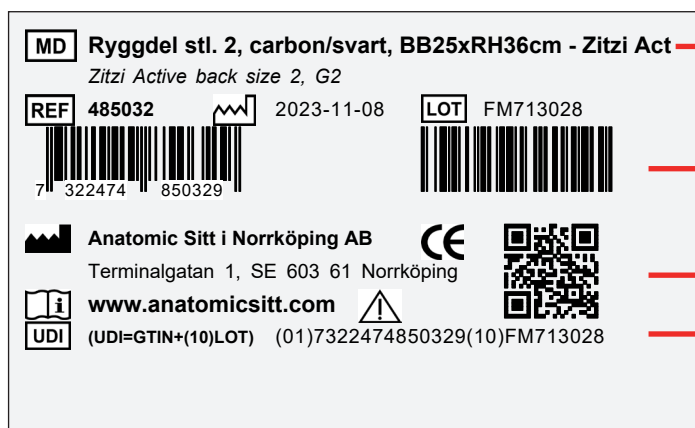

Produkt navn

Stregkode (EAN-13 eller REF samt LOT)

UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)

UDI= GS1-128

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om Anpassning/specialtilpasning skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (Eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

Anvarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejling altid før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet eller tilsvarende og, som har kendskab til om brugeren kan balancere i det valgte sæde for at sikre, at enhver tipperisiko udelukkes.



Når Active anvendes sammen med Flipper/Flipper G2 eller Flipper Flex/G2 skal rammeforlænger monteres pga evt. tipperisiko.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle monterings-skruer og møtrikker kontrolleres og spændes.



Sørg altid for, at sædet er fastgjort til kørestolsstellet før borgeren placeres i siddesystemet! Et bælte leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra rygprofilen af sædet og omkring chassissets kørebøjle. Dette bælte skal altid bruges sammen med adaptersystemet universal, og når det transporteres i et køretøj. Sørg for, at denne rem er stabil og stram.



Brug aldrig fodpladen, til ind- og udstigning af hjælpemidlet.



Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning".



Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.



Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.
Løft aldrig hjælpemidlet med brugeren i.



Udfør aldrig service mens produktet anvendes.



Efterlad aldrig brugeren uden opsyn, når hjælpemidlet anvendes.



Udfør altid kontrol efter brug for at registrere rødme eller trykmærker på brugeren.

Kontrol før brug

Tillsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:
Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.

- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling for bevægelse og låsning.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxvægt

Den højste belastningsvægt er 75 kg og gælder for samtlige størrelser.
Med belastningsvægt menes den maksimale vægt som siddesystemet må udsættes for inkl. bruger og evt. anden vægt.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:
Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned. Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør.

Godkendte kombinationer

For at CE-mærkningen skal opretholdes på en sikker måde, skal hjælpemidlet anvendes sammen med produkter, tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt. Se produktets bestillingsoplysninger for muligt tilbehør og en splittegning af reservedele.

Produktet kan dog udstyres med CE-mærkede bæltter/seler og hovedstøtter/nakkestøtter fra en anden leverandør, samtidig med at CE-mærkningen bevares, hvis følgende punkter er opfyldt:

- Det skal tydeligt fremgå af tredjepartens dokumentation, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartens produkt er beregnet til brug på manuelle kørestole eller modulære siddesystemer, og at tredjeparten godkender brugen på andres siddesystemer).
- At sædesystemets originale fastgørelsespunkter anvendes, og at bæltter/seler og hovedstøtter/nakkestøtter er fastgjort til de beslag, der er beregnet til dette sædesystem fra Anatomic Sitt AB. Beslagene skal passe til det relevante tredjepartsprodukt. Der må ikke foretages ændringer/tilpasninger af nogen af produkterne for at muliggøre kombinationen.
- Monteringsvejledninger for nakkestøtter og seler/seler fra Anatomic Sitt skal følges og kan findes i afsnittet Monterings- og justeringsvejledninger senere i denne dokumentation. Der må derfor ikke monteres andre produkter eller tilbehør på tredjepartsproduktet.

Bemærk, at der altid bør udføres en risikovurdering, når produkter fra forskellige leverandører kombineres. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i dets nærhed.

Afviigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed.

Tekniske data / Ydeevne

Zitzi Active

	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4	Str. 5
Sædets dybde (cm) (D)	27	32	37	41	46
Hoftebredde (cm)* (E)	23	28	33	38	41
Kropsbredde (cm)** (A)	20	22	25	30	32
Kropsstøtkehøjde (cm) (F)	28 - 33	32 - 40	38 - 44	43 - 50	43 - 50
(Kropsstøttemålet gælder uanset hvilken sædedelstørrelse der vælges)					
Ryghøjde (cm) (B)	32	37	42	47	51
Rygprofil længde (cm)(C)	39	45	53	58	63
Hoftevinkelsjustering	32°	38°	38°	38°	38°

* Aftagelig kantpolstring indgår bagved polstringen for mindre just. ved hofte og bækken


** Kropsbredde flexibel + 3 cm (Med brystbælte også - 3 cm)

Sædedelens hældning er 15° fremad


Abduktion: Samtlige størrelser 28°

Max brugervægt: op til 90 kg

Brugerhøjde: 100 - 185 cm

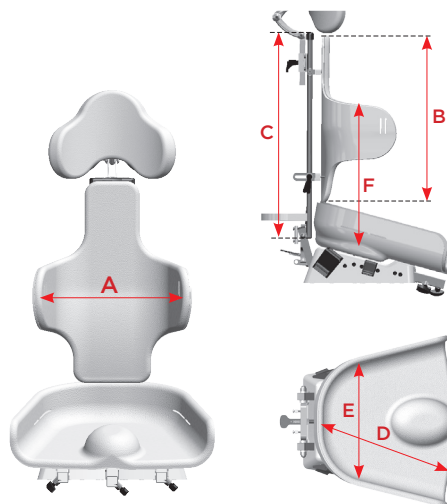


ARMLÆN FRA RYG

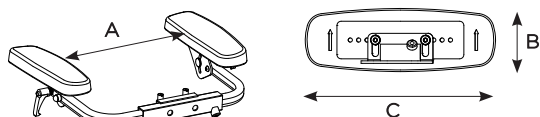


Mål	A	B	C
Str. 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Str. 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Str. 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm

HOVEDSTØTTE

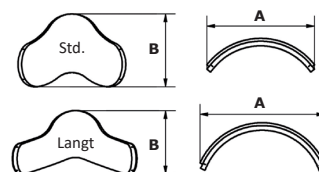

	A	B
Hovedstøtte str. 1	220 x 150 mm	
Hovedstøtte str. 1 lang	280 x 160 mm	
Hovedstøtte str. 2	240 x 190 mm	
Hovedstøtte str. 2 lang	280 x 210 mm	

FODSTØTTE

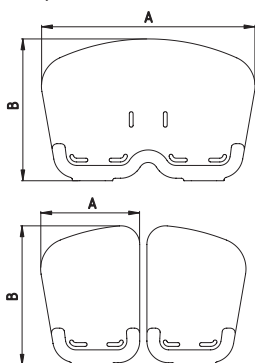


	A x B
Hel str. 0	300 x 255 mm
Hel str. 1	315 x 195 mm
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm
Hel str. 6	480 x 310 mm

	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm


Størrelse	1	2	3	4	5	6
Fodstøttestang profil længde (cm)	25	30	35	35	40	40

STØTTEHÅNDTAG

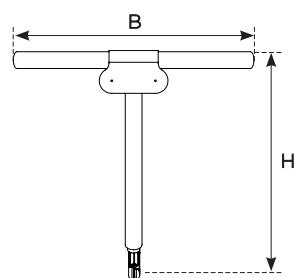



Mål (cm)	B	H
Støttehåndtag str. 1	32	32
Støttehåndtag str. 2	37	37
Støttehåndtag str. 3	42	42
Støttehåndtag str. 4	47	47

STØTTEBORD

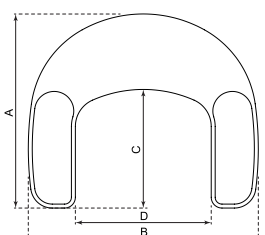

	Mål
Støttebord	A B C D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm
Str. 5	620 x 740 x 380 x 440 mm

KNÆSTØTTE

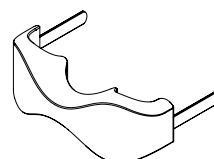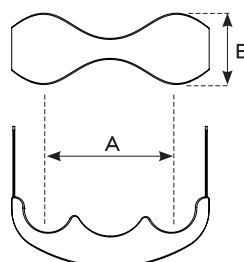

Mål (cm)	A	B
Knæstøtte str. S	27	7
Knæstøtte str. L	30	12

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Længden af fodstøtteprofilen kan forkortes, så den passer bedre til brugeren.

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på Hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljøet om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

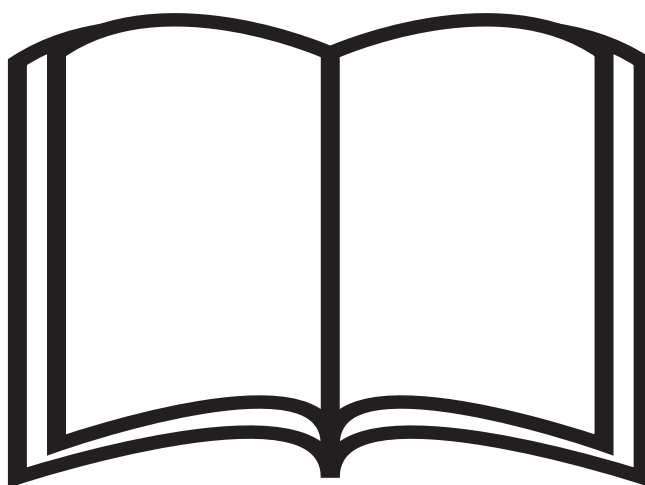

Værktøj

Værktøjsnøglen, som du skal bruge til at foretage justeringer, er integreret øverst på rygprofilen som du finder på bagsiden af stolen. (4 mm unbrakonøgle)

 Værktøjsnøglen skal sidde i profilen, når den ikke bruges for at beskytte rygprofilens top og altid kunne findes til justeringer.

(Der medfølger også en løs Torxnyckel T-25)



Justering af siddesposition

Forskydning af sædedelen

Sædedelen har to positionsalternativer: standardmontering (leje 1) eller tilbageleje (leje 2). Forskellen er, at sædedelen flyttes 2,5 cm bagud i position 2. De to positioner ændres ved at løsne de fire skruer og flytte sædet til den nye position. Stram skruerne.



Tilpasning med sædebrødspude

Sædebrødspude kan også fjernes, slipas eller erstattes af andet materiale.



Montering/afmontering af ryg

Rygbeslaget består af 4 skruer. Sæt bagprofilen ind i fælgstifterne og spænd de fire medfølgende skruer (markeret med rødt på billedet).

Ryggen ender automatisk i den rigtige position ved hjælp af stoppet i rygprofilen.



Justering af rygvinkel



Placer låsepalen i aktiveringspositionen ved at løfte den op og derefter skubbe den ind på plads. Tryk ned på palen for at justere ryglænets vinkel. Derefter aktiverer gaspatronen ryggen, så du kan indstille den i den ønskede position. Når du har nået den ønskede vinkel, skal du slippe låsepalen igen, og du bevarer nu din indstillede vinkel.



Det er meget vigtigt at låsepalen sættes i børnesikretleje, hviler nedad, efter justering af rygvinklen.



Justering af ryghøjde



- Løsen skruerne A og vingeskrue B, se billede, på begge sider af rygprofilen
- Justera in højden
- Placer ryggen så man udnytter ryggens integrerede lændestøtte
- Lås skruerne og vingeskrue

 = Justeringsnøgle 

Justering af ryg i dybden



- Løsen vingeskrue B, se billede, på begge sider af rygprofilen
- Juster ryggen i dybdeled C til ønskede dybde
- Lås vingeskrue



Justering af ryg med håndtag

For at brugeren kan komme korrekt ind i sædet, kan det være nødvendigt at skubbe lændehvirvelsøjlen tilbage mod rygprofilen. Justeringshåndtaget er en mulighed for hurtigt og nemt at justere dybden på lænderyggen, når brugeren sidder ned.

Montering




- Start med at montere de medfølgende stoprammestifter (4) med stopskruer (5) i profilen (hvis de ikke allerede er til stede) under det nederste ryglænsbeslag på hver side.
- Skru håndtaget (3) af, som er placeret på den nederste bagbeslag. Rammestiften til håndtaget bevæger sig nu ned og stopper på den stoprammestift, der netop blev monteret.
- Monter justeringshåndtaget (1) i ryglænsbeslaget på begge sider ved hjælp af de nye, længere håndtag (3) og skiver (2), der er inkluderet i sættet. Vælg hullet i justeringshåndtaget, så det peger nedad, når lændejusteringen er færdig.

Justering

Løsn håndtagsknapperne (3) let på begge sider af lændestøtten.

Juster lændestøtten i dybden med justeringsgrebet (1) til den forudbestemte dybde (drej grebet helt ned).

Lås bagsiden med knapperne (3) i højre og venstre side.

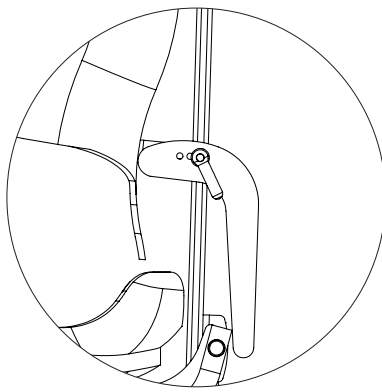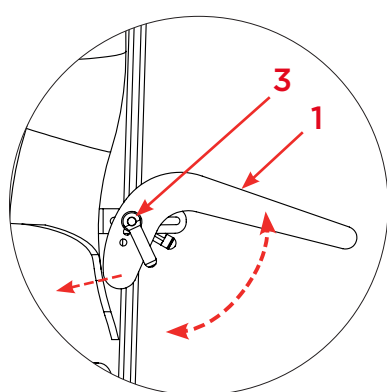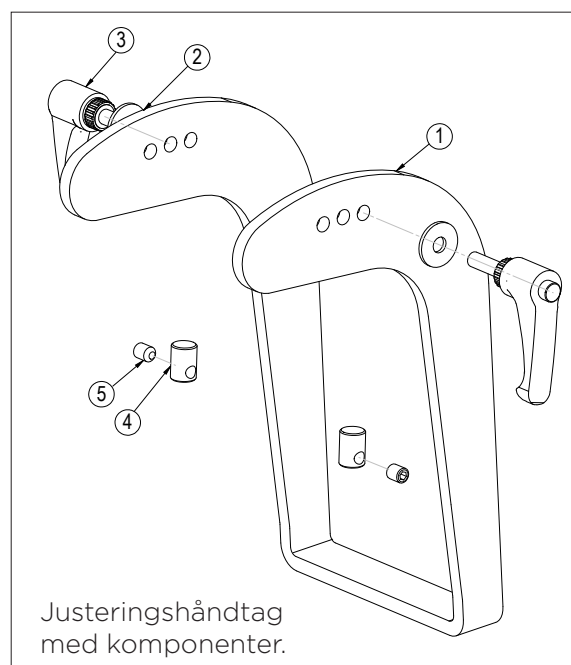


Hoftebælte

Justering af hoftebæltetsbeslag

For at flytte placeringen af hofteselegebespændingen, løsnes skruerne (A) og flytter spændet (B) til ønskede position (se alternative hul bagved hæften). Sæt skrue (A) i og spænd til.

Montering af hoftebælte

Træk hoftebæltets bånd ned gennem spændet (B). Klem bæltetsbåndet ordentligt fast i spændet (B).

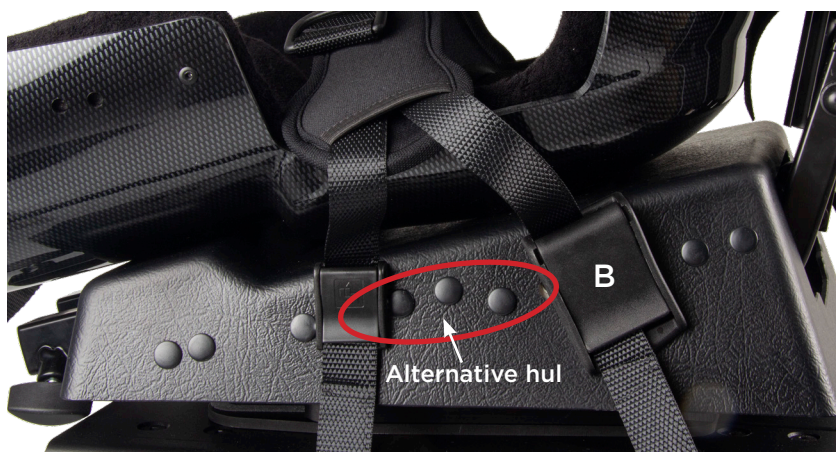


Justering af antirotationsbæltetsbeslag

For at flytte position på bæltefastgørelsen løsner du skruerne (A) og flytter spænderne (B+D) til ønskede position (se alternative hul). Isæt skruerne (A) og spænd.

Montering af antirotationsbælte

Træk begge bæltets stropper gennem springen i sædet (C) og ned gennem spændet (B) og (D). Klem bæltets stropper ordentligt fast i spænderne.

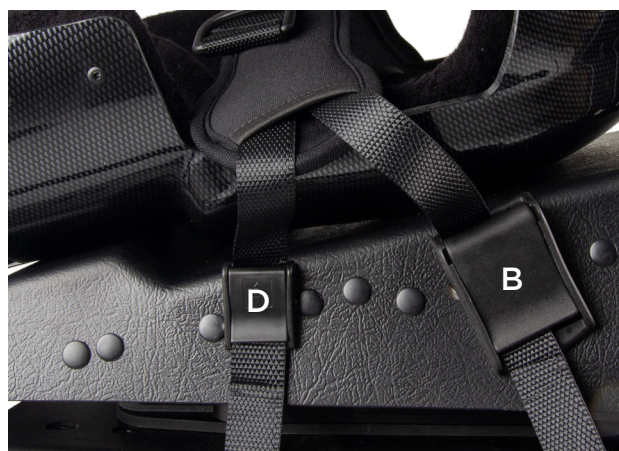

Kropssele

A Øvre beslag



B
Nedre fastgørelsesbeslag,
der medfølger 1 stk. som
standard

Montering af øvre beslag - A

Tag justeringsnøglen af, og skub derefter profilmøtrikken(A) på øvre monteringsbeslag (D) ind i rillen på bagprofilen. Når du har nået den ønskede højde på beslaget, spænd da skruerne. Sæt justeringsnøglen på plads i rygprofilen.

Justering af øvre fæstbeslag


For at højde- og vinkeljustere det øvre beslag, løsner du skruerne og flytter herefter beslaget til ønsket position. Spænd herefter skruerne. Sørg for at trækket bliver højere end skulderpartier, så borgeren ikke trækkes ned i sædet.

Montering af sele

Træk selens øvre remme gennem sporet og i spændet. Træk efterfølgende selens nedre fastgørelsespunkter ind i det nederste beslag (B). Brug Triglide spændet E.

Justering af trækretning og bredde

Løsen skruerne på det øvre fæstebeslag og juster højden, spænd den øvreste skrue. Juster vinklen ind og spænd herefter den nedre skrue.

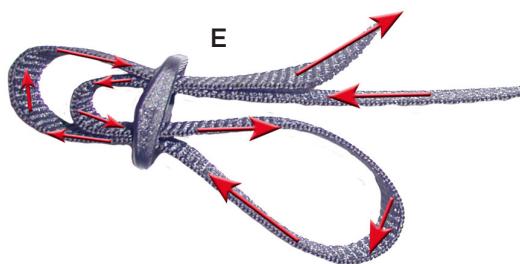

Sørg for, at der er nok plads til halsen. Tjek også trykket på stroppen, og at bæltepuderne er, hvor de skal.

 = Justeringsnøgle 

Brystbælte

Montering af brystbælte

Montering af båndet til brystselen gøres ved at båndet trækkes gennem kropsstøtten og klemmes fast i spændet på bagsiden af ryggen, se billederne nedenfor.



Hovedstøtte

A - Montering af hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen.

Skub derefter hovedstøttebeslaget ned til den ønskede position i rillerne på rygprofilen.

Spænd skruerne!

B - Monter herefter hovedstøtten i

hovedstøttebeslaget, juster til ønskede leje.

Spænd vingeskruen!

C - Justering af hovedstøtten

Løsn justeringsskruerne C lige nok, så hovedstøtten kan justeres manuelt til den ønskede position, og spænd derefter skruerne C.

Hvis hovedstøtten skal være højere oppe, justeres dette ved at løsne vingeskrue B og derefter flytte hovedstøtten til den ønskede højde.

Derefter spændes vingeskrue B.

 = Justeringsnøgle 




A Hovedstøttebeslag, 4 profilskruer.

B Vingeskrue til højdejustering

Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding.

Montering af ankelbespænding på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.

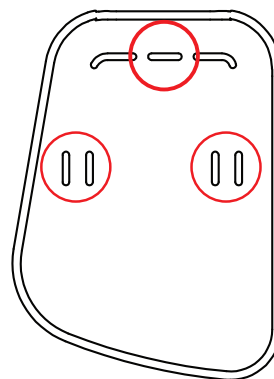


Kontroller at polstringen ikke har foldet sig på ankelbespændingen.

Fotrem/fodstrop

Fodpladen er forberedt til montering af fodrem.

Montering af fodremme på alle fodplader gøres ved at remmen trækkes ned og op gennem to af de passende forborede huller i fodpladen. Fodremmen kan monteres i de forreste eller bagerste hulsæt.

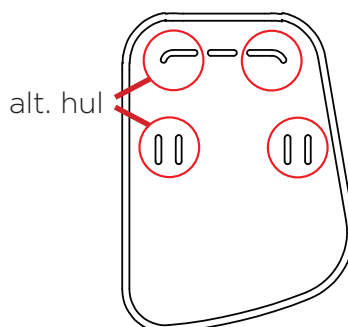

Armlæn fra rygg


Montering af armlæn fra ryg

Inden armlænet monteres bagfra, skal du først fjerne justeringsnøglen og andre detaljer, der måtte være i vejen. Disse detaljer kan f.eks. være nakkestøtte, øvre monteringsbeslag og styr.

Løsn stopskruerne (A), og juster armlænbeslagene (B) for at få adgang til skruerne (C) på midterbeslaget gennem hullerne. Løsn disse skruer tilstrækkeligt til at kunne indsætte profilskruerne (D) i rillerne på bagprofilen. Justér derefter beslaget til passende højde, og stram skruerne. Juster armlænbeslagene til den passende bredde, og stram stopskruerne. Monter om nødvendigt de dele, du har fjernet, for at kunne montere armlænbeslaget.


Højdejustering

For at højdejustere armlænet løsner du skruerne (C) lidt og flytter derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (C). Armlænet skal eventuelt breddejusteres til siderne først, hvis de blokerer hullerne til højdejusteringen.

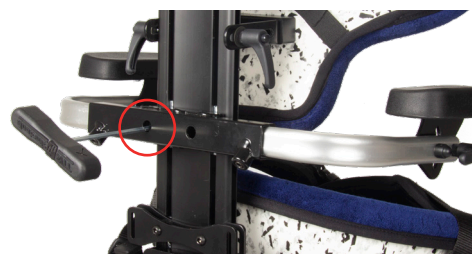

Breddejustering

For at ændre armlænets bredde skal du løsne stopskruerne (A) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne.

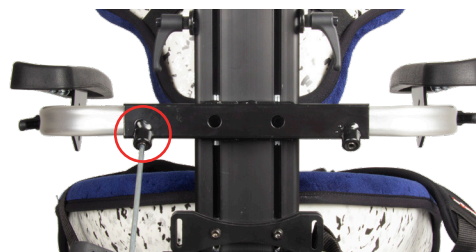



Vinkeljustering opad/nedad

For at justere armlænets vinkel skal du løsne vingeskruen (E) og derefter dreje armlænet til den ønskede vinkel. Stram derefter vingeskruen (E).



Vinkeljustering i sideled

Hvis du vil justere pladen sidelæns og i en vinkel, skal du løsne skruerne (F) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (F).

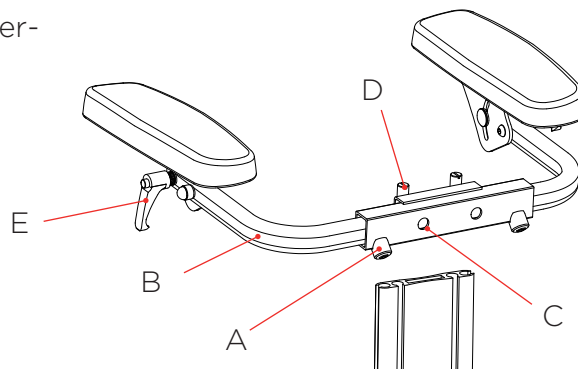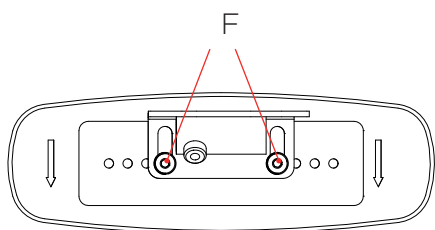


Støttebord

Montering af bordet

Læg bordet på armlænspladerne og vrid herefter bordets låsearm ind (A) under armlænspladen (B).

Låsarmene skal vrides til de havner indenfor kanten på armlænspladen.

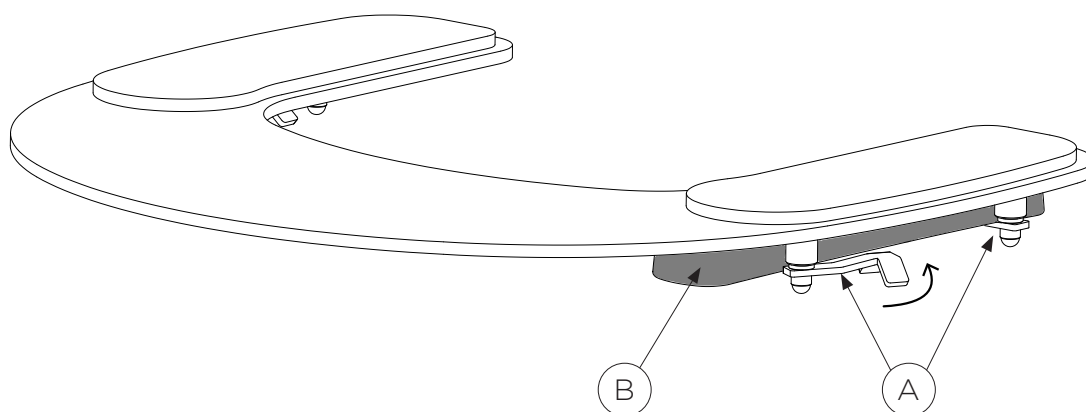

Fodstøtte helt

Montering af fodstøtten

Monter fodstøtten i beslaget (A)
(firkantet rør). Lås fodstøtten med
låseskruen (B).

Justering av vinkel av knäled

Løsn vingeskruen (C) og juster derefter til
den ønskede vinkel. Spænd vingeskruen,
når den ønskede vinkel er nået.

! **Vigtigt** - Efter justering skal takkerne gå
ind hinanden, så det låser. Spænd skruen!

Højdejustering af fodplade

Løsn knappen (D) og juster derefter til
den ønskede vinkel. Spænd fingerskruen,
når den ønskede højde er nået.

Vinkeljustering af fodplade

Løsn skrue (E) på begge stænger, juster
efterfølgende fodpladen til ønskede
vinkel. Spænd herefter skruen.

! **Vigtigt** - Efter justering skal takkerne gå
ind hinanden, så det låser. Spænd skruen!



 = Justeringsnøgle 

Delat fodstøtte med kulled

Montering af fodstøtten

Monter fodstøtten i beslaget (A)
(firkantet rør). Lås fodstøtten med
låseskruen (B).

Justering af vinkel af knæled

Løsen fingerskruen (C) og juster
efterfølgende til ønskede vinkel. spænd
fingerskruen, når ønskede vinkel er
opnået.




Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå
ind hinanden, så det låser. Spænd skruen!

Højdejustering af fodplade

Løsn skruen (D), og juster derefter til
den ønskede højde. Lås skruen, når den
ønskede højde er nået.

Vinkeljustering af fodplade

Løsen skruerne (E) til fodpladen og indstil
til ønskede vinkel. spænd skruerne igen
ordentligt.

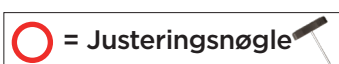

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Begynd med at tage endehætten af og løsn herefter vingeskruen, som holder fodstøtten på plads på fodstøttesstangen. Spænd herefter fodstøttepladen og dennes beslag.

Monter lægstøtten ved at sætte profilmøtriken ind i fodstøttestangen, se billedet nedenfor, juster til ønskede højde og spænd skruerne (A). Monter herefter fodstøtten og endehætten.


Monter lægstøttespladderne, se billedet nedenfor (B).
Genmonter fodpladen, endestoppet og rørbeskyttelse.

Højde-/dybdejustering af lægstøtten

Løsen skruerne (A), juster herefter lægpladen til ønskede højde og dybde. Lås skruerne (A).

Side-/vinkeljustering af lægstøtten

Løsen lidt på skruerne (B), juster efterfølgende lægpladerne i sideled og eventuel vinkel. Spænd skruerne (B).

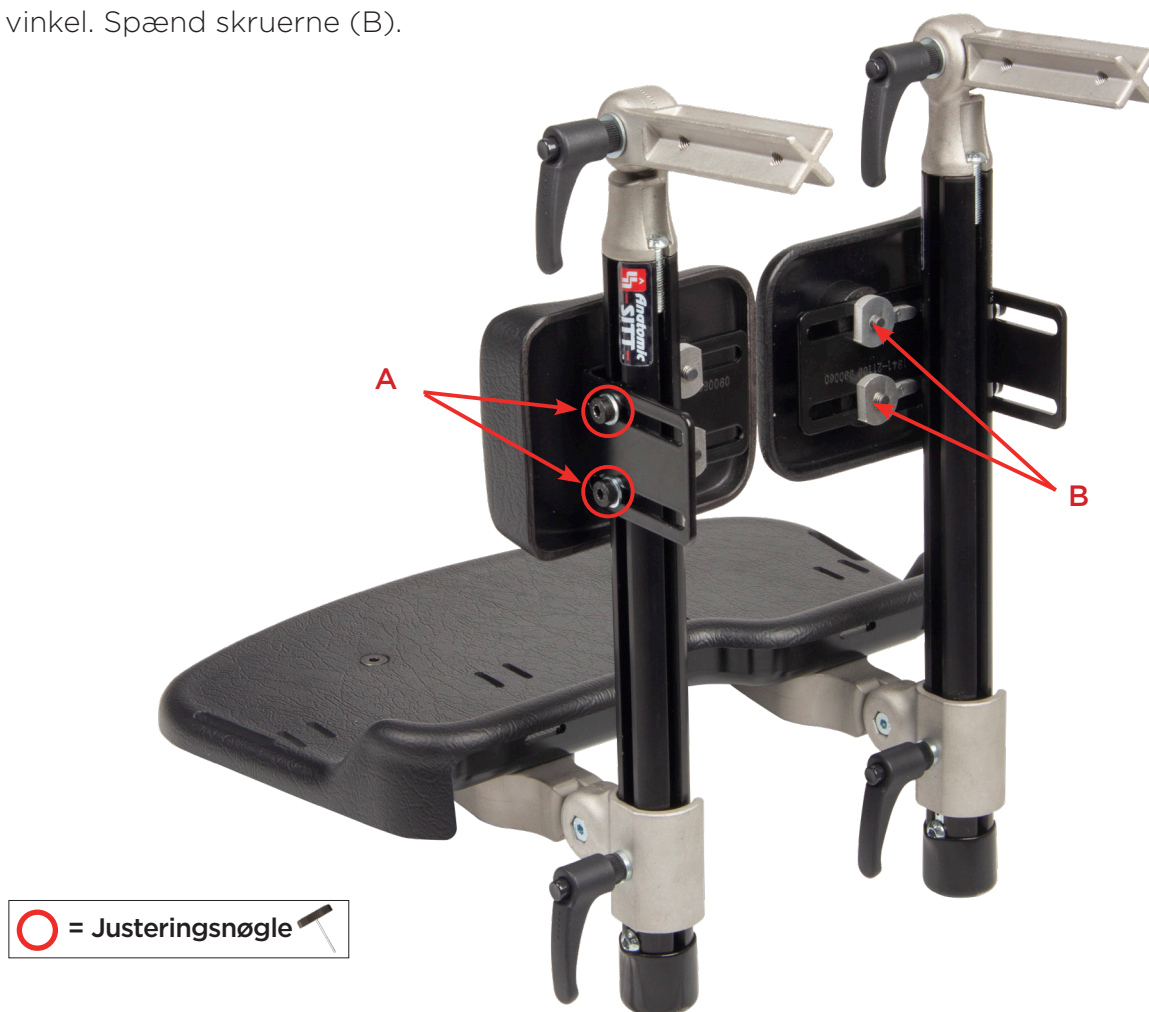

Knæstøtte

Montering af knæstøtten

Knæstøtten monteres ved hjælp af plastspændebåndet på hver sin side af sædet.

Beslagene til knæstøtten kan placeres højt eller lavt (se billedet nedenfor).

- Montering (lavt) i den nederste del sker med de medfølgende skruer i eksisterende huller iht. billede 1.
- Montering (højt) i sædet sker med monteringssettet (korte skruer og plade) i eksisterende huller i sædedelen iht. billede 2-3.



1. Lav placering af knæstøttebeslaget



2. Høj placering af knæstøttebeslaget



3.



Justering af knæstøtten

Knæstøtten kan spændes med det praktiske spænde, som har inbygget spændearm og frigøringsknap.



Spændearm



Frigøringsknap

Støttehåndtag

Montering af støttehåndtaget

Monter støttehåndtaget (A) i midter-beslaget (B) (firkantetrør). Lås støttehåndtaget fast med låseskrue (C).

Justering af vinklen på støttehåndtaget


Løsen skrue (D) og juster efterfølgende til ønskede vinkel. Spænd skruen, når ønskede vinkel er opnået.

! Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå ind hinanden, så det låser. Spænd skruen!



Kørebøjle

- 1) Fjern t-nøglen fra rygprofilen.
- 2) Før profilskrue (A) ind i sporerne på rygprofilen og før kørebøjlen til ønsket position.
- 3) Spænd skrue.

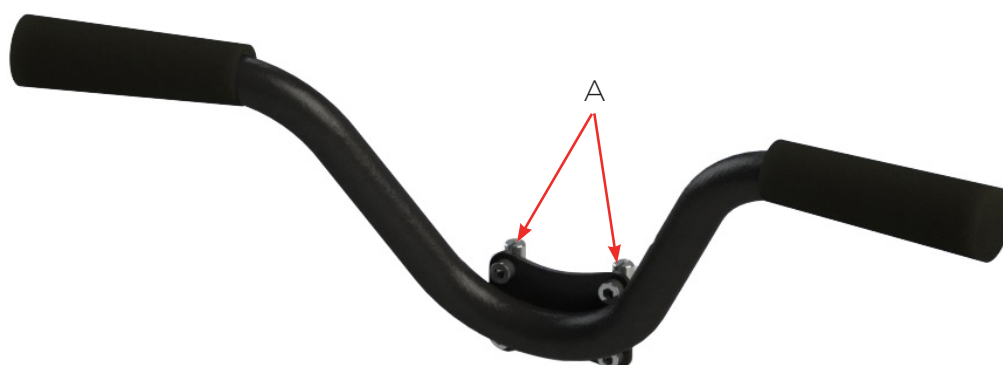


Indendørskørestolsstel Flipper G2



Fast montering


Fast montering indebærer at man fastgør siddesystemet direkte til chassiset/stellet. Montering med denne metode skal ske med medfølgende monteringssats.

I bunden på siddesystemet findes hul til fast montering på kørestolsstellet.

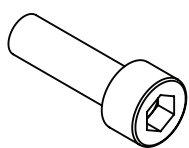


M6 Skrue (A)

4 stk.

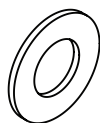

M6 Skiver (B)

4 stk.

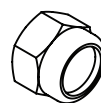

M6 Låsemøtrik (C)

4 stk.



Brug aldrig andre skruer end de medfølgende. Disse er sikkerhedsgodkendte. Såfremt andre dimensioner ønskes, kontakt Anatomic Sitt A/S.


Montering med adaptersystem

Anvend adaptersystem Universal Small (153042).

Begynd med at montere bundpladen (A) på en kørestolsramme ved at skrue den fast med de medfølgende skruer, skiver og møtrikker (B).

Monter derefter adapterpladen (C) med skruerne (E) i hullerne på siddesystemets underside. Distancestykkerne (D) skal monteres mellem siddesystemet og adapterpladen.

Når adapterpladen og bundpladen er monteret på sædesystemet og kørestolsrammen, kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt fastgjort, når der høres en kliklyd.

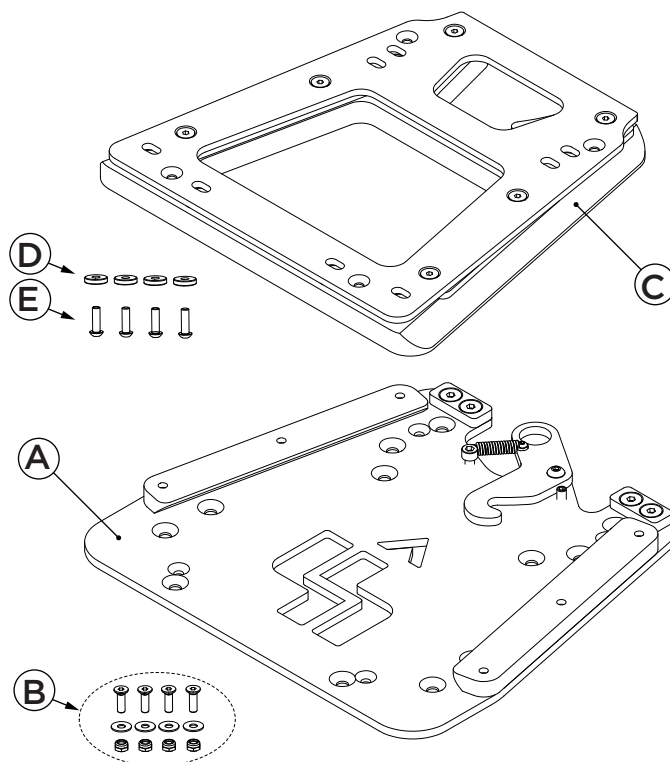

Kontroller at siddesystemet er korrekt monteret inden det tages i brug.



Når Adapter System Small anvendes, skal sikkerhedsstroppen på bagsiden af sædesystemet anvendes og strammes omkring skubbe-/trækstangen eller tilsvarende på basen. Sørg for, at remmen er stram og fastgjort, så den ikke kan glide af.



For håndtering af kørestolsstellet henvises til separat brugervejledning.

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til handling.

Vedligeholdelses- og vaskeanvisninger

Dette produkt er et medicinsk udstyr beregnet til flere anvendelser. For at hjælpemidlet kan fungere sikkert og nå sin forventede levetid, er det derfor vigtigt at overvåge, vedligeholde og rengøre det. Ved udskiftning af dele i forbindelse med vedligeholdelse og service bør der altid anvendes originale dele fra Anatomic Sitt.

Definitioner:

Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

- Afhjælpende vedligeholdelse refererer til foranstaltninger til at reparere et defekt produkt, en nødvedligeholdelse, der er vanskelig at planlægge i tide og ofte afhængig af produktets brug.
- Service henviser til en simpel eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter for eksempel kontrol af skruer og fastgørelseselementer, bevægelige dele, generel slitage osv., samt mindre reparationer.
- Forebyggende vedligeholdelse refererer til handlinger, der er foranlediget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne type vedligeholdelse kan ses som engangsforanstaltninger, der er planlagt med hensyn til tid, art og omfang. Dette produkt kræver ingen forebyggende vedligeholdelse i løbet af sin forventede levetid.

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt knapper.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller produktets bevægelige dele, eksempelvis rygvinkling med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontroller bælte og seler i forhold til slitage, funktion samt fastgørelse.

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Betræk og bæltter / seler kan vaskes i 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For yderligere information, se aktuelle brugermanualer for hvert enkelt positioneringshjælpemiddel.

Service og vedligeholdelse

For at fungere trygt og sikkert skal der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af dele skal originaldele fra Anatomic Sitt A/S altid bruges.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift. For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller sikkerhedsbåndet på ryggen, at det er ubeskadiget og låses korrekt.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling. Både i forhold til justeringsmuligheder, mobilitet og låsning.
- Kontroller, at gaspatronen låses i den valgte position.
- Kontroller om nødvendigt slid på alle dele. Sørg for, at de låses/spændes ordentligt.
- Kontroller bæltter og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges.

For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp / klud og antibakteriel, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bælder / seler. Polstring er en forbrugsartikel og bør udskiftes ved slid. Betræk og bælder / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For mere information, se aktuelle brugermanualer for hvert positioneringshjælpemiddel.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklave ved 60 ° C i maksimalt 10 minutter.

Fjern betræk og bælder / seler ved rengøring af sædesystemet i håndvasken.

Tørring

Siddesystemet kan tørres i kabinet i max 60°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved reovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE -mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller alle produktfunktioner. Eller slidte dele, der skal udskiftes.

Sæde/rygdel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- ☐ Kontroller at rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronen låser i enhver placering.
- ☐ Kontroller polstring og udskrift efter behov.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Hovedstøtte:

- ☐ Kontroller betrækket og udskift efter behov.
- ☐ Kontroller at hovedstøtteledene låser.
- ☐ Kontroller fæstet på hovedstøtten, at det fungerer.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlænets justeringer. At det kan justeres i højde, dybde og bredde.
- ☐ Kontroller armlænsbeslagene, at de låser, som de skal.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Sikkerhedsrem:

- ☐ Kontroller sikkerhedsremmen på ryggen, at det ikke har skader og at det låser.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Gaspatroner sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Revisionsliste

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

www.instagram.com/anatomicsitt

