



Anatomic formstøbt sæde Soft Alu



Brugervejledning

Brugermanual, monterings-/justeringsvejledning,
service og vedligeholdelse



Denne brugervejledning omhandler siddesystemet Anatomic formstøbt sæde Soft ALU med tilbehør.
For komplet oversigt over tilbehør, se produktets bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent og forhandler.....	3	Monterings- og justeringsvejledninger.....	12
Specialtilpasning.....	3	Montering af Anatomic formstøbt sæde Soft	12
Introduktion	4	Placering af formstøbt sæde.....	14
Indledning	4	Justerbare kropsstøtter	15
Korrespondance - mærkning	4	Airseat	16
CE-mærkning - klassificering	4	Armlæn	18
Overensstemmelseserklæring.....	4	Bord	18
Tilsigtede formål	4	Fodstøtte.....	19
Symbolfortegnelse	5	Lægstøtte	20
Produktmærkning.....	6	Nakkestøtte.....	21
Sikkerhedsinstruktioner	7	Hoftebælte	22
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Kropsseler	23
Advarsler og forholdsregler	7	Opsummering og opfølgning	24
Kontrol før brug	8	Transport i køretøj	24
Begrænsninger	8	Vedligeholdelse og plejevejledninger	25
Andre risici	9	Kontrol før brug	25
Kombinationer	9	Pleje- og vaskeanvisninger	26
Afvielser/hændelser	9	Service og vedligeholdelse.....	28
Tilpasning og specialtilpasning.....	10	Genbrug.....	29
Brug af det formstøbte sæde	11	Affaldshåndtering	29
		Garanti	29
		Revision.....	31

Producent og forhandler

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf	86 17 01 74
Fax	86 17 01 75
E-mail	a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web	anatomicsitt.dk

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i boksen ved eventuel specialtilpasning af produktet.

CE-mærkningen ophører med at gælde, hvis der er tale om et specielt tilpasset produkt.



Introduktion

Indledning

Tillykke med valget af hjælpemidler. Vi håber, du nyder at bruge vores produkt. For at du kan få fuldt udbytte af produktet, er det vigtigt, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Dette gælder for alle personer i brugerens nærhed. Gem brugervejledningen til fremtidig reference. Nye udgaver kan downloades fra vores hjemmeside: www.anatomicstt.com. Revision er på forsiden sammen med datoen.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal oplyses ved korrespondance med Anatomic SITT vedrørende produkterne. Etiketten med serienummer er placeret på indersiden af sædets skal på ryggen eller sædet.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dens tilbehør er et patienttilpasset produkt og som sådan et CE-mærket medicinsk teknisk produkt, klasse I i henhold til klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Erklæring om overensstemmelse

Produktet opfylder kravene til medicinske produkter i henhold til forordningen (EU) 2017/745 om medicinske produkter. Ved afprøvning og før første anvendelse skal der foretages en risikovurdering og dokumenteres i overensstemmelse med produktets afprøvningsprotokol for at muliggøre erklæring om overensstemmelse i henhold til MDR.

Tilsigtede formål

Anatomic formstøbt sæde Soft Alu er et patienttilpasset sæde til brug af en specifik, navngiven person med siddestillings problemer. Sædet kan udstyres med forskelligt tilbehør for at opnå en specifik siddestilling og er beregnet til at bruge sammen med et kørestolsstel.

Symbolliste

	Dette symbol henleder læserens opmærksomhed på vigtige sikkerhedsoplysninger mv.		Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
	Dette symbol indikerer eventuel afklemningsrisiko.		Angiver at produktet er et medicinteknisk produkt.
	Instruktioner og tips, der letter brugen af produktet.		Angiver producentens reference- eller varenummer, så det medicintekniske kan identificeres.
 www.anatomicstitt.com	Angiver, at brugsanvisningen altid skal læses før brug. Webadressen angiver, hvor dokumentet findes elektronisk.		Angiver fabrikantens serienummer så det specifik medicintekniske produkt kan identificeres.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses for at få vigtig sikkerhedsinformation, f.eks. advarsler, som ikke findes på den medicintekniske produkts etiket.		Unik produktidentifikator, der muliggør entydig identifikation af specifikke medicintekniske produkter.
	Angiver producenten af det medicintekniske produkt i overensstemmelse med definitionen i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med produktionsdatoen.		Angiver at produktet er CE-mærket i henhold til relevante EU-direktiver.
	Angiver datoen for hvornår, det medicintekniske produkt er fremstillet.		Angiver bogstav-/nummerkode for det individ, produktet er beregnet til.
	Disse symboler kan forekomme på sædets beslag til brystseler eller hoftebælte.		

Se også vaskesymboler under kapitel: Pleje- og vaskeanvisninger

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt CE-mærket

MD Individuell sits
Anatomic Soft Alu, skum std.

PATIENTANPASSAD PRODUKT

 Tillverkad till: **PoLi240228**
 Ansvarig enhet: **MAS**

Order: 207800
 2024-03-28

REF 778101

SN 64808

 **Anatomic Sitt i Norrköping AB**
 Terminalgatan 1 SE-603 61 Norrköping
  www.anatomicsitt.com




UDI (01)7322477781019(21)64808

Produkten överensstämmer med (EU) 2017/745 MDR



Produkttype
 Produktnavn

UDI bærer stregkode

Etiket på hovedprodukt uden CE-mærkning

MD SPECIALANPASSAD PRODUKT
Anatomic Soft Alu, skum std.

Specialtillverkad till: **PoLi240228**
 Ansvarig enhet: **MAS**

Order: 207800

REF 778101

SN 64808

 2024-03-28

 **Anatomic Sitt i Norrköping AB**
 Terminalgatan 1 SE-603 61 Norrköping
  www.anatomicsitt.com




UDI (01)7322477781019(21)64808

Produkten överensstämmer med (EU) 2017/745 MDR

Produkttype
 Produktnavn

UDI-bærer stregkode

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslutninger om tilpasning skal træffes af kompetent medicinsk personale og udføres af kvalificeret specialpersonale (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (eksempelvis teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).

Risikovurdering i forbindelse med levering

Produktspecialist fra Anatomic SITT skal sammen med hjælpemidlets rekvirent eller en person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren og hjælpemidlet altid foretage en risikovurdering efter produktets ordreformular før første brug. Risikovurderingen skal dokumenteres og arkiveres sammen med formularen for at muliggøre EU-sikkerhed i henhold til MDR.

Denne risikoanalyse sammen med ordreformularen er påkrævet for at opretholde CE-mærkningen. Uden en dokumenteret risikovurdering, der klart siger, at produktet er CE-mærket, ses det i stedet som specialtilpasset.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun foretages af kvalificeret fagpersonale. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne brugervejledning.



Kontroller produktets funktionalitet, inden det afleveres til en bruger.



Sørg altid for, at siddesystemet er sikkert fastgjort til kørestolsstellet før borgeren placeres i siddesystemet! En sikkerhedsrem leveres med sædet som er beregnet til at blive spændt fra bagsiden af sædet og rundt om kørestolsstellets kørebøjle. Denne rem skal altid bruges sammen med adaptersystemer og ved transport i køretøjer. Sørg for, at denne rem er stabil og stram.



Den som bevilger hjælpemidlet er ansvarlig for at instruere brugeren og/eller andre personer i dennes nærmiljø, hvor produktet bruges på en sikker måde. Kontroller altid produktets funktion inden brug.



Hjælpemidlets bevilger eller en person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren skal afbalancere det valgte sæde for at sikre, at enhver risiko for væltning er udelukket.



Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.



Justeringer må udelukkende udføres i henhold til beskrivelse i denne brugervejledning.



Efter al montering, justering eller servicearbejde skal alle fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.



Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnittet Begrænsninger for aktuel maxbelastning.



Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.



Brugeren skal altid have et hoftebælte på, når vedkommende sidder i sædet.



Bemærk, at hvis noget er fastgjort til eller hængt på sædet, øges risikoen for at vælte.



Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Max belastningsvægt

Den maksimale belastningsvægt er 130 kg og gælder for alle størrelser.

Belastningsvægt refererer til den maksimale vægt, som sædesystemet må udsættes for. f.eks. brugere og evt. anden vægt.

Livslængde

Produktets forventede levetid er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktionerne i denne brugervejledning følges. Den faktiske levetid varierer dog alt efter, hvor hyppigt og intensivt produktet bruges, men det anbefales ikke at overstige 10 år.

Øvrige risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er indstillet korrekt, så brugeren ikke får gener eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, skal du foretage justeringer eller montere passende tilbehør.

Kombinationer

For at produktet med sikkerhed kan bevare sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic SITT. Se produktets bestillingsgrundlag for eventuelt tilbehør og splittegnings billede af reservedele.

Sædet kan beholde CE-mærket selv med tilbehør/kørestolsstel fra en anden leverandør under forudsætning af, at der er brugt originale fastgørelsespunkter/påtænkte fastgørelsessystemer, og det fremgår af tredjepartsdokumentation, at kombinationen er godkendt. Gældende monteringsvejledning skal følges. Derudover skal nuværende kombination indgå i den risikoanalyse, der etableres ved levering iht ordreformularen.

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering når produkter fra forskellige leverandører kombineres. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren eller personer i dets nærhed.

Afviigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed. Produktet skal også sendes til Anatomic SITT i dets nuværende stand til yderligere undersøgelse.

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på en eller anden måde, skal der foretages en vurdering af, om der er tale om en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning og formål. Alt andet er specialtilpasning. Tilpasninger må kun foretages af de, der skønnes kvalificerede til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning på produktet er kun dem, der sker i forbindelse med levering af sædet sammen med en produktspecialist fra Anatomic SITT. Eksempelvis fastgørelse af tilbehør fra ordreformular og med efterfølgende risikoanalyse indeholdt i ordreformularen.

Risikoanalyse

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren eller personer i dets nærhed at bruge efter tilpasning.



Mærkning

Produktet skal forsynes med information om, at det er specielt tilpasset en bestemt bruger i de tilfælde, hvor tilpasningen ligger uden for CE-mærkningens rammer.

Anvendelse af støbet

Anvendelse af støbet

1. Kontroller at det formstøbte sæde sidder stabilt fast på kørestolsstellet og at det er muligt at tilte.
2. Sørg for at håndbremsen er låst og at kørestolen står på et stabilt underlag.
3. Begynd med at tilte/tippe det formstøbte sæde bagud, gerne så langt som muligt, inden brugeren placeres i det formstøbte sæde.
4. Placer brugeren i et Anatomic formstøbt sæde. Sørg for at brugeren kommer ordentligt ind i Anatomic formstøbt sæde. Kontrollér med hånden ved bagdelen. Bækkenet skal være i en så rank position som muligt. Efterjuster ved behov.
5. Spænd hofteselen over hoften og stram stropperne for at fiksere bækkenet (se detaljerede instruktioner under kapitlet Hoftebælter).
6. Fastspænd brystselen (se kapitlet om brystseler) og evt. andre bælter i overensstemmelse med deres brugervejledninger.
7. Tilte stolen tilbage til normalt leje. Anvend tiltefunktionen i løbet af dagen, for at skabe variation i tyngdepunktsfordelingen på kroppen.
8. Kontroller at brugeren sidder korrekt og stabilt.

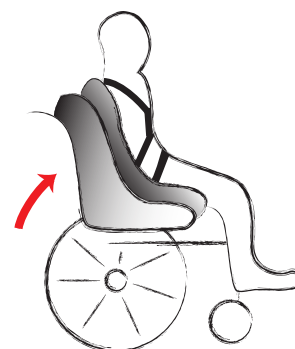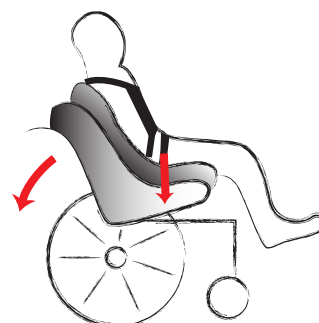

Mange brugere orker kun at sidde i aktiv siddestilling i kortere perioder. Ved at ændre fra aktiv siddestilling til hvileleje flere gange om dagen, får brugeren en mere behagelig siddestilling og trykket fordeles. Dette er med til at forhindre forekomsten af røde.

Monterings- og justeringsvejledninger


Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

Montering af Anatomic formstøbt sæde Soft ALU

Det formstøbte sæde kan være fast monteret på kørestolsstellet (billede 1) eller aftagelig med en hurtigkobling (billede 2).

Fast montering (billede 1)

Sædet skrues i kørestolsstellet (B) med medfølgende skruer og møtrikker gennem sædet og gennem slidserne (C) i kørestolsstellets sædeplade (se billede 1).

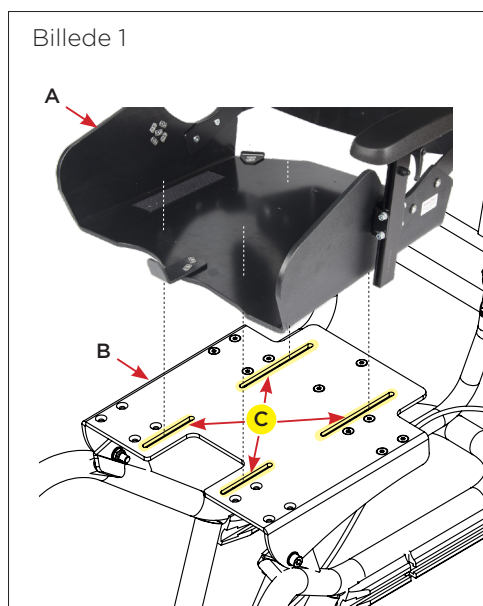

Afmontering med adaptersystem (billede 2)

Adaptersystem muliggør nem flytning af sædesystemet mellem forskellige chassiser. Et adaptersystem består af en øvre adapterplade (B) på sædesystemet og en nederste bundplade (C) på kørestolsstellet.


1. På sædet (A) er adapterpladen (B) monteret direkte i bunden nedefra med en møtrik og M6 skrue. Dette er normalt blevet gjort af Anatomic SITT.
2. Monter bundpladen (C) på kørestolsstellet (D) ved at skruue den ind i slidserne (E) med de medfølgende skruer, spændeskiver og møtrikker.
3. Når adapterplade og bundplade er monteret på siddesystemet og kørestolsstellet, kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt fastgjort, når der høres en kliklyd fra låsen (F).



Sørg for, at sædesystemet er forsvarligt fastgjort til kørestolsstellet før brug.



Når sædet er aftageligt med en fastgørelsesplade eller adaptersystem, kan sikkerhedsremmen bruges ved at fastgøre det rundt om chassissets kørebøjle (eller tilsvarende), når sædet er monteret.

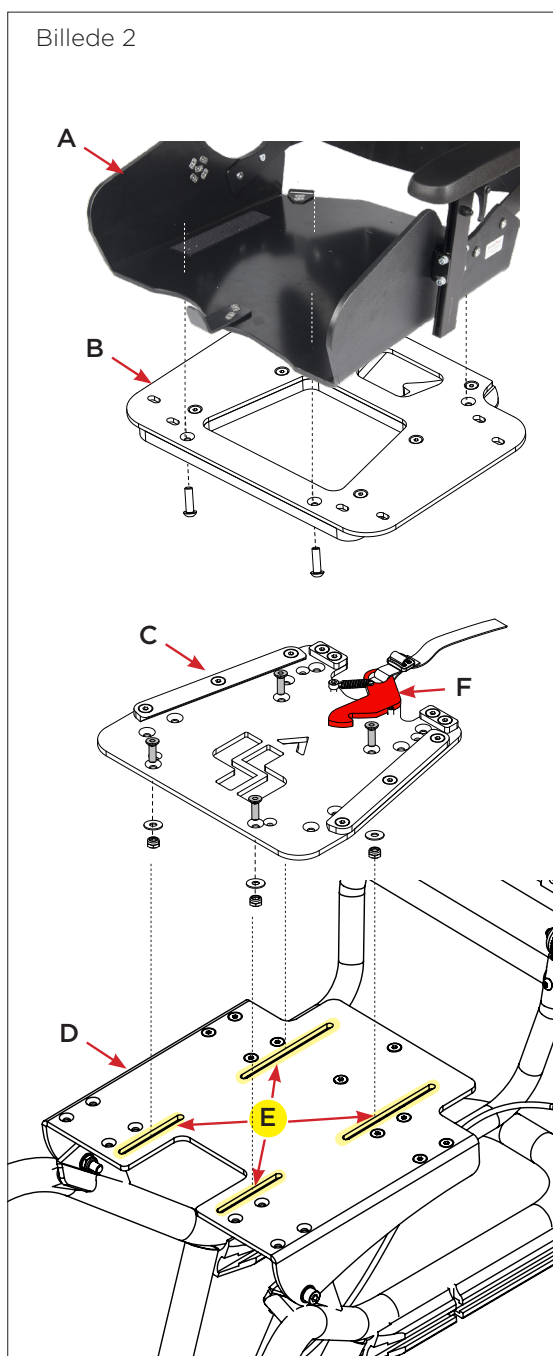

Montering af sæde med fastgørelsesstropper

Anatomic formstøbt sæde kan i nogle tilfælde udstyres med to fastgørelsesstropper. Stroppen ved ryglænet skal fastgøres omkring f.eks. kørestolens kørehåndtag. Stroppen ved sædet skal fastgøres under f.eks. kørestolens sædeplade.



Kontroller altid at stropperne er monteret sikkert.


Placering af det formstøbte sæde

Dybdejustering

For at undgå risiko for væltning skal sædet justeres i dybden på kørestolsstellet.


Løsn skruerne i skruehullerne (E), der holder sædet på kørestolsstellet og skub sædet, så du får en god balance på kørestolsstellet.

Spænd herefter skruerne ordentligt.

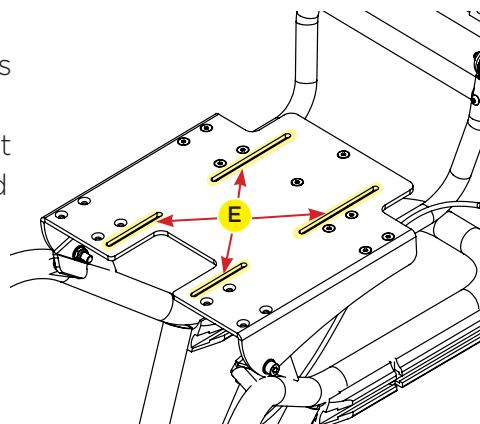

Justerbare kropsstøtter

For at justere kropsstøttebredden skal man fjerne skummet med betrækket fra skallen. Løsn skruerne (C) lidt og juster kropsstøtten. Spænd derefter skruerne igen og genplacerer skumryggen i skallen.

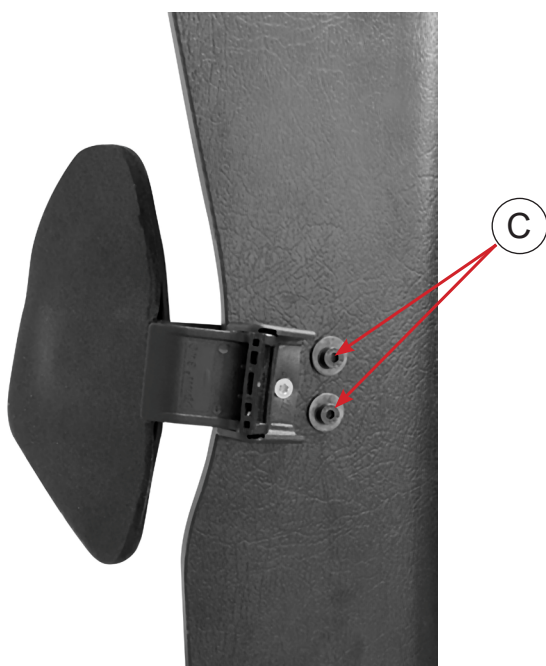

Airseat (ventilator i Anatomic formstøbt sæde)

Ventilatoren suger varme og fugt ud af Anatomic formstøbt sæde. Man må på ingen måde udsætte ventilator eller batteri for vand (f.eks. ved rengøring). Såfremt det er nødvendigt at rengøre Anatomic formstøbt sæde kan dette gøres forsigtigt med fugtig klud så man ikke udsætter den monterede ventilator for fugt. Sæt ikke gang i ventilatoren, når temperaturen er lav, for så kan brugeren blive kold.



Montering

Kontrolenheden kan monteres på sædets yderside eller på kørestolsstellet. Der er et quickbeslag, hvor pladen skrues fast på sædet eller monteres med monteringsklemmer på stellet (se komponenter på næste side). Tilslut kablerne til styreenhedens stik i henhold til tabellen på næste side. En rød brugerknop (tilbehør) kan placeres et passende sted med et stykke velcro.

Manøvrering

Start/stop ventilatoren med den grønne kontakt (A) eller med den røde brugerknop (9) (tilbehør).

Kontrolenhed med batteri 12V

Kontrolenhed 12V har et opladningsbart batteri og kan oplades med den medfølgende lader. Inden batteriet tages i brug skal det lades i 10-15 timer. Kontrolenheden med batteri kan enkelt afkobles laderen. Opladning af batteri sker ved følgende:

- Tilslut opladeren til stikkontakten og kontrolenheden.
- Det røde lys lyser på opladeren, når opladningen er startet.
- Lyset slukker, når opladningen er færdig.
- Afkoble opladeren

Opladning skal ske indendørs hver nat efter brug.

Opladeren kan efterlades tilsluttet, da den har indbygget beskyttelse mod overopladning og skifter til vedligeholdelsesopladning, når batteriet er fuldt opladet. Batteriet kan ikke oplades i bilen, men kun med den medfølgende oplader. Batteriet må ikke smides i skraldespanden, når det er brugt op, men skal afleveres til genbrug

Kontrolenhed til 24V strømkilde

Kontrolenhed 24V har intet indbygget batteri men skal tilsluttes en ekstern strømkilde, f.eks. elektrisk kørestol.

Sikring

Der sidder en glassikring på undersiden af kontrolenheden.

Airseat komponenter




Komponenter	Varenr.	Udtag
1. Kontrolenhed 24V	774097	
2. Kontrolenhed 12V	774096	
3. Plade til quickbeslag	213035	
4. Monteringsklemmer	211800	
5. Ladere 12V	213029	(E)
6. Kabel 24V	213049	(F)
7. Ventilator 12V	213021	
Ventilator 24V	213033	
8. Ventilatorkabel	213038	(D)
9. Brugerknap	774099	(B)
10. Adapter til lader (UK)	213031	

Kontakter

- A. Kontakt
- B. Udtag brugerknap
- C. Sikring
- D. Udtag ventilator
- E. Udtag lader
- F. Udtag til 24V ekstern kilde


Kontrolenhed 12 V

forside bagside

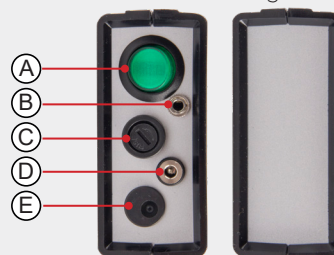

Kontrolenhed 24 V

forside bagside

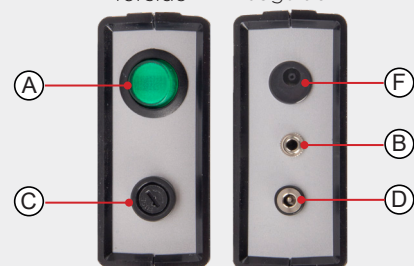

Armlæn

Løsn skruerne (A) og skub armlænet op/ned til den ønskede højde. Det er også muligt at vinkle armlænet lidt ind/ud mod kroppen. Spænd skruerne (A).

Løsn knappen (B) for at vinkle armlænspladen fremad/bagud.


For at flytte armlænspladen kan de to skruer (C) flyttes til andre huller under pladen.



Bord

Montering af bordet

Placer bordet på armlænspladerne og drej derefter bordets låsearm (H) under armlænspladen (G), indtil de er fastspændt. Har du valgt et bord med forstærkning og som kan svinges væk, er der et rør som bordet skal fastgøres til under armlænspladen.

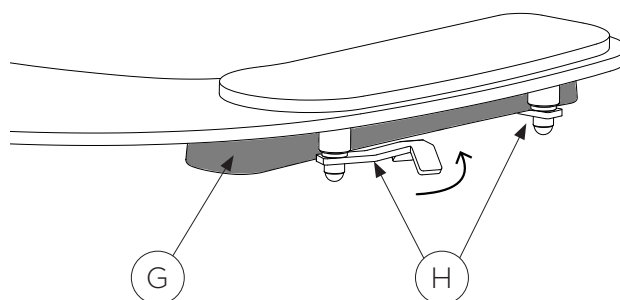

Indstilling

Kontroller, at der er tilstrækkelig støtteflade under bordet mod armlænene. Hvis støttefladen er for lille og bordet føles vaklende, skal de to skruer (B) og (C) under armlænene løsnes og skubbes frem til de tilsigtede huller, se hulbillede under armlænspladerne. Vinkel bordet, så det får en god praktisk hældning ved hjælp af knopperne (E) i siderne og sørg for, at højden er korrekt med knopperne (D). Vær opmærksom på, at bordet ikke er for tæt på maven, så der opstår ubehag.


Fodstøtte

Fodstøtten foreslås monteret i kørestolstellets base. Se kørestolsstellets brugsanvisning.

Indstilling

Løsn vingeskruen (A) ved sædet og juster vinklen på fodstøttestængerne, så de ikke bliver for stejle, så fodstøttestængerne fanger kørestolsstellets ramme eller jorden ved vipning.

Juster fodpladens højde med vingeskruen (C) og afslut med den ønskede vinkel i ankelledet (4 mm unbrakonøgle). Kontroller, at hjulene bevæger sig frit.

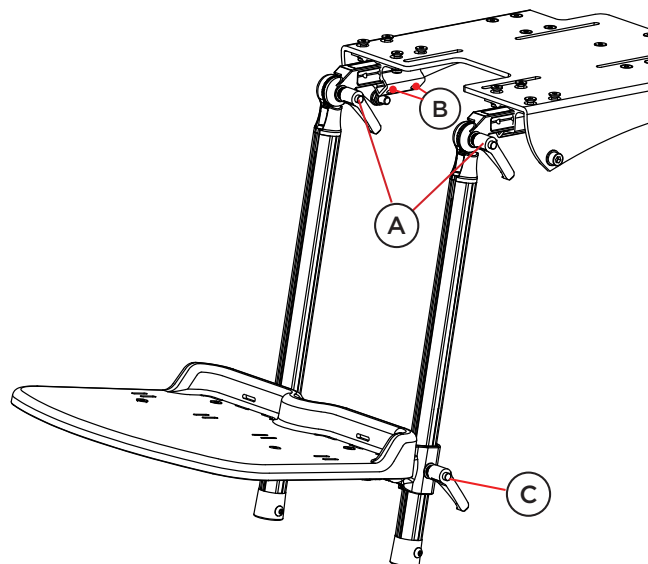


Afmontering

Når man vil afmontere hele fodstøtten, gøres det ved at løsne skruerne (B) under kørestolsstellet lidt. Træk derefter fodstøtten fremad.


Højdejustering af fodpladen

For at justere fodstøttens højde skal du løsne vingeskruen (C) lidt for at justere til den ønskede højde. Spænd derefter vingeskruen.

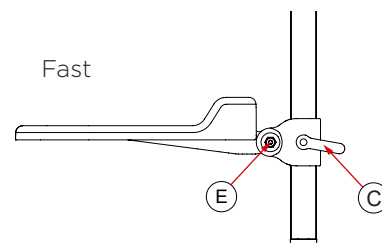


Vinkeljustering af fodpladen:

Fast fodstøttebeslag: For at justere vinklen ved anklen skal du løsne skruen (E) og justere til den ønskede vinkel. Spænd derefter skruen.

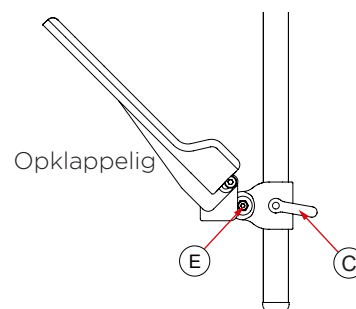

Opklappeligt fodstøttebeslag: For at justere vinklen ved anklen skal du løsne skruen (E) og justere til den ønskede vinkel. Spænd derefter skruen. For at bruge den opklappelige funktion løftes fodstøttepladen i forkanten.

Kugleledsadapter: For at bruge kugleledsfunktionen skal du først løsne skruerne (F) og (G) og justere til ønsket position. Spænd derefter skruerne (F) og sikkerhedslåsens position med skruen (G).

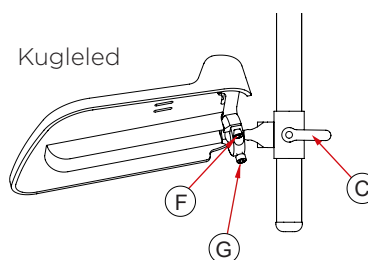

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Inden montering af lægstøtten kan udføres, skal du først fjerne evt fodstøtte. Start med at fjerne endedækslet (G), og løs derefter håndtaget (F), der holder fodstøtten på plads på fodstøttebeslaget. Træk derefter fodstøttepladen og dens beslag ned.


Monter lægstøtten ved at skubbe profilmøtrikkerne (C) i fodstøttebeslaget, juster til den ønskede højde og spænd skruerne (E). Sæt derefter fodstøtten og endekappen (G) på igen.

Højde- og dybdejustering af lægstøtte

For at justere højden og dybden af lægstøtten, løsnes skruerne (E) lidt og derefter justeres til den ønskede højde/dybde. Spænd derefter skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at justere bredden af lægstøtten skal du løsne skruerne (A) lidt og derefter justere til den ønskede bredde. Spænd derefter skruerne (A).

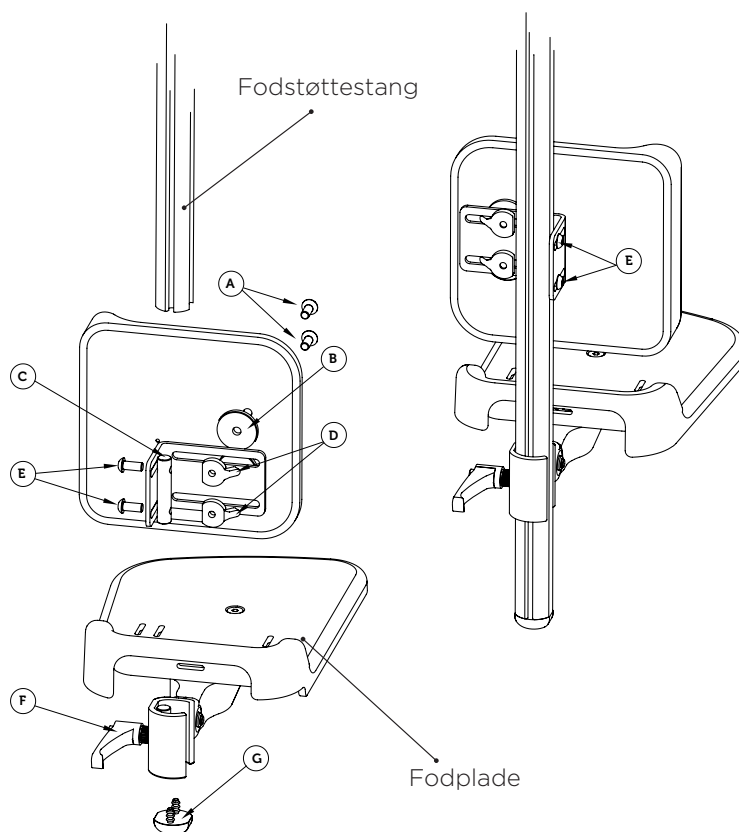

Nakkestøtte

Justering

Alle justeringer af hovedstøtten skal foretages efter aftale med den bevilligende terapeut. Vær opmærksom på, om der er tommer eller millimeter på skrueerne til hovedstøtten, så du bruger det rigtige værktøj.

For Pro-Serie hovedstøtter, se separat brugervejledning.

Fjernelse af hovedstøtte

Mange har brug for at fjerne hovedstøtten for at gøre det nemmere for brugeren at komme ind/ud. Især med Anatomic formstøbte sæder.

Alle hovedstøtter har én "hukommelse". Enten en ring med en stift (LINX) eller et firkantet stop (andre). Stopringen skal altid være låst, så du kan fjerne hovedstøtten, men altid vende tilbage til den tiltænkte position igen.



Linx
stopring



Firkantet stop
(tilbehør)



Plush justerbar nakkestøtte med Linx adapterstang og fæste.



Motion nakkestøtte med standard adapterstang og fæste.

Hoftebælte

Sædet er udstyret med de påkrævede spænder til hofteselen efter gældende foreskrifter. Spænderne (A) er monteret på ydersiden af sædet. Remmene til hofteselen skal nogle gange føres gennem tilsigtede åbninger i sædeskummet og sædeskallen, før de spændes fast i spænderne.

Montering af 2-punkts hoftebælte

Fastgør bæltets rem til spænderne (A) på hver side (billede 1).

Montering af 4-punkts hoftebælte

4-punktsbæltet har to bånd på hver side af sædet. De bagerste bånd fastgøres med Triglide-spænde gennem beslaget (B) (billede 2). De forreste bånd fastgøres i spænde (A). Klip eventuelt unødvendigt lange bånd. Brænd i så fald kanten af båndet, så det ikke flosser.

Indstilling af hoftebælte

Placer hofteselen over hoften (se billede 3 nederst) og fastgør bækkenet med hofteselen. Bæltepudden på den side, som brugeren vender/spænder udad, spændes først.

Juster selens position gennem de bagerste stropper/fastgørelsespunkter (B). Juster bæltet, så spændet (C) ender centreret på brugeren. Hvis spændet ikke er centreret, er der risiko for, at stropperne løber i spændet (spændet låser ikke). Spænd hofteselen stramt. Hofteselen skal sidde så godt, at brugerens bækken er stabilt. En tommelfingerregel er, at du kan få en finger mellem låret og bæltet. Kontroller, at spændet (C) er forsvarligt fastgjort, og at justeringsremmene (D) er tilstrækkeligt stramme. (Se også separat brugsanvisning for det pågældende bælte)

Se også separat brugsanvisning for andre positioneringshjælpemidler.


Kontroller fra tid til anden, at brugeren sidder korrekt og stabilt.



bælte

For at bæltet enkelt skal kunne placeres rigtigt, er spænderne på sædet mærket med disse symboler.

Billede 1

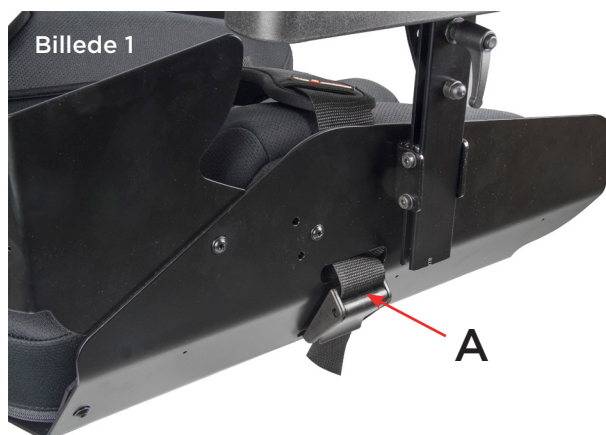


B



Billede 2



Billede 3

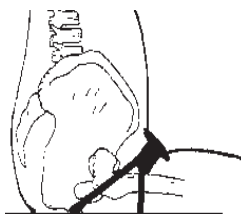

Rigtig trækretning



Forkert trækretning

Brystseler

I basisversionen er sædet udstyret med de nødvendige spænder til seler til overkroppen efter aftale med rekvirenten. Spænderne er monteret på ydersiden af sæderyggen. Stropperne til brystselen skal nogle gange føres gennem tilsigtede slidser i bagskummet og bagpladen, før de spændes fast i spænderne.

Montering af sele

Fastgør selens øverste rem i de øverste monteringsbeslag (spænde A). Fastgør selens nederste rem til de nederste spænder (B). Klip eventuelt unødvendigt lange bånd. Brænd i så fald kanten af båndet, så det ikke flosser.

Monter selens stropper i de øverste spænder i den passende position. De øverste monteringsbeslag kan vinkles sideværts og flyttes til andre huller for den bedste trækretning.

Retningen af de øverste fastgørelsespunkter skal være over skulderområdet for at forhindre, at skulderen bliver skubbet ned.

Tilpasning af sele

Fastgør først hofteselen iht. forrige kapitel til position og evt korrigerer brugerens bækken optimalt.


Fastgør derefter selens stropper i de dertil beregnede spænder (A) øverst og (B) forneden.

Selen har også skjulte spænder syet ind i foret, hvilket gør det nemt at finde den rigtige spænding, når den tages på og af.

Montering af brysbælte

Træk brystselens rem gennem rillerne i bagskummet og bagpladen og fastgør i spændet (C) (billede 2). Klip eventuelt unødvendigt lange bånd. Brænd i så fald kanten af båndet, så det ikke flosser.

Billede 1

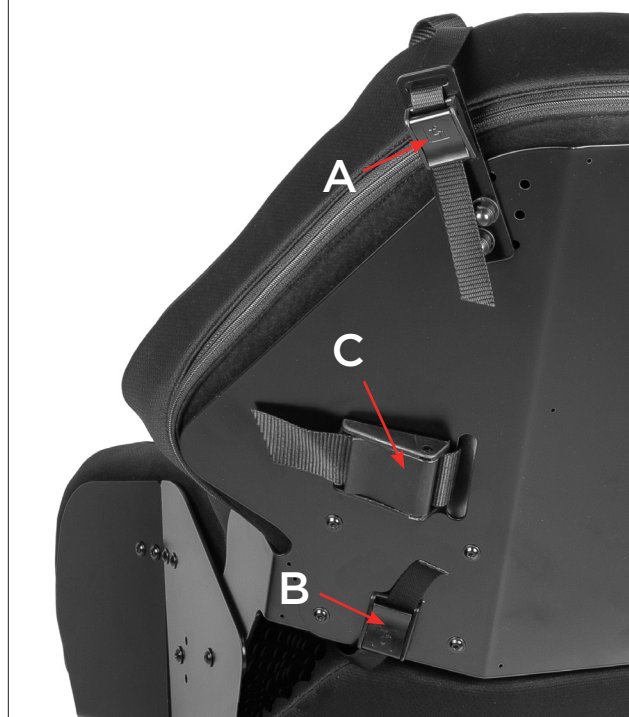

Billede 2



Opsummering og opfølgning

Efter endt montering og/eller justering skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt iht. brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Kontroller indstillingerne på produktet og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter al montering, justering eller servicearbejde skal alle drejeknapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for væltning er udelukket.

Hvis der bemærkes defekter, må du ikke bruge produktet. Kontakt din forhandler af hjælpemidlet for handling.

Transport i køretøj

Ved transport i bil med Anatomic formstøbt sæde Soft Alu monteret på kørestolstellet, skal instruktioner fra kørestolsproducenten følges.

Sikkerhedsbånd/rem til kørestol

En rem leveres til sædet med den hensigt at blive strakt fra sædets rygprofil og rundt om kørestolstellet.

Sørg for, at denne rem er stabil og stram, før du rejser.

Crashtestet og godkendt

Anatomic formstøbt sæde Soft Alu er crashtestet og godkendt efter ISO 16840-4. Denne standard medgiver at siddesystemet må monteres på samtlige kørestolsstel, som er godkendt efter ISO 7176-19, med fortsat godkendelse af kombinationen.



Sikkerhedsbånd



Crashtestgodkendelsen gælder op til en brugervægt til 136 kg.

Vedligeholdelses- og plejeanvisninger

Dette produkt er et medicinskteknisk udstyr beregnet til flergangsbrug. For at hjælpemidlet kan fungere trygt og sikkert og nå den estimerede levetid, er det derfor vigtigt at føre tilsyn, vedligeholde og rengøre det. Ved udskiftning af dele i forbindelse med vedligeholdelse og service skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic SITT.

Definitioner:

Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

- **Afhjælpende vedligeholdelse** refererer til foranstaltninger til reparation af et ødelagt produkt, akut vedligeholdelse, vanskelig at planlægge i tide og ofte afhængig af produktets brug.
- **Service** henviser til et enklere eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter fx kontrol af skruer og befæstelser, bevægelige dele, almen slitage mv. samt mindre reparationer.
- **Forebyggende vedligeholdelse** refererer til handlinger forårsaget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne form for vedligeholdelse kan ses som handlinger af engangskarakter, der er planlagt i forhold til tid, art og omfang. For dette produkt kræves ingen forebyggende vedligeholdelse i produktets forventede levetid.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til nedenstående punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Tjek især skruer og møtrikker og fingerskruer.
- Kontroller, at sædet er korrekt fastgjort til kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet (både sædet og sædet sammen med kørestolsstellet).
- Tjek bæltet og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der bemærkes defekter, må du ikke bruge produktet. Kontakt din distributør for at få hjælp til handling.

Vedligeholdelse og vaskeanvisninger

Rengøringsbehovet varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængig af produktets anvendelse, men mindst en gang om ugen anbefales. Følg altid produktets vaskerådsetiket.

ALUMINIUMSKALLEN

Vaskes med svamp eller blød børste. Du kan bruge mildt vaskemiddel eller desinfektionsmiddel, hvis nødvendigt.

BETRÆK

Anatomic formstøbt sæde Soft Alu har aftagelige betræk for at lette rengøringen.

Generel vedligeholdelse af betræk

- ✓ Fjern spild med en absorberende klud.
- ✓ Brug en fugtig klud med lunkent vand til let snavs.
- ✗ Undgå stærke rengøringsmidler.

Vask

- ✓ Fjern altid sæde- og rygskummet inden vask.
 - Fjern først sædeskummet og derefter rygskummet, så rygskummet ikke beskadiges af kropsstøttebeslagene.
 - Sædebetrækket fjernes fra ryglænet og trækkes fremad.
 - Rygbetrækket fjernes fra toppen og trækkes nedad.
 - Efter tørring genmonteres delene i omvendt rækkefølge.
- ✓ Vend vrangen ud ad ved vask og tørring.
- ✓ Betræk kan maskinvaskes op til 60 °C (se vaskerådsetiket).
- ✓ Betræk skal lufttørres, eller tørres i tørreskab på lav temperatur.
- ✗ Må ikke tørretumbles, må ikke placeres direkte mod en varmekilde eller udsættes for høj varme – betrækket kan miste sin form og sine egenskaber.



Dartex®-betræk

Polyuretanbelagt materiale, særligt velegnet til hygiejnisk brug.

- ✓ Må maskinvaskes i op til 60 °C (se vaskerådsetiket).
- ✓ Skal lufttørres eller tørres i tørreskab på lav temperatur.
- ✗ Må ikke tørretumbles, må ikke placeres direkte mod en varmekilde eller udsættes for høj varme – betrækket kan miste sin form og sine egenskaber.
- ✗ Undgå alkoholholdige desinfektionsmidler – de kan forårsage hævelse.

Coolmax®-betræk

Allergitestet, antibakteriel og fugttransporterende materiale.

- ✓ Må maskinvaskes i op til 60 °C (se vaskerådsetiket).
- ✓ Skal lufttørres eller tørres i tørreskab på lav temperatur.
- ✗ Må ikke tørretumbles, må ikke placeres direkte mod en varmekilde eller udsættes for høj varme – betrækket kan miste sin form og sine egenskaber.
- ✗ Undgå skyllemiddel – det kan forringe stoffets ventilationsevne.

Tvåttsymboler



Håndvask



Maskinvask
60°C



Må ikke
tørretumbles



Ingen klor-
blegning



Må ikke
stryges



Må ikke ke-
misk renses

SKUMPUDE

Tør af med en fugtig klud. For grundig rengøring kan hynden skylles, for eksempel i et badekar. Klem grundigt vandet ud og lad puden lufttørre, eller tør i et tørreskab ved lav varme, indtil det er helt tørt.

SKUMPUDE MED COATING

Tør af med en svamp eller blød børste. Om nødvendigt kan der anvendes et mildt rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel. Lad lufttørre, eller tør i et tørreskab ved lav varme, indtil det er helt tørt.

SUPPORT-SERIEN

For positioneringsseler og hoftebælter fra Anatomic Sitt skal du følge vaskeanvisningerne på det respektive produkt. Se også den respektive brugermanual for detaljerede oplysninger.

Service og afhjælpende vedligeholdelse

Service udføres primært for at forlænge produktets levetid og for at kontrollere, om der er behov for afhjælpende vedligeholdelse. Behovet for eftersyn/service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængig af produktets brug og slid, men det anbefales mindst en gang hver 6. måned.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsforskrifter i brugervejledningen. Ved udskiftning af ødelagte, slidte eller revnede dele, brug kun originale dele fra Anatomic SITT, så produktet bevarer sit CE-mærke. Reservedele kan bestilles efter særskilt reservedelsliste/split tegning for det pågældende produkt.

Ved enhver service lejlighed skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er fejl, der påvirker sikkerheden og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af brug.

For rengøring af produktet, se afsnittet Pleje.

Ved servicering skal følgende kontrolleres og om nødvendigt rettes:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er korrekt spændt.
- Kontroller, at alle knapper er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er korrekt fastgjort til chassiset.
- Tjek produktets bevægelige funktioner. Både hvad angår justeringsmuligheder, mobilitet og aflåsning.
- Tjek evt slid på alle led, stiftsamlinger og befæstelser. Sørg for, at de låser ordentligt.
- Tjek bæltter og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Tjek markeringer, etiketter og advarselssymboler for at sikre, at de er fuldstændige og læselige.

Efterkontrol

Når servicen udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Etiketter/mærkater

Hvis du har brug for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet, se www.anatomicsitt.com, hvor du også finder brugsanvisninger.

Genbrug

Renovering foretages fortrinsvis, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i længere tid. Da dette produkt er et individuelt sæde beregnet til en navngiven bruger og derfor ikke bør bruges til andre, se i stedet afsnittene om Pleje og service/afhjælpende vedligeholdelse.

Affaldssortering

En brugt del eller et brugt produkt skilles ad og skrottes. Delene skal adskilles efter materialetype og efterlades på en lokal genbrugsstation.

Garanti

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændringer foretaget:

CE-tilpasning af hele brugervejledningen

Airseat

Nyt afsnit

side 16-17

Hoftebælte

Ny illustration og symbolmærkning

side 22

Vedligeholdelse og vaskeanvisninger

Ny text

side 26-27

Revisionsförteckning

ver. 1.0	2024-03-28
ver. 1.1	2024-05-03
ver. 1.2	2025-02-04

SE

Anatomic Sitt AB (Producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

Følg os på

