


Buster

Splittegning / Reservedelsliste

Oversigt El	2
Oversigt Manuel.....	3
Kørebøjle, Kørehåndtag	4
Adaptersystem Universal	5
Fodstøtte hel	6
Fodstøtte delt	7
Fodstøttestang.....	8
Fodkasse	9
Lægstøtte	10
Armlæn	11
Bord standard.....	12
Støttebord	13
Svinghjul, Anti-tip støtte.....	14




Buster EI - Oversigt

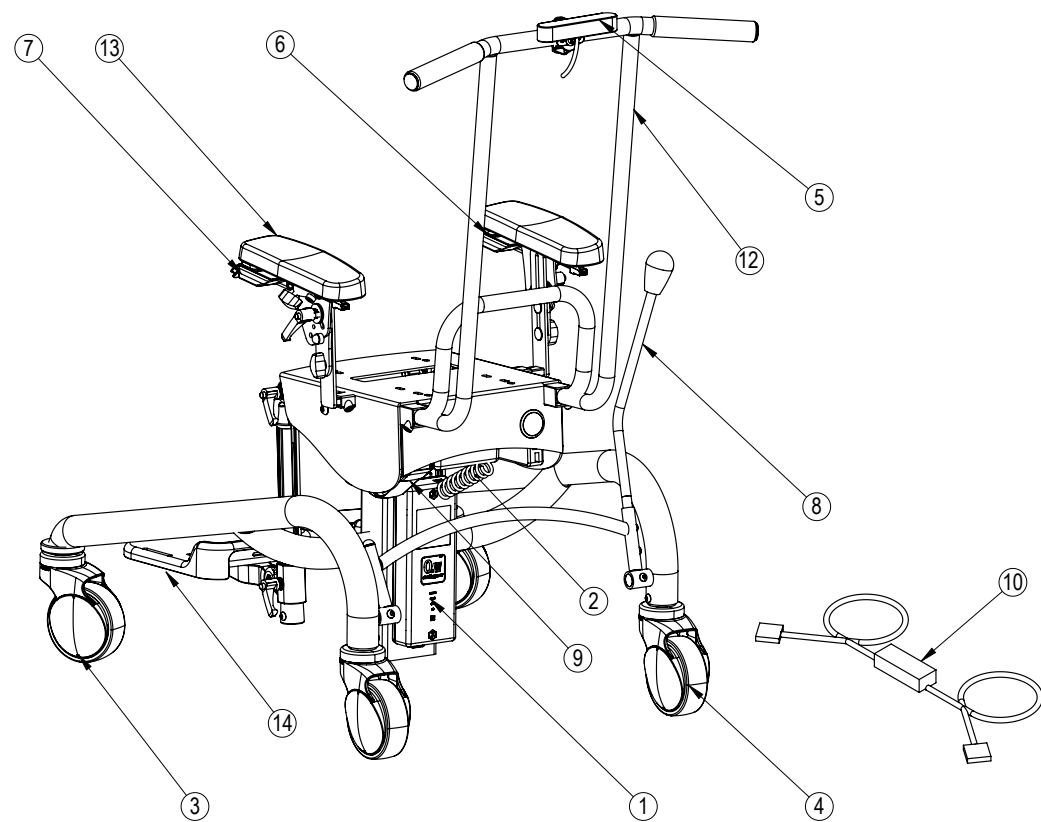

Pos	Varenr.	Varenavn
1	387303	Batteri BA001 Buster
2	387341	Batterikabel
3	387310	Hjul ø100
4	387315	Hjul med centrallås og retningsholder
5	387327	Hjælperstyring EL
6	387344	Håndbetjening EI Høj og sænket
7	387321	Håndbetjening EI Tilt
8	385041	Centralbremse kpl
9	387302	Tiltdon LA23
10	385019	Ladekabel kpl Buster
11	385040	Anti-tip støtte
12	844416	Kørehåndtag H50cm (stk.) - Flipper G2 / Buster
13	385031	Armlæn Buster
14		Fodstøtte

Buster Manuel - Oversigt

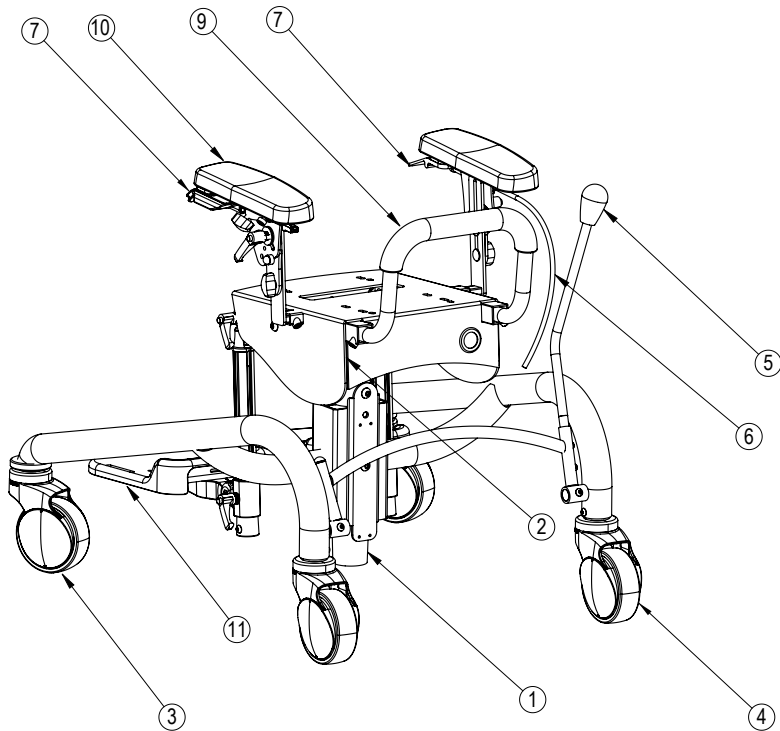


Pos	Varenr.	Varenavn
1	915243	Løfteaktuator 300N
	915242	Løfteaktuator 400N Standard
	915241	Løfteaktuator 500N
2	915240	Tiltpatron 350N
3	387310	Hjul ø100
4	387315	Hjul med centrallås og retningsholder
5	385041	Centralbremse kpl
6	387322	Aktiveringskabel 750 mm
	387324	Aktiveringskabel 1000 mm
7	387320	Aktiveringspaddel gas
8	385040	Anti-tip støtte
9	385035	Kørebojle kort - Buster
10		Armlæn
11		Fodstøtte

Buster - Kørebøjle / Kørehåndtag


Hovedprodukter:
385035
844416

Pos	Varenr.	Varenavn
1	385035	Kørebøjle kort - Buster
3	844416	Kørehåndtag H50cm (stk.) - Flipper G2 / Buster

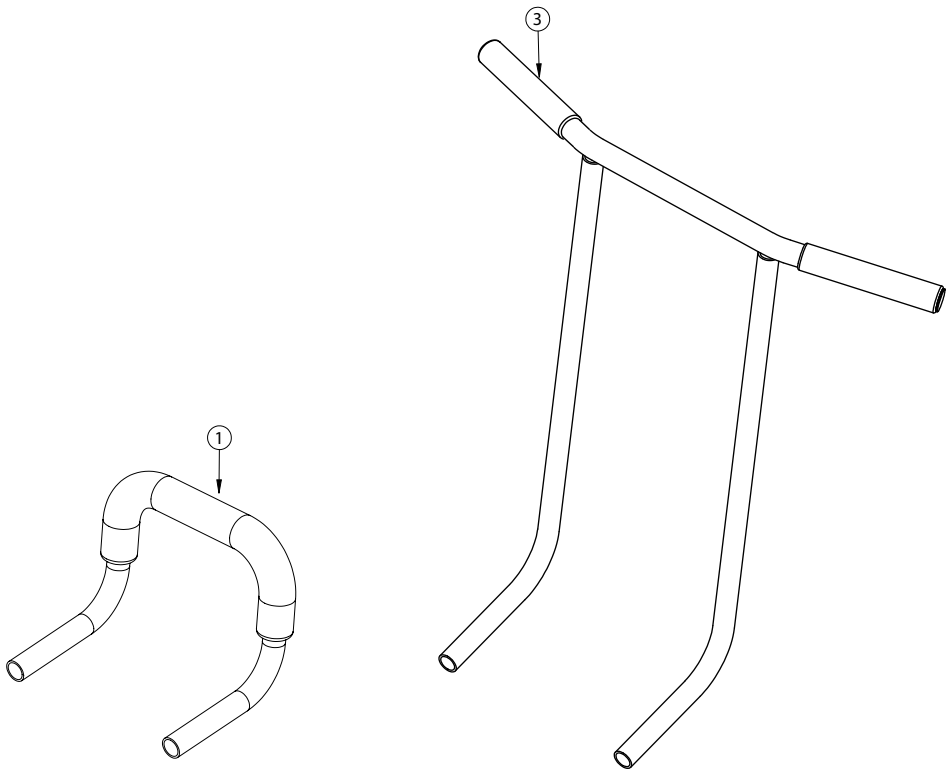

Buster / Active - Adaptersystem Small Pro


Hovedprodukt: 153042

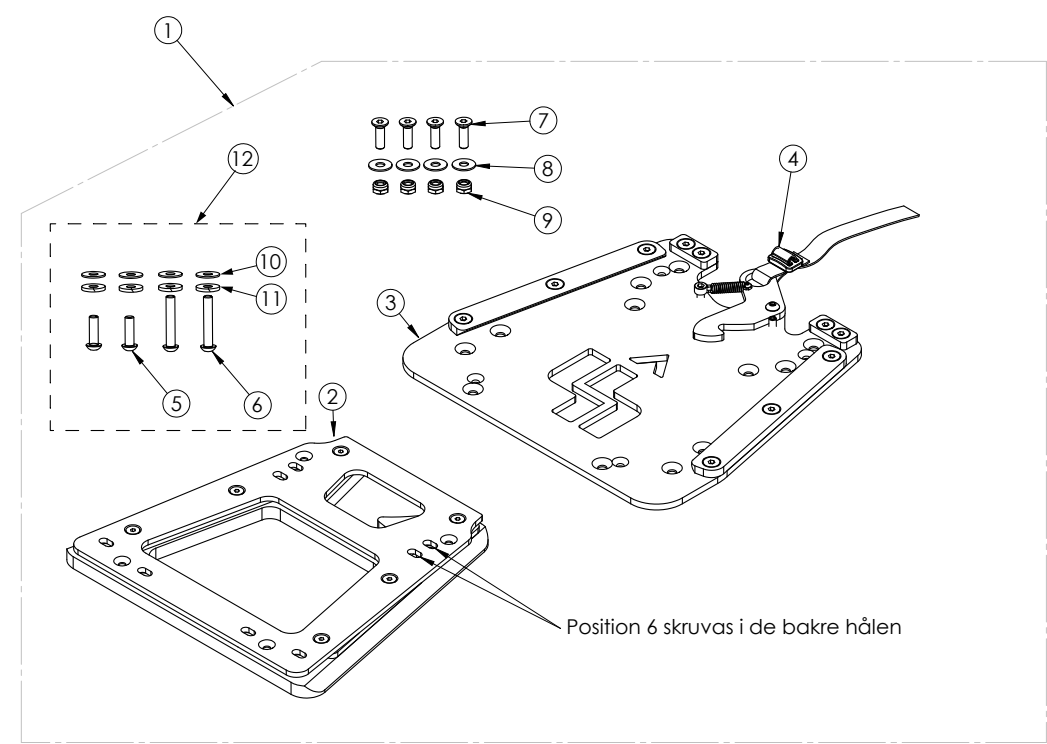

Pos.	Varenr.	Varenavn
1	153042	Adaptersystem Small Pro kpl. (stk.) - Zitzi Active
2	153043	F�steplade Small Pro (monteres p� siddesystem) (stk.) - Zitzi Active
3	153048	Adapterplade Pro (monteres p� k�restolsstel) (stk.) - Zitzi
4	153299	B�nd 15mm adaptersystem kpl. med Tg15 - Zitzi
5	126620	Skrue M6 - H�j unbraco M6x20
6	126640	Skrue M6 - H�j unbraco M6x40
7	127627	Skrue M6 - fors�nket unbraco M6x20, sort
8	144433	Sp�ndeskive M6 - 6x16x1
9	132006	L�sem�trik M6
10	141612	Sp�ndeskive M6 - 6,4x12x1,6
11	141660	Fjedersp�ndeskive M6 - 6,4x12 FZB
12	485043	Skruekit fast montering - Active str. 1
	485044	Skruekit fast montering - Active str. 2-5

Buster - Fodstøtte hel fast / hel opklappelig

Hovedprodukter:
993112 - 993115
993122 - 993125

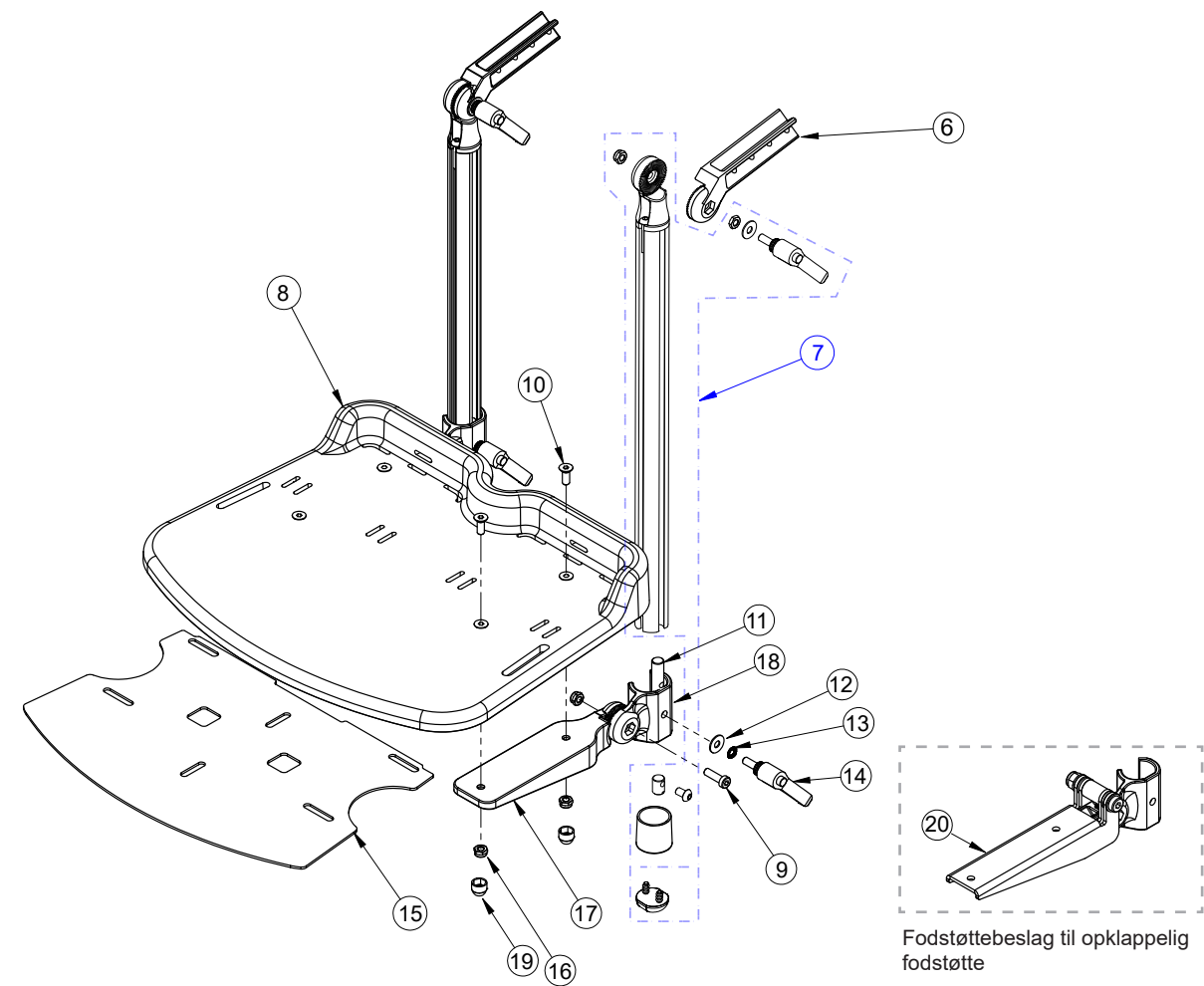

Pos	Varenr.	Varenavn
6	213134	Tagled 3 Vinklet (Firkant 80mm lng)
7		Fodstøttestang (se separat splittegning)
8	990002 990003 990004 990005 990006	Fodstøtteplade hel, str. 2 Fodstøtteplade hel, str. 3 Fodstøtteplade hel, str. 4 Fodstøtteplade hel, str. 5 Fodstøtteplade hel, str. 6
9	129656	Skrue M6 - Lav unbraco M6x20
10	127616	Skrue M6 - forsænket unbraco M6x16
11	135007	Profilskrue M6 45mm, enkel M6
12	144433	Spændeskive M6 - 6x16x1
13	141625	Schnorrspændeskive M6 - 6,4x10x0,7
14	159515	Vingeskrue M6x16 (arm 44 mm)
15	990017	Fodstøtteplade forstærkning str. 3-6
16	132006	Låsemøtrik M6
17	152291	Fodstøttebeslag, fast - Zitzi
18	213170	Tagled 8 (Rundprofil)
19	133106	Møtrikshætte M6
20	152456 285362	Fodstøttebeslag, opklappelig Fodstøttebeslag, opklap. hel justerbar (str. 3-4)


Buster - Fodstøtte delt kugleled / delt fast / delt opklappelig

Hovedprodukt:

993132 - 993134


993142 - 993144

993152 - 993154

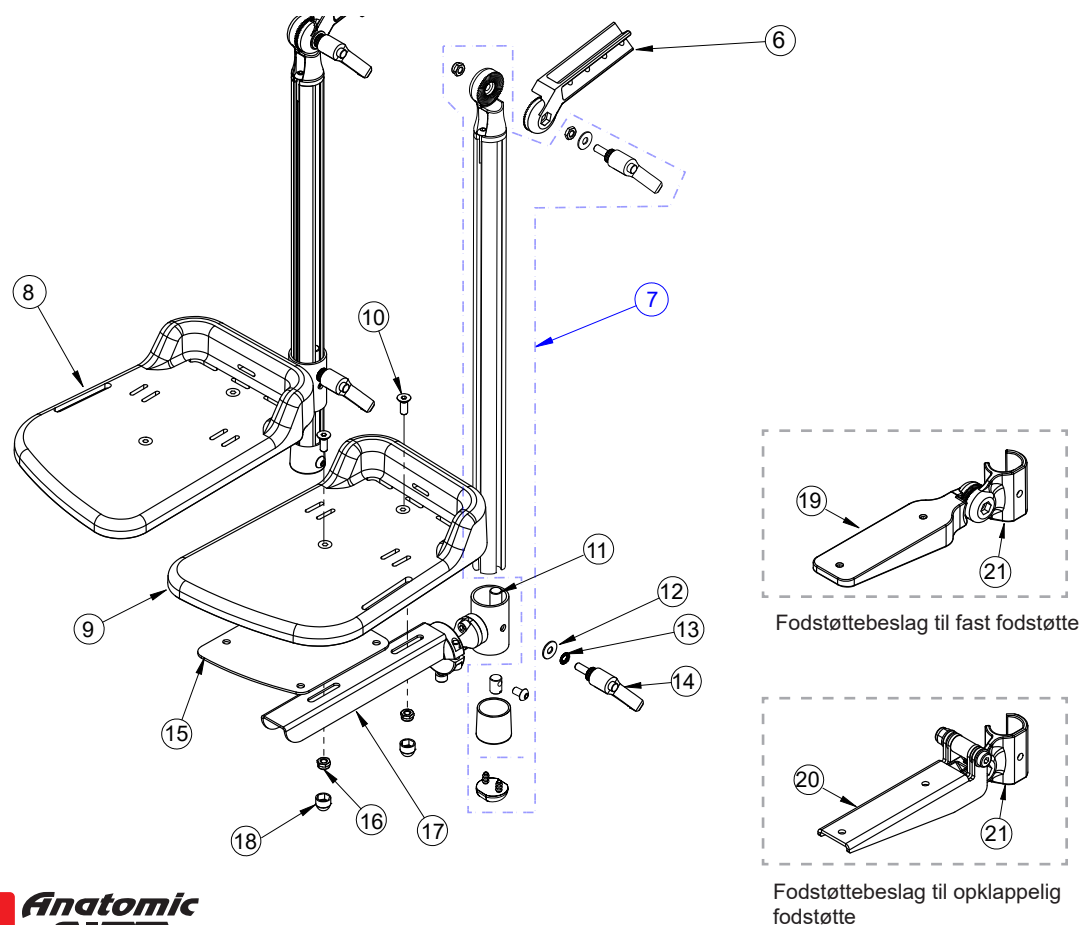

Pos	Varenr.	Varenavn
6	213134	Tagled 3 Vinklet (Firkant 80mm lang)
7		Fodstøttestang (se separat splittegning)
8	990342 990344 990346	Fodstøtteplade delt, hø. str. 2 Fodstøtteplade delt, hø. str. 3 Fodstøtteplade delt, hø. str. 4
9	990343 990345 990347	Fodstøtteplade delt, ve. str. 2 Fodstøtteplade delt, ve. str. 3 Fodstøtteplade delt, ve. str. 4
10	127616	Skrue M6 - forsænket unbraco M6x16
11	135007	Profilskrue M6 45mm, enkel M6
12	144433	Spændeskive M6 - 6x16x1
13	141625	Schnorrspændeskive M6 - 6,4x10x0,7
14	159515	Vingskrue M6x16 (arm 44 mm)
15	990016	Forstærkningsplade 3-6 (delt)
16	132006	Låsemøtrik M6
17	152457	Fodstøttebeslag, kugleled - Zitzi
18	133106	Møtrikshætte M6
19	152291	Fodstøttebeslag, fast - Zitzi
20	152456 285362	Fodstøttebeslag, opklappelig Fodstøttebeslag, opklap. helt justerbart (str. 3-4)
21	213170	Tagled 8 (Rundprofil)


Buster - Fodstøttestang

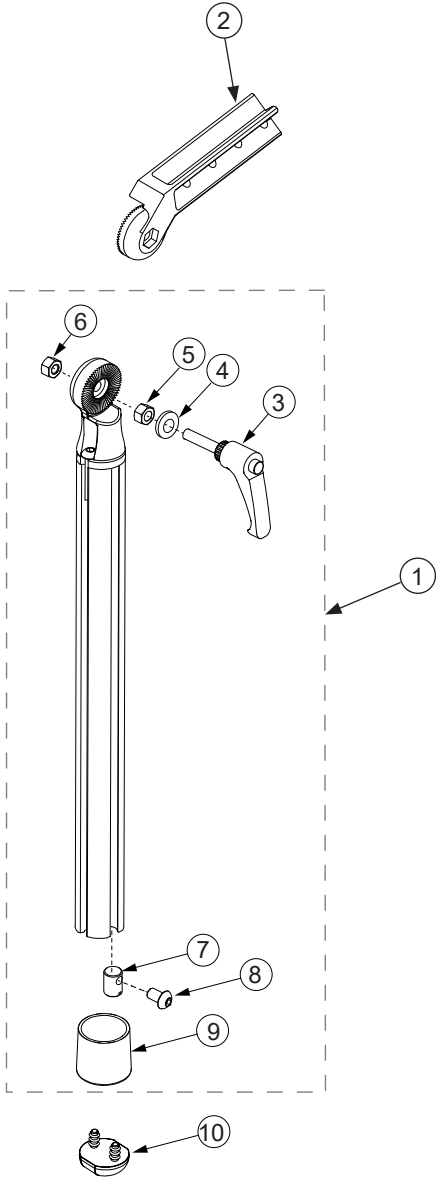

Pos	Varenr.	Varenavn
1	990138	Fodstøtteprofil sort 20cm kpl. (stk.) - Zitzi
	990141	Fodstøtteprofil sort 25cm kpl. (stk.) - Zitzi
	990142	Fodstøtteprofil sort 30cm kpl. (stk.) - Zitzi
	990143	Fodstøtteprofil sort 35cm kpl. (stk.) - Zitzi
	990144	Fodstøtteprofil sort 40cm kpl. (stk.) - Zitzi
	990145	Fodstøtteprofil sort 45cm kpl. (stk.) - Zitzi
2	213131	Tagled 3 vinklet (Firkant 30 mm lang)
	213134	Tagled 3 vinklet (Firkant 80 mm lang)
	213136	Tagled 3 vinklet (Firkant 150 mm lang)
3	159530	Vingeskrue M6x30 (arm 44 mm)
4	144433	Spændeskive M6 - 6x16x1
5	131016	Møtrik M6/Distance - udboret
6	131006	Møtrik M6
7	135005	Profilskrue M6 - Enkel 14mm
8	129610	Skrue M6 - klumpet unbraco M6x10
9	152553	Endeafslutning til rund fodstøtteprofil (Sort gummi)
10	145002	Endeafslutning til rund fodstøtteprofil (Grå Plast)

Buster - Fodkasse


Hovedprodukter:
990042 - 990045

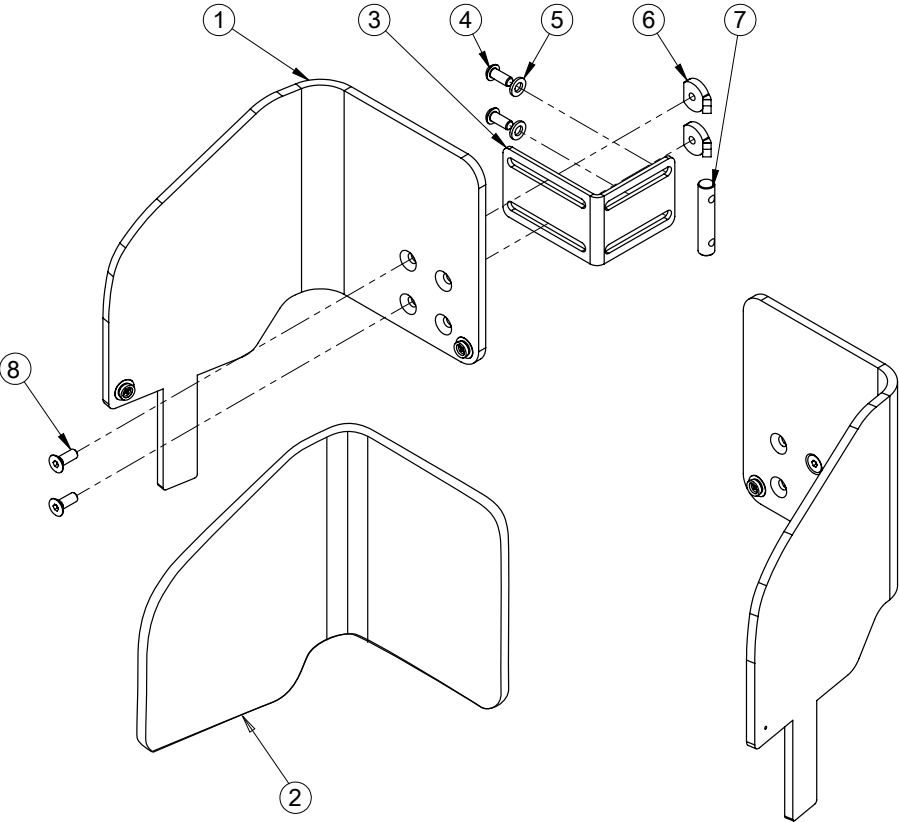

Pos	Varenr.	Varenavn
1	990182	Fodkasse plast str. 2, Hø - Zitzi
	990183	Fodkasse plast str. 2, Ve - Zitzi
	990184	Fodkasse plast str. 3, Hø - Zitzi
	990185	Fodkasse plast str. 3, Ve - Zitzi
	990186	Fodkasse plast str. 4, Hø - Zitzi
	990187	Fodkasse plast str. 4, Ve - Zitzi
	990188	Fodkasse plast str. 5, Hø - Zitzi
	990189	Fodkasse plast str. 5, Ve - Zitzi
2	990332	Polstring fodkasse str. 2, Hø - Zitzi
	990333	Polstring fodkasse str. 2, Ve - Zitzi
	990334	Polstring fodkasse str. 3, Hø - Zitzi
	990335	Polstring fodkasse str. 3, Ve - Zitzi
	990336	Polstring fodkasse str. 4, Hø - Zitzi
	990337	Polstring fodkasse str. 4, Ve - Zitzi
	990338	Polstring fodkasse str. 5, Hø - Zitzi
	990339	Polstring fodkasse str. 5, Ve - Zitzi
3	990060	Lægstøttebeslag 2 stang
4	166614	Skrue M6 - klumpet unbraco M6x14 sort belagt
5	141612	Spændeskive M6 - 6,4x12x1,5
6	689214	Spormøtrik M6, RF (glidemøtrik)
7	135008	Profilskrue M6 - Dobbel 50mm
8	127626	Skrue M6 - forsænket unbraco M6x16, sort obeh.

Buster - Lægstøtte


Hovedprodukter:
281140 - 281143

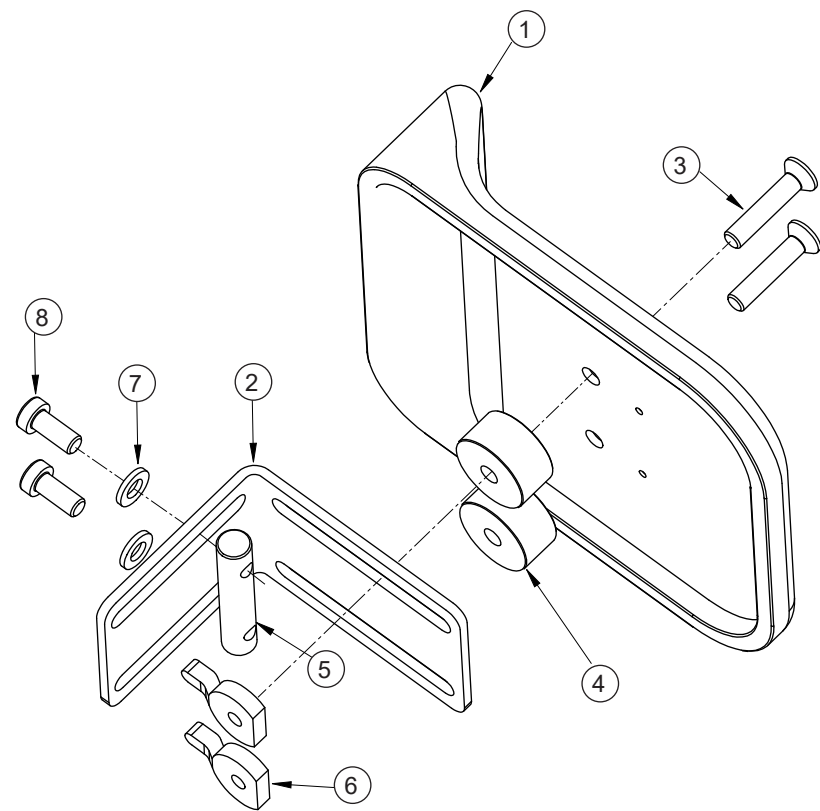

Pos	Varenr.	Varenavn
1	283130	Lægstøtteplade (95x110mm) (stk.) - Zitzi
	283108	Lægstøtteplade (120x145mm) (stk.) - Zitzi
	283109	Lægstøtteplade (150x155mm) (stk.) - Zitzi
	283134	Lægstøtteplade (225x150mm) (stk.) - Zitzi
2	990060	Lægstøttebeslag 2 stag
3	127628	Skrue M6 - forsænket unbraco M6x30, sort obeh.
4	111004	Distance plast 25x13xM6
5	135008	Profilskrue M6 - Dobbel 50mm
6	689214	Spormøtrik M6, RF (glidmøtrik)
7	141612	Spændeskive M6 - 6,4x12x1,5
8	166714	Skrue M6 - Lav unbraco M6x14, sort belagt


Buster - Armlæn (standard og skålformet)

Hovedprodukter:
385031 - 385032

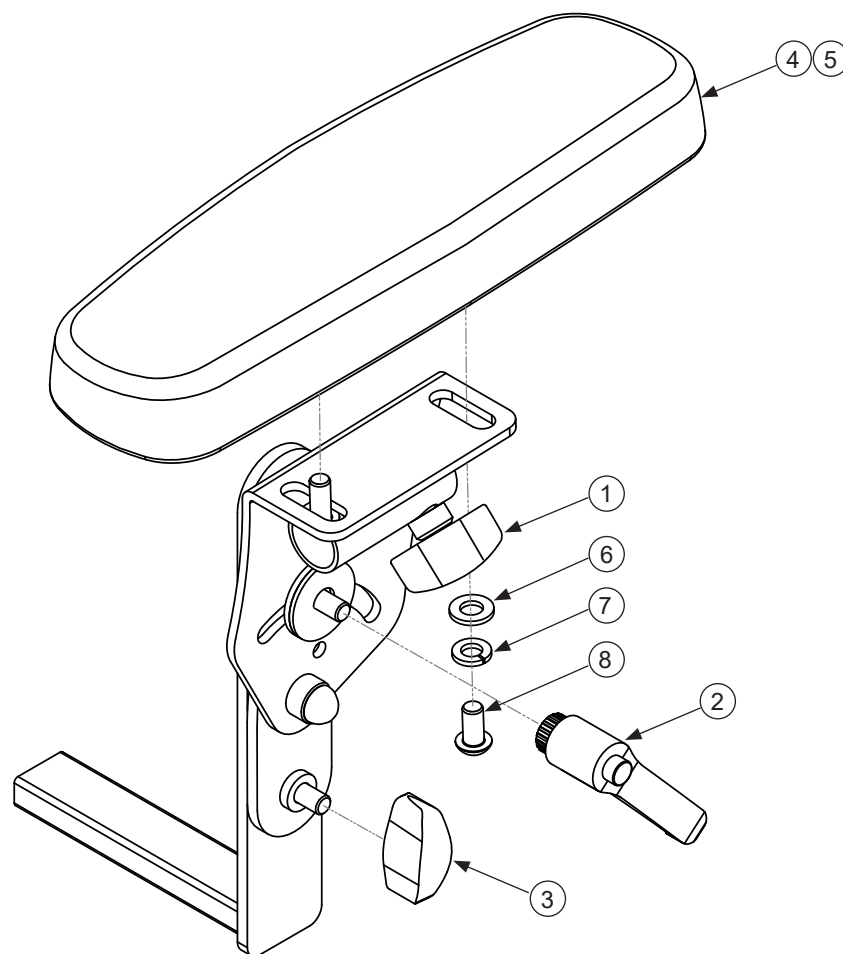

Armlænsplade monteres i hul næst længst tilbage. Kontroller markeringen under pladen for, hvilken side der skal vende udad.


Pos	Varenr.	Varenavn
1	162005	Vingred M6x10
2	160600	Vingeskrue M6 møtrik
3	158810	Vingred II - M6 møtrik
4	990065	Armlænsplade str. 1. 230x75mm - Zitzi
5	990064	Armlænsplade str. 2. 330x75mm - Zitzi
6	141612	Spændeskive M6
7	142630	Fjederspændeskive M6 RF - 6,1x11,8x1,6
8	129612	Skrue - unbraco kulrig M6x12
9	990293	Armlænsplade skålformet, 325mm, Hø - Zitzi
	990294	Armlænsplade skålformet, 325mm, Ve - Zitzi
	990295	Armlænsplade skålformet, 370mm, Hø - Zitzi
	990296	Armlænsplade skålformet, 370mm, Ve - Zitzi
10	990266	Postring armlæn skålformet, 325mm, Hø - Zitzi
	990267	Postring armlæn skålformet, 325mm, Ve - Zitzi
	990268	Postring armlæn skålformet, 370mm, Hø - Zitzi
	990269	Postring armlæn skålformet, 370mm, Ve - Zitzi

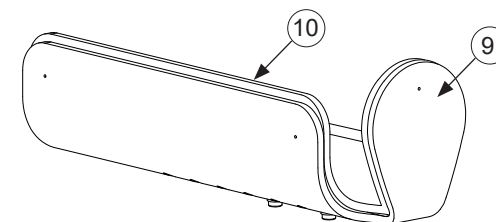

Skålformede armlænsplader

Buster - Bord standard transparent

Hovedprodukter:
990251 - 990253

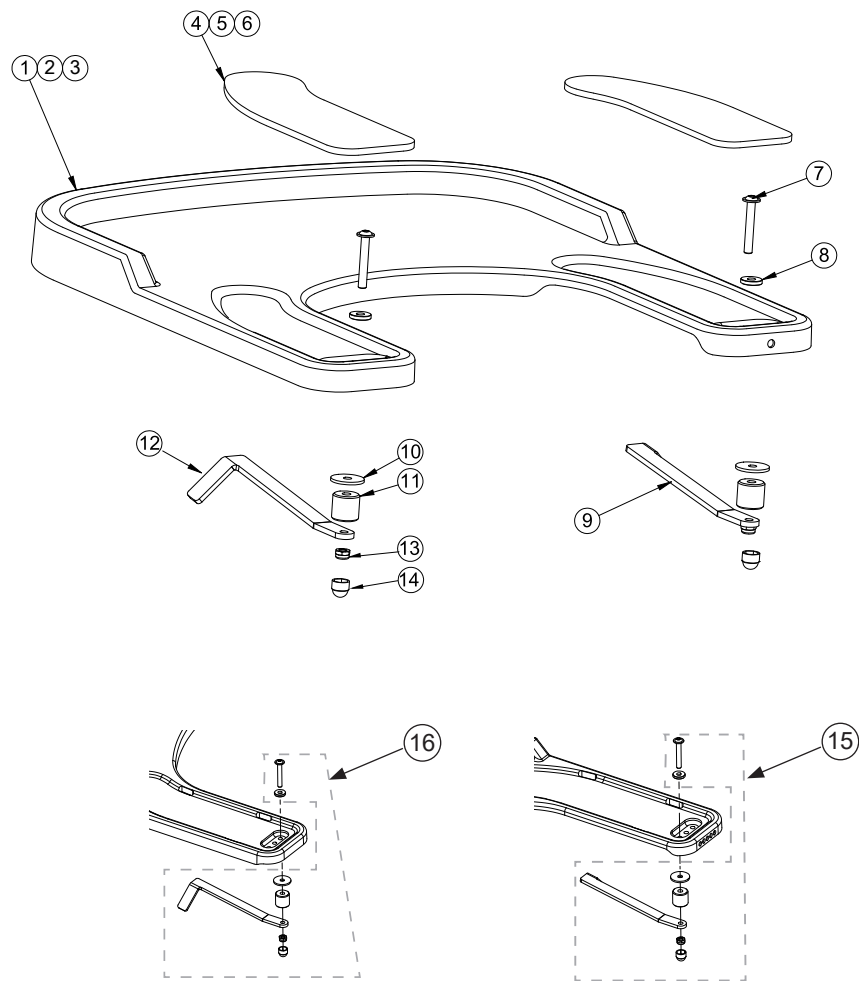


Pos	Varenr.	Varenavn
1	285346	Bord str. 1 (kun plast) - Zitzi
2	285347	Bord str. 2 (kun plast) - Zitzi
3	285348	Bord str. 3 (kun plast) - Zitzi
4	285800 285801	Polstring bord str. 1 Hø. (stk.) - Zitzi Polstring bord str. 1 Ve. (stk.) - Zitzi
5	285802 285803	Polstring bord str. 2 Hø. (stk.) - Zitzi Polstring bord str. 2 Ve. (stk.) - Zitzi
6	285804 285805	Polstring bord str. 3 Hø. (stk.) - Zitzi Polstring bord str. 3 Ve. (stk.) - Zitzi
7	138640	Skrue M6 RF - Kuglerig med flange umbraco M6x40
8	111001	Distance plast 16x3xM6
9	152775	Låsarm, sort - Hø. til bord
10	990061	Gummi spændeskive til bord
11	111022	Distance Alu 20x19xM6, til bord
12	152776	Låsarm, sort - Ve. til bord
13	137006	Låsemøtrik M6 RF
14	133106	Møtrikshætte M6
15	152783	Arm lang hø. kpl. til bord - Zitzi
16	152784	Arm lang ve. kpl. til bord - Zitzi

Grå positioner er ikke mulige at bestille stykvis. De indgår i pos. 15 & 16.




Buster - Støttebord

Hovedprodukter:
990201 - 990204

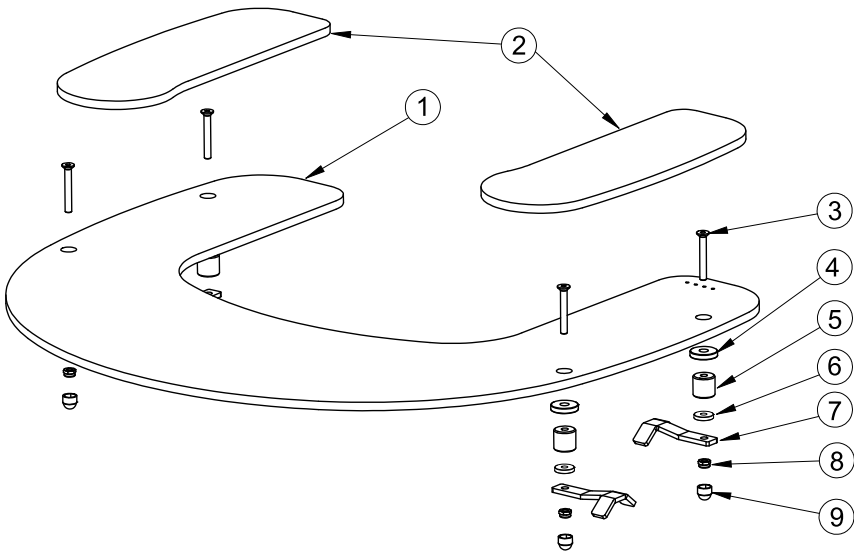

Pos	Varenr.	Varenavn
1	990281	Plast støttebord transparent str. 1 - Zitzi
	990282	Plast støttebord transparent str. 2 - Zitzi
	990283	Plast støttebord transparent str. 3 - Zitzi
	990284	Plast støttebord transparent str. 4 - Zitzi
2	990285	Polstring støttebord str. 1-2 Hø.
	990286	Polstring støttebord str. 1-2 Ve.
	990287	Polstring støttebord str. 3-4 Hø.
	990288	Polstring støttebord str. 3-4 Ve.
3	132645	Skrue M6 RF - Forsænket unbraco M6x45
4	990061	Gummispendeskive 6.2x25x2
5	111022	Distance Alu 20x19xM6, til bord
6	111001	Distance plast 16x3xM6
7	385317	Beslag bord forreste låsarm
8	137006	Låsemøtrik M6 RF
9	133106	Møtrikshætte M6
10	152785	Låsarm kpl. til støttebord - Zitzi

Grå positioner fås ikke enkeltvis. De er inkluderet i sættet med 10 stk.

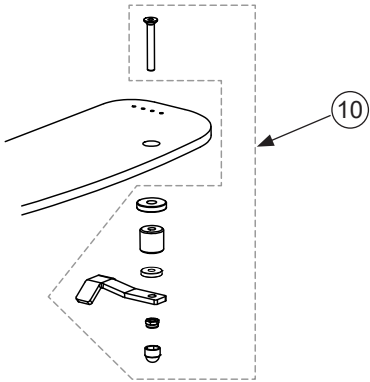


Buster - Svinghjul, Anti-tip støtte

Hovedprodukter:

387310

385040

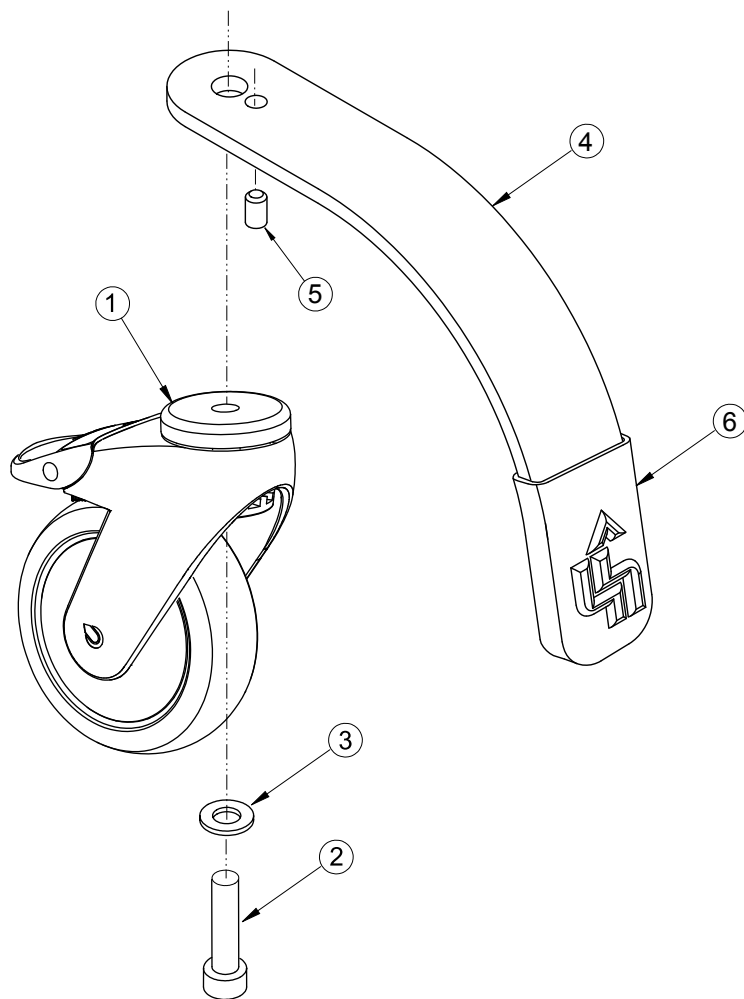

Pos.	Varenr.	Varenavn
1	387310	Enkelt hjul, 100 mm (stk.) - Buster
2		Skrue M10 RF - Høj unbraco M10x50
3		Spændeskive M10 RF - 10,5x24x2,5
4	385040	Anti-tip støtte (stk.) - Buster
5		Stopskrue M6 RF - Plan unbraco M6x10
6	689601	Endeafslutning fodpedal - Starfish Pro