



Zitzi
Delfi Pro

Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,
service, vedligeholdelse og renovering



Denne vejledning refererer til Zitzi Delfi Pro siddesystem med tilbehør. For en komplet oversigt over produktets tilbehør, se produktets bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent	3	Montering af andre hovedstøttebeslag	30
Specialtilpasning	3	Montering af kropsseler	31
Introduktion	4	Hoftebælte	32
Indledning	4	Ankelbespænding	33
Korrespondance - mærkning	4	Armlæn	34
CE-mærkning - klassificering	4	Armlæn fra ryg	35
Overensstemmelseserklæring	4	Albuestop	36
Kort om produktet	4	Håndbøjle	37
Symbolliste	5	Bord, fast	38
Produktmærkning	6	Bord, vipbar	39
Sikkerhedsinstruktioner	7	Bord, forstærket monteringsbeslag	40
Uddannelse og kvalifikationer	7	Støttebord	41
Advarsler og forholdsregler	8	Fodstøtte	42
Kontrol før brug	9	Delt fodstøtte	43
Begrænsninger	9	Fodstøtte, hel justerbar	44
Andre risici	10	Fodstøtte, delt justerbar	45
Godkendte kombinationer	10	Fodstøtte, opklappelig	46
Afviselser/tilbud	10	Fodstøtte, fjedrende fodstøtteadapter	46
Tekniske data/ydeevne	11	Fodkasse enkelstang	47
Tilpasning og specialtilpasning	13	Fra enkelstang til dobbelstang	48
Monterings- og justeringsinstruktioner	14	Lægstøtte	49
Montering på kørestolsstel	15	Legebøjle	50
Adaptersystem universal	16	Kørebøjle	51
Plansæde	17	Kaleche	51
Justering af sædedel	17	Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe	52
Montering/afmontering af ryg	20	Varmepakke	52
Justering af rygvinkel	21	Resumé og opfølgning	53
Justering ryghøjde/låsbar fleks	22	Transport i køretøj	54
Forstærket ryg	23	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner ...	55
Justerbare kropsstøtter	24	Kontrol før brug	55
Vipbar kropsstøtte	25	Service og vedligeholdelse	56
Bækkenstøtte	26	Renovering	57
Hoftestøtte	27	Affaldssortering	60
Hovedstøtte	28	Garanti og retur	61
Sidejusterbart hovedstøttebeslag	28	Revision	62
Vipbar hovedstøttebeslag	29		

Producent

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 75

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at kunne udnytte Zitzi Delfi Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT om produkterne. Du finder serienummeret på siddepladens bagerste del.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk.

Kort om produktet

Zitzi Delfi Pro er et modulopbygget dynamisk siddesystem til børn og unge med siddeproblematikker. Sæde- og ryglænsbasen har flere justeringsmuligheder og kan udstyres med forskelligt tilbehør for at opnå en specifik siddestilling. Siddesystemet er beregnet til at blive brugt sammen med kørestolsstel fra Anatomic SITT.

Zitzi Delfi Pro kan bruges flere gange.

Symbolliste

	Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.	 Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
	Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning. 	 Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.	 Angiver producentens referencenummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 www.anatomicstt.com	Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.	 Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver at brugervejledningen skal læses for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information om f.eks. advarsler som ikke findes på produktets medicintekniske etiket.	 Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato.	 Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.	

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt



Produktnavn

Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)

Max belastningsvikt

UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)

UDI= GS1-128

Etiket på tilbehør



Produktnavn

Stregkode (EAN-13 eller REF samt LOT)

UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)

UDI= GS1-128

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om tilpasning/specialtilpasning skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (Eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Den, der ordinerer hjælpemidlet, eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren og hjælpemidlet bør altid være til stede for at teste produktet og udføre en risikovurdering inden første brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Den person, der har ordineret midlet eller en person med tilsvarende kompetence og viden om, hvordan brugeren skal balancere i det valgte sæde for at sikre at enhver risiko for tipning er udelukket.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle monterings-skruer og møtrikker kontrolleres og spændes.



Sørg altid for, at sædet er fastgjort til kørestolsstellet før borgeren placeres i siddesystemet! Et bælte leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra rygprofilen af sædet og omkring chassissets kørebøjle. Dette bælte skal altid bruges sammen med adaptersystemet universal, og når det transporteres i et køretøj. Sørg for, at denne rem er stabil og stram.



Brug aldrig fodpladen, til ind- og udstigning af hjælpemidlet.



Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning".



Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.



Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.



Udfør aldrig service mens produktet anvendes.



Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.



Udfør altid kontrol efter brug for at registrere rødme eller trykmærker på brugeren.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- * Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling for bevægelse og låsning.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxvægt

Den højste belastningsvægt er 90 kg og gælder for samtlige størrelser.

Med belastningsvægt menes den maksimale vægt som siddesystemet må udsættes for inkl. bruger og evt. anden vægt. Max belastningsvægt for transport i køretøj er 75 kg.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned. Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør.

Godkendte kombinationer

For at produktet kan bevare sin CE -mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S. Se produktets bestillingsgrundlag for muligt tilbehør og reservedelsliste.

Produktet kan dog monteres med CE-mærkede seler/seler og hovedstøtter/nakkestøtter fra en anden leverandør med bibeholdt CE-mærkning på nedenstående punkter er opfyldt:

- Det skal fremgå af tredjepartsdokumentation, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartsproduktet er beregnet til brug på manuelle kørestole eller modulære siddesystemer, og som tredjeparter godkender brugen på andres siddesystemer).
- At sædesystemets originale fastgørelsespunkter anvendes og at seler/seler samt nakkestøtten/nakkestøtten er fastgjort til befæstelserne beregnet til dette siddesystem fra Anatomic Sitt AB. Beslagene skal passe til det aktuelle tredjepartsprodukt. Ingen påvirkning/tilpasning kan foretages på et hvilket som helst af produkterne for at muliggøre kombinationen.
- Monteringsvejledning for nakkestøtter og bælder/seler fra Anatomic Sitt AB skal følges og findes under afsnittet Monterings- og justeringsinstruktioner senere i denne dokumentation. Der må derfor ikke monteres andre produkter eller tilbehør tredjeparts produkt.

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering ved produkter fra forskellige leverandører er kombineret. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren eller personer i dets nærhed.

Afviigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.


Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed.

Tekniske data / Ydeevne

Delfi Pro


Varenr: 2840XX-serien

Zitzi Delfi Pro	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Brugerlængde, ca cm:	60 - 100	90 - 130	120 - 160	140 - 170
Sædebredde (A) cm:	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Sædedybde (B) cm:	17 - 26*	24 - 33	31 - 40	36 - 45
Axilhøjde (C) cm:	17 - 27	24 - 34	30 - 40	30 - 40
Brugervægt samtligte størrelser: max 90 kg				
Ryg vinkel samtligte størrelser: - 10° til + 30° * Sædedybde 14-26 cm i kombination med ryg str. 0				

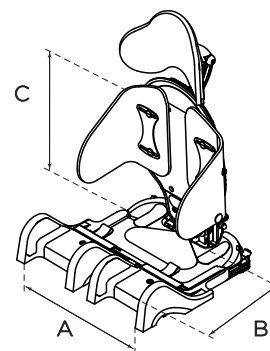

JUSTERBAR RYG

Alle mål er opmålt med betræk

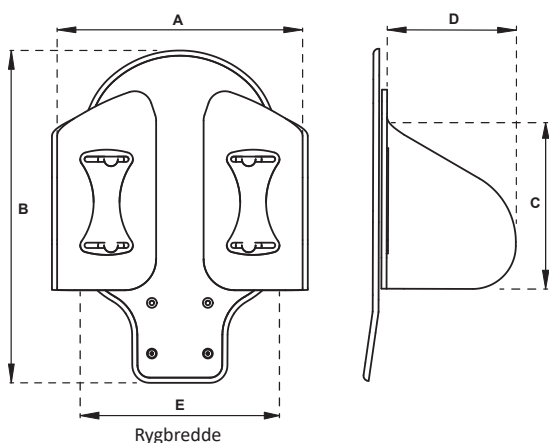

RYG mål i cm

	B x E
Rygg str. 0	31 x 21 cm
Rygg str. 1	34 x 21 cm
Rygg str. 2	39 x 26 cm
Rygg str. 3	45 x 29 cm

KROPSSTØTTE mål i cm

	C x D
Kropsstøtte str. 0	14 x 12 cm
Kropsstøtte str. 1	16 x 13 cm
Kropsstøtte str. 2	19 x 15 cm
Kropsstøtte str. 3	21 x 18 cm

	str. 0	str. 1	str. 2	str. 3-4
Rygprofilens længde:	33	36	45	52 cm

Kropsstøtte BREDDJUSTERING (A) cm inkl. foder


	Ryg 0	Ryg 1	Ryg 2	Ryg 3
Kropsstøtte 0	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Kropsstøtte 1	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Kropsstøtte 2	19 - 28	19 - 28	21 - 30	23 - 30*
Kropsstøtte 3	19 - 28*	19 - 28*	21 - 30*	23 - 32

Grå felter er standardkonfiguration

* Ikke optimal højdejustering.


SÆDEDEL

Windswept

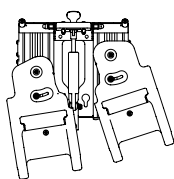


Windswept:
Windswept mulighed 9°

Abduktion/Adduktion

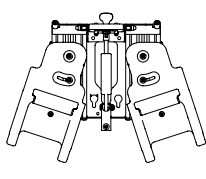


Abduktion:
Samtlige størrelser 0° til +18°
Adduktion:
Samtlige størrelser 0° til -9°

Benlængde

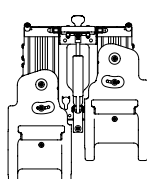


BORD

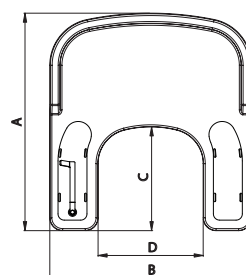

Bord	MÅL
Str. 1	A B C D
Str. 2	480 x 450 x 240 x 250 mm
Str. 3	540 x 515 x 260 x 290 mm
	570 x 570 x 280 x 340 mm


STØTTEBORD

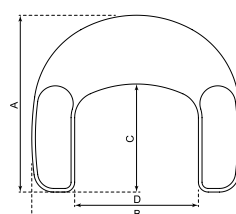

Støttebord	MÅTT
Str. 1	A B C D
Str. 2	380 x 450 x 230 x 260 mm
Str. 3	430 x 510 x 260 x 300 mm
Str. 4	490 x 580 x 300 x 340 mm
Str. 5	540 x 640 x 330 x 380 mm
	600 x 710 x 360 x 420 mm

BÆLTESBESLAG

Anbefalingstabel

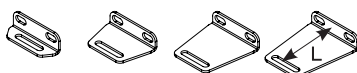


Art nr.	371925	371926	371927	371928
Længde L	10 mm	30 mm	50 mm	60 mm
Position	Bag Foran	Bag Foran	Bag Foran	Bag Foran
Delfi 1	X	X	X	
Delfi 2	X	X	X	
Delfi 3	X	X	X	
Delfi 4	X	X	X	X
Sharky 1	X	X	X	X
Sharky 2	X	X	X	X

FODKASEE


Fodkase str.1 passer til fodstøtte str. 1 osv.

A (højde fra fodplade)


str. 1	180 mm
str. 2	180 mm
str. 3	210 mm
str. 4	240 mm

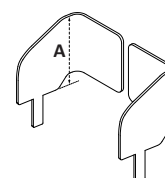


HOVEDSTØTTE

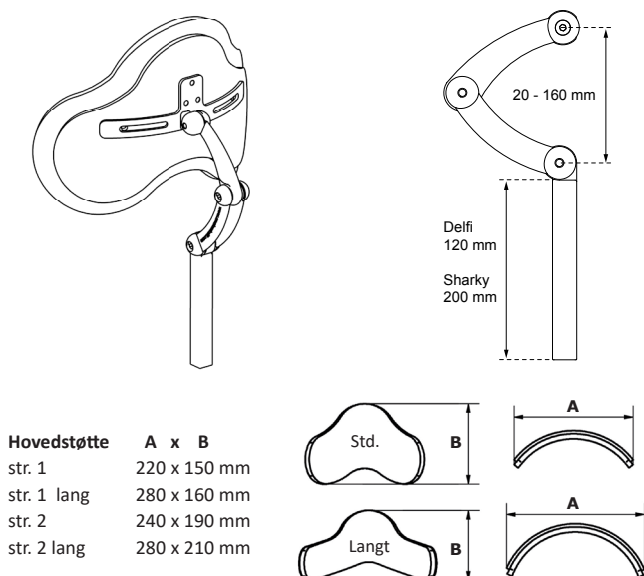

FODSTØTTE

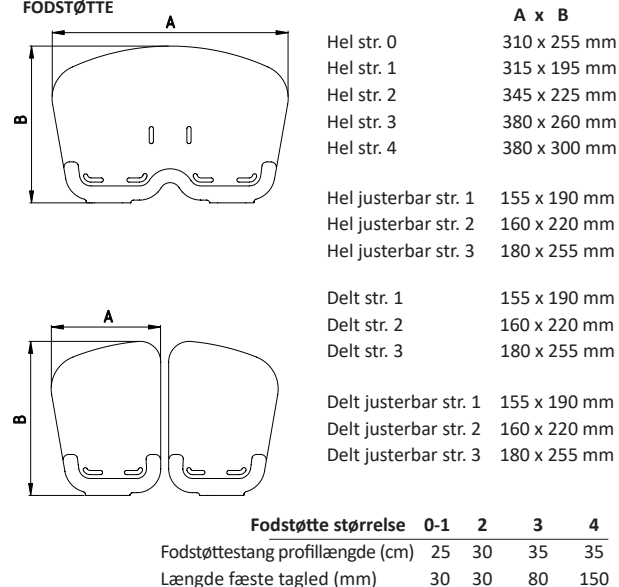


HANDBÅGE

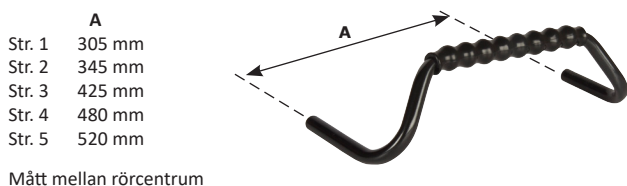


OVERARMSSTØTTE

Mål pude*	A	B
Str. 0-1	85 mm	100 mm
Str. 2-4	125 mm	150 mm

Puden kan vrides 90 grader ved montering.
* for mål med polstring + 20 mm

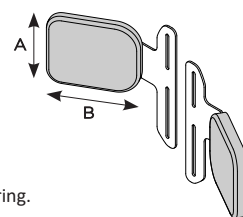


ARMSTÖD FRÅN RYGG

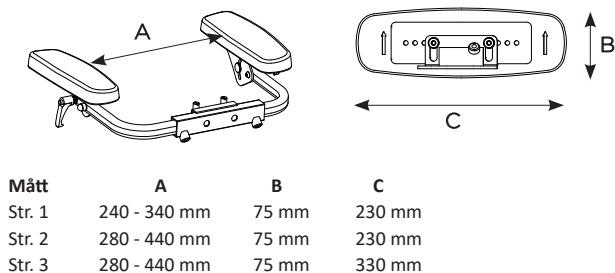


HOFTSTØTTE

Mål:	A x B
Str. 1	160 x 130 mm
Str. 1 lige	160 x 125
Str. 2	175 x 160
Str. 2 lige	175 x 150

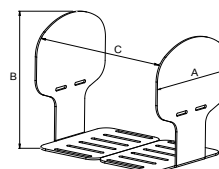

Mål i cm	Sæde- bredde	Hofstøtte bredde- justering C	Hofstøtte lige bredde- justering C
Delfi 0/1	24	19 - 29	25 - 35
Delfi 0/1	27	22 - 32	28 - 38
Delfi 0/1	30	25 - 35	31 - 41
Delfi 2	28	19 - 29	27 - 35
Delfi 2	31	22 - 32	30 - 38
Delfi 2	34	25 - 35	33 - 41
Delfi 3/4	32	19 - 29	28 - 35
Delfi 3/4	35	22 - 32	31 - 38
Delfi 3/4	38	25 - 35	34 - 41


ARMLÆN FRA SÆDE

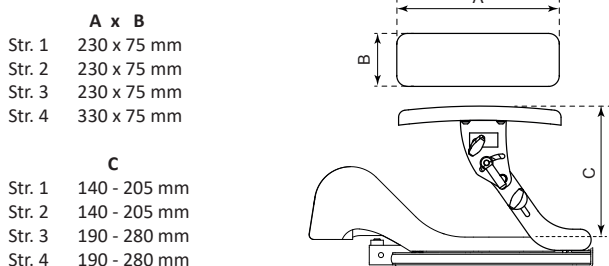

C mål fra toppen af sædedelen til armlænets top


Bredde mellem armlænsstangen D

Str. 0/1	250 - 390 mm
Str. 2	300 - 440 mm
Str. 3/4	300 - 440 mm

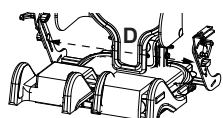

BÆKKENSTØTTE

A x B
Str. 1 - 150 x 70 mm
Str. 2 - 200 x 100 mm

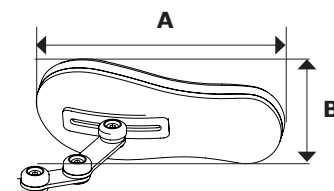

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Længden af fodstøtteprofilen kan forkortes, så den passer bedre til brugeren.

Ryglænsprofilens længde kan forkortes. Profilen må aldrig være kortere, end alle beslag til bagpladen kan monteres på.

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på Hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

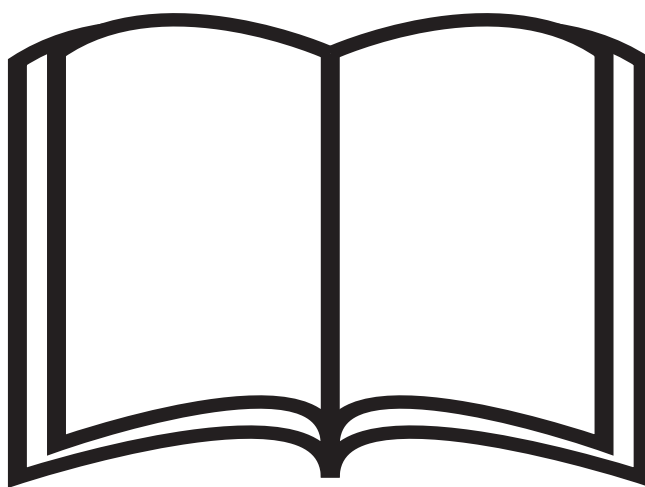

Værktøj

Værktøjsnøglen, som du skal bruge til at foretage justeringer, er integreret øverst på rygprofilen som du finder på bagsiden af stolen. (4 mm unbrakonøgle)



 = Justeringsnøgle 

Montering på kørestolsstel



Montering af fæsteplade

Monter monteringspladen med de medfølgende skruer, skiver og låsemøtrikker på kørestolsrammen.

Montering af Delfi Pro

Siddesystemet monteres let og sikkert på et kørestolsstel ved hjælp af en fæsteplade/monteringsplade. Fæstepladen er udstyret med 2 stifter, der gør at sædesystemet sidder på plads, samt en vingeskrue nedenunder for at holde sædet fast.

Før siddeesystemet ind som vist. Skub derefter siddeesystemet bagud, indtil det stopper, og du hører et klik. Stram derefter vingeskruen med uret under sædepladen for at bestemme placeringen af siddeesystemet.

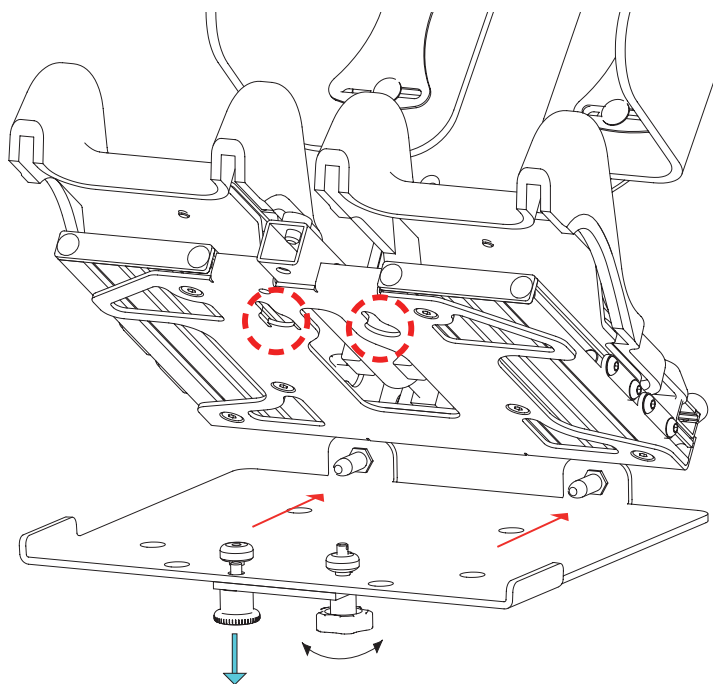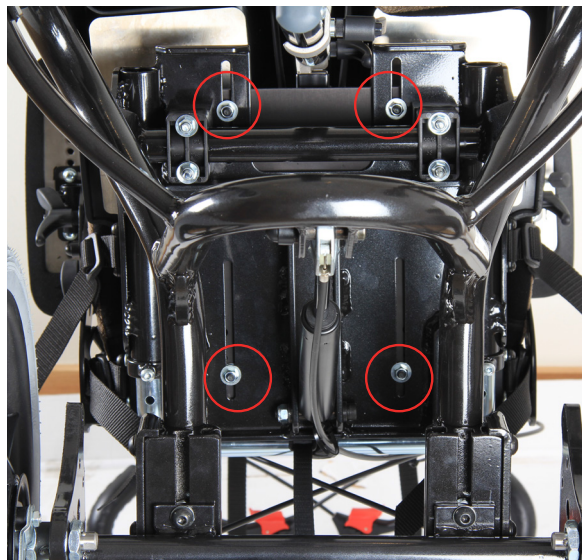

 Hulbillede

 Trækretning

 Træk nedad for at åbne

 Vingeskrue



Sørg for, at låsen klikker korrekt, og at du har strammet vingeskruen!


Adaptersystem

Montering med adaptersystem

Begynd med at montere bundpladen (A) på en kørestolsramme ved at skrue den fast med de medfølgende skruer, skiver og møtrikker (B).

Monter derefter adapterpladen (C) ved at skubbe profilskrue (D) ind i rillerne på undersiden af siddesystemet. Spænd skrue (E), når den ønskede position er nået.

Når adapterpladen og bundpladen er monteret på sædesystemet og kørestolsrammen, kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt fastgjort, når der høres en kliklyd.

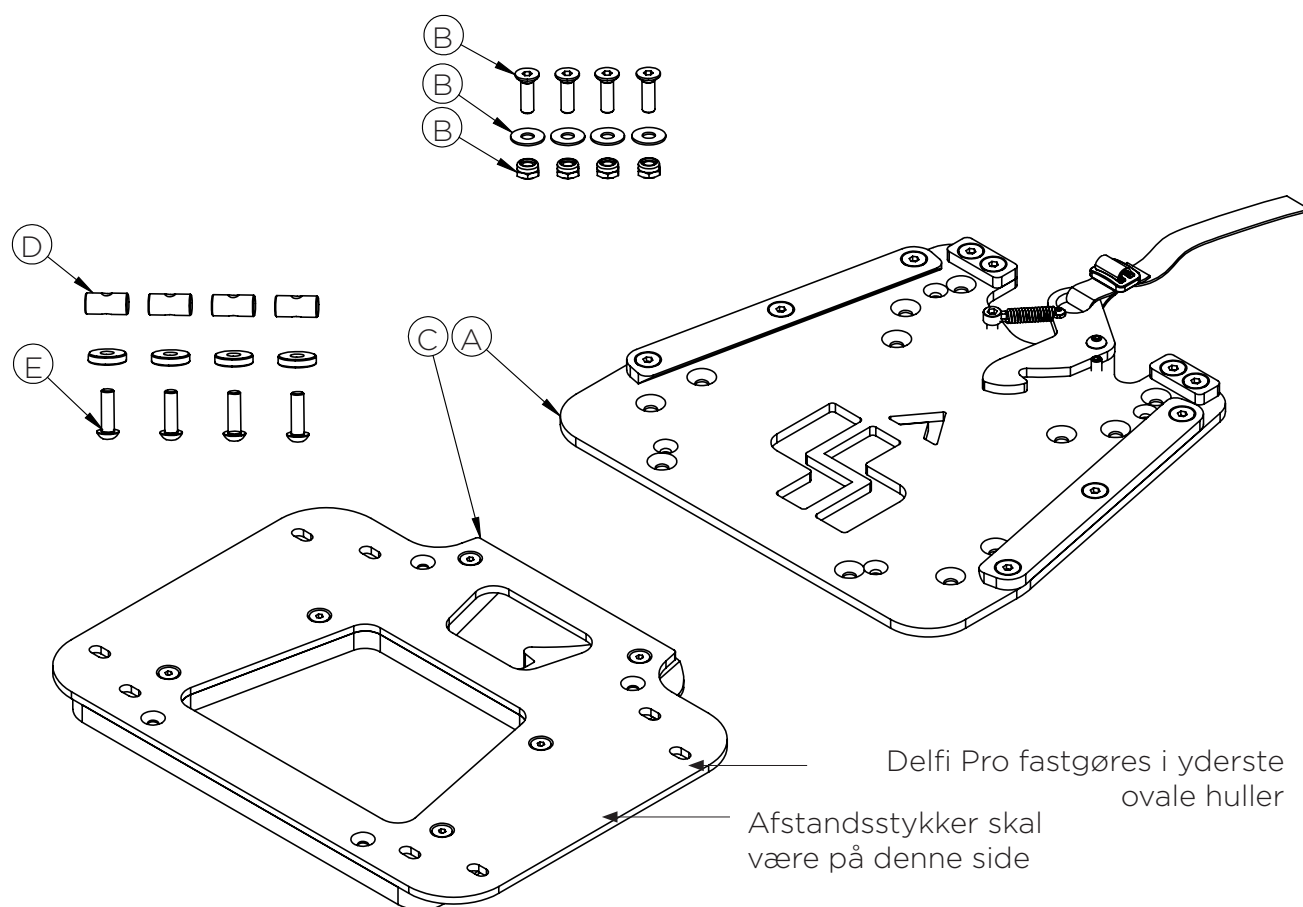

Sørg for, at siddesystemet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen før brug.




Når Adapter System Pro (153047) anvendes, skal sikkerhedsstroppen på bagsiden af sædesystemet altid anvendes og strammes omkring skubbe-/trækstangen eller tilsvarende på basen (se billede). Sørg for, at remmen er stram og fastgjort, så den ikke kan glide af.




Plansæde

Skrue skrue, træplade, afstandsstykke og profilskrue sammen. Skub alle 4 profilskruer ind i profilen som vist, og stram derefter skruerne forsvarligt.

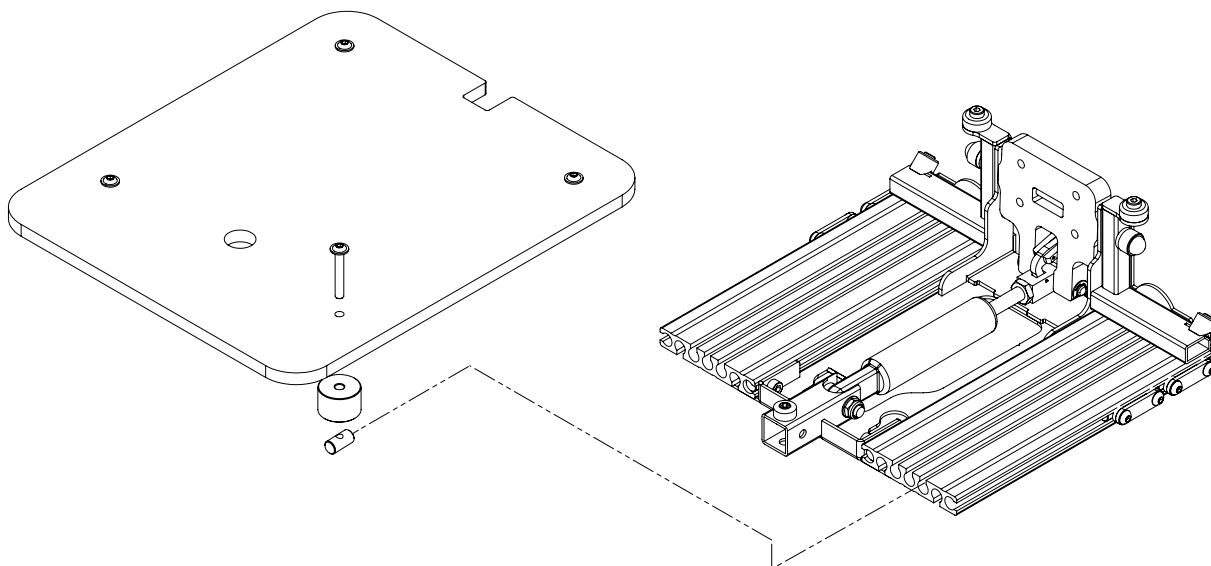

Justering af sædedel

Sædedybde, benlængdeforskelle og eventuel abduktion/adduktion af benene justeres enkelt. Fjern betrækket og den bagerste del af sædedelen for at komme til justeringsskruerne. Sørg for at du ikke skruer skruen helt ud. Det er nok at løsne den.

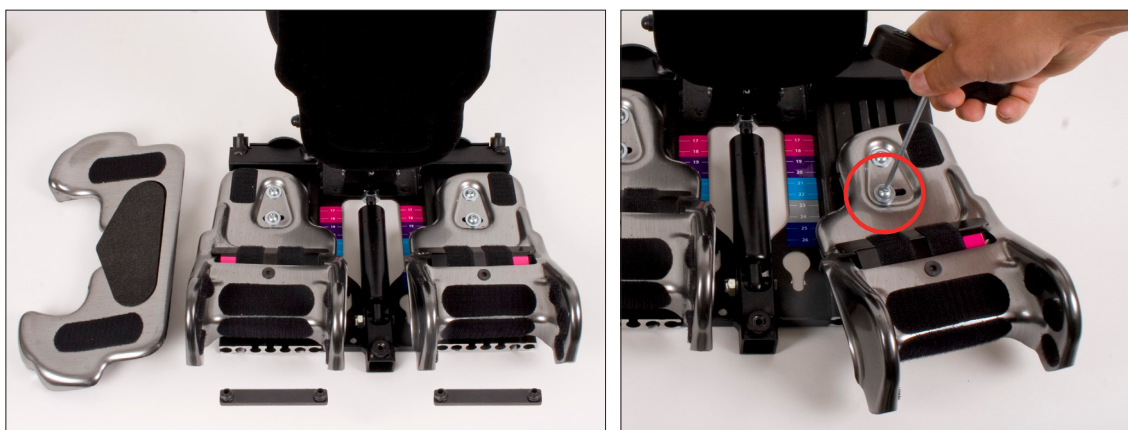

Sædebreddejustering



For maksimal sidde bredde indstilles profilskruen i rille 3, og for minimumsbredde indstilles profilskruen i spor 1. Benpartierne leveres forudindstillet i rille 1.

1. Løsn den forreste skrue på bensektionen ved hjælp af værktøjsnøglen.
2. Flyt bensektionen til den ønskede rille og position for en bredere sædebredde.
3. Spænd skruen, når du har nået den ønskede position. Den bagerste skrue skal muligvis løsnes lidt.



Benlængdeforskel



Løsn den forreste skrue (A) på bensektionen ved hjælp af værktøjsnøglen. Træk bensektionen til den ønskede position, og stram skruen.

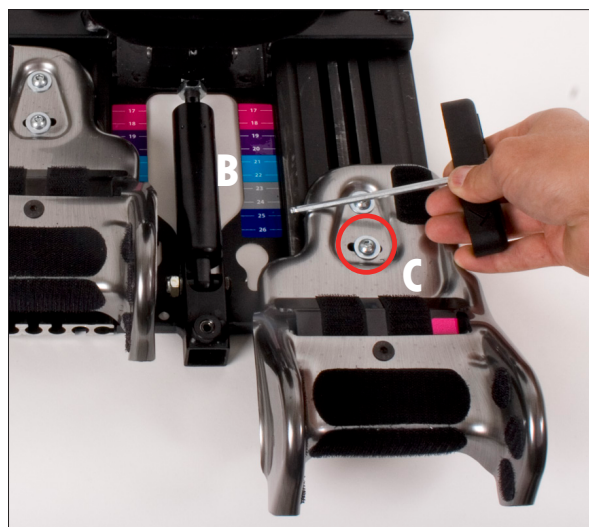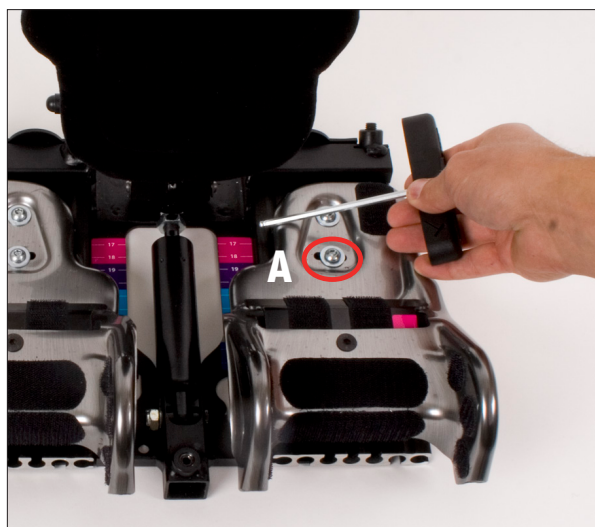

Sørg for ikke at justere sædets front uden for det godkendte indstillingsområde (B) (måleklistermærke). Fræset rille (C) markerer maksimal justering (se billede).


Sædebrøndsjustering

Ved justering af sædedybden skal sædebrøndens justering også inkluderes. Eks. hvis sædedybden justeres til 23 cm (gråt felt), skal sædebrøndsjusteringen også udvides til det grå felt for at opretholde sædebrøndens størrelse for at opnå en korrekt siddestilling. Løsn bensektionsskruen ved hjælp af værktøjsnøglen. Træk sædebrøndsjusteringen til ønskede position. Spænd skruen.

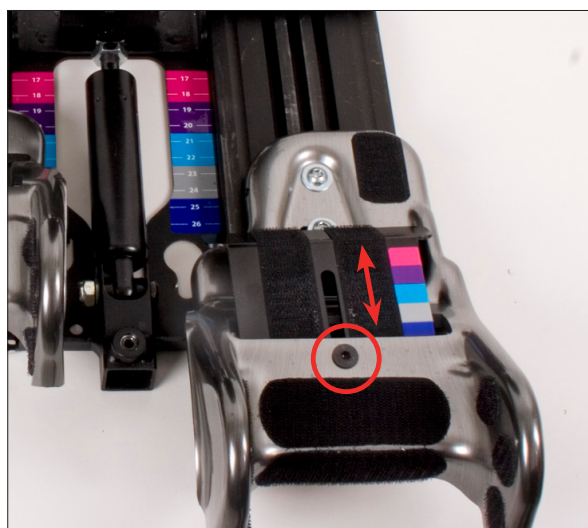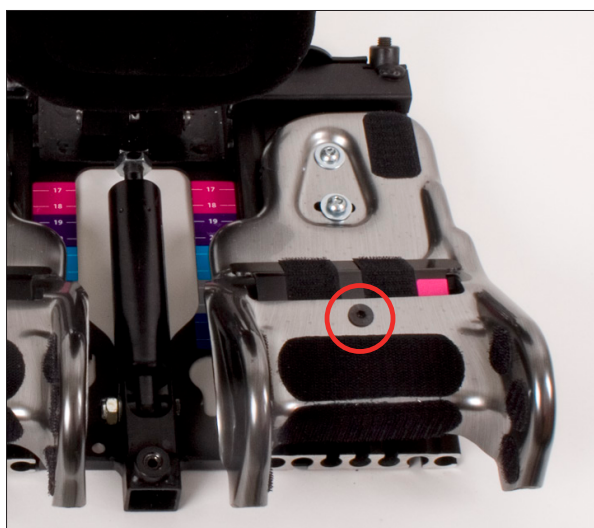

Abduktion og adduktion

Løsn den forreste skrue på bensektionen ved hjælp af værktøjsnøglen. Flyt bensektionen til den ønskede position, og stram skruen, når du har nået den ønskede position.

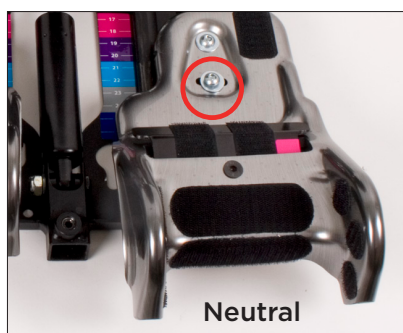

Montering/afmontering af ryg

Ryggens bagside består af 4 stk. skruer.

Før rygprofilen i profilskruerne og stram de fire medfølgende skruer (markeret med rødt på billedet).


Ryggen ender automatisk i den korrekte position ved hjælp af stop i rygprofilen.



OBS!
Vælg forstærket ryg
ved høj tonus
hos brugeren!




Justering af rygvinkel

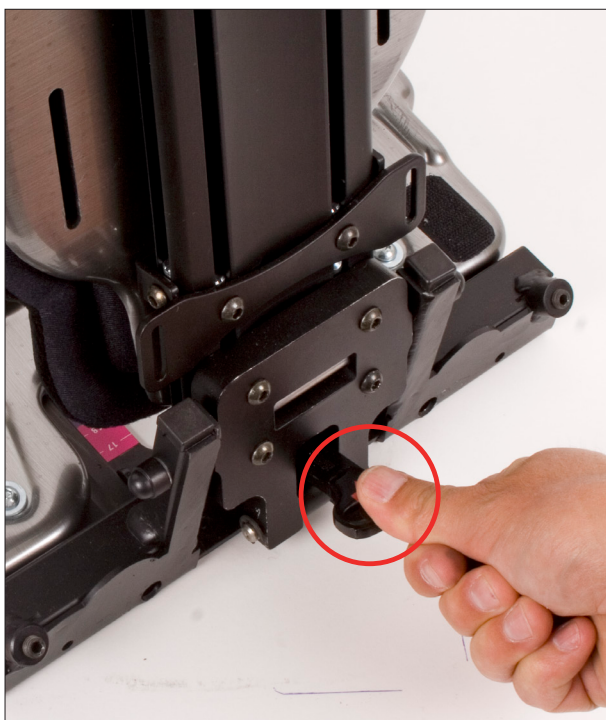

Placér først låsepalen i aktiveringspositionen ved at trække den lige ud og derefter opad. For at justere ryglænets vinkel skal du trykke palen nedad, så frigøres ryggen, så du kan placere den i den ønskede position. Når du har nået den ønskede vinkel, skal du slippe palen igen.



Det er meget vigtigt, at palen sættes i børnesikret position, hvilende nedad efter justering af rygvinklen.

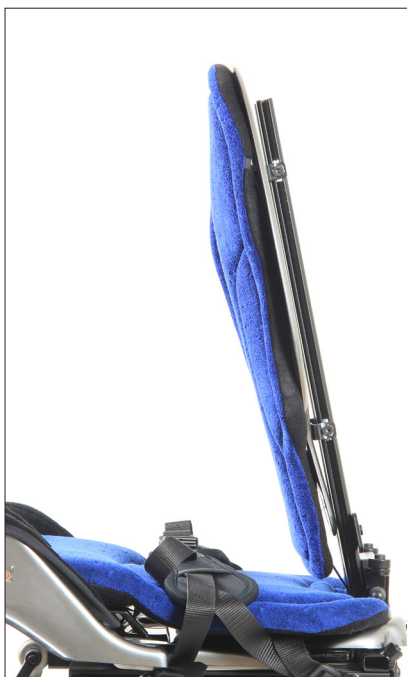

Justering af ryghøjde



- Løsn skruerne iht A på begge sider af rygprofilen (2 på hver side).
- Juster højden
- Lås skruerne


Placer ryggen, så du kan udnytte ryggens integrerede lændestøtte!



Lås og stilbar fleksfunktion (På siddedel MLD - Delfi +)


Drej knappen med uret (A) for at låse flex-funktionen i ryggen og få den fikset.

For at aktivere flex-funktionen så skru knappen af mod uret (B), mand kan også indstille, hvor langt ryggen skal bevæge sig afhængig af hvor langt knappen drejes ud.

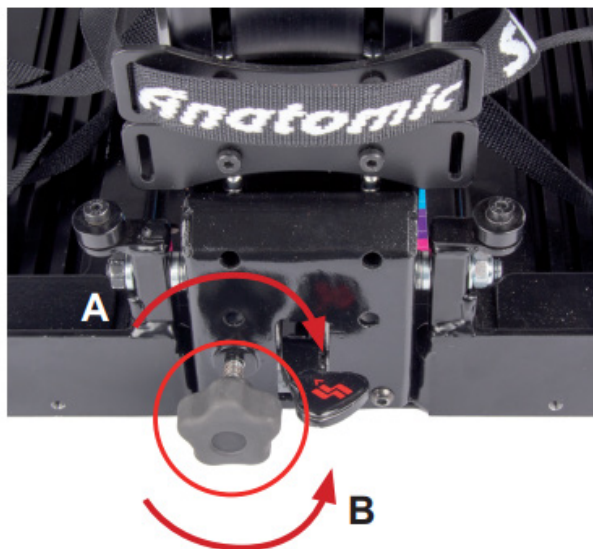

Forstærket ryg

Forstærkningsplade fastgøres til bagpladen ved hjælp af dobbeltklæbende tape. Sørg for, at alle riller og huller vender mod hinanden. Pladen holdes derefter på plads via boltene, der fastgør kropsstøtten til rillerne.

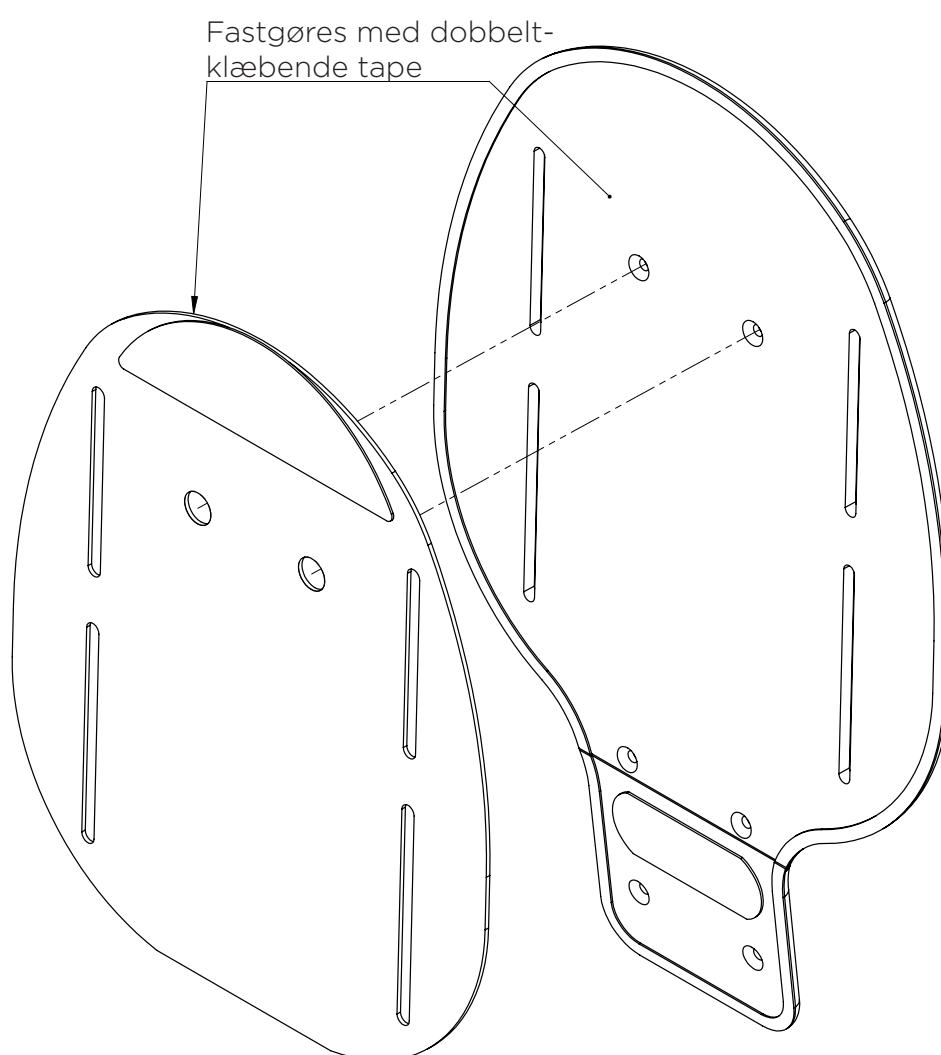

Justerbar kropsstøtte



Monter kropsstøtte

Monter kropsstøtten med den medfølgende vognbolt, afstandsstykke, skive og vingeskrue (se billede). Afstanden skal placeres mellem kropsstøtten og ryggen, så dækslet ikke klemmes.



Justering kropsstøtte

- Løsn vingeskruerne (to på hver side)
- Juster efterfølgende kropsstøttens bredde og højde
- Spænd knapperne, når du har nået den ønskede position.

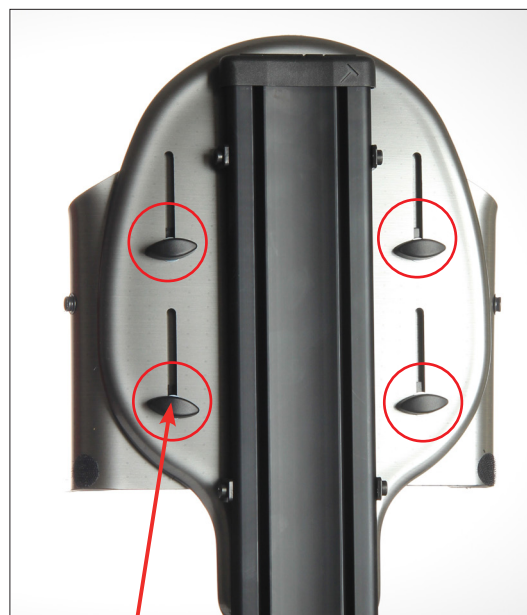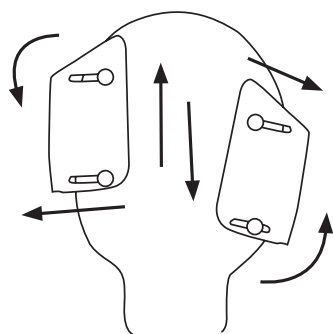

Vingeskrue


Vipbar kropsstøtte

Monter kropsstøtte

Monter kropsstøtten med inkluderet vognbolt (1), afstandsstykke (2), skive (3) og vingeskrue (4) (se billede). Afstanden skal placeres mellem kropsstøtten og ryggen, så dækslet ikke klemmes. Fastgør låsestroppen (6) som vist.

Ud af kropsstøtte

Tryk på knappen (5) og vip kropsstøtten til side.

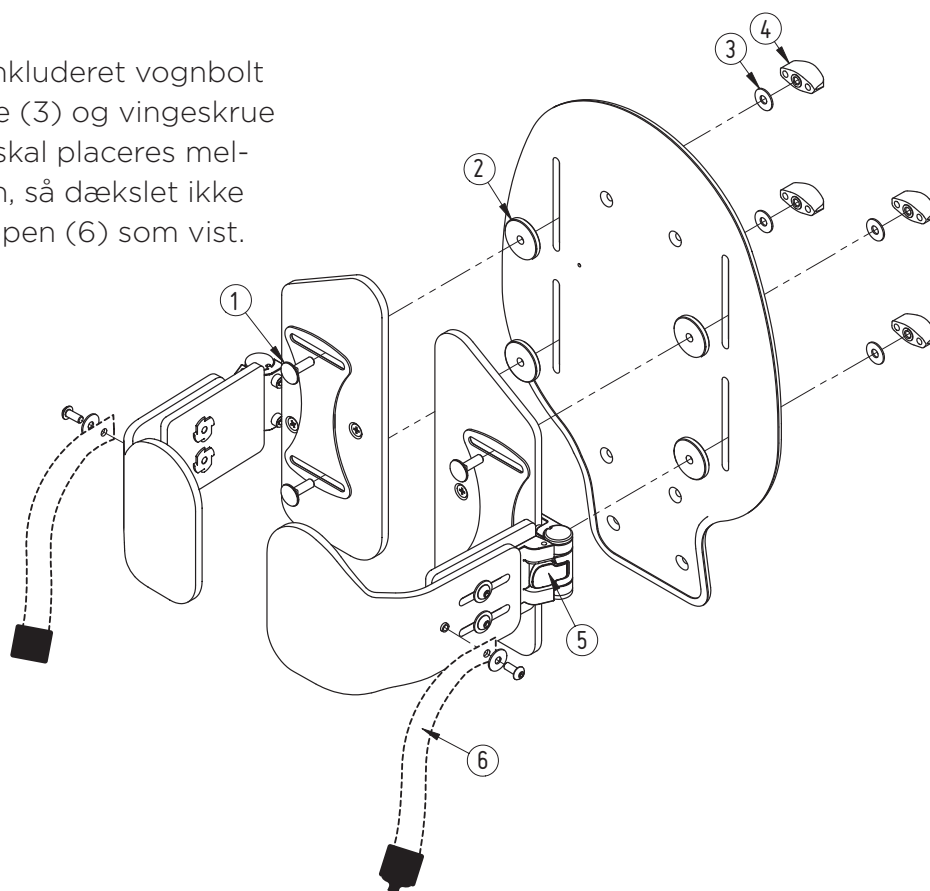

Bækkenstøtte



Montering af bækkenstøtte

Inden du kan montere bækkenstøtten, skal du fjerne beskyttelsesdækslet (A). Skru skruen (B) af, og løft derefter dækslet.

Monter bækkenstøtten, hvor beskyttelsesdækslet (A) er fastgjort og fastgør med skruen (B).

Justering af bækkenstøtte


For at justere bækkenstøttens vinkel, løsnes skruen (B), (C) eller (D) afhængigt af de indstillinger, du vil foretage. For at justere højden på bækkenstøttepladen skrues skrue (E) af, og pladen flyttes til den ønskede position. Skru derefter skrue (E) igen.

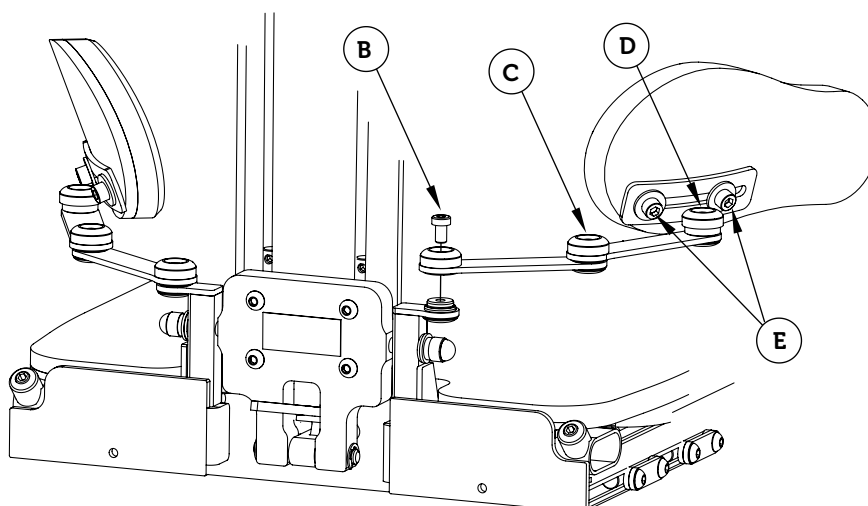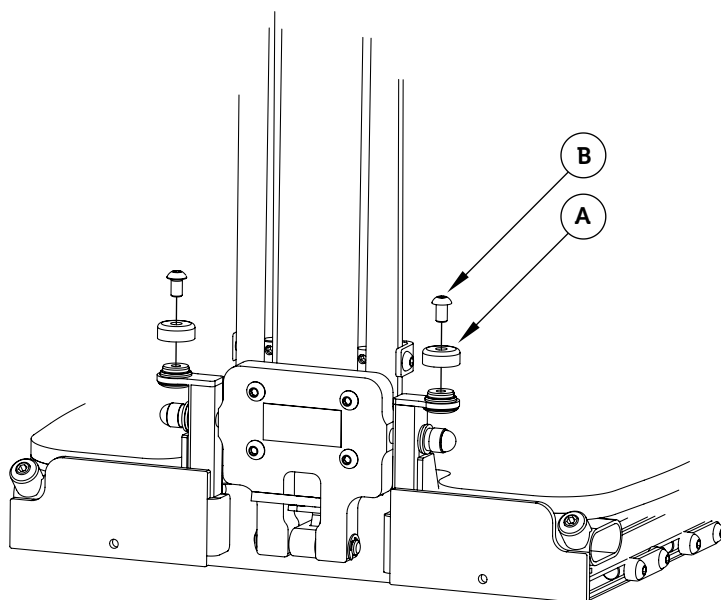

Hoftestøtte

Skrue de to skruer ud som fastholder bendelen og udskift skruerne i det medfølgende sæt, der er et trin (5 mm) længere. Når du monterer de nye skruer placer hoftestøtten mellem benet og bunden som vist på billedet (mellem de to sorte profiler for Delfi), så hoftestøtten hviler mod basen.

Vælg hvilke riller i hoftestøtten du bruger, afhængigt af hvor langt frem / tilbage du vil have støtten, og juster derefter støtten sidelæns, før skruerne strammes ordenligt.

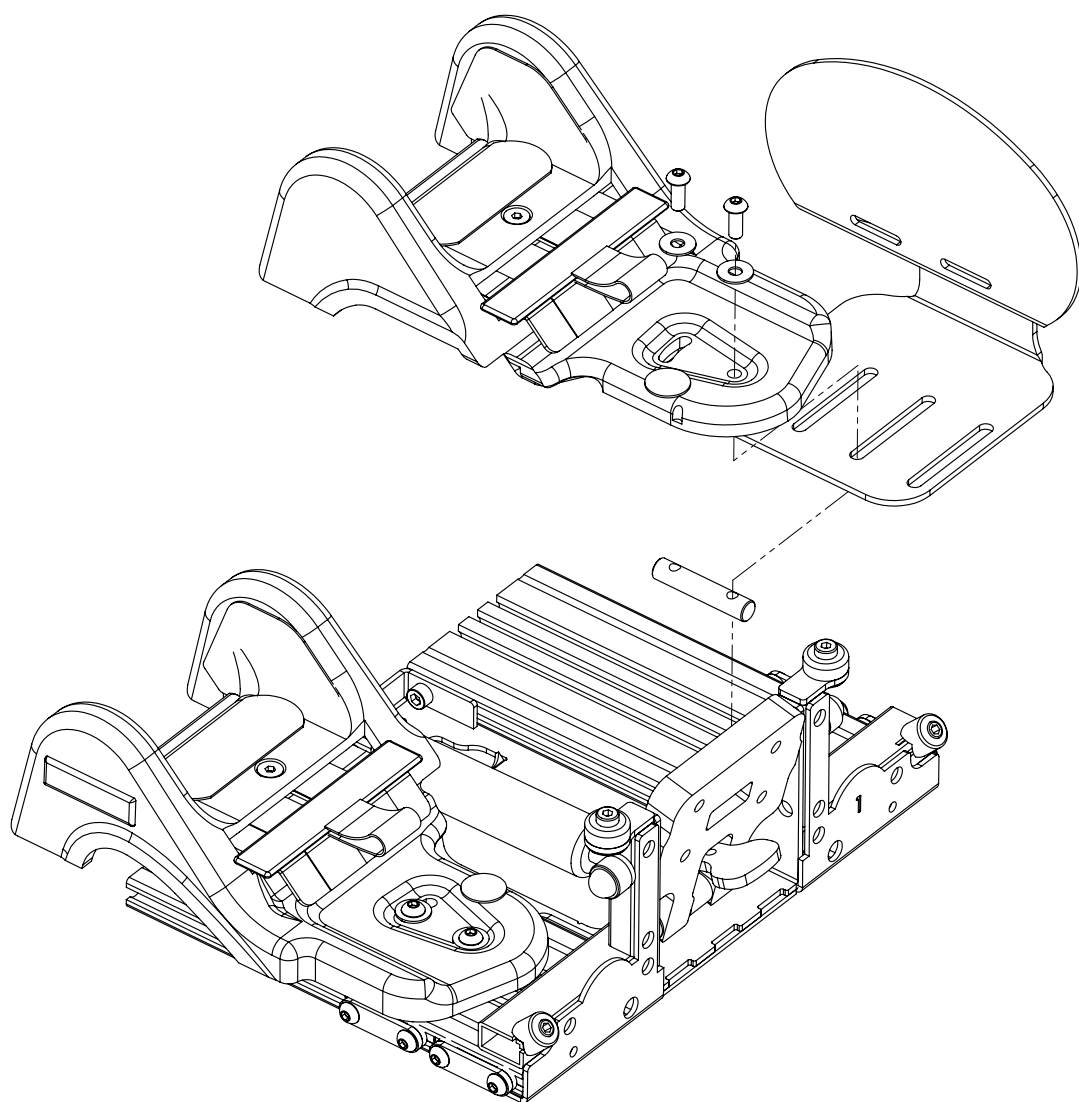

Hovedstøtte

○ = Justeringsnøgle

A - Montering af hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen.

Skub derefter hovedstøttebeslaget ned til den ønskede position i rillerne på rygprofilen.

Spænd skruerne!

B - Monter herefter hovedstøtten i

hovedstøttebeslaget, juster til ønskede leje. Spænd vingeskruen!

C - Justering af hovedstøtten

Løsn justeringsskruerne C lige nok, så hovedstøtten kan justeres manuelt til den ønskede position, og spænd derefter skruerne C.

Hvis hovedstøtten skal være højere oppe, justeres dette ved at løsne vingeskrue B og derefter flytte hovedstøtten til den ønskede højde.

Derefter spændes vingeskrue B.



(B) Højdejusterings-
vingeskrue

(A) Hovedstøtte-
beslag, 4 skruer
med profilmøtrikker.

Sidejusterbart hovedstøttebeslag


Montering af sidejusterbart hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen. Skub derefter det sidejusterbare hovedstøttebeslag ned til den ønskede position i rillerne på rygprofilen. Lås skruerne!

Monter derefter hovedstøtten i nakkestøttebeslaget, juster den til den ønskede position. spænd vingeskruen!

Justering af hovedstøtten

For at justere sidestøtten sidelæns, løsnes skruen A (2 stk.). Hvis der ønskes mere justering, løsnes skruerne B (4 stk.). Spænd skruerne!

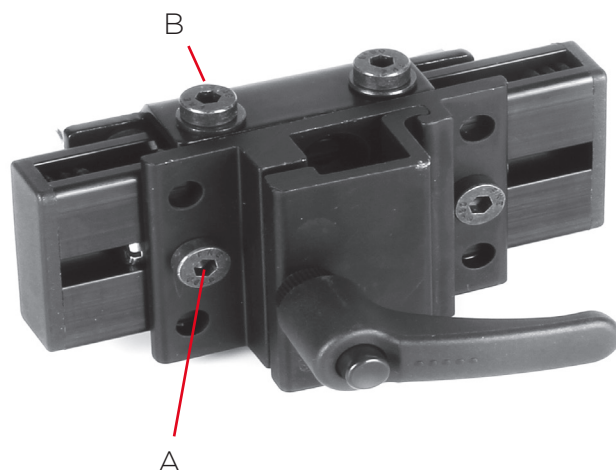

Vipbar hovedstøttebeslag

Montering af vipbar hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen. Skub derefter det vipbare hovedstøttebeslag (A) ned til ønskede position i sporet på rygprofilen. Spænd skruerne!

B - Monter efterfølgende hovedstøtten i hovedstøttebeslaget, juster til ønskede højde. Spænd vingeskruen!

C - Justering af hovedstøtten


Løsn stifen for at kunne vippe nakkestøtten væk. Ved låsning af det vipbare nakkestøttebeslag; sørg for, at stifen låses.



Montering af andre hovedstøttebeslag

Løsn skruerne (A), og fjern hovedstøtten fra nakkestøttebeslaget.
Monter beslaget med den medfølgende skrue (B), og stram skruerne.
Udskift derefter hovedstøtten på hovedstøttebeslaget, og spænd skruerne (A).

Fæste Headpod

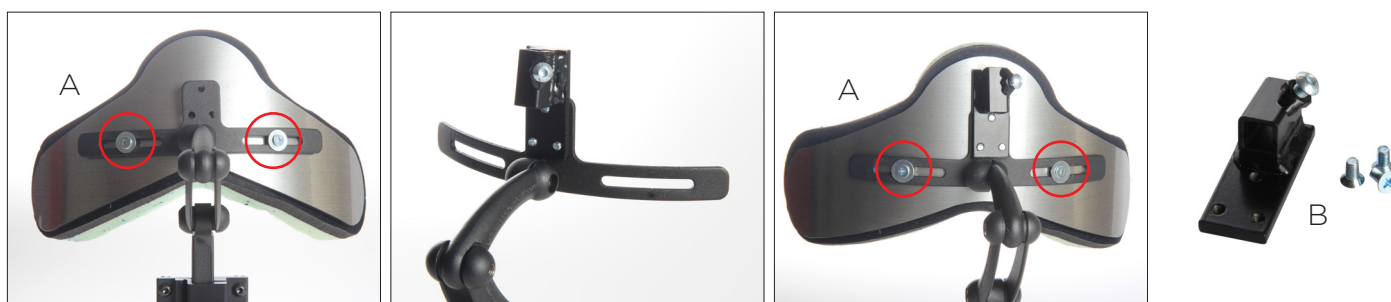

Fæste HeadActive



Fæste Pandebånd



Montering af kropsseler



Øvre fæstebeslag
(A)

Montering af øvre fæstebeslag (A)

Først fjerner du den integrerede værktøjsnøgle, der er placeret øverst på rygprofilen og evt. nakkestøttebeslaget. Skub derefter de øvre monteringsbeslag ned til den ønskede position i rillerne på bagprofilen.

Justering af øvre fæstebeslag


Løsn skruerne, og juster den ønskede højde og vinkel. Juster monteringsbeslagets højde, så trækretningen ender lidt over skulderområdet. Spænd skruerne.

Montering af sele

Træk selens øvre stropper gennem rillen og ind i spændebåndet. Træk derefter de nederste fastgørelsespunkter på selen ind i det nederste beslag. Brug de medfølgende Triglide -spænder E.


Justering af trækretning og bredde

Løsn skruerne på det øverste beslag, og juster højden, og lås derefter den øverste skrue. Juster vinklen, og lås derefter også den nederste skrue.

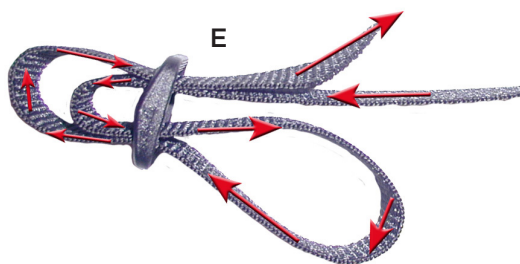

(B) Nedre monteringsbeslag, medfølger som standard.

Alternativt nedre monteringsbeslag
(Tilvalg 285140)

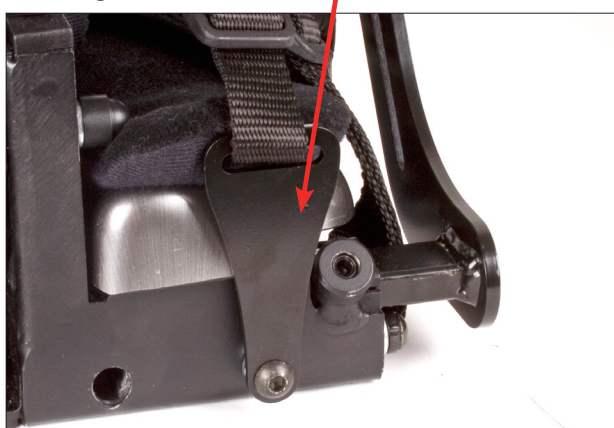

Sørg for, at der er plads nok til nakken. Kontroller også trykket på remmen, og at bæltepuderne er, hvor de skal være.



= Justeringsnøgle





Hoftebælte

Justering af hoftebæltebeslag

For at flytte placeringen af hofteselegebespændingen, løsnes skruerne (A) lidt og justeres til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (A).

Montering af hoftebælte

Når hoftebæltet skal monteres i hofteselegebeslagene, skal du bruge et tri-glide spænde. For montering i henhold til tri-glide-metoden, gør som billedet viser.

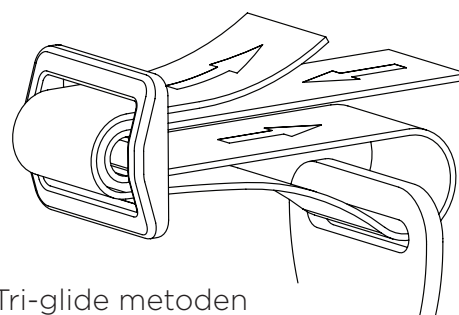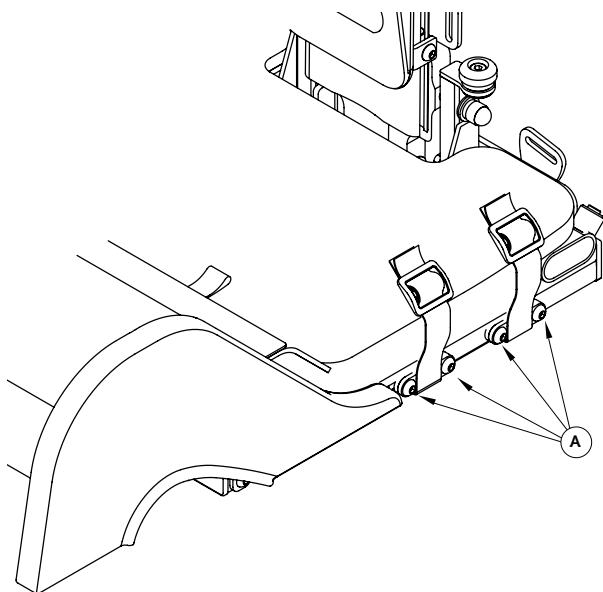



Tri-glide metoden



Sørg for, at remmen ikke er klemmt mellem distancestykket og beslaget.

Bæltebeslag til hoftebælte

Ekstra hofteselegebeslag fås som tilbehør i fire størrelser og flytter hofteselegebeslagpunkterne ud af sædebasen. De forenkler adgang og justering af sæde-/bensektionerne og passer til 4-punkts hofteselege med 25 mm brede stropper. Brug eksisterende skruer og skiver, og udskift det eksisterende glattejern med den ønskede remfitting. Kan monteres opad eller nedad, hvis der anvendes adaptersystem. Ellers er den monteret opad for ikke at forstyrre chassisets sædeplade. For valg af anbefalede størrelser, se kapitlet Tekniske data.

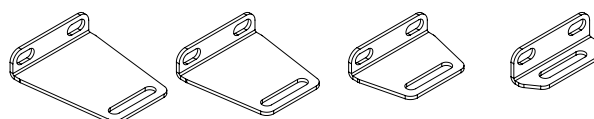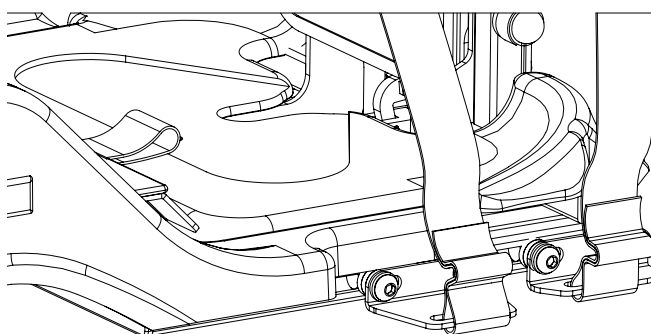


Bæltebeslag tilbydes i fire størrelser

Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding. Montering af ankelbespænding på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.



Kontroller at
polstringen ikke har
foldet sig på
ankelbespændingen.

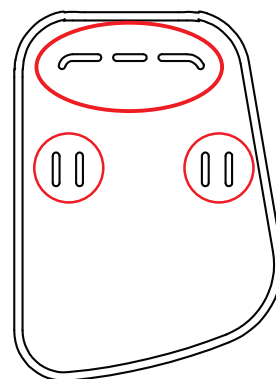

Armlæn

For at montere armlænet skubbes armlænet ind i beslaget på siden af sædet. Lås derefter skruen. Se position A.


Breddejustering: Løsn skruen A, og juster den til den ønskede position. Spænd skruen.

Dybdejustering: Løsn skruerne B og C helt og juster til den ønskede position. Udskift og spænd skruerne.

Rotation: Løsn skruen C, og juster den til den ønskede position. Spænd skruen.

Højdejustering af armlænsplade - D: Løsn knappen og juster den til den ønskede position. Spænd fingerskruen.

Vinkeljustering af armlænsplade - E: Løsn vingeskruen og juster den til den ønskede position. Spænd vingeskruen.

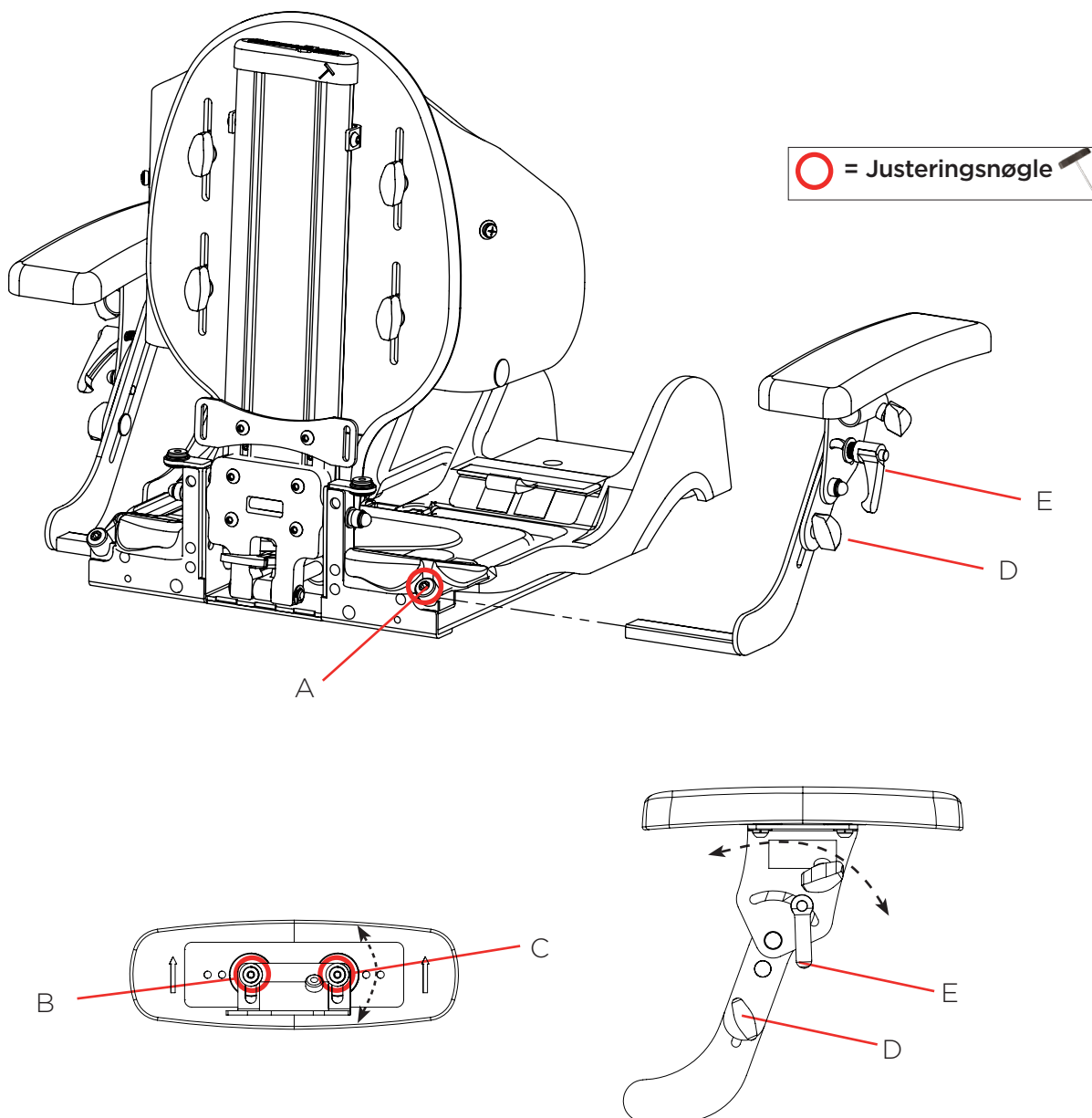

Armlæn fra ryg

Montering af armlæn fra ryg

Inden armlænet monteres bagfra, skal du først fjerne justeringsnøglen og andre detaljer, der måtte være i vejen. Disse detaljer kan f.eks. være nakkestøtte, øvre monteringsbeslag og styr.

Løsn stopskruerne (A), og juster armlænsbeslagene (B) for at få adgang til skruerne (C) på midterbeslaget gennem hullerne. Løsn disse skruer tilstrækkeligt til at kunne indsætte profilskruerne (D) i rillerne på bagprofilen. Justér derefter beslaget til passende højde, og stram skruerne. Juster armlænsbeslagene til passende bredde, og stram stopskruerne. Monter om nødvendigt de dele, du har fjernet, for at kunne montere armlænsbeslaget.

Højdejustering

For at højdejustere armlænet løsner du skruerne (C) lidt og flytter derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (C).

Breddejustering


For at ændre armlænets bredde skal du løsne stopskruerne (A) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne.

Vinkeljustering opad/nedad

For at justere armlænets vinkel skal du løsne vingeskruen (E) og derefter dreje armlænet til den ønskede vinkel. Stram derefter vingeskruen (E).

Vinkeljustering i sideled

Hvis du vil justere pladen sidelæns og i en vinkel, skal du løsne skruerne (F) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (F).

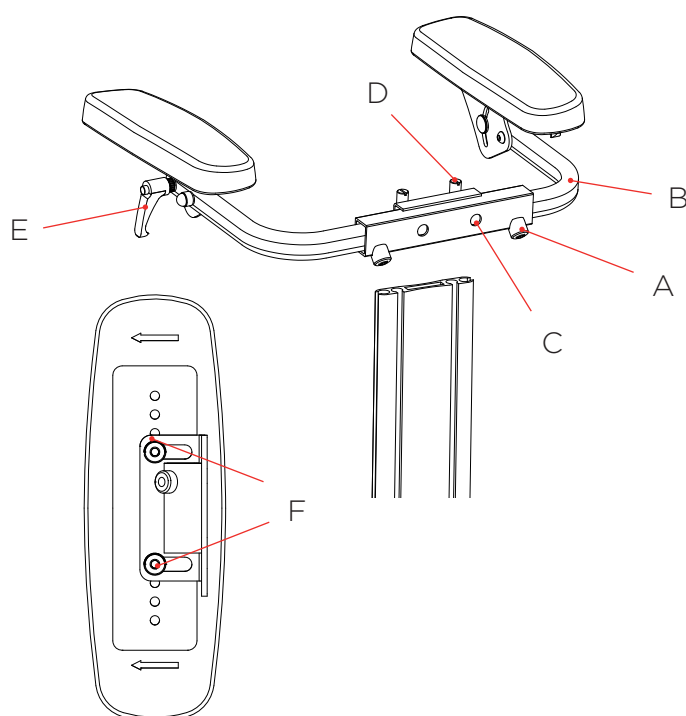

Montering af skålformede armlæn:

Armlænet skal monteres ifølge billedet med de høje sider udad, væk fra kroppen.



Albuestop

Montering af albuestop

Monter albuestoppet ved hjælp af vingeskrue (A), skiven (B), distancestykker og bolten (E). Bemærk, at bolten i kropsstøtten skal udskiftes med den medfølgende længere bolt. For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan kropsstøtten monteres, se side 24-25 i denne brugermanual. Sæt bolten (E) gennem kropsstøtten og rygpladen. Monter herefter distancestykker, albuestopbeslag (C), skive (B) og til sidst vingeskrue (A).

Højdejustering af albuestop


For at højdejustere albuestoppet løsnes vingeskruen (A) og justeres til ønskede højde. Spænd vingeskruen (A) når du opnået ønsket position.

Breddejustering af albuestop

For at breddejustere albuestoppet løsnes skruerne (E) og justeres til ønsket bredde. Spænd vingeskruen (E) når du har opnået ønsket position.

Polstring

Når polstringen skal vaskes, kan du nemt trække den væk fra den øverste armlænsplade ved at strække elastikken på bagsiden af polstringen. For at samle polstringen igen, træk polstringen over albueunderlaget og sørg for, at det er centreret på albueunderlaget.

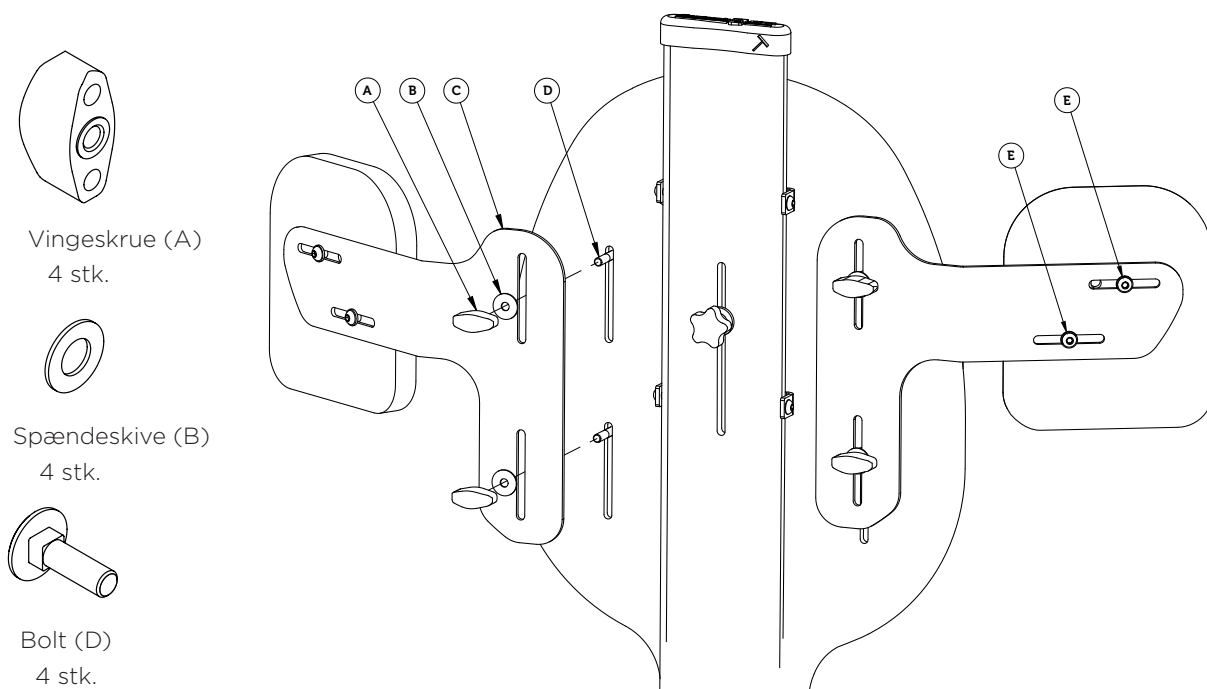


Bolten i kropsstøtten skal byttes ud med medfølgende længere bolt ved montering af albuestoppet.
Ved justering af albuestoppet løsnes kropsstøtten for justering.

Håndbøjle

Montering af håndbøjle

Bøjlen skubbes ind i et rør under armlænspladerne og låses med en vingeskrue (A) på begge sider. Bøjlen kan skubbes ud på brugerens venstre side og roteres væk, mens den højre side stadig er i monteringsrøret.

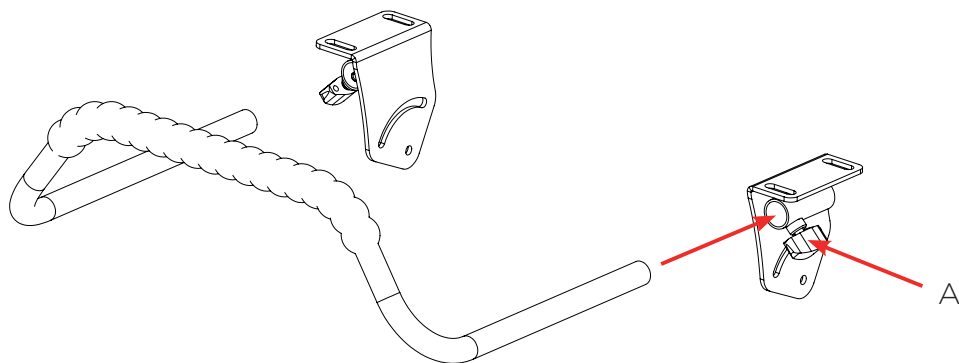


Bord, fast

Montering af bord

Placer bordet på armlænspladerne, og drej derefter bordets låsearm under armlænspladen. Låsearmen skal drejes, indtil den ender inde i kanten af armlænspladen.

Bytning af monteringshul

Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden bruges et af monteringshullerne under armlænets polstring i bordets bagkant. I grundversionen er låsearmen fastgjort til det midterste hul. For at udskifte monteringshuller skal du først løfte polstringen i bagkanten. Mærkningerne på den ydre bagkant af bordet viser kun bordets størrelse.

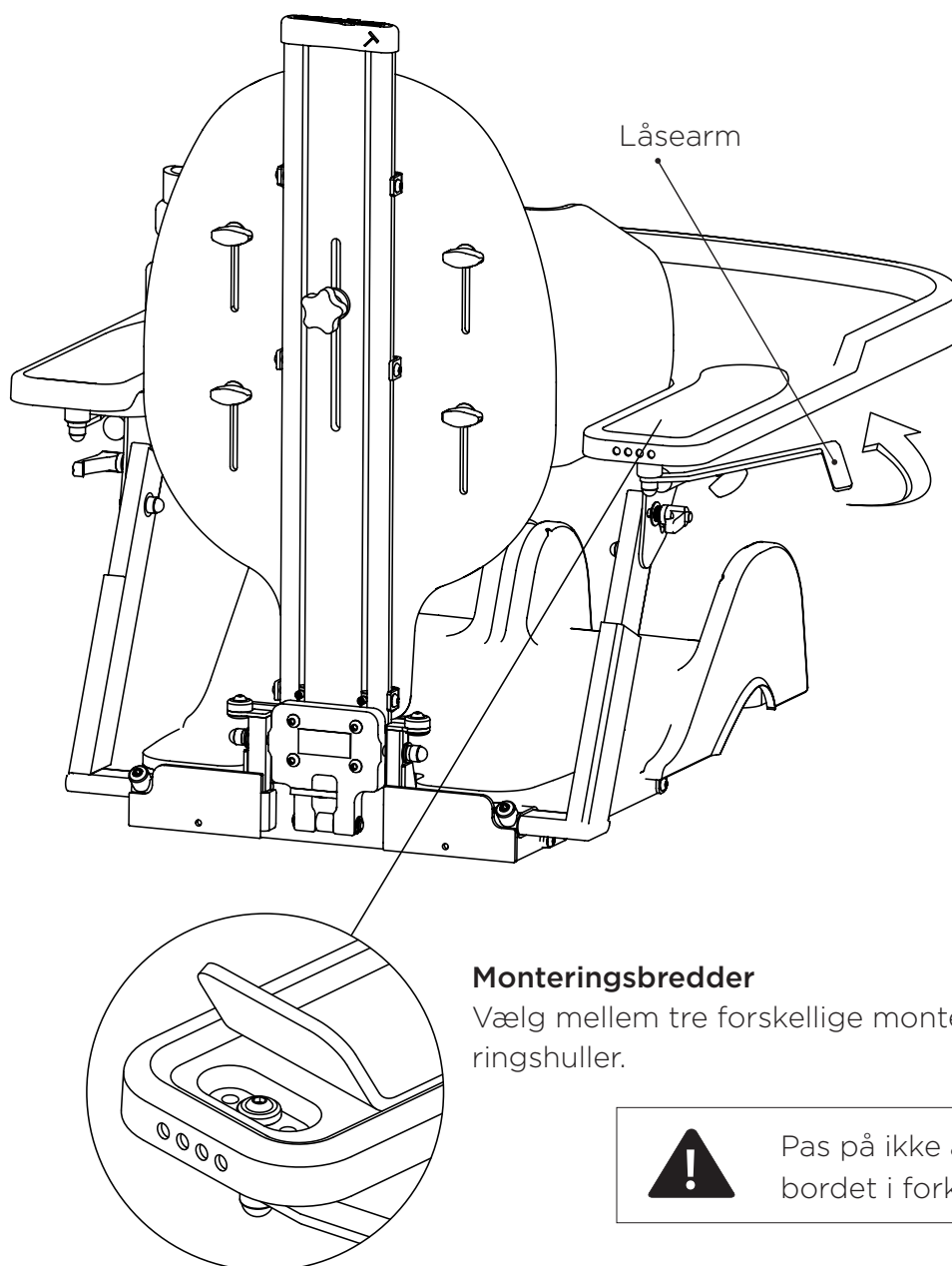

Monteringsbredder

Vælg mellem tre forskellige monteringshuller.



Pas på ikke at løfte
bordet i forkanten.

Bord, vipbar


Montering af bord, vipbar

For at montere det opklappelige bord, skal bordets monteringsrør (A) sættes gennem røret (B) under armlænspladen. Skub bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladerne. Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet.


At anvende den vipbare funktion

For at vippe bordet til siden, løsnes først fingerskruen (C) lidt. Løft derefter bordet lidt og træk det fremad. Løft bordet yderligere og fold det til siden. Når bordet er i sin laveste position, skal du skubbe det tilbage igen og stramme fingerskruen (C).


- 1) Træk bordet ud
- 2) Løft og træk til siden
- 3) Vip bordet helt ned, så bordet hænger, og skub derefter bordet tilbage til den oprindelige position

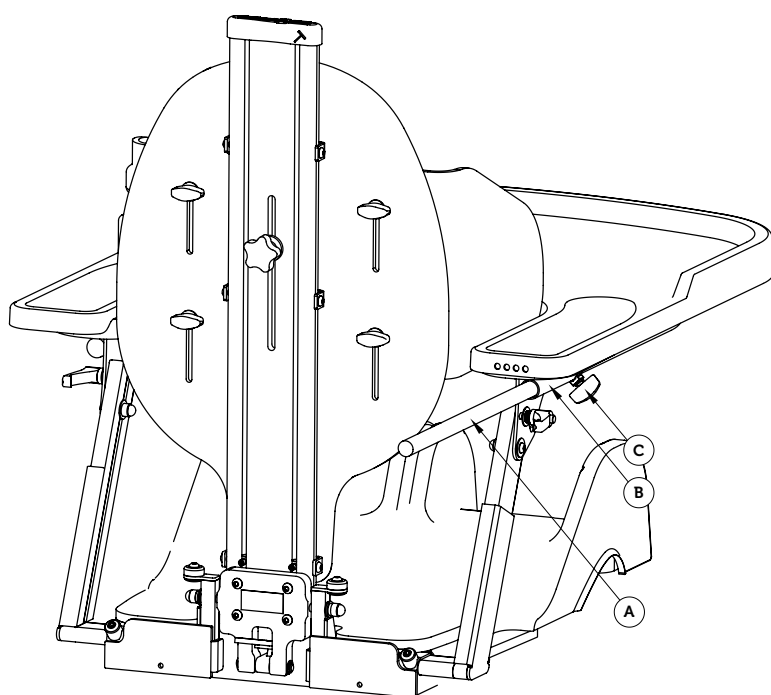


Placering 1

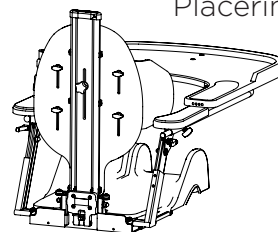

Placering 2

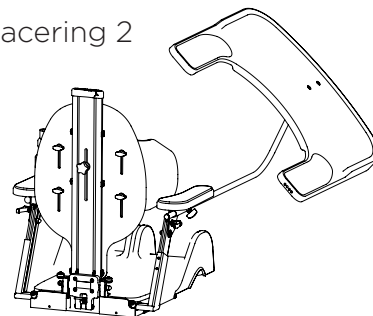

Placering 3

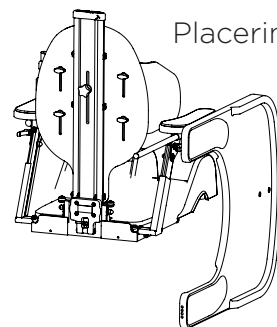

Glem ikke at stramme fingerskruen (C) efter at bordet er vippet. Sørg for at trække bordet langt nok fremad, når du vipper det sidelæns, så brugeren ikke kommer til skade.

Bord, forstærket


Montering af forstærket bord

For at montere det forstærkede bord skal du sætte bordets monteringsrør (A) gennem røret (B) under armlænspladen. Skub derefter bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladerne.

Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet. Drej derefter låsearmen ind, indtil den passer inden i kanten af armlænspladen.

Breddejustering af forstærket bord

I stedet for at justere bredden på armlænen, kan du vælge at justere bredden på bordets monteringsbeslag, så det passer med monteringsrørene i armlænsbeslagene. For at justere bredden på bordet, løsnes skruerne (D) lidt og justeres til ønsket position. Spænd derefter skruerne (D).

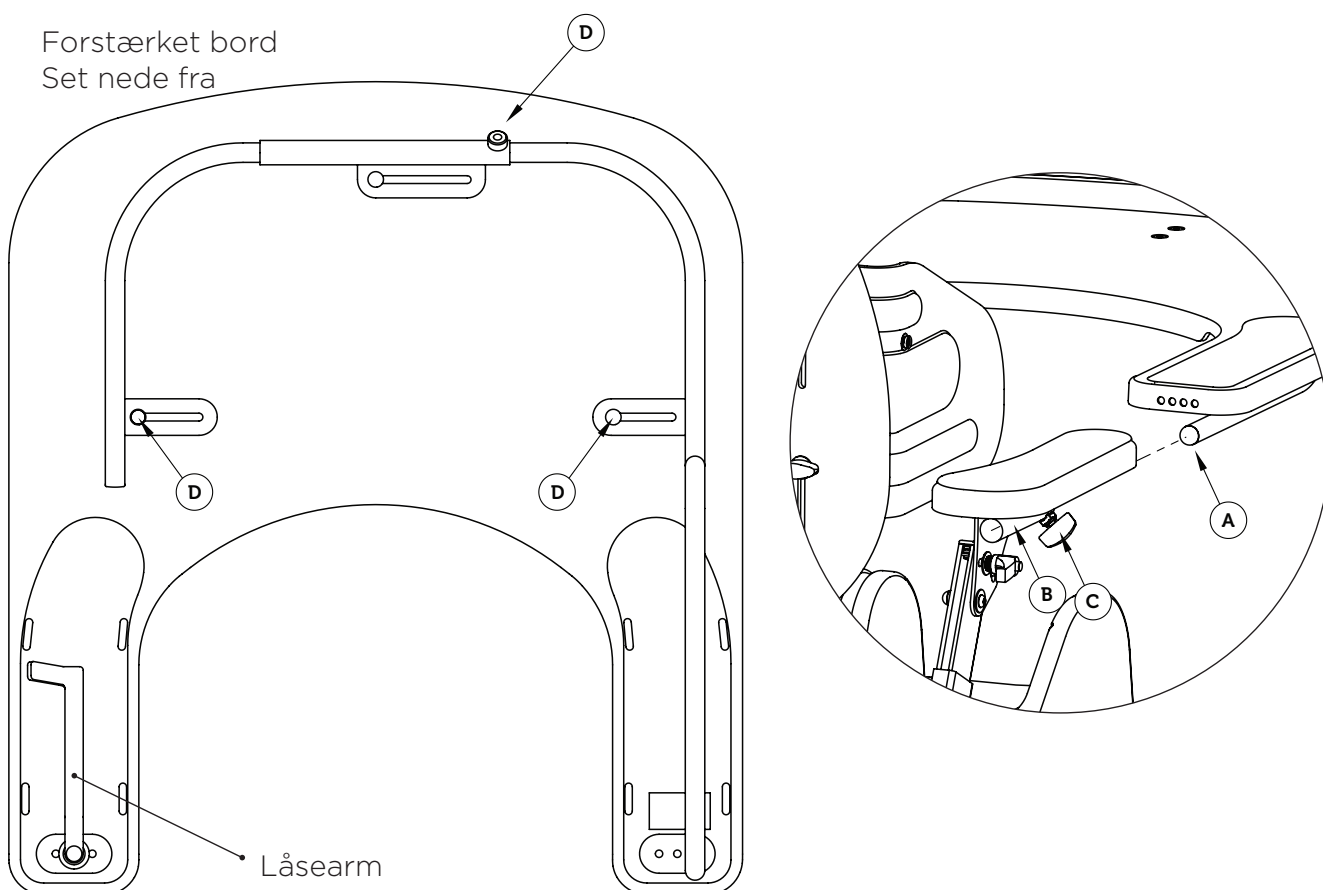


Hvis ikke en breddejustering i bordets beslag er tilstrækkelig, skal der muligvis foretages en justering af armlænets bredde.

Støttebord

Montering af bordet

Placer bordet på armlænspladerne, og drej derefter bordets låsearm (A) nedenunder armlænspladen (B).

Låsearmene skal drejes, indtil de ender inde i kanten af armlænspladen.

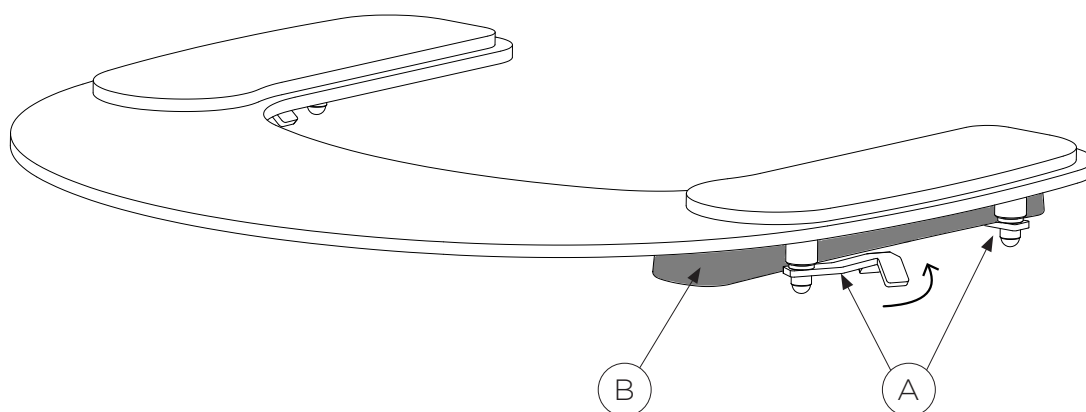

Fodstøtte

Montering af fodstøtte - A

Monter fodstøtten i beslaget (firkantet rør). Lås fodstøtten med låseskruen.

Justering af vinkel af knæled - B

Løsn vingeskruen og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd vingeskruen, når den ønskede vinkel er nået.

Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå ind i hinanden, så det låser. Spænd skruen!

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsn skruen, og juster derefter til den ønskede vinkel. Lås skruen, når den ønskede vinkel er nået.

Højdejustering af fodplade - D

Løsn knappen og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd fingerskruen, når den ønskede højde er nået.


(A) Montering, fodstøtte

(B) Juster vingeskrue til knæled


○ = Justeringsnøgle 

(C) Skruen til vinkeljustering

(D) Vingeskrue til højdejustering

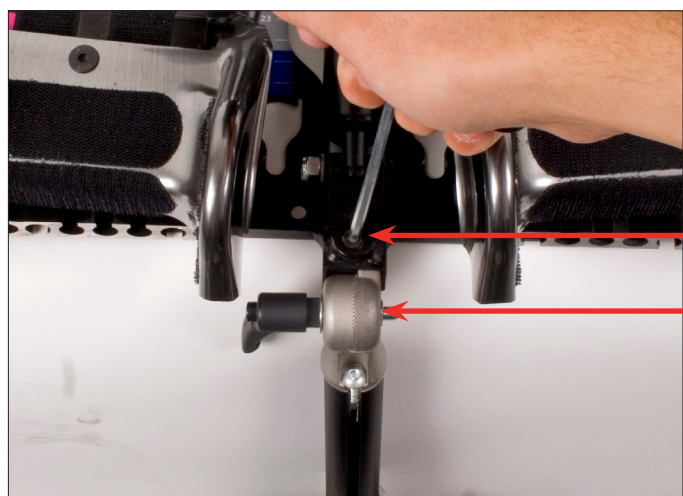

Delt fodstøtte

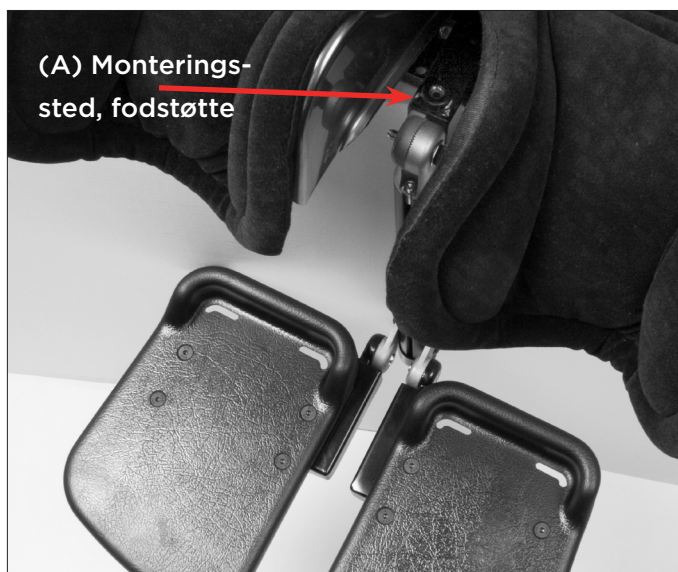

Montering af fodstøtte - A

Monter fodstøtten i beslaget (firkantet rør). Lås fodstøtten med låseskruen.




Justering af vinkel af knæled - B

Løsn knappen og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd vingeskruen, når den ønskede vinkel er nået.

Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå ind i hinanden, så det låser. Spænd skruen!

Højdejustering af fodplade - C

Løsn skruen (C + D), og juster derefter til den ønskede højde. Lås skruen, når den ønskede højde er nået.

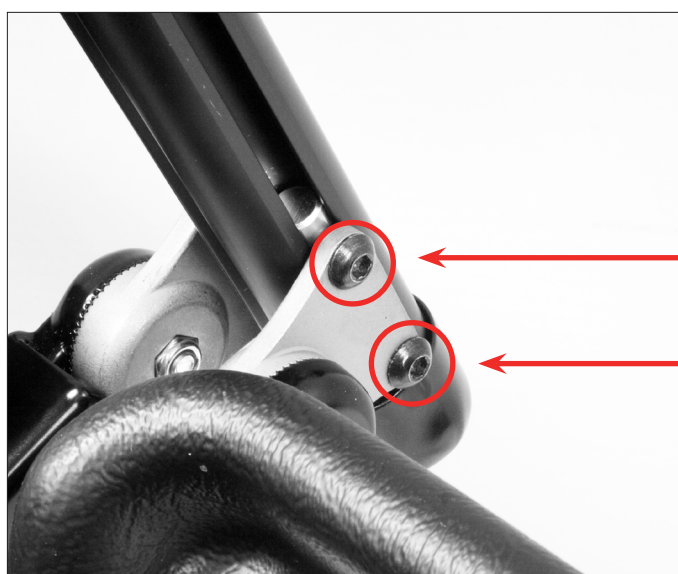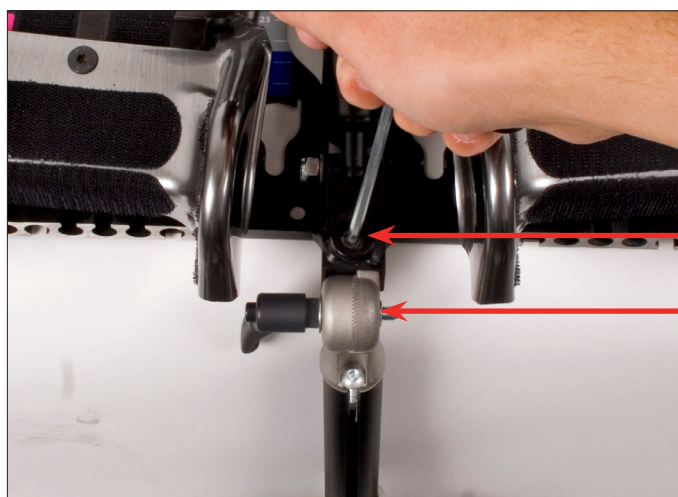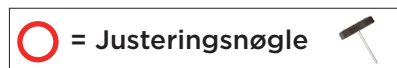

Fodstøtte, hel justerbar

Justering af vinkel af knæled - A

Løsn vingeskrue og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd vingeskruen når ønskede vinkel er opnået.

Højdejustering af fodplade - B



Løsn vingeskrue og juster derefter til den ønskede højde. Spænd vingeskruen, når den ønskede højde er nået.

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsn skruen, og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd skruen, når den ønskede vinkel er nået.

Justering af fodplade - D

Fodpladerne kan justeres både i bredde og dybde! Løsn skruerne, og juster derefter til den ønskede position. Spænd skruerne, når den ønskede vinkel er nået.

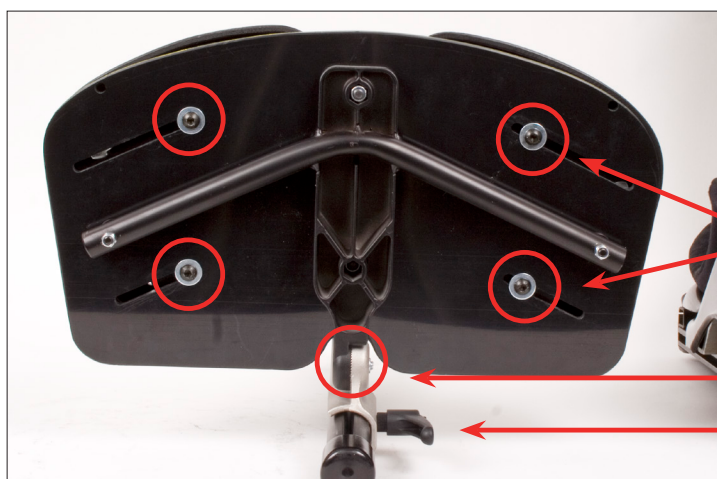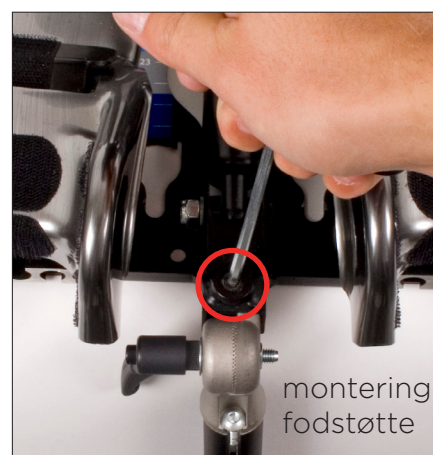

○ = Justeringsnøgle

(D) Skruer til fodpladen

(C) Skrue til fodstøtte vinkel

(B) Justering/vingeskrue til
fodpladens højde

Fodstøtte, delt justerbar

Justering af vinkel af knæled - A

Løsn vingeskruen og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd vingeskruen, når den ønskede vinkel er nået.

Højdejustering af fodplade - B


Løsn vingeskruen og juster derefter til den ønskede højde. Spænd vingeskruen når den ønskede højde er opnået.

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsn skruen, og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd skruen, når den ønskede vinkel er nået.

Justering af fodplade - D

Fodpladerne kan justeres både i bredde og dybde! Løsn skruerne, og juster derefter til den ønskede position. Spænd skruerne, når den ønskede vinkel er nået.

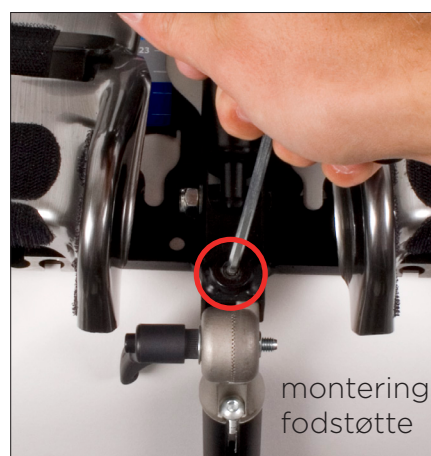

(C) Justeringsskruer til fodstøttevinkel

(D) Justeringsskruer til fodpladen

Fodstøtte, opklappelig

Montering af fodstøtte - A

Montér fodstøtten ved at skubbe den ind i fodstøttebeslaget (firkantet rør). Spænd skruen forsvarligt efter montering.

Justering af vinkel ved knæled - B


- Løsn vingeskruen ifølge position B
- Juster til ønskede vinkel
- Spænd vingeskruen

Højdejustering af fodplade - C

- Løsn vingeskruen ifølge position C
- Juster til ønskede højde
- Spænd skruerne.

Justering af vinkel ved fodled - D

- Løsn skruen. Juster efterfølgende til ønskede vinkel.
- Spænd skruen når ønskede vinkel er opnået.

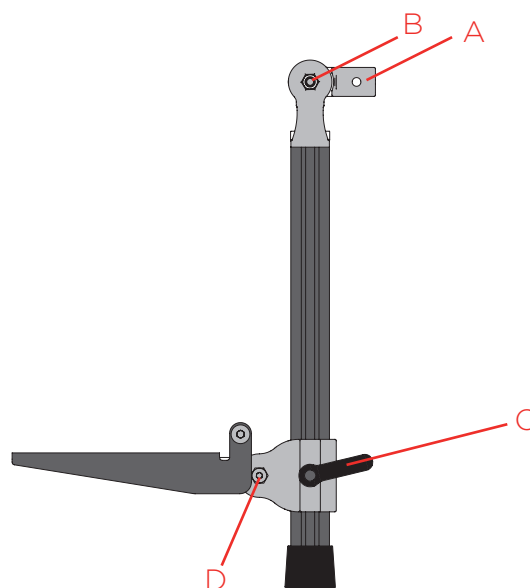

○ = Justeringsnøgle

Fodstøtte, fjedrende fodstøtteadapter

Fjedrende fodstøtte


Zitzi Delfi Pro kan udstyres med en fjedrende fodstøtte for at bryde eventuel spasticitet og skabe en dynamisk siddestilling.

Højdejustering

Løsn skrue, se position A.

Vinkeljustering på fodstøtte

Løsn skrue, se position B og vinkel fodstøtten til ønskede vinkel.

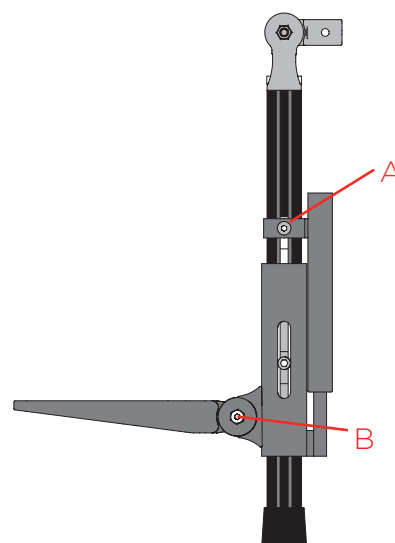

For at flexfunktionen skal fungere optimalt skal fodstøttestangen pege nedad.

Fodkasse enkelstang


Montering af fodkasse med enkelstang ved efterbestilling

Udskift den nuværende fodplade med den medfølgende. Fordi fodkassen er designet på en sådan måde, at den passer til både enkelstang og dobbeltstang, skal fodpladen bores afhængigt af den type fodplade, du har.

For at montere fodstøtten skal du starte med at skyde profilmøtrikken (A) på fodstøtten (B) ind i fodstøttestangen (C). Justér derefter fodstøtten (D) til den ønskede højde, og stram håndtagsknappen (E). Juster den ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres gennem rillen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring, og kontroller, at alle skruer er strammet korrekt.

Montering af fodkasse med enkelstang ved bestilling med fodstøtte

For at montere fodstøtten skal du starte med at skyde profilmøtrikken (A) på fodstøtten (B) ind i fodstøttestangen (C). Justér derefter fodstøtten (D) til den ønskede højde, og stram vingeskruen (E). Juster den ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres gennem rillen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring, og kontroller, at alle skruer er strammet korrekt.

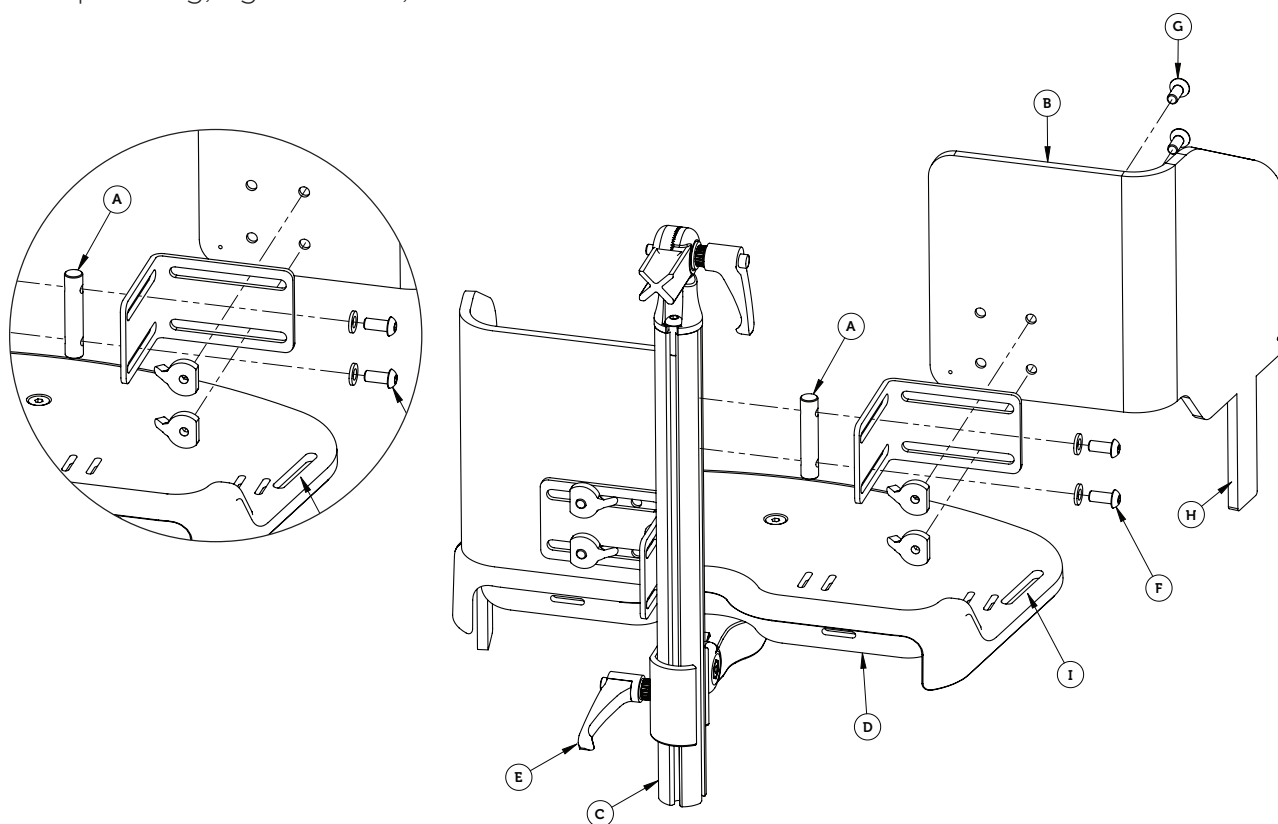



Plaststangen (H) kan efter justering til den ønskede højde afskæres eller varmes ind under fodstøttepladen efter dine egne ønsker. Under fodpladen er der også markeringer for borer.

Fra enkelstang til dobbeltstang


Fra enkelstang til dobbeltstang og vice versa

Som standard kommer fodkassen i størrelserne 2, 3 og 4 formonteret til dobbeltstang og størrelse 1 er formonteret til enkeltstang.

For at skifte mellem de forskellige varianter, drej vinkelbeslaget (A) 180 grader og skift derefter siden for profilmøtrikken (B).

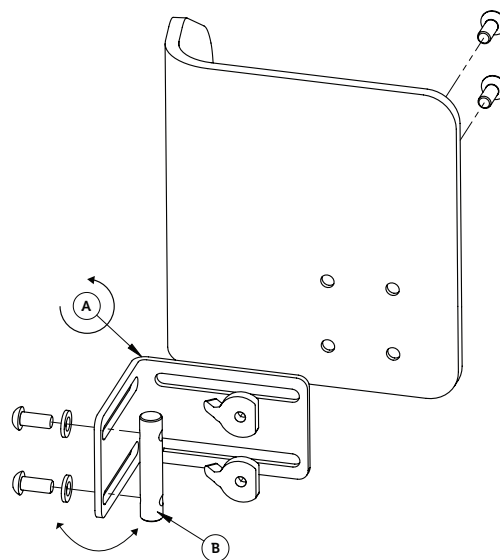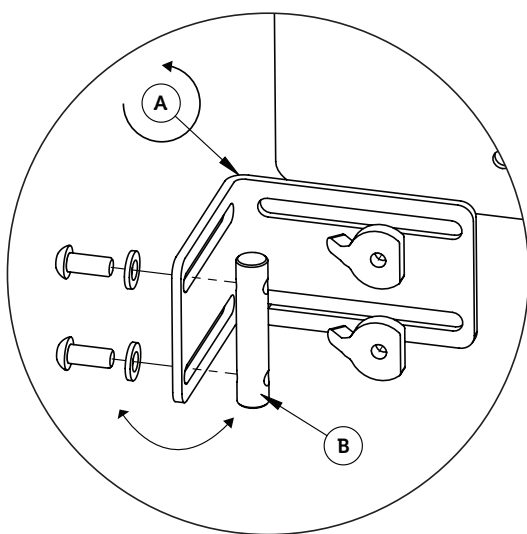


Tekniske data

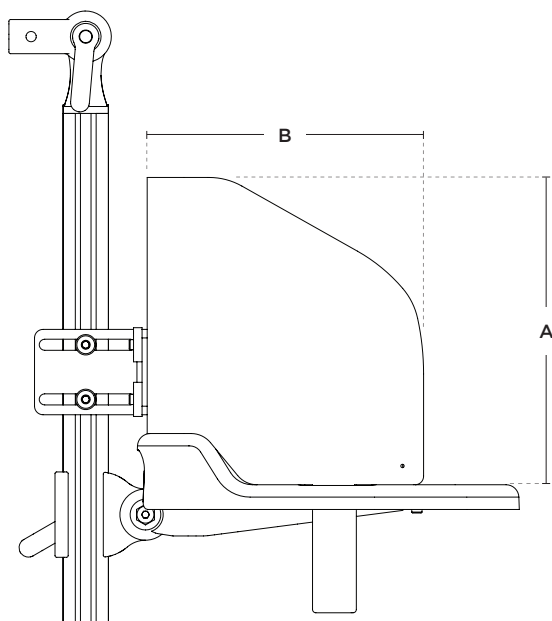

Til hel / delt fodplade	størrelse	højde (A)	dybde (B)
990041 / 990046	1	140 mm	130 mm
990042 / 990047	2	170 mm	160 mm
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm


Lægstøtte

Løsn skruerne A for at justere til ønskede højde og dybde. Spænd skruerne når ønskede indstilling er opnået. Løsn skruerne B for at justere bredden på lægstøttepladerne. Spænd skruerne, når ønskede indstilling er opnået.

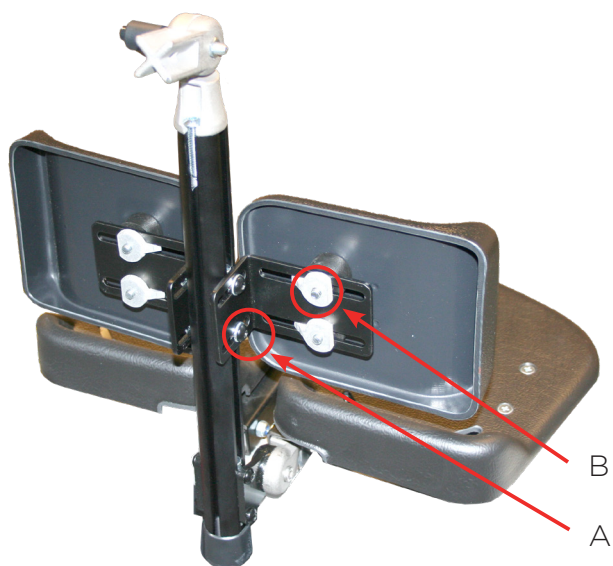

Legebøjle

Beslaget til legebøjlen skal monteres på rygprofilen. Udskift det eksisterende endestykke øverst på rygprofilen med det der følger med legebøjlen. (Endestykket er forboret så det letter monteringen). Skub beslaget til legebøjlen ned i rygprofilen B. Lås herefter legebøjle's beslags position ved at anvende skrue C. Når beslaget er på plads og i låst position, skubber du legebøjlen ned i position D.

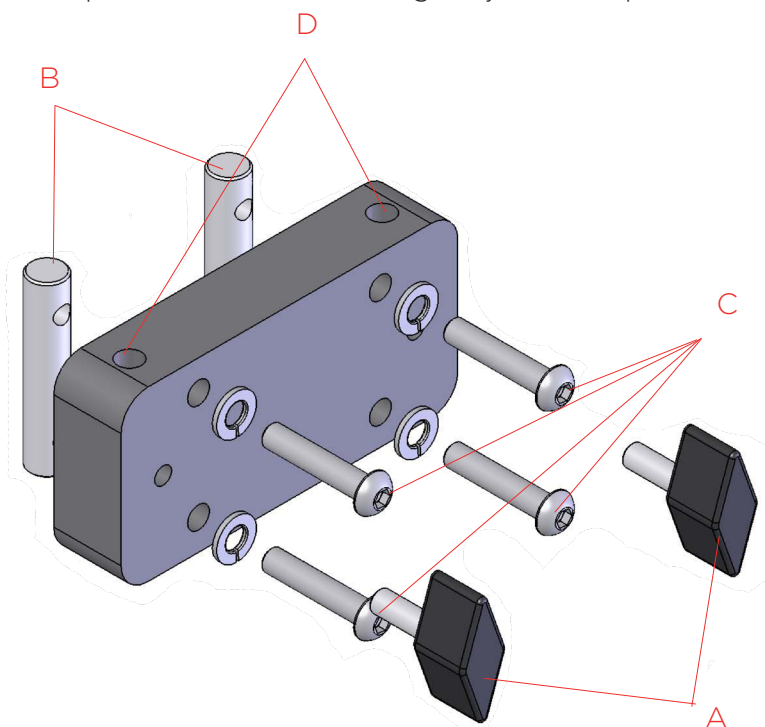


Montering af hovedstøtte ved anvendelse af legebøjle

Montering af hovedstøtte ved anvendelse af legebøjle. Hvis der også skal monteres hovedstøtte, monteres hovedstøttebeslaget på fæstet til legebøjlen. Fastgør med lange skruer og fjederskiver.



Kørebøjle


- 1) Tag t-nøglen fra rygprofilen af
- 2) Sæt profilmøtrikkerne (A) i sporene på rygprofilen og før kørebøjlen til ønskede position.
- 3) Spænd skruerne

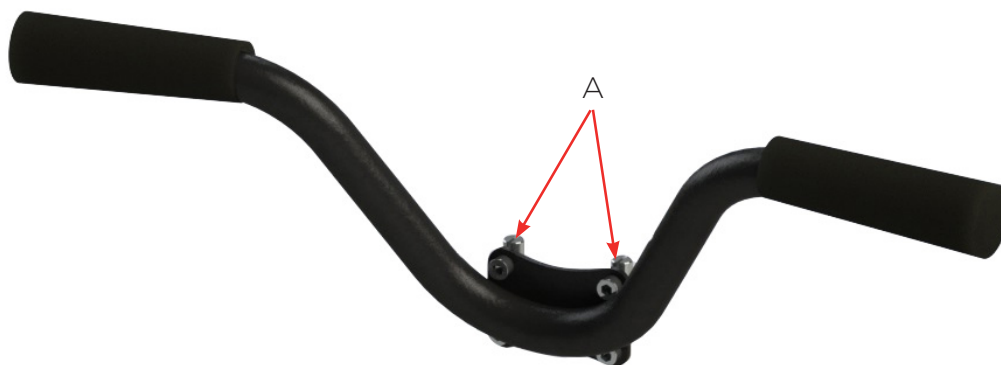

Kaleche


Montering af kaleche

Begynd med at afmontere eventuel hovedstøtte. Løsn herefter skruerne (A) og før profilmøtrikkerne ind i (B) profilen. Juster til rette højde og spænd skruerne. Kalechen kan afmonteres fra fæstet ved at løsne italienergrebet (C) og spænde kalechen i siden.

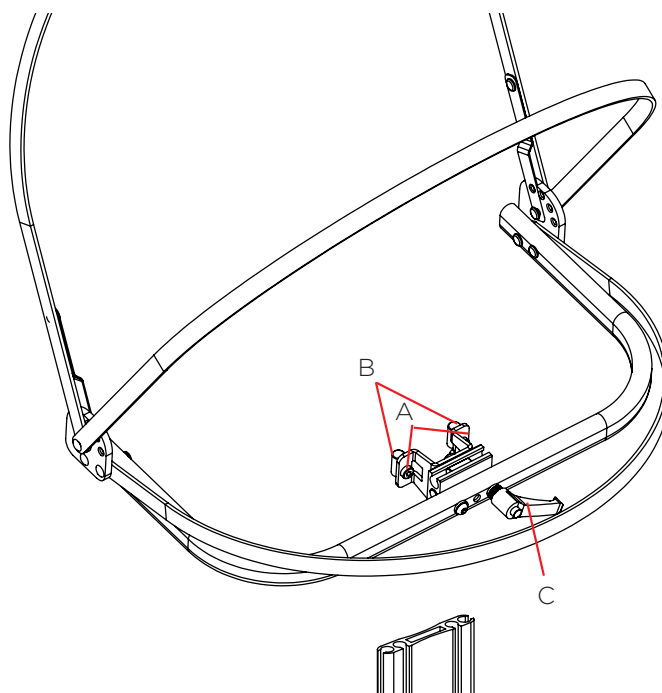

Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe

- A) Fjern rygpolstringen
- B) Fastgør lændestøtten på rygpolstringen (indenfor det markerede område) ved hjælp af medfølgende velcro
- C) Sæt rygpolstringen på plads.

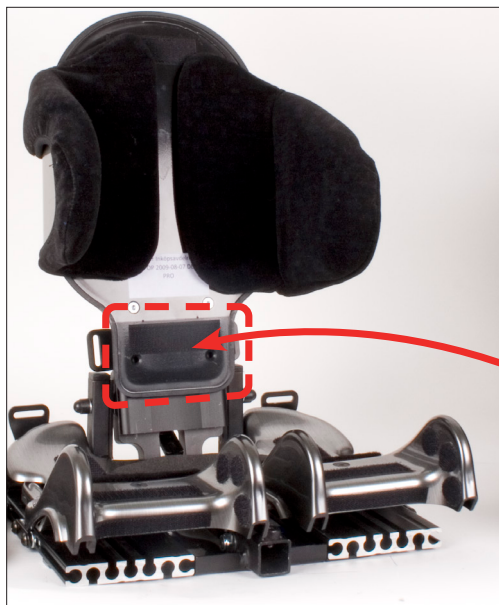

Lændestøttekile

Varmepakke

Varmepakken holder kropstemperaturen oppe og forhindrer afkøling ved koldt vejr. Når kropstemperaturen opnåes slår varmekpakken fra for at spare energi. Hvis temperaturen falder aktiveres systemet igen og varmer på ny op til kropstemperatur. Varmepuderne fastgøres på betrækket med velcro.



- A) Sædedelspude
- B) Rygpude
- C) Batteri og kontroldåse

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Transport i køretøj

Ved transport i bil, hvor Delfi Pro er monteret på kørestolsstel skal anvisninger fra producenten af kørestolsstellet følges.

Sikkerhedsbånd

En rem leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra sædets rygprofil og omkring kørestolsstellets kørebøjle. Sørg for, at denne rem er stabil og stram, inden kørsel.

Crashtestet og godkendt

Delfi Pro er crashtestet og godkendt i henhold til ISO 16840-4. Denne standard gør det muligt at montere siddesystemet på alle kørestolsstel, der er godkendt i henhold til ISO 7176-19, samtidig med at godkendelsen for kombinationen bevarer.



Crashtest godkendelse gælder for belastningsvægt op til 75 kg.

Vedligeholdelses- og vaskeanvisninger

Dette produkt er et medicinsk udstyr beregnet til flergangsbrug. For at derfor skal hjælpemidlet fungere sikkert og sikkert og nå den anslåede levetid vigtigt med tilsyn, vedligeholdelse og rengøring. Ved udskiftning af dele ifm vedligeholdelse og service, skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic Sitt.

Definitioner: Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

- **Afhjælpende vedligeholdelse** refererer til foranstaltninger til reparation af et ødelagt produkt, en akut vedligeholdelse, svær at planlægge i tide og ofte afhængig af produktet brug.
- **Service** henviser til et enklere eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter for eksempel kontrol af skruer og fastgørelseselementer, bevægelige dele, generel slitage etc. samt mindre reparationer.
- **Forebyggende vedligeholdelse** refererer til handlinger forårsaget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne form for vedligeholdelse kan ses som tiltag af engangskaraktér, der er planlagt i forhold til tid, art og omfang. For det produkt ingen forebyggende vedligeholdelse er nødvendig i produktets forventede levetid.

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt knapper.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller produktets bevægelige dele, eksempelvis rygvinkling med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontroller bæltet og seler i forhold til slitage, funktion samt fastgørelse.

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Betræk og bæltter / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For yderligere information, se aktuelle brugermanualer for hvert enkelt positioneringshjælpemiddel.

Service og afhjælpende vedligeholdelse

For at fungere trygt og sikkert skal der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af ødelagte, slidte eller revnede dele, brug kun originale dele fra Anatomic Sitt, så produktet bevarer sin CE-mærkning. Reservedele kan bestilles efter separat reservedelsliste/splittegning for det pågældende produkt.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift. For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller sikkerhedsbåndet på ryggen, at det er ubeskadiget og låses korrekt.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling. Både i forhold til justeringsmuligheder, mobilitet og låsning.
- Kontroller, at gaspatronen låses i den valgte position.
- Kontroller om nødvendigt slid på alle dele. Sørg for, at de låses/spændes ordentligt.
- Kontroller bæltter og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges.

For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bælder / seler. Polstring er en forbrugsartikel og bør udskiftes ved slid. Betræk og bælder / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For mere information, se aktuelle brugermanualer for hvert positioneringshjælpemiddel.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklave ved 60 ° C i maksimalt 10 minutter.

Fjern betræk og bælder / seler ved rengøring af siddesystemet i håndvasken.

Tørring

Siddesystemet kan tørres i kabinet ved max 60°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved renovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE -mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller alle produktfunktioner. Eller slidte dele, der skal udskiftes.

Sæde/rygdel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- ☐ Kontroller at rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronen låser i enhver placering.
- ☐ Kontroller polstring og udskrift efter behov.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Hovedstøtte:

- ☐ Kontroller betrækket og udskift efter behov.
- ☐ Kontroller at hovedstøtteledene låser.
- ☐ Kontroller fæstet på hovedstøtten, at det fungerer.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlænets justeringer. At det kan justeres i højde, dybde og bredde.
- ☐ Kontroller armlænsbeslagene, at de låser, som de skal.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Sikkerhedsrem:

- ☐ Kontroller sikkerhedsremmen på ryggen, at det ikke har skader og at det låser.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Gaspatroner sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Tekniske data

opdateret med bæltbeslag s. 11-12

Montering och Justeringsanvisninger

Hoftestøtte

Text om Sharky bort s. 14

Overarmstøtte

Distanse borttaget s. 36

Revisionsliste

rev. 2.0 - 2021-03-09
rev. 2.1 - 2021-05-26
rev. 2.2 - 2021-12-21
rev. 2.3 - 2023-02-20
rev. 2.4 - 2023-08-15
rev. 2.5 - 2023-09-13
rev. 2.6 - 2024-02-12

SE**Anatomic Sitt AB (producent)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com**DK****Anatomic Sitt A/S (forhandler)**

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk**www.anatomicsitt.dk****Følg os på**