



Zitzi  
Delfi Pro

# Bruksanvisning

Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,  
service och underhåll samt rekonditionering

---



Denna bruksanvisningen avser sittsystem Zitzi Delfi Pro med tillbehör. För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens beställningsunderlag.

## Innehållsförteckning

<b>Tillverkare .....</b>	<b>3</b>	Montering av kompletterande fästen på huvudstödsfäste .....	30
<b>Specialanpassning .....</b>	<b>3</b>	Montering av bålselar .....	31
<b>Introduktion .....</b>	<b>4</b>	Höftbälte .....	32
Inledning .....	4	Vrifthållare .....	33
Korrespondens - märkning .....	4	Armstöd .....	34
CE-märkning - klassificering .....	4	Armstöd från rygg .....	35
Försäkran om överrensstämmelse .....	4	Överarmstöd .....	36
<b>Avsedda ändamål .....</b>	<b>4</b>	Handbåge .....	37
<b>Symbolförteckning .....</b>	<b>5</b>	Bord, fast .....	38
<b>Produktmärkning .....</b>	<b>6</b>	Bord, vikbart .....	39
<b>Säkerhetsföreskrifter .....</b>	<b>7</b>	Bord, förstärkt .....	40
Utbildning och kvalifikationer .....	7	Stödbord .....	41
Varningar/Försiktighetsåtgärder .....	8	Bord, konstläder .....	41
Kontroll före användning .....	9	Fotstöd .....	42
Begränsningar .....	9	Delat fotstöd .....	43
Kvarvarande risker .....	10	Fotstöd, hel justerbar .....	44
Kombinationer .....	10	Fotstöd, delad justerbar .....	45
Avvikelser/tillbud .....	10	Fotstöd, uppfällt .....	46
<b>Teknisk data/Prestanda .....</b>	<b>11</b>	Fotstöd, fjädrande fotstödsadapter .....	46
<b>Anpassning och specialanpassning .....</b>	<b>13</b>	Fotlåda enkelstag .....	47
<b>Monterings- och justeringsanvisningar ....</b>	<b>14</b>	Från enkelstag till dubbelstag .....	48
Montering på underrede .....	15	Vadstöd .....	49
Adaptersystem .....	16	Lekbåge .....	50
Planskiva .....	17	Körbåge .....	51
Justering av sittdel .....	17	Sufflet .....	51
Montering/demontering av rygg .....	20	Svankstöd/Svankstöd med pump .....	52
Användning av Active rygg .....	20	Värmepaket .....	52
Justering av ryggvinkel .....	21	<b>Sammanfattning och efterkontroll .....</b>	<b>53</b>
Justering av rygghöjd .....	22	<b>Transport i fordon .....</b>	<b>54</b>
Lås- och ställbar flexfunktion (MLD) .....	22	<b>Underhåll och skötselanvisningar .....</b>	<b>55</b>
Förstärkt rygg .....	23	Kontroll före användning .....	55
Justerbara bålstöd .....	24	Service och avhjälpande underhåll .....	56
Vikbart bålstöd .....	25	Rekonditionering .....	57
Bäckenstöd .....	26	<b>Avfallshantering .....</b>	<b>60</b>
Höftstöd .....	27	<b>Garanti och retur .....</b>	<b>61</b>
Huvudstöd .....	28	<b>Revision .....</b>	<b>62</b>
Sidojusterbart huvudstödsfäste .....	28		
Vikbart huvudstödsfäste .....	29		

# Tillverkare

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB

<b>Postadress</b>	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
<b>Besöksadress</b>	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
<b>Telefon</b>	011-161800
<b>E-post</b>	info@anatomicsitt.com
<b>Web</b>	anatomicsitt.com
<b>Instruktionsfilmer</b>	youtube.com/anatomicsitt
<b>Följ oss på</b>	facebook.com/anatomicsitt

**Eudamed-registreringsnummer/SRN:** SE-MF-000002240

---

## Specialanpassning



Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen upphör att gälla vid specialanpassad produkt.



# Introduktion

## **Inledning**

Grattis till valet av hjälpmedel. Vi hoppas du kommer få stor användning av vår produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo på ett säkert sätt är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår hemsida: [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). Revision finns på framsidan tillsammans med datumet.

## **Korrespondens - märkning**

På produktetiketten finns produktens artikelnummer samt serienummer (huvudprodukt) eller LOT-nummer (tillbehör). Dessa nummer ska anges vid korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna. Du hittar serienumret på sittplattans bakre del.

## **CE-märkning - klassificering**

Hjälpmedlet med dess tillbehör är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I enligt klassificeringsreglerna i annex VIII (EU) 2017/745.














## **Försäkran om överrensstämmelse**

Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Se aktuell EU-försäkran om överrensstämmelse för produktvarianter och tillbehör, [www.anatomicsitt.com/dokument](http://www.anatomicsitt.com/dokument)

# Avsedda ändamål

Zitzi Delfi är ett modulärt dynamiskt sittsystem för barn och ungdomar med sittproblematik där sitt- och ryggdelsbasen har flera inställningsmöjligheter och kan förses med olika tillbehör för att uppnå en specifik sittställning. Sittsystemet är avsett att användas tillsammans med underrede. Zitzi Delfi är en flergångsprodukt.

# Symbolförteckning

	<p>Denna symbol återfinns i bruksanvisningen och uppmärksammar läsaren om t.ex. viktig säkerhetsinformation m.m.</p>		<p>Anger tillverkningens satsnummer så att sats/batch kan identifieras.</p>
	<p>Denna symbol indikerar eventuell klämrisk.</p>		<p>Anger att produkten är en medicinteknisk produkt.</p>
	<p>Anvisningar och tips som underlättar vid användning av produkten.</p>		<p>Anger tillverkarens referensnummer/artikelnnummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.</p>
 <p data-bbox="108 1070 284 1093"><a href="http://www.anatomicstitt.com">www.anatomicstitt.com</a></p>	<p>Anger att bruksanvisningen alltid ska läsas före användning. Webbadress anger var dokumentet finns elektroniskt.</p>		<p>Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.</p>
	<p>Anger att bruksanvisningen ska läsas för att få viktig säkerhetsinformation om t.ex. varningar som inte återfinns på den medicintekniska produktens etikett.</p>		<p>Unik produktidentifierare som möjliggör entydig identifiering av specifika medicintekniska produkter.</p>
	<p>Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt definition i (EU) MDR 2017/745. Kan också användas tillsammans med tillverkningsdatum.</p>		<p>Anger att produkten är CE-märkt enligt tillämpliga EU-direktiv.</p>
	<p>Anger datumet när den medicintekniska produkten tillverkades.</p>		

# Produktmärkning

## Etikett på huvudprodukt

The label for the main product, Zitzi Delfi Pro stl. 2 (Utan rygg), contains the following information:

- MD** Zitzi Delfi Pro stl. 2 (Utan rygg)  
*Zitzi Delfi Pro size 2 (without back)*
- REF** 285002 | 2023-11-15 | **SN** 61224
- Barcode: 7 322472 850024
- Maxlast 90 kg
- Anatomic Sitt i Norrköping AB  
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
- [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)
- UDI (UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322472850024(21)61224
- QR code (UDI-bärare)

Annotations on the right side of the label:

- Produktnamn
- Streckkod (EAN-13 eller REF samt SN)
- Max belastningsvikt
- UDI-bärare: QR-kod (GS1-128)
- UDI= GS1-128

## Etikett på tillbehör

The label for the accessory, Armstöd stl. 1 kpl. sittdel L230mm (par) - Delfi Pro, contains the following information:

- MD** Armstöd stl. 1 kpl. sittdel L230mm (par) - Delfi Pro  
*Armrest size 1, cpl.*
- REF** 285061 | 2023-10-30 | **LOT** FM712889
- Barcode: 7 322472 850611
- Barcode: FM712889
- Anatomic Sitt i Norrköping AB  
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
- [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)
- UDI (UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322472850611(10)FM712889
- QR code (UDI-bärare)

Annotations on the right side of the label:


- Produktnamn
- Streckkod (EAN-13 eller REF samt LOT)
- UDI-bärare: QR-kod (GS1-128)
- UDI= GS1-128

# Säkerhetsföreskrifter

## Utbildning och kvalifikationer

- Montering, service och rekonditionering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Beslut om anpassning/specialanpassning ska ske av behörig medicinsk personal och utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Inställningar, justeringar samt in- och utprovning av hjälpmedlet ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (fackpersonal på hjälpmedelscentral eller motsvarande).
- Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid vara med och prova ut produkten samt utföra en riskbedömning innan första användning.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

-  Läs alltid bruksanvisningen före användning.
-  Inställningar får endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Det är endast tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
-  Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till en användare.
-  Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö hur produkten används på ett säkert sätt. Funktionskontrollera alltid produkten innan användning.
-  Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.
-  Justeringar får endast utföras på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
-  Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästnings-skrivar och muttrar kontrolleras och dras åt.
-  Säkerställ alltid att sittsystemet sitter fast ordentligt i underredet innan patient sätts i sittsystemet! Ett säkerhetsband levereras till sitsen med avsikt att spännas från sitsens ryggprofil och runt chassits körbåge. Detta band ska alltid användas tillsammans med Adaptersystem Pro samt vid transport i fordon. Se till att detta band sitter stabilt och spänt.
-  Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet.
-  Överbelasta aldrig hjälpmedlet, se avsnittet Begränsningar för aktuell maxlast.
-  Observera att om brukaren griper tag i föremål utanför hjälpmedlet eller lutar sig för långt ut från hjälpmedlet, kan en tyngdpunktsförskjutning ske vilket kan leda till en ökad tipprisk.
-  Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.
-  Utför aldrig service medan produkten används.
-  Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används.
-  Gör alltid en kontroll efter användning för att upptäcka rodnader eller tryckmärken på patienten.

## Kontroll före användning

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

## Begränsningar

### Maxvikt

Den högsta belastningsvikten är 90 kg och gäller för samtliga storlekar.

Med belastningsvikt avses den maximala vikt som sittsystemet får utsättas. tex brukare och ev. annan vikt. Max belastningsvikt för transport i fordon är 75 kg.

### Livslängd

Produktens förväntade livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med produktens avsedda ändamål, förutsatt att instruktioner i denna bruksanvisning efterföljs. Den faktiska livslängden varierar dock beroende på hur frekvent och intensivt produkten används, men rekommenderas inte överstiga 10 år.

### Gaskolv

Om produkten ska förvaras under en längre tid, beakta följande:

Gaskolvar bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt annars kan gaskolvens tätning gå sönder och den slutar fungera.

## Kvarvarande risker

Var observant på att produkten och dess tillbehör är korrekt inställda så att brukaren inte åsamkas obehag eller skada under användningen. Om så är fallet ska justering göras eller lämpliga tillbehör monteras.

## Kombinationer

För att med säkerhet bibehålla CE-märkningen ska hjälpmedlet användas tillsammans med produkter, tillbehör och reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB. Se produktens beställningsunderlag för möjliga tillbehör och sprängskiss för reservdelar.

Produkten kan dock förses med CE-märkta bälten/selar och huvudstöd/nackstöd från annan leverantör med bibehållen CE-märkning om nedanstående punkter uppfylls:

- Det ska framgå av tredje parts dokumentation att kombinationen är möjlig och godkänd (att tredje parts produkt är avsedd att användas på manuella rullstolar eller modulära sittsystem samt att tredje part godkänner användningen på andras sittsystem).
- Att sittsystemets original infästningspunkter används och att bälten/selar samt huvudstöd/nackstöd fästs i för detta sittsystems avsedda fästen från Anatomic Sitt AB. Fästena måste passa aktuell tredjeparts produkt. Ingen åverkan/anpassning får göras på någon av produkterna för att möjliggöra kombinationen.
- Monteringsanvisningar för huvudstöd och bälten/selar från Anatomic Sitt AB ska följas och återfinns under avsnittet Monterings- och justeringsanvisningar senare i denna dokumentation. Inga andra produkter eller tillbehör får därför fästas på tredje parts produkt.

Notera att en riskbedömning alltid skall göras när produkter från olika leverantörer kombineras. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller personer i dess närhet.


## Avvikelser/tillbud

Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller återförsäljare/tillverkare.

Om ett tillbud som hade kunnat leda till allvarlig skada uppstår ska det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet. Produkten ska dessutom skickas till Anatomic Sitt i befintligt skick för vidare utredning.

# Tekniska data / Prestanda

Artikelnr: 2840XX-serien

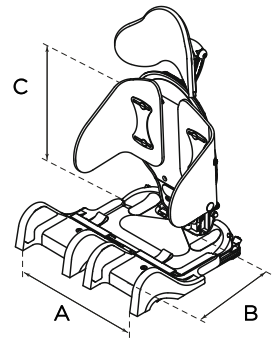


Zitzi Delfi Pro	Stl. 1	Stl. 2	Stl. 3	Stl. 4
Brukarlängd, ca cm:	60 - 100	90 - 130	120 - 160	140 - 170
Sitsbredd (A) cm:	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Sitsdjup (B) cm:	17 - 26*	24 - 33	31 - 40	36 - 45
Axilhöjd (C) cm:	17 - 27	24 - 34	30 - 40	30 - 40

Brukarvikt samtliga storlekar: max 90 kg

Ryggvinkel samtliga storlekar: -10° till +30° \* Sittdjup 14-26 i kombination med rygg stl. 0

## JUSTERBAR RYGG

Alla mått är uppmätta med foder

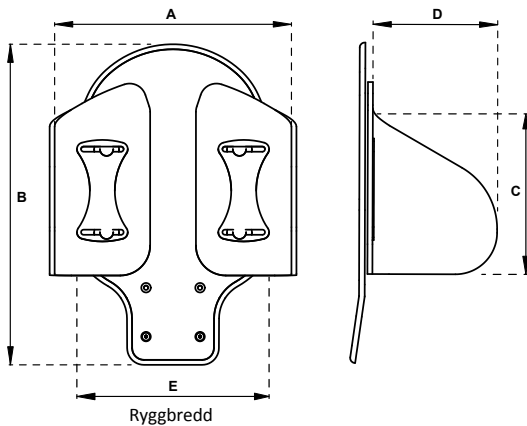

## RYGG mått i cm

	B x E
Rygg stl. 0	31 x 21 cm
Rygg stl. 1	34 x 21 cm
Rygg stl. 2	39 x 26 cm
Rygg stl. 3	45 x 29 cm

## BÅLSTÖD mått i cm

	C x D
Bålstöd stl. 0	14 x 12 cm
Bålstöd stl. 1	16 x 13 cm
Bålstöd stl. 2	19 x 15 cm
Bålstöd stl. 3	21 x 18 cm

	stl. 0	stl. 1	stl. 2	stl. 3-4
Ryggprofilens längd:	33	36	45	52 cm

## BÅLSTÖD BREDDJUSTERING (A) cm inkl. foder


	Rygg 0	Rygg 1	Rygg 2	Rygg 3
Bålstöd 0	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Bålstöd 1	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Bålstöd 2	19 - 28	19 - 28	21 - 30	23 - 30*
Bålstöd 3	19 - 28*	19 - 28*	21 - 30*	23 - 32

Grå rutor är standardkonfiguration

\* Ej optimal höjjustering.


## SITTEL

### Windswept

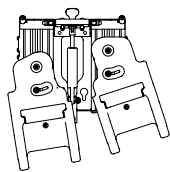


**Windswept:**  
Windswept möjlighet 9°

### Abduktion/Adduktion

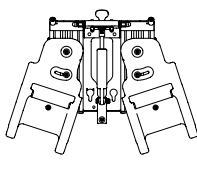


**Abduktion:**  
Samtliga storlekar 0° till +18°  
**Adduktion:**  
Samtliga storlekar 0° till -9°

### Benlängd

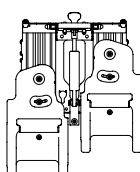

## BORD

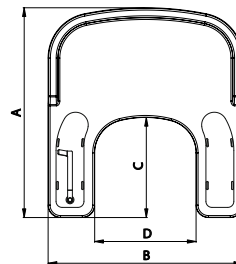


### MÅTT

Transparent	A	B	C	D
Stl. 1	480	450	240	250
Stl. 2	540	515	260	290
Stl. 3	570	570	280	340

### MÅTT

Konstläder	A	B	C	D
Stl. 1	414	500	175	250
Stl. 2	469	550	200	300
Stl. 3	525	600	225	350

## STÖDBORD

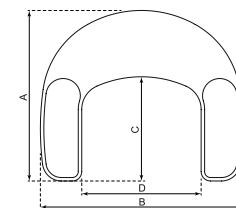


### MÅTT

Stödbord	A	B	C	D
Stl. 1	380	450	230	260
Stl. 2	430	510	260	300
Stl. 3	490	580	300	340
Stl. 4	540	640	330	380
Stl. 5	600	710	360	420

## BÄLTESBESLAG

Rekommendationstabell

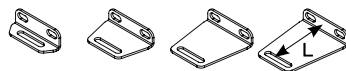


Art nr.	371925	371926	371927	371928
Längd L	10 mm	30 mm	50 mm	60 mm
Position	Bak	Fram	Bak	Fram
	Bak	Fram	Bak	Fram
Delfi 1	X	X		X
Delfi 2	X	X		X
Delfi 3	X	X		X
Delfi 4	X		X	X
Sharky 1	X		X	
Sharky 2	X		X	

## FOTLÅDA

Fotlåda stl.1 passar till fotstöd stl. 1 osv.

### A (höjd från fotplatta)

stl. 1	180 mm
stl. 2	180 mm
stl. 3	210 mm
stl. 4	240 mm

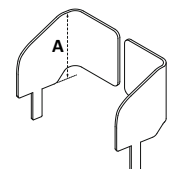

TEKNISK DATA - DELFI PRO / DELFI PRO +

### HUVUDSTÖD

Delfi 120 mm  
Sharky 200 mm

Huvudstöd	A x B
stl. 1	220 x 150 mm
stl. 1 lång	280 x 160 mm
stl. 2	240 x 190 mm
stl. 2 lång	280 x 210 mm

### FOTSTÖD

	A x B
Helt stl. 0	310 x 255 mm
Helt stl. 1	315 x 195 mm
Helt stl. 2	345 x 225 mm
Helt stl. 3	380 x 260 mm
Helt stl. 4	380 x 300 mm
Helt justerbar stl. 1	155 x 190 mm
Helt justerbar stl. 2	160 x 220 mm
Helt justerbar stl. 3	180 x 255 mm
Delat stl. 1	155 x 190 mm
Delat stl. 2	160 x 220 mm
Delat stl. 3	180 x 255 mm
Delat justerbar stl. 1	155 x 190 mm
Delat justerbar stl. 2	160 x 220 mm
Delat justerbar stl. 3	180 x 255 mm

Fotstöd storlek	0-1	2	3	4
Fotstödsstag profilängd (cm)	25	30	35	35
Längd infästning taggled (mm)	30	30	80	150

### HANDBÅGE

Stl.	A
Stl. 1	305 mm
Stl. 2	345 mm
Stl. 3	425 mm
Stl. 4	480 mm
Stl. 5	520 mm

Mått mellan rörcentrum

### ÖVERARMSTÖD

Mått dyna*	A	B
Stl. 0-1	85 mm	100 mm
Stl. 2-4	125 mm	150 mm

Dynan kan vridas 90 grader vid montering.  
\* för mått med polstring + 20 mm

### ARMSTÖD FRÅN RYGG

Mått	A	B	C
Stl. 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Stl. 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Stl. 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm

### HÖFTSTÖD

Mått: A x B	
Stl. 1	160 x 130 mm
Stl. 1 rakt	160 x 125
Stl. 2	175 x 160
Stl. 2 rakt	175 x 150

Mått i cm	Sitsbredd	Höftstöd breddjustering C	Höftstöd rakt breddjustering C
Delfi 0/1	24	19 - 29	25 - 35
Delfi 0/1	27	22 - 32	28 - 38
Delfi 0/1	30	25 - 35	31 - 41
Delfi 2	28	19 - 29	27 - 35
Delfi 2	31	22 - 32	30 - 38
Delfi 2	34	25 - 35	33 - 41
Delfi 3/4	32	19 - 29	28 - 35
Delfi 3/4	35	22 - 32	31 - 38
Delfi 3/4	38	25 - 35	34 - 41

### ARMSTÖD FRÅN SITS

A x B	
Stl. 1	230 x 75 mm
Stl. 2	230 x 75 mm
Stl. 3	230 x 75 mm
Stl. 4	330 x 75 mm

C	
Stl. 1	140 - 205 mm
Stl. 2	140 - 205 mm
Stl. 3	190 - 280 mm
Stl. 4	190 - 280 mm

C mäts från toppen av sittdelen till armstödet topp

Bredd mellan armstödsstagen D

Stl. 0/1	250 - 390 mm
Stl. 2	300 - 440 mm
Stl. 3/4	300 - 440 mm

### BÄCKENSTÖD

A x B	
Stl. 1	150 x 70 mm
Stl. 2	200 x 100 mm

# Anpassning och specialanpassning

## Rekommendationer

Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märkning. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt.

## Tillåtna anpassningar inom ramen för CE-märkning

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Ryggstödsprofilens längd får kortas ned. Profilen får aldrig vara kortare än att samtliga fästen till ryggplattan går att montera på denna.

## Riskbedömning


Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller personer i dess närhet, att använda efter anpassning.

## Märkning

Produkten bör förseas med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.


# Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna används på ett säkert sätt.

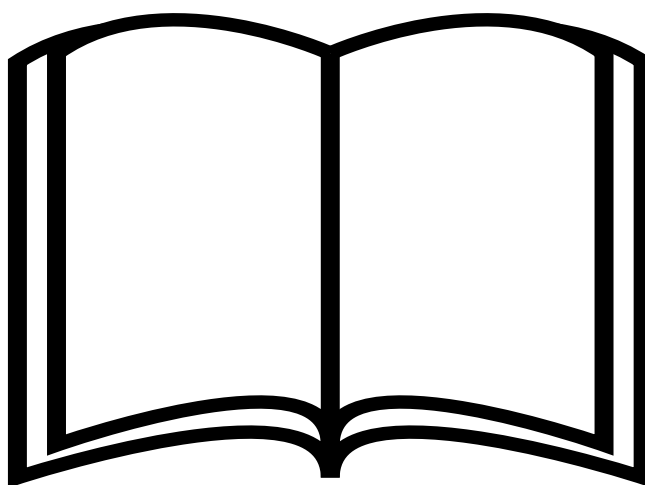

## Verktyg

Verktögsnyckeln som du behöver för att utföra justeringar finns integrerad i toppen av ryggprofilen som du hittar på baksidan av stolen. (4 mm insexnyckel)

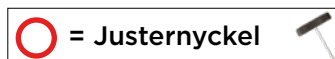

## Montering på underrede



### Montering av fästplatta

Montera fästplattan med de medföljande skruvarna, brickorna och låsmuttrarna på underredets fästplatta.

### Montering av Delfi Pro


Sittsystemet monteras enkelt och säkert på underredet med hjälp av en fästplatta. Fästplattan är utrustad med 2 st styrstift som gör att sittsystemet sitter på plats, samt ett vred undertill för att behålla sittsystemets position.

För i sittsystemet enligt bild. Tryck sedan sittsystemet bakåt tills det tar stopp och att du hör ett klick. Dra sedan åt vredet medurs under sittplattan för att fastställa sittsystemets position.

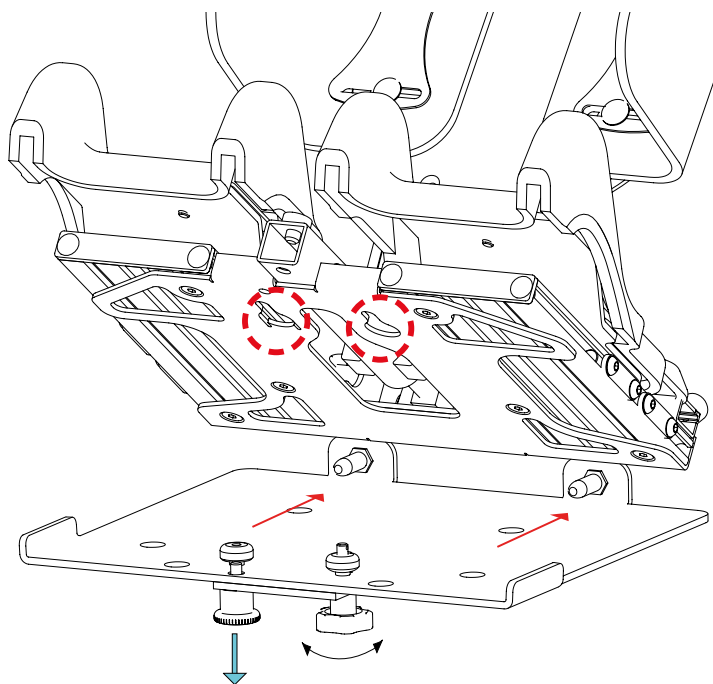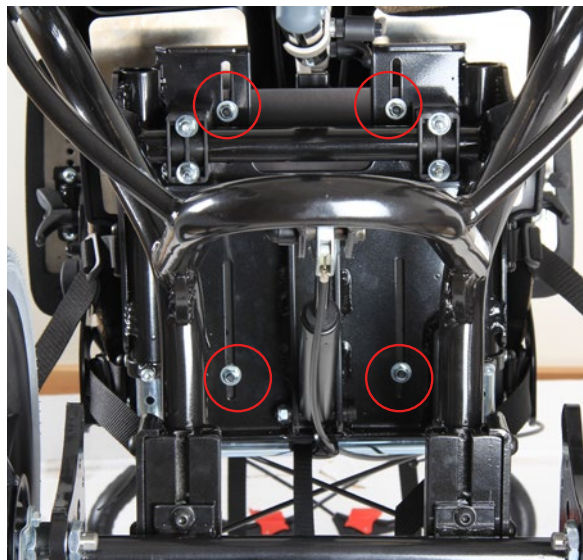

 Hålbild

 Dragriktning

 Dra nedåt för att öppna

 Vred



Se till att spärren snäpper i ordentligt och att du dragit åt vredet!


## Adaptersystem

### Montering med adaptersystem

Börja med att montera basplattan (A) på underredet genom att skruva fast den med medföljande skruvar, brickor och muttrar (B).

Montera sedan adapterplåten (C) genom att skjuta i sargsprintarna (D) i spåren på sittsystemets undersida. Dra åt skruvarna (E) när önskad position uppnåtts.

När adapterplåt respektive basplatta är monterade på sittsystem och underrede kan dessa kombineras. Sittsystemet är korrekt fastsatt när ett klickljud hörs.

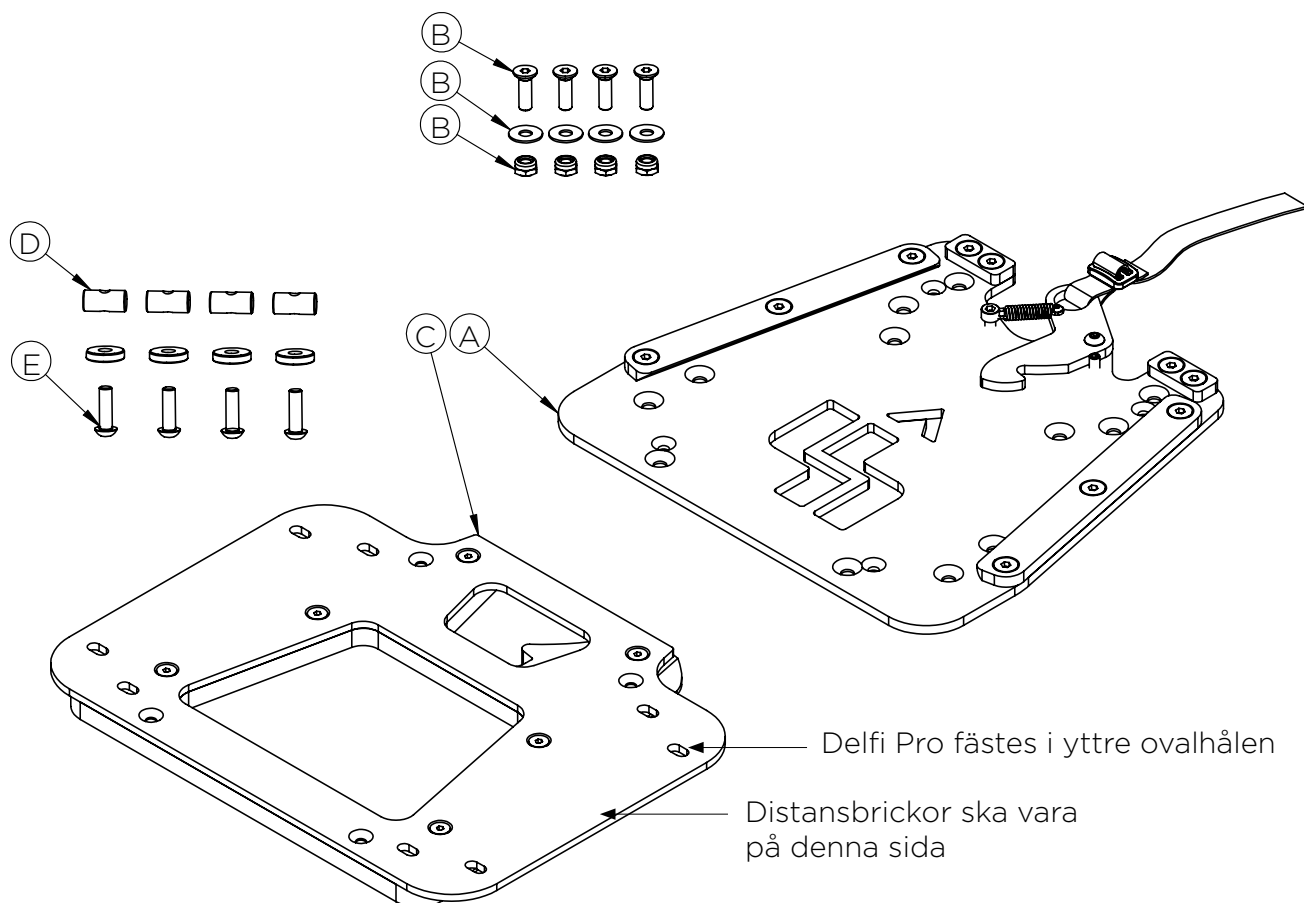

Säkerställ att sittsystemet sitter fast ordentligt på underredet innan användning sker.




Vid användning av Adaptersystem Pro (153047) ska säkerhetsbandet på sittsystemets rygg alltid användas och spännas runt körbåge/körbygel eller motsvarande på underredet (se bild). Se till att bandet sitter spänt och fixerat så det inte kan glida av.




## Planskiva

Skruva ihop skruv, träskiva, distans och sargsprint. Skjut in alla 4 sargsprintar i profil enligt bild och skruva sedan åt skruvarna ordentligt.

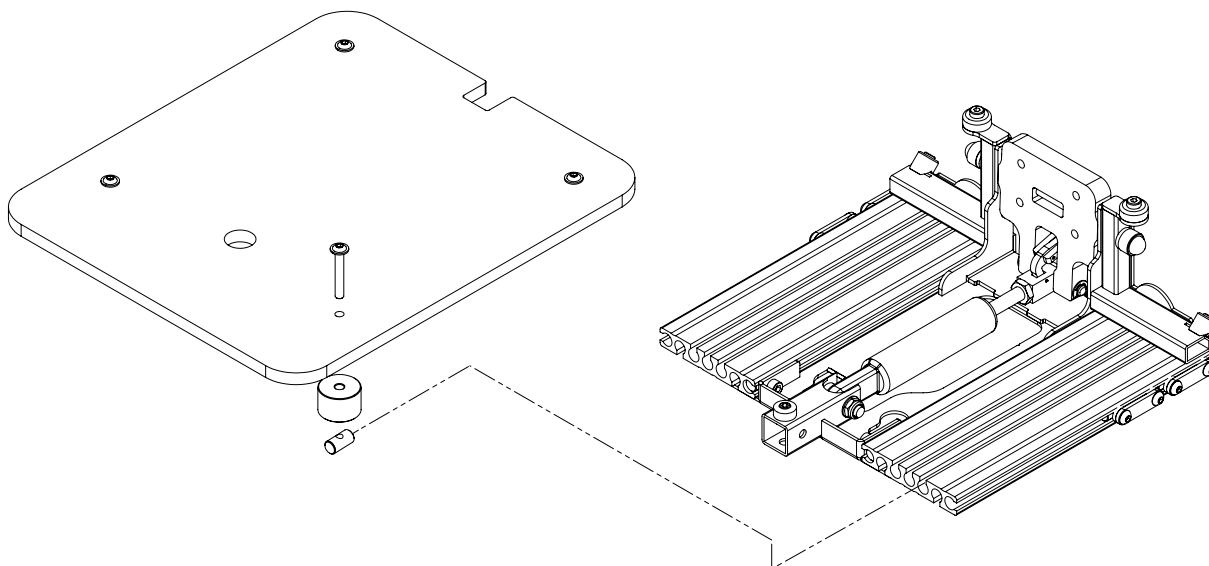

## Justering av sittdel


Sittdjup, benlängdsskillnad och eventuell abduktion/adduktion av benen justeras enkelt. Ta loss fodret samt ta bort den bakre sittdelen för att komma åt justeringsskruvarna. Observera att du inte skall skruva ur skruven helt, utan det räcker med att lossa den.

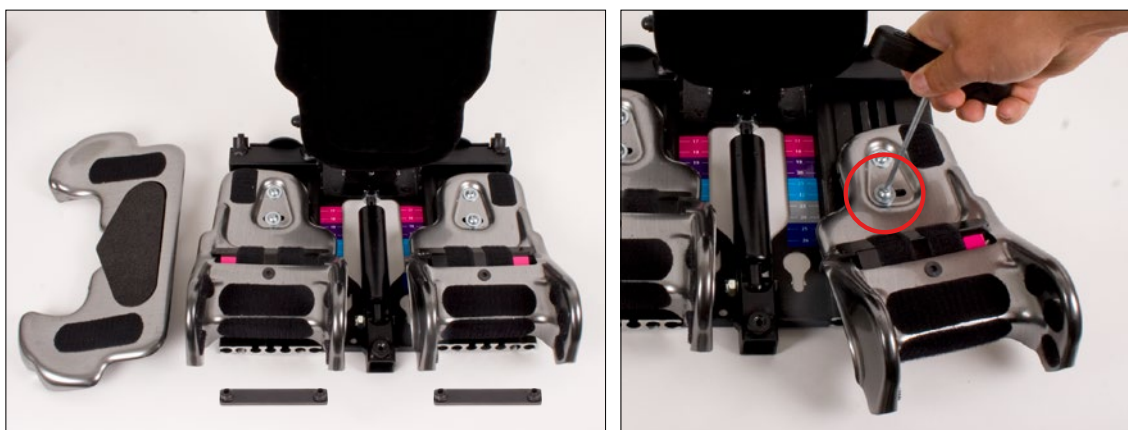

### Sittbreddsjustering


För maximal sittbredd, sätt sargsprinten i spår 3, och för minimal sittbredd sätt sargsprinten i spår 1. Bendelarna levereras grundinställda i spår 1.

1. Lossa den de två skruvarna på bendelen med hjälp av verktygsnyckeln.
2. Flytta bendelen till önskat spår & position för bredare sittbredd.
3. Dra åt skruvarna när du uppnått önskad placering.

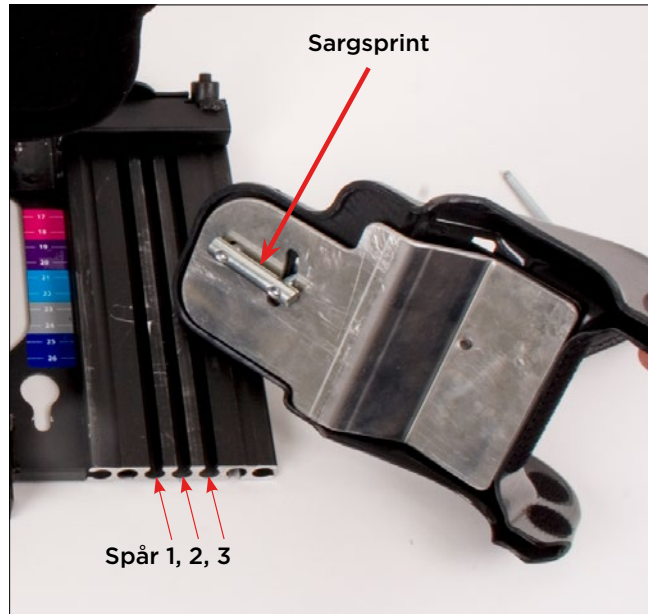

### Benlängdsskillnad/sittdjup



Lossa den främre skruven (A) på sittframdelen med hjälp av verktygsnyckeln. Dra sittframdelen till önskad position och dra åt skruven.

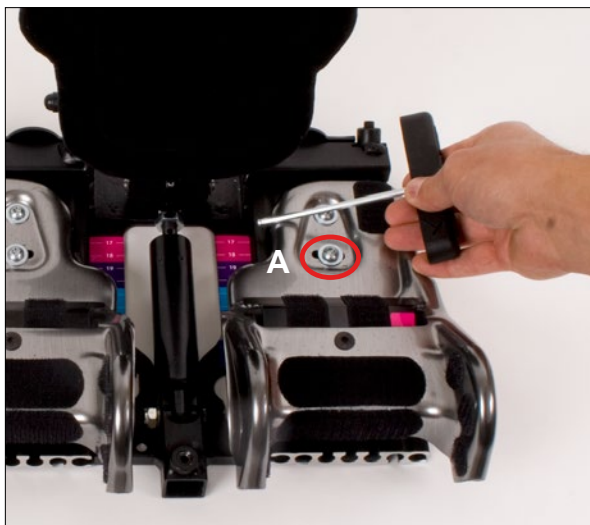

Säkerställ att du inte justerar sittframdelen utanför godkänt justeringsområde (B) (mätsticka). Fräst spår (C) markerar maximal justering (se bild)


### Sittgropsjustering

Vid justering av sittdjupet ska även sittgropsjusteringen följa med. Ex. Om sittdjupet är justerat till 23 cm (grått fält) ska även sittgropsjusteringen skjutas ut till grått fält för att bibehålla sittgropsens storlek, för att få en korrekt sittställning. Lossa bendelens skruv (D) med hjälp av verktygsnyckeln. Dra sittgropsjusteringen till önskad position. Lås skruven.

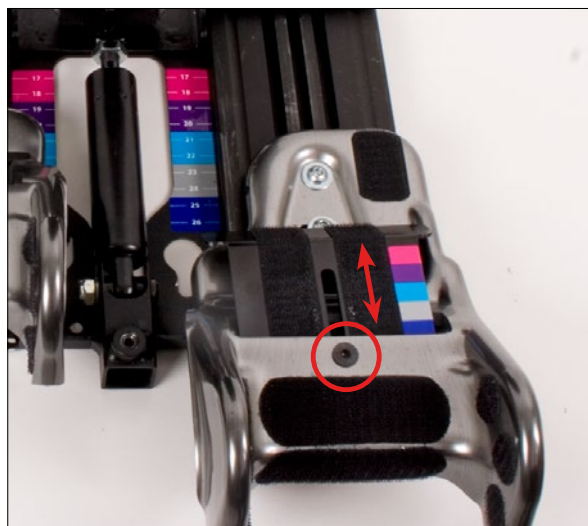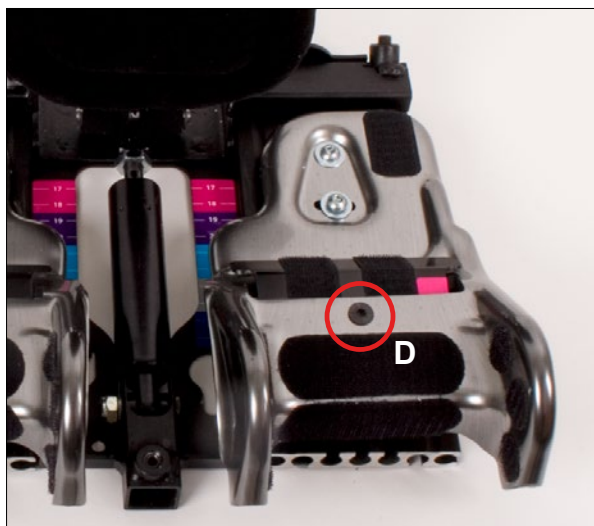

### Abduktion och adduktion

Lossa den främre skruven på bendelen med hjälp av verktygsnyckeln. För bendelen till önskad position och dra åt skruven när du uppnått önskad placering.

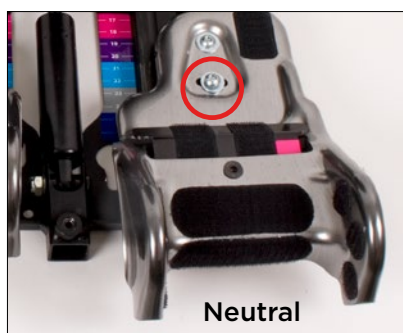

## Montering/demontering av rygg

Ryggens infästning består av 4 st skruvar.

För ryggprofilen ner i sargsprintarna och dra åt de fyra medföljande skruvarna (rödmarkerade på bilden).

Ryggen hamnar automatiskt i rätt läge med hjälp av stoppet i ryggprofilen.



Tänk på!  
Välj förstärkt rygg  
vid hög tonus  
på patienten!



## Användning av Active - rygg

### Montering/demontering

Sker på samma sätt som ovan.

### Justering och inställning


För justering av ryggen och specifika tillbehör hänvisas till bruksanvisningen för Zitzi Active.

Se vår hemsida:

[www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)



## Justering av ryggvinkel

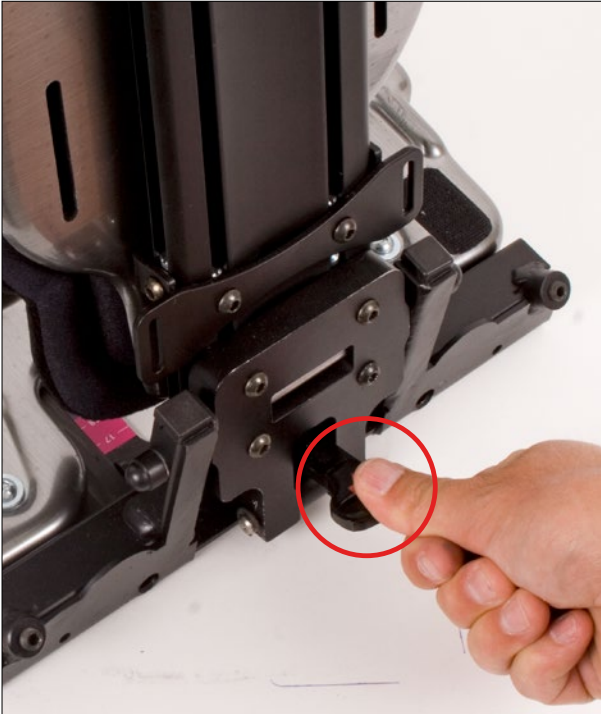

Applicera först låsläppen i aktiveringsläge genom att dra den rakt ut och sedan uppåt. För att justera vinkeln på ryggstödet trycker du läppen nedåt, då frigörs ryggen så att du kan ställa den i önskat läge. När du uppnått önskad vinkel släpper du läppen igen.



Det är mycket viktigt att läppen sätts i barnsäkert läge, vilandes nedåt, efter justering av ryggvinkeln.



## Justering av rygghöjd



- Lossa skruvarna enl. A på båda sidorna av rygprofilen (2 på vardera sida).
- Justera in höjden
- Lås skruvarna


Placera ryggen så att man utnyttjar ryggens integrerade svankstöd!



## Lås- och ställbar flexfunktion (på sittdel MLD - Delfi+)

Vrid vredet medsols (A) för att låsa flex-funktionen i ryggen och få den fast.


För att aktivera flex-funktionen så skruvar man ut vredet motsols (B), man kan även ställa hur långt ryggen ska röra sig beroende på hur långt vredet skruvas ut.

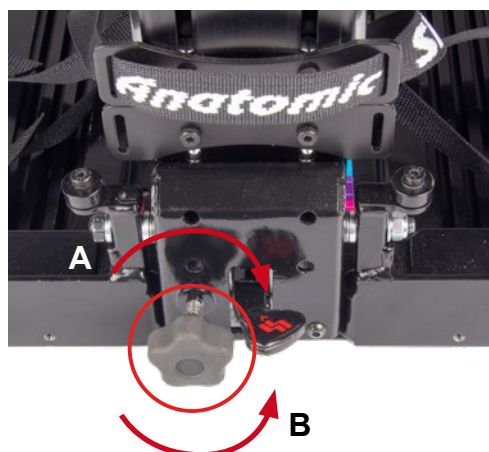

## Förstärkt rygg

Förstärkingsplåt fästes på ryggplattan med hjälp av dubbelhäftande tejp. Se till att alla spår och hål ligger rätt mot varandra. Plattan hålls sedan på plats via de vagnsbultar som fäster in bålstöden i spåren.

OBS! Vagnsbultarna till bålstöden måste bytas ut till en längre modell (167625 Vagnsbult M6x25mm) när man använder förstärkt rygg.

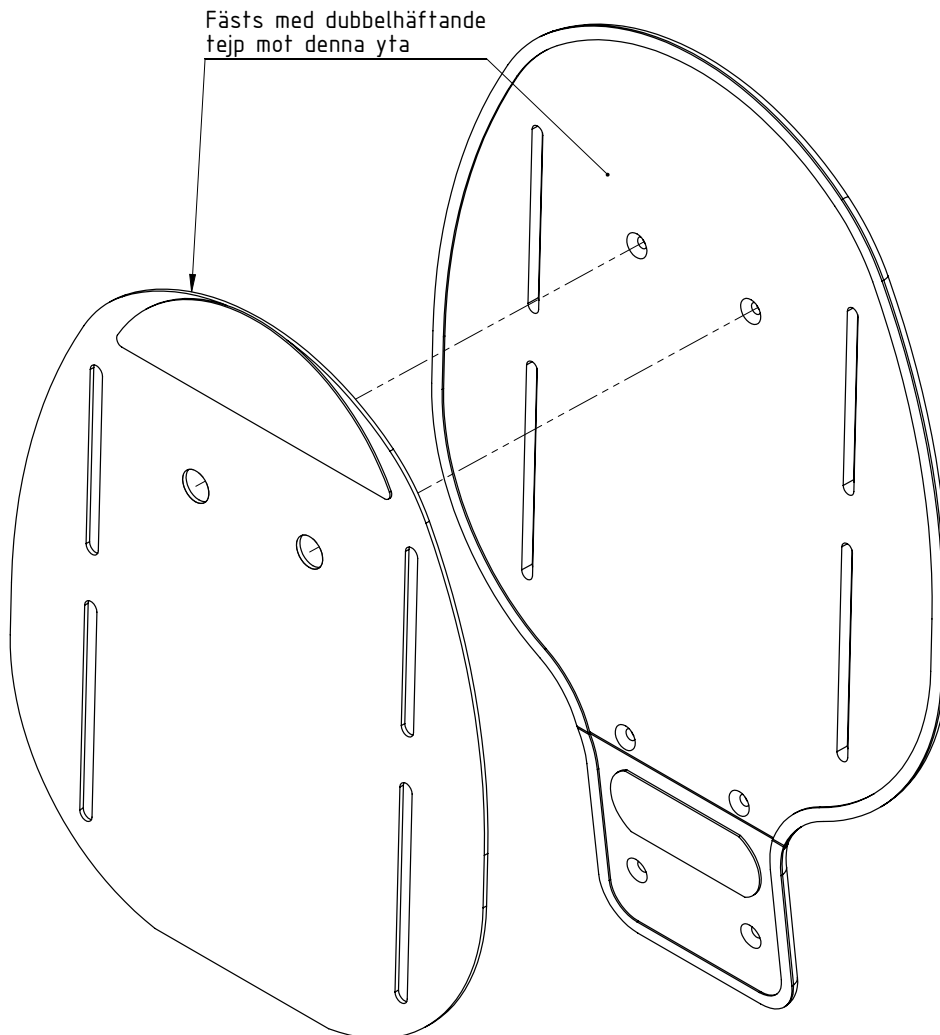

## Justerbara bålstöd

### Montera bålstöd

Montera bålstödet med medföljande vagnsbult, bricka och vred (se bild).



Äldre modeller före 2023 monteras med distans mellan bålstöd och rygg så inte fodret kläms.




Nya modeller efter 2023 monteras utan distans.



### Justering bålstöd

- Lossa vreden (två på varje sida)
- Justera sedan bålstödens bredd och höjd
- Dra åt vreden när du uppnått önskad position.

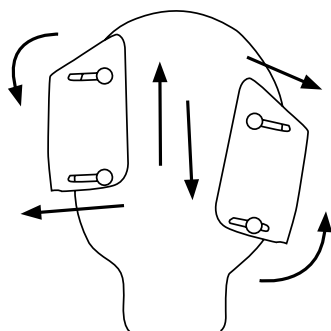

Justeringsvred


## Vikbart bålstöd

### Montera bålstöd

Montera bålstödet med medföljande vagnsbult (1), distans (2), bricka (3) och vred (4) (se bild). Distansen ska placeras mellan bålstöd och rygg så inte fodret kläms fast. Fäst låsbandet (6) enligt bild.

### Undanvikning av bålstöd

Tryck in knappen (5) och vik stödet åt sidan

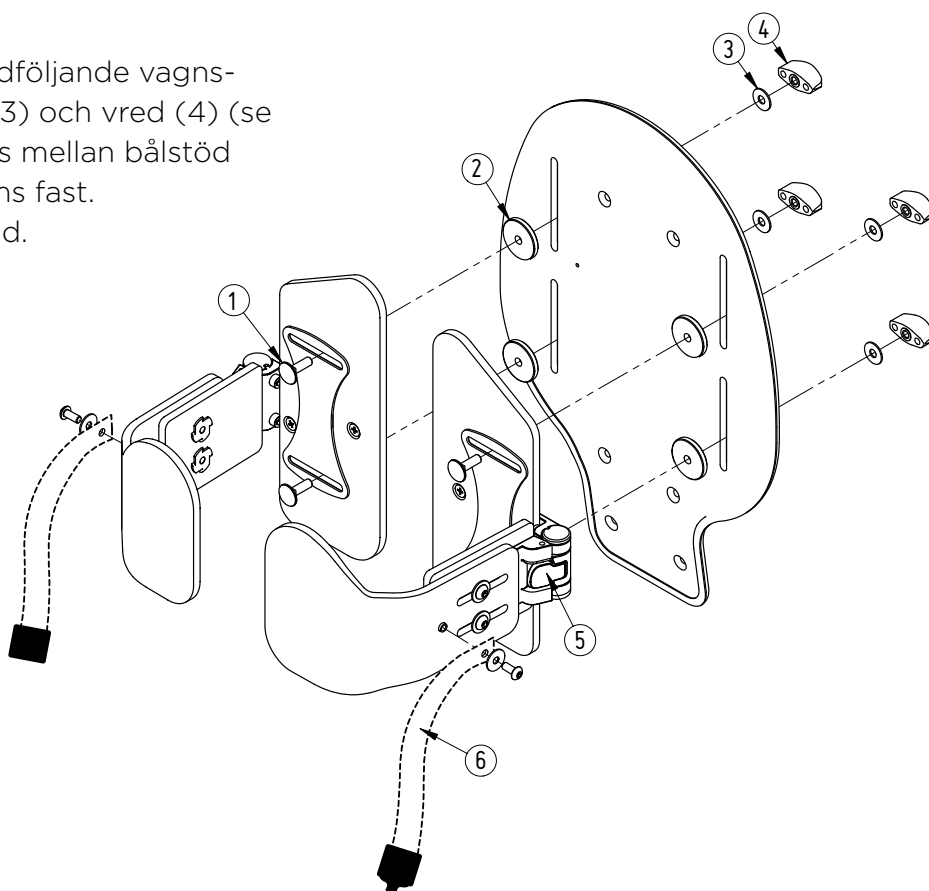

## Bäckenstöd



### Montering av bäckenstöd

Innan du kan montera bäckenstödet måste du avlägsna skyddskåpan (A). Skruva ur skruven (B) och lyft sedan bort kåpan.

Montera bäckenstödet där skyddskåpan (A) satt och fäst med skruven (B).

### Justering av bäckenstöd


För att vinkeljustera bäckenstödet lossar du skruv (B), (C) eller (D) beroende på vilka inställningar du vill göra. För att höjjustera bäckenstödsplattan skruvar du ur skruvarna (E) och flyttar plattan till önskad position. Skruva därefter dit skruvarna (E) igen.

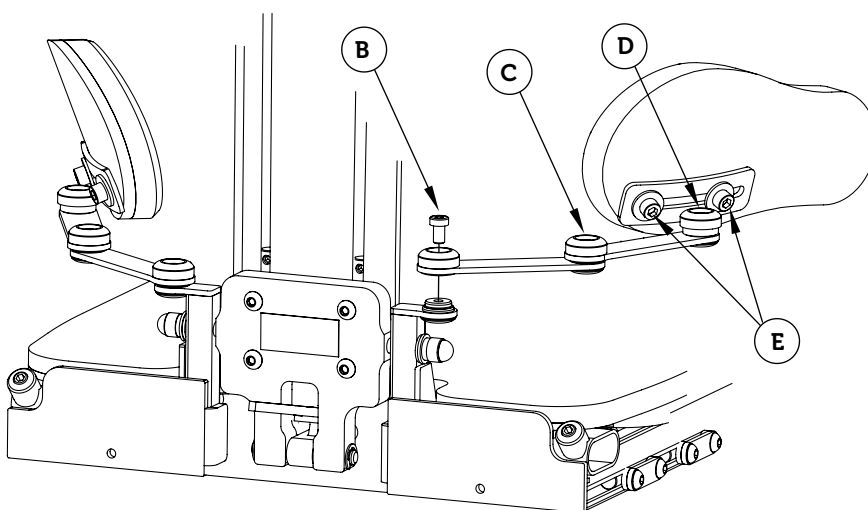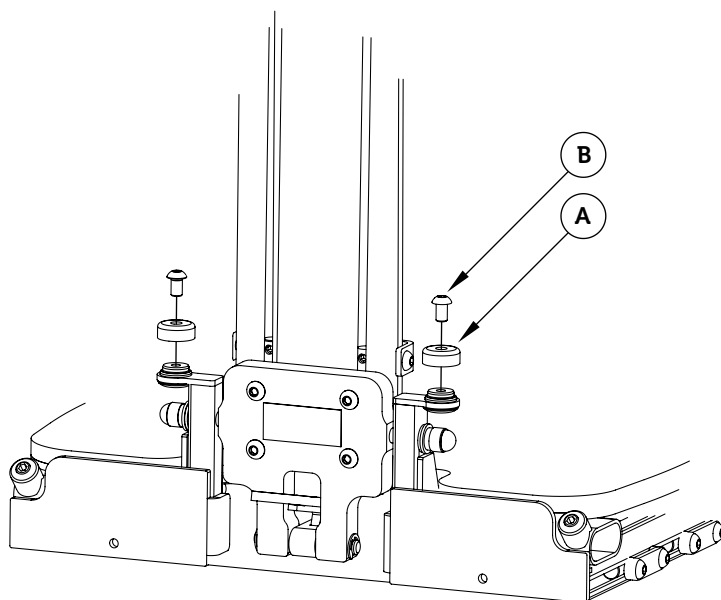



## Höftstöd

Skruva bort de två skruvar som fäster bendel i bas och byt till de skruvar i medföljande kit som är ett steg (5 mm) längre. När du monterar de nya skruvarna lägger du höftstödet mellan bendel och bas som bilden visar (mellan de två svarta profilerna för Delfi stl. 4) så att höftstödet ligger mot basen.

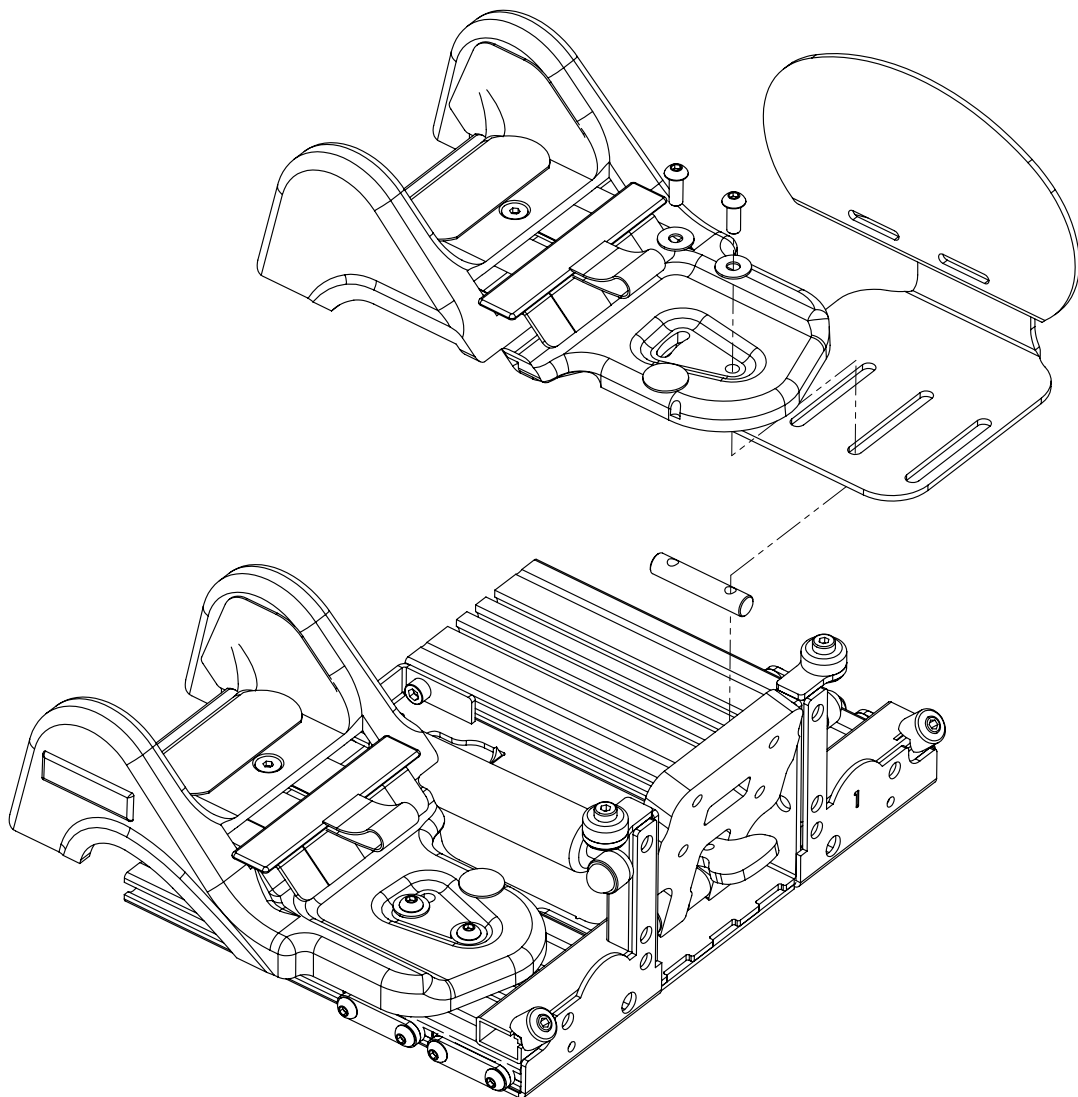Välj vilka spår i höftstödet du använder beroende på hur långt fram/bak du vill placera stödet, sedan justerar du stödet i sidled innan du skruvar åt skruvarna ordentligt.



## Huvudstöd

 = Justernyckel 

### A - Montering av huvudstödsfäste

Först tar du bort den integrerade vektgnyckeln som sitter högst upp i rygprofilen.

Skjut sedan ned huvudstödsfästet till önskat läge i spåren på rygprofilen. Lås skruvarna!

### B - Montera sedan huvudstödet i

huvudstödsfästet, justera till önskat läge. Lås vredet!

### C - Justering av huvudstödet

Släpp justeringskruvarna C lagom mycket så att huvudstödet ska kunna justeras för hand till önskad position, lås sedan skruvarna C.

Behöver huvudstödet komma högre upp justeras detta genom att lossa på vred B och sedan flytta huvudstödet till önskad höjd.

Lås sedan vredet B.



(B) Höjdjusteringsvred

(A) Huvudstödsfäste, 4 skruvar med sarg-sprintar.

## Sidojusterbart huvudstödsfäste


### Montering av sidojusterbart huvudstödsfäste

Först tar du bort den integrerade vektgnyckeln som sitter högst upp i rygprofilen. Skjut sedan ned det sidojusterbara huvudstödsfästet till önskat läge i spåren på rygprofilen. Lås skruvarna!

Montera sedan huvudstödet i huvudstödsfästet, justera till önskat läge. Lås vredet!

### Justering av huvudstödet

För att sidojustera huvudstödet lossas skruv A (2 st). Önskas mer justeringsmöjlighet, lossa skruvarna B (4 st). Lås skruvarna!

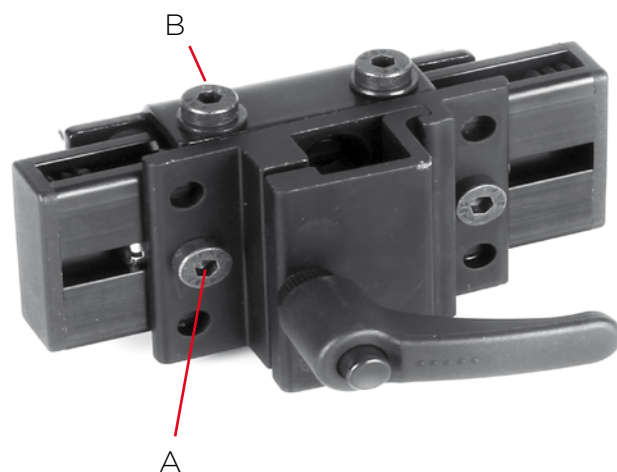

## Vikbart huvudstödsfäste

### Montering av vikbart huvudstödsfäste

Först tar du bort den integrerade vektgnyckeln som sitter högst upp i ryggprofilen. Skjut sedan ned det vikbara huvudstödsfästet (A) till önskat läge i spåren på ryggprofilen. Lås skruvarna!

**B - Montera sedan huvudstödet** i huvudstödsfästet, justera till önskat läge. Lås vredet!

### C - Justering av huvudstödet

Lossa sprinten för att kunna vika bort huvudstödet. Vid låsning av det vikbara huvudstödsfästet; säkerställ att sprinten går i lås.



## Montering av kompletterande fästen på huvudstödsfäste

Lossa på skruvarna (A) och avlägsna nackstödet från nackstödsfästet.  
Montera fästet med medföljande skruv (B) och dra åt skruvarna.  
Sätt sedan tillbaka nackstödet på nackstödsfästet och dra åt skruvarna (A).

### Fäste Headpod



### Fäste Pannband



## Montering av bålselar

Övre fästbeslag (A)



### Montering av övre fästbeslag (A)

Först tar du bort den integrerade vektysnyckeln som sitter högst upp i ryggprofilen och ev. huvudstödsfästet. Skjut sedan ned de övre fästbeslagen till önskat läge i spåren på ryggprofilen.

### Justering av övre fästbeslag


Lossa skruvarna och justera in önskad höjd & vinkel. Justera höjden på fästbeslaget så att dragriktningen hamnar något över axelpartiet. Lås skruvarna.

### Montering av sele

Trä selens övre remmar genom spåret och i spännet. Trä sedan selens nedre fästpunkter in i det nedre beslaget. Använd bifogade Triglide spännen E.


### Justering av dragriktning och bredd

Lossa skruvarna på det övrefästbeslaget och justera in höjden, lås sedan den övre skruven. Justera in vinkeln och lås sedan även den nedre skruven.

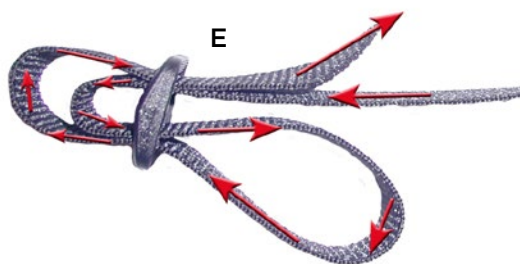

(B) Nedre infästningsbeslag, ingår standard

Alternativt nedre monteringsbeslag  
(Tillval 285140)

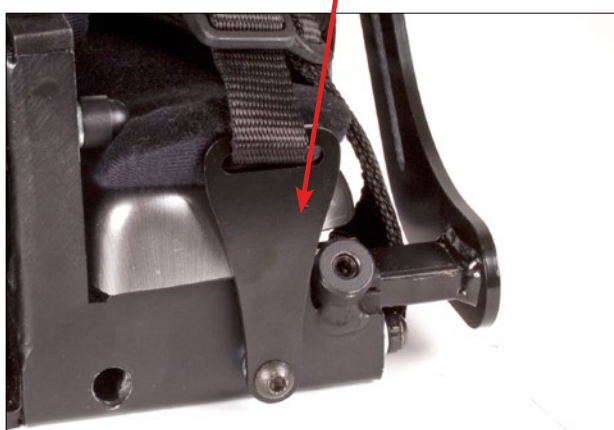

Var noggrann med att det finns tillräckligt utrymme för halsen. Kontrollera även trycket på bandet samt att bälteskuddarna sitter där dom ska.



= Justernyckel





## Höftbälte

### Justering av höftbältesbeslag

För att flytta position på höftbältesinfästningen lossar du skruvarna (A) något och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (A).

### Montering av höftbälte

När höftbältet ska monteras i höftbältesbeslagen använder du dig av ett tri-glidespänne. För montering enligt tri-glidemetoden, gör som bilden visar.

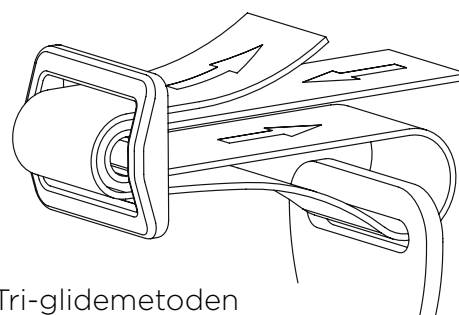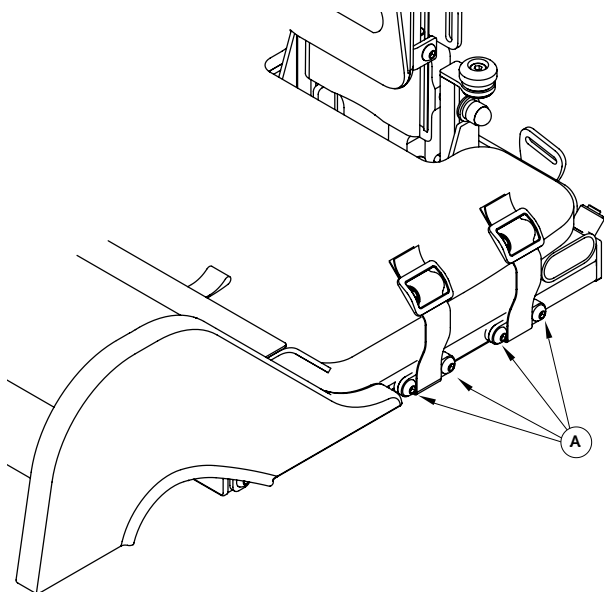



Tri-glidemetoden



Säkerställ att bandet inte kläms fast mellan distansen och beslaget.

### Bältesbeslag för höftbälte


Extra beslag för höftbälte finns som tillbehör i fyra storlekar och gör att fästpunkterna för höftbältet flyttas ut från sittdelsbasen. De förenklar åtkomst och justering av sitt-/bendelarna och passar 4-punkts höftbälten med 25 mm breda fästband. Använd befintliga skruvar och brickor och byt befintligt plattjärn mot önskat bältesbeslag. Kan monteras uppåt eller nedåt om adaptersystem används. Annars monteras det uppåt för att inte gå emot underredets sittplatta. För val av rekommenderade storlekar, se kapitel Tekniska data.

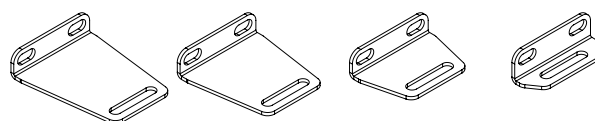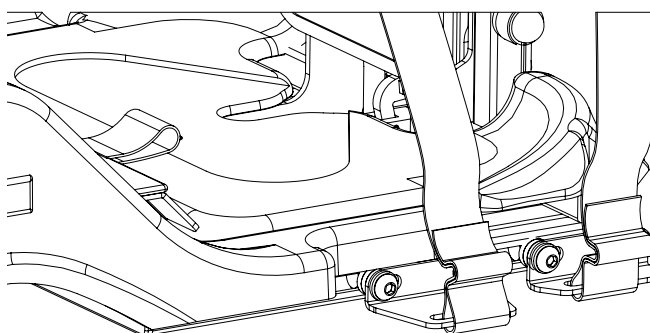

Bältesbeslag i fyra storlekar

## Vrifthållare

Fotplattan är förberedd för montering av vrifthållare. Montering av vrifthållarna på helt justerbart & delat justerbart fotstöd görs under den justerbara fotplattan.

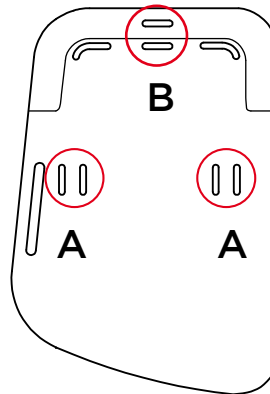

För montering av tvåpunkts vrifthållare använd spårn A och vid montering av trepunkts vrifthållare använd A och B.



Kontrollera att plösen ej veckat sig på vrifthållaren.

## Armstöd

För montering av armstöd, skjut in armstödet i fästet på sidan av sitsen.

Lås sedan skruven. Se position A.


**Breddjustering:** Lossa skruv A och justera till önskad position. Lås skruven.

**Djupjustering:** Lossa skruv B och C helt och justera till önskad position. Sätt tillbaka och lås skruvarna.

**Rotation:** Lossa skruv C och justera till önskad position. Lås skruven.

**Höjdjustering av armstödsplatta - D :** Lossa vredet och justera till önskad position. Lås vredet.

**Vinkeljustering av armstödsplatta - E :** Lossa vredet och justera till önskad position. Lås vredet.

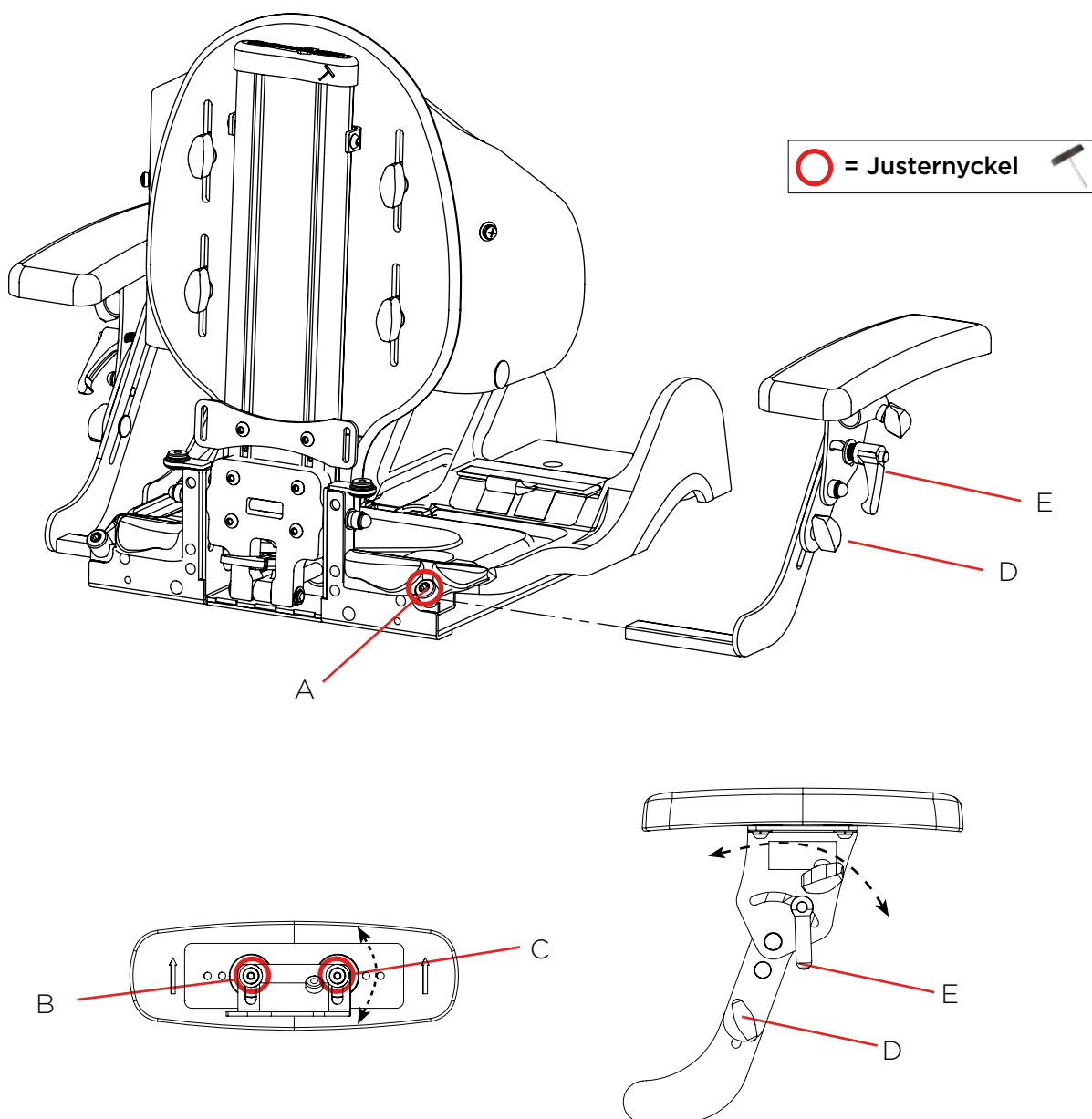

## Armstöd från rygg

### Montering av armstöd från rygg

Innan montering av armstöd från rygg kan utföras måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan exempelvis vara huvudstöd, övre monteringsbeslag och körbåge.

Lossa på stoppskruvarna (A) och justera ut armstödsbeslagen (B) för att kunna komma åt skruvarna (C) på mittfästet genom hålen. Lossa dessa skruvar tillräckligt för att kunna trä in sargsprintarna (D) i spåren på ryggprofilen. Justera sedan beslaget till lämplig höjd och dra åt skruvarna. Ställ in armstödsbeslagen i lämplig bredd och dra åt stoppskruvarna. Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort för att kunna montera armstödsbeslaget.

### Höjjustering

För att höjjustera armstödet lossar du skruvarna (C) något och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (C).

### Breddjustering


För att ändra bredd på armstödet lossar du stoppskruvarna (A) och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna.

### Vinkeljustering uppåt/nedåt

Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (E) och roterar sedan armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (E).

### Vinkeljustering i sidled

Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (F) och flytta sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (F).

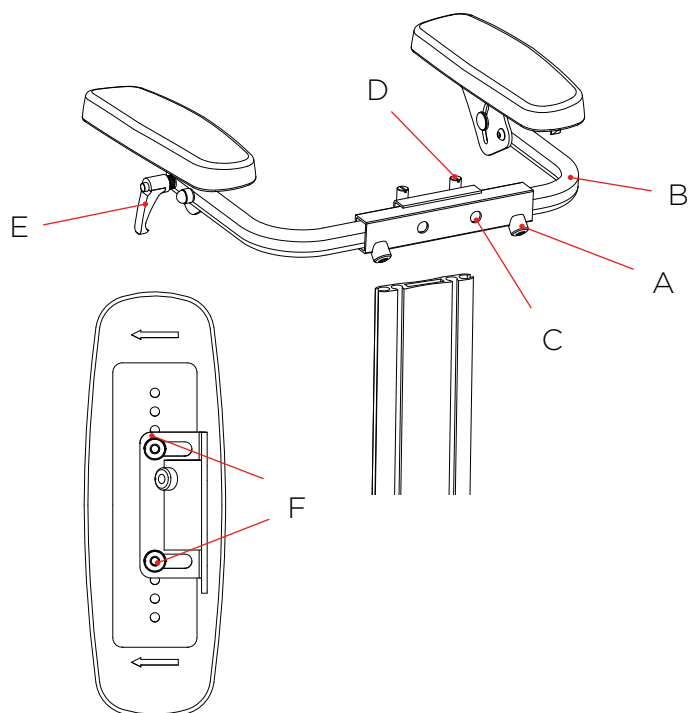

### Montering av skålade armstöd:

Armstöden ska monteras enligt bild med de höga sidorna utåt, bort från kroppen.



## Överarmsstöd

### Montering av överarmsstöd

Montera överarmsstödet med hjälp av fingervred (A), bricka (B) och vagnsbult (E). Notera att vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre vagnsbult. För närmare beskrivning om hur du monterar bålstöd, se sidorna 24-25 i denna bruksanvisning. Stick igenom vagnsbulten (E) genom bålstödet och ryggplattan. Möt sedan upp med överarmstödsbeslag (C), bricka (B) och slutligen fingervred (A).

### Höjjustering av överarmsstöd


För att höjjustera överarmsstödet lossar du fingervredet (A) och justerar sedan till önskad höjd. Dra åt fingervredet (A) när du uppnått önskad position.

### Breddjustering av överarmsstöd

För att breddjustera överarmsstödet lossar du skruvarna (E) och justerar sedan till önskad bredd. Dra åt skruvarna (E) när du uppnått önskad position.

### Polstring

När polstringen behöver tvättas kan du enkelt dra bort denna från Överarmstödsplattan genom att sträcka resåren på baksidan av polstringen. För att återmontera polstringen, trä polstringen över överarmstödsplattan och se till att den sitter centrerat på överarmstödsplattan.

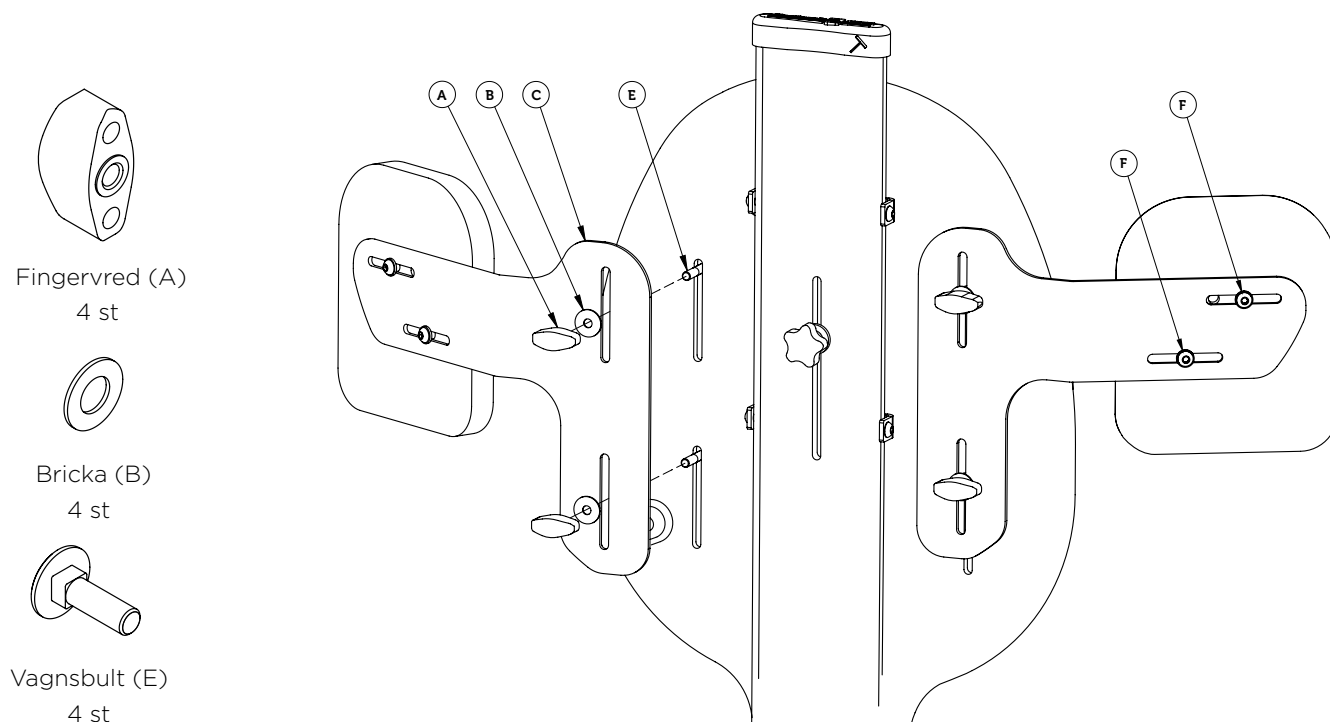


Vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre vagnsbult vid montering av överarmstöd.  
Vid justering av överarmstödet lösgörs även bålstödet för justering.

## Handbåge

### Montering av handbåge

Bågen skjuts in i rör under armstödsplattorna och spärras med vred (A) på båda sidor. Bågen kan skjutas ut på brukarens vänstra sida och roteras bort medan den högra sidan fortfarande sitter kvar i fäströret.

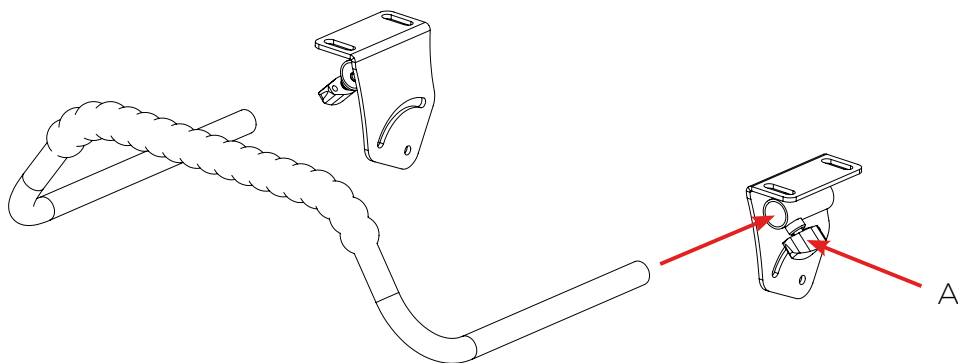



## Bord, fast

### Montering av bord

Lägg bordet på armstödsplattorna och vrid sedan in bordets låsarm under armstödsplattan. Låsarmen ska vridas tills den hamnar innanför kanten på armstödsplattan.

### Byte av monteringshål

Det finns 3 st infästningsbredder att välja mellan. För att byta bredd används valfritt monteringshål under armstödspolstringen i bordets bakkant. I grundutförandet är låsarmen infäst i mittenhålet. För att byta monteringshål måste du först lyfta på polstringen i bakkant. Markeringarna i bordets yttre bakkant visar bara vilken storlek bordet har.

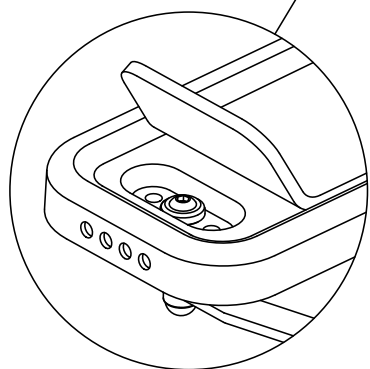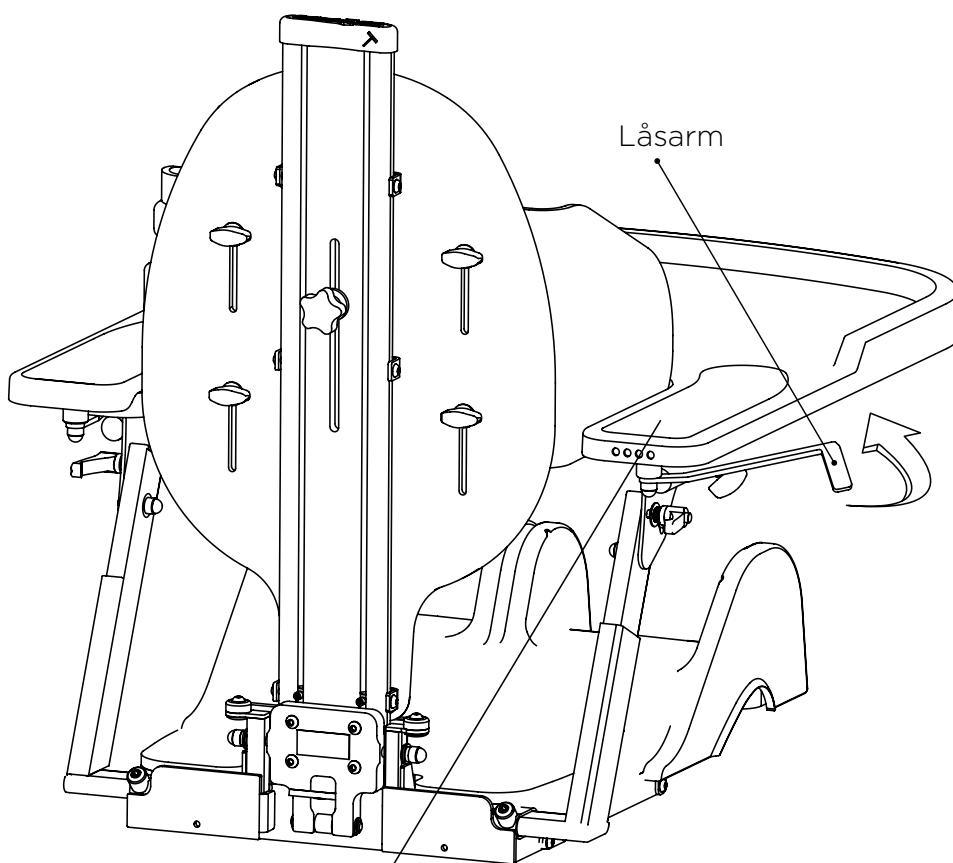

### Infästningsbredder

Välj mellan tre olika monteringshål



Var nogga med att ej lyfta bordet i framkant.

## Bord, vikbart





### Montering av bord, vikbart

För att montera det uppfällbara bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom röret (B) som finns under armstödsplattan. Skjut in bordet till önskad position och låt det vila på armstödsplattorna. Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet.

### Att använda den vikbara funktionen

För att fälla bordet åt sidan lossa först fingervredet (C) något. Lyft sedan bordet något och dra det framåt. Lyft bordet ytterligare och fäll det åt sidan. När bordet är i sitt nedersta läge, skjuter du det bakåt igen och drar åt fingervredet (C).

- 1) Dra fram bordet
- 2) Lyft och dra åt sidan
- 3) Fäll hela vägen ner så att bordet hänger och skjut sedan tillbaka bordet mot ursprungsläget

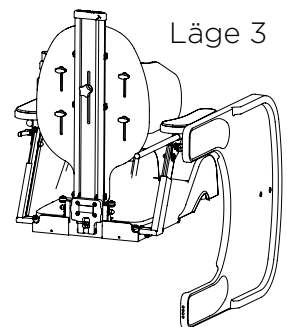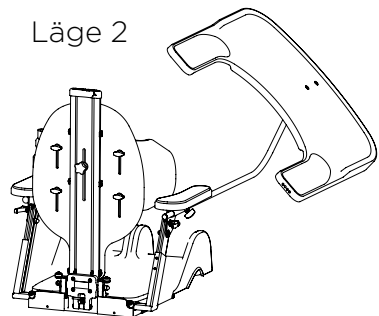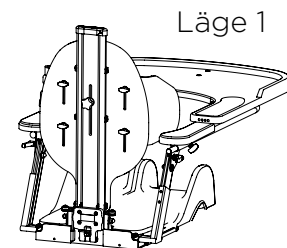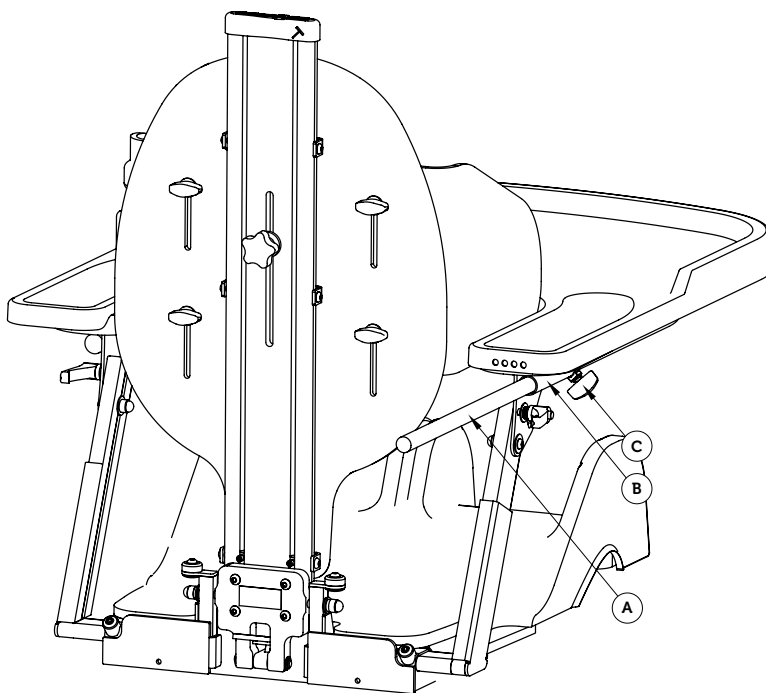

Glöm ej att dra åt fingervredet (C) efter fällning av bordet. Se till att dra bordet tillräckligt långt framåt vid sidofällning så att brukaren ej skadas.

## Bord, förstärkt


### Montering av förstärkt bord

För att montera det förstärkta bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom röret (B) som finns under armstödsplattan. Skjut sedan in bordet till önskad position och låt det vila på armstödsplattorna.

Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet. Vrid sedan in låsarmen tills den hamnar innanför kanten på armstödsplattan.

### Breddjustering av förstärkt bord

I stället för att breddjustera armstöden kan du välja att breddjustera bordets infästningsbeslag så det passar mot infästningsrören i armstödsbeslagen. För att breddjustera bordet lossar du skruvarna (D) något och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).

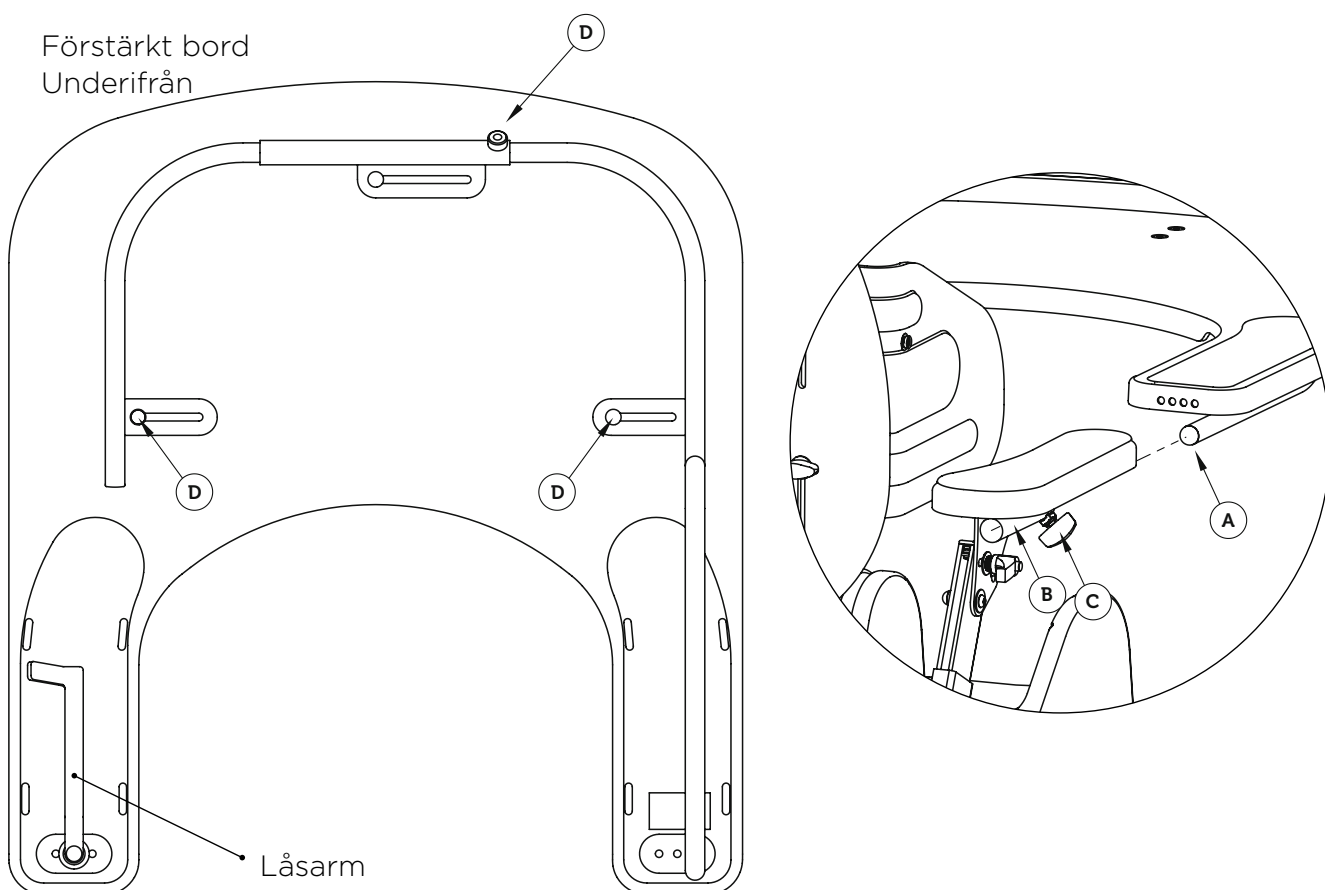


Om inte breddjusteringen i bordets infästningsbeslag räcker till kan eventuellt viss justering av armstödsbredden behöva göras.

## Stödbord

### Montering av bordet

Lägg bordet på armstödsplattorna och vrid sedan in bordets låsarmar (A) under armstödsplattan (B).

Låsarmarna ska vridas tills de hamnar innanför kanten på armstödsplattan.

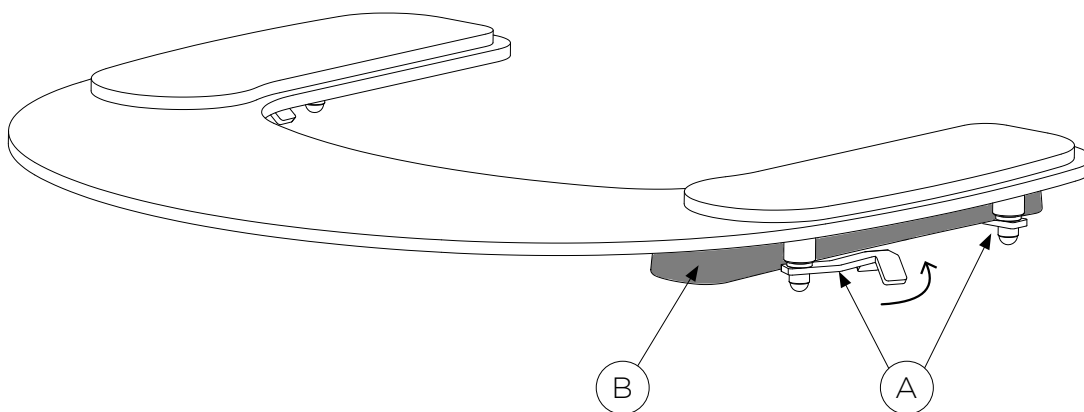

## Bord, konstläder


### Montering av bordet

För att montera det förstärkta bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom röret (B) som finns under armstödsplattan.

Breddjustera armstöden så att de passar mot bordets monteringsrör.

Skjut sedan in bordet till önskad position och låt det vila på armstödsplattorna.

Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet på båda sidorna.

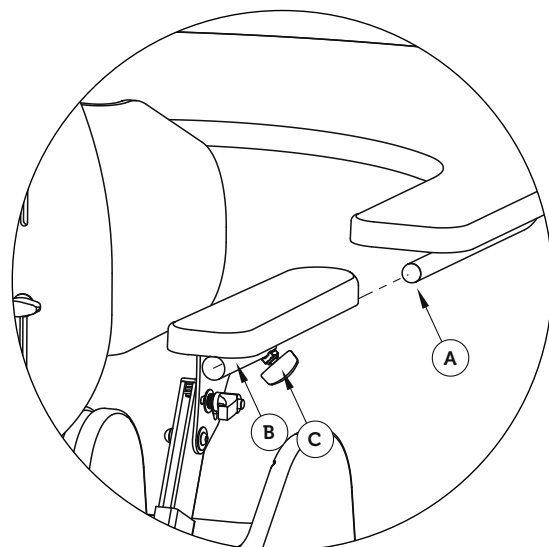

## Fotstöd

### Montering av fotstöd - A

Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkantsrör) Lås fast fotstödet med låsskruven.

### Justering av vinkel av knäled - B

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.


**Viktigt** - Efter justering måste taggarna gå i varandra så det låser. Dra skruven hårt!

### Justering av vinkel vid fotled - C

Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

### Höjjustering av fotplatta - D

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

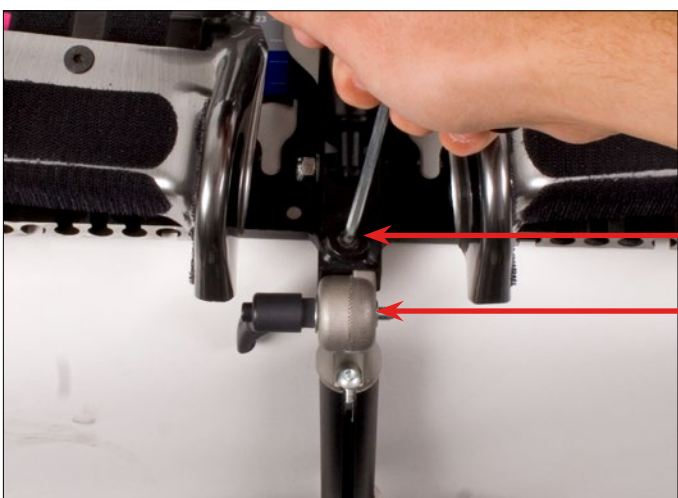

(A) Infästning, fotstöd

(B) Justervred till knäled



○ = Justernyckel 

(C) Skruv för vinkeljustering

(D) Vred för höjjustering

## Delat fotstöd



### Montering av fotstöd - A

Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkant-rör) Lås fast fotstödet med låsskruven.




### Justering av vinkel av knäled - B

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.

**Viktigt** - Efter justering måste taggarna gå i varandra så det låser. Dra skruven hårt!

### Höjdjustering av fotplatta - C

Lossa skruv (C+D), justera sedan till önskad höjd. Lås skruven när önskad höjd är uppnådd.

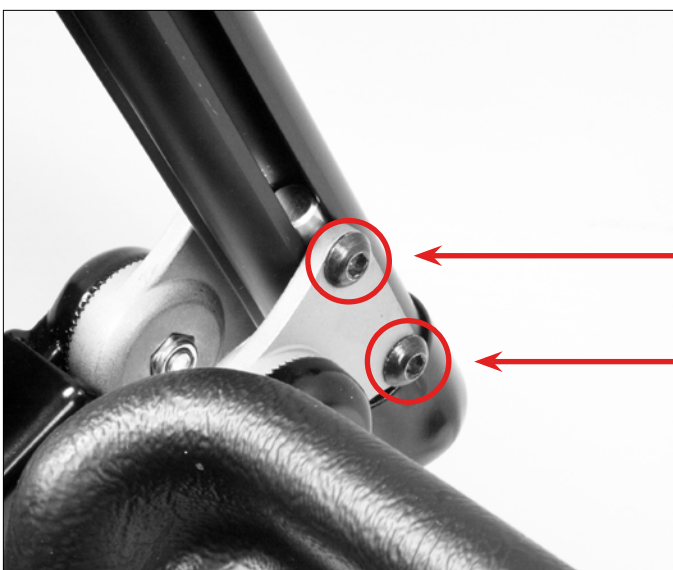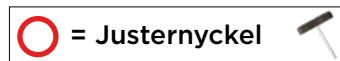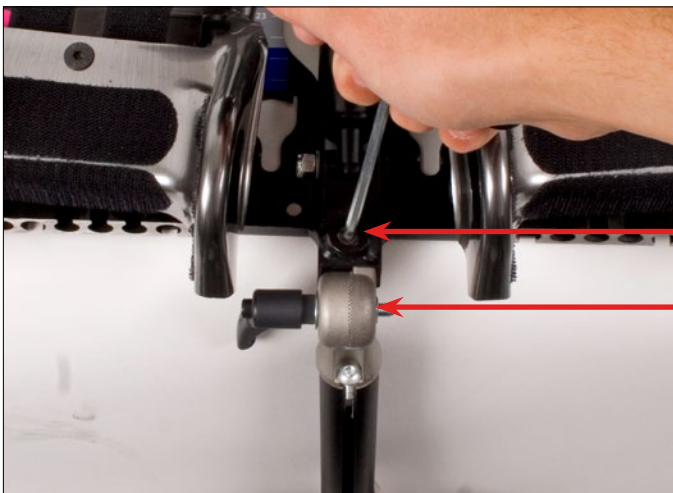

## Fotstöd, hel justerbar

### Justering av vinkel av knäled - A

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.

### Höjjustering av fotplatta - B


Lossa vredet och justera sedan till önskad höjd. Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

### Justering av vinkel vid fotled - C

Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

### Justering av fotplatta - D

Fotplattorna kan justeras både i bred & djup! Lossa skruvarna och justera sedan till önskad position. Lås skruvarna när önskad vinkel är uppnådd.

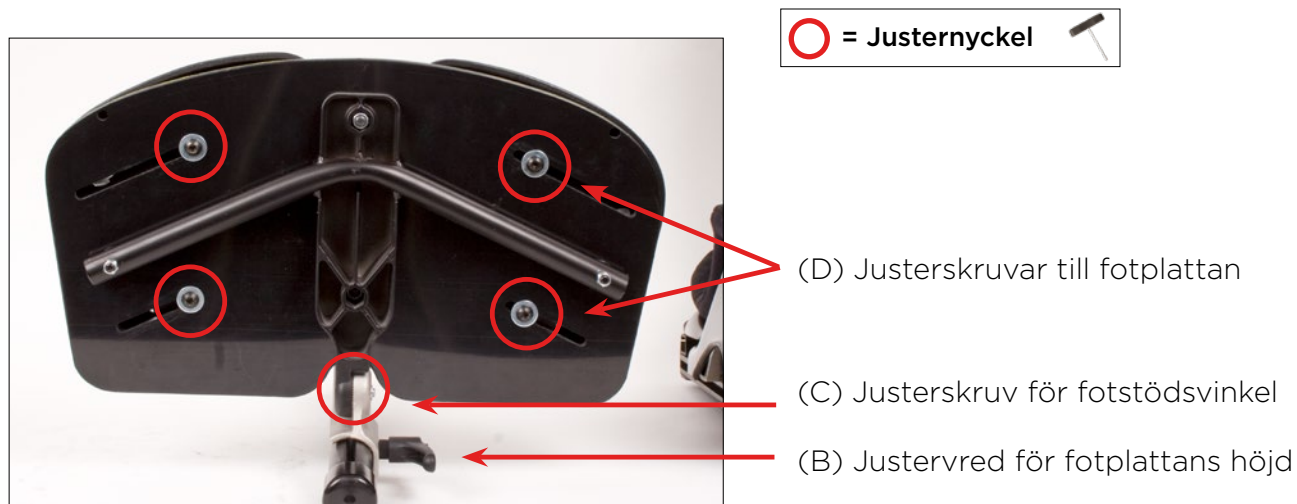

## Fotstöd, delad justerbar

### Justering av vinkel av knäled - A

Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.

### Höjjustering av fotplatta - B



Lossa vredet och justera sedan till önskad höjd. Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

### Justering av vinkel vid fotled - C


Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

### Justering av fotplatta - D

Fotplattorna kan justeras både i bred & djup! Lossa skruvarna och justera sedan till önskad position. Lås skruvarna när önskad vinkel är uppnådd.

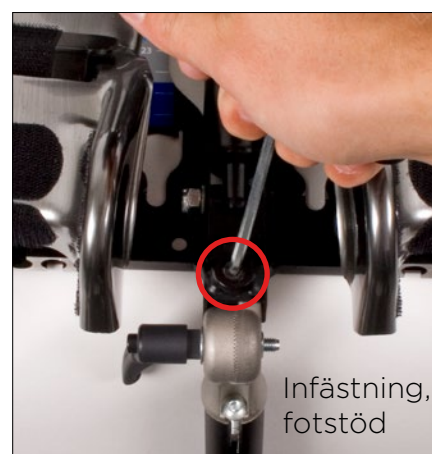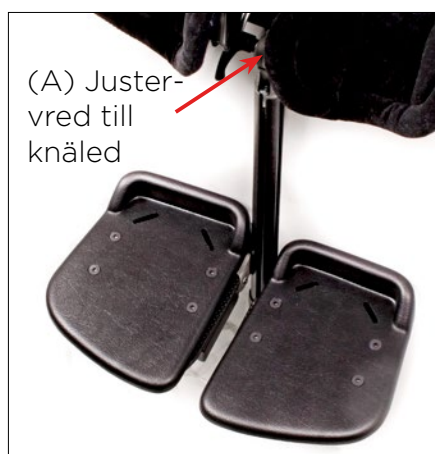

(D) Justerskruvar till fotplattan

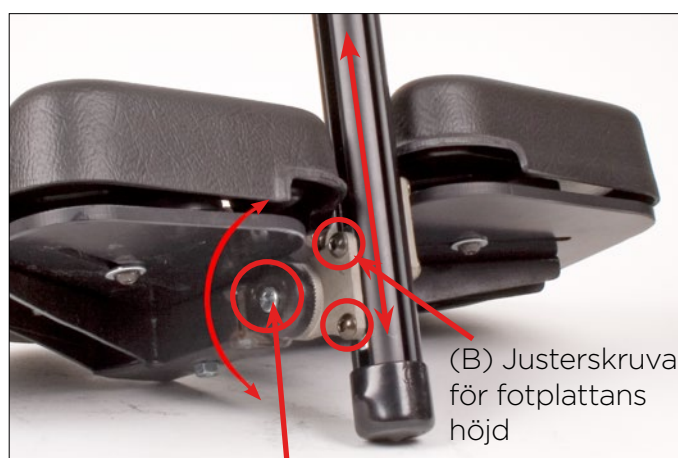

(C) Justerskruvar för fotstöds vinkel

## Fotstöd, uppfällbart

### Montering av fotstöd - A

Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkantströr)  
Lås fast fotstödet med låsskruven

### Justering av vinkel vid knäled - B


- Lossa fingervredet enligt position B
- Justera till önskad vinkel
- Lås fingervredet

### Höjdjustering av fotplatta - C

- Lossa vredet enligt position C
- Justera till önskad höjd
- Lås skruvarna.

### Justering av vinkel vid fotled - D

- Lossa skruven. Justera sedan till önskad vinkel.
- Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

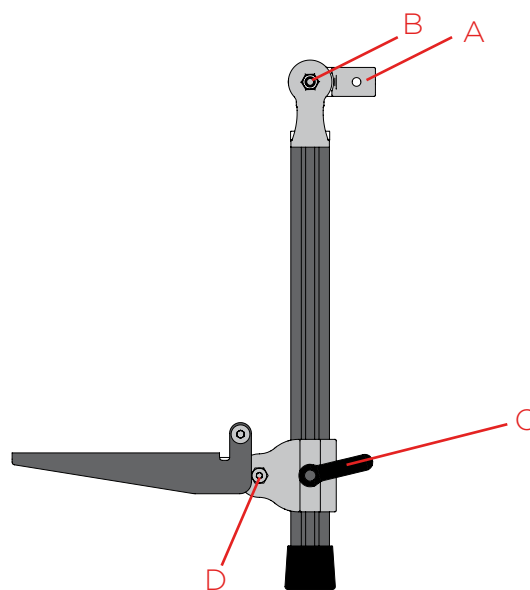

## Fotstöd, fjädrande fotstödsadapter

### Fjädrande fotstöd


Zitzi Delfi Pro kan även utrustas med fjädrande fotstöd för att bryta eventuell spasticitet och skapa dynamik i sittandet.

### Höjdjustering

Lossa skruvar enl. position A.

### Vinkeljustering på fotstöd

Lossa på skruv enl. position B och vinkla fotstödet till önskad vinkel.

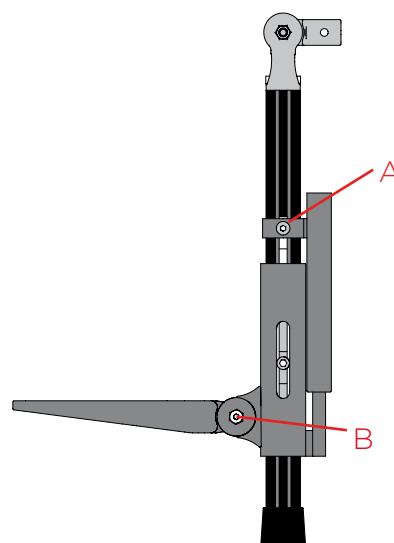

För att flexfunktionen ska fungera optimalt bör fotstödsstaget vara riktat nedåt.

## Fotlåda enkelstag


### Montering av fotlåda med enkelstag vid efterbeställning

Byt ut nuvarande fotplatta mot den medföljande. Eftersom att fotlådan är konstruerad på ett sådant sätt så att passar både enkelstag och dubbelstag behöver fotplattan borraras beroende på vilken typ av fotplatta du har.

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E). Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

### Montering av fotlåda med enkelstag vid beställning med fotstöd

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E). Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

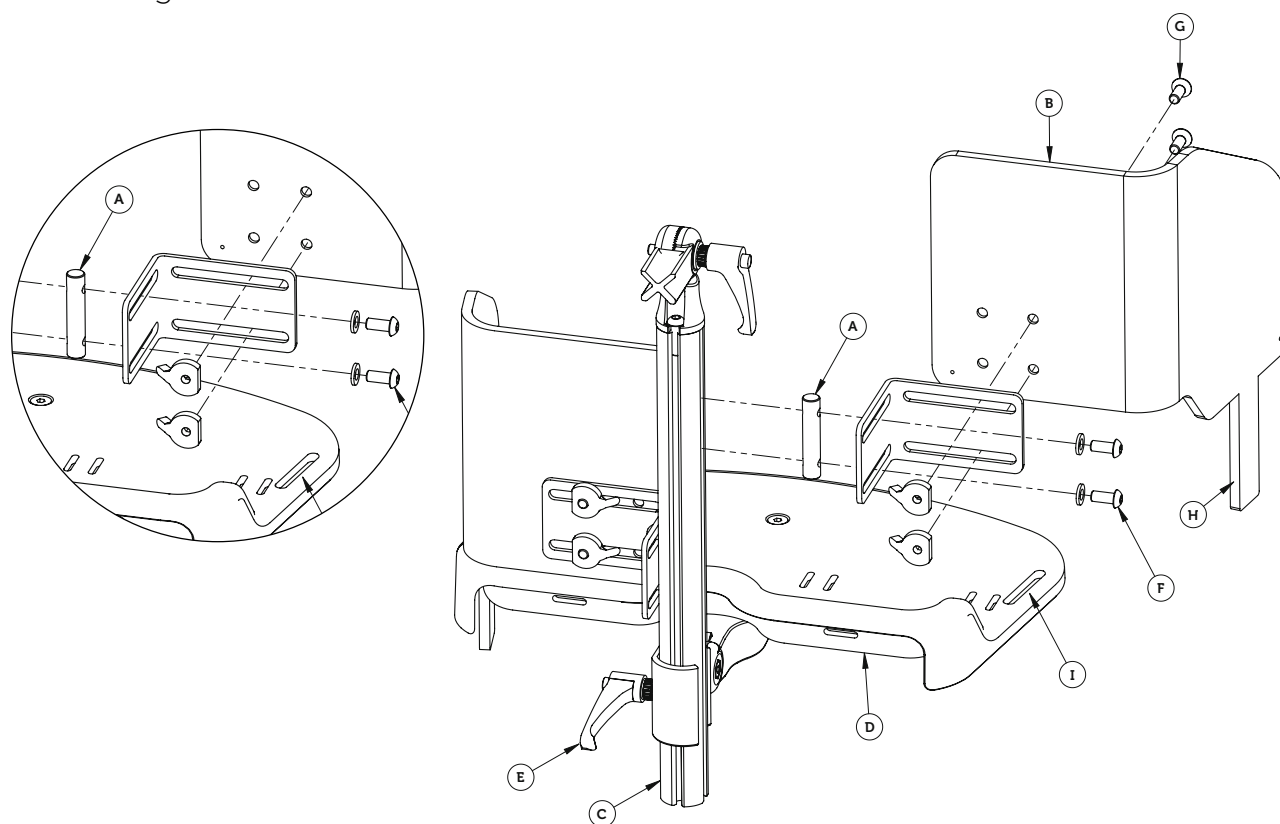



Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål. Markeringar för borrhål även finns markerat under fotplattan.

## Från enkelstag till dubbelstag


### Från enkelstag till dubbelstag och vice versa

Som standard kommer fotlåda storlek 2, 3 och 4 förmonterade för dubbelstag och storlek 1 är förmonterad för enkelstag.

För att ändra mellan de olika varianterna vänder du vinkelblecket (A) 180 grader och byter sedan sida på sargsprinten (B).

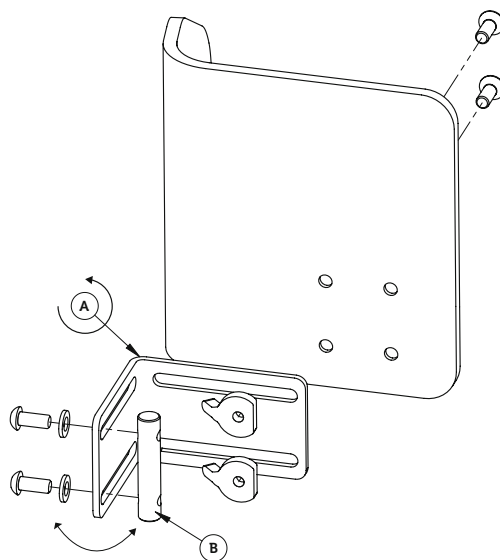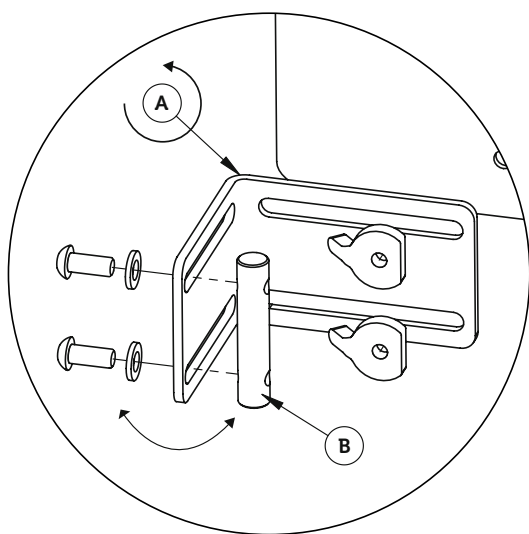


## Tekniska data

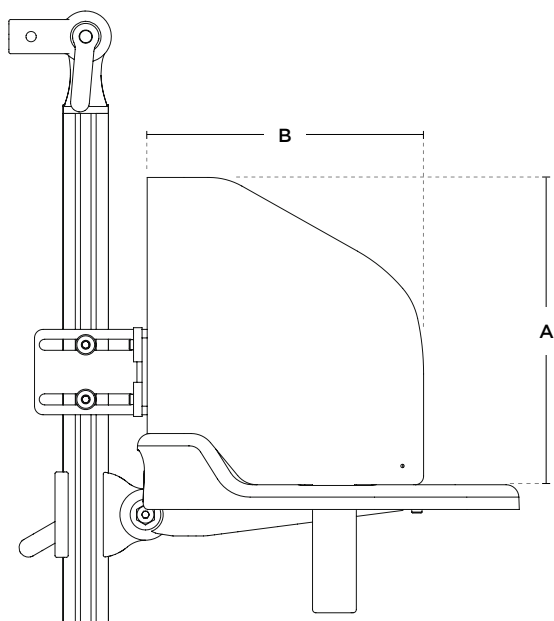

För hel / delad fotplatta	Storlek	Höjd (A)	Djup (B)
990041 / 990046	1	140 mm	130 mm
990042 / 990047	2	170 mm	160 mm
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm


## Vadstöd

Lossa på skruvarna A för att justera till önskad höjd och djup. Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd. Lossa skruvarna B för att justera bredden på vadstödsplattorna. Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.

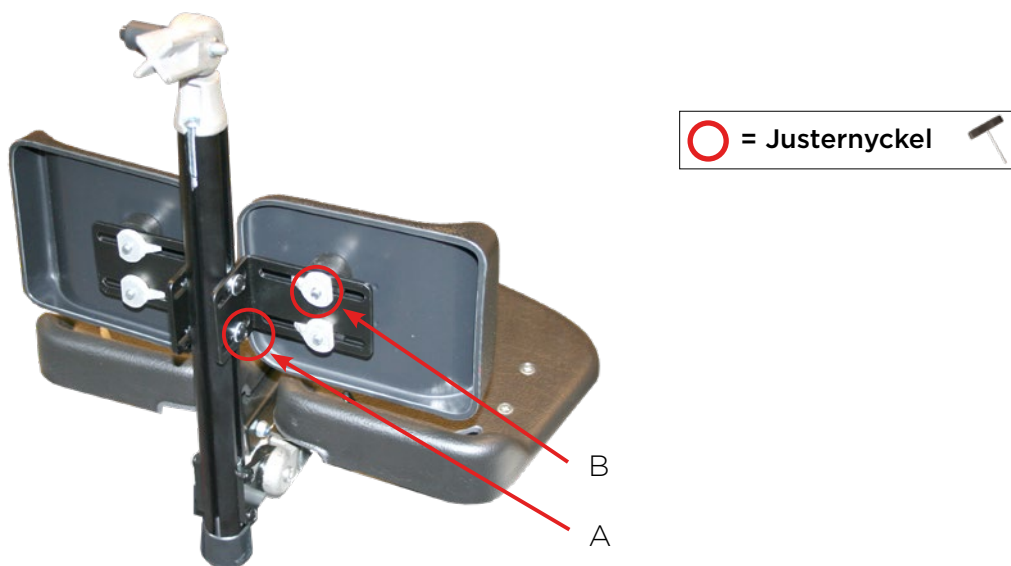

## Lekbåge

Lekbågsfästet monteras på rygprofilen. Tag först bort verktygsnyckeln som sitter integrerad i rygprofilen. För sedan ned lekbågsfästet i rygprofilens spår enligt position B. Lås sedan lekbågsfästets position genom att använda skruvarna C. När lekbågsfästet är på plats och i låst position för du ned lekbågen enligt position D.

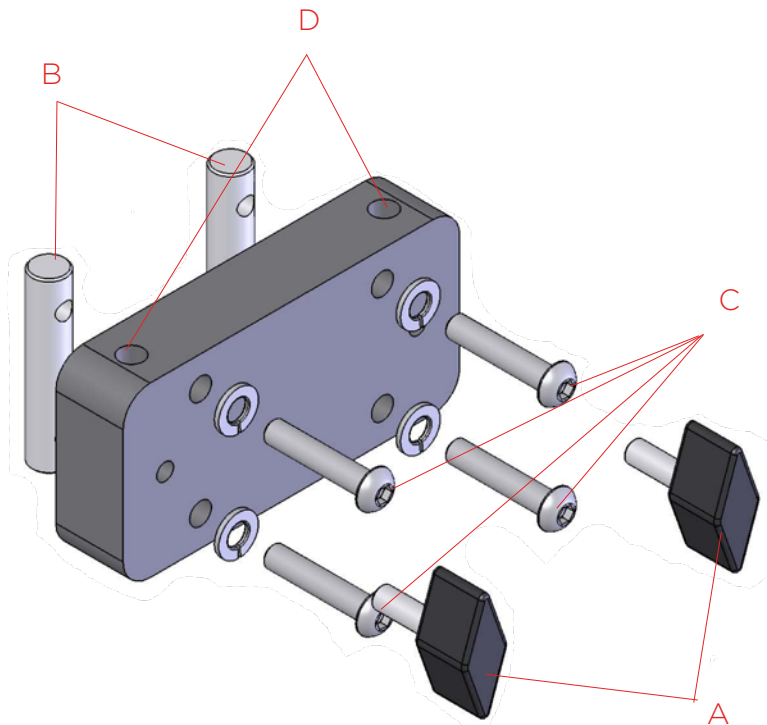


### Montering av huvudstöd vid användning av lekbåge

Om det även ska monteras huvudstöd monteras huvudstödsfästet på fästet till lekbågen. Fästes med längre skruv och fjäderbricka.



## Körbåge


- 1) Ta bort t-nyckeln från ryggsprofilen.
- 2) För in sargsprintarna (A) i spåren på ryggsprofilen och för körbågen till önskad position.
- 3) Dra åt skruvarna.

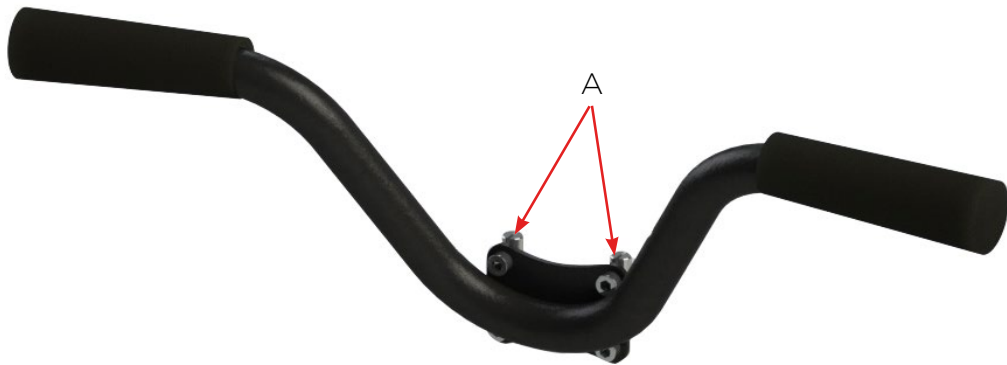

## Sufflett


### Montering av sufflett

Börja med att avlägsna eventuellt huvudstöd. Lossa sedan på skruvarna (A) och för in sargsprintarna (B) i profilen. Justera till lämplig höjd och dra åt skruvarna. Suffletten kan avlägsnas från fästet genom att lossa vredet (C) och dra ut suffletten åt sidan.

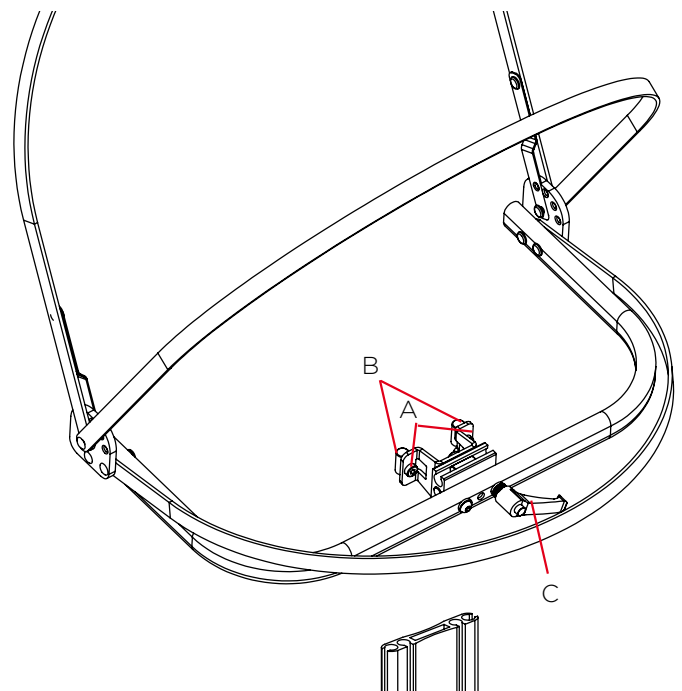

## Svankstöd/Svankstöd med pump

- A) Ta bort ryggfodret.
- B) Fäst svankstödet på ryggfodret (inom det markerade område) med hjälp av medföljande karborre.
- C) Sätt tillbaka ryggfodret.

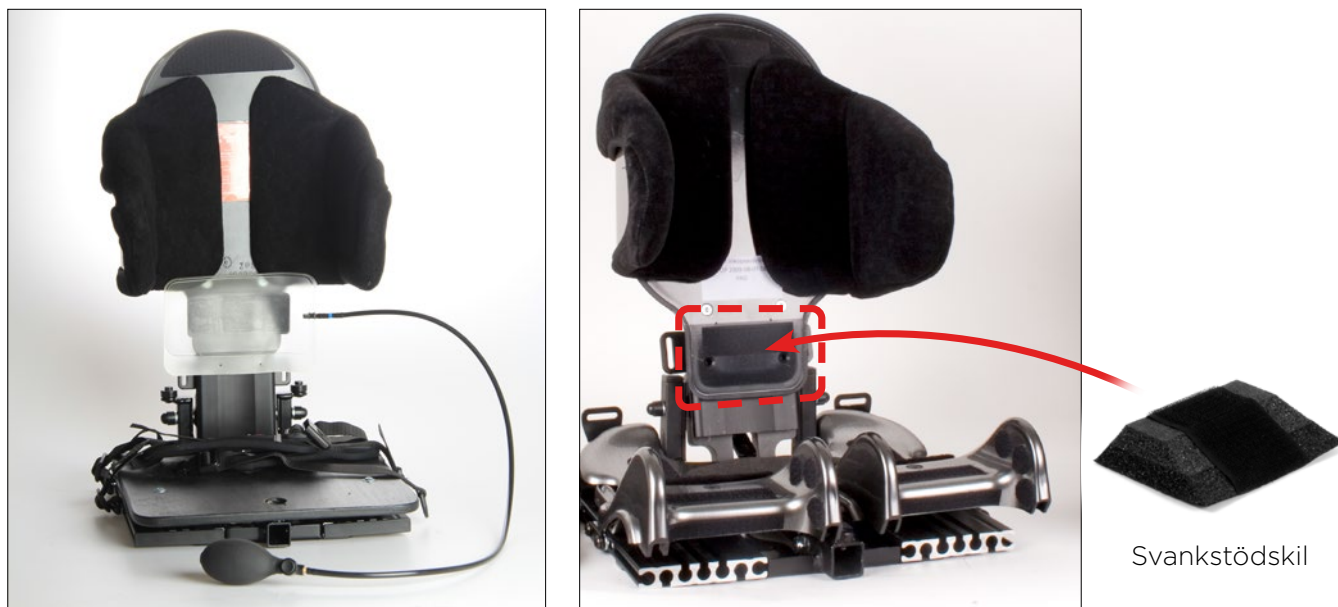

## Värmepaket

Värmepaketet håller kroppstemperaturen uppe och förhindrar avkyllning vid kallt väder. När kroppstemperatur uppnåtts slår värmepaketet av för att spara energi. Om temperaturen sjunker aktiveras det igen och värmer på nytt upp till kroppstemperatur. Värmeplattorna fästs på fodret med karborrefäste.



- A) Sittdelsplatta
- B) Ryggplatta
- C) Batteri och kontroll dosa

## Sammanfattning och efterkontroll

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.

Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska samtliga vred, infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.

Kontrollera så att hjälpmedlet är korrekt balanserat för att säkerställa att ev tipprisk utesluts.

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

# Transport i fordon

Vid transport i bil med Delfi Pro monterad på underrede ska anvisningar från tillverkaren av underredet följas.


## Säkerhetsband

Ett band levereras till sitsen med avsikt att spännas från sitsens rygg och runt chassits körbåge.

Se till att detta band alltid sitter stabilt och spänt under transport.

## Krocktestad och godkänd

Produkten är krocktestad och godkänd enligt ISO 16840-4. Denna standard medger att sittsystemet kan användas på underreden godkända enligt ISO 7176-19 med bibehållet krockgodkännande.

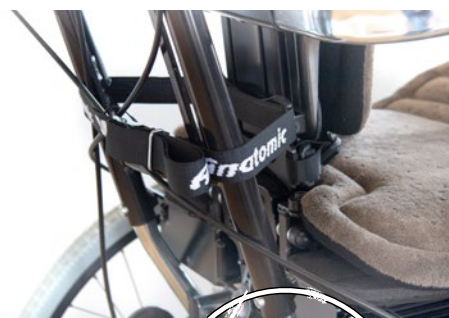

## Följande ska beaktas innan transport:

- Bord och andra lösa tillbehör ska tas bort innan färd.
- Huvudstöd/nackstöd ska användas.
- Stolens rygg ska vara i ett så upprätt läge som möjligt.
- Benstöden ska vara nedvinklade så mycket som möjligt.
- Brukaren ska alltid använda fordonets fast installerade trepunktsbälte.



Krockgodkännande gäller brukarvikter upp till 75 kg.

# Underhåll och skötsel­anvisningar

Denna produkt är ett medicinsktekniskt hjälpmedel avsett för flergångsbruk. För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert samt nå bedömd livslängd är det därför viktigt med tillsyn, underhåll och rengöring. Vid utbyte av delar i samband med underhåll och service ska alltid originaldelar från Anatomic Sitt användas.

Definitioner:

Generellt skiljer man på avhjälpande underhåll, service och förebyggande underhåll.

- Med **avhjälpande underhåll** avses åtgärder för att reparera en trasig produkt, ett akut underhåll, svårt att planera i tid och ofta beroende av produktens användning.
- **Service** avser en enklare översyn som kan förlänga produktens livslängd. Här ingår exempelvis kontroll av skruvar och fästelement, rörliga delar, allmänt slitage mm samt mindre reparationer.
- Med **förebyggande underhåll** avses åtgärder föranledda av förutsägbara begränsningar i produktens prestanda. Denna typ av underhåll kan ses som åtgärder av engångskaraktär som är planerade till tid, art och omfattning. För denna produkt fordras inget förebyggande underhåll under produktens förväntade livslängd.

## Kontroll före användning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:

- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera produktens stabilitet
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende rörlighet samt låsning.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.

Om brister uppmärksammas: Använd ej produkten. Kontakta din distributör av hjälpmedlet för åtgärd.

## Skötsel

Behovet av rengöring skiftar och måste bedömas från fall till fall beroende på produktens användning men minst en gång varje vecka rekommenderas.

Rengör plast och metalledar med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata tvättrådsetiketter på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar för respektive positioneringshjälpmedel.

## Service och avhjälpande underhåll

Service utförs för att i första hand förlänga produktens livslängd och för att kontrollera eventuellt behov av avhjälpande underhåll. Behovet av översyn/service skiftar och får bedömas från fall till fall beroende på produktens användning och slitage men minst en gång var 6:e månad rekommenderas.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen. När trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut, använd bara originaldelar från Anatomic Sitt så produkten bibehåller sin CE-märkning. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för aktuell produkt.

Vid varje servicetillfälle ska det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att produkten är säker att använda. Om det finns brister som påverkar säkerheten och inte kan åtgärdas ska produkten tas ur bruk.

För rengöring av produkten, se avsnittet Skötsel.

### Kontrollera följande och åtgärda vid behov:

- Kontrollera produktens samtliga funktioner.
- Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och skador.
- Kontrollera att alla skruvar, muttrar och bultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla vred är hela och fungerar.
- Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
- Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så det är utan skador och låser korrekt.
- Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling. Både avseende justeringsmöjligheter, rörlighet samt låsning.
- Kontrollera att kolven låser i valt läge
- Kontrollera ev. slitage på alla leder, taggleder och fästen. Säkerställ att de låser som de ska.
- Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.
- Kontrollera märkning, etiketter och varningssymboler så de är hela och läsbara.

## Efterkontroll

När service är utförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.

## Rekonditionering

Rekonditionering görs lämpligen om hjälpmedlet är personligt och ska ges till en ny brukare eller långtidsförvaras. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen.

Vid utbyte av delar ska Anatomic Sitt originaldelar användas.

För information om produkten och dess funktioner, se bruksanvisning på [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). För information om produktens livslängd se avsnitt, Begränsningar i bruksanvisningen.

Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Vid varje rekonditioneringstillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan åtgärdas genom rekonditionering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.

## Rengöring

Rengör plast och metalledar med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande ämnen eller lösningsmedel.

Avlägsna polstring, foder och bälten/selar. Polstring är en förbrukningsvara och ska bytas ut vid behov. Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata tvättrådsetiketter på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar för respektive positioneringshjälpmedel.

Produkten kan med fördel rengöras i tvättkabinett, 60°C i max 10 minuter. Avlägsna foder och bälten/selar vid rengöring av sittsystemet i tvättkabinett.

## Tork

Sittsystemet kan torkas i kabinett i max 60°C i upp till 10 minuter.

### **Kontroller vid rekonditionering**

Efter rengöring och torkning kontrolleras produkten på skador/slitage. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se avsnitt Begränsningar i bruksanvisningen) när en bedömning görs för att kontrollera om produkten är lämplig att rekonditionera.

Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut. Använd bara originaldelar från Anatomic Sitt. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för aktuell produkt. För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.  
Säkerställ att bruksanvisning och alla originaletiketter medföljer vid ny förskrivning.

### **Etiketter/dekaler**

Vid behov av nya etiketter och dekaler, kontakta Anatomic Sitt. För dess placering på hjälpmedlet se [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com) där återfinns även bruksanvisning.

## Kontrollpunkter

Övergripande:

- Kontrollera hela produkten och dess tillbehör för att identifiera trasiga, spruckna eller slitna delar som ska bytas ut.
- Kontrollera produktens samtliga funktioner eller slitna delar som ska bytas ut.

Sitt/ryggdel:

- Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
- Kontrollera att stolens justeringsmöjligheter fungerar.
- Kontrollera att ryggvinklingsfunktionen fungerar och att kolven låser i valt läge.
- Kontrollera foder och byt vid behov.

Fotstöd:

- Gör funktionskontroll av höjd- och vinkeljustering.
- Kontrollera ev. slitage på alla taggleder och säkerställ att de låser som de ska.

Huvudstöd:

- Kontrollera fodret och byt vid behov.
- Kontrollera så huvudstödslederna låser.
- Kontrollera fästet på huvudstödet så det låser.

Armstöd:

- Kontrollera armstödens justeringar för höjd, djup och bredd.
- Kontrollera armstödsfästena så de låser som de ska.

Fästsystem:

- Kontrollera funktionen så att det låser.

Säkerhetsband:

- Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så att det inte har skador och att det låser.

Övriga ev. tillbehör:

- Kontrollera alla delar efter slitage, byt vid behov.
- Kontrollera ev. låsningar och justeringsmöjligheter.

## Efterkontroll

När rekonditionering är utförd kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett. Kontrollera också att märkning, etiketter och varningssymboler är hela och läsbara.

# Avfallshantering

## Återvinning

En förbrukad del eller produkt ska demonteras. Delarna ska separeras efter materialtyp och lämnas på återvinningscentral eller motsvarande. Gaskolv sorteras som farligt avfall.

# Garanti och retur

## Garanti och reklamation

Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabriktionsfel fr.o.m. leveransdatum eller enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedöma reklamationen ska produkten vara torr och rengjord när den skickas åter.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

## Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Observera att specialanpassade produkter inte går att returnera!

# Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts.

## **Tekniska data / Prestanda**

Ny info bord, konstläder s. 11

## **Montering och Justeringsanvisningar**

Användning av Active - rygg (nytt tillbehör) s. 20

Förstärkt rygg: ny text om vagnsbultar s. 23

Bord, konstläder (nytt tillbehör) s. 41

## **Transport i fordon**

Kompletterande text s. 54

## **Revisionsförteckning**

rev. 2.0 - 2021-03-09

rev. 2.1 - 2021-05-25

rev. 2.2 - 2021-12-21

rev. 2.3 - 2023-02-20

rev. 2.4 - 2023-08-15

rev. 2.5 - 2023-09-13

rev. 2.6 - 2024-02-12

rev. 2.7 - 2025-02-04

rev. 2.8 - 2026-01-15



SE

**Anatomic Sitt AB (tillverkare)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

**Besöksadress**

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

*World wide*

[anatomicsitt.com](http://anatomicsitt.com)

[info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)

[facebook.com/anatomicsitt](https://facebook.com/anatomicsitt)

[youtube.com/anatomicsitt](https://youtube.com/anatomicsitt)

