

ANATOMIC FORMSTØBTE SÆDER





Anatomic formstøbt sæde har været grundstenen i Anatomic SITT siden starten af 1988. Vi har idag formet mere end 30.000 Anatomic formstøbte sæder, hvilket resulterer i et gedigent kendskab til svære siddestillingsproblematikker.

Anatomic formstøbt sæde er blevet udviklet og forbedret gennem årene, for at vi i fremtiden kan tilbyde endnu bedre siddesystemer til nye og gamle brugere.

ANATOMIC FORMSTØBT SÆDE - Et sæde fuld af muligheder

Tanken er, og har altid været, at skabe siddesystemer, som hjælper borgere med svære siddestillingsproblemer. Forskellen fra tidligere er, at produktionsmulighederne nu er blevet endnu bedre.

Hvorfor et Anatomisk formstøbt sæde?

For at kunne positionere og korrigere en krop, som har svære fejlstillinger, er et stabilt hold en nødvendighed. Lige netop dette opnås i et Anatomic formstøbt sæde. Med store støtteflader og et godt materiale kan man minimere trykket og modvirke risikoen for progrediering af fejlstillinger. Ved tryksårstruede anvender vi ofte trykmåling for at identificere aktuelle risikoområder. Anatomic formstøbt sæde kan også bruges i samspil med et korset. Anatomic formstøbt sæde er et individuelt sæde, fremstillet efter og til den, som skal bruge sædet. Herved får brugeren et optimalt sæde ud fra brugerens krop og behov.



En seriøs proces fra start til det færdige sæde

Med vores mange års erfaring er du i kompetente og trygge hænder.

Efter aftale besøger vi borgeren i hjemmet eller i kommunens faciliteter.

Vi ser på borgerens sygdomsbillede og livsvilkår, og har naturligvis pårørende, terapeuter og plejepersonale med i de samlede overvejelser.

Efter forundersøgelsen opbygger vi støbepuden efter borgerens krop, til det ønskede resultat er opnået. I denne del af processen vil vores ortopædtekniker og en konsulent være til stede.

Formen i støbepuden bliver 3D-scannet og sendes straks til produktionen i Sverige.



Hvorfor skal du vælge et formstøbt sæde fra Anatomic SITT?

1. Mange års erfaring
2. Stor faglighed
3. Samarbejde med fysio- eller ergoterapeut
4. Forundersøgelse og problemlokalisering er en vigtig del af processen
5. Specialløsninger ingen hindring
6. Kun fantasien sætter grænser

Det færdige sæde kan monteres på mange forskellige manuelle eller el stel.



Et individuelt fremstillet Anatomic formstøbt sæde giver den absolut bedste støtte og fås med meget forskelligt tilbehør.

Vigtigheden af god støtte er altafgørende for at forebygge fejlstillinger, eller at forhindre eksisterende fejlstillinger i at blive værre. En god støtte forbedrer organernes funktion, lindrer smerter og giver bevægelsesfrihed.



*I kombination med vores kørestolsstel

Anatomic **formstøbt sæde**

- God trykaflastning
- Individuelt fremstillet til den enkelte bruger for optimal trykfordelingsflade og komfort
- Stabiliserende / positionerende.
- Kombiner det med et fleksled for et dynamisk sæde
- Ny / genbestil uden ny gibsning / scanning
- God fast støtte
- God kvalitet / lang holdbarhed

Tilvalg:

- Ventilationshuller, der gør sædet køligere og giver god ventilation
- Vælg vaskbart/aftageligt RR-betræk
- Vælg mellem forskellige skumtyper / materialer alt efter behov for trykaflastning og positionering
- Mulighed for at indsætte en ventilator, der giver et køligt sæde

PRODUKTNAVN

Anatomic formstøbt sæde, lille

Anatomic formstøbt sæde, stor

Anatomic formstøbt ryg, forberedt til siddepude

Varenr.

7723-1

7724-2

7723

HMI-nr.

20257

20628

54398



Et sæde for dig, som har brug for god støtte men har brug for ekstra komfort og trykaflastning.

Anatomic formstøbt sæde Soft Sits fås med forskellige skumvalg til forskellige behov for trykaflastning og komfort, i forskellige farver, med forskellige typer betræk og et stort udvalg af tilbehør



*I kombination med vore kørestolsstel

Anatomic **formstøbt sæde soft**

- Høj trykaflastning
- Individuelt fremstillet til den enkelte bruger for optimal trykfordelingsflade og komfort
- Stabiliserende / positionerende
- Mulighed for justerbar hoftevinkel
- Ny / genbestil uden ny gibsning / scanning
- God fast støtte
- God kvalitet / lang holdbarhed

Tilvalg:

- Ventilationshuller, der gør sædet køligere og giver god ventilation
- Vælg Coolmax betræk som gør sædet køligere
- Vælg mellem forskellige skumtyper / materialer alt efter behov for trykaflastning og positionering
- Mulighed for at indsætte en ventilator, der giver et køligt sæde

PRODUKTNAVN

Anatomic formstøbt sæde SOFT

Anatomic formstøbt ryg SOFT, forberedt for siddepude

Varenr.

7731

7732

HMI-nr.

70910

124320



Nyhed!

Anatomic formstøbt sæde Soft Alu Aluminiumssædet er primært udviklet i vores bestræbelser på at opfylde miljøkravet om at reducere brugen af plastprodukter i vores produktion og slutprodukt. Ved at udskifte plastskallen på vores bløde sæder med aluminium reducerer vi brugen af forskellige plastprodukter betydeligt.



Anatomic formstøbt sæde soft Alu

Vores nye Anatomic formstøbt sæde Soft Alu har en sædeskal af aluminium, men samme skum og gode trykaflastende egenskaber som almindelige Anatomic formstøbt sæde Soft med en sædeskal af plast. Sædeskallen i aluminium har flere fordele::

- **Klimahensyn**
Aluminiumsskallen betyder en betydelig reduktion af plast i både produktionen og det færdige sæde.
- **Let og stærk**
Aluminium har den fordel at veje lidt samtidig med at det er stærkt, hvilket gør det muligt at holde vægten på siddesystemet nede.
- **Plane overflader**
Sædeskallens flade overflader gør det lettere at montere forskelligt tilbehør som armlæn, nakkestøtter, hofteseler og seler. Beslag kan monteres i en vinkel, hvilket gør det let at justere tilbehøret.
- **Enkel montering**
Montering og balancering af Anatomic formstøbt sæde soft Alu på kørestolsstellet er særlig nemt.
- **Simpel vedligeholdelse**
Skumpuderne til sædet og ryglænet har flade dele mod ALU-skallen, hvilket forenkler for- men på betrækkene og gør det nemmere at tage dem af og på under vask eller rengøring.

PRODUKTNAVN

Anatomic formstøbt sæde soft Alu

Varenr.

778101

HMI-nr.

140258



Kombiner det bedste fra to verdener, et Anatomic formstøbt sæde Soft i kombination med et klassisk Anatomic formstøbt sæde.

På billedet ses et sæde til et aktivt kørestolstel, her har man kombineret et blødt sæde (Anatomic formstøbt sæde Soft) med høj trykaflastning med en fastere rygdæl (Anatomic formstøbt sæde) for støtte og maksimal stabilitet og positionering af lænderyggen.

Anatomic formstøbt sæde **Kombi**

- Stabiliserende / positionerende
- Sæde til dem med svær siddeproblematik
- Fungerer også virkelig fint til aktive kørestole
- Mulighed for flex-led til et dynamisk sæde og delvis indstillelig rygvinkel
- Fast støtte
- Varmebeetræk, som er særligt dejligt om vinteren
- Mulighed for at have flere indlæg, hvilket giver dig fleksibilitet ifht. plads til tykkere tøj om vinteren.

PRODUKTNAVN

Anatomic formstøbt sæde Kombi, lille

Anatomic formstøbt sæde Kombi, stor

Anatomic formstøbt sæde Kombi med airseat, lille

Anatomic formstøbt sæde Kombi med airseat, stor

Varenr.

775310

775311

775350

775360

HMI-nr.

120085

120089


120092

120095

Eksempler på tilbehør




Airseat - ventilationspakke

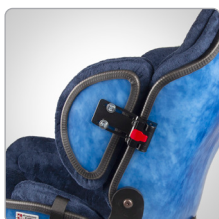

Indst. kropsstøtte



Aflastende støtte

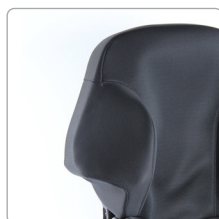

Formstøbt overarmsstøtte Soft



Individuel nakke/hovedstøtte

Nyhed!



Den menneskelige krop er ikke designet til at sidde stille i lange perioder. Du skal kunne bevæge dig og de fleste skifter stilling ofte, når de sidder, men for personer med funktionsnedsættelser kan det være svært.

Anatomic Motion seat er et siddesystem, som kontrolleret følger kroppens bevægelser.



Anatomic Motion Seat Individuel

Anatomic Motion siddesystemet er specielt udviklet til brugere med ekstensionsspasticitet og svære siddeproblematikker.

Brugeren bevarer sin positionering af kroppen og får dermed en blid bevægelse i hofter, ryg og knæled og forhindrer fremadskridning.

Muligheden for ekstension i hofter og knæled aflaster trykket på tuber og mindsker risikoen for tryksår.

Ekstensions- og fleksionsmodstanden i både hofter og knæled justeres individuelt ved hjælp af gasfjedre, hvilket gør bevægelsesområdet kontrolleret og sikkert.

Ved ekstension er siddesystemet designet således, at nakkestøtten bevarer sin position under aktivitet.

Dette sæde er helt individuelt fremstillet efter en scanning af brugeren. Sædet er et todelt Anatomic formstøbt sæde Soft, der er monteret på Motion-stellet for at opnå Motion-seriens dynamik, selv i et helt individuelt formstøbt sæde.



Anatomic formstøbt ryg **forberedt** til siddepude

- Individuelt udformet formstøbt ryg - optimal støtte til den enkelte
- Hjælper med at sikre det rigtige højdeforhold mellem puden og ryggen
- Mulighed for at have flere indlæg, hvilket betyder, at du kan fjerne ét indlæg til f.eks. at give plads til tykt overtøj om vinteren
- Vaskbart betræk
- Mulighed for Airseat

PRODUKTNAVN

Anatomic formstøbt ryg, forberedt til siddepude

Varenr.

7723

HMI-nr.

54398

Anatomic formstøbt ryg SOFT, forberedt for siddepude

7732

124320

Eksempler på tilbehør



Airseat - venti-
lationspakke



H-sele



Hoftebælter



Siddepuder


Vigtigheden af at træffe det rigtige valg

Vi har mulighed for at tilbyde et fleksibelt materiale/modelvalg efter hver enkelt brugers behov. Vores mål er at finde den nødvendige støtte til svære siddeproblemer for at modvirke forekomsten af "fejlstillinger", opretholde symmetri eller rette fejlstillinger, lindre og forebygge tryksår og bryde svær spasticitet. Alle vore materialer har god holdbarhed, formstabilitet samt giver god trykaflastning.

Kombinationen mellem forskellige materialer giver et rigtig godt individuelt sæde !

Mere end 30 års erfaring har givet os viden om, hvordan man kombinerer hårde og bløde materialer til en god siddestilling. I dag bruger vi en række forskellige materialer i fremstillingen. Vi bruger kun gode materialer. De forskellige materialer opfører sig forskelligt i varme og kulde. De har også forskellig luftstrøm.

Vi valgt at bruge PEHD til de formstøbte sæder, fordi det plastik er det bedste for brugeren samt er mest holdbart. Det kan aldrig revne, som det kan ske med ABS-plast. PEHD har også en rigtig god "sejhed" i sig selv, hvilket gør at den simpelthen ikke går i stykker ved f.eks. boring af huller, beslag og opdelinger i plasten f.eks. mellem ryg og sæde. PEHD har også stor dynamik i sig selv, hvilket er godt for brugere med forskellig spasticitet.

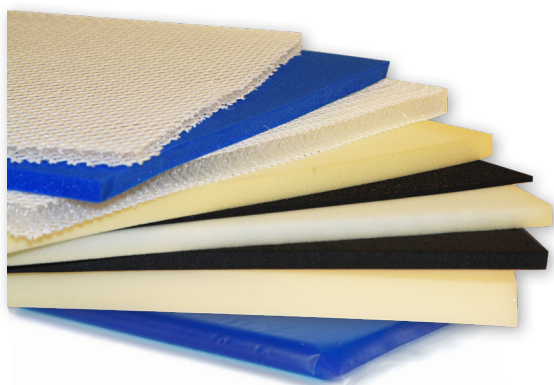

Eksempler på materiale at vælge mellem:

- Koldskum
- Blødt skum
- Memory skum
- RR/Mesh
- PZ
- AZ
- Gele
- Forskellige former af koldskum med forskellige hårdheder

Dynamiske sæder

Vores formstøbte sæder er dynamiske. Sædeskallen er lavet af polyethylenplast, som muliggør bevægelse i sædet. Anatomic formstøbt sæde Soft er både bredde- og vinkeljusterbare i torsoen. Når brugerens behov ændrer sig, er det nemt at foretage justeringer, der sikrer sædets funktion over tid.

Ved Anatomic formstøbt sæde anvendes med fordel et fleksibelt hofteled, som muliggør en justerbar hofte/rygvinkel.

Let ny-/ efterbestilling

Med ny og avanceret teknologi er det nu muligt at genbestille et Anatomic formstøbt sæde Soft uden ny "gibsfæstning" er påkrævet. Dette letter for både bruger, pårørende og plejepersonale. Desuden forkortes leveringstiden til det færdige sæde.

Inkontinensbeskyttelse

Alle betræk til et Anatomic formstøbt sæde Soft kan bestilles med inkontinensbetræk.

Til Anatomic formstøbt sæde kan man ved behov bestille et løst inkontinensbetræk.

Et køligt Coolmax® betræk

Anatomic formstøbt sæde Soft Coolmax® betræk er et højteknologisk betræk designet til at holde dig tør og køligt og øge din komfort. Coolmax®-stoffer er lavet af specialbehandlede polyesterfibre med en unik overfladekonstruktion. Denne fire- eller seks-kannels fiber transporterer den fugt væk fra huden, der opstår, når vi sidder i lang tid og giver dig et køligt, behageligt sæde ved længere brug. Anatomic Soft Coolmax® betræk sammen med Anatomic formstøbt sæde Soft "lufthul" giver den bedste komfort.

Ventilations hul

Med hul gennem både plastskal og sædets materiale bliver sædet ventileret og luften kan cirkulere, hvilket medfører at det bliver svalere.

Crashtestet og godkendt

Anatomic formstøbte sæder er crashtestede og godkendte efter ISO 16840-4:2009 af Sveriges Teknologiske Forskningsinstitut.

Fordi alle mennesker ser forskellige ud

Anatomic formstøbte sæder tilbydes med forskellig materialevalg for at give god funktion og møde forskellige behov for trykaflastning. Betræk tilbydes i mange forskellige varianter og farver.

Eksempler på muligheder og tilbehør

TILBEHØR OG KØRESTOLSSTEL

Der findes et meget stort udvalg af tilbehør til Anatomic formstøbt sæde. Nedenfor ses nogle af dem.

Et Anatomic formstøbt sæde passer perfekt på alle vores **kørestolsstel**, men kan også monteres på kørestolsstel fra andre firmaer, både manulle og el.



Monteringsplade træ




Monteringsplade plast




Adapterplade



Drop base til kørestol med rørsystem

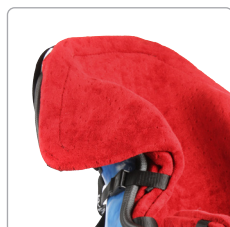

Formstøbt overarmsstøtte

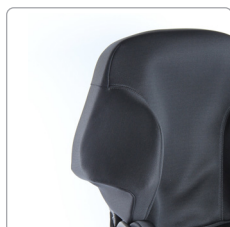

Formstøbt overarmsstøtte SOFT



Aflastende hul



Formstøbt ryg med pude




Ventilationshul




Hul i skum




Airseat - ventilationspakke

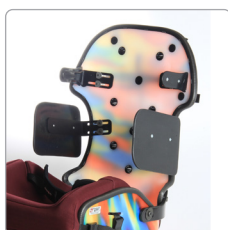


Justerbare kropsstøtter

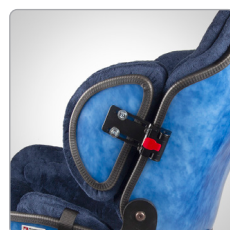

Vipbar kropsstøtte

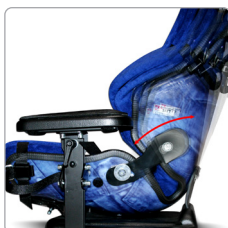

Fleksled, stilbar hofte-/rygvinkel

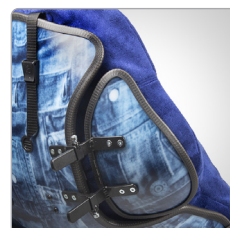

Aflastende støtte



Aftageligt nakkestøttebetræk



Justerbar armlæn



Termopose



Individuel nakkestøtte



Plush nakkestøtte



Pro Serie voksen nakkestøtte



Sidejusterbar hovedstøttebeslag



Justerbart hovedstøttebeslag



Justerbar fod- /lægstøtte



Delt fodstøtte



Dynamisk fodstøtte



Justerbar fodstøtte



Hel fodstøtte



Bord



Forstærket bord



Vipbart bord



Støttebord



Skålformede armlæn



Kropsbælte



Sternumstøtte



H-sele



Hoftebælter



Armbind




Ankelbespænding



Løftehåndtag



Løftebånd

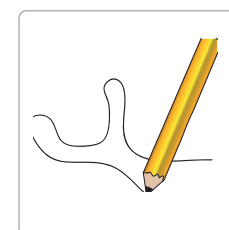

Individuelt tilbehør f.eks. bord, fodstøtte, positioneringsstøtte og armlæn




Individuelt tilpasset støttebord

Plast - og stoffarver

Standard stof



Coolmax stof

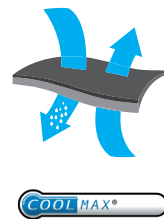

Coolmax® betræk
Har en kølende effekt, hvilket skaber en komfortabel temperatur.

Coolmax® effekt
Frigiver fugt og giver en kølende effekt.

Plastfarver





ANATOMIC FORMSTØBT HYGIEJNESÆDE

Kombineret bad- og toiletstol

Vores hygiejnesæde har alle de fordele som et klassisk Anatomic formstøbt sæde.

Et individuelt formstøbt hygiejnesæde gør det lettere for brugere med alvorlige siddestillingsproblemer at klare deres hygiejne i bad og på toilet. Sædet er optimalt, når brugeren har særlige behov for individuel støtte og trykaflastning.

FAKTA

Et Anatomic formstøbt sæde kan fremstilles efter samme form som Anatomic formstøbt hygiejnesæde og omvendt.

Bestiller man et Anatomic formstøbt hygiejnesæde inden for to år efter at man har bestilt et almindeligt Anatomic formstøbt sæde, kan man få det til en særlig attraktiv pris.



Polstringsmaterialet

Et Anatomisk formstøbt hygiejnesæde har et komfortabelt polstringsmateriale.

Materialet er specielt designet til hygiejnesituationer og er både vand- og smudsafvisende samtidig med, at det føles behageligt mod huden.

Justerbar tilt og hoftevinkel

Fast støtte er nødvendig for at positionere brugeren og skabe en funktionel siddestilling. Sædeskallen er lavet af polyethylenplast, der muliggør bevægelse.

Billedet viser: Individuelt udformet hygiejne sæde, aftagelig polstring, multijusterbar hovedstøtte, sædedel med hul til toiletbesøg.

ANATOMIC FORMSTØBT HYGIEJNESÆDE



Passende stel

Starfish Pro stellet tilbydes i 3 forskellige størrelser og i modellerne: Manuel, Hydraulisk og Elektrisk højdejustering. For mere information om Starfish Pro, se anatomicssitt.dk.

Anatomic formstøbt hygiejnesæde kan monteres på mange forskellige manuelle stel.



Starfish Pro Manuel
Fast stel med manuel højdejustering (uden værktøj) sædehøjde mellem 50-63 cm.



Starfish Pro Hydraulisk
Højdejusterbart chassi med fodpedal til hyalrisk højdejustering. Sædehøjde mellem 50-78 cm.



Starfish Pro Elektrisk
Højdejusterbart chassi med håndkontrol til elektrisk højdejustering mellem 50-78 cm sædehøjde.

Eksempler på tilbehør




Hovedstøtte



Lang nakkestøtte



Formstøbt nakkestøtte

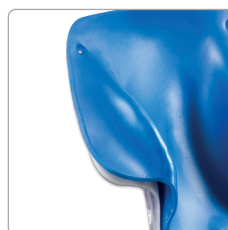

Formstøbt støtte for overarm



Stilbar hofte-/rygvinkel



Fodstøtte



Delt fodstøtte justerbar adapter



Lægplade



Polstring



Potte

Eksempler på tilbehør



Armlæn fra ryg
str. 1



Armlæn fra ryg
str. 2



Armlæn fra chassi



Bord



Kørebøjle



Sternumstøtte



H-sele



Hoftebælte



Antirotations-
bælte



Øvre monterings-
fæste



Armbind



Ankelbespænding



Anti-tip støtte



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

