



Zitzi
Guppy G2

Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,
service, vedligeholdelse og renovering



Denne brugermanual gælder for Zitzi Guppy G2 udendørs kørestolsstel med tilbehør. For en komplet oversigt over det tilsigtede tilbehør, se produktets bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent og forhandler.....	3	Bremse	22
Specialtilpasning.....	3	Parkeringsbremse	25
Introduktion	4	Sædetilt.....	26
Indledning.....	4	Fodstøtte.....	27
Korrespondence - mærkning	4	Fodstøttebeslag.....	28
CE-mærkning - klassificering	4	Fodkasse	30
Overensstemmelseserklæring.....	4	Lægstøtte	31
Tilsigtede formål.....	4	Kørebøjle	32
Symbolliste.....	5	Armlæn fra ryg.....	33
Produktmærkning.....	6	Anti-tip støtte	34
Sikkerhedsinstruktioner	7	Tippepedal.....	35
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Stænkskærm	36
Advarsler og forholdsregler	7	Transportbeslag	37
Kontrol før brug	9	Montering af siddesystem.....	38
Begrænsninger.....	10	Resumé og opfølgning	39
Afklemningsrisiko.....	11	Transport i køretøj	40
Kombinationer.....	11	Køreteknik	42
Afviigelser/tilbud	11	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner	44
Tekniske data/ydeevne.....	12	Kontrol før brug.....	44
Dæktryk	13	Service og afhjælpende vedligeholdelse...	45
Tilpasning og specialtilpasning	13	Renovering	46
Monterings- og justeringsinstruktioner.....	14	Affaldssortering	49
Svinghjul	15	Garanti og retur.....	49
Retningsholder	17	Revision.....	50
Sæt til udvidelse af hjul.....	18		
Drivhjul	19		
Drivhjulsplacering	20		
E-drive	21		

Producent og forhandler

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf	86 17 01 74
Fax	86 17 01 75
Mail	a-sitt@anatomic-sitt.dk

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit valg af hjælpemiddel. Vi håber, du får meget brug af vores produkt. For at kunne bruge det fuldt ud på en sikker måde, er det vigtigt, at du læser disse instruktioner omhyggeligt. Dette gælder for alle personer, der befinder sig i brugerens nærhed.

Gem brugervejledningen til senere brug. Nye udgaver kan downloades fra vores hjemmeside: www.anatomicsitt.com. Revisionen findes på forsiden sammen med datoen.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne. Du finder serienummeret under siddepladens bagerste del.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU-overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, www.anatomicsitt.com/dokument

Tilsigtede formål

Zitzi Guppy G2 er et kørestolsstel til udendørs brug, der er hjælperbetjent. Produktet er beregnet til brug sammen med siddesystemer eller formstøbte sæder. Zitzi Guppy G2 er et genanvendeligt produkt.

Symbolfortegnelse

 	Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.		Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
 	Dette symbol angiver mulig risiko for at få noget i klemme.		Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.		Angiver producentens reference-nummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 www.anatomicsitt.com	Angiver, at brugsanvisningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.		Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses for vigtige sikkerhedsoplysninger, såsom advarsler, der ikke findes på det medicinske produkts etiket.		Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i (EU) MDR 2017/745. Kan også bruges med fremstillingsdato.		Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.		Angiver, hvor transportsikring skal fastgøres til produktet ved transport i et køretøj.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses, før produktet tages i brug. Symbolet findes på produktet.		Angiver, at produktet er crashtestet og godkendt i henhold til ISO 7176-19 til fremadvendt installation i køretøjets kørselsretning.

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt

MD	Zitzi Guppy G2 stl. 2	→ Produktnavn
	<i>Zitzi Guppy G2 size 2</i>	
REF	386606	→ Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)
	2023-11-15	
SN	51474	→ Max belastningsvægt
	Maxlast 75kg	
	Anatomic Sitt i Norrköping AB	→ UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	
	www.anatomicsitt.com	→ UDI= GS1-128
UDI	(UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322473866062(21)51474	→

Etiket på tilbehør

MD	Armstöd stl. 2 kpl. (330 mm) (par) - Guppy G2	→ Produktnavn
	<i>Armrest size 2 (330mm) - Guppy G2</i>	
REF	386652	→ Stregkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
	2023-11-15	
LOT	FM713150	
	Anatomic Sitt i Norrköping AB	→ UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	
	www.anatomicsitt.com	→ UDI= GS1-128
UDI	(UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322473866529(10)FM713150	→

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om tilpasning/specialtilpasning altid skal udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet bør altid være til stede for at teste produktet og skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Bevilligeren af hjælpemidlet eller person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren skal sørge for at det valgte sæde er ordenligt monteret for at sikre at evt tipperisiko undgås. Se afsnittet om rammeforlængelse. Anti-tip støtter kan bestilles, såfremt der er behov for det.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.

-  Efter alt monterings-, justerings- eller servicearbejde skal alle fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.
-  Kontroller at siddesystemet sidder ordentligt fast i kørestolsstellet inden brug..
-  Bremserne skal altid være låste ved ind- og udstigning.
-  Driftsbremsen, der virker på tromlebremsen på drivhjulene, er beregnet til at fungere som bremse under kørsel og parkering. Parkeringsbremsen, der virker på dækket, bør kun bruges som låsebremse.
-  I nogle tilfælde kan hjulene støde på fodpladen. Hjulenes styreevne kan blive påvirket, og fodpladens indstillinger skal muligvis ændres.
-  Brug aldrig fodpladen ved ind- og udstigning fra hjælpemidlet.
-  Vær forsigtig og vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte ved brug af chassiset på skrå overflader. Chassiset må kun parkeres på vandrette og jævne overflader.
-  Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.
-  Udfør aldrig service mens produktet anvendes.
-  Bemærk, at hvis brugeren griber fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå tyngdepunktsforskydning, hvilket kan medføre øget risiko for at vælte.
-  Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning".
-  Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Kontroller især skruer og møtrikker.
- Kontroller at sædet er sat ordentligt fast på kørestolsstellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip støtter.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Tjek hjulenes tilstand og at de sidder fast.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. vedrørende mobilitet og låsning.
- Kontroller justeringen af kabler for tilt, så den fungerer korrekt.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxlast

Den højeste belastningsvægt er: 75 kg (str. 1-2) og 110 kg (str. 3/3 bred). Med belastningsvægt menes den maximale vægt som kørestolsstellet må udsættes for f.eks. bruger og siddesystem.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktionerne i denne manual følges. Den faktiske livslængde kan dog variere afhængig af hvor ofte og intensivt produktet bruges, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde deres funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst én gang hver 6. måned.

Derudover skal de opbevares på en sådan måde, at stempelstangen er rettet nedad ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og dermed holde op med at virke.

Afklemningsrisiko

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er indstillet korrekt, så brugeren ikke får gener eller skader under brug. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages justeringer eller passende tilbehør monteres.

Godkendte kombinationer

At kombinere medicinske tekniske produkter eller tilbehør medfører at du som kunde skal sikre, at dette kan lade sig gøre.

For at produktet skal bevare sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun forsynes med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic SITT. Se produktets bestillingsoplysninger for anbefalede siddesystemer og muligt tilbehør, samt en splittegning af reservedele.

Produktet kan beholde sin CE-mærkning, selv med sæder og siddesystemer fra andre leverandører, hvis følgende punkter er opfyldt:

- Tredjepartsdokumentation skal vise, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartsproduktet er beregnet til brug på manuelle kørestole, og at tredjeparten godkender brugen af sine siddesystemer på andre leverandørers kørestolsstel).
- Kørestolsstelets originale fastgørelsespunkter og de tilsigtede fastgørelses-systemer fra Anatomic SITT skal anvendes. Fastgørelsespunkterne/ fastgørelsessystemerne skal være compatible med det pågældende tredjepartsprodukt. Der må ikke foretages skader/ændringer på nogen af produkterne for at muliggøre kombinationen.
- Monteringsvejledningen for det relevante tredjepartsprodukt og fra Anatomic SITT skal følges.

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, når produkter fra forskellige leverandører kombineres. Vurderingen skal arkiveres. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden.

Afviigelser/tilbud

I tilfælde af funktionsfejl skal du kontakte centeret for hjælpemidler eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en hændelse, der kunne have ført til alvorlig personskade, skal dette rapporteres til Anatomic SITT og den kompetente myndighed i landet. Produktet skal også sendes til Anatomic SITT i sin nuværende tilstand til nærmere undersøgelse.

Tekniske data / ydeevne

Guppy G2

PRODUKTDATA				
Belastningsvægt (bruger + sæde)	STØRRELSE	str. 1	str. 2	str. 3
	MAX	75 kg	75 kg	110* kg
*110 kg gælder fra serienummer 58624 (tidligere 105 kg).				
Sædehøjde beroende på hjulstørrelse	HJUL	16" & 20"	22"	24"
	SÆDEHØJDE	46 cm	48 cm	50 cm
Vægt beroende på drivhjul & tilbehør	15-17 kg			
Tilt	0° - 31° alt. -6° - 29°			

Med 16" hjul (7" svinghjul)


Størrelse	A	A (E-drive)	B	C	D	E
1	51 cm 54 cm*	56 cm	70-80 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	56 cm 59 cm*	61 cm	70-80 cm	41 cm	57 cm	46 cm
3	61 cm	66 cm	79-91 cm	49 cm	66 cm	51 cm
3 bred	66 cm	71 cm	79-91 cm	49 cm	66 cm	56 cm




* mål med cambervinkel



Med 20" / 22" / 24" hjul (7" svinghjul)

Størrelse	A	B	C	D	E	E med stænskærm
1	57 cm 63 cm*	75-85 cm**	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	62 cm 68 cm*	75-85 cm**	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm
3	67 cm	90-101 cm**	49 cm	66 cm	53.5 cm	49.5 cm
3 bred	72 cm	90-101 cm**	49 cm	66 cm	58.5 cm	54.5 cm

* mål med cambervinkel. ** B-mål for 22" +2.5 cm og for 24" +5 cm

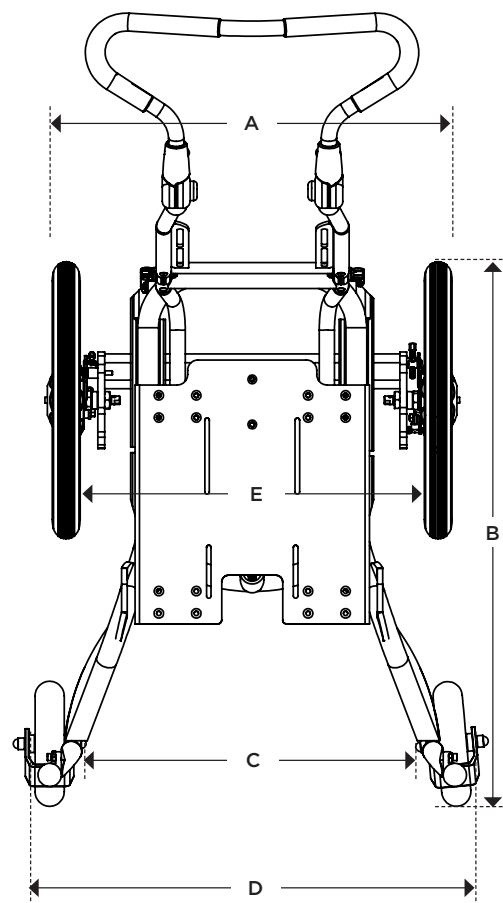

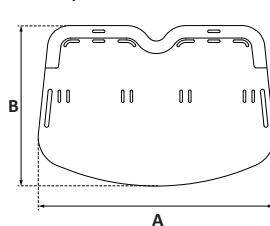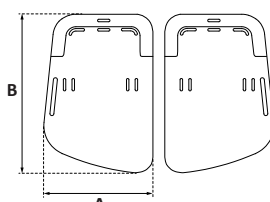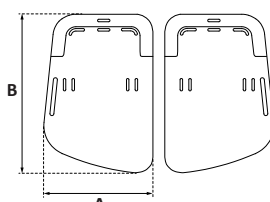FODSTØTTE	
	A x B
	Helt str. 2 345 x 225 mm
	Helt str. 3 380 x 260 mm
	Helt str. 4 380 x 300 mm
	Helt str. 5 * 430 x 310 mm
	* Brug breddeudv. til svinghjul
	A x B
	Delt str. 2 160 x 220 mm
	Delt str. 3 180 x 255 mm
	Delt str. 4 180 x 305 mm
Fodstøttestang profilslængde (mm)	
Størrelse:	2 3 4/5
	200 250 300
Tagledslængde: 80 mm	

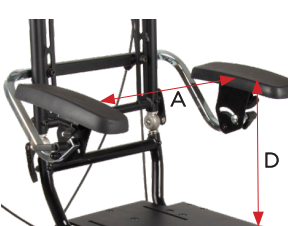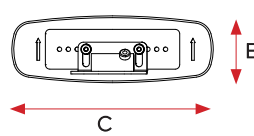ARMLÆN FRA RYG	
	
Mål	A B C D
str.1	280 - 440 mm 75 mm 230 mm 180 - 380 mm
str.2	280 - 440 mm 75 mm 330 mm 180 - 380 mm
str.3	380 - 500 mm 75 mm 330 mm 220 - 400 mm

Anbefalet dæktryk

Størrelse	Dæktryk	Tryk (max)
7"	D180/45-S-SO	2.5 bar
16"	R400/45-1-LSSBLQ85S-NM	2.8 bar
20"	R510/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*
22"	R570/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*
24"	R620/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*

* Højtryksdæk

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning

Fodstøtteprofilens længde kan afkortes for at den passer bedre til brugeren.

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på Hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

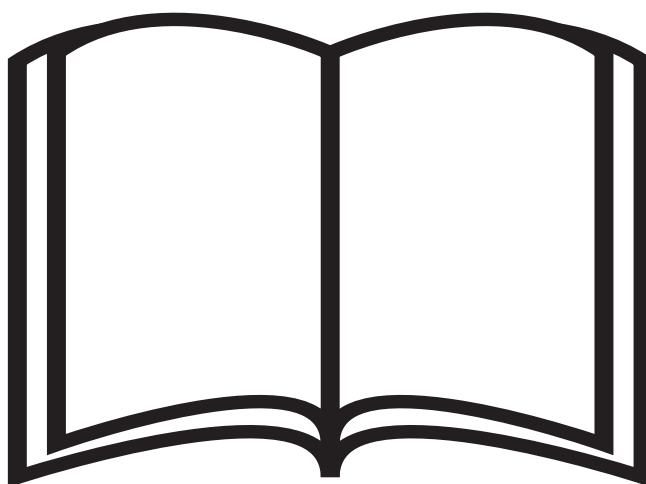

Svinghjul

Montering af hjulhuset på kørestolsrammen

Indsæt profilbolten (A) i det dertil indrettede hul på undersiden af kørestolsrammen i hjulhuset som vist på billedet. Monter derefter hjulet ved hjælp af skruen (B), skiven (C) og den excentriske møtrik (D), og stram til.

Montering af svinghjul på svinghjulsgaffel

Vælg mellem fire (4) forskellige drejhjulspositioner, og monter derefter drejhjulet (F) ved hjælp af den medfølgende hjulaksel (G), skive (H) og låsemøtrik (I) i det ønskede monteringshul på drejhjulsgafflen (K).

Indsæt hjulet (F) i hjulgaflen (K) som vist på illustrationen. Placer en skive på hjulakslen (G) og indsæt den derefter i det ønskede hul på hjulgaflen.

Fastgør derefter skiven (H) og kontramøtrikken (I) på den modsatte side. Spænd møtrikken. Til sidst placeres møtrikdækslerne (J) over låsemøtrikken.


Svinghjulsplaceringer

Svinghjulet kan placeres i fire (4) forskellige højdepositioner.

Dette giver dig mulighed for at justere hjulets højde i henhold til størrelsen på det drivhjul, du vælger.



Sørg for at spænde skruerne ordentligt efter justering af svinghjulsplacering.

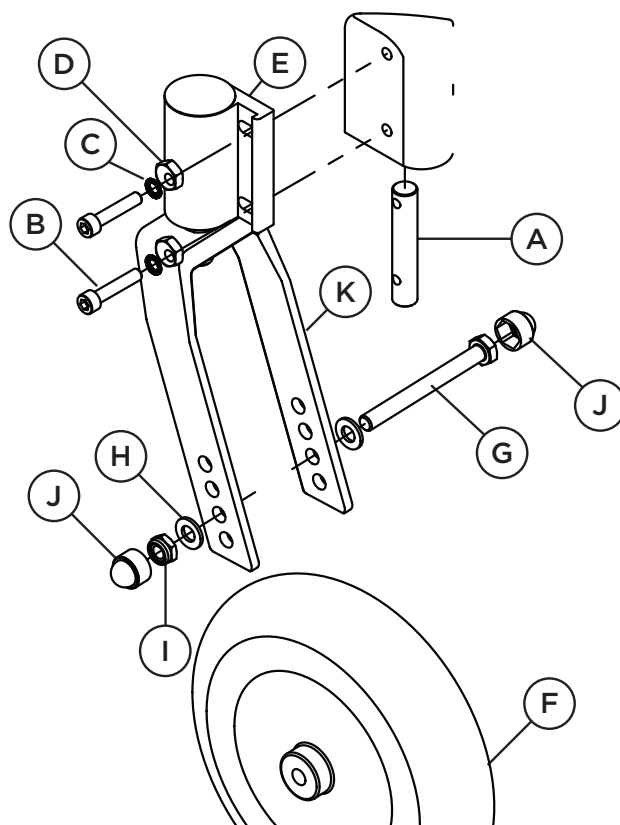

Justering af hjulgaffelen

Hvis kørestolen ikke ruller korrekt, kan det være nødvendigt at justere hjulgaffelen (A). Dette kan forekomme, hvis hjulets position er blevet justeret uden at justere hjulgaffelen (A).

Det stiplede område på billedet viser, at hjulbeslagets position (B) skal være 90° i forhold til underlaget.


Vinkeljustering af svinghjulsgaffelen

For at justere hjulgaffelens vinkel skal du løsne og dreje de excentriske møtrikker (C) på hjulbeslaget (B), indtil den korrekte vinkel er opnået.

Sørg for at stramme møtrikkerne, når hjulgaffelen er blevet justeret.



Husk at stramme møtrikkerne godt efter justering af svinghjulsgaffelen.

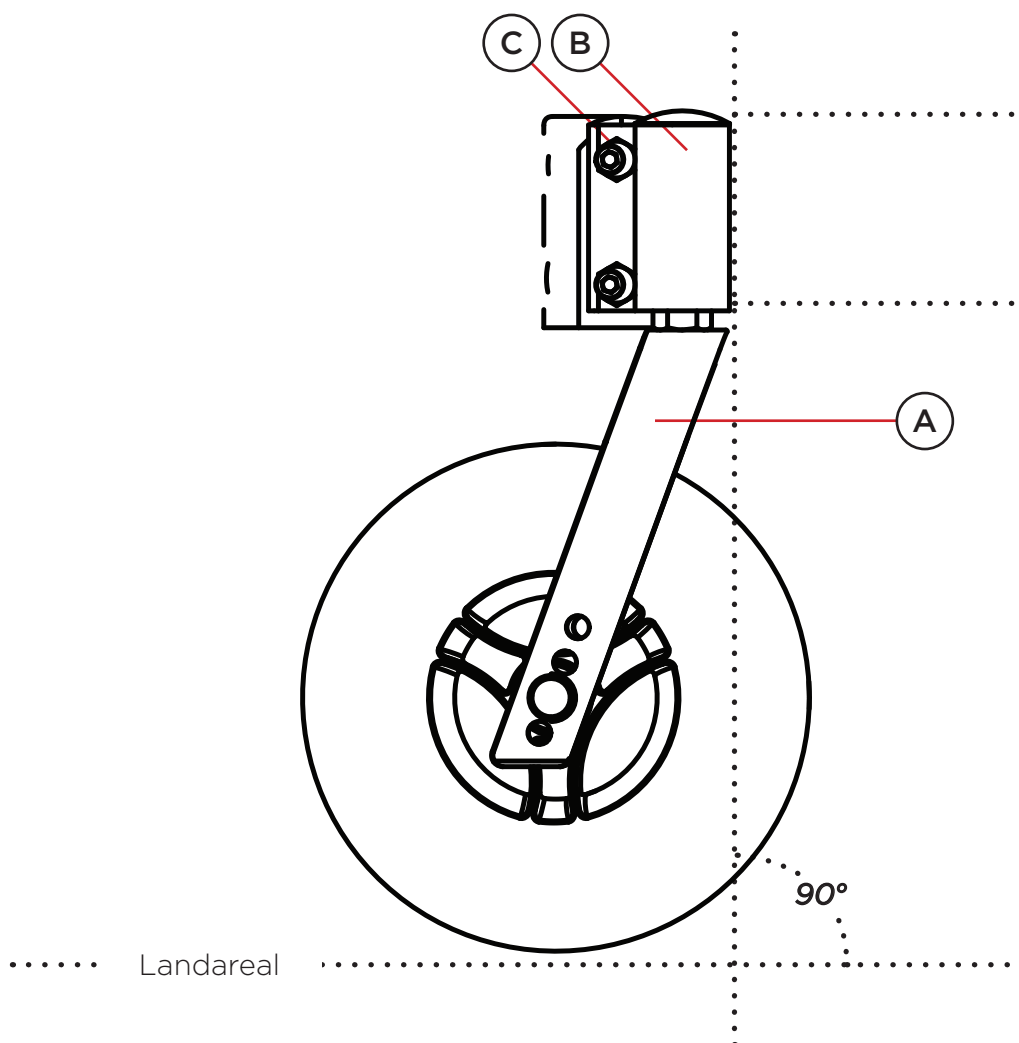

Retningsholder


Montering af retningsholder

Monter retningsholderen på svinghjulbeslaget ved hjælp af de medfølgende monteringsdele.

Start med at fjerne lejehuset (A) fra kørestolsrammens svinghjulbeslag (B) ved at skrue skrue (C) ud. Løft derefter endehætten (D) af toppen af lejehuset (A) og skru den midterste bolt (E) ud.

Monter derefter retningsholderbeslagene (F) mellem lejehuset (A) og svinghjulbeslaget (B) på kørestolsrammen og mellem lejehuset (A) og hjulgaflen (G) ved hjælp af monteringsdelene som vist på illustrationen.

Når retningslåsen er monteret, skal du montere hjulet igen på kørestolsrammen. Finjuster derefter hjulenes retning ved at justere skruen (J) let.

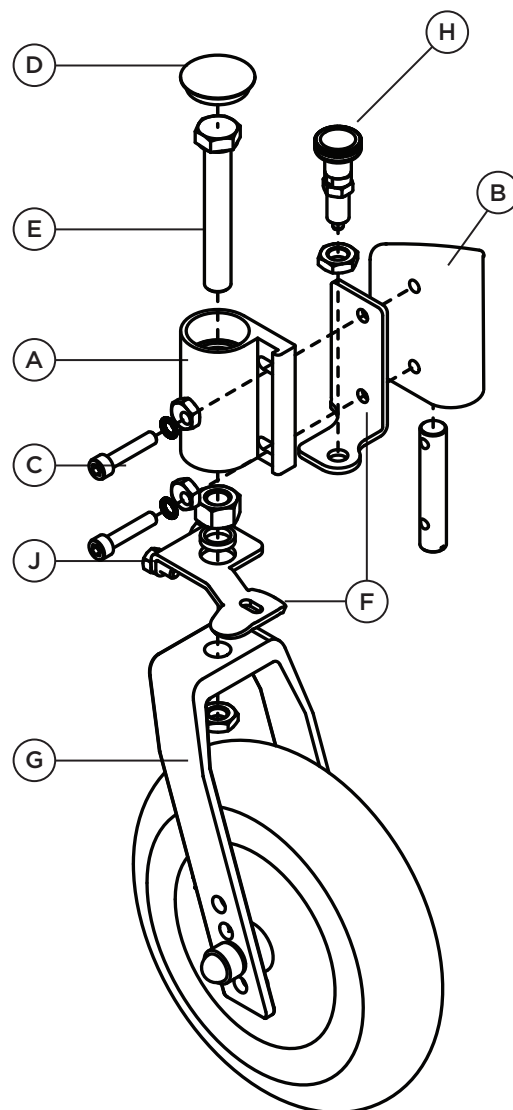

Aktivering af retningslås

For at aktivere retningslåsen skal du trække quick-releasen (H) lige op, dreje den 90° og slippe spidsen ned i hullet på den bevægelige del. Sørg for, at kørselsretningen er låst.

Frigørelse af retningslåsen

For at frigøre retningslåsen skal du trække quick-releasen (H) lige ud, så spidsen trækkes ud af hullet på den bevægelige del. Drej derefter låsen 90° og frigør den forsigtigt.



Retningslåsen er kun egnet, når der vælges 7" svinghjul.

Udvidelsessæt til svinghjul

Formålet med udvidelsessættet er at udvide afstanden mellem svinghjulene, så der bliver mere plads til fodstøtterne, hvilket mindsker risikoen for, at de rammer svinghjulene.


Montering af breddeudvidelsessæt

Monter breddeudvidelsesaftandsstykkerne (1) mellem svinghjulbeslaget og rammen. Den smalle fals skal vende fremad mod rammen for at fastgøre afstandsstykket korrekt.

Start med at fjerne de skruer, der holder svinghjulbeslaget på plads. Placer afstandsstykket (1) som vist på figuren nedenfor. Brug de længere skruer (2), der følger med udvidelsessættet, samt skiven (3), den excentriske møtrik (4) og fælgstiften (5).

Spænd skruerne.

Hvis hjulene ikke er lige eller presses ujævnt mod gulvet, skal du følge instruktionerne i Justering af hjulgaflen på side 16.

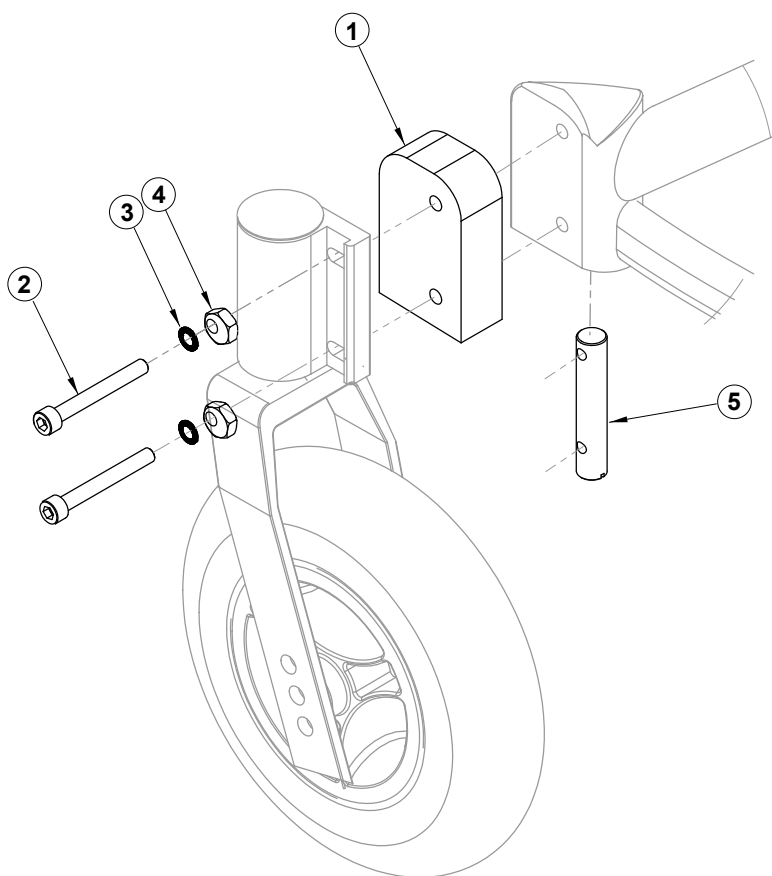

Drivhjul

Drivhjulene kan nemt monteres og afmonteres takket være deres Quick-release-funktion. Dette kan f.eks. være nyttigt ved transport af chassiset.

Påmontering af drivhjul


For at montere drivhjulene (A) skal du holde trykknappen (B) nede midt i navet på quick-releaseakslen og skubbe drivhjulet (A) ind, indtil det stopper. Du kan nu slippe trykknappen (B). Sørg for, at drivhjulet er låst fast ved forsigtigt at trække i drivhjulet uden at holde trykknappen (B) nede.



Sørg for at hjulet sidder ordentligt fast efter brug af quick-releasefunktionen.

Afmontering af drivhjul

For at afmontere drivhjulet fra kørestolsstellet, holder du trykknappen (B) inde, som er centreret i navet og træk herefter ud i hjulet.

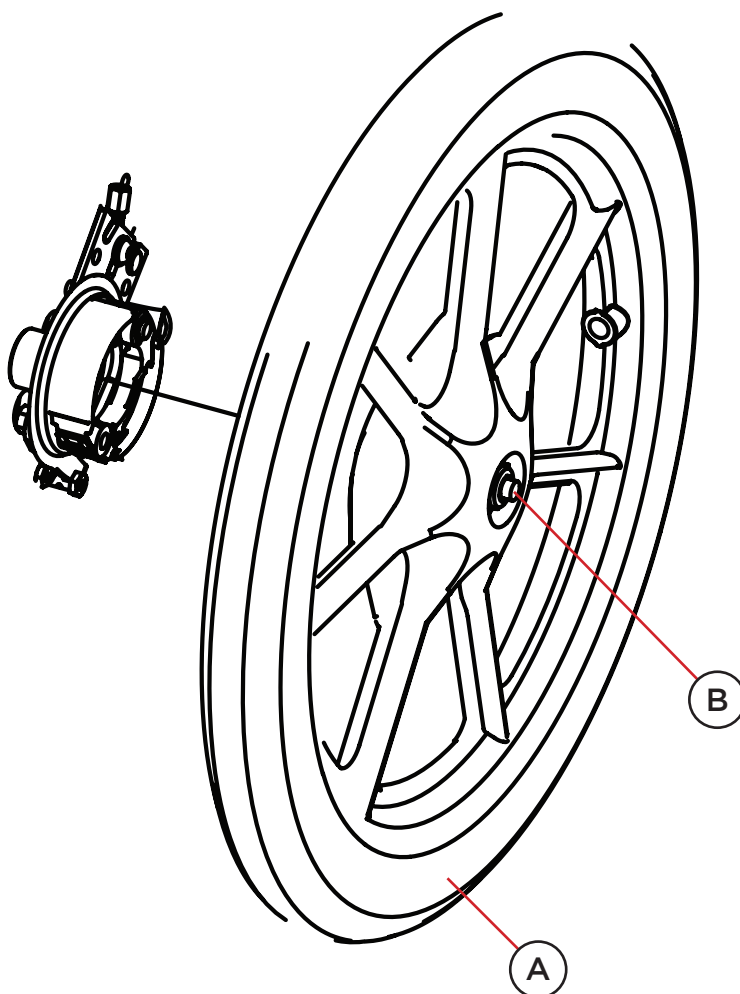

Drivhjulsplacering

For at opnå det korrekte tyngdepunkt kan drivhjulet justeres trinløst i dybden afhængigt af sædesystemets placering på chassisset sædeplade.

For at justere hjulet i dybden skal du løsne de fire skruer (A) på undersiden af hjulakslen og justere til den ønskede dybde. Kontroller f.eks. med en lineal eller en foldelineal, at hjulakslen har samme dybde på begge sider.

16" hjul monteres i hullerne B + C.



20», 22« og 24" hjul monteres i hullerne D + E.



Vær opmærksom på, at ændring af drivhjulenes position kan øge risikoen for at vælte.



Skruerne må ikke skrues helt ud, men kun løsnes lidt.

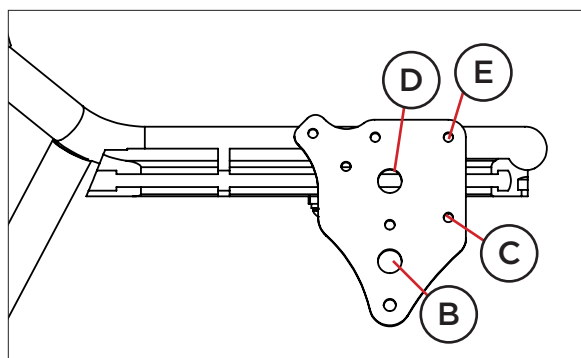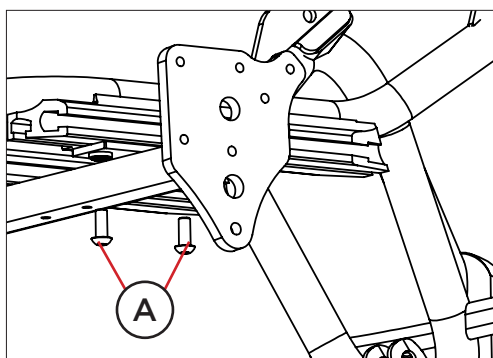

Cambervinklede drivhjul

Til Guppy G2 størrelse 1 og 2 er det muligt at vælge cambervinklede hjul. Dette kræver udskiftning af drivhjulets aksel.

Løsn skruerne (A) og udskift den lige aksel med den cambervinklede, og saml derefter igen som beskrevet ovenfor.



Uanset om hjulene er lige eller har cambervinkel, monteres de i det samme hulmønster i henhold til den ovenfor beskrevne tomme-størrelse.

E-drive

E-drive sammen med Guppy G2

E-drive er en el-pakke, der gør Guppy G2 elektrisk manøvredygtig. E-drive fås som ekstraudstyr til Guppy G2 i 16» og 20» drivhjulstørrelser.

Montering af E-drive


E-drive erstatter eksisterende drivhjul og monteres i henhold til separate instruktioner i det dertil indrettede hulmønster på sideelementet af kørestolsrammen med afstandsstykke, skive, skrue, møtrik og navkapsel. Håndbetjeningen monteres med de medfølgende dele på skubbestangens skubbehåndtag.



For mere detaljerede oplysninger om e-drive henvises til den separate monteringsvejledning til E-drive på Guppy.

At anvende E-drive

E-drive gør Guppy G2 til en elmanøvreret hjælperstyret kørestol, der betjenes ved hjælp af en håndkontrol.

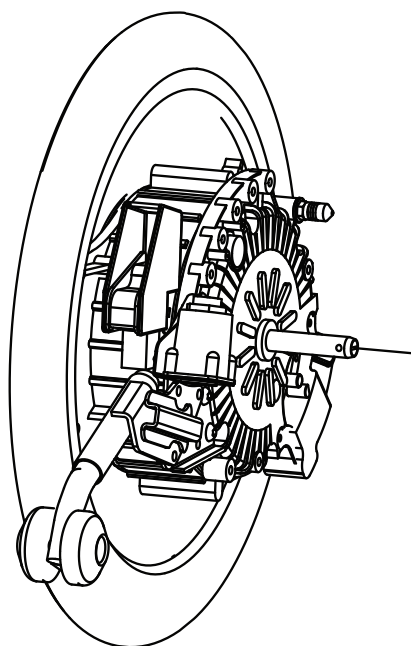

Bremse

Brug af tromlebremse

Kørestolsstellet er udstyret med en tromlebremse, der betjenes af hjælperen. Kontroller altid, at bremserne virker, inden du tager stellet i brug.


Tryk på bremsearmen (A), mens du bevæger chassiset fremad. Baghjulet skal nu bremse og må ikke rulle. Det skal ikke være muligt at trykke bremsehåndtaget (A) helt ned til drivhåndtaget; der skal være en afstand på 5-10 mm mellem dem. Gentag derefter ovenstående procedure med det venstre bremsehåndtag.

Låsning af hjul

For at aktivere hjullåsen skal du trykke på bremsehåndtaget (A) og skubbe den røde låseknop (B) til den ønskede position.

Frigørelse af hjulene

For at frigøre hjullåsen skal du trykke på bremsehåndtaget (A), hvorefter den røde låseanordning (B) frigøres automatisk. Slip derefter bremsehåndtaget (A).

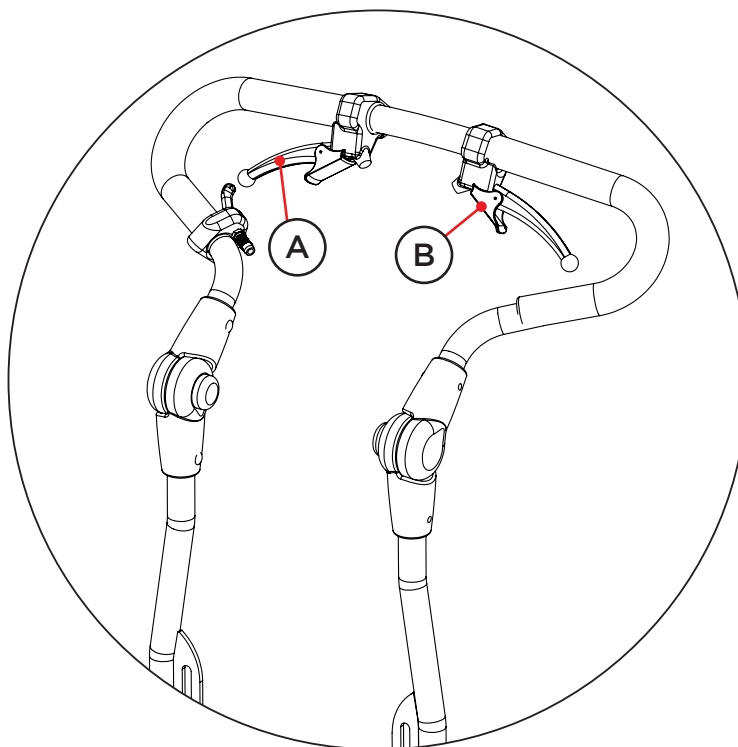

Montering af tromlebremse

For at montere tromlebremsen skal du fjerne drivhjulet fra kørestolen ved at trykke på knappen på quick release-akslen og trække hjulet og akslen ud af tromlebremsen.

Monter derefter tromlebremsen på kørestolsrammen ved at skubbe den store afstandsholder (A) over tromlebremsens gevind og derefter indsætte gevindet gennem det dertil indrettede hul i den ønskede position. Fastgør med den store møtrik (B) på indersiden af rammesidepladen og stram let. Det er vigtigt, at du ikke strammer den helt.

Tag derefter skruen (C) og indsæt den gennem det aflange hul til rotationslåsen i bremsetromlen, gennem den lille afstandsholder (D) og gennem hullet i rammesiden.

Fastgør med skiven (E) og møtrikken (F) på indersiden af rammesidepladen. Spænd begge møtrikker (B) og (F), så bremsetromlen er fastgjort korrekt.

Indsæt derefter hurtigudløserakslen med hjulet og tryk den ind, indtil hjulet er fastgjort. Test ved at trække hjulet let udad (uden at trykke på hurtigudløserknappen). Om hjulet er fastgjort.



Ved valg af 16" drivhjul så skrues (C) skrues direkte ind i pladen.




Møtrik (B) (og skrue C, hvis der vælges 16") skal fastgøres med gevindlåsemiddel, f.eks. Loctite 243 eller tilsvarende.



For yderligere oplysninger om, hvordan du bruger quick-release, se side 24.




Monteringsprincippet for tromlebremser er det samme uanset hjulstørrelse.

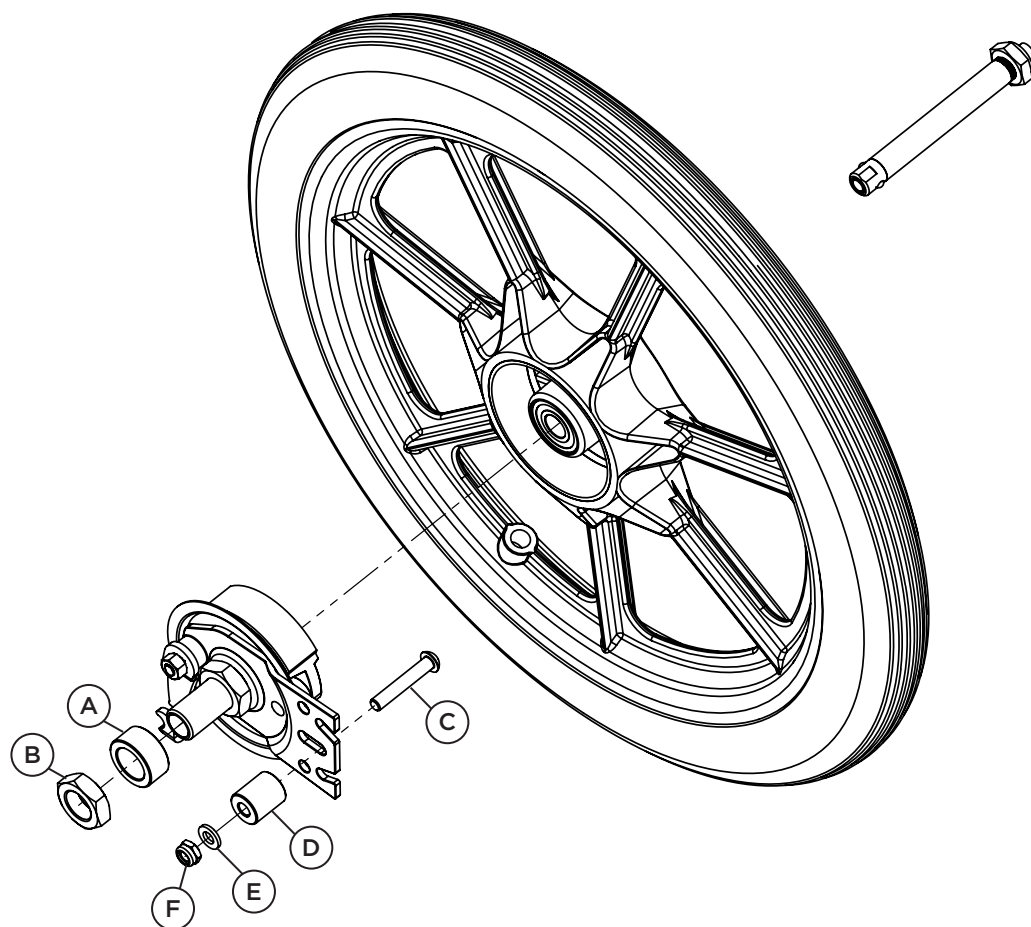

Fejlfinding på tromlebremsen

Hvis bremserne ikke virker, skal du først kontrollere, at bremsekablet har den korrekte spænding. Hvis kablet har lav spænding, kan det være tilstrækkeligt at stramme det ved at dreje skruen (C). Hvis justeringsskruen (C) ikke er tilstrækkelig, kan du prøve nedenstående hurtige vejledning til at stramme bremsekablet.

1. Skru skruen (C) i bundposition.
2. Løsn møtrikken (D)
3. Tryk bremsen sammen ved at løfte tromlebremsearmen (E) og flytte møtrikken (D) lidt længere op ad kablet.
4. Lås møtrikken (D) og finjuster derefter spændingen med skruen (C).

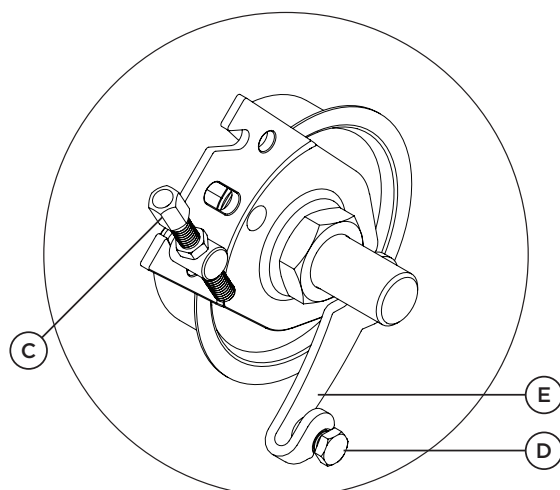

Detaljeret visning af
tromlebremse

Parkeringsbremse


Montering af parkeringsbremse

Parkeringsbremsebeslaget monteres som vist i det forudbestemte hulmønster på sidestykket af kørestolsrammen ved hjælp af de medfølgende skruer (A), skiver (B) og møtrikker (C).

Juster parkeringsbremsen (D) efter behov ved at løsne skruen (E) og derefter flytte parkeringsbremsen (D) fremad eller bagud i sporet. Stram derefter skruen (E), når den ønskede position er opnået.

Brug af parkeringsbremse

Lås parkeringsbremsen (D) ved at skubbe bremsearmen fremad. Træk bremsearmen bagud for at løsne parkeringsbremsen.

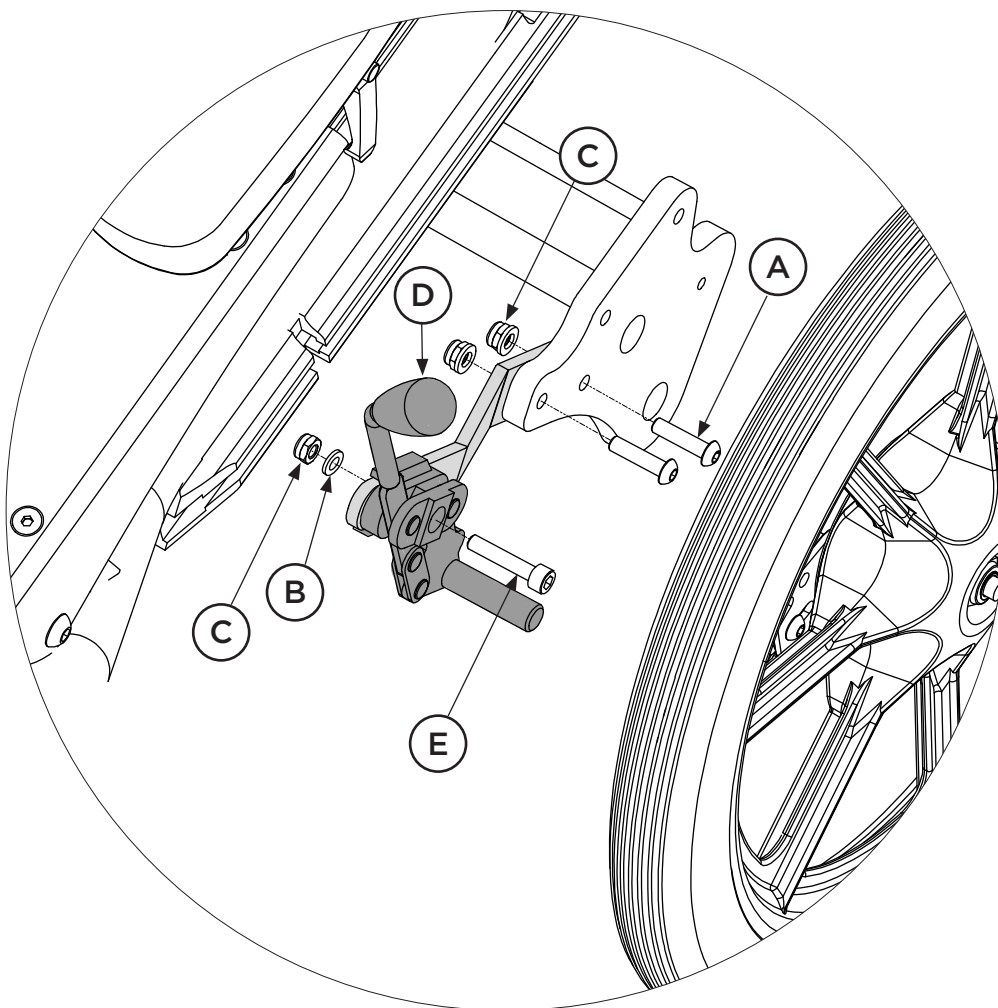


Sædetilt

Montering af sædetiltet

Guppy G2 har to forskellige hældningsindstillinger, som justeres ved hjælp af huller under sædepladen. Hvis stemplet er fastgjort til det bageste hul (som vist på billedet), opnås en hældning på 0° til 31°.


Hvis stemplet er fastgjort til det forreste hul, opnås en hældning på -6° til 29°.

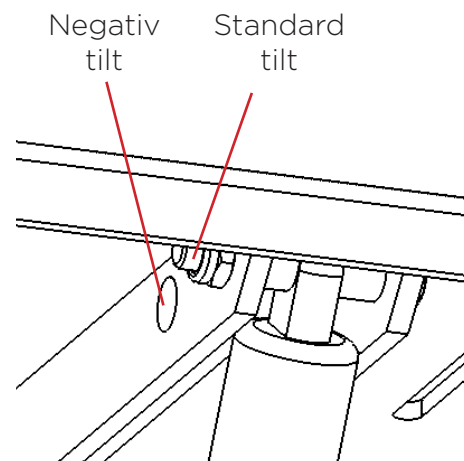

Brug af sædetilt

For at tilte kørestolsstellet skal du trykke på betjeningsknappen (A), mens du holder fast i skubbestangen med den ene hånd og skubber nedad/fremad. Slip derefter betjeningsknappen (A), når du har opnået den ønskede hældning.

For at vende tilbage til udgangsløjet i sædevinklen, skal du trykke på betjeningsknappen (A) og trække skubbestangen opad og bagud ved at holde fast i skubbestangen/skubbehåndtaget.

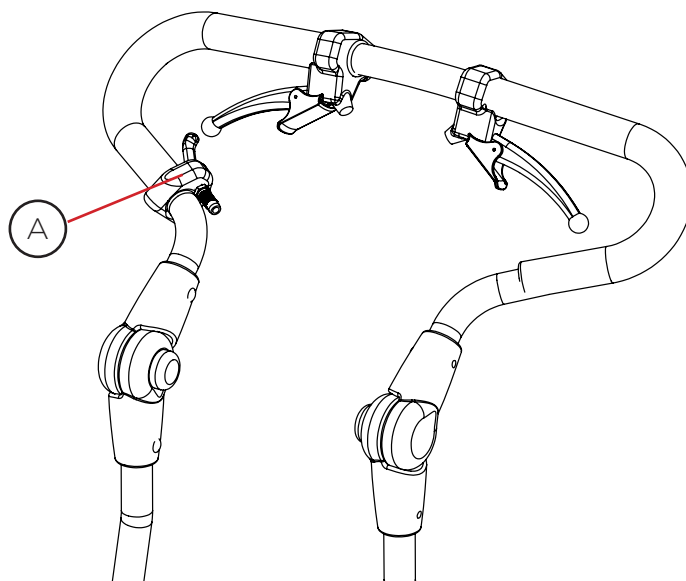

Vær opmærksom på risikoen for at klemme fingrene, når du vipper sædet.



Vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte, når du bruger tilt.

Fodstøtte

Montering af fodstøtte

Fodstøttebeslaget er normalt inkluderet i kørestolsstellet. Hvis beslaget leveres sammen med fodstøtten, skal du bruge de medfølgende skruer (C) til at fastgøre det. Beslagene fastgøres som vist på billedet med fire skruer/beslag i forkant af sædepladen. Bemærk, at låseskruerne (B) skal pege indad/nedad.

Monter fodstøttens firkantede rør (A) i fodstøttebeslagene under den forreste del af sædepladen. Fastgør fodstøtten med låseskruerne (B) på begge sider.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (D) i form af en glidemøtrik er monteret i bunden af fodstøtteprofilen. Stoppet kan også bruges til at vende tilbage til en forudindstillet højdeposition.





Monter et ekstra sikkerhedsstop over fodstøtten i fodstøttens profilrille for nemt at vende tilbage til en alternativ højdeposition (f.eks. med eller uden sko).

Justering af vinkel ved knæleddet

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, er det muligt at justere vinklen på fodstøtten ved knæleddet. Løsn vingeskruen (E) let og juster til den ønskede vinkel. Stram derefter vingeskruen.

Justering af fodstøttens højde

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, giver det mulighed for at justere fodstøttens højde ved anklen. Løsn vingeskruen (F) let og juster til den ønskede højde. Stram derefter vingeskruen.

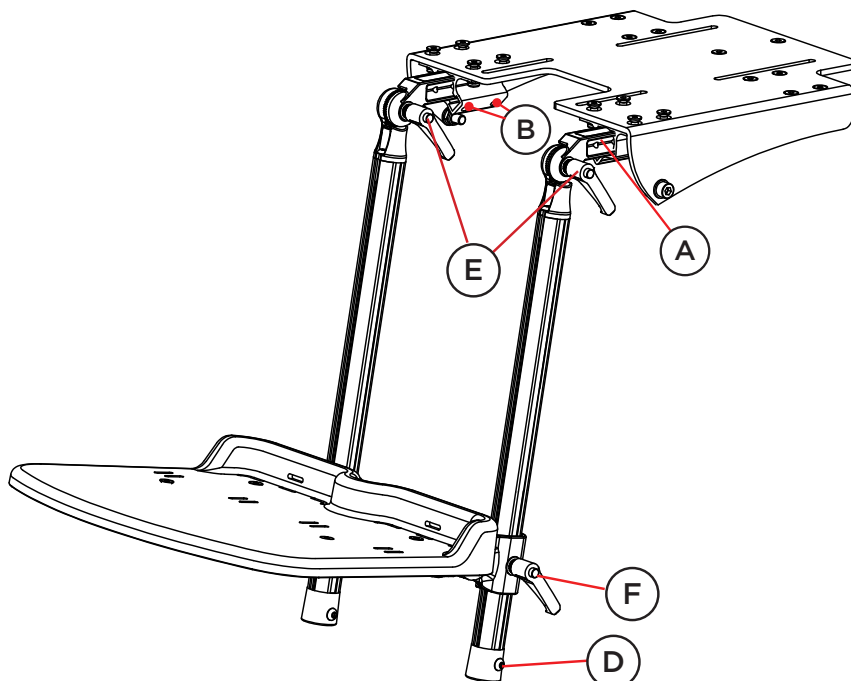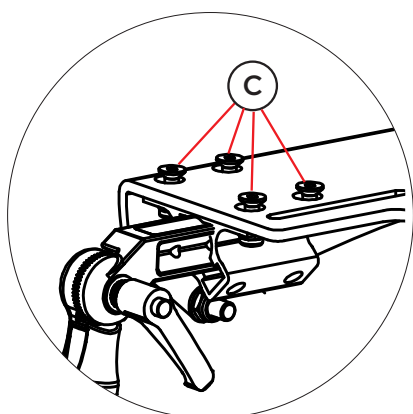

Fodstøttebeslag

Fast fodstøttebeslag (1)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne vingeskruen (A) lidt og justere til den ønskede højde. Stram derefter håndtaget.

Fjedrende fodstøtteadapter (2)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne skruen (D) og om nødvendigt skruen (E) lidt, og derefter justere til den ønskede højde. Stram skruen (D). Vælg længden af fjedervandringen ved at justere skruen (E) til den ønskede position og stramme den.



Fjederens modstand kan justeres med en skruetrækker ved at dreje skruen i fjederenheden (F).




Opklappelig fodstøttebeslag (3)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne vingeskruen (A) lidt og justere til den ønskede højde. Stram derefter håndtaget. For at bruge flip-up-funktionen skal du løfte den forreste kant af fodstøttepladen.

Kugleledsadapter (4)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne vingeskruen (A) lidt for at justere til den ønskede højde. Stram derefter håndtaget.

For at bruge kugleledfunktionen skal du først løsne skruerne (B) og (C) og justere til den ønskede position. Stram derefter skruerne (B) og fastgør positionen med skruen (C).

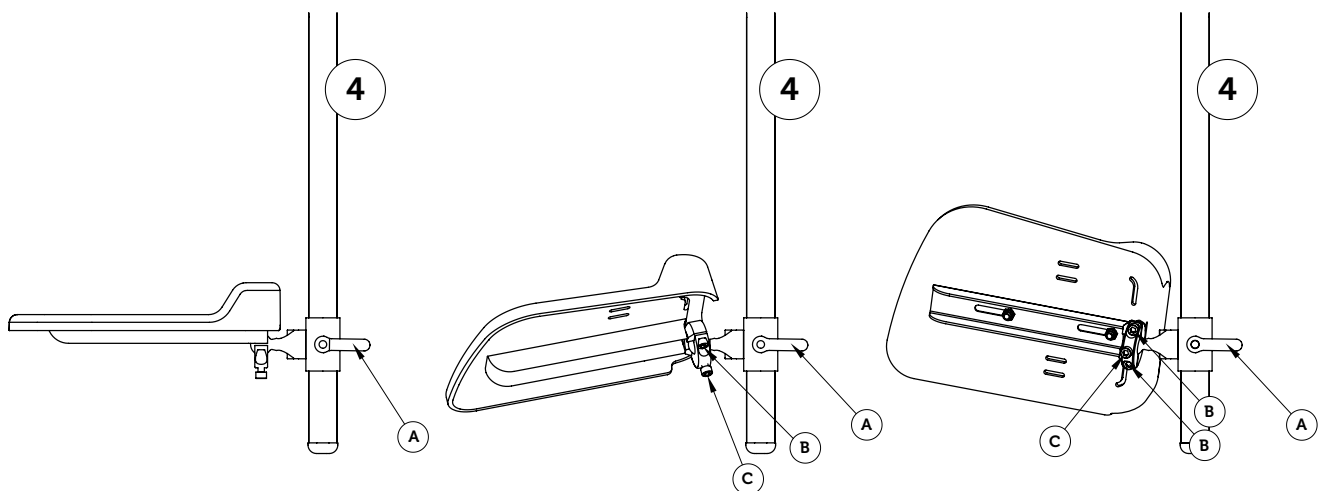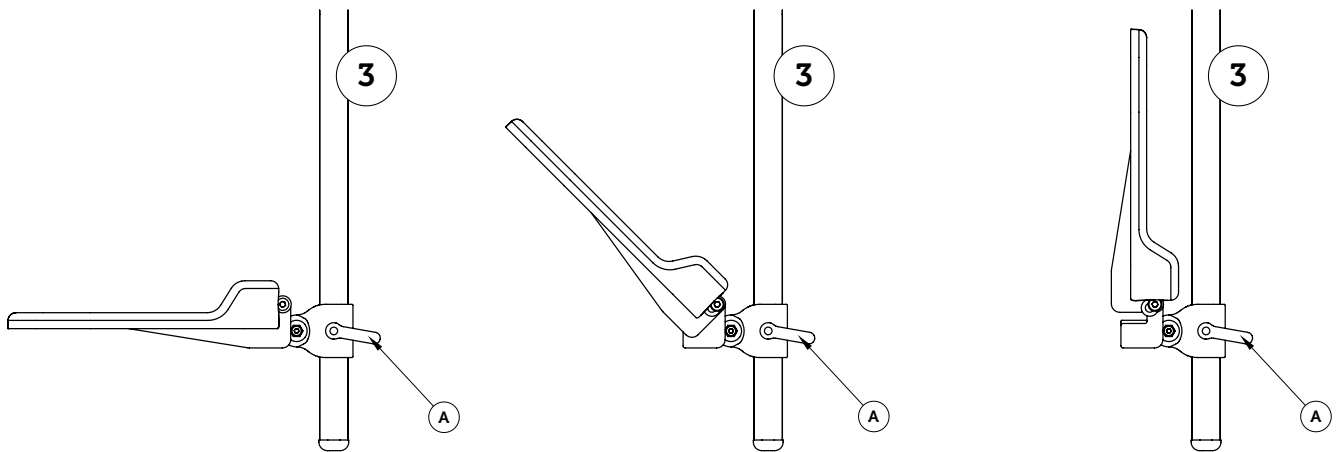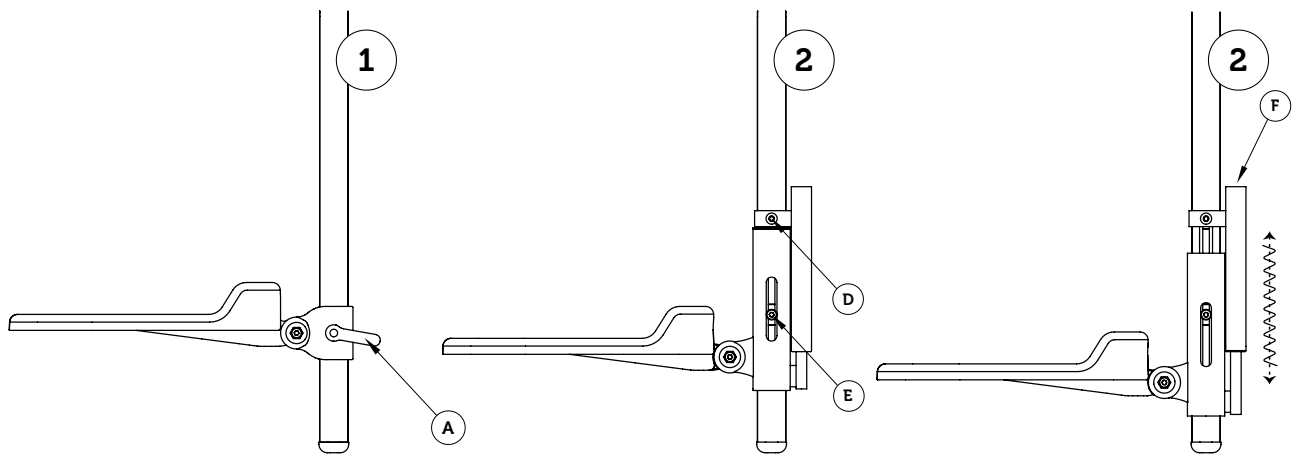


Fodkasse

Fodkasse dobbeltstang

For at montere fodkassen starter du med at skubbe profilmøtrikkerne (A) på fodkassen (B) ind i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd italienskruen (E).

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere medfølgende polstring og kontroller at alle skruer er ordentligt spændte.

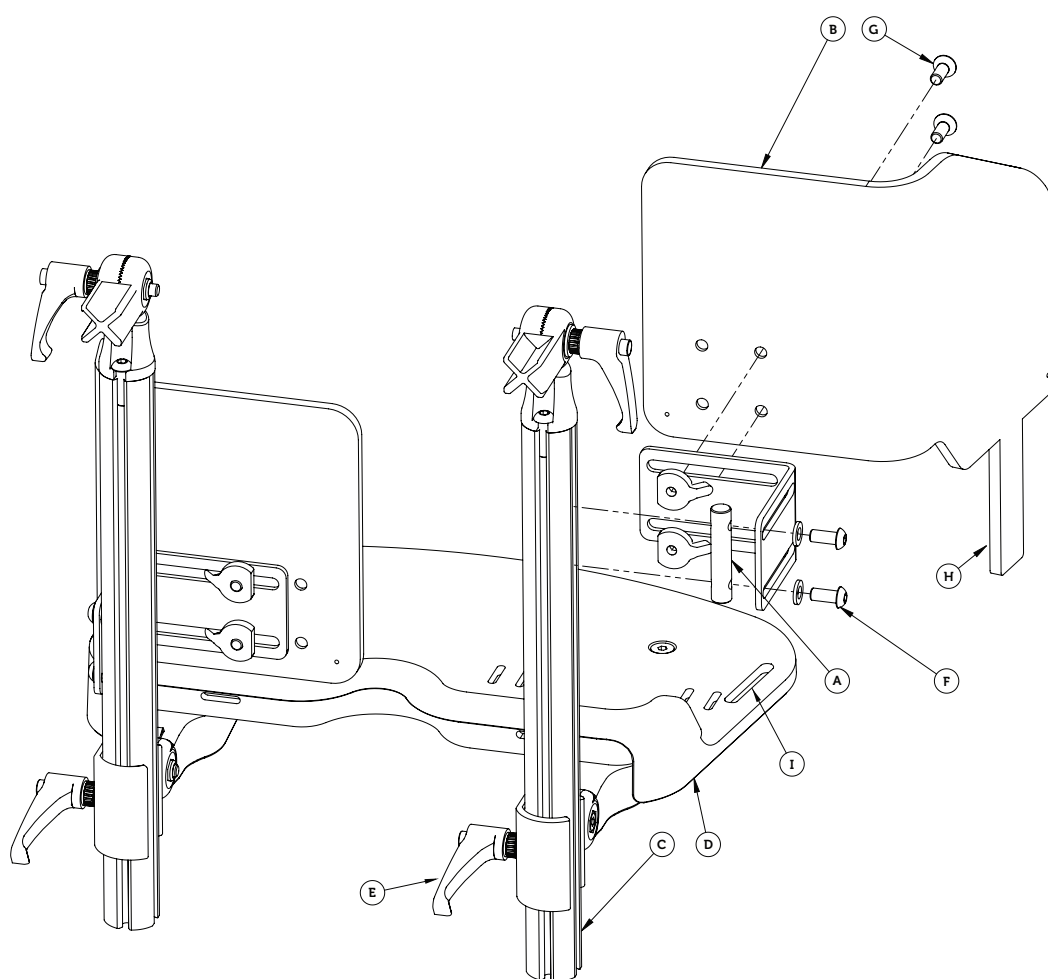

Plaststangen (H) kan efter justeres til ønskede højde kappes eller varmes ind under fodstøttepladen efter egne ønskemål.

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Inden montering af lægstøtte kan udføres skal du først fjerne eventuel fodstøtte. Begynd med at fjerne endeafluttet (G) og løs herefter vingeskruen (F) som holder fodstøtten på plads på fodstøttestangen. Træk derefter fodstøttepladen og dens beslag nedad.


Monter lægstøtten ved at skubbe profilmøtrikkerne (C) ind i fodstøttebeslaget, juster til ønskede højde og spænd skruerne (E). Genmonter herefter fodstøtten og endeafluttet (G).

Højdejustering af lægstøtte

For at højdejustere lægstøtten, løsner du skruerne (E) noget, for herefter at justere til ønskede højde. Spænd derefter skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at breddejustere lægstøtten løsner du skruerne (A) noget for derefter at justere til den ønskede bredde. Spænd derefter skruerne (A).

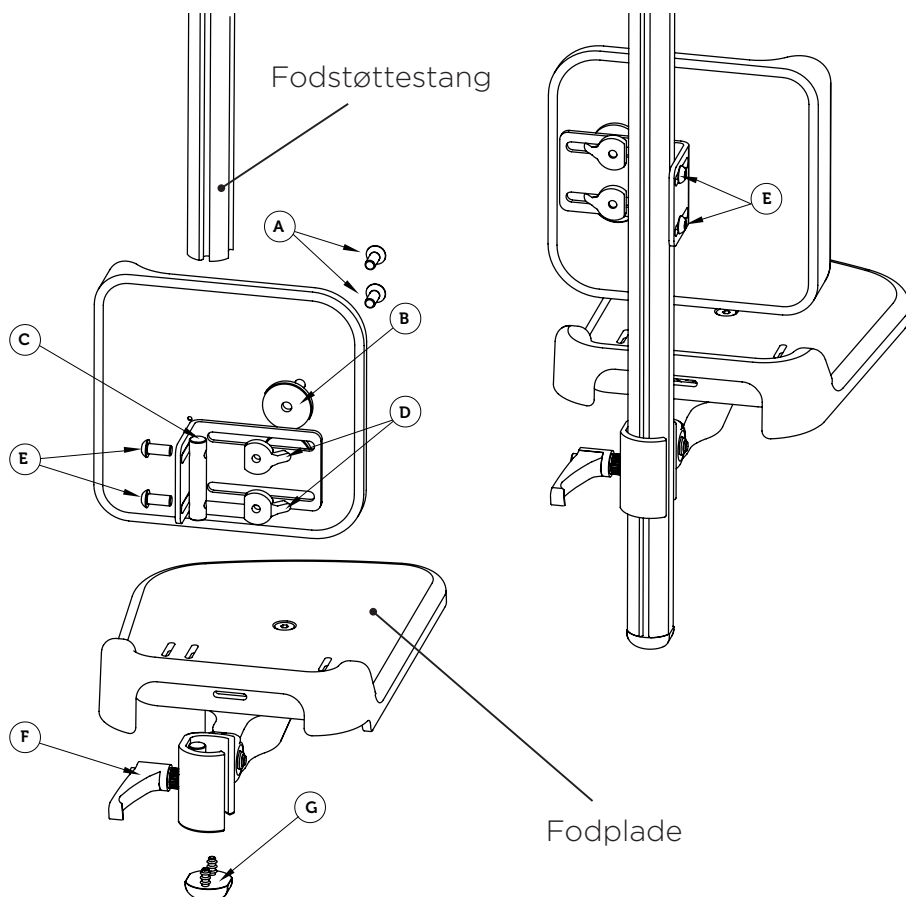

Kørebøjle

Montering af kørebøjle

Indsæt kørebøjlebeslagene på bagkanten under sædepladen. Spænd skruerne (A) godt fast efter montering.

Dybdejustering af kørebøjle

For at dybdejustere kørebøjlen (forlænge sædedybden) skal du løsne skruerne (A) under den bageste del af sædepladen og derefter flytte løbebjælken til den ønskede dybde. Stram derefter skruerne (A).

Vinkeljustering af kørebøjle


Kørebøjleens højde kan justeres, så den passer til den valgte sædekonstruktion. Løsn kørebøjleens lås ved at løsne begge vingeskruer (B) og juster derefter til den ønskede vinkel. Spænd derefter vingeskruerne (B) igen.



Kørebøjlen skal altid ligge mod siddesystemets ryg, når det transporteres i et køretøj.

Vinkeljustering af kørebøjlehåndtag

For at vinkeljustere kørebøjleens kørehåndtag trykker du knapperne (C) på størrelse 1 & 2, på indersiden af kørebøjleleddene og juster herefter til ønsket vinkel. For størrelse 3 / 3 bred er knappen (C) erstattet af et vred og tagled.

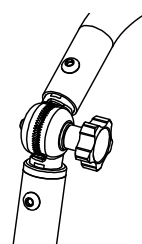


Vred og tagled str. 3/3 bred

Foldning af kørebøjle

Løsn begge vingeskruer (B) og fold kørebøjlen fremad. Spænd herefter vingeskruerne (B) igen.



Hæng ikke tasker eller tunge genstande på kørebøjlen. Dette kan sammen med andre faktorer foranledige at kørestolsstellet kan tippe bagud.

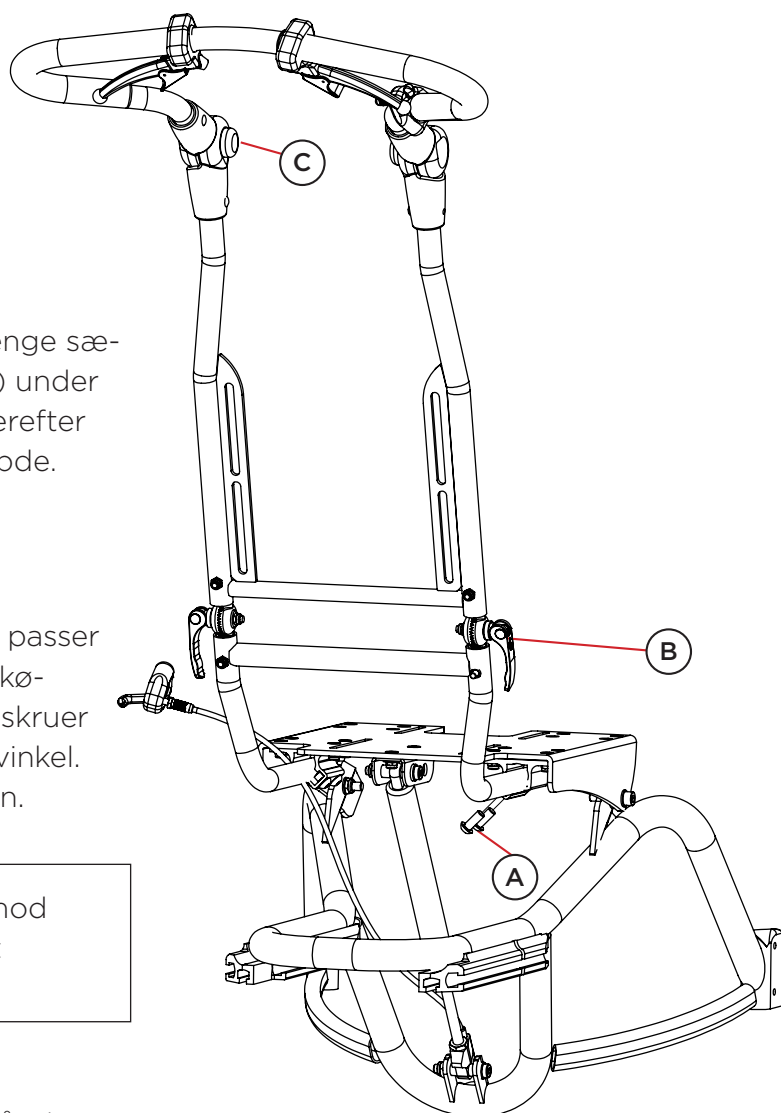

Armlæn fra rygrør

Montering på kørestolsstel

Skrue skruerne (A) helt af på begge sider. Monter armlænsbeslaget mod bagsiden af ryglænet i en passende højde ved at flytte skruerne (A) og sprænde dem.

Højdejustering

Løsn skruerne (A) lidt og juster til den ønskede højde. Spænd skruerne.

Breddejustering

Løsn skruerne (B) lidt og juster til den ønskede bredde. Spænd skruerne.

Vinkeljustering opad/nedad

For vinkeljustering af armlænspladen, løsn italienskrue (C) lidt og juster til ønskede vinkel.

Dybdejustering af armlænsplade

Løsn skruerne (D) under armlænspladen og flyt til ønsket dybde ved hjælp af hullet under pladen.



Anti-tip støtte

Montering anti-tip støtte

Som vist på billedet skal du bruge de medfølgende skruer (A), skiver (B), møtrikker (C) og møtrikhætter (D).

Indsæt skrue (A) gennem de dertil beregnede huller i anti-tipbeslaget og gennem kørestolsrammen. Sæt derefter skive (B) og møtrik (C) på den modsatte side, og stram skruerne.

Til sidst fastgøres møtrikdækslerne (D).





Guppy G2 bør altid udstyres med anti-tipstøtte med tanke på produktets mange indstillingsmuligheder.

At bruge anti-tip støtte

Anti-tipstøtte bruges for sikker og tryk brug af kørestolsstellet og kan nemt vippes væk for ikke at være i vejen, når den ikke er i brug. Træd forsigtigt antitipstøtten ned (E) med din fod og drej den til siden. Prøv at træde så tæt på anti-tip-støttestangen (F) som muligt, når anti-tip-støtten deaktiveres. Dette er for at delene skal have den længst mulige levetid.

Sørg for at dreje anti-tipstøtten helt, indtil du hører et klik, hvilket indikerer at anti-tipstøtten endte på plads.

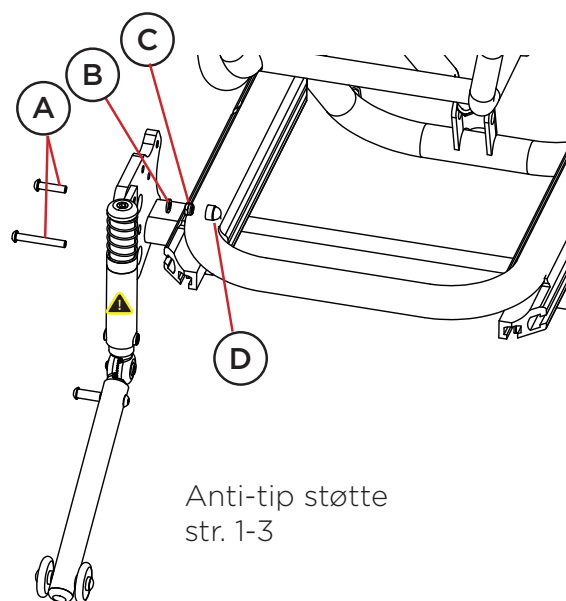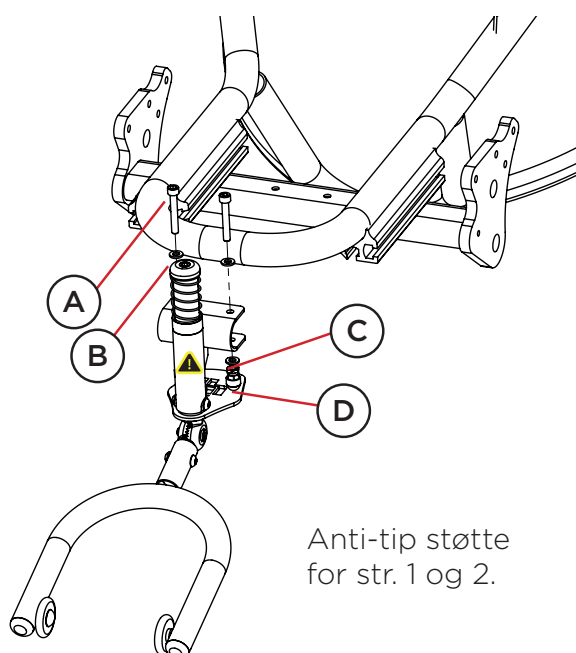

Tippepedal

Montering af tippepedal

Monter tippepedalen (A) på indersiden af profilen ved bagerste del af kørestolsrammen, ved at indsætte møtrikkerne i sporet og låse dem fast med en af skruerne (B) udefra.




Tippepedalen er som standard monteret på højre side.

Brug af tippepedal

Tippepedalen bruges til at gøre det lettere at løfte chassiset, f.eks. ved kantsten. Tryk på tippepedalen med foden, mens du holder fast i skubbebøjlen, og træk forsigtigt tilbage for at frigøre plads under hjulene.



Ved brug af tippepedalen er det vigtigt at du holder i kørebøjlen eller kørehåndtaget ordentligt.

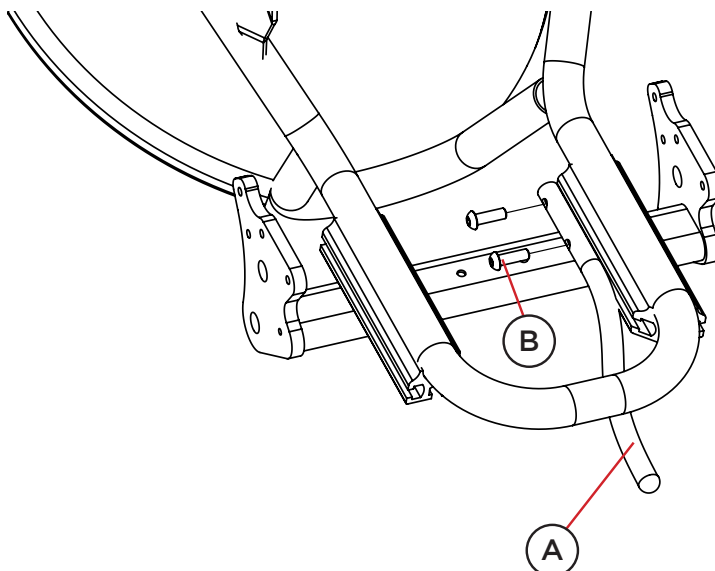

Stænkskærm

Montering af stænkskærm

Stænkskærmen monteres ved hjælp af de medfølgende skruer (A), afstandsstykker (B) og møtrikker (C).

For at montere stænkskærmen skal du først fjerne drivhjulet fra drivhjulets aksel ved hjælp af quick-release funktionen og lægge det til side foreløbig. Løsn skruen, der holder rotationslåsen på tromlebremsen, og fjern afstandsstykket.


Monter stænkskærmen ved hjælp af de medfølgende skruer. Afstandsstykket på tromlebremsen udskiftes med et kortere for at gøre plads til stænkskærmladen.

Justering af stænkskærm

Stænkskærmen kan justeres i højdeled ved at løsne skruerne (D). Justere til ønskede højde og spænd skruerne (D) til ønskede højdeposition er opnået.



Du behøver ikke at skrue skruerne (E) helt ud, det er nok at løsne dem.

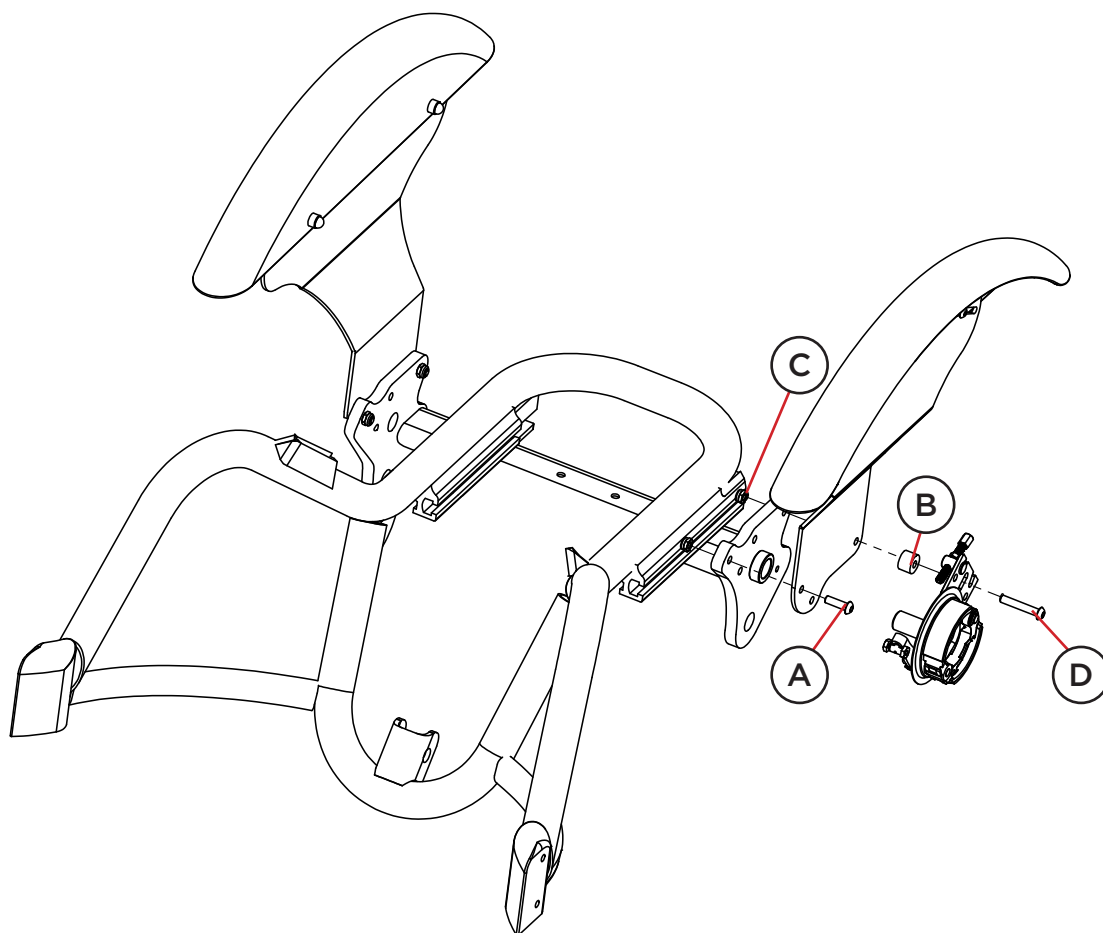

Transportbeslag

Montering af forreste transportbeslag


Monter beslaget rundt om rørrammen. Før gevindstangen (A) gennem beslaget og låsepladen (B). Bemærk, at afstandsstykket (C) skal monteres i beslaget. Spænd beslaget med skive (D) og møtrik (E), og skjul møtrikken med et dæksel (F).

Montering af bagerste transportbeslag

Det bageste transportbeslag monteres på ydersiden af profilen bagerst på rammen ved hjælp af de medfølgende skruer (G), skiver (H) og møtrikker (I) som vist på billedet.

At anvende transportbeslaget

Se afsnittet "Transport i bil" for yderligere information og anbefalinger af hvordan du på en sikker måde bruger transportbeslaget.

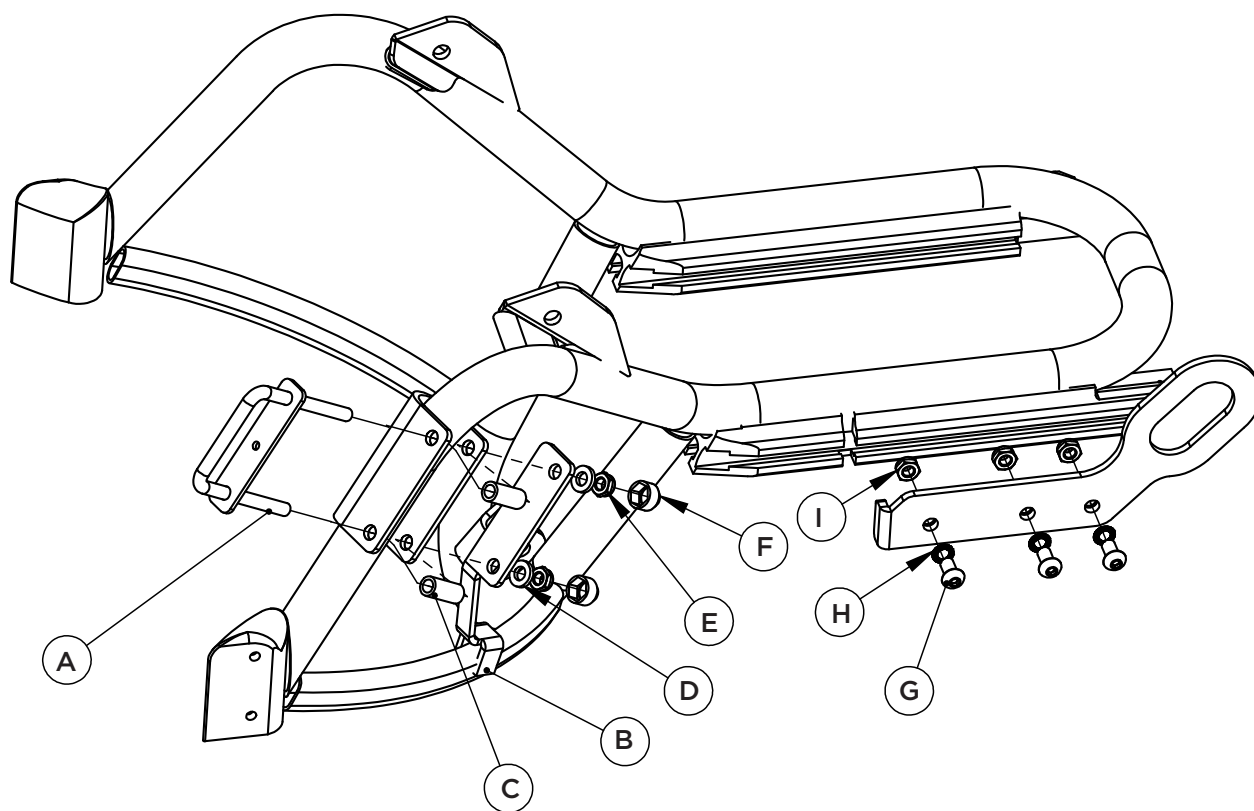


Montering af siddesystem

Montering af siddesystem

Siddesystemets fæsteplade monteres enkelt på kørestolsstellet gennem fire (4) skruer, spændeskiver og møtrikker i markerede riller (A) på kørestolsstellets sædeplade.



For yderligere information om fæsteplader, se den respektive brugervejledning til det valgte siddesystem

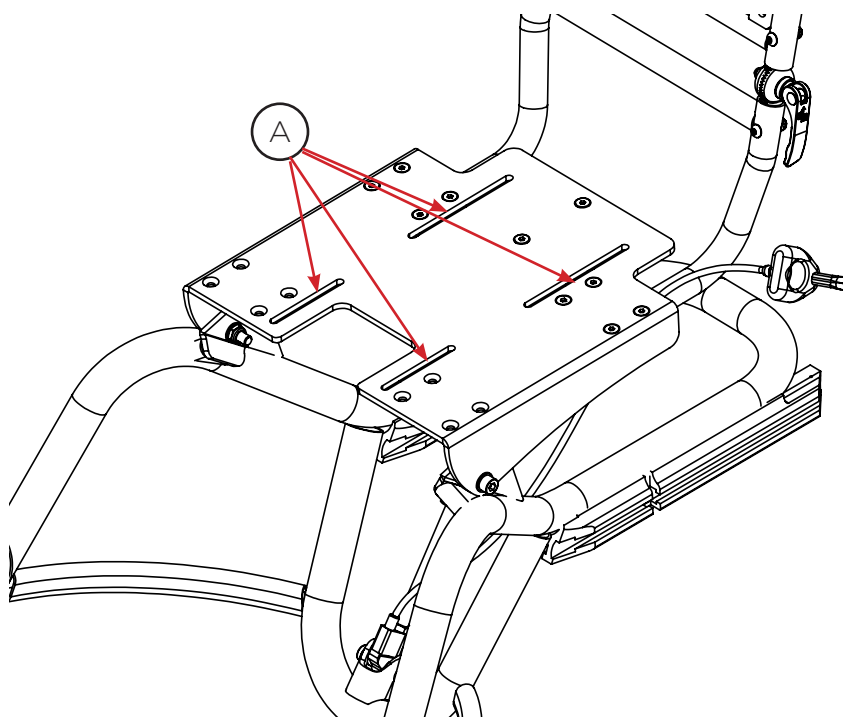

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til handling.

Transport i køretøj

Vi gør opmærksom på, at den absolut sikreste måde er at transportere brugeren i køretøjets autosæder, fastspændt med den almindelige sikkerhedssele. Vi anbefaler ikke køretøjstransport i kørestolsstellet. Dog er vi opmærksomme på, at visse brugere og situationer betyder, at brugeren skal transporteres siddende i kørestolsstellet. I disse tilfælde skal nedenstående sikkerhedsanvisninger altid følges for at minimere risikoen for personskade i tilfælde af en ulykke. Læs mere under Transportbeslag.




Anvisninger for transport i køretøj

Kørestolsstellet er crashtestet og godkendt efter 7176-19 for transport i bil.



Fastgørelse skal ske med spændebånd, Godkendt i henhold til ISO 10542, i kørestolsstellets transportbeslag markeret med følgende mærkat. Fastgør de fire stropper med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter. Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne. Kørebøjlen skal ligge op mod ryggen.

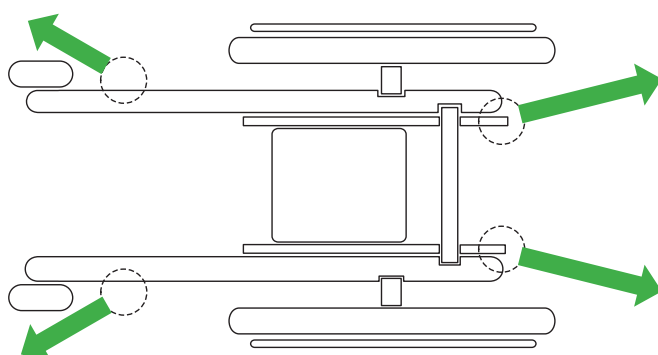

Forslag til
spændebåndenes
trækretninger

- 

Det er vigtigt kun at strække stropperne, og ikke spænde dem for stramt. For stram spænding af stropperne kan få kørestolsstellet til at blive skævt
- 

Max belastningsvægt er 75 kg (for str. 1+2) og 110 kg (for str. 3+3bred).
- 

Man skal køre fremadvendt i en bil med bilens trepunktssæde.
- 

Fastgørelsessystemet og trepunktsselen skal være godkendt i henhold til ISO 10542.
- 

Fastgør de fire stropper med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter. Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne. Kørebøjlen skal ligge op mod ryggen.



! Korrekt positionering af bæltet samt vinkel ifølge fig. 1.

! Bæltet skal sidde stramt og tæt mod kroppen. Kørestolens dele må ikke forhindre selen i at sidde tæt til kroppen.

! Den øverste del af bæltet skal gå over brugerens skulder uden at trykke på halsen (se fig. 2)

! Overskrid ikke maksbelastningen på kørestolsstellet.

! Der må ikke foretages ændringer eller skader på kørestolens transportbånds fastgørelser.

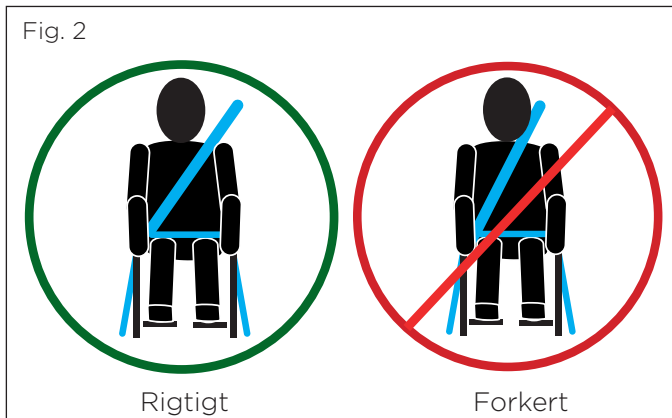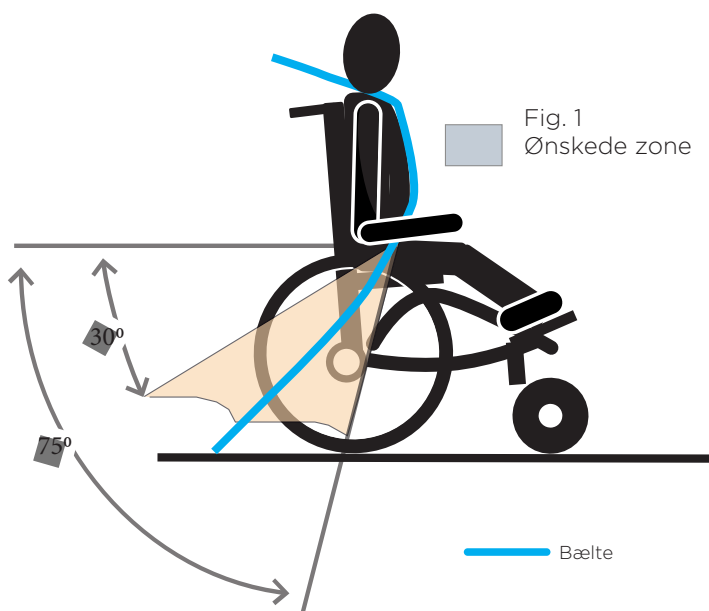

! Trepunktsseler skal bruges for at reducere risikoen for hoved- og brystskader forårsaget af køretøjskomponenter

! Hvis kørestolen er udstyret med et bord, skal dette fjernes og opbevares sikkert under transport.

! Når det er muligt, skal andet aftageligt udstyr enten fastgøres på kørestolen eller fjernes for sikker opbevaring under transport.

! Vær opmærksom på, at spændet på sikkerhedsselen ikke skal ende, så "åbningsknappen" kan komme i kontakt med løse dele ved en kollision.

! Kørestolen skal tages ud af drift, hvis den har været involveret i en kollision.



Køreteknik

Assistenthjælp, opad fremad

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned

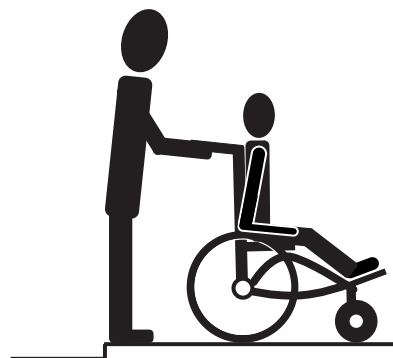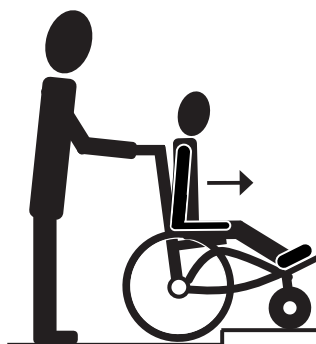


Assistenthjælp, opad baglæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned

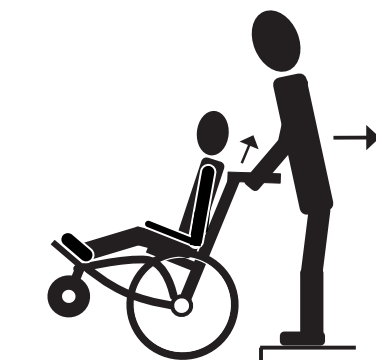

Assistenthjælp, ned forlæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtten .



Træd tippepedalen ned



Aktiver altid evt. anti-tipstøtte, når forflytningen er klaret!

Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Løft i rammen og kørebøjlen.

Assistenthjælp, op af trapper


- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Assistenthjælp, ned af trapper

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.

Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Bær i rammen og kørebøjlen.

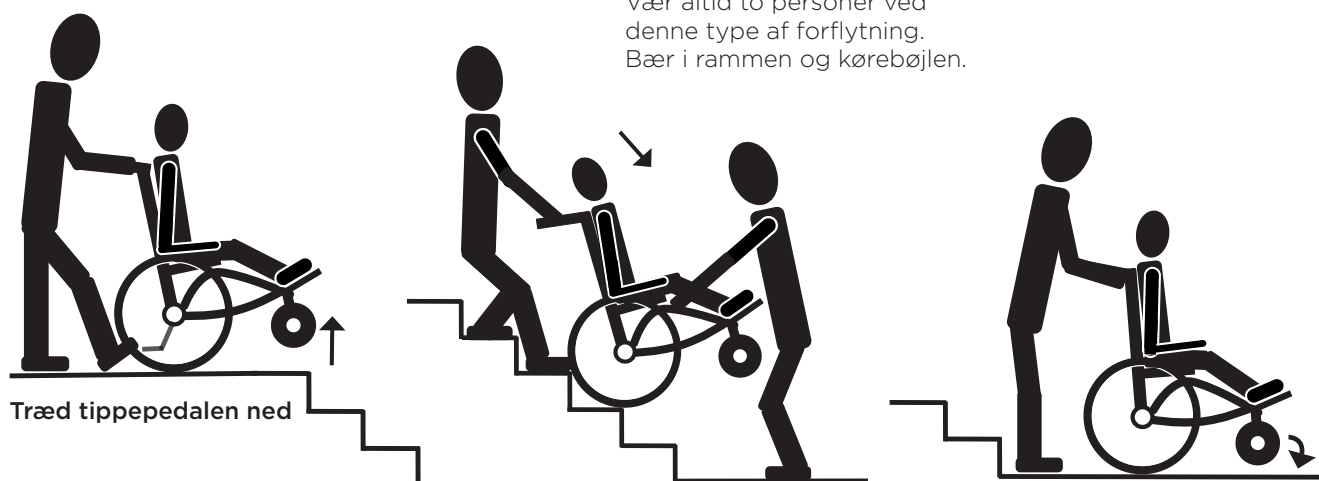

Skrånende underlag

- Tænk over den øgede risiko for at vælte ved brug på skrå overflader. Slip aldrig kørebøjlen ved transport på skrå overflader. Kontroller, at kørestolsstellet er stabilt, og at bremserne er aktiveret ved parkering.



Aktiver altid ev. anti-tipstøtte når forflytningen er fuldført! Sørg for, at hæve- og sænkehåndtagene er strammet. Gå aldrig på en rulletrappe, selvom der er hjælp at hente!

Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner

Dette produkt er et medicinsk teknisk hjælpemiddel beregnet til flergangsbrug. For at hjælpemidlet kan fungere sikkert og for at nå den anslåede levetid, er tilsyn, vedligeholdelse og rengøring derfor vigtigt. Ved udskiftning af dele i forbindelse med vedligeholdelse og service skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic SITT.

Definitioner: Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

- Med **afhjælpende vedligeholdelse** menes foranstaltninger til reparation af et ødelagt produkt, en akut vedligeholdelse, svær at planlægge i tide og ofte afhængig af brugen af produktet.
- **Service** henviser til et enklere eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter fx kontrol af skruer og befæstelser, bevægelige dele, generel slitage mv samt mindre reparationer.
- Med **forebyggende vedligeholdelse** henvises til handlinger forårsaget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne form for vedligeholdelse kan ses som handlinger af engangskarakter, der er planlagt i forhold til tid, type og omfang. For dette produkt kræves ingen forebyggende vedligeholdelse i produktets forventede levetid

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt fingerskruer.
- Kontroller at sædet er sat ordentligt fast på kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip-støtter
- Kontroller bremsernes funktion.
- Kontroller hjulenes stand og at de sidder fast.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. vedrørende mobilitet og aflåsning

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

Vedligeholdelse

Rengøringsbehovet varierer og skal vurderes fra sag til sag produktets brug, men mindst en gang om ugen anbefales. Rengør produktet med en svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende stoffer eller opløsningsmidler.

Service og vedligeholdelse

For at fungere trygt og sikkert skal der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen. Ved udskiftning af ødelagte, slidte eller revnede dele må der kun anvendes originale dele fra Anatomic SITT, så produktet bevarer sin CE-mærkning. Reservedele kan bestilles i henhold til den separate reservedelsliste/eksploderede visning for det pågældende produkt.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift.

For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller at eventuelle anti-tip støtter fungerer.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Funktionstest og smør alle bevægelige dele som led, vajre, hjul, vingeskruer mm. Anvend olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray etc).
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, siddestilling, højdejustering, mm. Både ifht. justeringsmuligheder, bevægelighed samt låsning.
- Kontroller at gaspatronerne låser i valgt leje.
- Kontroller at ledningerne er korrekt placeret og korrekt justeret.
- Kontroller hjulenes funktion: Kontroller at alle hjul sidder fast og står fast på underlaget. Kontroller at stolen ruller tilfredsstillende.
- Kontroller evt. slitage på alle led, taggedede led og beslag. Sørg for, at de låser, som de skal.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Tillæg for E-drive

- Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monterede og i et stik, der virker.
- Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

For information om produktet og deres funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. For information om produktets livslængde Se afsnittet "Begrænsninger" i brugervejledningen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør produktet med svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklaffe ved 65 ° C i maksimalt 10 minutter. Ved rengøring af kørestolsstellet i vaskekabinet skal det stå fikseret og placeret opret med låste hjul.

Tørring

Kørestolsstellet kan tørres i kabinet i max 65°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved renovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE-mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Funktionstest og smør alle bevægelige dele såsom samlinger, ledninger, hjul, knopper osv. Brug den relevante olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, Teflonspray osv.). Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme. Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Maling

For at forhindre korrosionsskader eller forbedre ridser kan maling bestilles fra Anatomic SITT.

Artikelnummer: 387299, maling kørestolsstel G2, mattsort.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller samtlige funktioner på produktet.
- ☐ Kontroller at hjælpemidlet ikke er skævt og at det stadig står med alle hjul mod underlaget.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusteret

Kørestolsstel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller at tiltfunktionen virker og at gaspatronen låser i valgte leje.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusterede.
- ☐ Kontroller at eventuel løftegaspatron fungerer som den skal.
- ☐ Kontroller at kørebøjle's justeringsmuligheder og led fungerer og at polstringen er hel.

Hjul/Bremser:

- ☐ Kontroller at skruer til hjulene er ordentligt spændte.
- ☐ Kontroller at svinghjulet snurrer uhindret og at lejerne ikke sidder fast.
- ☐ Kontroller at quick-release akslen låser korrekt.
- ☐ Kontroller at bremsekablerne er uskadede, korrekt placeret og korrekt indjusteret.
- ☐ Kontroller bremsefunktionen på samtlige hjul.
- ☐ Kontroller at kørestolsstellet ruller let og lige.
- ☐ Kontroller eventuelt dæktryk og mønster på dækket.
- ☐ Kontroller eventuelle drivringe/egerbeskyttere efter grader og skarpe kanter.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlænenes justeringer ifht højde, dybde og bredde.

Anti-tipstøtte:

- ☐ Kontroller vinkel/vridfunktion.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Elektriske funktioner:

- ☐ Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monteret og i god stand.
- ☐ Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- ☐ Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Batteri og gaspatron sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Garantien gælder generelt i et (1) år mod fabrikationsfejl fra leveringsdatoen eller i henhold til aftale. Garantien dækker ikke udefrakommende påvirkninger eller unormal håndtering. For at garantibehandlingen kan finde sted, skal den defekte vare returneres. Vedlæg altid følgesedlen.

For bedst at kunne vurdere reklamationen skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen og årsagen så grundigt som muligt. Anmod om garantireparation eller eventuel garantiombytning. Vedlæg en kopi af fakturaen, og angiv, at produktet skal returneres til dig efter reparation. Angiv leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamationsformularen kan downloades fra vores hjemmeside.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produktet.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Symbolfortegnelse

Nye crashtest-klistermærker s. 5

Transport i køretøj

Nye crashtest-klistermærker s. 40

Revisionsfortegnelse

ver. 2.0 - 2020-04-15

ver. 2.1 - 2021-06-25

ver. 2.2 - 2021-09-03

ver. 2.3 - 2021-12-21

ver. 2.4 - 2022-04-29

ver. 2.5 - 2022-08-29

ver. 2.6 - 2023-02-20

ver. 2.7 - 2023-04-17

ver. 2.8 - 2023-11-29

SE

Anatomic SITT AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com

DK

Anatomic SITT A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

www.instagram.com/anatomicsitt

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

