



# Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,  
service, vedligeholdelse og reovering



Denne vejledning refererer til siddesystem Anatomic Motion siddesystem med tilbehør. For komplet oversigt over produktets tilbehør, se produktets bestillingsgrundlag.

## Indholdsfortegnelse

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Producent .....</b>                              | <b>3</b>  | Udskiftning af gaspatron til ryg .....           | 18        |
| <b>Specialtilpasning.....</b>                       | <b>3</b>  | Beskyttere.....                                  | 19        |
| <b>Introduktion .....</b>                           | <b>4</b>  | Justering af ryghøjde .....                      | 20        |
| Indledning.....                                     | 4         | Justering af rygvinkel.....                      | 20        |
| Korrespondance - mærkning .....                     | 4         | Dynamisk funktion - Quick-release .....          | 21        |
| CE-mærkning - klassificering .....                  | 4         | Justerbar kropsstøtte.....                       | 22        |
| Overensstemmelseserklæring .....                    | 4         | Vipbar kropsstøtte.....                          | 22        |
| <b>Kort om produktet.....</b>                       | <b>4</b>  | Hovedstøtte .....                                | 23        |
| <b>Symbolliste.....</b>                             | <b>5</b>  | Sidejusterbart hovedstøttefæste.....             | 23        |
| <b>Produktmærkning.....</b>                         | <b>6</b>  | Vipbart hovedstøttefæste.....                    | 24        |
| <b>Sikkerhedsinstruktioner .....</b>                | <b>7</b>  | Montering af kropsseler .....                    | 25        |
| Uddannelse og kvalifikationer.....                  | 7         | Hoftebælte .....                                 | 26        |
| Advarsler og forholdsregler .....                   | 8         | Armlæn .....                                     | 27        |
| Kontrol før brug .....                              | 9         | Overarmsstøtte .....                             | 28        |
| Begrænsninger.....                                  | 9         | Hoftestøtte .....                                | 29        |
| Andre risici .....                                  | 10        | Knævinkeljustering.....                          | 30        |
| Godkendte kombinationer.....                        | 10        | Bord Motion .....                                | 31        |
| Afvielser/tilbud .....                              | 10        | Fodstøtte.....                                   | 32        |
| <b>Tekniske data/ydeevne .....</b>                  | <b>11</b> | Ankelbespænding.....                             | 33        |
| <b>Tilpasning og specialtilpasning.....</b>         | <b>12</b> | Fodrem.....                                      | 33        |
| <b>Monterings- og justeringsinstruktioner .....</b> | <b>13</b> | Lægstøtte .....                                  | 34        |
| Montering på kørestolsstel .....                    | 14        | <b>Resumé og opfølgning .....</b>                | <b>35</b> |
| Sædedel Motion-sædedybde, sædebrønd....             | 15        | <b>Transport i køretøj.....</b>                  | <b>36</b> |
| Sædedel Advance-sædedybde, sædebrønd                | 16        | <b>Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner ...</b> | <b>37</b> |
| Montering/afmontering af ryg.....                   | 17        | Kontrol før brug .....                           | 37        |
|   |           | Service og vedligeholdelse.....                  | 38        |
|   |           | Renovering .....                                 | 39        |
|   |           | <b>Affaldssortering .....</b>                    | <b>42</b> |
|   |           | <b>Garanti og retur.....</b>                     | <b>42</b> |
|   |           | <b>Revision.....</b>                             | <b>43</b> |

# Producent

**Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB**

**Post adresse** Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping  
**Besøgs adresse** Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping  
**Telefon** 011-161800  
**E-mail** info@anatomicsitt.com  
**Web** anatomicsitt.com  
**Instruktionsfilm** youtube.com/anatomicsitt

**Produktet forhandles i Danmark af:**

**Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Danmark**

**Tlf** 86 17 01 74  
**Fax** 86 17 01 75  
**E-mail** a-sitt@anatomicsitt-sitt.dk  
**Web** anatomicsitt.dk

**Eudamed-registreringsnummer/SRN:** SE-MF-000002240

# Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved  
SPECIALTILPASNING for da  
gælder CE-mærkningen ikke.



# Introduktion

## Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at I skal kunne udnytte produktet til fulde er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: [www.anatomicsitt.dk](http://www.anatomicsitt.dk).

## Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne. Du finder serienummeret på sidde-systemets basede bagerste del under sædepolstringen.

## CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

## Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU-overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se [www.anatomicsitt.com/da/dokument\\_dk](http://www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk).

## Kort om produktet

Anatomic Motion Sidde-system er et modulopbygget dynamisk sidde-system til børn, unge og voksne med siddestillingsproblematikker og nedsat motorisk kontrol, ekstensionsspasticitet eller andre ufrivillige bevægelser. Sæde og ryg har mange indstillingsmuligheder og kan forsynes med forskelligt tilbehør for at opnå en specifik siddestilling. Sidde-systemet er beregnet til at blive brugt sammen med kørestolsstel fra Anatomic SITT.

Anatomic Motion Sidde-system er et genbrugsprodukt.



# Symbolliste

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | <p>Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.</p>   |    | <p>Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.</p>                        |
|    | <p>Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.</p>   |    | <p>Angiver at produktet er medicinsk udstyr.</p>  |
|    | <p>Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.</p>  |    | <p>Angiver producentens referencenummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.</p>    |
|  | <p>Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.</p>  |  | <p>Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.</p>              |
|  | <p>Angiver at brugervejledningen skal læses for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information om f.eks. advarsler som ikke findes på produktets medicintekniske etiket.</p> |  | <p>Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.</p> |
|  | <p>Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato.</p>                          |  | <p>Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.</p>                                    |
|  | <p>Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.</p>  |   |   |

# Produktmærkning

## Etiket på hovedprodukt

**MD** Sittsystem Motion  
 Sittdelsbas stl. 5 (35x40) - Anatomic Motion  
**REF** 170005 **SN** 53162 2021-06-14  
 Anatomic Sitt i Norrköping AB  
 Terminalgatan 1  
 SE-603 61 Norrköping  
 www.anatomicsitt.com Maxlast

Annotations:
 

- Produkttype
- Produktgruppe
- Produktnavn
- QR-kode
- Max belastningsvægt inkl. bruger

## Etiket på tilbehør

**MD** Tillbehør Motion & Advanced  
 Armstød stl. 5-9 kpl. sittdel L230mm (par) - Mot  
**REF** 170706 **LOT** 65051 2021-06-14  
 Anatomic Sitt i Norrköping AB  
 Terminalgatan 1  
 SE-603 61 Norrköping

Annotations:
 

- Produkttype
- Produktgruppe/produktgrupper
- Produktnavn
- QR-kode

# Sikkerhedsinstruktioner

## Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om tilpasning/specialtilpasning skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

## Advarsler og forholdsregler

-  Læs altid brugervejledningen før brug.
-  Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.
-  Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.
-  Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.
-  Den person, der ordinerer hjælpemidlet, og som har kendskab til brugeren skal afbalancere det valgte sæde for at sikre, at enhver tipperisiko er udelukket. Kontroller altid produktets funktion før brug.
-  Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.
-  Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle monteringsskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.
-  Sørg altid for, at sædet er fastgjort til kørestolsstellet før borgeren placeres i siddesystemet! Et bælte leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra rygprofilen af sædet og omkring chassisets kørebøjle. Dette bælte skal altid bruges sammen med adaptersystemet universal, og når det transporteres i et køretøj. Sørg for, at denne rem er stabil og stram.
-  Brug aldrig fodpladen ved ind- og udstigning af hjælpemedlet.
-  Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle max belastning".
-  Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.
-  Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.
-  Udfør aldrig service, mens produktet anvendes.
-  Efterlad aldrig brugeren uden opsyn, når hjælpemidlet anvendes.
-  Udfør altid kontrol efter brug for at registrere rødme eller trykmærker på brugeren.
-  Kontroller at quick-releasen til dynamikken er låst ved ind og udstigning samt ved transport i køretøj.

## Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres hver gang før brug, se punkter nedenfor:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling for bevægelse og låsning.
- Kontroller bæltet og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

## Begrænsninger

### Maxvægt

Den højeste belastningsvægt er 90 kg og gælder for samtlige størrelser.

Med belastningsvægt menes den maksimale vægt som siddesystemet må udsættes for inkl. bruger og evt. anden vægt. Max belastningsvægt for transport i køretøj er 75 kg.

### Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere alt efter, hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

### Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned. Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

## Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør.

## Godkendte kombinationer

For at produktet kan bevare sin CE -mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S. Se produktets bestillingsgrundlag for muligt tilbehør og reservedelsliste.

## Afvielser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed.




# Tekniske data / ydeevne

## Motion siddeystem / Advanced

|   | Str. 0 | Str. 1  | Str. 2  | Str. 3  | Str. 4  | Str. 5  | Str. 6  | Str. 7  | Str. 8  | Str. 9  |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Brugerhøjde, ca cm:   | 95-120 | 115-140 | 135-160 | 135-160 | 155-180 | 155-180 | 175-200 | 175-200 | 195-205 | 195-205 |
| Sædebredde (A) cm:  | 25     | 25      | 25      | 30      | 30      | 35      | 35      | 40      | 40      | 45      |
| Sædedybde (B) cm:   | 25-30  | 30-35   | 35-40   | 35-40   | 40-45   | 40-45   | 45-50   | 45-50   | 50-55   | 50-55   |
| Brugervægt samtlige størrelser: max 90 kg.                      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Crashtestet max 43 kg (til str. 1-4), max 75 kg (til str. 5-9). |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ryg vinkel samtlige størrelser: 0° til +15°                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |


### RYGPUDE

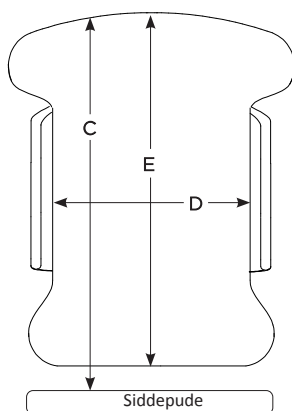

|            | E x D      | C min* | C max* |
|------------|------------|--------|--------|
| Ryg str. 1 | 35 x 16 cm | 37 cm  | 43 cm  |
| Ryg str. 2 | 40 x 19 cm | 42 cm  | 50 cm  |
| Ryg str. 3 | 45 x 22 cm | 47 cm  | 56 cm  |
| Ryg str. 4 | 50 x 25 cm | 52 cm  | 60 cm  |
| Ryg str. 5 | 55 x 28 cm | 57 cm  | 66 cm  |
| Ryg str. 6 | 60 x 31 cm | 62 cm  | 70 cm  |

\*Målt fra siddepude til ryggens overkant.  
Rygpudder er justerbar i højden.

### KROPSSTØTTE

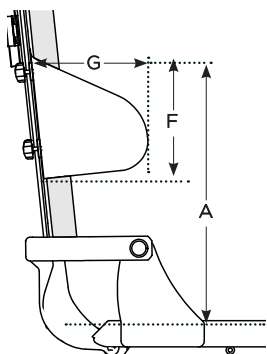

|                    | F x G        |
|--------------------|--------------|
| Kropsstøtte str. 1 | 12 x 10,5 cm |
| Kropsstøtte str. 2 | 13,5 x 12 cm |
| Kropsstøtte str. 3 | 15 x 13,5 cm |
| Kropsstøtte str. 4 | 16,5 x 15 cm |
| Kropsstøtte str. 5 | 18 x 16,5 cm |
| Kropsstøtte str. 6 | 19,5 x 18 cm |

#### A - Axilhøjde\*

|                    | Kropsbredde* | A        |
|--------------------|--------------|----------|
| Kropsstøtte str. 1 | 18-28 cm     | 15-23 cm |
| Kropsstøtte str. 2 | 22-32 cm     | 20-26 cm |
| Kropsstøtte str. 3 | 26-36 cm     | 22-29 cm |
| Kropsstøtte str. 4 | 30-40 cm     | 24-32 cm |
| Kropsstøtte str. 5 | 34-42 cm     | 27-35 cm |
| Kropsstøtte str. 6 | 38-46 cm     | 30-38 cm |

\*Mål gælder ved valg af samme størrelse på kropsstøtte og ryg.

### ARMLÆN



#### Støtteplade A x B

|        |             |
|--------|-------------|
| Str. 1 | 230 x 75 mm |
| Str. 2 | 330 x 75 mm |
| Str. 3 | 330 x 75 mm |


#### Armlæns højde C\*

|        |              |
|--------|--------------|
| Str. 1 | 175 - 220 mm |
| Str. 2 | 200 - 260 mm |
| Str. 3 | 240 - 300 mm |


\* med beslag til bord, øges armlæns højden 45 mm

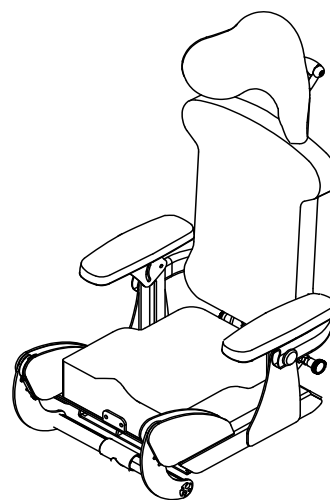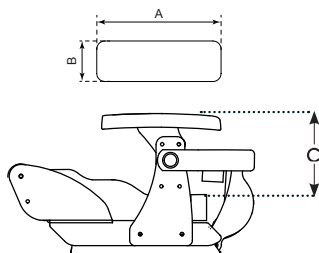

### MÅLTAGNING SÆDE

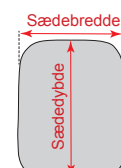


MOTION SEAT

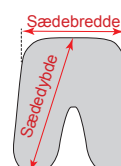


ADVANCED SEAT


### FODSTØTTE

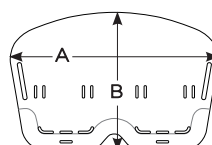

|            | A x B        |
|------------|--------------|
| Hel str. 2 | 345 x 225 mm |
| Hel str. 3 | 380 x 260 mm |
| Hel str. 4 | 380 x 310 mm |
| Hel str. 5 | 430 x 310 mm |

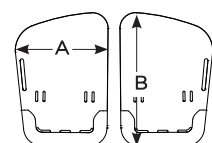


|             | A x B        |
|-------------|--------------|
| Delt str. 2 | 160 x 220 mm |
| Delt str. 3 | 175 x 255 mm |
| Delt str. 4 | 175 x 305 mm |

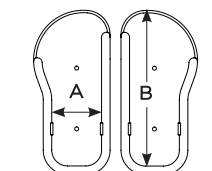

|                 | A x B        |
|-----------------|--------------|
| Med kant str. 3 | 90 x 260 mm  |
| Med kant str. 4 | 100 x 290 mm |
| Med kant str. 5 | 110 x 320 mm |

Kanthøjde 4 cm

### BORD MOTION

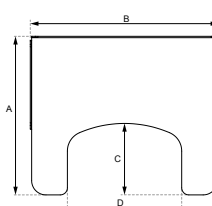

|        | A   | B   | C   | D   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| Str. 1 | 405 | 510 | 175 | 250 |
| Str. 2 | 455 | 560 | 200 | 300 |
| Str. 3 | 505 | 610 | 225 | 350 |
| Str. 4 | 555 | 660 | 250 | 400 |
| Str. 5 | 605 | 710 | 275 | 450 |

# Tilpasning og specialtilpasning

## Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE -mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

## Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Længden af fodstøtteprofilen kan forkortes, så den passer bedre til brugeren.

Ryglænsprofilens længde kan forkortes. Profilen må aldrig være kortere, end alle beslag til bagpladen kan monteres på.

## Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

## Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

# Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

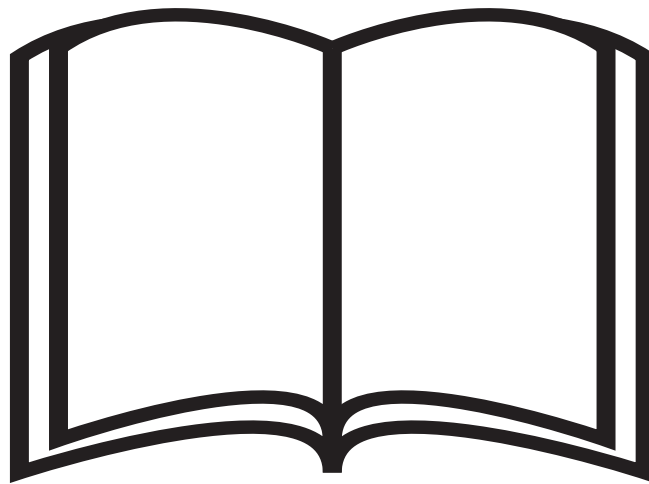

## Værktøj

Værktøjsnøglen, som du skal bruge til at foretage justeringer, er integreret øverst på rygprofilen som du finder på bagsiden af stolen.  
(4 mm unbrakonøgle)




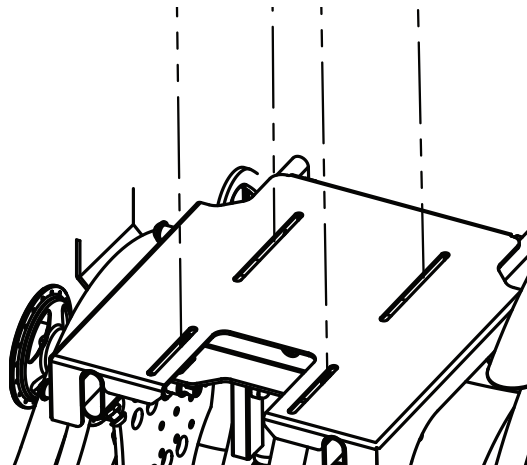
## Montering på kørestolsstel


### Fast montering

Fast montering betyder, at du fastgør siddesystemet direkte på chassiset. Montering på denne måde skal ske med det medfølgende monterings sæt, 4 skruer og skiver.

Sædet fastgøres fra undersiden af toppladen til bunden og op i sædet.

 Man skal sikre sig, at benstøtterne ikke støder sammen med chassiset eller forårsager risiko for at noget kommer i klemme.



 **Balancering**  
Kontroller siddesystemets balancepunkt på kørestolsstellet, så det er stabilt og ikke i risiko for at tippe.

## Siddedel Motion - siddedybde



### Sædedybde

For at indstille sædedybden, løsnes de fire skruer lidt (A).

Skub sædepladen frem til den ønskede sædedybde (se skalaen på siden af sædet).

For at aflæse sædedybden, så se på trykknappens position (B).

Spænd skruerne.

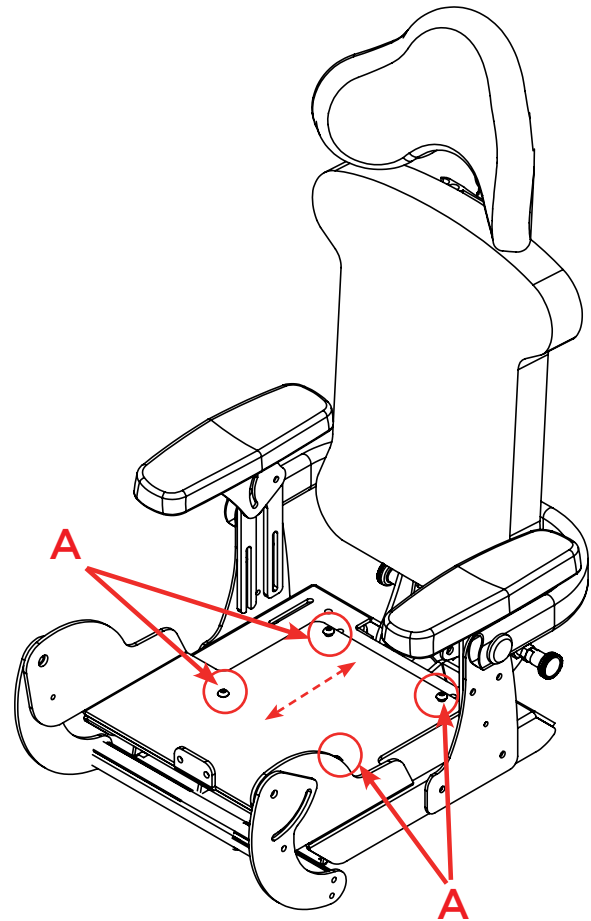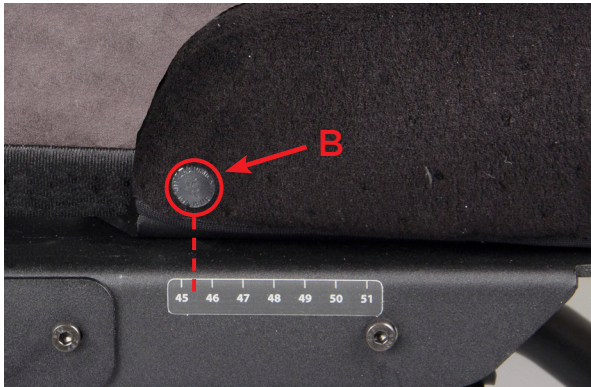


### Sædebrønd

Sædebrøndens position kan justeres ved at hele siddepuden flyttes fremad eller bagud beroende på den aktuelle sædedybde.

Ved maximal sædedybde anbefales det at siddepuden flyttes bagud for at bibeholde sædebrøndens position. Dette gøres ved at flytte pudestoppet (C) som forhindrer puden i at glide fremad.

Løsen begge skruer, som holder (C) og flyt den to huller tilbage.

Spænd skruerne.

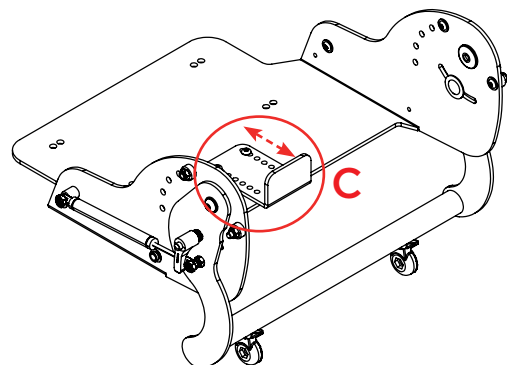


## Siddedel Advanced - sædedybde



På Motion Siddesystem Advanced kan man enkelt indstille bendelene individuelt. Man kan indstille sædedybde, sædebrønd samt abduktion/adduktion/windswept.

### Sædedybde

For at indstille sædedybden, løsne de fire skruer (A). De forreste skrue nås gennem hullerne i plastikken til sædebrønden (som derfor ikke skal fjernes). Skub bendelene frem til den ønskede sædedybde (se skalaen på siden af sædet). Aflæs sædedybden som angivet af trykknappens position (B). Spænd skrueerne.

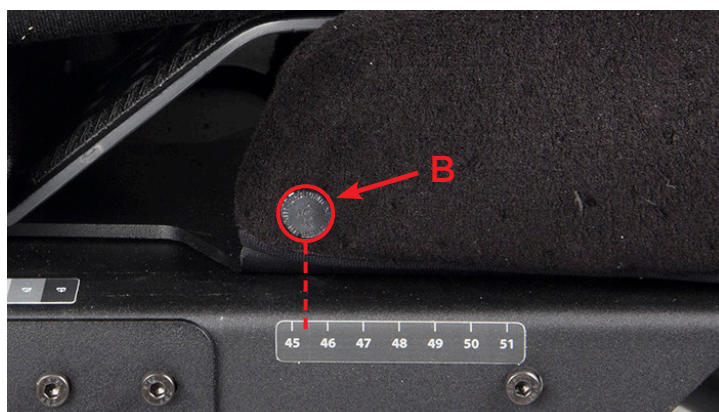



Skalaen viser indstilling, hvor bendelene er sat til normal abduktion, ca. 5°.

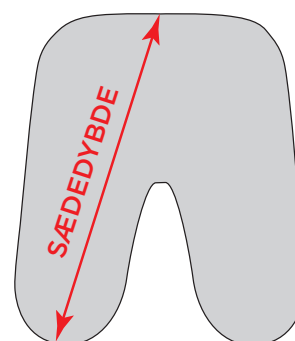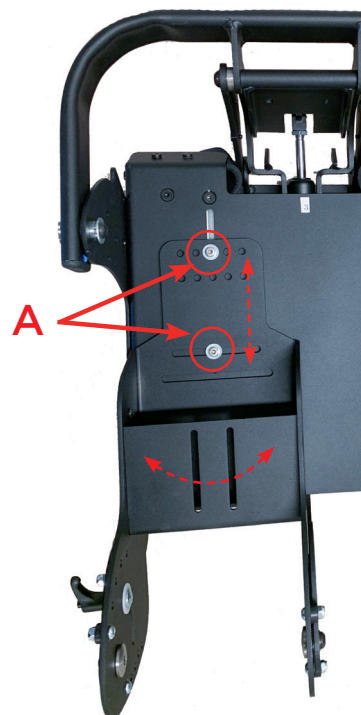



### Sædebrønd

Løsn skruerne (C), der holder plastikken til sædebrønden. Placeringen af sædebrønden er angivet med indhakket (D) i plastikken over skalaen på toppen af sædepladen. Grøn markering er standardpositionen/størrelsen af sædebrønden. Skub plastdelen, der styrer sædebrønden, til den ønskede position, og spænd skruerne (C).

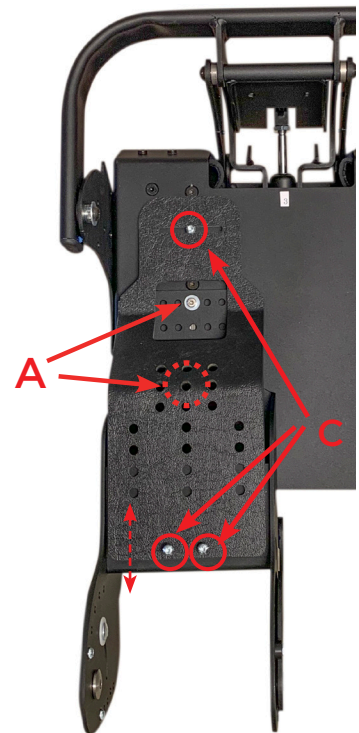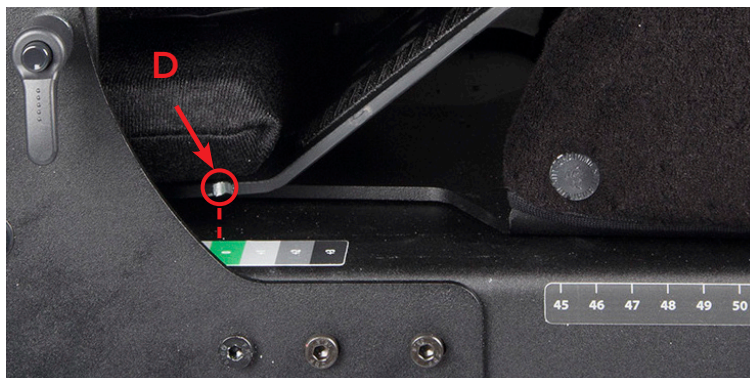

### Montering/afmontering af ryg

Ryggen er fastgjort med 4 stk. skruer.  
Rygprofilen føres med profilskruerne ned i profilerne. Herefter spændes de fire medfølgende skruer (Markeret med rødt på billedet). Skruerne til rygprofilen skrues i forfra eller bagfra alt efter sædets størrelse.




## Udskiftning af gaspatron til ryg

### Udskiftning af gaspatron

Fjern beskyttelsen fra den nederste del af ryggen.

Under låseflappen til rygvinklingen er det bagerste gaspatronbeslag (A) med en skrue med en låsemøtrik, der holder en gaspatron (nogle modeller har 2 gaspatroner). Løsn skrueforbindelsen og træk patronen ud.



Monter den nye gaspatron i det forreste beslag (B), så patronen ikke kan bevæge sig sidelæns. Beskyttelsen under sædet kan foldes til siden på fronten til eftersyn (se billedet nedenfor).

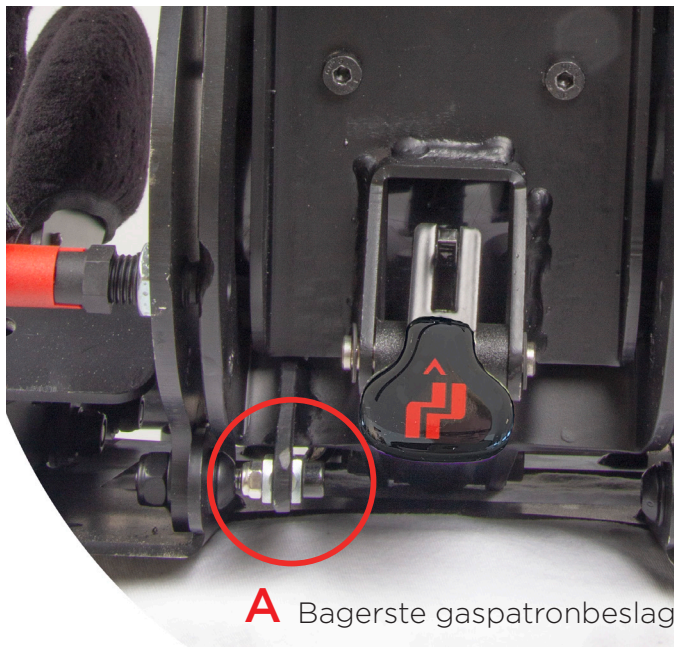

**A** Bagerste gaspatronbeslag



Fastgør gaspatronen med skrue og låsemøtrik i det bagerste beslag, og genmonter begge beskyttelser.

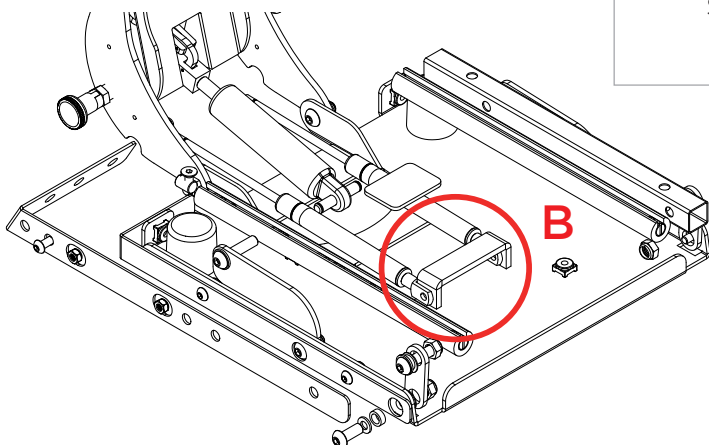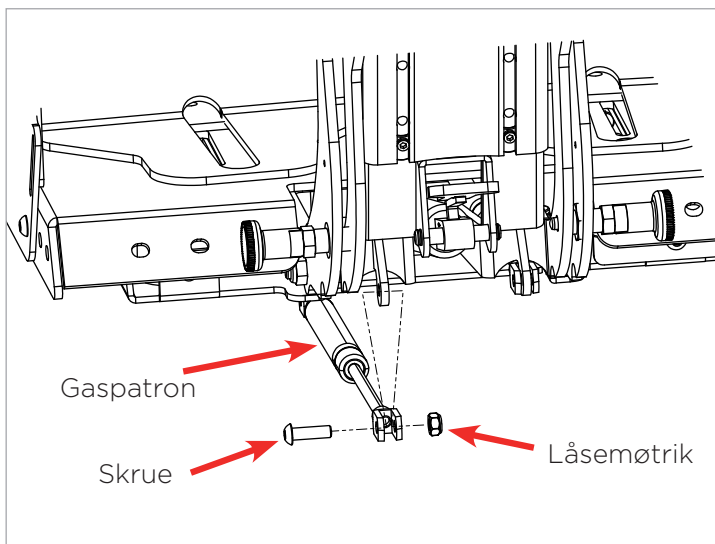

## Beskyttere

Beskytterne er for at mindske risikoen for søskende eller andre får noget i klemme, når brugeren er aktiv i stolen.


**Beskytterne (D)** placeres rundt om ryggens nederste del, se billederne til højre. Sørg for at stykket kommer ordenligt ind under sædedelen på bagsiden.



**Beskyttere (E)** under sædet må aldrig fjernes, medmindre de er i stykker og skal udskiftes. Dækslet kan åbnes på fronten til inspektion ved udskiftning af gaspatron.



Det er meget vigtigt at beskytterne sidder på ved anvendelse af stolen.

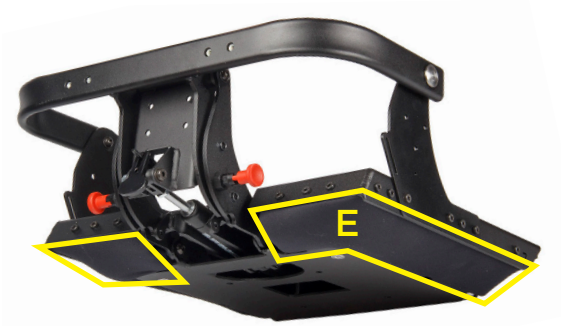




## Justering af ryghøjde

- Løsen de 4 skruer (A) på begge sider af rygprofilen (2 på hver side).
- Juster højden på ryggen.
- Spænd skruerne (A).



## Justering af rygvinkel

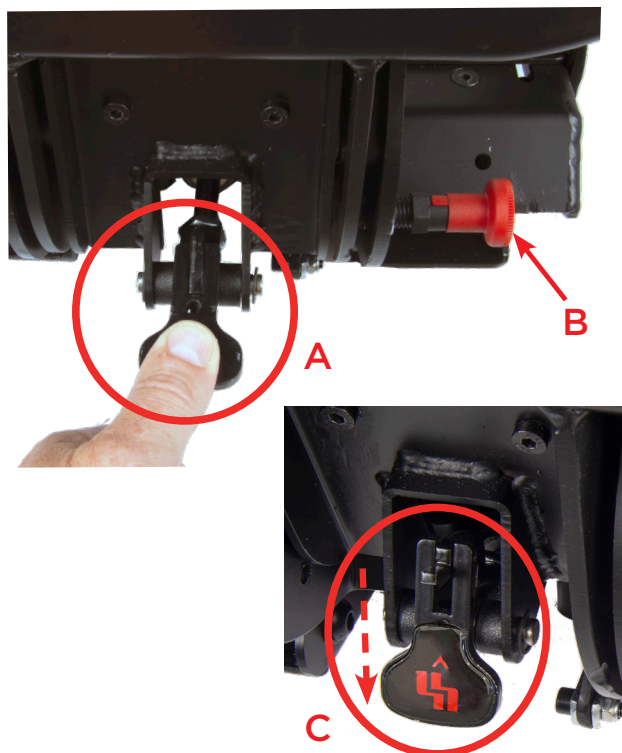

Sørg for at hurtiglåsen (B) til oprejsningsfunktionen er låst inden justering af rygvinklen.

Hvis beskyttelsen er monteret, er låsepalen skjult. Fjern beskyttelsen, eller træk låsepalen ud gennem indhakked på beskyttelsen.

Sæt låsepalen i aktiveringsposition ved at trække den lige ud og derefter opad.

Tryk palen (A) ned, så frigøres ryggen, så du kan indstille rygvinklen. Når du har nået den ønskede vinkel, slipper du palen og sætter den i dvale igen (C).


Monter beskyttelsen og dæk palen, så ingen ved et uheld kan få adgang til den.



Det er meget vigtigt at palen sættes i børnesikret leje, hvilende nedad (C), efter justering af rygvinklen.

## Dynamisk funktion - hurtiglås

For at låse den dynamiske funktion aktiveres de to røde hurtiglåse på bagsiden af sædet (en på hver side).

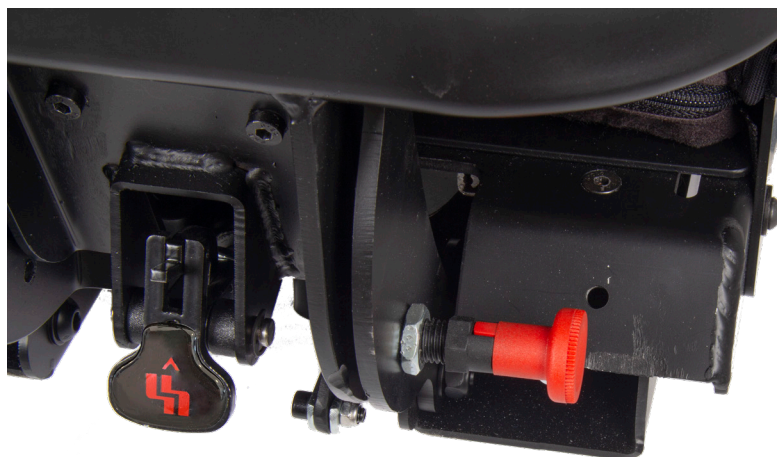

Bemærk at begge hurtiglåse skal være låste ved ind- og udstigning samt ved transport i køretøj.



Hurtiglås - Låst



Hurtiglås - Åbnet  
(træk og vrid 90° til den sidder i et lille spor som holder den i åben position.)


## Justerbar kropstøtte

### Justerbare kropstøtter

Løsen skruerne (A) for at justere grundhøjden på kropstøtten.

Løsen italienskrueene (B) (to på hver side). Juster efterfølgende kropstøttens bredde og højde.

Spænd skruerne (A) og italienskrueene (B) når du har nået den ønskede position.

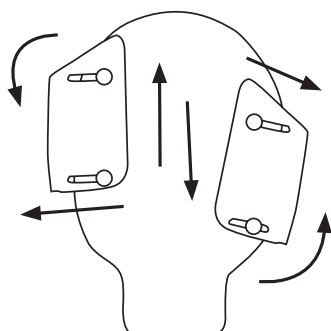


## Vipbar kropstøtte

### Alternativ kropstøtte

Som alternativ til de faste kropstøtter findes der også en forstærket fast kropstøtte og en vipbar kropstøtte.

### Åbning af vipbar kropstøtte

Åben kropstøtten ved at trykke på den røde knap (se billede).

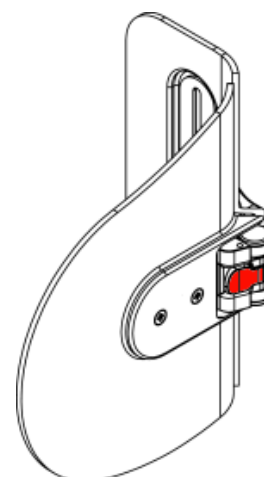



## Hovedstøtte

### A - Montering af hovedstøttefæste

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen.

Skub derefter hovedstøttebeslaget ned til den ønskede position i rillerne på rygprofilen.

Spænd skruerne!

### B - Monter herefter hovedstøtten i

hovedstøttebeslaget, juster til ønskede leje.

Spænd vingeskruen!

### C - Justering af hovedstøtten

Løsn justeringsskruerne C lige nok til at hovedstøtten kan justeres manuelt til den ønskede position, og spænd derefter skruerne C.

Hvis hovedstøtten skal være højere oppe, justeres dette ved at løsne vingeskruen B og derefter flytte hovedstøtten til den ønskede højde.

Derefter spændes vingeskruen B.



(A) Hovedstøttefæste, 4 skruer med profilskruer

(B) Højdejusteringsvingeskruen

## Sidejusterbart hovedstøttebeslag


### Montering af sidejusterbart hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen. Skub derefter det sidejusterbare hovedstøttebeslag ned til den ønskede position i rillerne på rygprofilen. Lås skruerne!

Monter derefter hovedstøtten i nakkestøttebeslaget, juster den til den ønskede position. Spænd vingeskruen!

### Justering af hovedstøtten

For at justere sidestøtten sidelæns, løsnes skruen A (2 stk.). Hvis der ønskes mere justering, løsnes skruerne B (4 stk.). Spænd skruerne!

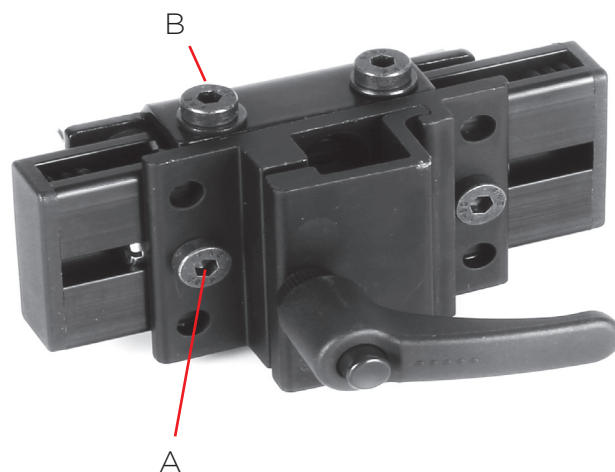

## Vipbart hovedstøttebeslag

### Montering af vipbar hovedstøttebeslag

Fjern først den integrerede værktøjsnøgle øverst på rygprofilen. Skub derefter det vipbare hovedstøttebeslag (A) ned til ønskede position i sporet på rygprofilen. Spænd skruerne!

**B - Monter efterfølgende hovedstøtten** i hovedstøttebeslaget, juster til ønskede højde. Spænd vingeskruen!

### C - Justering af hovedstøtten

Løsn stiften for at kunne vippe nakkestøtten væk. Ved låsning af det vipbare nakkestøttebeslag; sørg for, at stiften låses.



## Montering af kropsseler



### Montering af øvre monteringsbeslag til sele (A)

Først fjerner du den integrerede værktøjsnøgle, der er placeret øverst på rygprofilen og evt. nakkestøttebeslaget. Skub derefter de øvre monteringsbeslag ned til den ønskede position i rillerne på bagprofilen og spænd skruerne (B).

### Justering af øvre monteringsbeslag

Løsen skruerne (B) og juster til ønskede højde og vinkel. Juster højden på beslaget så trækretningen havner noget over axilpartiet. Lås skruerne.




### Montering af sele

Træk selens øvre stropper gennem rillen og ind i spændet på øvre monteringsbeslag (A). Træk selens nedre stropper gennem det nedre beslag (C) og anvend Triglide-metoden (E) og medfølgende spænder.

### Justering af trækretning og bredde

Løsen skruerne på det øvre monteringsbeslag og juster højden, spænd herefter den øverste skrue. Juster vinklen og spænd derefter også den nederste skrue.

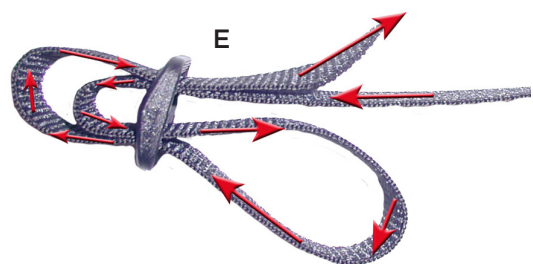

Sørg for, at der er plads nok til nakken. Kontroller også trykket på remmen, og at bæltepuderne er, hvor de skal være.

 = Justeringsnøgle 






## Hoftebælte

### Montering af hoftebælte

Hoftebælte 2-punkts, monteres gennem fæstepunkt (D) eller (F). Anvend Triglide-metoden (E) og medfølgende spænder.

Hoftebælte 4-punkts, monteres gennem fæstepunkt (F) + (G) på siden af sædet. Anvend Triglide-metoden (E) og medfølgende spænder.

Sporerne (D) og (F) klarer max 40mm bånd og sporet (G) max 25 mm bånd.  
Beslaget (F) kan skrues løs og vendes til en mere fremadflyttet position.  
Beslagene (F) + (G) kan også monteres i hullerne (H) på bagsiden af sædet.

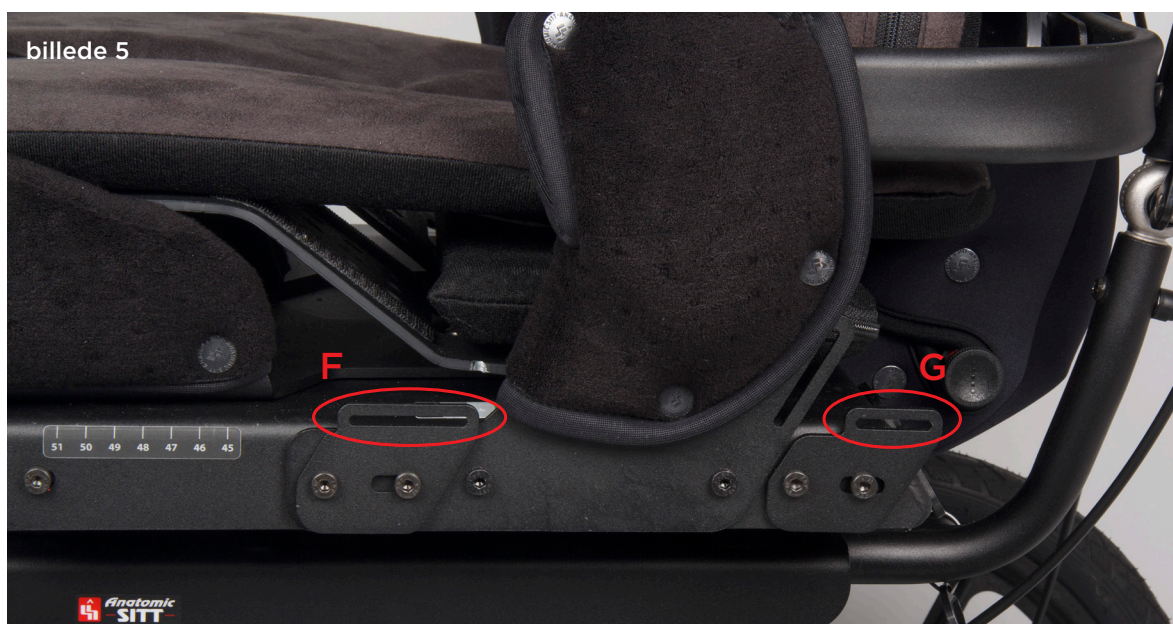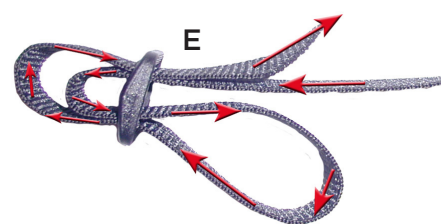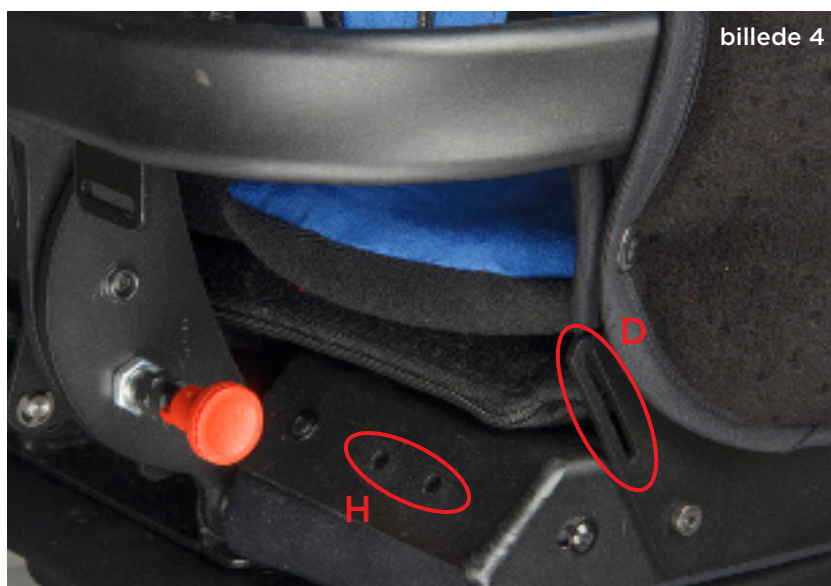



## Armlæn

**Dybdejustering:** Løsen skrue B og C helt og juster til ønskede position. Spænd skrueerne.

**Højdejustering af armlænsplade:** Løsen vingeskrue (D) og skub armlænet opad/nedad til ønskede position (billede 1). Spænd vingeskruen.

**Vinkling af armlænspladen i højden:** Løsen vingeskrue (E) og vinkel op/ned til ønskede position (billede 2). Spænd vingeskruen. For individuel fast montering af armlænvinklen, kan et hul bores og en skrue med møtrik monteres.

**Vinkeljustering i sideled:** Løsen skrue B og C og juster til ønskede position (billede 3). Spænd skrueerne.

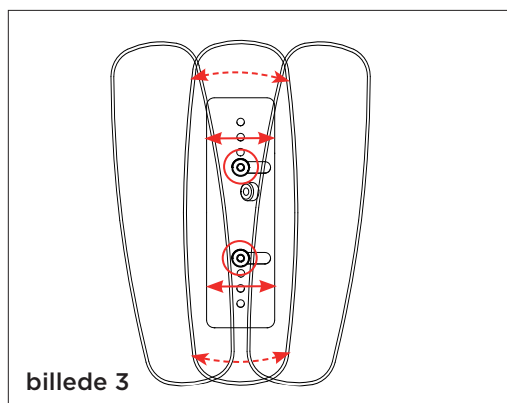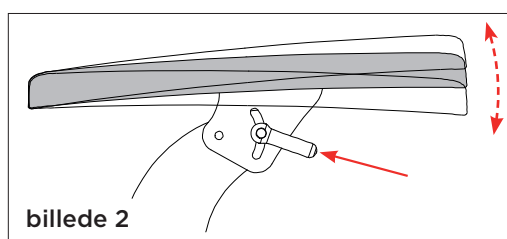

Efter justeringer skal du altid anbringe stofbeskytterne rundt om armlænsbeslaget for at undgå risiko for afklemning.



**Polstring:** Monter den nedre polstring først, se billede 4, og herefter den øvre, se billede 5. De blanke trykknapperne skal være synlige til siderne. .

## Albuestop

### Montering

Skru italienskruen (A) til kropsstøtten ud og placer pladen til albuestoppet (B) mellem beslaget og kropsstøtten. Skift til længere fastgjorte bolte til italienskruen. Træk polstringen på albuestoppet (B) og armlænspladen, før du spænder italienskruen.

### Højdejustering af albuestoppet

Begynd med at justere armlænspladens højde efter brugerens behov. Juster herefter albuestoppet i højden, så polstringen skaber en blød bøjning, se billede 2. Armen eller albuen må ikke kunne komme i klemme mellem armlænet og albuestoppet. Albuestoppet kan justeres i højden uafhængig af kropsstøtten. Spænd italienskruen (A).





## Hoftestøtte

### Montering med armlæn

Tag nedre polstring under armlænet af. Skru italienskrue og spændeskiver ud. Monter hoftestøtten med beslaget på ydersiden af sidepladen, se billede, med to skruer (C) i de ledige huller. Genmonter italienskruen, men fjern den blanke låseskive og behold den sorte italienskrue. Genmonter polstringen, men på anden sides armlæn. Dette er for at få den tyndeste polstring indad, hvilket giver bedre plads til hoftestøttepulstringen.

### Justering

Det er ikke muligt at foretage justeringer.



## Justering af knævinkel

### Låsning i knæleddet af den dynamiske funktion

Italienserskruen (C) bruges til at låse/åbne knæleddet til flexion/extension.



### Fleksionsområde i knæleddet

Flyt skrue (D) til ønskede hul.  
Flexionens startposition er stilbar i 5 stk. 5 graders trin.



### Ekstensjonsområde i knæleddet

Flyt skrue (E) til ønskede hul.  
Extensionens maxposition er stilbar i 5 st 5 graders trin.



### Modstand ved ekstension

Der er to tykkelser af elastikbånd, der udskiftes eller kombineres for forskellige modstande. Det elastiske bånd spændes rundt om skrue (F) til dæmpningsstemplet.



#### For mindst mulig modstand:

- Brug tynde elastikbånd

#### For yderligere modstand:

- Brug tykke elastikbånd

#### For højeste modstand:

- Anvend begge elastikbånd



## Bord Motion

### Montering af bordet

Skub bordrøret (A) ind i beslaget (B) under armlænspladerne.

Lås med knappen (C) (under armlænspladerne), når bordet er i den ønskede position.

### Justering af bordets dybde


Bordet kan justeres i dybden ved at vingeskruen (C) løsnes og bordet justeres. Lås vingeskruen igen.

### Justering af bordets vinkel

Bordet kan justeres i vinklen ved at vingeskruen (D) løsnes og bordet (sammen med armlænspladerne) vinkles. OBS! Låseskruerne på siden af knappen skal fjernes. Lås vingeskruen igen.

### Justering af bordets højde

Bordet kan justeres i højden ved at låseskruen (E) løsnes og bordet (med armlænet) justeres. Lås vingeskruen igen.

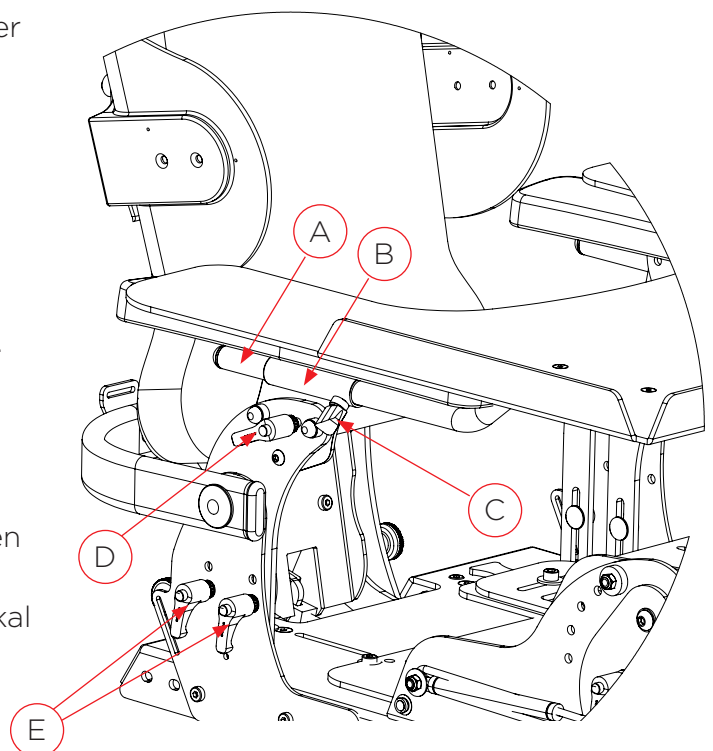



## Fodstøtte

### Delt fodstøtte

#### Justering af vinkel

Løsn skruerne (A) i det takkede led og juster derefter til den ønskede vinkel. Lås det takkede led og sørg for, at takkerne går ordentligt ind i hinanden. Spænd skruen hårdt!

#### Justering af højden

Løsen italienserskruen (B) og juster herefter til ønskede højde.

Spænd italienserskruen, når ønskede højde er opnået.

#### Justering af vinkel ved fodled

Løsen skrue (C) i det takkede led og juster herefter til ønskede vinkel.

Lås det takkede led og sørg for, at takkerne går ordentligt ind i hinanden. Spænd skruen hårdt!




## Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding. Montering af ankelbespænding på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.



Kontroller at polstringen ikke er snoet på ankelbespændingen.

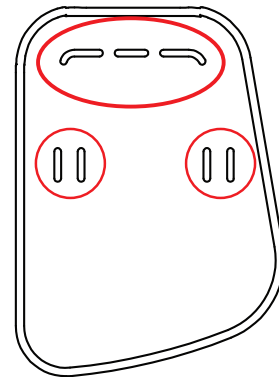


Til montering af ankelbespænding anvend de tilsigtede spor i fodpladen.

## Fodstrop

Montering af fodstopperne på vores fodplader sker ved at trække remmen ned og op gennem to af de tilsigtede huller i fodpladen. Fodremmen kan monteres i de forreste (A) eller bagerste (B) hulsæt. Tiltænkte riller til montering af fodstropper skal i første omgang altid anvendes. Hvis der mangler forberedte riller, skal du muligvis bore huller for at fastgøre stropperne. For at opnå den korrekte trækretning skal stropperne monteres så tæt på foden som muligt.

### Justering af fodstrop

Spænd fodremmen godt fast. Fodstropperne er korrekt strammet, når du kan få en eller to fingre ind mellem remmen og foden. Pas altid på brugerens behov for at opnå sikkerhed, støtte og bekvemmelighed.

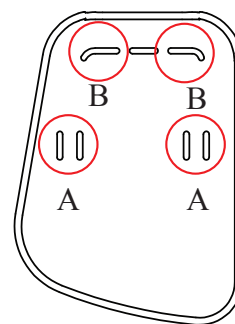

## Lægstøtte

Løsen skruerne (A) og flyt dem i højdeleddet til ønskede position på profils-lidsen. Indjuster dybden på lægpladen før du spænder skruerne (A).  
Løsn skruerne (B) for at justere bredden af lægstøttepladerne. Spænd skruerne, når den ønskede indstilling er opnået.



## Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

## Transport i køretøj

Ved transport i bil, hvor Motion sædet er monteret på kørestolsstellet skal anvisninger fra producenten af kørestolsstellet følges.

### Sikkerhedsbånd

En rem leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra sædets rygprofil og omkring kørestolsstellets kørebøjle. Sørg for, at denne rem er stabil og stram, inden kørsel.



### Crashtestet og godkendt

Motion sædet er crashtestet og godkendt efter ISO 16840-4. Denne standard gør det muligt at montere siddesystemet på alle kørestolsstel, der er godkendt i henhold til ISO 7176-19, samtidig med at godkendelsen for kombinationen bevares.



Crashtestet og godkendt til brugervægt op til 75 kg.



Vigtigt at begge hurtiglåse er låste under transport i køretøj!



# Vedligeholdelses- og vaskeanvisninger

## Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt knapper.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller produktets bevægelige dele, eksempelvis rygvinkling med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontroller bæltet og seler i forhold til slitage, funktion samt fastgørelse.

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

## Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Betræk og bæltet / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For yderligere information, se aktuelle brugermanualer for hvert enkelt positioneringshjælpemiddel.

## Service og vedligeholdelse

For at fungere trygt og sikkert skal der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af dele skal originaldele fra Anatomic Sitt A/S altid bruges.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift. For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og reovering.

### Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller sikkerhedsbåndet på ryggen, at det er ubeskadiget og låser korrekt.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling. Både i forhold til justeringsmuligheder, mobilitet og låsning.
- Kontroller, at gaspatronen låses i den valgte position.
- Kontroller om nødvendigt slid på alle dele. Sørg for, at de låses/spændes ordentligt.
- Kontroller bæltet og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

### Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

## Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges.

For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

## Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp / klud og antibakteriel, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bælder / seler. Polstring er en forbrugsartikel og bør udskiftes ved slid. Betræk og bælder / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For mere information, se aktuelle brugermanualer for hvert positioneringshjælpemiddel.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklave ved 60 ° C i maksimalt 10 minutter.

Fjern betræk og bælder / seler ved rengøring af sædesystemet i håndvasken.

## Tørring

Siddesystemet kan tørres i kabinet i max 70°C i op til 10 minutter.

### **Kontroller ved reovering**

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE -mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

### **Etiketter/mærkater**

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se [www.anatomicsitt.dk](http://www.anatomicsitt.dk), hvor brugervejledninger også kan findes.

## Kontrolpunkter

Samlet set:

- Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- Kontroller alle produktfunktioner. Eller slidte dele, der skal udskiftes.

Sæde/rygdæl:

- Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- Kontroller, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- Kontroller at rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronen låser i enhver placering.
- Kontroller polstring og udskift efter behov.

Fodstøtte:

- Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Hovedstøtte

- Kontroller betrækket og udskift efter behov.
- Kontroller at hovedstøtteledene låser.
- Kontroller fæstet på hovedstøtten, at det fungerer.

Armlæn:

- Kontroller armlænets justeringer. At det kan justeres i højde, dybde og bredde.
- Kontroller armlænsbeslagene, at de låser, som de skal.

Fæstesystem:

- Kontroller låsefunktionen.

Sikkerhedsrem:

- Kontroller sikkerhedsremmen på ryggen, at det ikke har skader og at det låser.

Øvrigt evt. tilbehør:

- Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

## Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

# Affaldssortering

## Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Gaspatroner sorteres som farligt affald.

# Garanti og retur

## Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

## Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

# Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændringer foretaget.

## **Tekniske data**

Størrelse 0 er tilføjet og bord Motion mm s. 11

## **Monterings- og justeringsanvisninger**

Bord Motion erstatter støttebord s.31

## **Revisionsfortegnelse**

ver. 2.1 - 2022-03-10

ver. 2.2 - 2022-04-25

ver. 2.3 - 2023-03-15

**SE**

**Anatomic Sitt AB (producent)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

**Besöksadress**

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

[www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

**DK**

**Anatomic Sitt A/S (forhandler)**

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail [a-sitt@anatomic-sitt.dk](mailto:a-sitt@anatomic-sitt.dk)

[www.anatomicsitt.dk](http://www.anatomicsitt.dk)

[www.facebook.com/AnatomicSITT.dk](https://www.facebook.com/AnatomicSITT.dk)

[www.instagram.com/anatomicsitt](https://www.instagram.com/anatomicsitt)

[www.linkedin.com/company/anatomic-sitt-as](https://www.linkedin.com/company/anatomic-sitt-as)

