



Zitzi
Seabass G2

Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsanvisning,
service og vedligeholdelse samt genbrug



Denne brugervejledning omhandler kørestolsstellet Seabass G2 med tilbehør. For komplet oversigt over tilbehør se produktets bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent og forhandler.....	3	Bremse	22
Specialtilpasning.....	3	Parkeringsbremse	26
Introduktion	4	E-drive	28
Indledning	4	Sædetilt.....	29
Korrespondance - mærkning	4	Fodstøtte G2	30
CE-mærkning - klassificering	4	Fodstøttebeslag.....	31
Overensstemmelseserklæring.....	4	Fodkasse	33
Tilsigtede formål.....	4	Lægstøtte	34
Symbolfortegnelse	5	Kørebøjle vinkelindstillelig G2	35
Produktmærkning.....	6	Kørebøjle foldbar.....	35
Sikkerhedsforeskrifter	7	Armlæn vipbar fra ryg.....	37
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Anti-tipstøtte.....	38
Advarsler og forholdsregler.....	7	Tippepedal.....	40
Kontrol før brug	9	Stænkskærm	41
Begrænsninger.....	10	Transportbeslag	42
Afklemnings risiko.....	11	Sædedel.....	43
Godkendte kombinationer.....	11	Resumé og opfølgning	44
Afvielser/tilbud	11	Transport i køretøj	45
Tekniske data/ydeevne.....	12	Køreteknik	47
Dæktryk	13	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner ...	49
Tilpasning og specialtilpasning.....	13	Kontrol før brug	49
Monterings- og justeringsanvisninger	14	Service og afhjælpende vedligeholdelse...	50
Svinghjul	15	Rekonditionering	51
Retningsholder	17	Affaldshåndtering	54
Breddeudvidelsessæt til svinghjul	18	Garanti og retur.....	54
Drivhjul	19	Revision.....	55
Drivhjulsplacering	20		

Producent og forhandler

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:


Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Risskov, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 75

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning

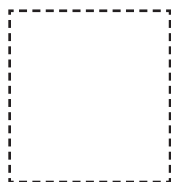

Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke



Introduktion

Indledning

Tillykke med valget af hjælpemidler, vi håber du vil få meget ud af vores produkt. For at du kan bruge den fuldt ud på en sikker måde, er det vigtigt, at du læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder for alle personer, der opholder sig i brugerens nærhed.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.com. Revision findes på forreste side sammen med datoen.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne. Du finder serienummeret på undersiden af siddepladen.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU-overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/dokument

Tilsligtede formål

Zitzi Seabass G2 er et hjælpermanøvreret kørestolsstel til udendørs brug. Produktet er beregnet til brug i forbindelse med modulære siddesystemer eller individuelt støbte sæder. Zitzi Seabass G2 er et genanvendeligt produkt.

Symbolfortegnelse

 	Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.	 Angiver fremstilling afsatsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
 	Dette symbol angiver mulig risiko for at få noget i klemme.	 Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.	 Angiver producentens reference-nummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 www.anatomicsitt.com	Angiver, at brugsanvisningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.	 Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses for vigtige sikkerhedsoplysninger, såsom advarsler, der ikke findes på det medicinske produkts etiket.	 Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i (EU) MDR 2017/745. Kan også bruges med fremstillingsdato.	 Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.	 Angiver, hvor transportsikringen skal fastgøres til produktet ved transport i et køretøj.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses, før produktet tages i brug. Symbolet findes på produktet.	 Angiver, at produktet er crashtestet og godkendt i henhold til ISO 7176-19 til fremadvendt installation i køretøjets kørselsretning.

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt

MD	Zitzi Seabass G2 stl. 2	→	Produktnavn
	<i>Seabass G2 size 2</i>		
REF	386092		2023-11-15
		SN	52924
			→ Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)
		Maxlast	135Kg → Max belastningsvægt
	Anatomic Sitt i Norrköping AB		
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping		→ UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	www.anatomicsitt.com		
UDI	(UDI=GTIN+(21)SN)	(01)7322473860923(21)52924	→ UDI= GS1-128

Etiket på tilbehør

MD	Stänkskärm 16" - Seabass G2	→	Produktnavn
	<i>Mudguard 16" - Seabass G2</i>		
REF	386350		2023-09-14
		LOT	M79041
			→ Stregkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
	Anatomic Sitt i Norrköping AB		
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping		→ UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	www.anatomicsitt.com		
UDI	(UDI=GTIN+(10)LOT)	(01)7322473863504(10)M79041	→ UDI= GS1-128

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om tilpasning/specialtilpasning altid skal udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet bør altid være til stede for at teste produktet og skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Den, der ordinerer hjælpemidlet, eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren, bør afbalancere det valgte sæde for at sikre, at enhver risiko for tipning er udelukket.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Efter alt monterings-, justerings- eller servicearbejde skal alle fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.



Kontroller at siddesystemet sidder ordentligt fast i kørestolsstellet inden brug..



Bremserne skal altid være låste ved ind- og udstigning.



Driftsbremsen, der virker på tromlebremsen på drivhjulene, er beregnet til at fungere som bremse under kørsel og parkering. Parkeringsbremsen, der virker på dækket, bør kun bruges som låsebremse.



I nogle tilfælde kan hjulene støde på fodpladen. Hjulenes styreevne kan blive påvirket, og fodpladens indstillinger skal muligvis ændres.



Brug aldrig fodpladen ved ind- og udstigning fra hjælpemidlet.



Vær forsigtig og vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte ved brug af chassiset på skrå overflader. Chassiset må kun parkeres på vandrette og jævne overflader.



Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.



Udfør aldrig service mens produktet anvendes.



Bemærk, at hvis brugeren griber fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå tyngdepunktsforskydning, hvilket kan medføre øget risiko for at vælte.



Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning".



Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Kontroller især skruer og møtrikker.
- Kontroller at sædet er sat ordentligt fast på kørestolsstellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip støtter.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Tjek hjulenes tilstand og at de sidder fast.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. vedrørende mobilitet og låsning.
- Kontroller justeringen af kabler for tilt, så den fungerer korrekt.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxlast

Den højeste belastningsvægt er: 135 kg. Med belastningsvægt menes den maximale vægt som kørestolsstellet må udsættes for f.eks. bruger og siddesystem.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktionerne i denne manual følges. Den faktiske livslængde kan dog variere afhængig af hvor ofte og intensivt produktet bruges, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde deres funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst én gang hver 6. måned.

Derudover skal de opbevares på en sådan måde, at stempelstangen er rettet nedad ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og dermed holde op med at virke.

Afklemningsrisiko

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er indstillet korrekt, så brugeren ikke får gener eller skader under brug. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages justeringer eller passende tilbehør monteres.

Godkendte kombinationer

At kombinere medicinsktekniske produkter eller tilbehør medfører at du som kunde skal sikre, at dette kan lade sig gøre.

For at produktet skal bevare sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun forsynes med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsoplysninger for anbefalede siddesystemer og muligt tilbehør, samt en splittegning af reservedele.

Produktet kan beholde sin CE-mærkning, selv med sæder og siddesystemer fra andre leverandører, hvis følgende punkter er opfyldt:

- Tredjepartsdokumentation skal vise, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartsproduktet er beregnet til brug på manuelle kørestole, og at tredjeparten godkender brugen af sine siddesystemer på andre leverandørers kørestolsstel).
- Kørestolsstellets originale fastgørelsespunkter og de tilsigtede fastgørelses-systemer fra Anatomic Sitt AB skal anvendes. Fastgørelsespunkterne/ fastgørelsessystemerne skal være kompatible med det pågældende tredjepartsprodukt. Der må ikke foretages skader/ændringer på nogen af produkterne for at muliggøre kombinationen.
- Monteringsvejledningen for det relevante tredjepartsprodukt og fra Anatomic Sitt AB skal følges.

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, når produkter fra forskellige leverandører kombineres. Vurderingen skal arkiveres. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden.

Afviigelser/tilbud


I tilfælde af funktionsfejl skal du kontakte centeret for hjælpemidler eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en hændelse, der kunne have ført til alvorlig personskade, skal dette rapporteres til Anatomic Sitt og den kompetente myndighed i landet. Produktet skal også sendes til Anatomic Sitt i sin nuværende tilstand til nærmere undersøgelse.

Tekniska data / Prestanda

Seabass G2

Produktdata	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Max belastningsvægt (bruger+sæde)	135 kg	135 kg	135 kg
Sædehøjde (lav/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Længde (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredde (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Indvendig rammebredde (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Indvendig bredde drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Udvendig hjulbredde m. E-drive 16"	64.5 cm	69.5 cm	74.5 cm
Indvendig bredde svinghjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sædeplade (E/F) (bredde/dybde)	30/36 cm	30/36 cm	35/36 cm
Vægt	19 kg	20 kg	20 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°

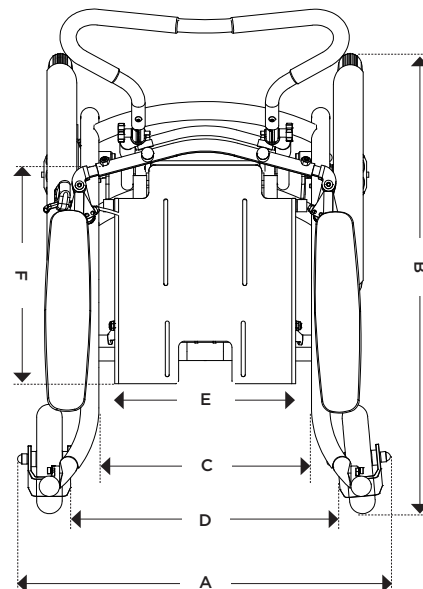


* Længden ændres alt efter valg af drivhjul og drivhjulsposition. 12" er kortest og 24" er længst.

** Bredden som er angivet viser det bredeste mål på kørestolsstellet og er beroende på valg af drivhjul, stænkskærm og drivringe. Med 16" drivhjul er stolen bredest ved svinghjulene. Med 16" E-drive bredest ved drivhjulene.


Samtlige mål er taget med respektive størrelser i standardformat. Standardramme og 16" hjul.

ARMLÆN


Mål armlæn fra ryg	Størrelse 1	Størrelse 2
Mål armlænsplader (AxB)	33,0 x 7,5 cm	33,0 x 7,5 cm
Bredde mellem armlæn (C)	21,5-31,5 cm	30-53 cm
Højde fra sædeplade (D)	19-30 cm	24-35 cm
Afstand fra rygrør til plade (E)	5-13 cm	7-15 cm

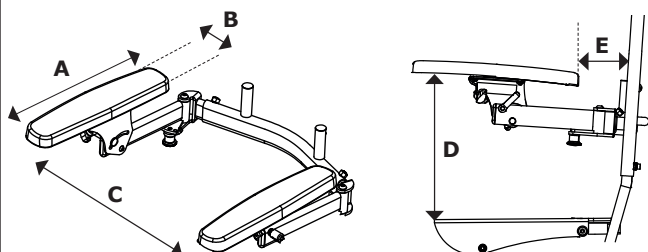

FODSTØTTE

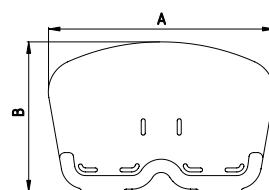

	A x B
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm

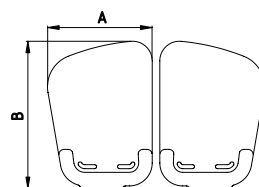

	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm

Fodstøttestang profil længde (mm)			
Størrelse:	2	3	4/5
	200	250	300

Anbefalet dæktryk

Størrelse	Dæktryk	Tryk (max)
7"	D180/45-S-SO	2.5 bar
16"	R400/45-1-LSSBLQ85S-NM	2.8 bar
20"	R510/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*
22"	R570/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*
24"	R620/25-LASGFK-B-01	6-7.5 bar*

* Højtryksdæk

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning

Fodstøttesprofilens længde kan afkortes for at den passer bedre til brugeren.

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på Hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

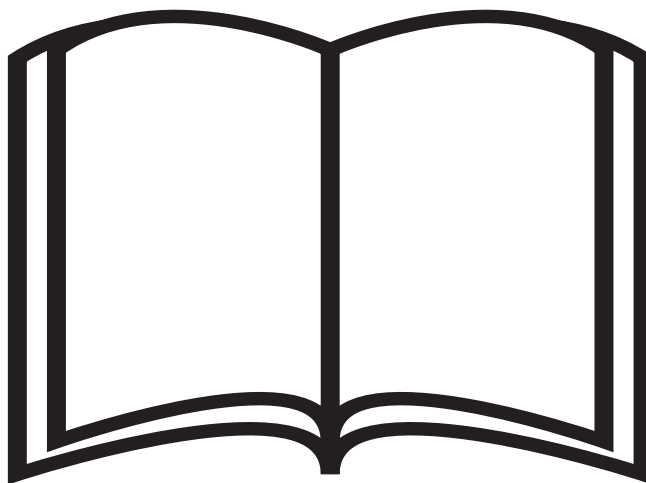

Svinghjul

Montering af hjulhuset på kørestolsrammen

Indsæt profilbolten (A) i det dertil indrettede hul på undersiden af kørestolsrammen i hjulhuset som vist på billedet. Monter derefter hjulet ved hjælp af skruen (B), skiven (C) og den excentriske møtrik (D), og stram til.

Montering af svinghjul på svinghjulsgaffel

Vælg mellem fire (4) forskellige drejhjulspositioner, og monter derefter drejhjulet (F) ved hjælp af den medfølgende hjulaksel (G), skive (H) og låsemøtrik (I) i det ønskede monteringshul på drejhjulsgafflen (K).

Indsæt hjulet (F) i hjulgaflen (K) som vist på illustrationen. Placer en skive på hjulakslen (G) og indsæt den derefter i det ønskede hul på hjulgaflen.

Fastgør derefter skiven (H) og kontramøtrikken (I) på den modsatte side. Spænd møtrikken. Til sidst placeres møtrikdækslerne (J) over låsemøtrikken.


Svinghjulsplaceringer

Svinghjulet kan placeres i fire (4) forskellige højdepositioner.

Dette giver dig mulighed for at justere hjulets højde i henhold til størrelsen på det drivhjul, du vælger.



Sørg for at spænde skruerne ordentligt efter justering af svinghjulsplacering.

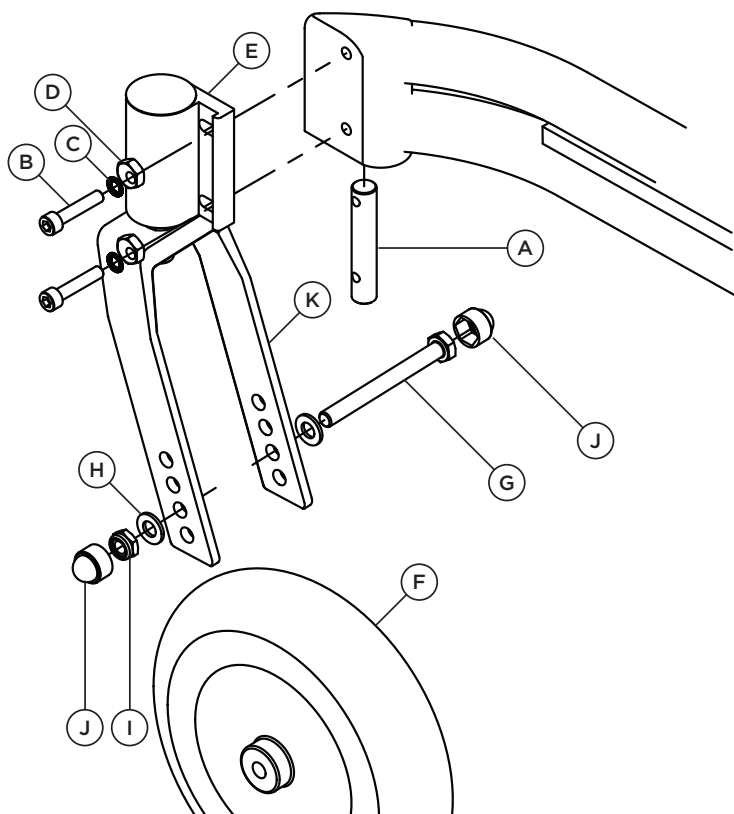

Justering af hjulgaffelen

Hvis kørestolen ikke ruller korrekt, kan det være nødvendigt at justere hjulgaffelen (A). Dette kan forekomme, hvis hjulets position er blevet justeret uden at justere hjulgaffelen (A).

Det stiplede område på billedet viser, at hjulbeslagets position (B) skal være 90° i forhold til underlaget.


Vinkeljustering af svinghjulgaffelen

For at justere hjulgaffelens vinkel skal du løsne og dreje de excentriske møtrikker (C) på hjulbeslaget (B), indtil den korrekte vinkel er opnået.

Sørg for at stramme møtrikkerne, når hjulgaffelen er blevet justeret.



Husk at stramme møtrikkerne godt efter justering af svinghjulsgafflen.

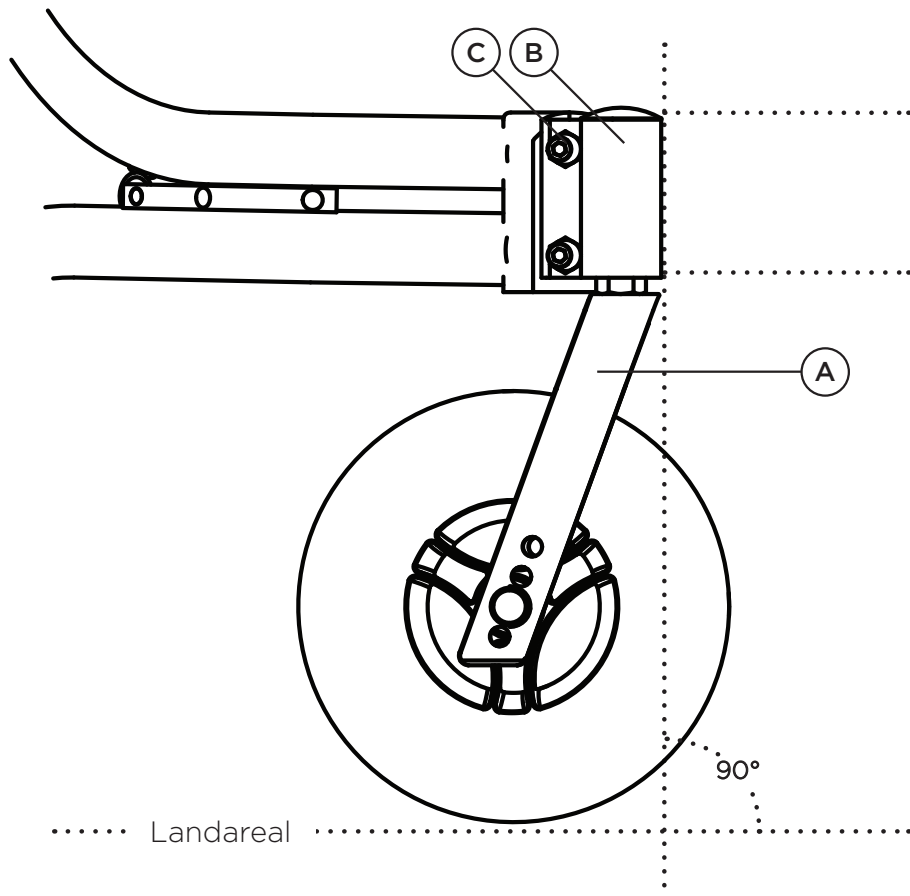

Retningsholder

Montering af retningsholder

Monter retningsholderen på svinghjulbeslaget ved hjælp af de medfølgende monteringsdele.

Start med at fjerne lejehuset (A) fra kørestolsrammens svinghjulbeslag (B) ved at skrue skrue (C) ud. Løft derefter endehætten (D) af toppen af lejehuset (A) og skru den midterste bolt (E) ud.

Monter derefter retningsholderbeslagene (F) mellem lejehuset (A) og svinghjulbeslaget (B) på kørestolsrammen og mellem lejehuset (A) og hjulgaflen (G) ved hjælp af monteringsdelene som vist på illustrationen.

Når retningslåsen er monteret, skal du montere hjulet igen på kørestolsrammen. Finjuster derefter hjulenes retning ved at justere skruen (J) let.


Aktivering af retningslås

For at aktivere retningslåsen skal du trække quick-releasen (H) lige op, dreje den 90° og slippe spidsen ned i hullet på den bevægelige del.

Sørg for, at kørselsretningen er låst.

Frigørelse af retningslåsen

For at frigøre retningslåsen skal du trække quick-releasen (H) lige ud, så spidsen trækkes ud af hullet på den bevægelige del. Drej derefter låsen 90° og frigør den forsigtigt.

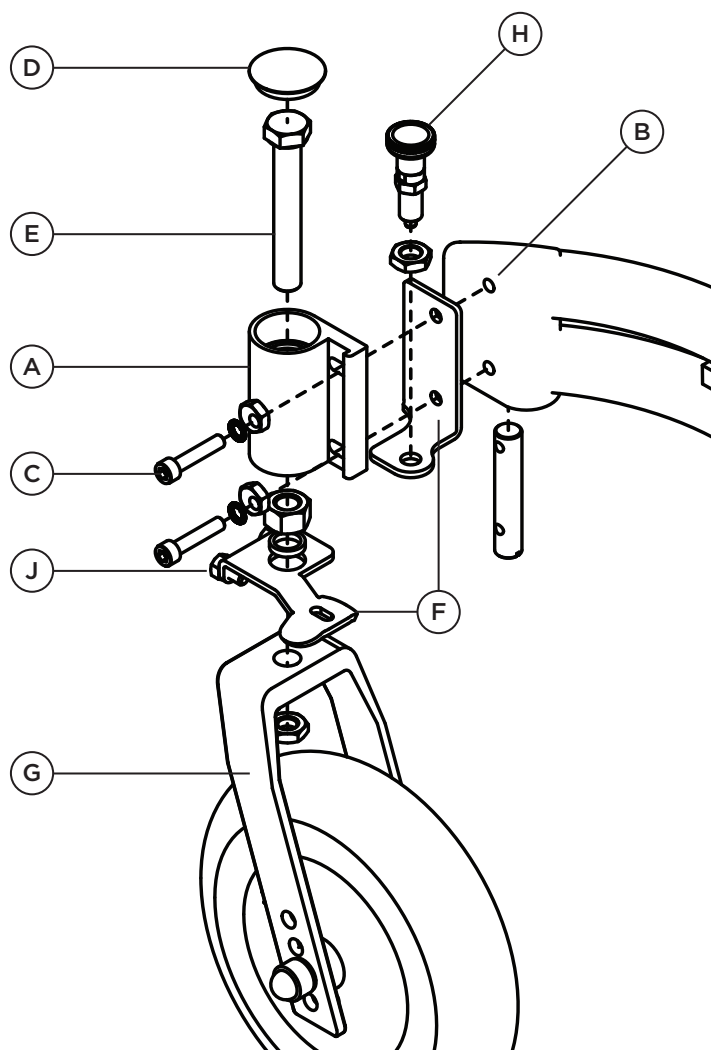

Udvidelsessæt til svinghjul


Formålet med udvidelsessættet er at udvide afstanden mellem svinghjulene, så der bliver mere plads til fodstøtterne, hvilket mindsker risikoen for, at de rammer svinghjulene.

Montering af breddeudvidelsessæt

Monter breddeudvidelsesaftandsstykkerne (1) mellem svinghjulbeslaget og rammen. Den smalle fals skal vende fremad mod rammen for at fastgøre afstandsstykket korrekt.

Start med at fjerne de skruer, der holder svinghjulbeslaget på plads. Placer afstandsstykket (1) som vist på figuren nedenfor. Brug de længere skruer (2), der følger med udvidelsessættet, samt skiven (3), den excentriske møtrik (4) og fælgstiften (5). Spænd skruerne.

Hvis hjulene ikke er lige eller presses ujævnt mod gulvet, skal du følge instruktionerne **Indjustering af svinghjulsgaffel** på side 16.

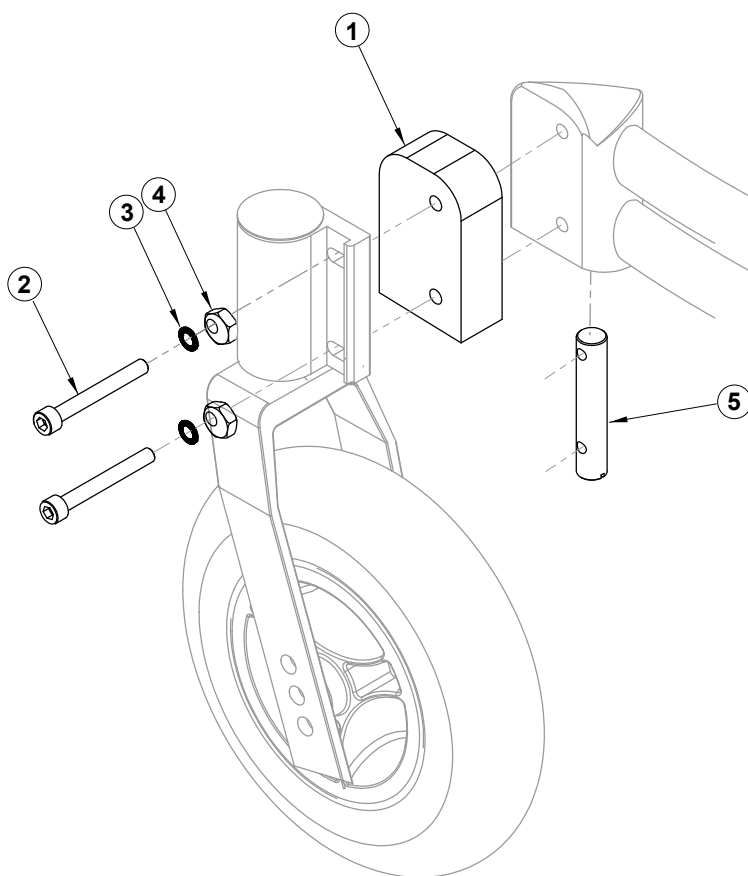

Drivhjul

Montering af drivhjul med quick-release

Drivhjulene kan enkelt på- og afmonteres på og ved hjælp af quick-releasefunktionen. Dette kan være anvendeligt eksempelvis ved transportering af kørestolsstellet.

For at montere drivhjulene (A) skal du holde trykknappen (B) nede midt i navet på quick-releaseakslen og skubbe drivhjulet (A) ind, indtil det stopper. Du kan nu slippe trykknappen (B). Sørg for, at drivhjulet er låst fast ved forsigtigt at trække i drivhjulet uden at holde trykknappen (B) nede.




Sørg for at hjulet sidder ordentligt fast efter brug af quick-release funktionen.

Afmontering af drivhjul med quick-release

For at afmontere drivhjulet fra kørestolsstellet, holder du trykknappen (B) inde, som er centreret i navet og træk herefter ud i hjulet.

Når du udskifter tromlebremser eller quick-releaseakslen, kan det være nødvendigt at justere akslen, så den låser korrekt.

For at justere akslen skal du justere møtrikken (C) ind eller ud på akslen. Den skal justeres, så de 2 låsekugler (D) er lige uden for muffen. Sørg for, at den er låst ved at kontrollere, at låsestiften (E) er forsænket.

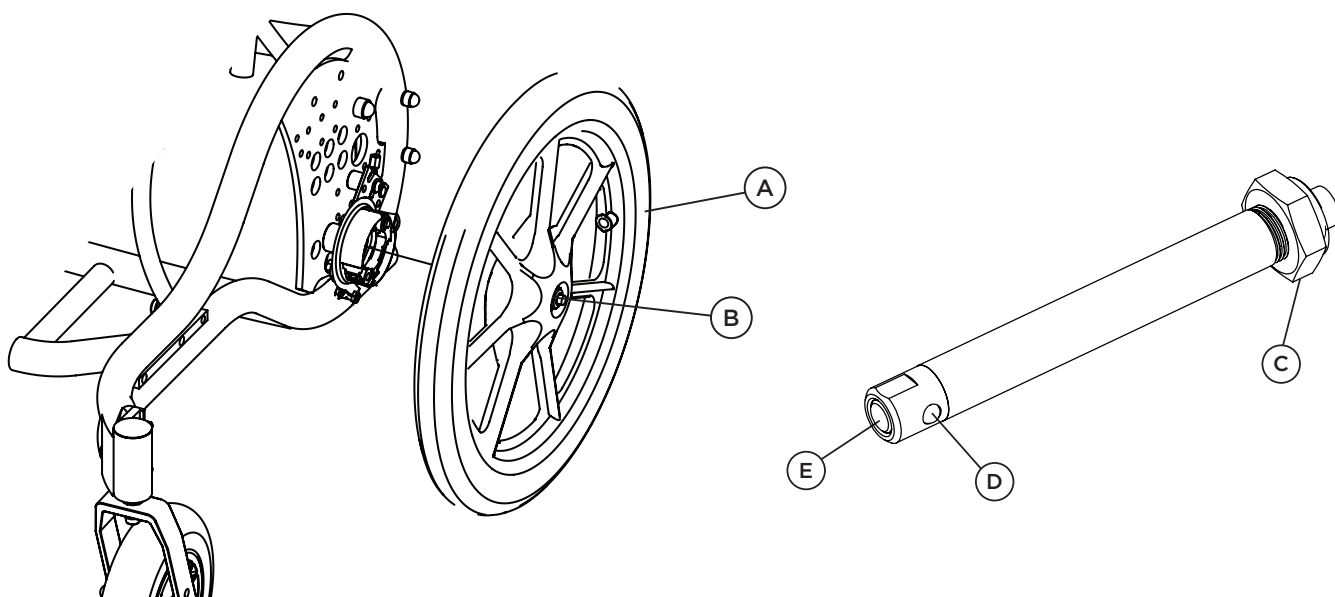

Drivhjulsplacering

Drivhjulsplaceringer

For at opnå det korrekte tyngdepunkt kan drivhjulet placeres i forskellige positioner afhængigt af siddesystemets placering på kørestolsstellets sædeplade. Der er forskellige antal positioner at vælge imellem, afhængigt af den valgte hjulstørrelse.

Der er også flere forskellige positioner at vælge imellem for den samme hjulstørrelse. Kontakt os venligst for råd og tips om placering af drivhjul, hvis du er usikker.

Eksempel ved Seabass med 24" drivhjul


Du har tre (3) forskellige drivhjulspositioner at vælge imellem. Vælg den position, der er mest passende i betragtning af siddesystemets placering på kørestolsstellet.




Bemærk venligst, at ændring af drivhjulets position kan øge risikoen for at vælte. Det kan også være nødvendigt at justere svinghjulets position, når drivhjulets position justeres.




Når du ændrer drivhjulenes placering, kan det også være nødvendigt at justere parkeringsbremsen en smule. Se afsnittet Parkeringsbremse for yderligere information.

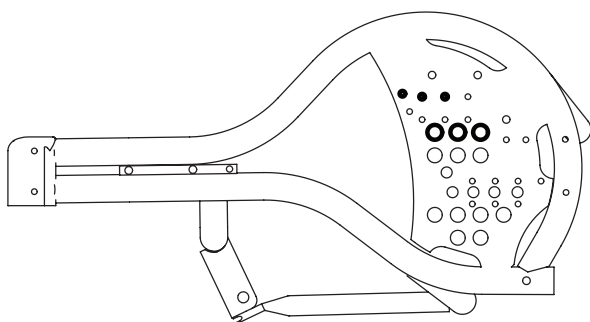


Drivhjulsplacering 24"

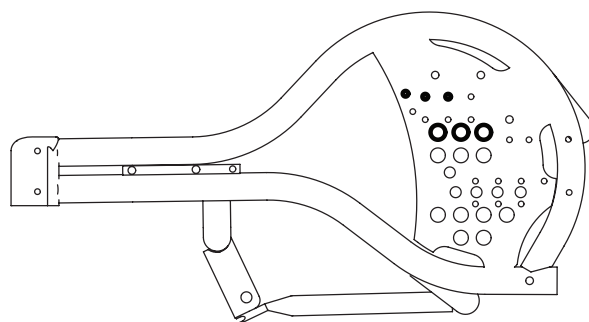


Drivhjulsplacering 22"

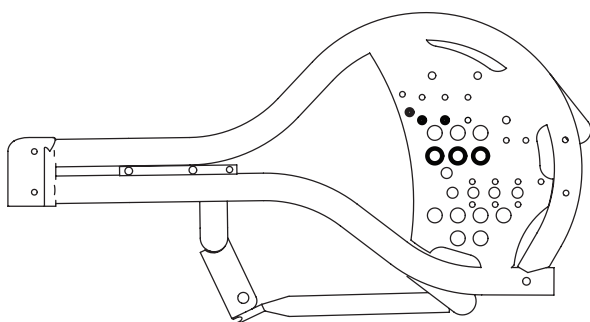


Drivhjulsplacering 20"

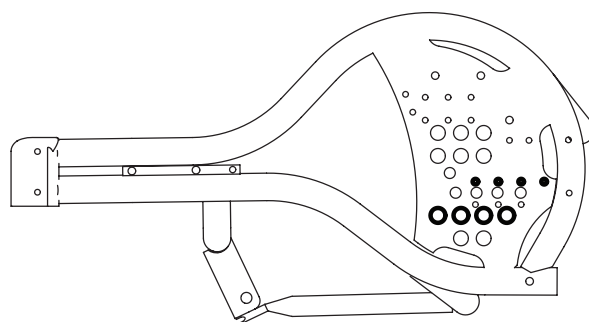


Drivhjulsplacering 16"

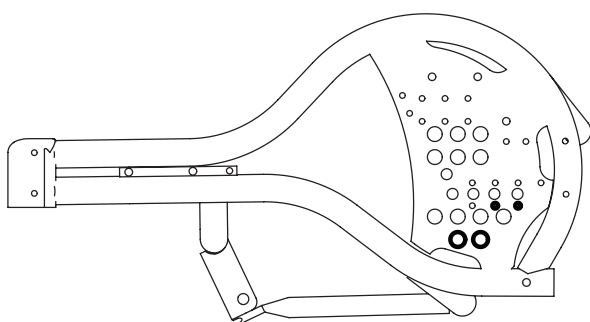

Drivhjulsplacering 12"

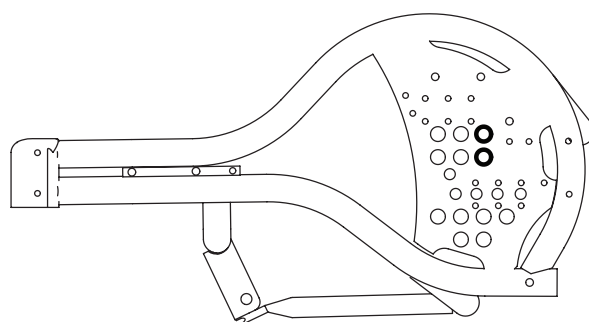

E-drive 20"

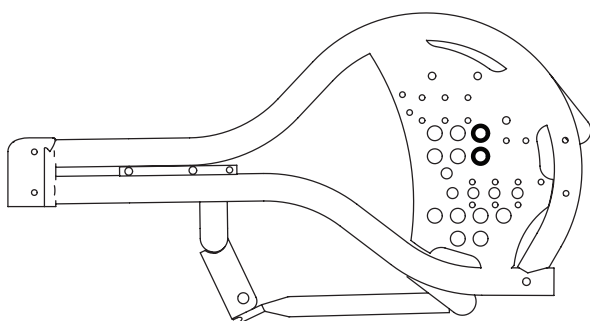

E-drive 16"

Bremse

Brug af tromlebremse

Kørestolsstellet er udstyret med tromlebremser, som manøvreres af hjælperen. Kontroller altid at bremserne fungerer inden brug.

Tryk højre bremsehåndtag ind (A) samtidigt med at du fører kørestolsstellet fremad. Baghjulet skal da bremse og ikke rulle. Bremsehåndtaget (A) skal ikke kunne skubbes helt ind mod kørehåndtaget, men der skal være et mellemrum på 5-10 mm.

Gentag derefter ovenstående procedure med det venstre bremsehåndtag.

Låsning af hjul

For at aktivere hjullåsning skal du trykke på bremsehåndtaget (A) og skubbe det røde låsehåndtag (B) frem til den ønskede position.



Frigøring af hjul

For at udløse hjullåsen skal du trykke på bremsegrebet (A) og det røde låsegreb (B) udløses automatisk. Slip derefter bremsegrebet (A).

Fejlsøgning af tromlebremse

Hvis bremserne ikke virker, skal du først kontrollere, at bremsekablet har korrekt spænding. Hvis wiren har af spænding, kan det være nok at spænde den igen ved at skrue skruen (C) af. Hvis justeringsskruen (C) ikke er nok, kan du prøve nedenstående hurtigguide til efterspænding af bremsekablet.

1. Spænd skruen (C) i nederste position
2. Løsn møtrik (D)
3. Komprimer bremsen ved at løfte tromlebremsearmen (E) og flytte møtrikken (D) lidt længere op ad kablet
4. Lås møtrik (D) og finjuster herefter med skruen (C)

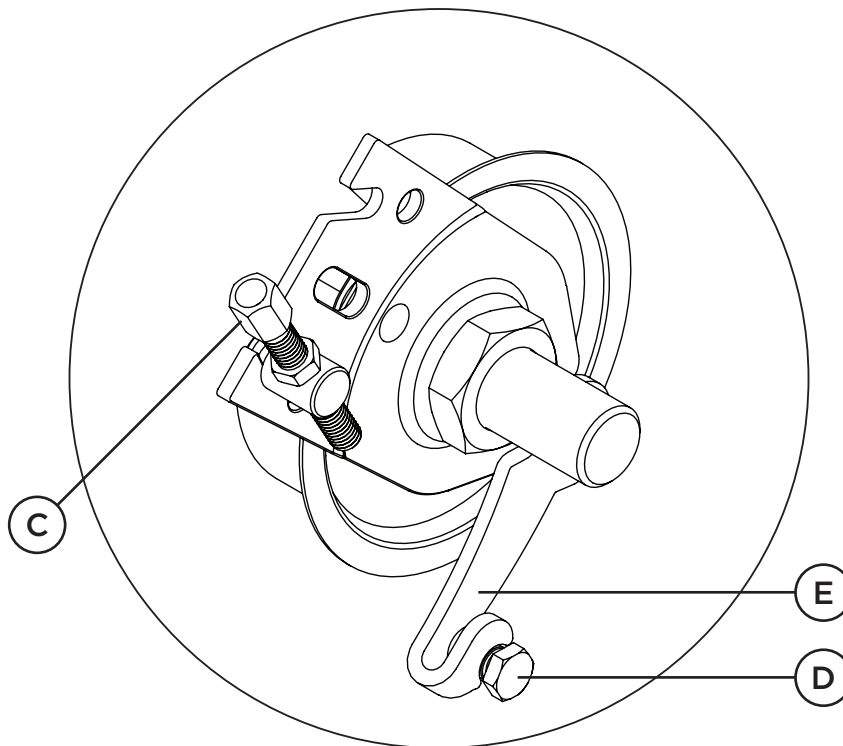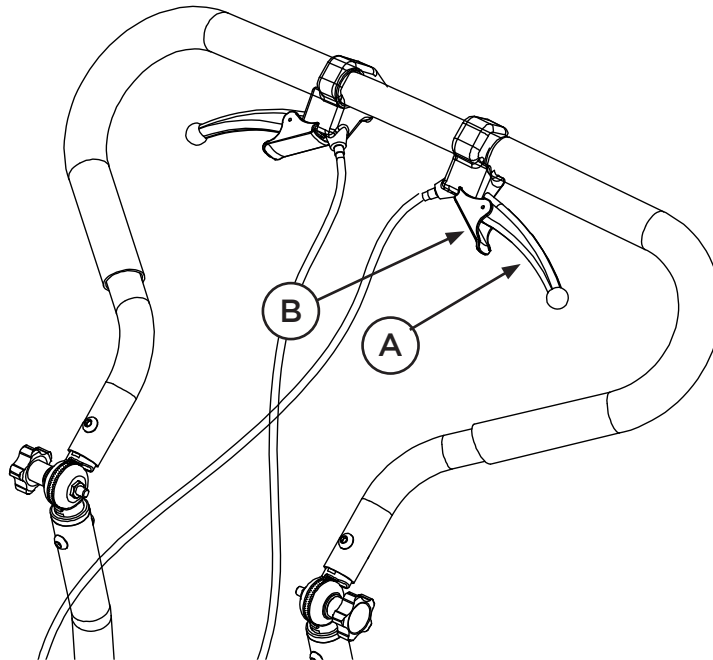

Detaljeret billede af
tromlebremse

Montering af tromlebremse

For at montere tromlebremsen skal du afmontere drivhjulet fra kørestolen ved at trykke på knappen på quick-release akslen og trække hjul og aksel ud af tromlebremsen.

Monter derefter tromlebremsen på kørestolsstellet ved at skrue det store afstandsstykke (D) over gevindet på tromlebremsen, og før derefter tråden gennem det tilsigtede hul i den ønskede position. Fastgør med den store møtrik (H) på indersiden af sideplade af rammen og stram let. Det er vigtigt, at du ikke strammer helt.

Tag derefter skruen (C) og indfør den gennem rotationslåsehullet i bremsetromlen (A), ind gennem den lille afstandsholder (E) og gennem huller i rammesiden. Se afsnit med Drivhjulsplacering med sidepladebilleder for mulige placeringer af drivhjul og bremsetromle.

Fastgør med skive (F) og møtrik (G) på indersiden af rammens sideplade. Spænd begge møtrikker (H) og (G), så bremsetromlen er sikkert fastgjort. Bremsetromlens rotationslås skal pege diagonalt bagud/opad i 12/16" og skrå fremad/opad i 20-24".

Sæt derefter quick-release-akslen tilbage med hjulet og skub ind, indtil hjulet går i indgreb. Test ved at trække hjulet lidt udad (uden at trykke på quick-release-knappen).




Bremsetromlens rotationslås skal pege skråt bagud/opad i 12/16" og skråt fremad/opad i 20-24".



Se afsnittet Quick release for yderligere information om, hvordan du bruger funktionen.



Tromlebremsens monteringsprincip er det samme uanset hjulstørrelse.

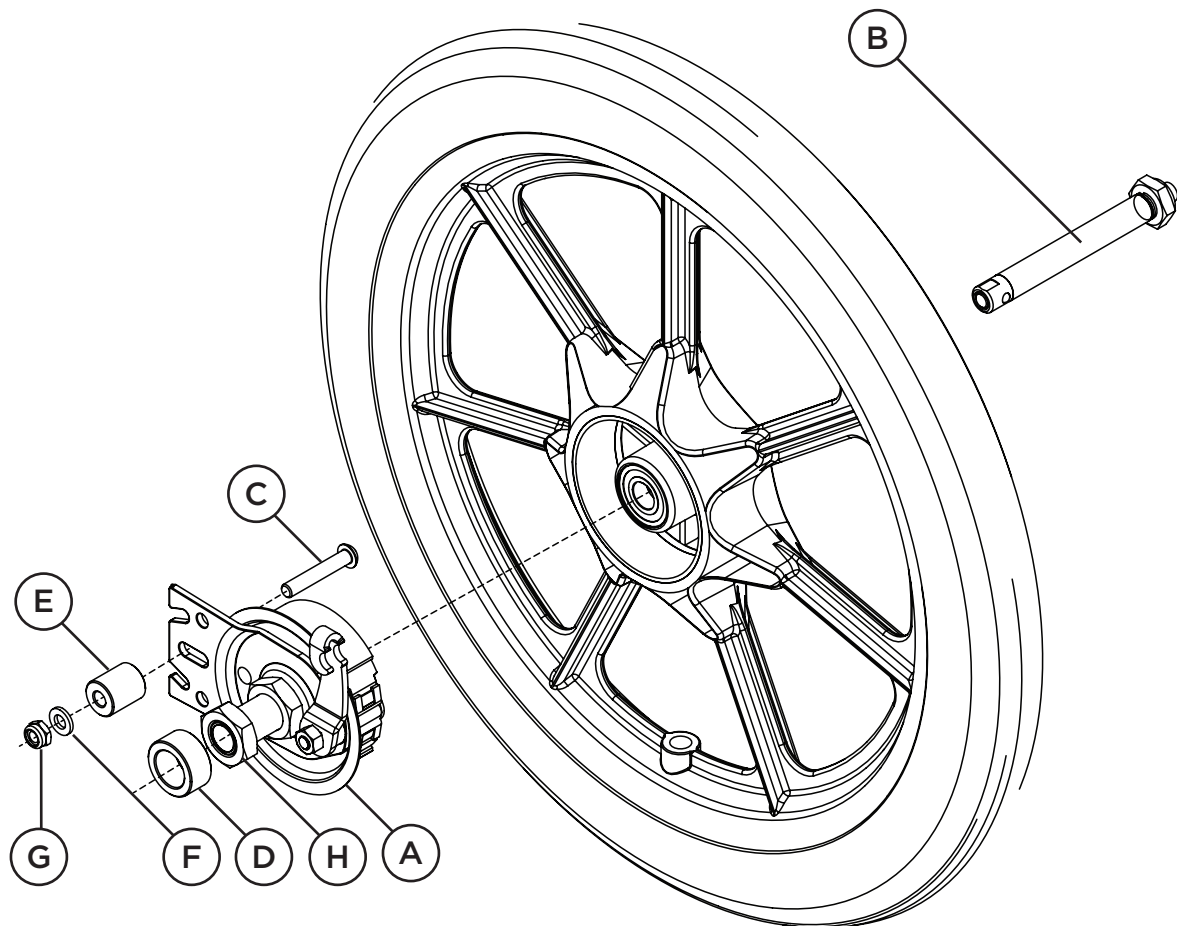

Parkeringsbremse 12-16"

Montering af parkeringsbremse til 12-16"

Parkeringsbremsebeslaget monteres som på billedet iberegnet hulmønster på sidestykket af kørestolsstellet med de medfølgende skruer (A), distancestykker (B) og møtrikker (C).

Indjuster parkeringsbremsen (D) ved behov ved at løsne skruen (E) og herefter flytte parkeringsbremsen (D) fremad eller bagud i sporet.


Spænd herefter skruen (E) når ønskede position er opnået.

Brug af parkeringsbremse

Lås parkeringsbremsen (D) ved at trykke parkeringsbremsearmen fremad.

For at få bedste montering på dækkets overflade ved brug af parkeringsbremsen anbefaler vi at mellemrummet mellem dæk og parkeringsbremsepind (F) skal være 20 mm når parkeringsbremsen er i hvileleje.

Træk parkeringsbremsearmen bagud for at frigøre parkeringsbremsen.

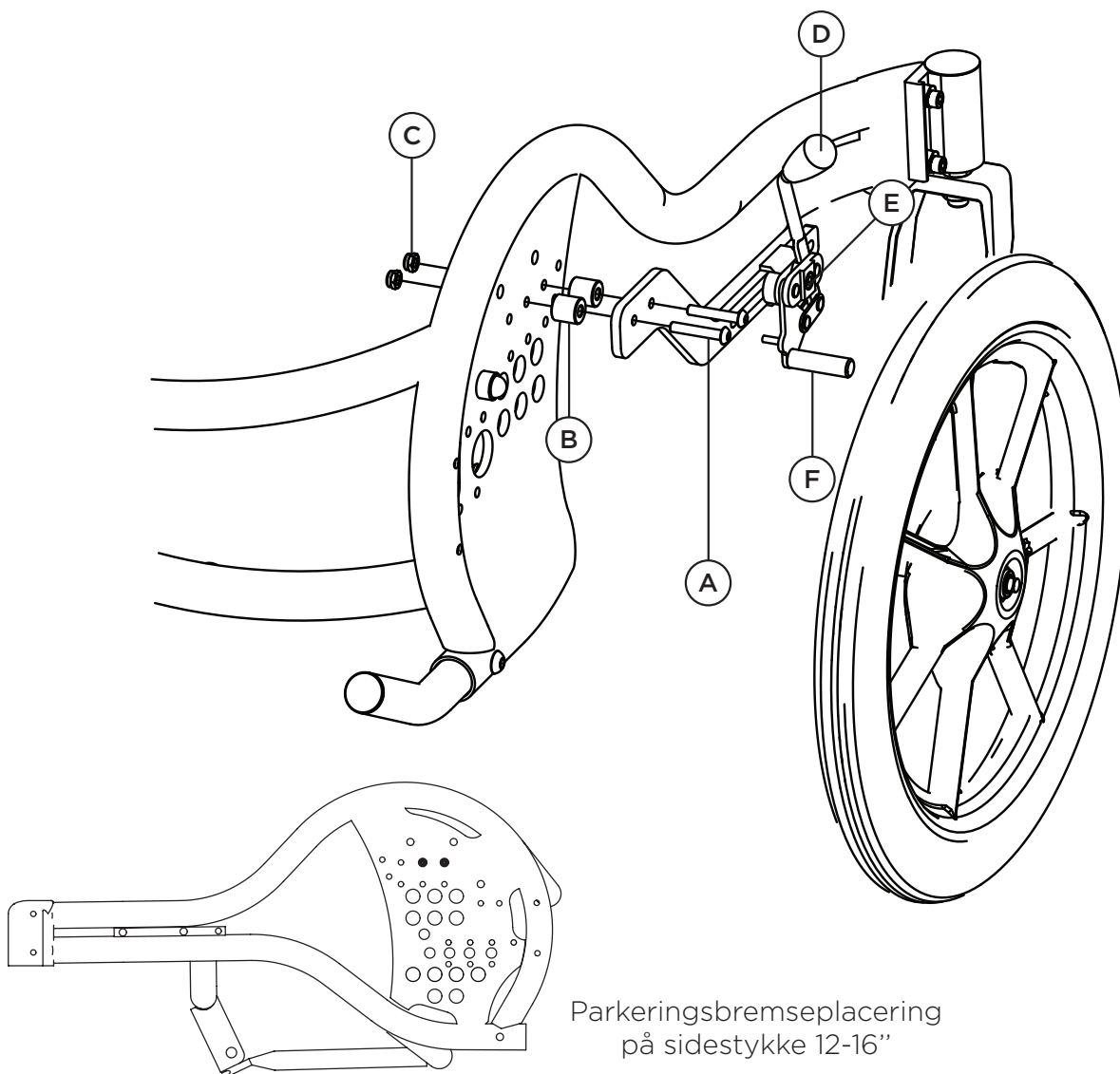

Parkeringsbremse 20-24"

Montering af parkeringsbremse til 20-24"

Parkeringsbremsebeslaget monteres i henhold til billedet i de anviste huller på kørestolsstellets fastgørelse for det forreste transportbeslag (A) med de tilhørende skruer (B), spændeskiver (C), møtrikker (D) og møtrikdæksler (E). Ved brug af parkeringsbremsen sammen med transportbeslaget (A), udskiftes skruerne til parkeringsbremsen med transportbeslaget.

Juster om nødvendigt parkeringsbremsen (F) ved at løsne skruerne (G) på rørklemmen (H) og derefter flytte parkeringsbremsehåndtaget (F) frem eller tilbage. Spænd derefter skruerne (G), når den ønskede position er opnået.





Sørg for, at parkeringsbremsen ikke vipper sidelæns efter justering.

At bruge parkeringsbremse

Lås parkeringsbremsen (F) ved at trykke parkeringsbremsearmen fremad. For at få den bedste montering på dækkets overflade ved brug af parkeringsbremsen, anbefaler vi, at afstanden mellem dækket og parkeringsbremsebolten (I) skal være 20 mm, når parkeringsbremsen er i hvileposition. Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at udløse parkeringsbremsen.



Ved brug af transportbeslaget sammen med parkeringsbremsen anvendes der ingen spændeskiver. For mere information, se afsnittet Transportbeslag.

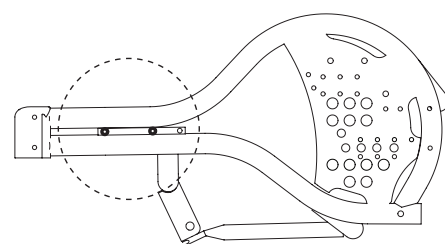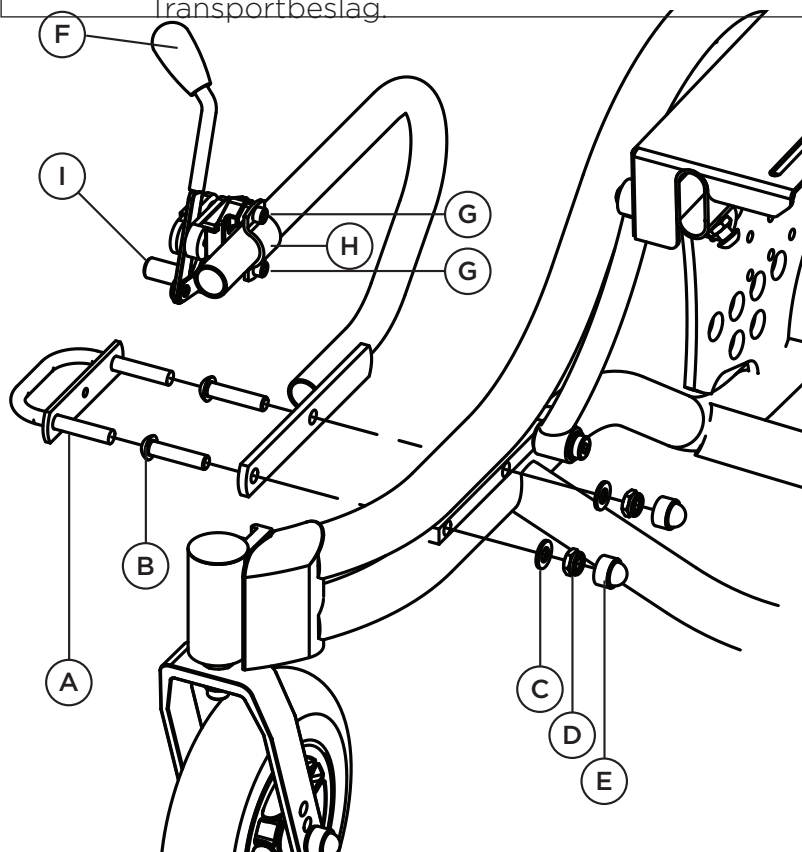

Parkeringsbremseplacering på sidestykke 20-24"

E-drive

E-drive sammen med Seabass G2

E-drive er en el-pakke som gør Seabass G2 el-manøvreret. E-drive findes som tilvalg til Seabass G2 med 16" samt 20" drivhjulsstørrelse.

Montering af e-drive


E-drive erstatter eksisterende drivhjul og monteres iht. billedbeskrivelsen, i det tilsigtede hulmønster på sidestykket af kørestolsstellet med afstandsstykke, skive, skrue, møtrik og nafbøsning. Håndbetjeningen er monteret med de medfølgende detaljer på kørestangens kørehåndtag.



For mere detaljeret information om e-drive, henviser vi til separat monteringsanvisning "E-drive til Seabass G2 MED3058".

At bruge e-drive

E-drive gør Seabass G2 til en elektrisk betjent kørestol og betjenes ved hjælp af en håndbetjening.


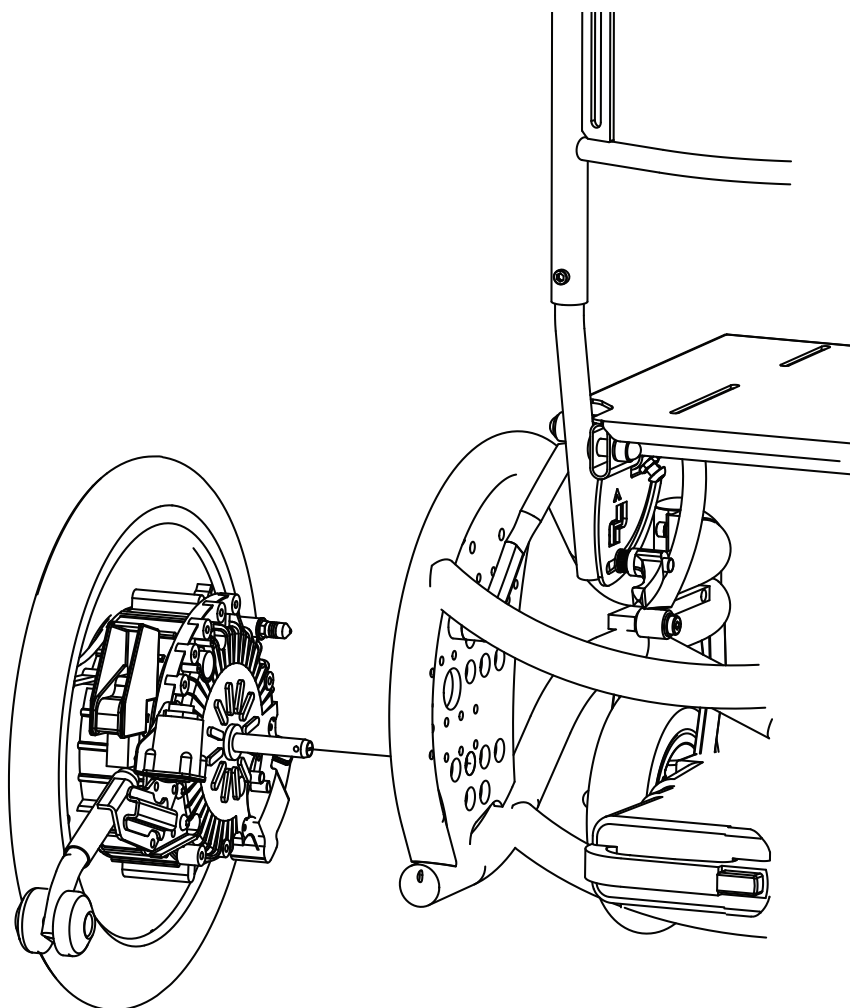


Sædetilt

Sædetiltning




For at tilte kørestolsstellet skal du trykke på knappen (A), mens du holder styret med den ene hånd og skubber nedad/fremad. Slip derefter knappen (A), når du har nået den ønskede hældning.

For at returnere sædevinklen til den oprindelige position, tryk på knappen (A) og træk kørebøjlen opad og bagud ved at holde i kørebøjles/kørehåndtagets håndtag.

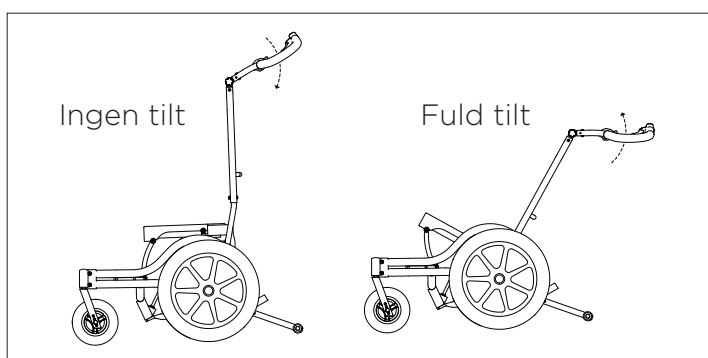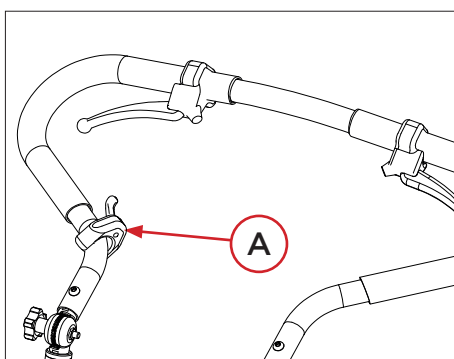

Alternativ tiltindstilling

Seabass G2 har to forskellige tiltspositioner: standard (0-35°) eller negativ (-7-28°). For at skifte til negativ tilt skal det nederste gasstempelbeslag (billede 1) flyttes til det øverste hul, og det øverste beslag skal drejes 180° i sædepladen (billede 2-3). Løsn skruerne (B), og drej beslaget 180°. Spænd skrueforbindelserne efter flytningen.

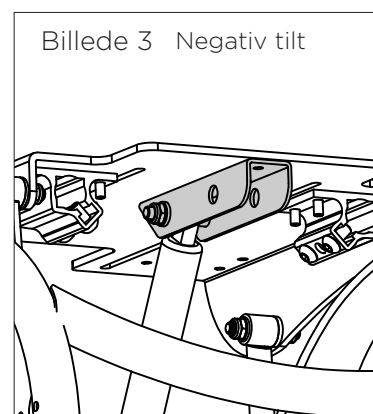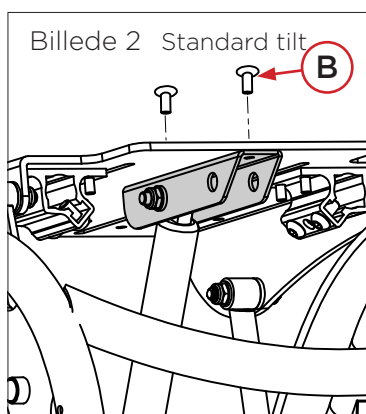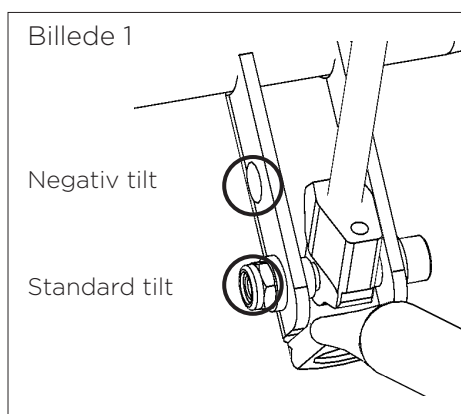

Ved tiltning af kørestolsstellet skubbes tyngdepunktet nedad/fremad, hvilket betyder en reduceret vælterisiko.



Vær opmærksom på den mulige afklemningsrisiko, når sædet tiltes.

Fodstøtte

Montering af fodstøtte

Fodstøttebeslaget er normalt inkluderet i kørestolsstellet. Hvis beslaget leveres med fodstøtten, skal du bruge de medfølgende skruer (C) til montering. Beslagene monteres som vist med fire skruer/beslag i forkanten af sædepladen. Bemærk, at låseskruerne (B) skal pege indad/nedad. Monter fodstøttens (A) firkanttrør i fodstøttebeslagene under forsiden af sædepladen. Lås fodstøtten fast med låseskruerne (B) på begge sider.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (D) i form af en stift findes monteret i bunden af fodstøtte-profilen. Sikkerhedsstoppet kan også bruges til at finde tilbage til en førindstillet højdeposition.





Monter et ekstra sikkerhedsstop over fodstøtten i rillen på fodstøtteprofilens rille for nemt at finde tilbage til en alternativ højdeposition (eksempelvis med eller uden spor).

Justering af vinkel ved knæleddet

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, er det muligt at vinkeljustere fodstøtten ved knæleddet. Løsn vingeskruen (F) lidt og juster til den ønskede højde. Spænd derefter vingeskruen.

Justering af fodstøttens højde

Når fodstøtten er monteret i sædepladen er det muligt at højdejustere fodstøtten ved fodleddet. Løsn fingerskruen (F) noget og juster til ønskede højde. Spænd herefter fingerskruen.

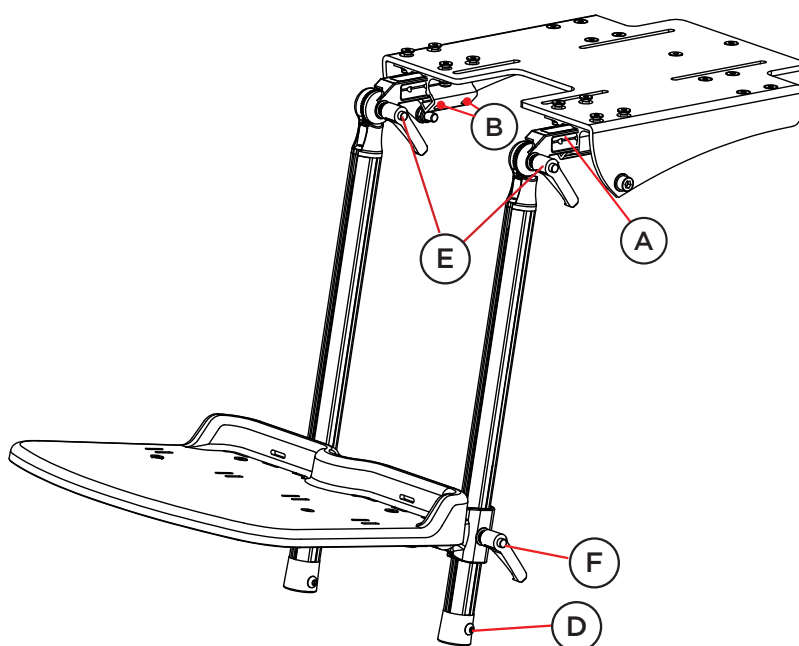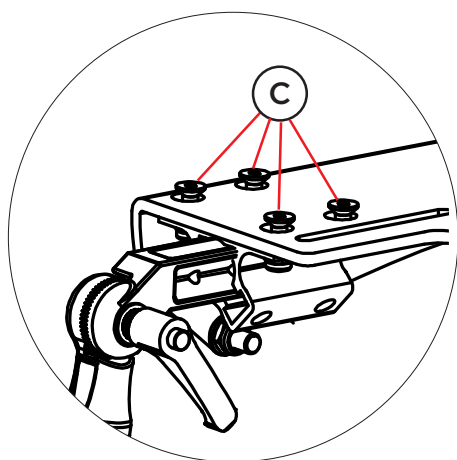

Fodstøttesbeslag

Fast fodstøttebeslag (1)

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) något for at justere til ønskede højde. Spænd herefter vingeskruen.

Fjedrende fodstøtteadapter (2)

For at justere fodstøtten i højden, løsnes skruen (D) og eventuelt skruen (E) lidt for derefter at justere til den ønskede højde. Spænd skruen (D). Vælg længden af fjedervandringen ved at justere skruen (E) til den ønskede position og stramme den.



Fjederens modstand kan justeres med en skruetrækker ved at dreje skruen i fjederpakken (F).










Opklappeligt fodstøttebeslag (3)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne håndtaget (A) lidt for at justere til den ønskede højde. Spænd derefter håndtaget. For at bruge den sammenklappelige funktion, løft fodstøttepladen foran.

Kugleledsadapter (4)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne håndtaget (A) lidt for at justere til den ønskede højde. Spænd derefter håndtaget.

For at bruge kugleledsfunktionen skal du først løsne skruerne (B) og (C) og justere til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (B) og sikkerhedslåsens position med skruen (C).

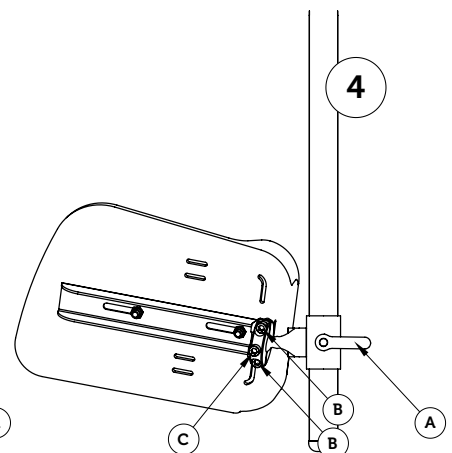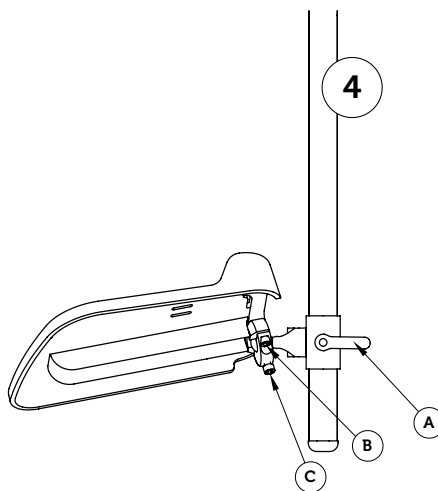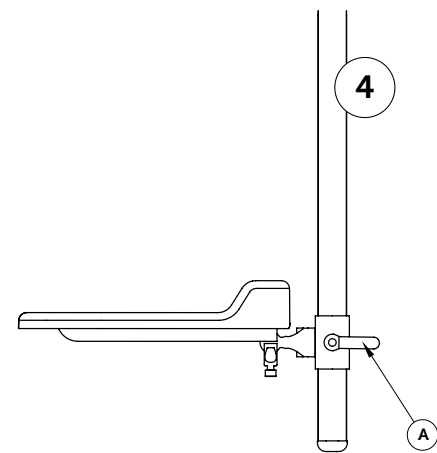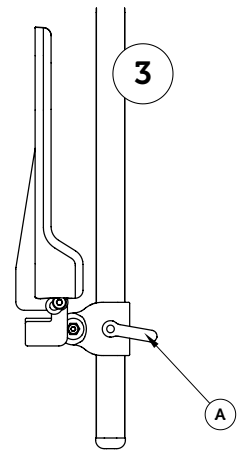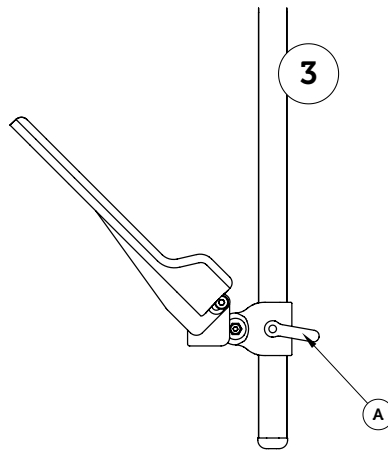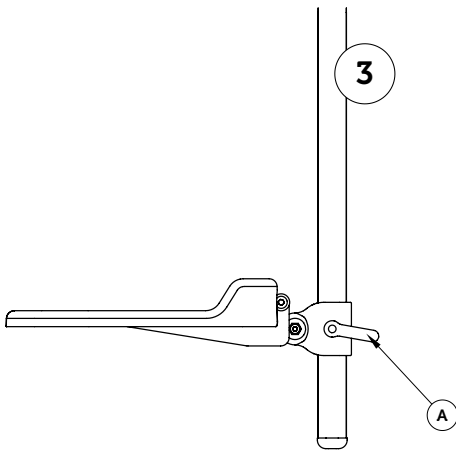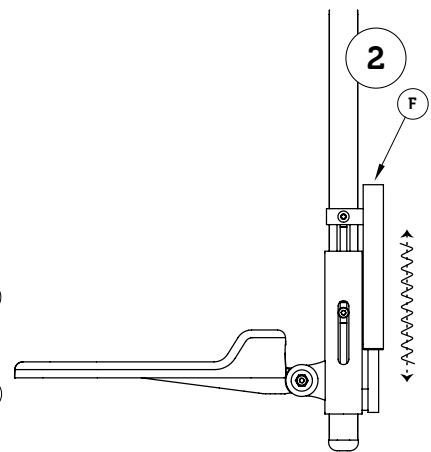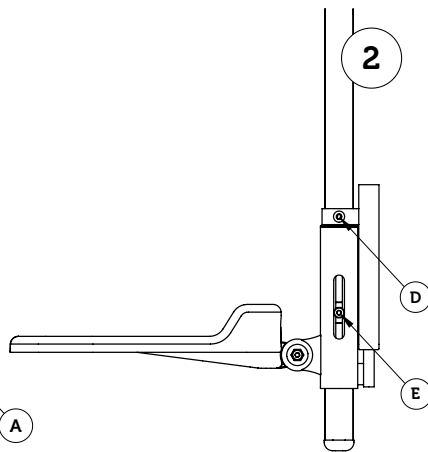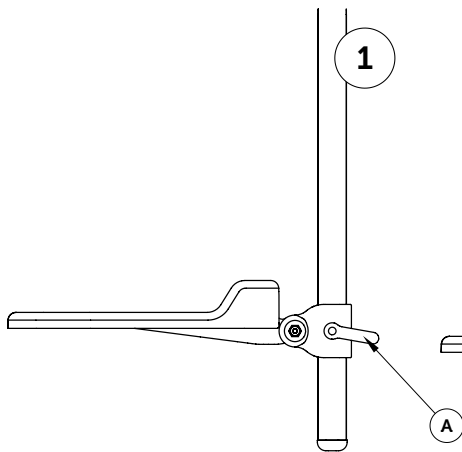


Fodkasse

Montering af fodkasse

for at montere fodkassen starter du med at trykke profilstiften (A) ind på fodkassen (B) i fodstøttebøjlen (C). Indstil derefter fodstøtten (D) til den ønskede højde og stram håndtaget (E).

Indstil den ønskede højde og bredde på fodkasse ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plastikstangen (H) på fodkassen skal sættes ind gennem rillen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring og tjek at skruerne er ordentligt spændt.

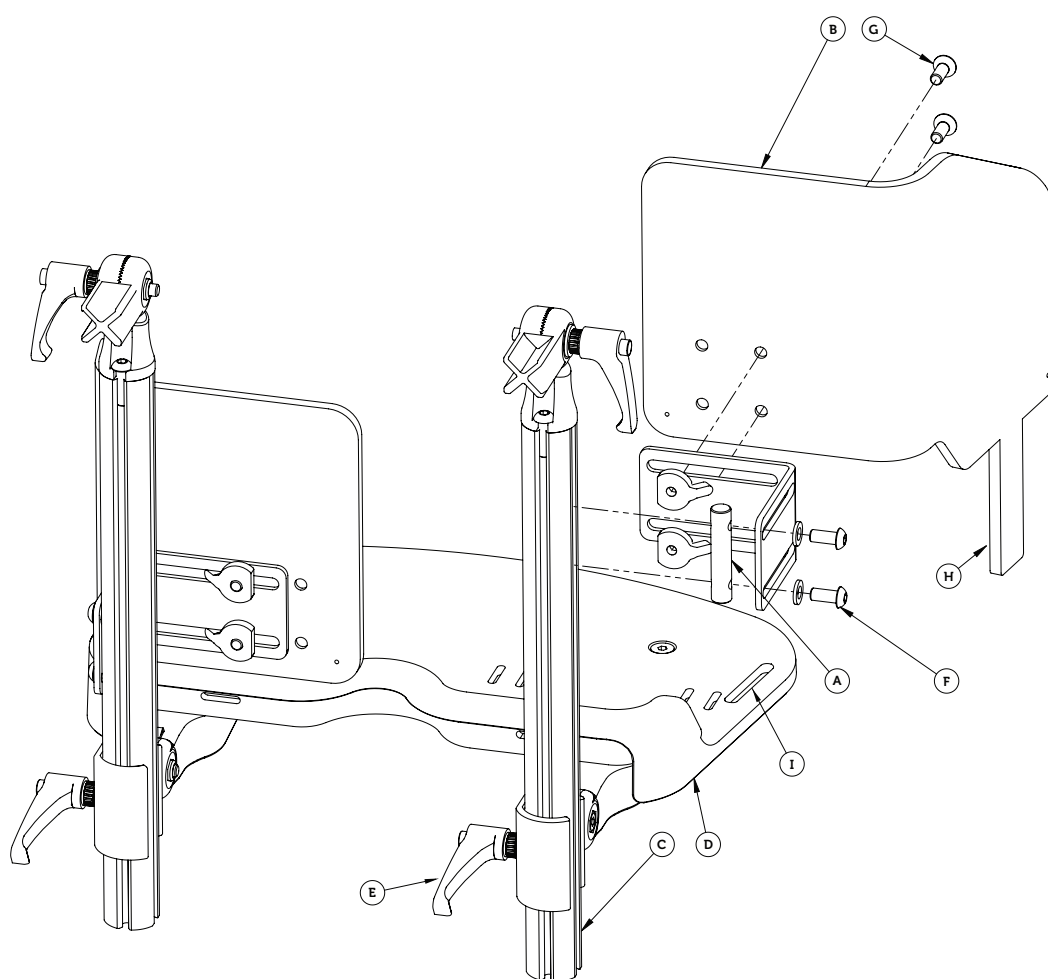

Plaststangen (H) kan efter justeres til ønskede højde kappes eller varmes ind under fodstøttepladen efter egne ønskemål.

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Før montering af lægstøtten kan udføres, skal du først fjerne eventuel fodstøtte. Start med at fjerne endedækslet (G) og løsner derefter håndtaget (F), der holder fodstøtten på plads på fodstøttestangen. Spænd derefter fodstøttepladen og dens beslag nedad.


Monter lægstøtten ved at skubbe profilskruen (C) ind i fodstøtten, juster til den ønskede højde og spænd skruerne (E). Genmonter derefter fodstøtten og endehætten (G).

Højdejustering af lægstøtte

For at højdejustere lægstøtten løsner du skruerne (E) noget og justerer herefter til ønsket højde. Spænd herefter skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at breddjustere lægstøtten løsner du skruerne (A) noget for herefter at justerer til ønsket bredde. Spænd herefter skruerne (A).

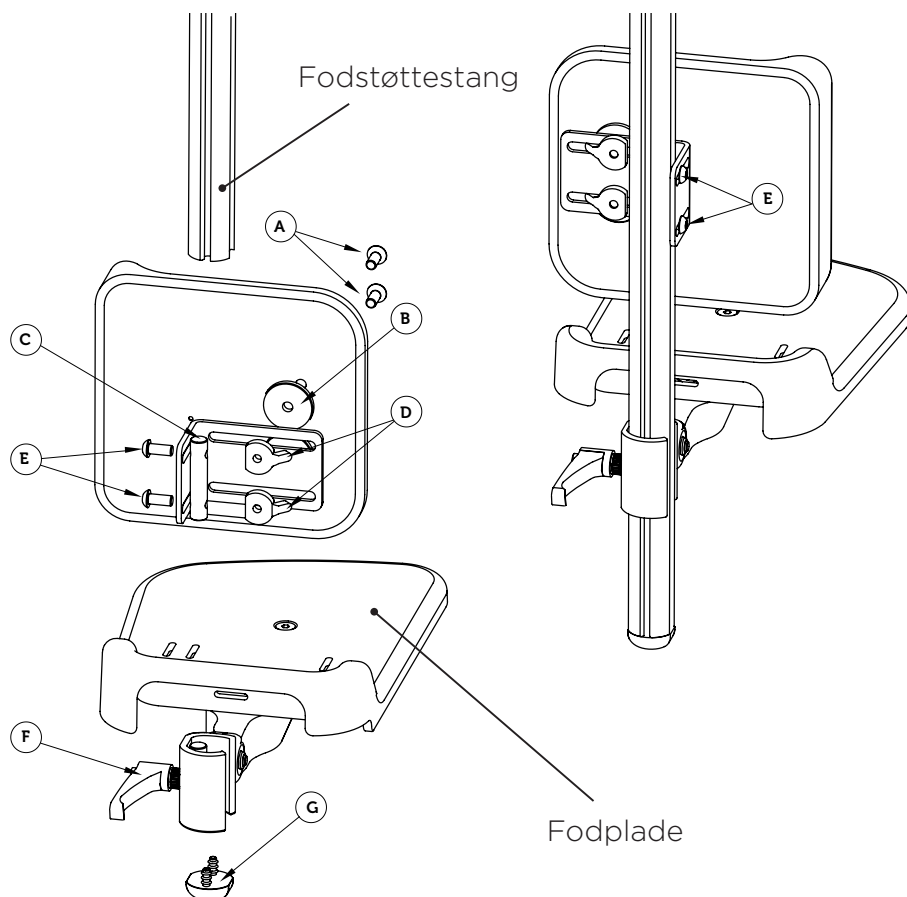

Kørebøjle vinkelindstillelig - G2

Montering af kørebøjle

Før kørebøjlen ind i beslagenes bagkant under sædedelspladen. Spænd skruerne (A) ordentligt efter montering.

Dybdejustering af kørebøjle

For at dybdejustere kørebøjlen (forlænge sædedybden) Løsner du skruerne (A), under siddedelspladens bagerste del og flytter herefter kørebøjlen til ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (A).

Vinkeljustering af kørebøjle

Kørebøjlen kan vinkeljusteres efter typen af siddesystem. Frigør låsningen af kørebøjlen ved at løsne begge vingeskrue (B) og herefter justere til ønskede vinkel. Spænd herefter vingeskrue (B).



Kørebøjlen skal altid ligge op imod siddesystemets ryg ved transport i køretøj.

Vinkeljustering af kørebøjlehåndtag

For at vinkeljustere kørebøjleens kørehåndtag løsner du knophåndtagene (C) noget og justerer herefter til ønskede vinkel. Spænd herefter knophåndtagene igen (C).

Udskift knophåndtag med snablås/hurtiglås

Knophåndtagene (C) ved kørehåndtaget kan erstattes med hurtiglås type (D) som bestilles separat. Hurtiglåsen monteres ved at skrue den forrige knap af og skrue hurtiglåsen på samme måde. Pas på ikke at spænde for stramt, så vil du ikke kunne stramme låsefunktionen.


Foldbar kørebøjle

Montering og justering af foldbar kørebøjle

Foldbar kørebøjle monteres og indstilles på samme måde som den vinkeljusterbare (se ovenfor). Den foldbare kørebøjle har to styk hurtiglåse (D) monteret nedenfor på kørebøjlen. Med disse hurtiglåse kan kørebøjlen enkelt foldes ned fremad for at lette f.eks. transport.

Sammenklapning af den foldbare kørebøjle

Frigør begge hurtiglåse (D) ved at folde låsearmen ud og folde kørebøjlen fremad. Fastgør kørebøjlen i den ønskede vinkel ved at folde låsearmen (D) ind igen. Hurtiglåsene kan justeres til at stramme strammere eller løsere ved at dreje låsearmen til højre eller venstre i åben position.

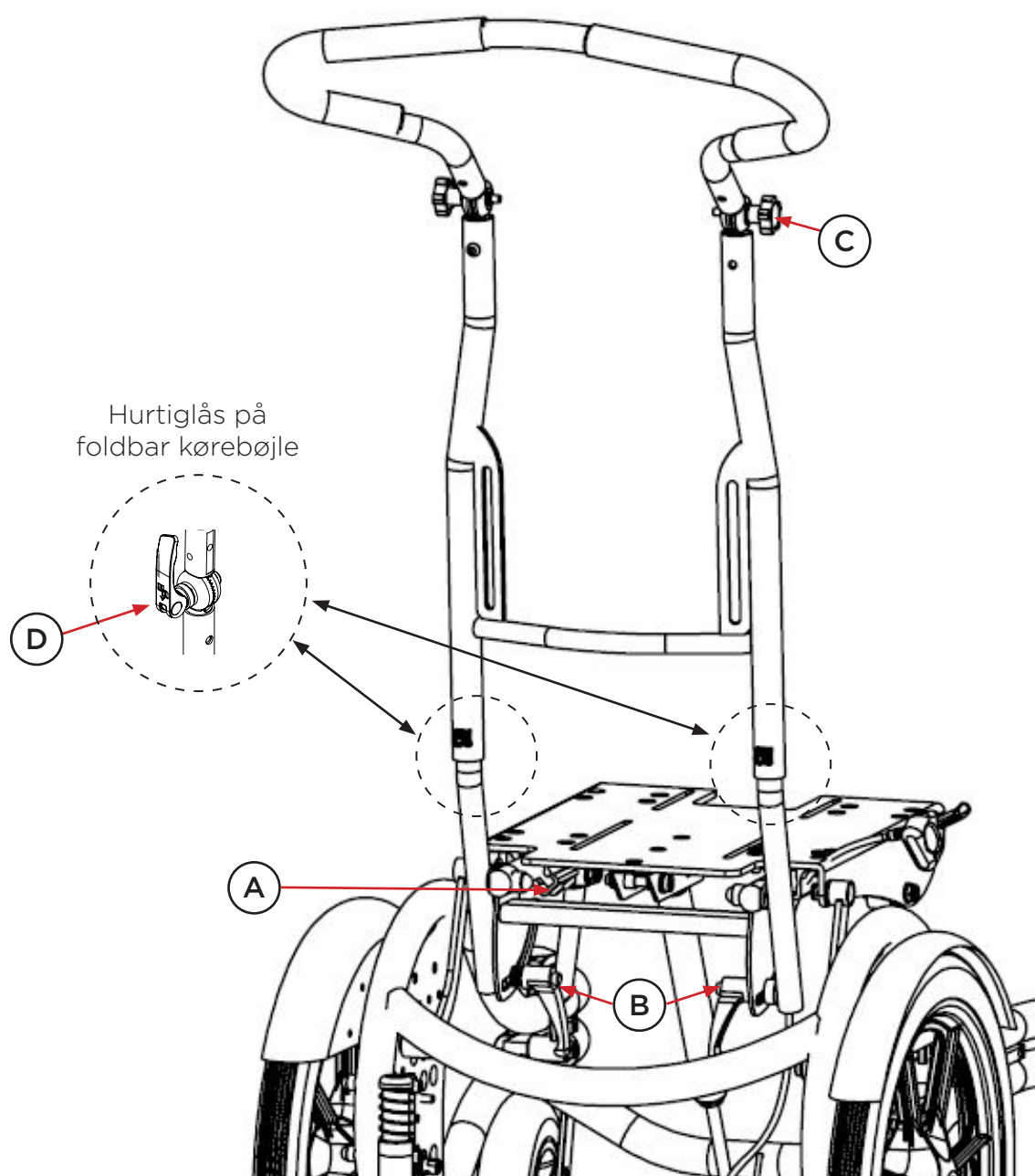

Sædedybdejustering

For at få rette vægtfordeling og et velbalanceret kørestolsstel kan kørestolsstellets kørebøjle dybdejusteres. Et velbalanceret kørestolsstel medfører lettere manøvrering.

For at justere sædedybden på kørestolsstellet løsner du skruerne (A) under sædepladens bagerste del og flytter herefter kørebøjlen til ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (A) igen.



Hæng ikke tasker eller tunge genstande på kørebøjlen. Dette sammen med andre faktorer kan få kørestolsstellet til at tippe bagud.

Armlæn vipbar fra ryg

Den vipbare funktion

For at vippe armlænet til siden skal du trække låsemekanismen (A) ned og derefter vippe væk fra armlænet. Sørg for, at der høres en kliklyd, når du klapper armlænet tilbage. Muligheden for vinkeljustering er tilvejebragt af låsemekanisms tre-hullers position (A).

Højdejustering

For at justere armlænets højde skal du løsne skruerne (B) lidt og derefter flytte armlænet til den ønskede højde. Spænd derefter skruerne (B).

Breddejustering

For at ændre bredden på armlænet skal du løsne skruen (C) og derefter flytte armlænet til den ønskede bredde. Spænd derefter skruen.

Vinkeljustering opad/nedad


Hvis du ønsker at justere vinklen på armlænet, skal du løsne håndtaget (D) og derefter flytte armlænet til den ønskede vinkel. Spænd derefter håndtaget (D).

Vinkeljustering i sideled

Hvis du ønsker at justere pladen sideværts og vinklet, løsnes skruerne (E) og flyt derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (E).



Sørg for, at der høres en kliklyd, når du slår armlænet tilbage, hvilket indikerer at låsemekanismen er havnet i låst position.

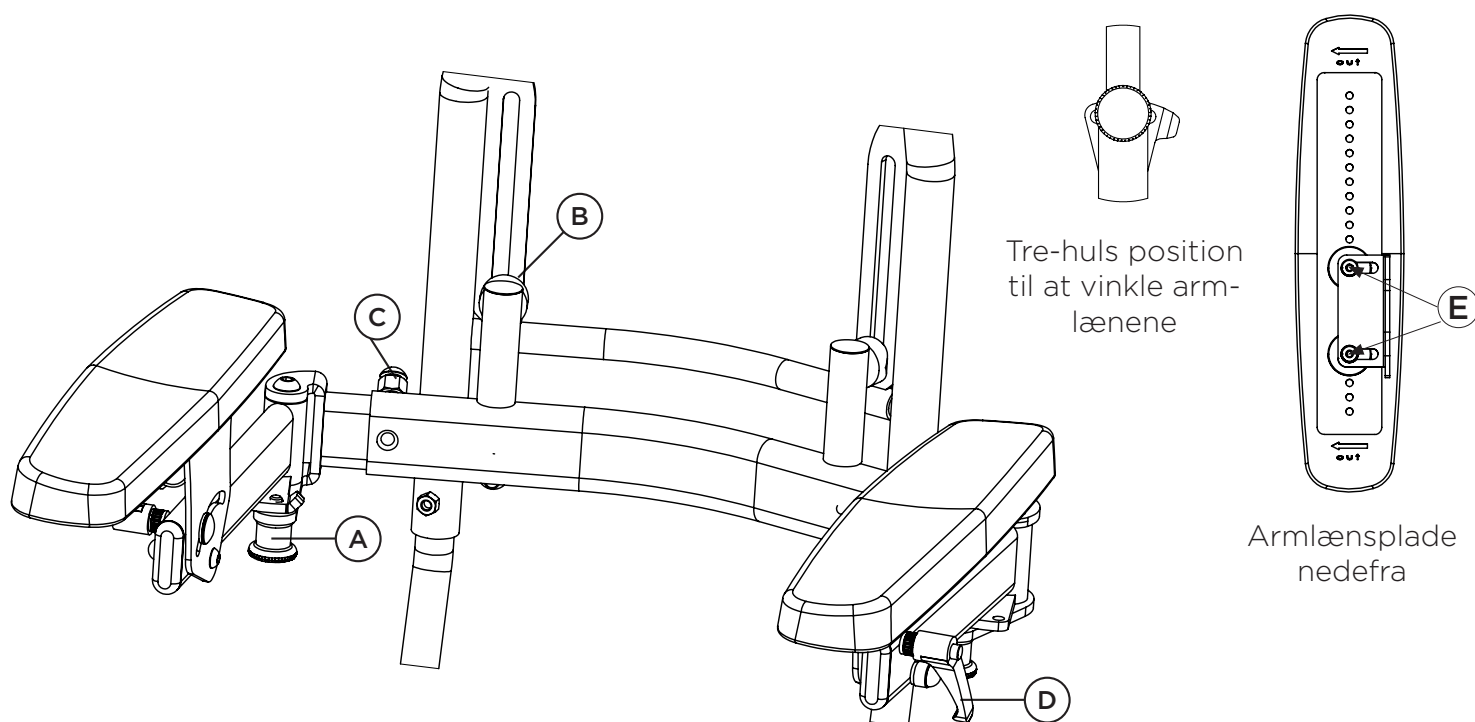

Anti-tipstøtte

Montering af anti-tipstøtte

Anti-tipstøtten er monteret på indersiden af kørestolsrammen som vist med de medfølgende skruer (A), spændeskiver (B), møtrikker (C), afstandsstykke (G) og møtrikdæksler (D).

Placer skiven (B) på skruen (A), og indsæt skruen (A) i de tilsigtede huller anti-tip støttebeslaget og gennem afstandsstykket (G) og gennem kørestolsrammen. Gør derefter det samme på den modsatte side med skive (B), møtrik (C) og spænd skruerne. Afslut derefter med at sætte møtrikhætter (D) på.



Seabass G2 bør altid udstyres med anti-tipstøtte med tanke på produktets mange indstillingsmuligheder.


At anvende anti-tipstøtte

Anti-tipstøtte bruges for sikker og tryk brug af kørestolsstellet og kan nemt vippes væk for ikke at være i vejen, når den ikke er i brug. Træd forsigtigt anti-tipstøtten ned (E) med din fod og drej den til siden. Prøv at træde så tæt på anti-tip-støttestangen (F) som muligt, når anti-tip-støtten deaktiveres. Dette er for at delene skal have den længst mulige levetid.

Sørg for at dreje anti-tipstøtten helt, indtil du hører et klik, hvilket indikerer at anti-tipstøtten er på plads.



Ved brug af anti-tipstøtte sammen med tippepedal sidder anti-tipstøtten monteret på venstre side som standard.

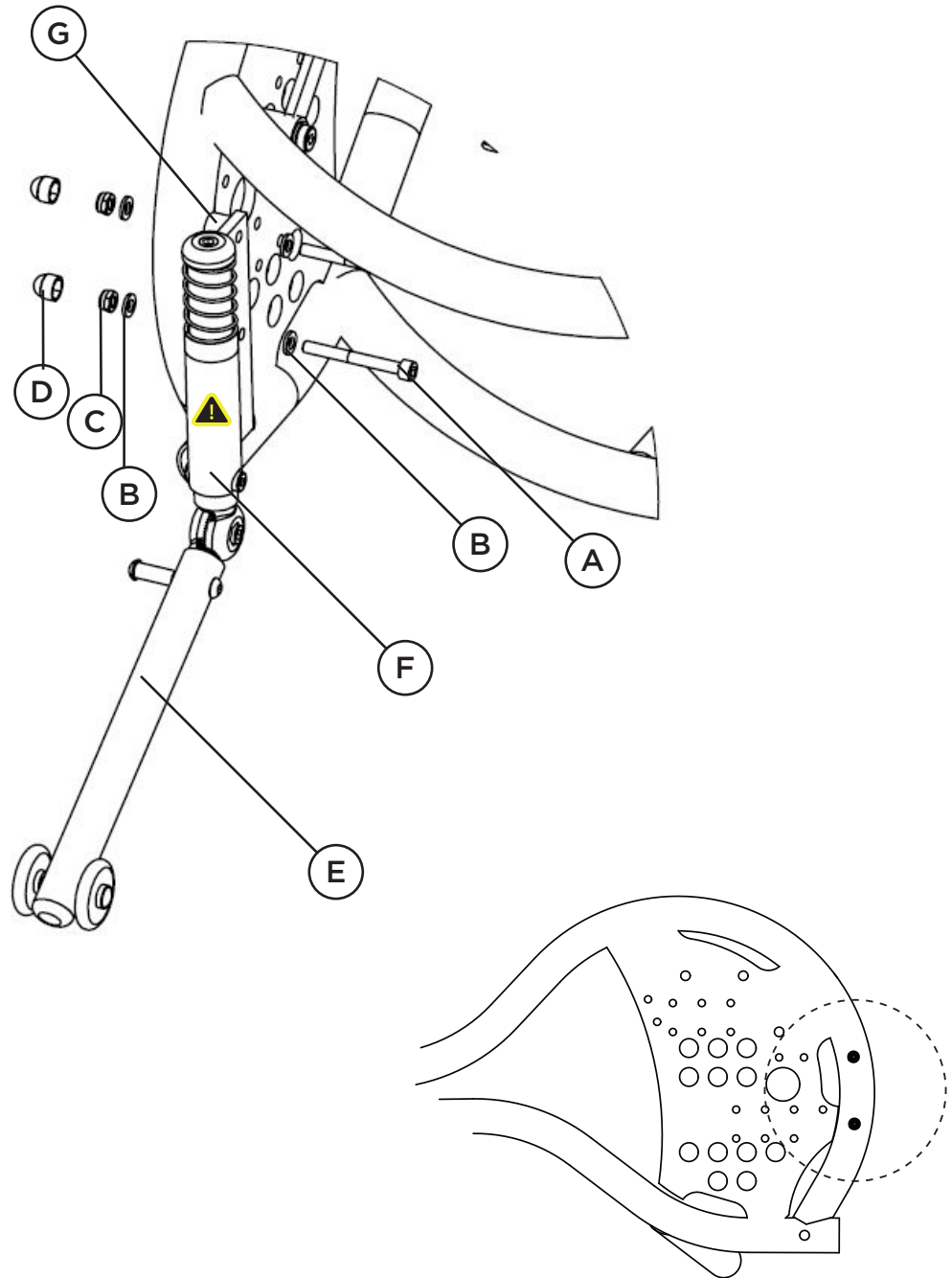

Tippepedal

Montering af tippepedal

Monter tippedalen (A) på det tilsigtede sted, i den bagerste del af kørestolsrammen, ved at indsætte tippepedalen (A) og låse dens position med en skrue (B) udefra.



Du skal fjerne endedækslet fra det bagerste rør på kørestolsrammen, før montering af tippepedal.




Tippepedalen sidder monteret på højre side som standard.

At bruge tippepedal

Tippepedal bruges f.eks. til at lette hævnning af kørestolsstellet ved kantsten. Tryk med foden på tippepedalen, samtidig med du holder i kørebøjlen, og trækker lidt bagud, for at frigøre plads under svinghjule.



Ved brug af tippepedalen er det vigtigt at du holder i kørebøjlen eller kørehåndtaget ordentligt.

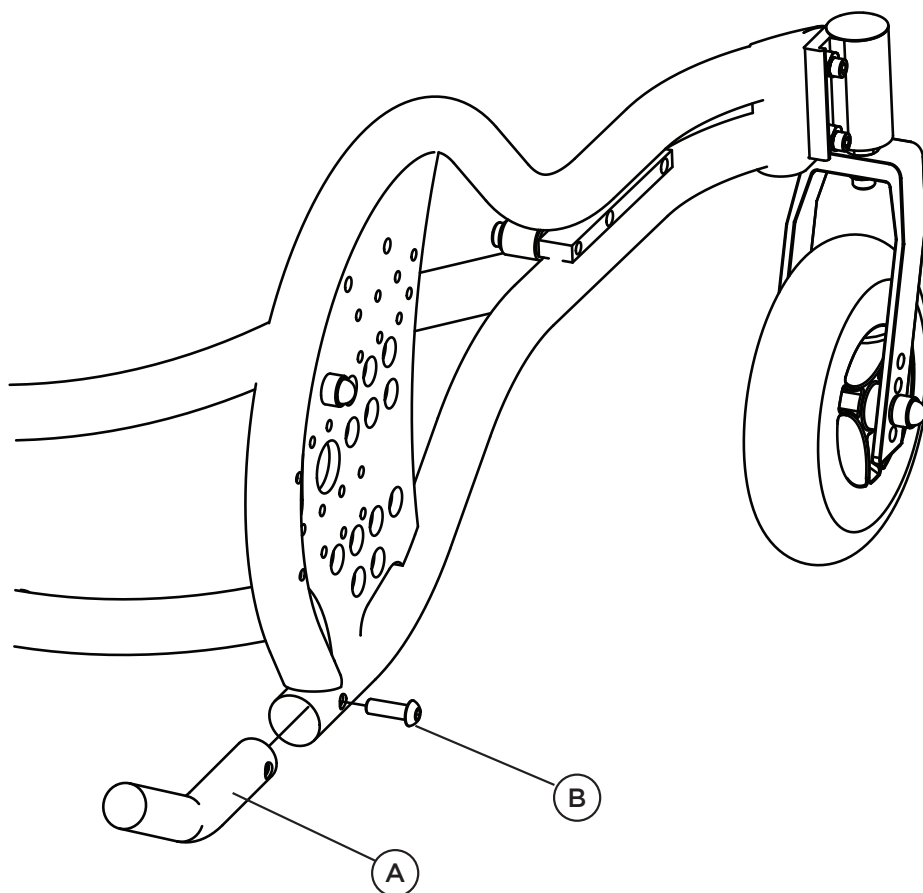

Stænkskærm

Montering af stænkskærm

Stænkskærmen monteres med de medfølgende skruer (A), skiver (B), møtrikker (C) og møtrikdæksler (D). Stænkskærmen monteres i samme hulmønster som det bageste transportbeslag, men på ydersiden af kørestolens stel.

For at montere stænkskærmen skal du først frigøre drivhjulet fra drivhjulets akse ved hjælp af hurtigudløserfunktionen og lægge det til side et stykke tid.


Sæt derefter skruerne (A) i det tilsigtede hulmønster, og juster dem med (transportbeslagets) skive (B), møtrikken (C) og spænd dem. Sæt derefter møtrikdækslerne (D) på, og afslut med at montere drivhjulet igen, når monteringen af stænkskærmen er færdig.

Justering af stænkskærm

Stænkskærmen kan justeres i højdeled ved at løsne skruerne (E). Juster til ønskede højde og spænde skruerne (E) når ønskede højdeposition er opnået.



Du behøver ikke at skrue skruerne (E) helt ud, det er nok at løsne dem.

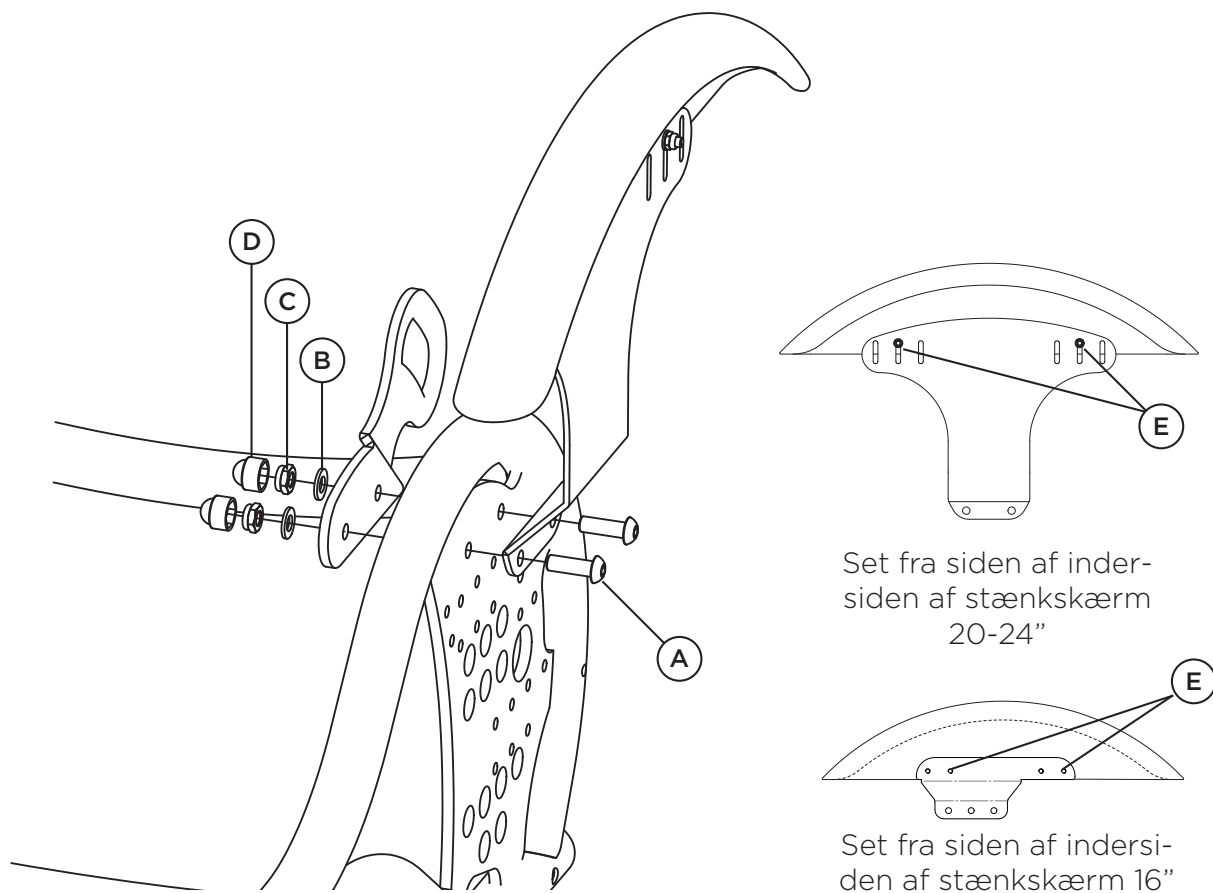

Transportbeslag

Montering af forreste transportbeslag


Monter det forreste transportbeslag (A) ved at sætte skiver (C1) på transportbeslaget (B) og indsæt derefter transportbeslaget med løkken udad, i eksisterende huller på forreste del af kørestolsstellet som beskrevet på billedet. Mød derefter skive (C) og møtrik (D) på indersiden af rammen og spænd. Afslut derefter med at sætte møtrikhætter (E) på.



Ved brug af transportbeslag og p-bremse til 20-24" drivhjul bruges der ikke skiver ved montering af det forreste transportbeslag.

Montering af bagerste transportbeslag

Det bagerste transportbeslag (F) monteres på indersiden af rammen ved hjælp af de medfølgende skruer (G), spændeskiver (H), møtrikker (I) og møtrikdæksler (J) som vist på billedet. Sæt skruerne (G) ind i det tilsigtede hulmønster på sidestykket af kørestolsrammen og på indersiden af kørestolsrammen med transportbeslaget (F), skive (H) og møtrik (I). Afslut derefter med at sætte møtrikhætter (J) på.

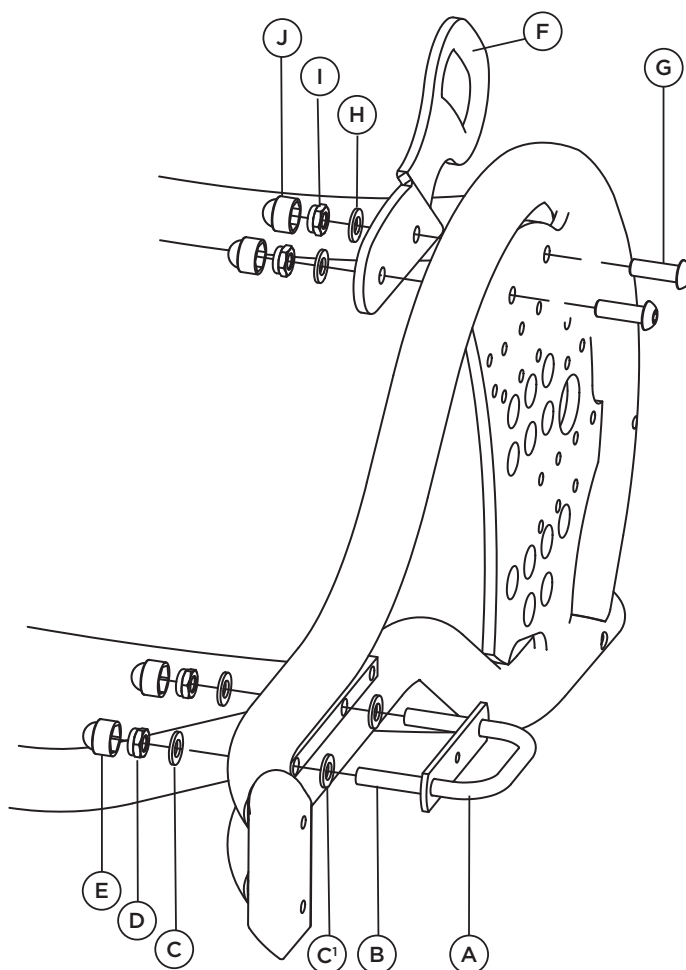



Sædedel

Montering af siddesystem

Siddesystemets fæsteplade monteres enkelt på kørestolsstellet gennem fire (4) skruer, spændeskiver og møtrikker i markerede riller (A) på kørestolsstellets sædeplade.




For yderligere information om fæsteplader, se den respektive brugervejledning til det valgte siddesystem.

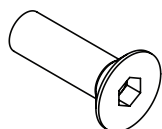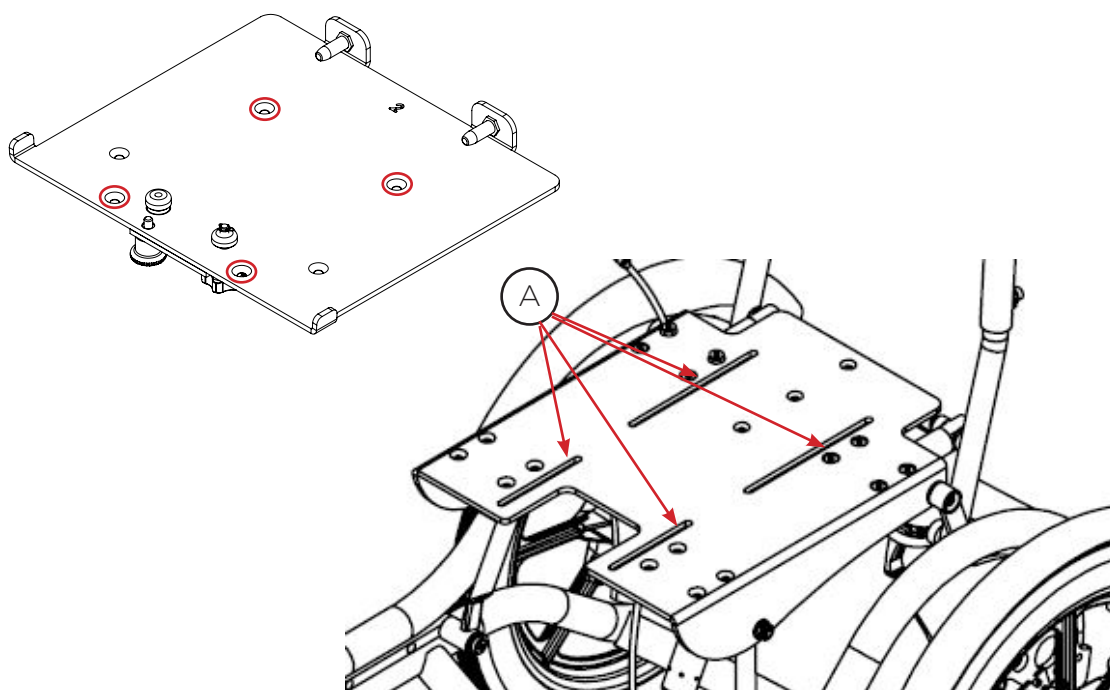

Insexskrue M6x20
Forsænket (D)
Antal 4 stk.



Skive
M6/16x1 mm
Antal 4 stk.

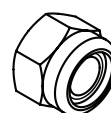

Låsemøtrik
M6
Antal 4 stk.

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for handling.

Transport i køretøj

Vi gør opmærksom på, at den absolut sikreste måde er at transportere brugeren i køretøjets faste sæder, fastspændt med den almindelige sikkerhedssele. Vi anbefaler ikke transport i køretøjer i kørestolsstellet. Vi er dog opmærksomme på, at visse brugere og situationer betyder, at brugeren skal transporteres siddende i kørestolsstellet. I disse tilfælde skal nedenstående sikkerhedsanvisninger altid følges for at minimere risikoen for personskader i tilfælde af en ulykke. Læs mere under Transportbeslag.



Retningslinjer for transport i køretøj

Kørestolsstellet er crashtestet og godkendt efter 7176-19 til 135 kg i bil.




Fastgørelse skal ske med spænderemme, godkendt i henhold til ISO 10542, i kørestolens transportbeslag mærket med følgende mærkat.

Fastgør de fire spændebånd med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter.

Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne.

Kørebjølen skal hvile mod ryggen.

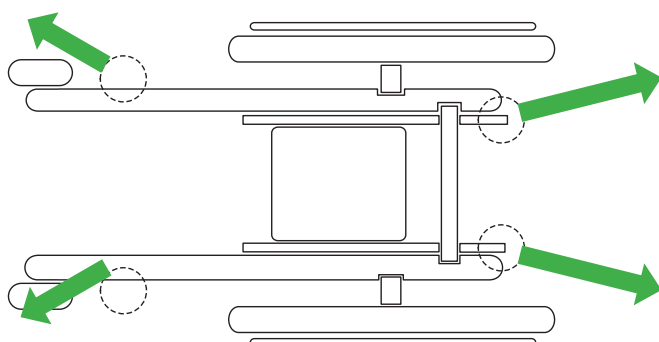

Forslag til spændebåndenes trækretninger



Det er vigtigt kun at strække båndene, og ikke spænde dem for stramt. For stram spænding af remmene kan få kørestolsstellet til at blive skævt.



Crashtestet og godkendt. Max belastningsvægt er 135 kg.



Man skal køre fremadvendt i en bil med bilens trepunktssæle.



Fastgørelsessystemet og trepunktsselen skal være godkendt ifølge ISO 10542.



Fastgør de fire spænderemme med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter. Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne. Kørebøjlen skal ligge op mod ryggen.



! Korrekt positionering af bæltet og vinklen ifølge fig.1.

! Bæltet skal sidde stramt og tæt mod kroppen. Kørestolens dele må ikke forhindre selen i at sidde tæt til kroppen.

! Den øverste del af bæltet skal gå over brugerens skulder uden at trykke på halsen (se fig. 2)

! Overskrid ikke maksbelastningen på kørestolsstellet.

! Der må ikke foretages ændringer eller skader på kørestolens transportbånds fastgørelser.

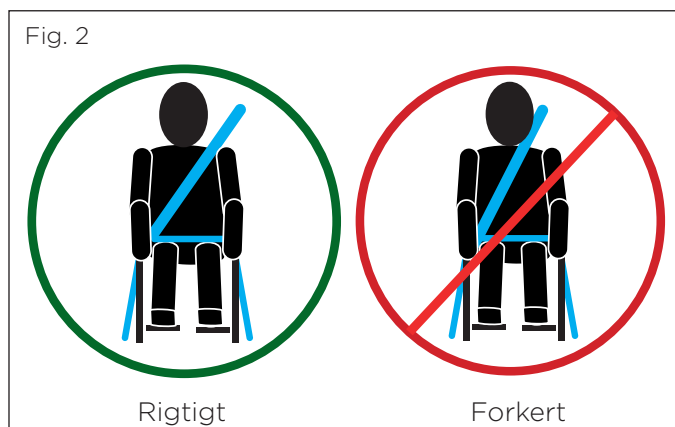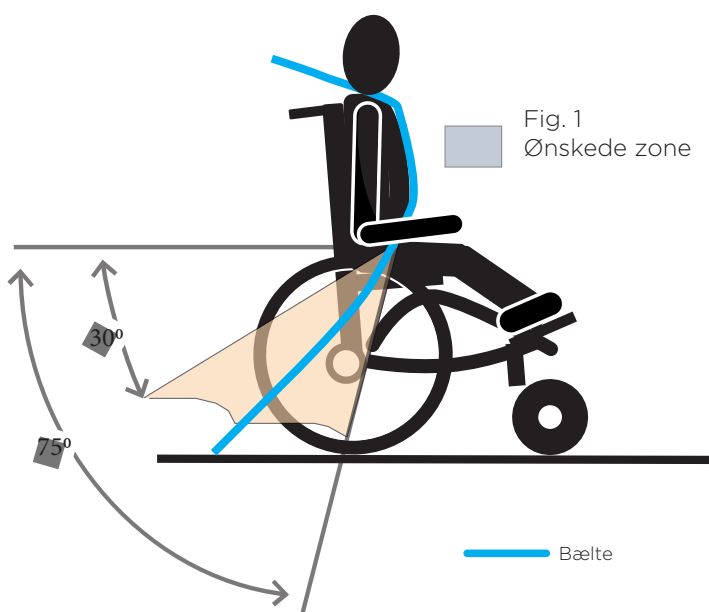

! Trepunktsseler skal bruges for at reducere risikoen for hoved- og brystskader forårsaget af køretøjskomponenter

! Hvis kørestolen er udstyret med et bord, skal dette fjernes og opbevares sikkert under transport.

! Når det er muligt, skal andet aftageligt udstyr enten fastgøres på kørestolen eller fjernes for sikker opbevaring under transport.

! Vær opmærksom på, at spændet på sikkerhedsselen ikke skal ende, så "åbningsknappen" kan komme i kontakt med løse dele ved en kollision.

! Kørestolen skal tages ud af drift, hvis den har været involveret i en kollision.


Køreteknik

Assistenthjælp, opad fremad

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned

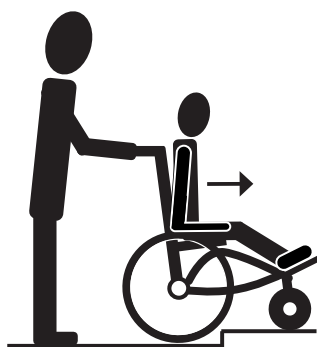

Assistenthjælp, opad baglæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned




Assistenthjælp, ned forlæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtten .



Træd tippepedalen ned

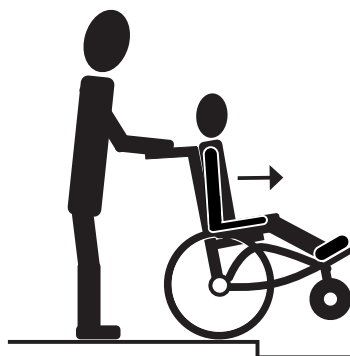

Aktiver altid evt. anti-tipstøtte, når forflytningen er klaret!

Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Løft i rammen og kørebøjlen.

Assistenthjælp, op af trapper


- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Assistenthjælp, ned af trapper

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.

Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Bær i rammen og kørebøjlen.

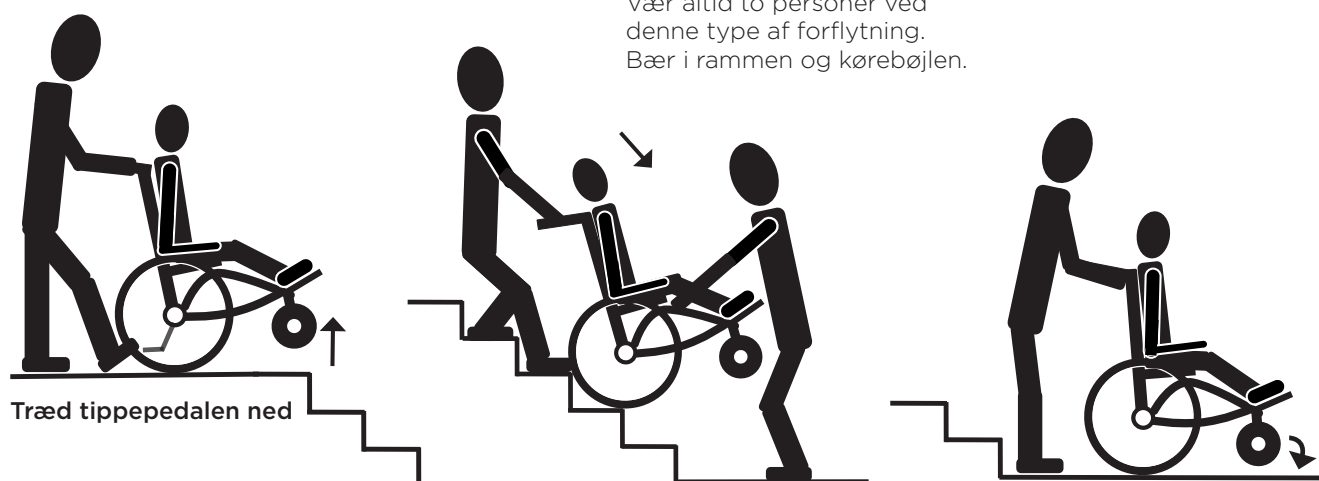

Skrånende underlag

- Tænk over den øgede risiko for at vælte ved brug på skrå overflader. Slip aldrig kørebøjlen ved transport på skrå overflader. Kontroller, at kørestolsstellet er stabilt, og at bremserne er aktiveret ved parkering.



Aktiver altid ev. anti-tipstøtte når forflytningen er fuldført! Sørg for, at hæve- og sænkehåndtagene er strammet. Gå aldrig på en rulletrappe, selvom der er hjælp at hente!

Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner

Dette produkt er et medicinsk teknisk hjælpemiddel beregnet til flergangsbrug. For at hjælpemidlet kan fungere sikkert og for at nå den anslåede levetid, er tilsyn, vedligeholdelse og rengøring derfor vigtigt. Ved udskiftning af dele i forbindelse med vedligeholdelse og service skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic SITT.

Definitioner: Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

- Med **afhjælpende vedligeholdelse** menes foranstaltninger til reparation af et ødelagt produkt, en akut vedligeholdelse, svær at planlægge i tide og ofte afhængig af brugen af produktet.
- **Service** henviser til et enklere eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter fx kontrol af skruer og befæstelser, bevægelige dele, generel slitage mv samt mindre reparationer.
- Med **forebyggende vedligeholdelse** henvises til handlinger forårsaget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne form for vedligeholdelse kan ses som handlinger af engangskaraktér, der er planlagt i forhold til tid, type og omfang. For dette produkt kræves ingen forebyggende vedligeholdelse i produktets forventede levetid.

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt fingerskruer.
- Kontroller at sædet er sat ordentligt fast på kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip-støtter
- Kontroller bremsernes funktion.
- Kontroller hjulenes stand og at de sidder fast.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. vedrørende mobilitet og aflåsning

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

Vedligeholdelse

Rengøringsbehovet varierer og skal vurderes fra sag til sag og i forhold til produktets brug, men mindst en gang om ugen anbefales. Rengør produktet med en svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende stoffer eller opløsningsmidler.

Service og afhjælpende vedligeholdelse

Service udføres primært for at forlænge produktets levetid og for at kontrollere, om der er behov for afhjælpende vedligeholdelse. Behovet for inspektion/service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst én gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af ødelagte, slidte eller revnede dele må der kun anvendes originale dele fra Anatomic Sitt, så produktet bevarer sin CE-mærkning. Reservedele kan bestilles i henhold til den separate reservedelsliste/eksploderede visning for det pågældende produkt.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift.

For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller at eventuelle anti-tip støtter fungerer.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Funktionstest og smør alle bevægelige dele som led, vajre, hjul, vingeskruer mm. Anvend olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray etc).
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, siddestilling, højdejustering, mm. Både ifht. justeringsmuligheder, bevægelighed samt låsning.
- Kontroller at gaspatronerne låser i valgt leje.
- Kontroller at ledningerne er korrekt placeret og korrekt justeret.
- Kontroller hjulenes funktion: Kontroller at alle hjul sidder fast og står fast på underlaget. Kontroller at stolen ruller tilfredsstillende.
- Kontroller evt. slitage på alle led, taggedede led og beslag. Sørg for, at de låser, som de skal.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Tillæg for E-drive

- Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monterede og i et stik, der virker.
- Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugervejledningen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen.

For information om produktet og deres funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. For information om produktets livslængde se afsnittet, "Begrænsninger" i brugervejledningen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør produktet med svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklave ved 65 ° C i maksimalt 10 minutter. Ved rengøring af kørestolsstellet i vaskekabinet skal det stå fikseret og placeret opret med låste hjul.

Tørring

Kørestolsstellet kan tørres i kabinet i max 65°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved renovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugervejledningen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE-mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Funktionstest og smør alle bevægelige dele såsom samlinger, ledninger, hjul, knopper osv. Brug den relevante olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, Teflonspray osv.). Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme. Sørg for, at brugervejledningen og alle originale etiketter følger med den nye bevilning.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Maling

For at forhindre korrosionsskader eller forbedre ridser kan maling bestilles fra Anatomic Sitt.

Artikelnummer: 387299, maling kørestolsstel G2, matsort.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller samtlige funktioner på produktet.
- ☐ Kontroller at hjælpemidlet ikke er skævt og at det stadig står med alle hjul mod underlaget.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusteret

Kørestolsstel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller at tiltfunktionen virker og at gaspatronen låser i valgte leje.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusterede.
- ☐ Kontroller at eventuel løftegaspatron fungerer som den skal.
- ☐ Kontroller at kørebøjle's justeringsmuligheder og led fungerer og at polstringen er hel.

Hjul/Bremser:

- ☐ Kontroller at skruer til hjulene er ordentligt spændte.
- ☐ Kontroller at svinghjulet snurrer uhindret og at lejerne ikke sidder fast.
- ☐ Kontroller at quick-release akslen låser korrekt.
- ☐ Kontroller at bremsekablerne er uskadede, korrekt placeret og korrekt indjusteret.
- ☐ Kontroller bremsefunktionen på samtlige hjul.
- ☐ Kontroller at kørestolsstellet ruller let og lige.
- ☐ Kontroller eventuelt dæktryk og mønster på dækket.
- ☐ Kontroller eventuelle drivringe/egerbeskyttere efter grader og skarpe kanter.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlæns justeringer ifht højde, dybde og bredde.

Anti-tipstøtte:

- ☐ Kontroller vinkel/vridfunktion.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Elektriske funktioner:

- ☐ Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monteret og i god stand.
- ☐ Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- ☐ Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugervejledningen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Batteri og gaspatron sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Garantien gælder generelt i et (1) år mod fabrikationsfejl fra leveringsdatoen eller i henhold til aftale. Garantien dækker ikke udefrakommende påvirkninger eller unormal håndtering. For at garantibehandlingen kan finde sted, skal den defekte vare returneres. Vedlæg altid følgesedlen.

For bedst at kunne vurdere reklamationen skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen og årsagen så grundigt som muligt. Anmod om garantireparation eller eventuel garantiombytning. Vedlæg en kopi af fakturaen, og angiv, at produktet skal returneres til dig efter reparation. Angiv leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamationsformularen kan downloades fra vores hjemmeside.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produktet.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Symbolfortegnelse

Nye crashtest-klistermærker s. 5

Transport i køretøj

Nye crashtest-klistermærker s. 45

Revisionsfortegnelse

ver. 2.0 - 2020-02-04

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-12-21

ver. 2.3 - 2023-02-20

ver. 2.4 - 2023-05-05

ver. 2.5 - 2023-11-29

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

www.instagram.com/anatomicsitt

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

