



Zitzi
Sharky Pro



Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,
service, vedligeholdelse og renovering



Denne vejledning refererer til Zitzi Sharky Pro siddesystem med tilbehør. For en komplet oversigt over produktets tilbehør, se produktets bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent	3	Hoftebælte	34
Specialtilpasning	3	Ankelbespænding	35
Introduktion	4	Armlæn fra sits	36
Indledning	4	Armlæn fra ryg, fast	38
Korrespondance - mærkning	4	Armlæn fra ryg, vipbart	40
CE-mærkning - klassificering	4	Albuestop	42
Overensstemmelseserklæring	4	Håndbøjle	43
Tilsigtede formål	4	Bord, fast	44
Symbolliste	5	Bord, vipbart	45
Produktmærkning	6	Bord, forstærket monteringsbeslag	46
Sikkerhedsinstruktioner	7	Støttebord	47
Uddannelse og kvalifikationer	7	Fodstøtte	48
Advarsler og forholdsregler	8	Hel fodstøtte	49
Kontrol før brug	9	Fodstøttebeslag	50
Begrænsninger	9	Fodkasse dobbeltstang	52
Andre risici	10	Lægstøtte	54
Godkendte kombinationer	10	Kørebøjle	56
Afviigelser/tilbud	10	Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe ...	57
Tekniske data/ydeevne	11	Varmepakke	58
Tilpasning og specialtilpasning	13	Resumé og opfølgning	59
Monterings- og justeringsinstruktioner	14	Transport i køretøj	60
Montering af siddesystem	15	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner	61
Adaptersystem universal	16	Kontrol før brug	61
Fast montering	17	Service og vedligeholdelse	62
Plansæde	18	Renovering	63
Sædedel	20	Affaldssortering	66
Oversigt over rygindstillinger	24	Garanti og retur	66
Lås- och stilbar flexfunktion	25	Revision	67
Kropsstøtte	26		
Bækkenstøtte	28		
Hoftestøtte	29		
Hovedstøtte	30		
Positioneringsseler	32		

Producent

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf	86 17 01 74
E-mail	a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web	anatomicsitt.dk

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke.



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at kunne udnytte Zitzi Delfi Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk.

Kort om produktet

Zitzi Sharky er et modulopbygget dynamisk siddesystem til unge og voksne med siddeproblematikker. Siddesystemet er beregnet til at blive brugt sammen med kørestolsstel fra Anatomic SITT. Zitzi Sharky kan bruges flere gange.

Symbolliste

 Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.	 Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
  Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.	 Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
 Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.	 Angiver producentens referencenummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk. www.anatomicsitt.com	 Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
 Angiver at brugervejledningen skal læses for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information om f.eks. advarsler som ikke findes på produktets medicintekniske etiket.	 Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
 Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato.	 Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
 Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.	

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt

MD	Zitzi Sharky Pro stl. 2 (utan rygg) std.	Produkt navn
	<i>Sharky Pro size2 (without back), std.</i>	
REF	153006	2023-11-15
SN	53460	
		Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)
7 322471 530064	Maxlast 130 kg	Max belastningsvægt
	Anatomic Sitt i Norrköping AB	
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	www.anatomicsitt.com	
UDI	(UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322471530064(21)53460	UDI= GS1-128

Etiket på tilbehør

MD	Bord vikbart transparent kpl. stl. 4 (st) - Zitzi	Produkt navn
	<i>Table, turn-up, size 4 - Zitzi</i>	
REF	153075	2023-11-14
LOT	FM713127	
		Stregkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
7 322471 530750		
	Anatomic Sitt i Norrköping AB	
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	UDI-bærer: QR-kode (GS1-128)
	www.anatomicsitt.com	
UDI	(UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322471530750(10)FM713127	UDI= GS1-128

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslutninger om tilpasning / særlig tilpasning skal træffes af kvalificeret fagpersonale og udføres af fagpersonale (teknikere på et hjælpemiddelcenter eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Den person, der bevilger hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare nærmiljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle monterings-skruer og møtrikker kontrolleres og spændes.



Sørg altid for, at sædet er fastgjort til kørestolsstellet før borgeren placeres i siddesystemet! Et bælte leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra rygprofilen af sædet og omkring chassissets kørebøjle. Dette bælte skal altid bruges sammen med adaptersystemet universal, og når det transporteres i et køretøj. Sørg for, at denne rem er stabil og stram.



Brug aldrig fodpladen, til ind- og udstigning af hjælpemidlet.



Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnit "Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning".



Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.



Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet.



Udfør aldrig service mens produktet anvendes.



Efterlad aldrig brugeren uden opsyn, når hjælpemidlet anvendes.



Udfør altid kontrol efter brug for at registrere rødme eller trykmærker på brugeren.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling for bevægelse og låsning.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxvægt

Den højste belastningsvægt er 130 kg og gælder for samtlige størrelser.

Med belastningsvægt menes den maksimale vægt som siddesystemet må udsættes for inkl. bruger og evt. anden vægt. Max belastningsvægt for transport i køretøj er 75 kg.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned. Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør.

Godkendte kombinationer

For at produktet kan bevare sin CE -mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S. Se produktets bestillingsgrundlag for muligt tilbehør og reservedelsliste.

Produktet kan dog udstyres med CE-mærkede bælter/seler og hovedstøtter/nakkestøtter fra en anden leverandør, samtidig med at CE-mærkningen bevares, hvis følgende punkter er opfyldt:

Det skal tydeligt fremgå af tredjepartens dokumentation, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartens produkt er beregnet til brug på manuelle kørestole eller modulære siddesystemer, og at tredjeparten godkender brugen på andres siddesystemer).

At sædesystemets originale fastgørelsespunkter anvendes, og at bælter/seler og hovedstøtter/nakkestøtter er fastgjort til de beslag, der er beregnet til dette sædesystem fra Anatomic Sitt AB. Beslagene skal passe til det relevante tredjepartsprodukt. Der må ikke foretages ændringer/tilpasninger af nogen af produkterne for at muliggøre kombinationen.

Monteringsvejledninger for nakkestøtter og seler/seler fra Anatomic Sitt AB skal følges og kan findes under afsnittet Monterings- og justeringsvejledninger senere i denne dokumentation. Der må derfor ikke monteres andre produkter eller tilbehør på tredjepartsproduktet.

Bemærk, at der altid bør udføres en risikovurdering, når produkter fra forskellige leverandører kombineres. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i dets nærhed.


Afvigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed. Produktet skal endvidere sendes til Anatomic Sitt i sin nuværende stand til yderligere undersøgelse.

Tekniske data / Yderevne

Sharky Pro

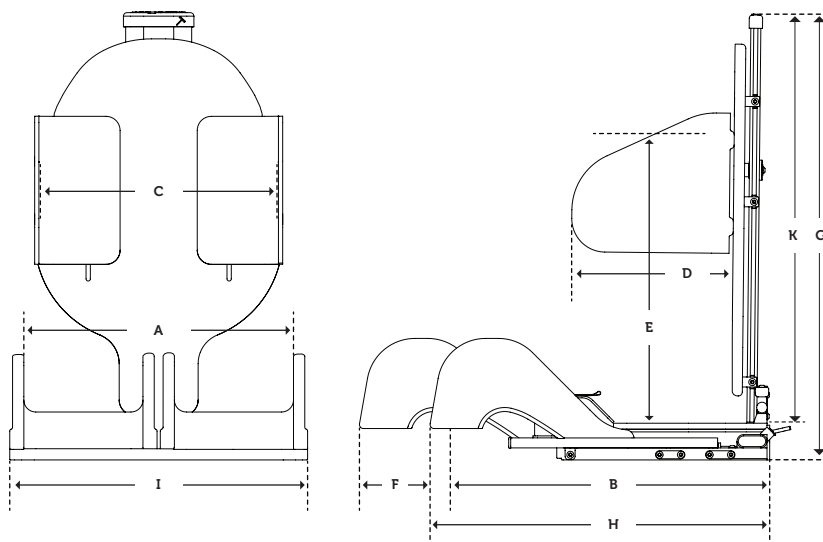


BRUGERDATA

	Størrelse 1	Størrelse 2
Brugerslængde	150- 180 cm	170- 195 cm
Brugervægt max	130 kg*	130 kg*
Sædebredde (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 50 cm
Sædedybde (B)	36- 47 cm	45- 55 cm
Kropsbredde (C)	27- 35 cm	30- 38 cm
Kropsdybde (D)	21 cm	25 cm
Axilhøjde (E)	35- 50 cm	40- 55 cm
Benlængdeforskel (F)	10 cm	10 cm
Abduktion/Adduktion	18° / 9°	18° / 9°
Højde (G)	72 cm	77 cm
Længde (H)	52- 62 cm	62- 72 cm
Bredde (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Vægt	14 kg	15 kg
Ryginkel	-10° / +30°	-10° / +30°
Rygplade bredde x højde	35 x 54 cm	36 x 60 cm
Rygprofil længde (K)	67 cm	72 cm


* Crashtestet og godkendt gælder brugervægt op til 75 kg.

HOFTESTØTTE str. 3

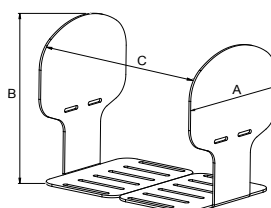

Størrelse: A x B = 18 x 21 cm

Bredde-justering C


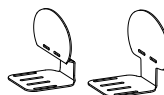


Hoftestøtte: Std. Lige

Sharky 1 (SB=36)	22-32	32-39
Sharky 1 (SB=39)	25-35	35-42
Sharky 1 (SB=42)	28-38	38-45
Sharky 2 (SB=43)	26-32	36-39
Sharky 2 (SB=46)	29-35	39-42
Sharky 2 (SB=50)	32-38	42-45

(SB=sædebredde, Alle mål i cm)

FODSTØTTE

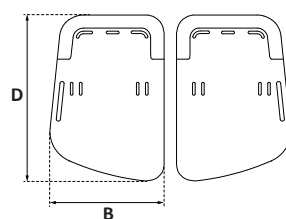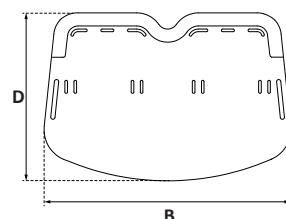


B x D

Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm

Fodstøtte størrelse	3	4
Fodstøttesstags profilslængde (cm)	35	40


BORD

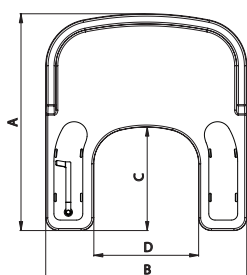

Bord	A	B	C	D
Str. 3	570	570	280	340 mm
Str. 4	660	600	320	385 mm
Str. 5	660	650	320	435 mm


Støttebord	A	B	C	D
Str. 3	490	580	300	340 mm
Str. 4	540	640	330	380 mm
Str. 5	620	740	380	440 mm

STØTTEBORD

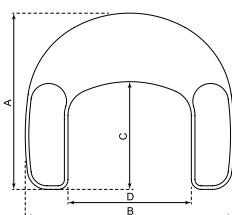

FODKASSE

Fodkasse str.3
passer str. 3
fodstøtte osv.

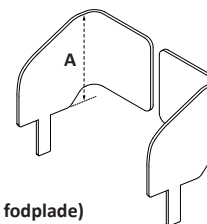


A (højde fra fodplade)

str. 3	210 mm
str. 4	240 mm

JUSTERBAR RYG

Alle mål er opmålt med polstring

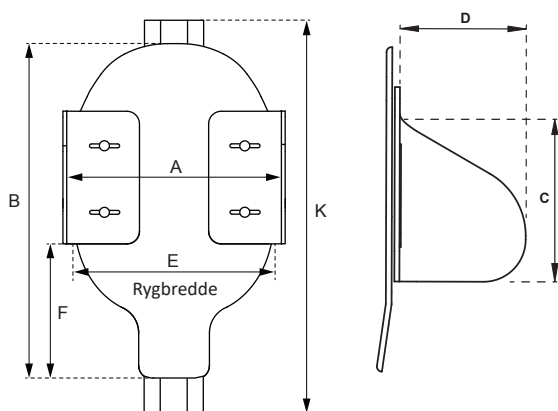

RYG mål i cm

	B x E
Ryg str. 1	54 x 35 cm
Ryg str. 2	60 x 36 cm

KROPSSTØTTE mål i cm

	C x D
str. 3 (Delfi)	21 x 18 cm
str. 1 (Sharky)	22 x 25 cm
str. 2 (Sharky)	30 x 29 cm

KROPSSTØTTE

Breddejustering (A) cm inkl. polstring


Højdejustering (F) cm inkl. polstring

Kropsstøtte	Ryg 1	Ryg 2	Ryg 1	Ryg 2
Str. 3 (Delfi)	21 - 30	21 - 30	13 - 20	16 - 23
Str. 1 (Sharky)	27 - 35	27 - 35	14 - 21	17 - 24
Str. 2 (Sharky)	30 - 38	30 - 38	12 - 18	15 - 22

Grå felter er standardkonfiguration


	str. 1	str. 2
Rygprofilens længde (K):	67	72 cm

ARMLÆN FRA SÆDE

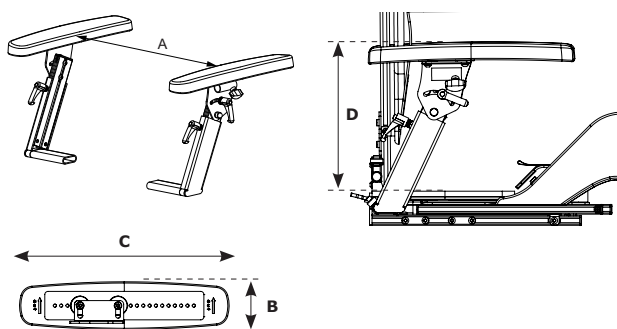

Mål	A	B	C	D
	350-460	75	330	190-280 mm

ARMLÆN FRA RYG

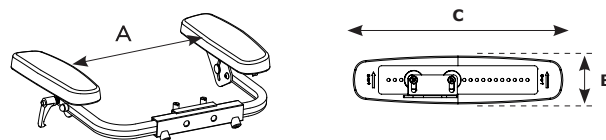


Mål std	A	B	C
Str. 1-2	350 - 470 mm	75 mm	330 mm
Mål vipbart	A	B	C
Str. 1-2	380 - 500 mm	75 mm	330 mm


HÅNDBØJLE

	A
Str. 3	425 mm
Str. 4	480 mm
Str. 5	520 mm


Mål mellem rørcentrum

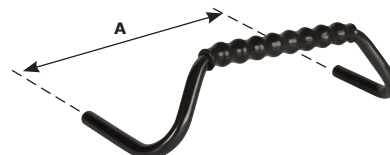

HOVEDSTØTTE

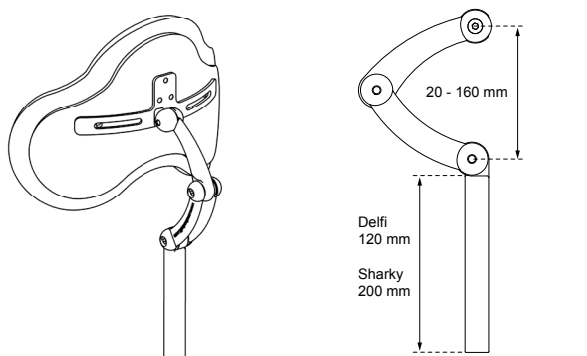


Hovedstøtte	A x B
str. 1	220 x 150 mm
str. 1 lang	280 x 160 mm
str. 2	240 x 190 mm
str. 2 lang	280 x 210 mm

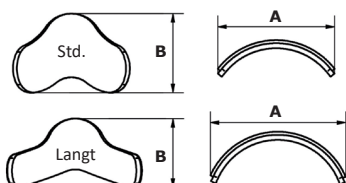


BÆKKENSTØTTE

	A x B
Str. 1-2	200 x 120 mm

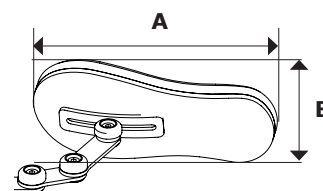

BÆLTESBESLAG

Anbefalingstabel

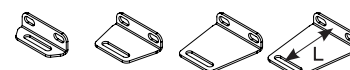

Vare nr.	371925	371926	371927	371928
Længde L	10 mm	30 mm	50 mm	60 mm
Position	Bag	Frem	Bag	Frem
Sharky 1	X		X	
Sharky 2	X		X	

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Længden af fodstøtteprofilen kan forkortes, så den passer bedre til brugeren.

Ryglænsprofilens længde kan forkortes. Profilen må aldrig være kortere, end at alle beslag til bagpladen kan monteres på.

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsanvisninger

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

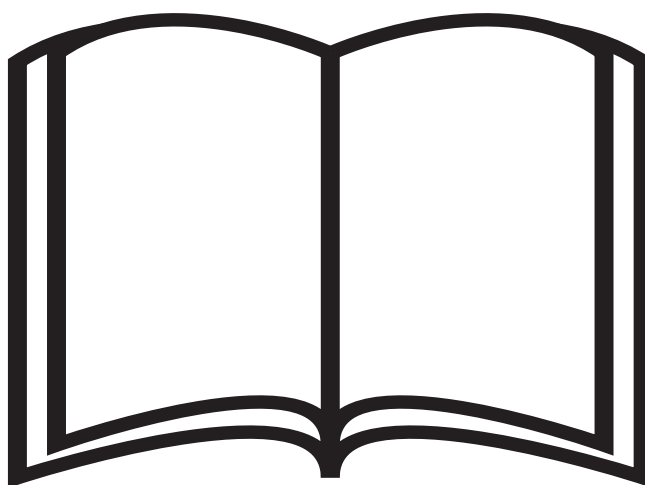

Værktøj

Værktøjsnøglen, som du skal bruge til at foretage justeringer, er integreret øverst på rygprofilen som du finder på bagsiden af stolen.
(4 mm unbrakonøgle)





Montering af siddesystem

Montering på kørestolssæl

Der er forskellige måder at montere siddesystemet på et kørestolsstel.

De forskellige muligheder forklares nedenfor. Vælg den måde, der passer dig bedst.

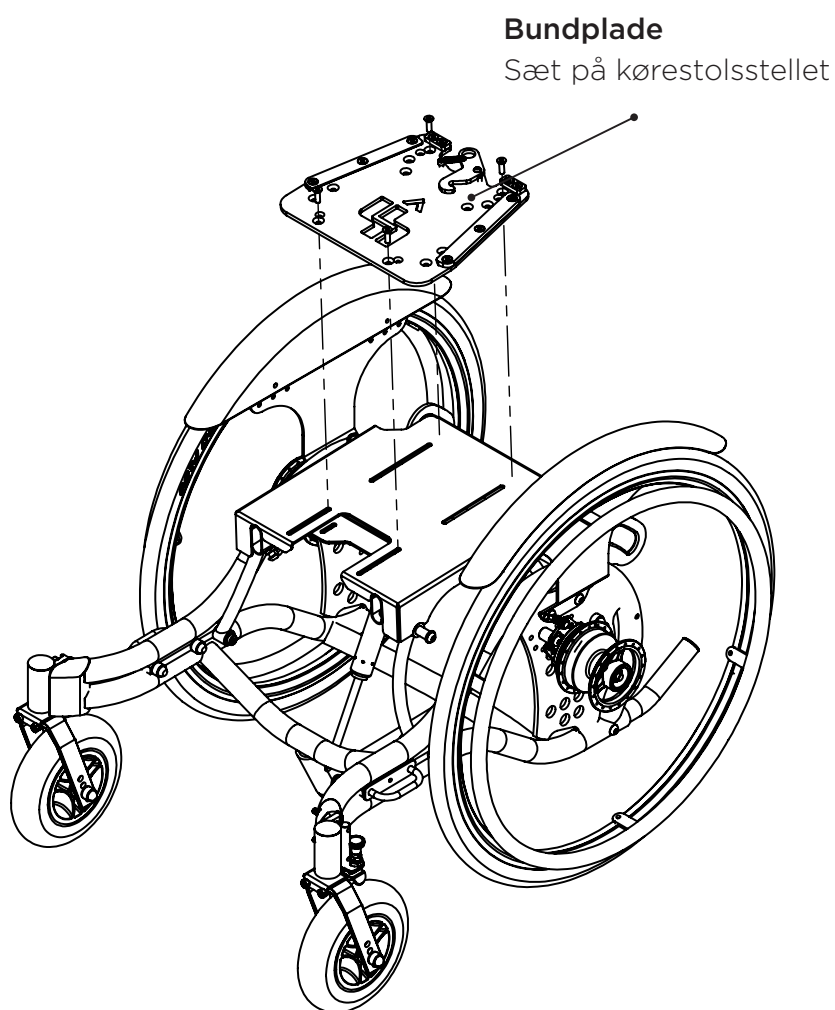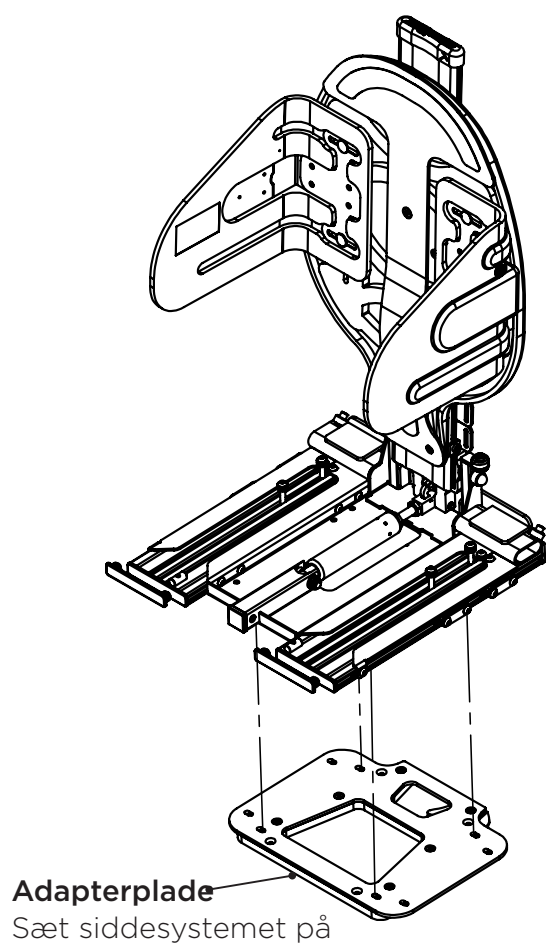


Adaptersystem

Montering med adaptersystem

Begynd med at montere bundpladen (A) på en kørestolsramme ved at skrue den fast med de medfølgende skruer, skiver og møtrikker (B).

Monter derefter adapterpladen (C) ved at skubbe profilskrue (D) ind i rillerne på undersiden af siddesystemet. Spænd skrue (E), når den ønskede position er nået.

Når adapterpladen og bundpladen er monteret på sædesystemet og kørestolsrammen, kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt fastgjort, når der høres en kliklyd.

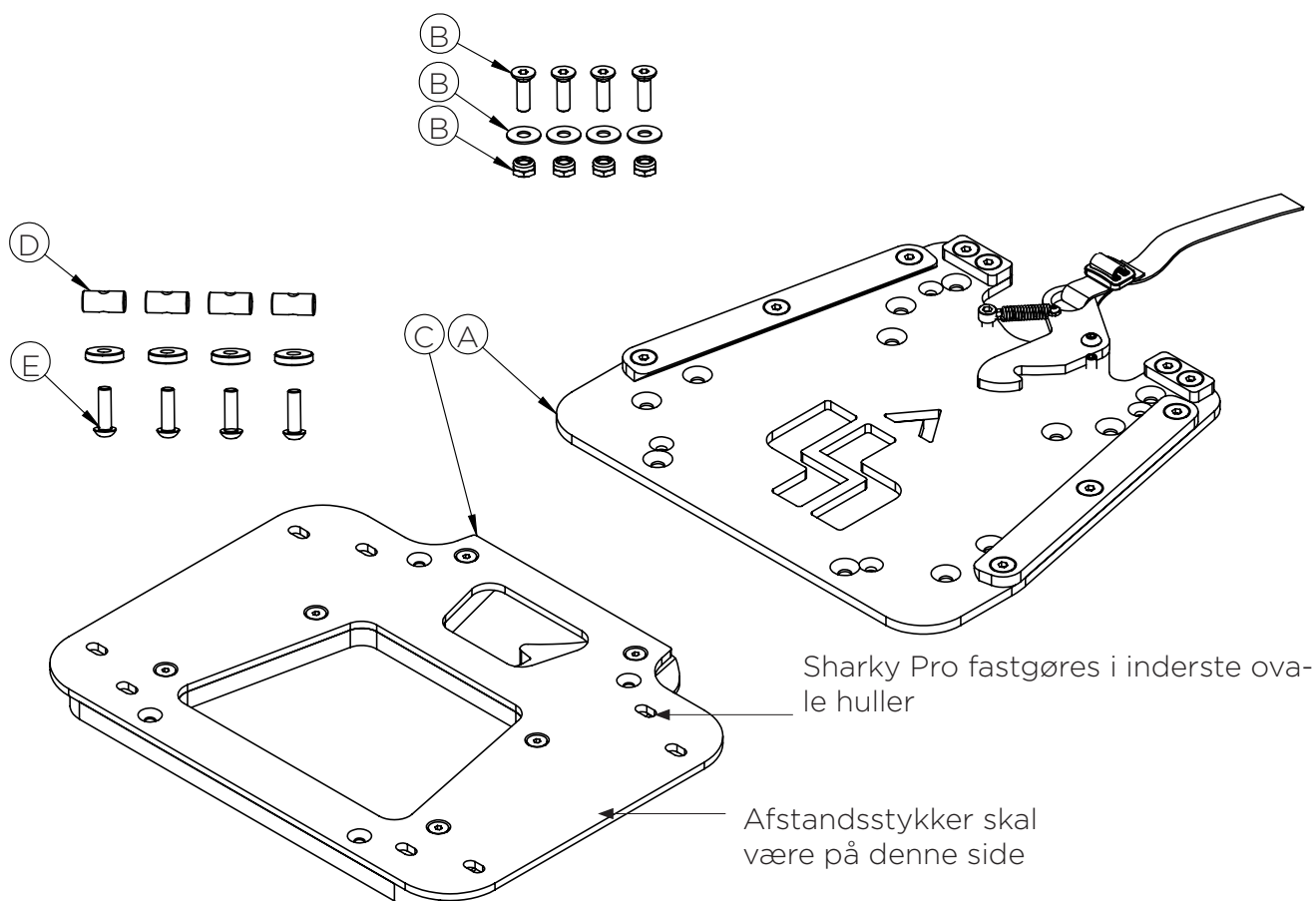

Sørg for, at siddesystemet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen før brug.



Ved brug af Adaptersystem Pro (153047) skal sikkerhedsremmen på siddesystemets bagside bruges og spændes rundet om kørebøjlen eller tilsvarende på kørestolstellet (se billede). Sørg at båndet sidder godt fast og ikke kan glide af.




Fast montering


Fast montering indebærer, at man fastgør siddesystemet direkte på kørestolsstellet. Montering med denne metode skal ske med medfølgende monteringsats, bestående af 4 stk. skruer (M6x16), skiver og møtrikker.

I bunden af siddesystemet er der to forskellige huller til fastmontering på chassiset.

Vælg det hulmønster, der er bedst egnet til en montering med god balance.

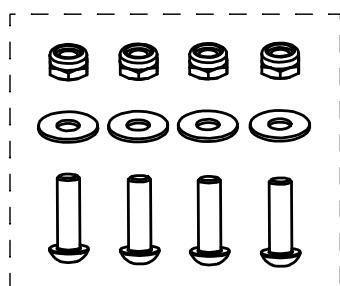

Monteringsats

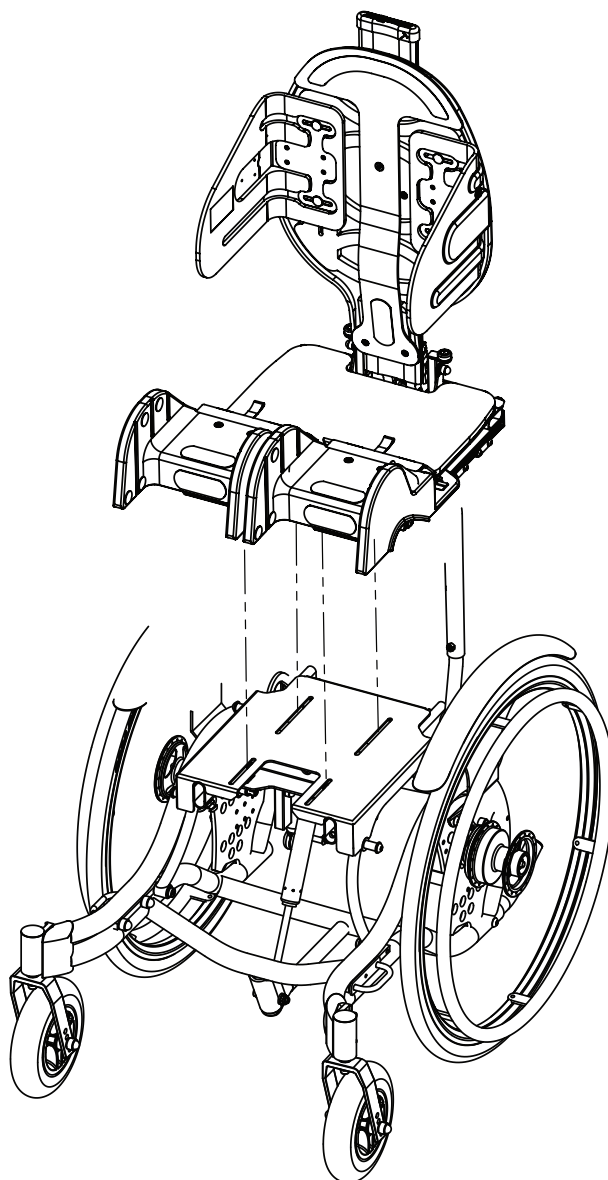

Anvend aldrig andre skruer end dem, der medfølger. Disse er de retmæssige i forhold til sikkerhed. Hvis der ønskes andre dimensioner, skal du kontakte Anatomic Sitt A/S.



Inden siddesystemet monteres på chassiet, skal det plane sæde afmonteres.

Plansæde

Montering af plansæde

Montering af plansæde betyder, at du udskifter sædet med et plansæde. Montering med denne metode skal udføres med det medfølgende monteringsæt som beskrevet nedenfor.


Fjern endehætterne (I) fra profilerne, og indsæt kantstifterne (A) i profilens ydre rille, og fastgør skruerne (B) i dem gennem hullerne (C) i den flade sædeskive. Spænd ikke skruerne (B) helt.

Sæt de længere skruer (D) med skiverne (E) gennem de bagerste huller (G) i profilen. Mød derefter på den modsatte side skruerne med kantstifterne (H). Spænd ikke skruerne (D) helt.

Skub derefter den flade sædeskive ind i sædebunden i not 2 til den ønskede position, og stram skruerne (B) og (D). Sæt derefter endehætterne (I) tilbage i profilerne.




Anvend aldrig andre skruer end dem der medfølger. Disse er de retmæssige i forhold til sikkerhed. Hvis der ønskes andre dimensioner, skal du kontakte Anatomic Sitt A/S.

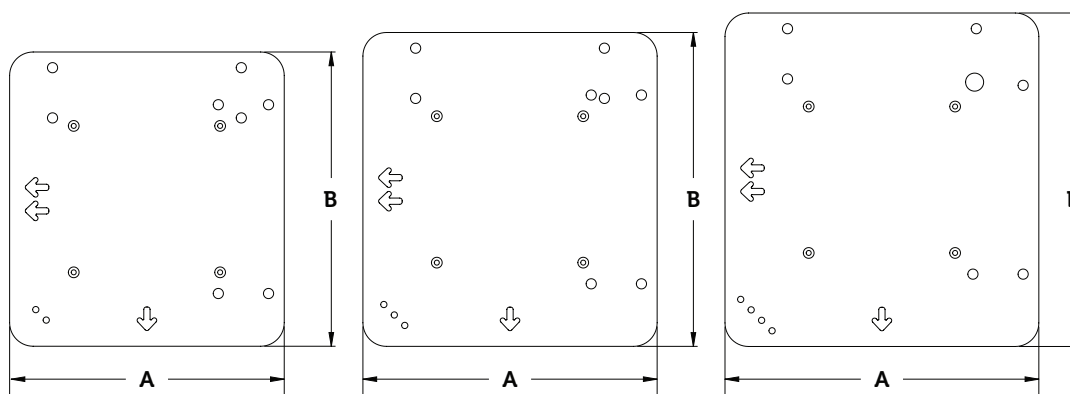

Plansæde
Artnr. 153190
(AxB)
350 x 375 mm

Plansæde
Artnr. 153191
(AxB)
375 x 400 mm

Plansæde
Artnr. 153192
(AxB)
400 x 425 mm

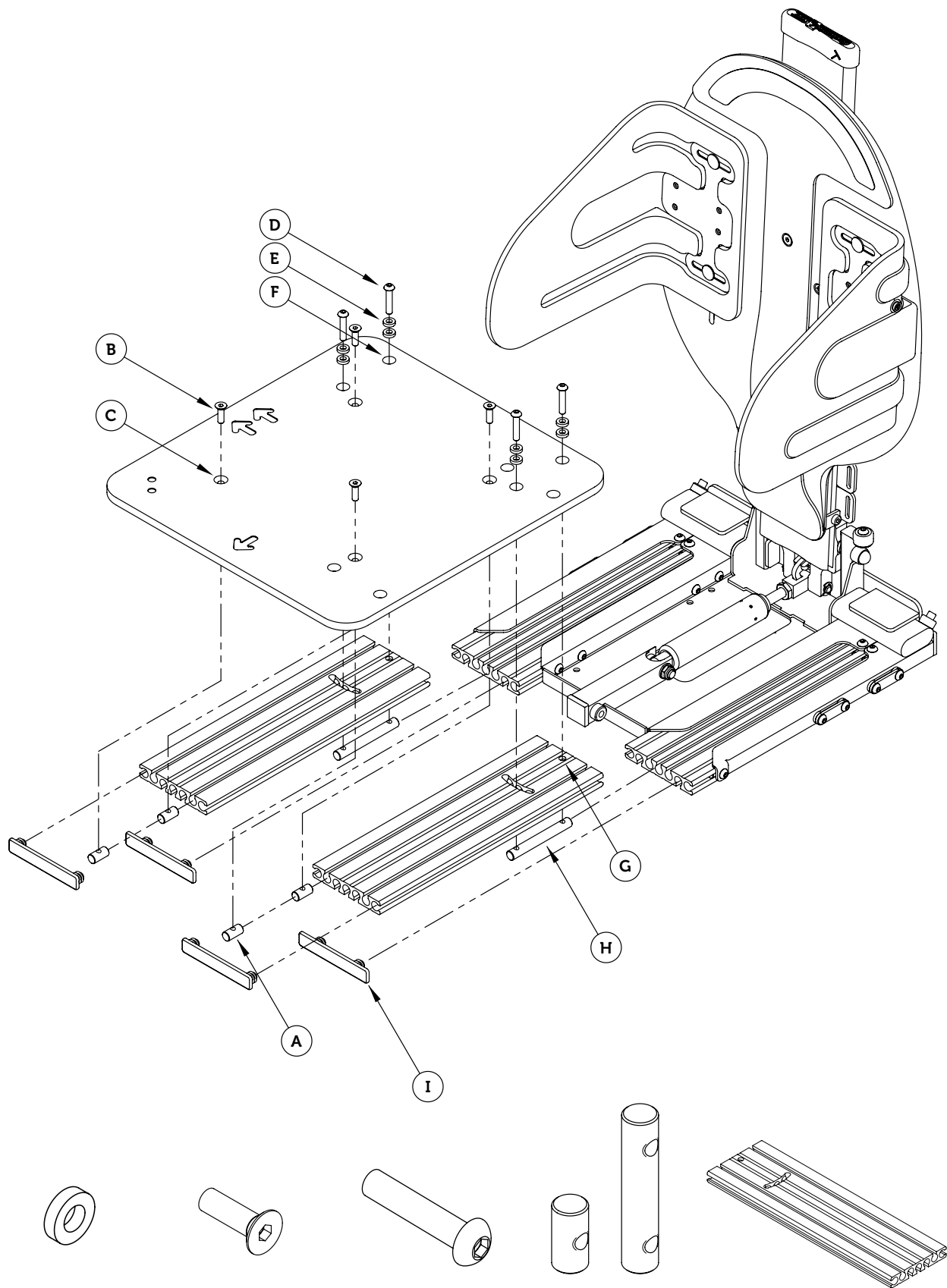

M6x3 spændeskive 8 stk.
M6x16 forsenket 4 stk.

M6x35 skrue 4 stk.

profilmøtrikker 4 stk./ 2 stk.

profiler 2 stk.

Sædedel

Justering af sædedel

Sædedybde, benlængde forskel og abduktion/adduktion af bendelene kan nemt justeres. Fjern betrækket og den bagerste del af sædedelen (sædedelspladen) (A) for at kunne komme ordentligt til justeringsskruerne (B).





Du skal ikke skrue skruerne helt ud, for at justere bendelene. Det er nok at løsne dem.

Sædebreddejustering

For at øge eller reducere sædets bredde, skal placeringen af bendelene på profilen ændres. For at fjerne bendelen fra sædedelens profil, skal du først fjerne endehætten, som er placeret ved forkanten af sædepartiets profil. Løsn derefter skruen (B) på bensektionen ved hjælp af justeringsnøglen. Når du har løsnet skruen (B) en smule, skal du trække hele bendelen ud af sædepartiets profil og derefter flytte den til den ønskede rille.

For maksimal siddebredde skal profilmøtrikken indstilles i rille 3, og for minimumsbredde indstilles profilmøtrikken i rille 1. Benpartierne leveres forudindstillet i rille 1.

Spænd skruen (B), når du har nået den ønskede position. Den bagerste skrue på bendelen kan i nogle tilfælde skal løsnes lidt (C).

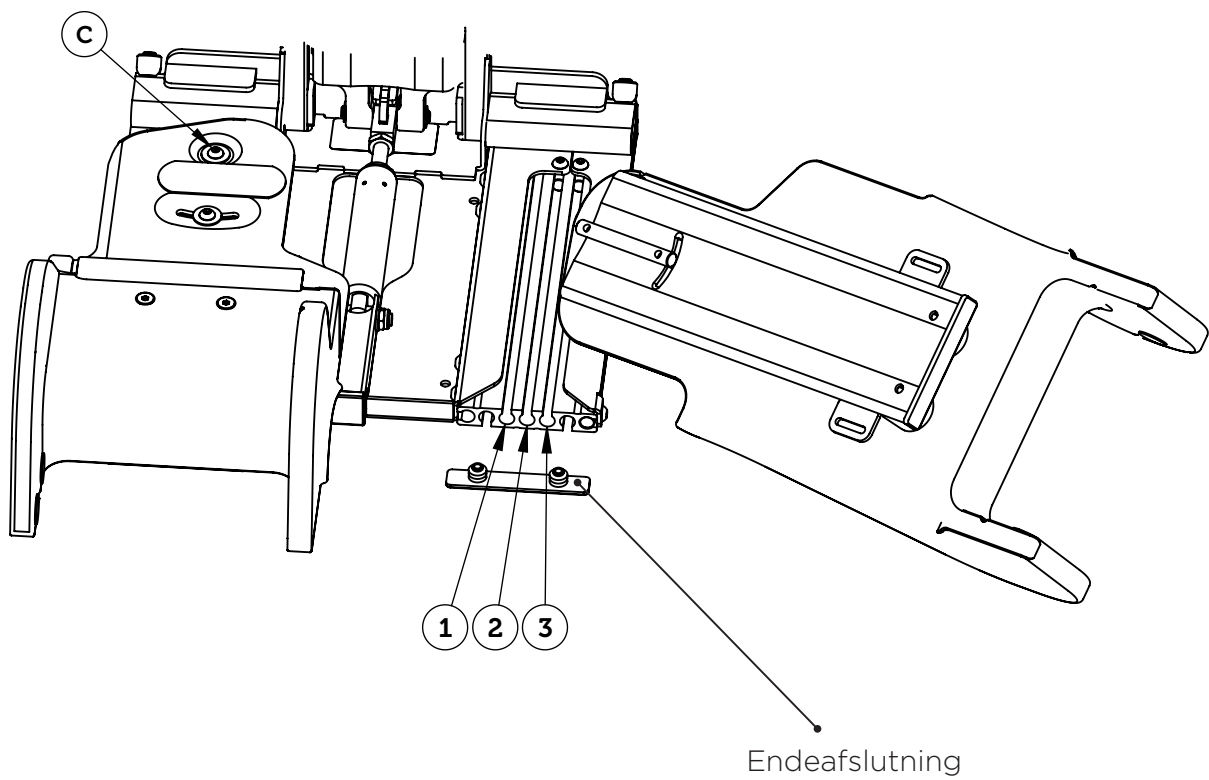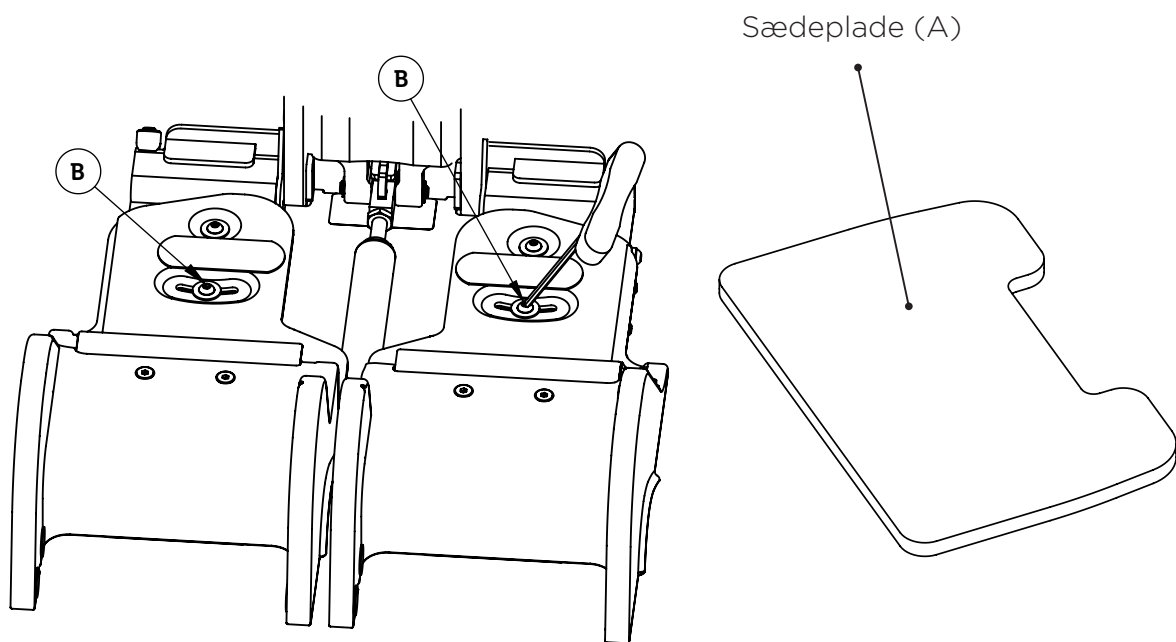

Benlængdeforskel

For at ændre benlængden, løsnes skruen (A) på bendelen ved hjælp af justeringsnøglen og derefter justeres bendelen til den ønskede benlængde. Spænd derefter skruen (A) igen.



Sørg for at sædets forreste del uden ikke justeres udenfor det godkendte justeringsområde ifølge måklistermærket (B). Fræset rille (C) markerer maksimal justering (se billede).

Sædebrøndjustering

Ved justering af sædedybden skal sædebrøndjusteringen også følge med. Løsn bendelens forreste skruer (D) ved hjælp af justeringsnøglen og juster sædebrønden til ønskede position. Spænd derefter skrue(r)ne (D).



For at få en god startposition ved justering af sædedybden kan farveskalaen på sædebunden og dybdejusteringspladen (E) bruges som hjælp.


Hvis sædedybden justeres til f.eks. 43 cm (gråt felt), bør sædebrøndens justering også skubbes ud til et gråt felt, så vil størrelsen på sædebrønden være korrekt og der opnås en så korrekt siddeposition som muligt. Finjuster altid indstillingerne i henhold til hver brugers forudsætninger.

Abduktion, adduktion og windswept

For at justere bendelene til en af disse positioner, løsnes skruen (A) ved hjælp af justeringsnøglen, og flyt derefter bendelen til den ønskede position. Spænd skruen (A).



Du skal ikke skrue skrue(r)ne helt ud for at justere bendelene. Det er nok at løsne dem lidt.

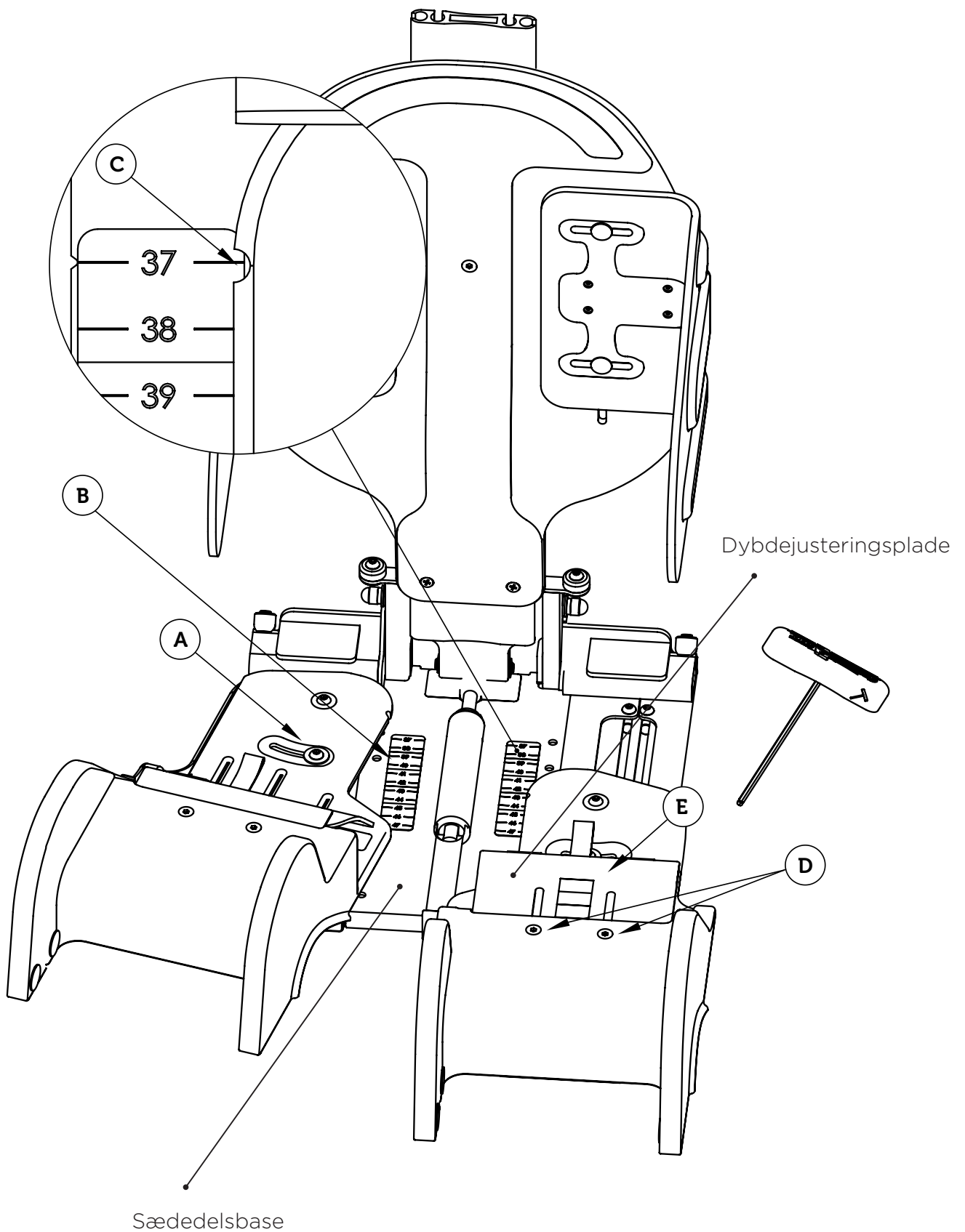

Oversigt over rygindstillinger

Montering af ryg

Ryggen fastgøres ved hjælp af fire (4) skruer (A) og to (2) profilmøtrikker. Monter og sænk bagprofilen på profilmøtrikkerne på aktiveringshuset, og stram de fire (4) skruer (A) med justeringsnøglen.

Ryggen ender automatisk i den korrekte position ved hjælp af stop i rygprofilen.

Justering af ryghøjde

For at justere ryghøjden løsner du skruerne (B) på begge sider af rygprofilen ved hjælp af justeringsnøglen og derefter justerer du til ønskede højde. Når du er tilfreds med indstillingen, stram skruerne (B) igen. Løsn også knappen (E)

Justering af rygvinkel

Placer låsepalen (C) i aktiveringspositionen ved at løfte den op og derefter skubbe den ind på plads.

Tryk ned på palen for at justere ryglænets vinkel. Derefter aktiverer gaspatronen ryggen, så du kan indstille den i den ønskede position. Når du har nået den ønskede vinkel, skal du slippe låsepalen igen, og du bevarer nu din indstillede vinkel.



Hold altid i ryggen, når du aktiverer gaspatronen.

Justering af kropsstøtte

For at bredde- og højdejustere kropsstøtten løsner du fingerskruen (D) og justerer efterfølgende til ønskede højde og bredde. Spænd fingerskruen (D), når du har nået den ønskede position.

Justering af lændestøtte


Løsn fingerskruen (E) og tryk på toppen af lændestøtten, som er placeret bagved rygbetrækket til ønskede lændedybde er opnået. Hold lændestøtten på plads, og stram derefter fingerskruen (E).



Ryghøjden skal muligvis justeres for at lændestøtten er placeret i rette position.




Fjern rygbetrækket for bedre at kunne se lændestøtten under justering.

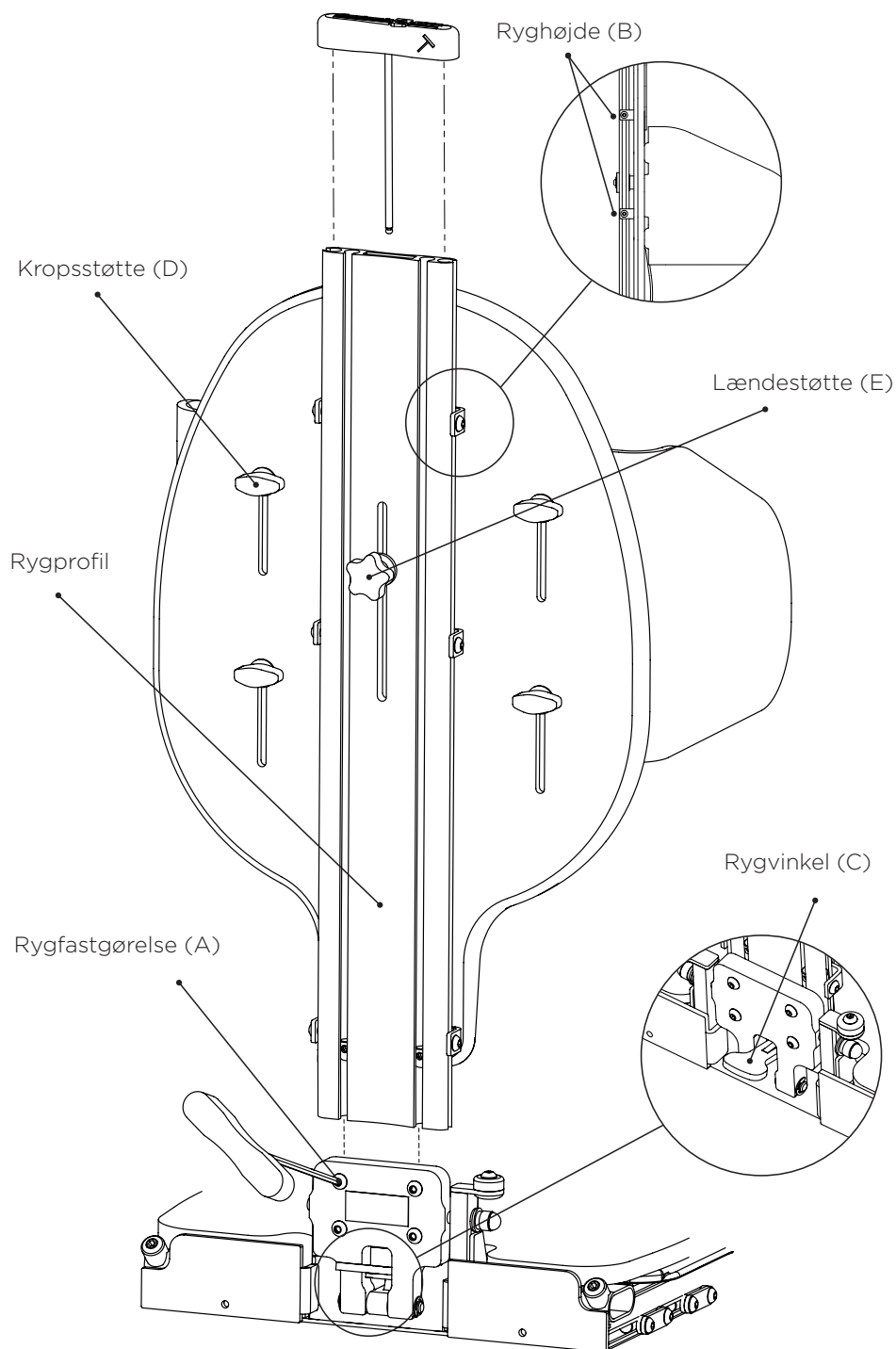

Lås- og justerbar fleksfunktion (på sædeenhed MLD - Sharky+)

Drej knappen med uret (A) for at låse fleksfunktionen bagpå og få den fast.

For at aktivere flexfunktionen, så skruer du knappen mod uret (B). Du kan også indstille, hvor langt ryggen skal bevæge sig, afhængigt af hvor langt knappen er skruet ud.

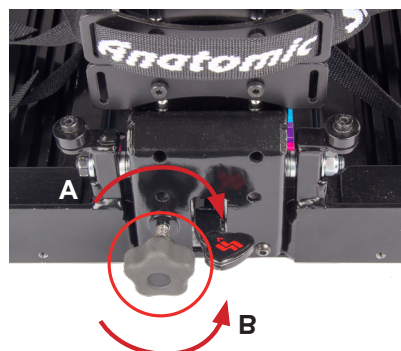

Kropsstøtte

Montering af kropsstøtte

Monter kropsstøtten ved hjælp af bolt (A), skive (B) og fingerskrue (C).


Stik bolt (A), kropsstøttevingen (D) og sporet i rygpladen (E). Mød derefter skiven (B) og fingerskruen (C) på den modsatte side af rygpladen (E).

Alternativ kropsstøtte


Som et alternativ til de faste kropsstøtter er der også vipkelige kropsstøtter, omsluttende kropsstøtter og forstærkede kropsstøtter. Disse samles på samme måde som beskrevet ovenfor.

Vipbare kropsstøtte

Åben den vipbare kropsstøtte ved at trykke på den røde knap.

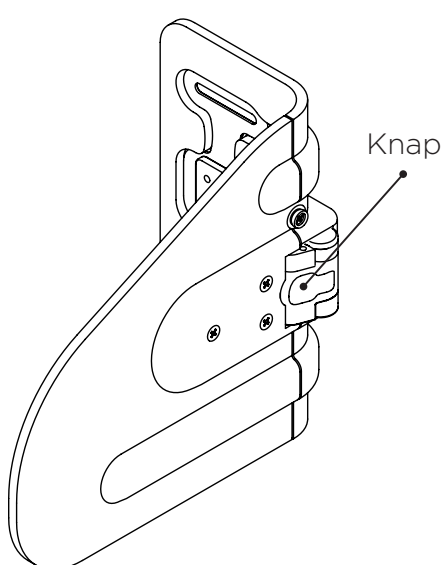

Forstærkningsbeslag


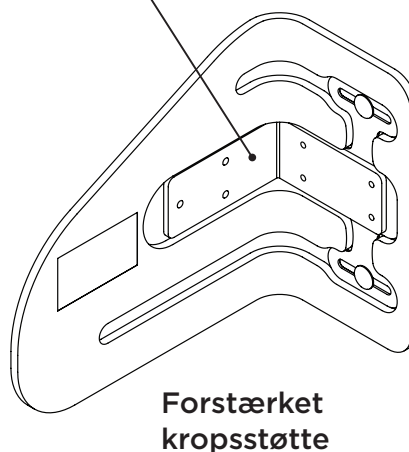


Omsluttende kropsstøtter

Åben de vipbare kropsstøtter ved at trykke på den røde knap.

For at dybdejustere de omsluttende kropsstøtter, så løsner man de fire skruer på siden.



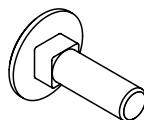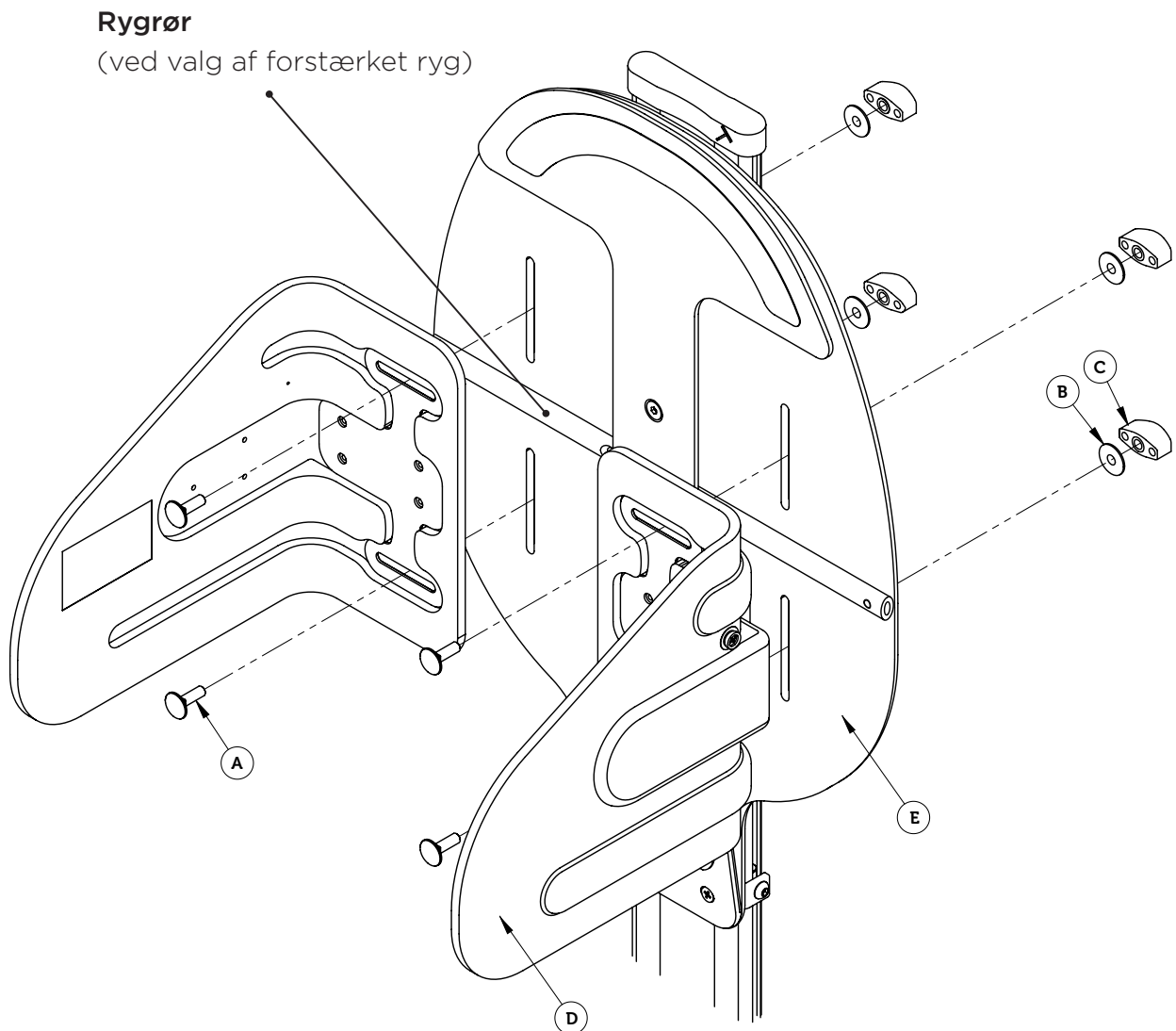

Bolt (A)
4 stk.



Skive (B)
4 stk.



Fingerskrue (C)
4 stk.

Bækkenstøtte

Montering af bækkenstøtte



Inden du kan montere bækkenstøtten skal du fjerne beskyttelseshætten (A).

Skrue skruen ud (B) og fjern herefter kappen.

Monter bækkenstøtten hvor beskyttelseskappen (A) er fastgjort, og fastgør den med skruen (B)

Justering af bækkenstøtte

For at vinkeljustere bækkenstøtten løsner du skrue (B), (C) eller (D) afhængigt af de indstillinger, du vil foretage. For at justere højden på bækkenstøttepladen skrues skrue (E) af og flyt pladen til den ønskede position. Spænd derefter skrue (E) igen.

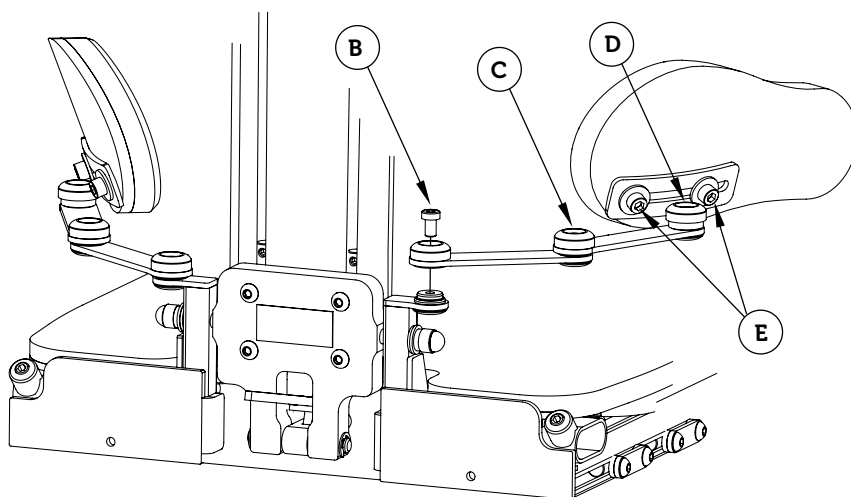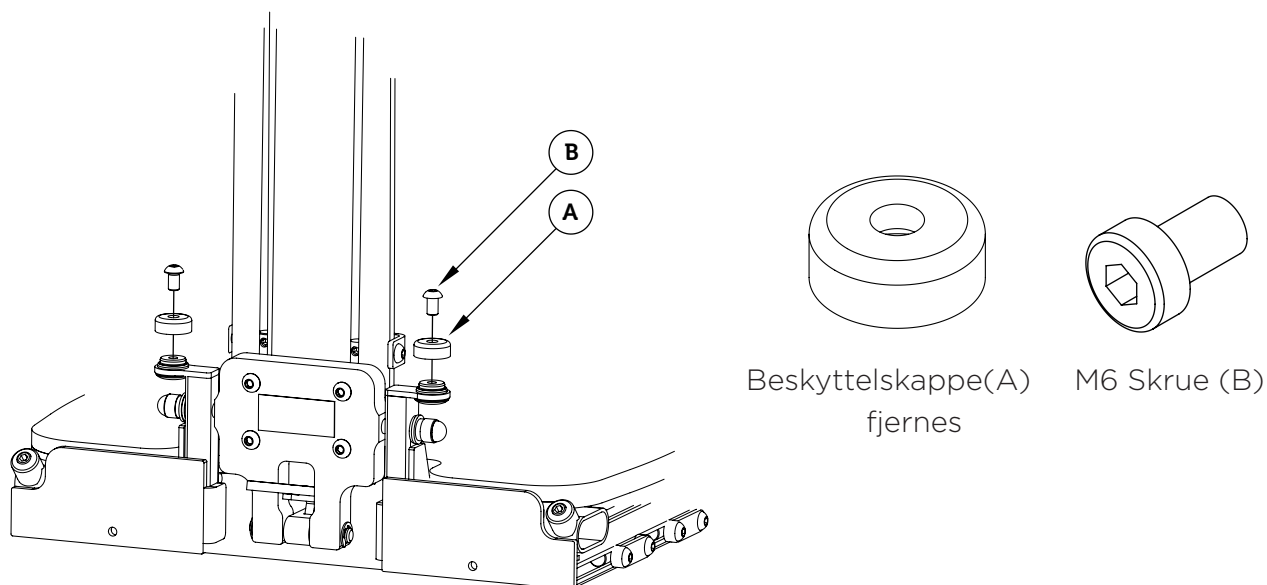


Hoftestøtte

Montering af hoftestøtte

Skrue de to skruer ud, som fastgør bendel i basen. Monter derefter hoftestøtten (med de to skruer fjernet) mellem benet og bunden som vist på billedet (mellem de to sorte profiler til Sharky), så hoftestøtten hviler mod basen.

Vælg, hvilke riller i hoftestøtten du bruger, afhængigt af hvor langt frem / tilbage du vil placere støtten, og juster derefter støtten sidelæns, før du strammer skruerne ordentligt.

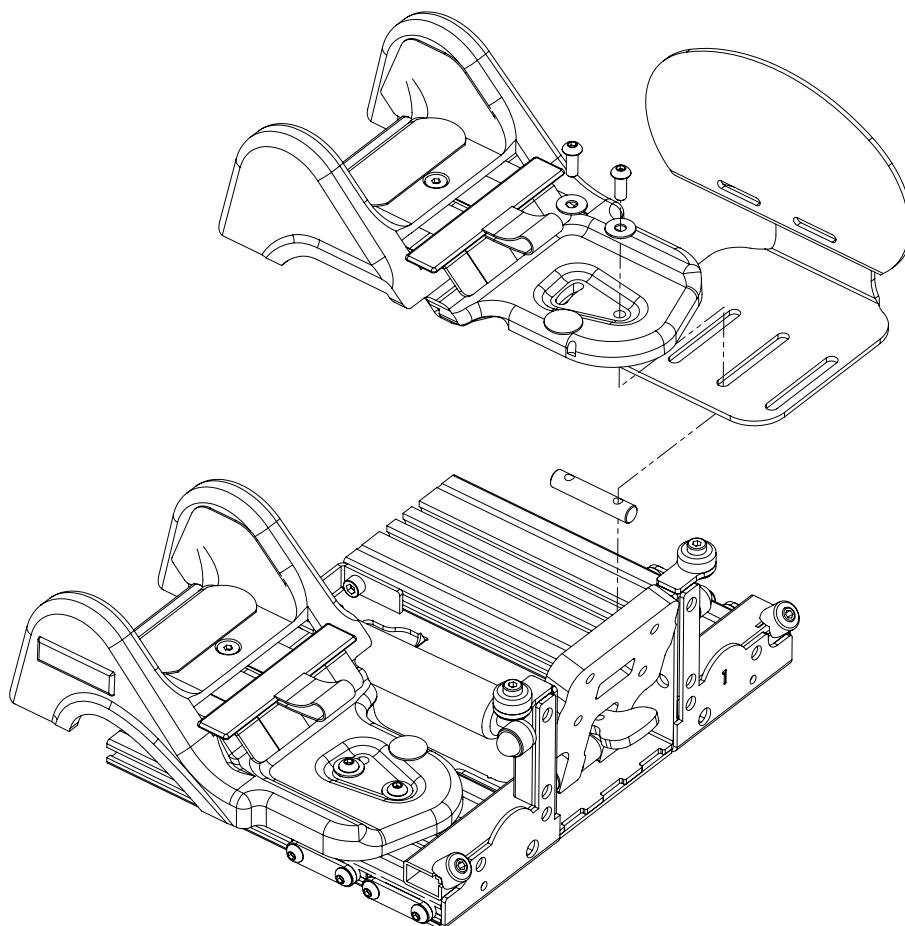

Hovedstøtte

Montering af hovedstøttebeslag

Inden du kan montere hovedstøtten, skal du fjerne justeringsnøglen og eventuelle andre dele, som kan sidde i vejen.

Isæt hovedstøttebeslagets profilmøtrikker (A) i rygprofilens spor. Når du har opnået ønskede position, spænder du de fire skruer (B).

Montering af hovedstøtte

Hovedstøttestangen isættes hovedstøttebeslaget (C) og spænd derefter vingeskruen (D), når du har nået den ønskede position.

Højdejustering af hovedstøttebeslag

For at højdejustere løsner du skruerne (B) noget og flytter herefter hovedstøttebeslaget til ønskede position. Spænd herefter skruerne (B).

Justering af hovedstøtte


Ved justering af den treledet hovedstøtte løsner du skrue (E) i det led du ønsker at justere. Når du har opnået ønskede position spænder du skrue (E) igen.

For at højdejustere hovedstøtten løsner du vingeskruen (D) og flytter hovedstøtten til ønskede position. Spænd herefter vingeskruen (D).

Montering af pandebåndsbeslag

Før montering af pandebåndsbeslaget kan udføres, skal hovedstøttepladen (H) være afmonteret. For at fjerne hovedstøttepladen løsnes begge skruer (I).

Monter derefter pandebåndsbeslaget i hul (F) med de medfølgende monteringsdele. Se separat betjeningsvejledning for eftermontering af pandebånd.

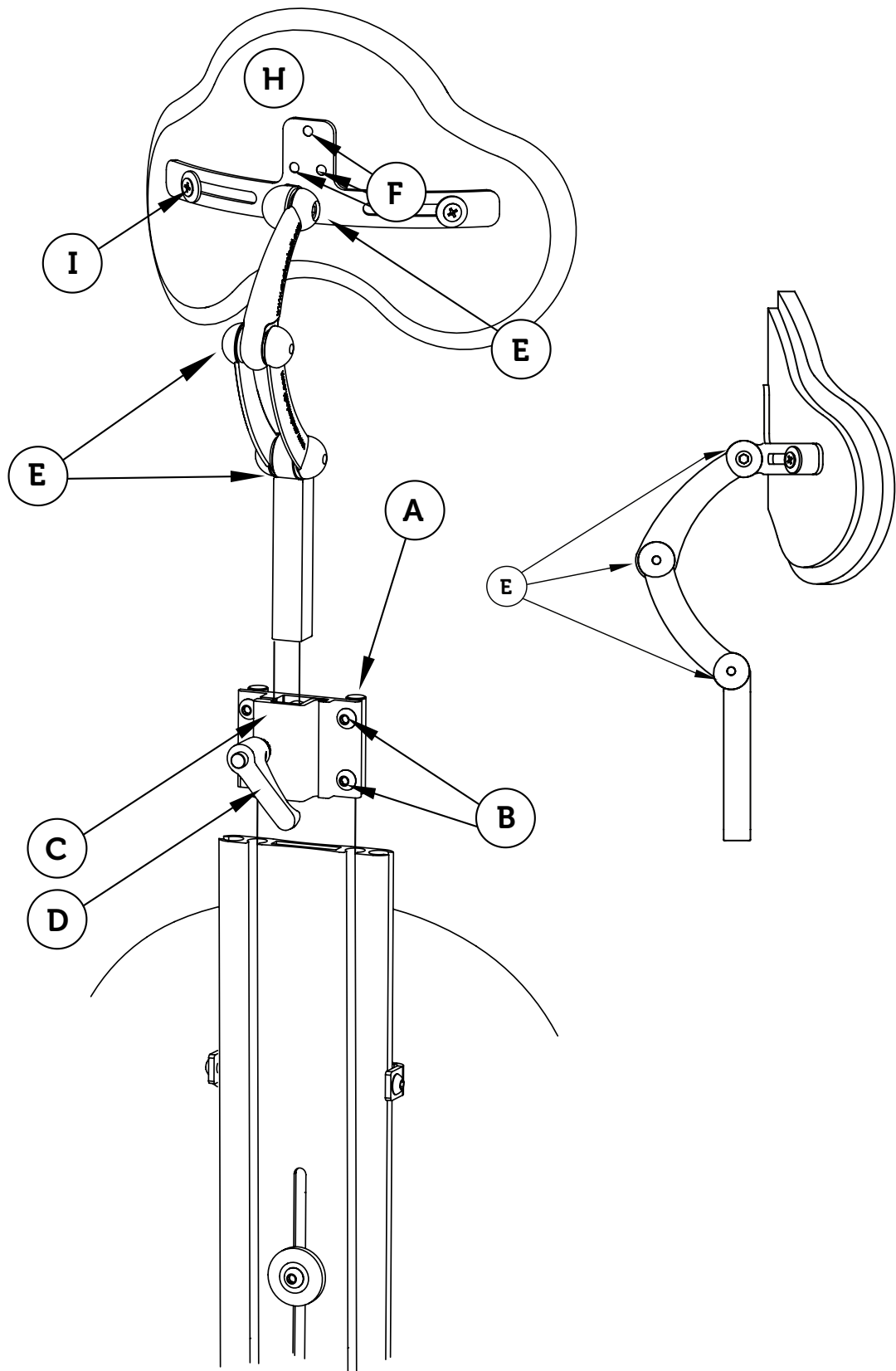

Positioneringsseler

Montering af øvre beslag

Tag justeringsnøglen af, og skub derefter profilmøtrikken(A) på øvre monteringsbeslag (D) ind i rillen på bagprofilen. Når du har nået den ønskede højde på beslaget, spænd da skruerne. Sæt justeringsnøglen på plads i rygprofilen.

Justering af øvre beslag

For at højde- og vinkeljustere det øvre beslag, løsner du skruerne og flytter herefter beslaget til ønskede position. Spænd herefter skruerne.

Montering af nedre beslag

Inden montering af det nedre beslag (C) er mulig, skal du afmontere justeringsnøglen og eventuelt andre dele, som kan sidde i vejen. Disse dele kan eksempelvis være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.


Før beslagets profilmøtrikker ned i rygprofilens spor. Når en ønsket position er opnået, spænd da skruerne (B). Genmonter eventuelt de dele du fjernede for at kunne montere det nedre beslag.


Justering af nedre beslag

For at højdejustere det nedre beslag løsner du skruerne (B) og flytter herefter beslaget til ønskede position. Spænd herefter skruerne (B).


Montering af alternativt nedre beslag

For lavere bespænding af selen kan et alternativt nedre beslag (F) anvendes. Disse monteres med medfølgende skrue i eksisterende hul på sædedelsbasen.

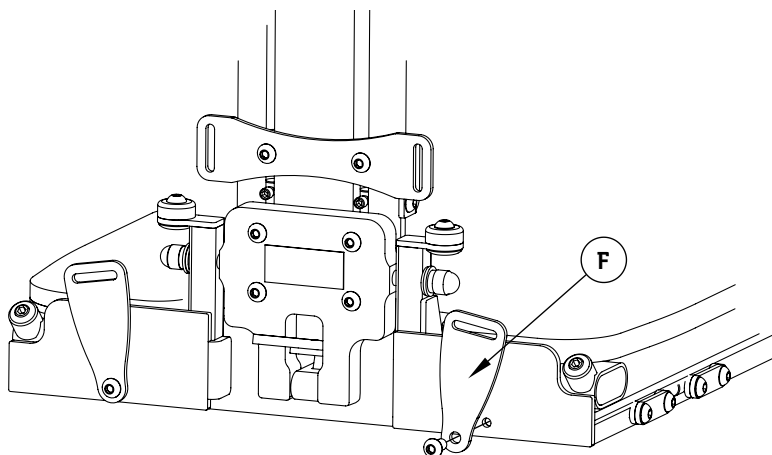


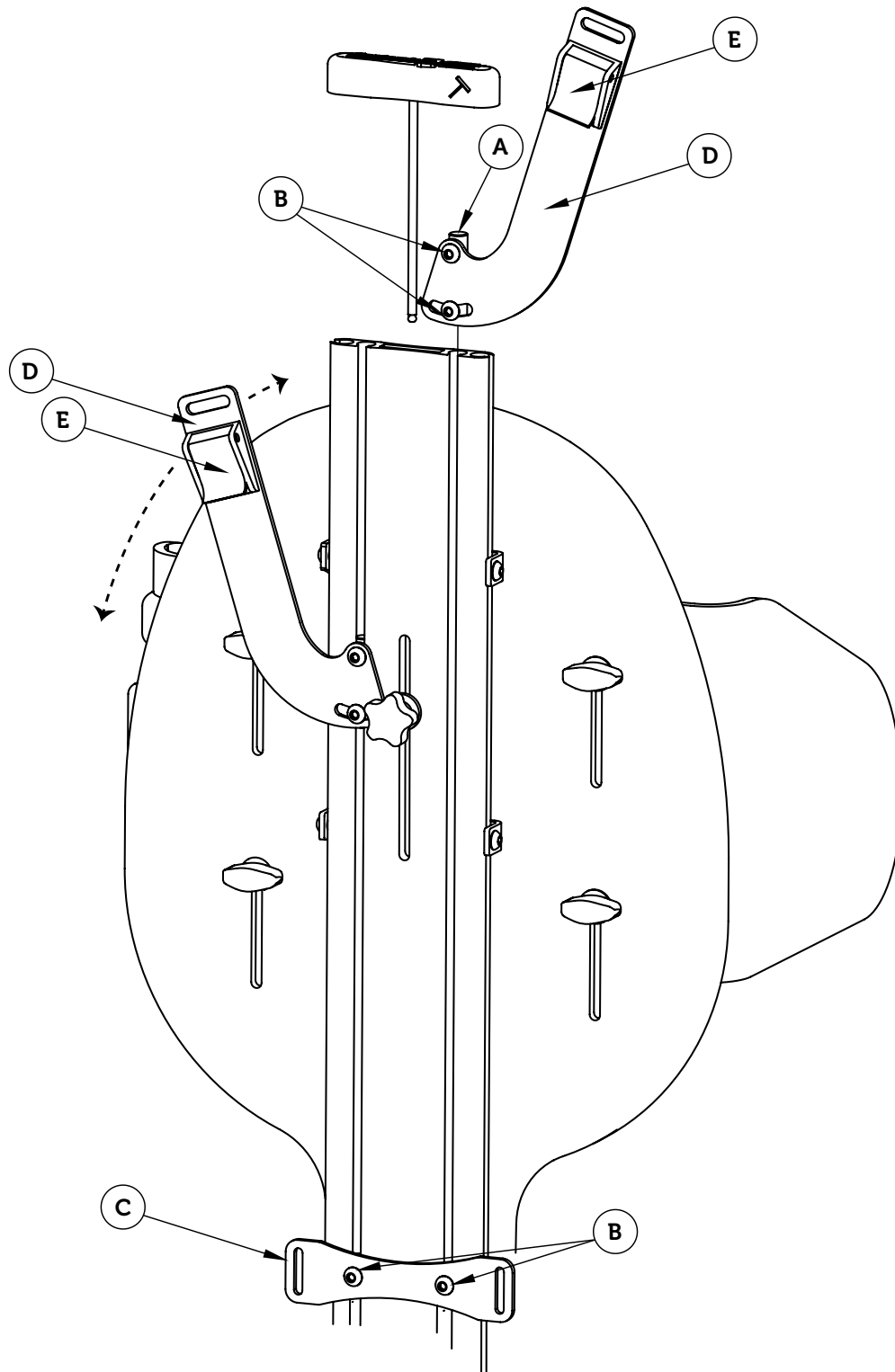

Profilmøtrik (A)
4 st

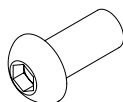

M6 Skrue (B)
6 st

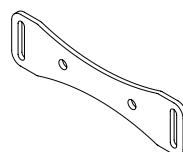

Nedre beslag (C)
Indgår som standard



Nedre beslag (F)
Alternativ 2 stk.



Hoftebælte

Justering af hoftebæltetsbeslag

For at flytte placeringen af hofteselespændingen, løsnes skruerne (A) lidt og justeres til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (A).

Montering af hoftebælte

Når hoftebæltet skal monteres i hofteselesbeslagene, skal du bruge et tri-glide spænde. For montering i henhold til tri-glide-metoden, gør som billedet viser.

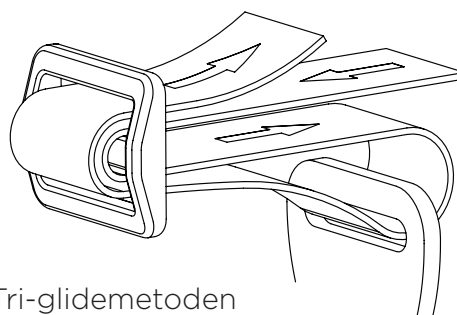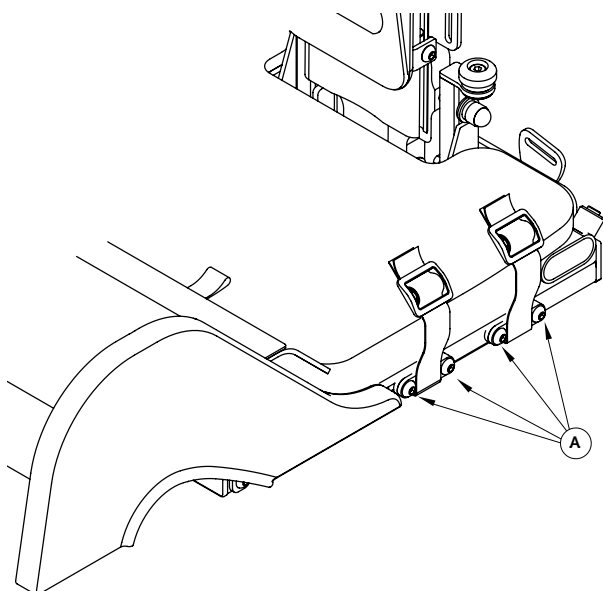


Tri-glidemetoden



Sørg for, at remmen ikke er klemmt mellem distancestykket og beslaget.

Monteringsfæste til hoftebælte

Ekstra selebeslag fås som tilbehør i fire størrelser og gør det muligt at flytte fastgørelsespunkterne til hofteselen ud, hvilket forenkler adgang til og justering af sæde-/bendelene. Passer til 4-punkts hofteseler med 25 mm brede stropper. Brug eksisterende skruer og skiver, og udskift det eksisterende glattejern med det ønskede monteringsbeslag. Kan monteres opad eller nedad, hvis der anvendes adaptersystem. Ellers er den monteret opad for ikke at forstyrre chassisets sædeplade.

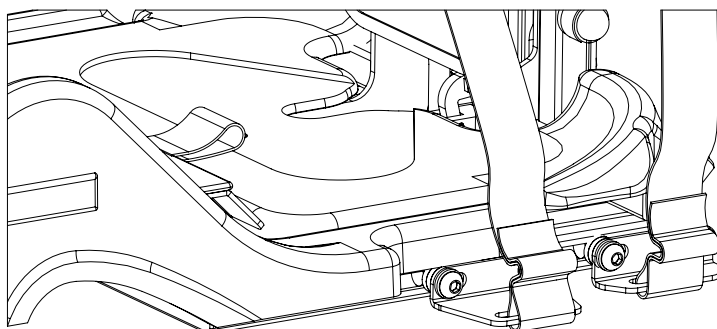


Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding. Montering af ankelbespænding på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.



Kontroller at
polstringen ikke har
foldet sig på
ankelbespændingen.

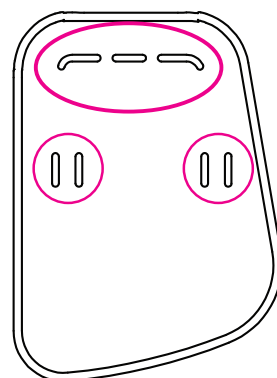

Armlæn fra sædet

Montering af armlæn fra sædet

Skub armlænet ind i det tilsigtede rør på siden af sædedelen. Når du har nået den ønskede breddeposition på armlænet, strammes låseskruen (A).

Breddejustering

For at ændre armlænets bredde skal du løsne stopskruerne (A) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne.

Højdejustering

For at højdejustere armlænet løsner du skruerne (B) lidt og flytter derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (B).

Vinkeljustering opad/nedad

For at justere armlænets vinkel skal du løsne vingeskruen (C) og derefter dreje armlænet til den ønskede vinkel. Stram derefter vingeskruen (C).


Vinkeljustering i sideled

Hvis du vil justere pladen sidelæns og i en vinkel, skal du løsne skruerne (D) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (D).

Montering af skålformede armlæn:

Armlænet skal monteres ifølge billedet med de høje sider udad, væk fra kroppen.



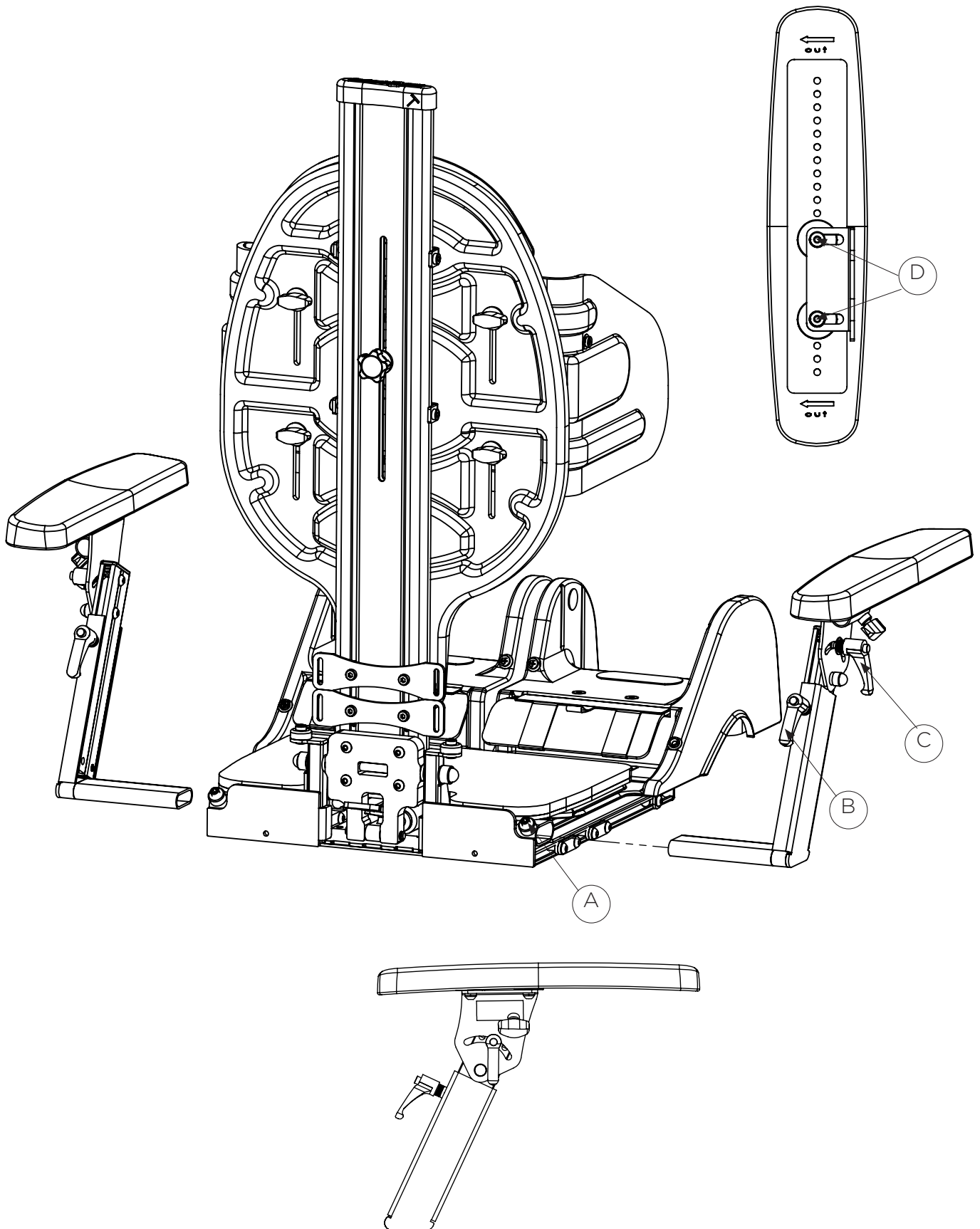

Armlæn fra ryg, fast

Montering af armlæn fra ryg

Inden armlænet monteres fra ryg, skal du først fjerne justeringsnøglen og eventuelt andre dele som kan sidde i vejen. Disse dele kan eksempelvis være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Sæt armlænsbeslagets profilmøtrikker i rygprofilens spor. Når du opnår ønskede position, skal du spænde skruerne (A). Genmonter eventuelt de dele du fjernede for at kunne monter armlænsbeslaget.

Højdejustering

For at højdejustere armlænet løsner du skruerne (A) og flytter herefter armlænet til ønskede position. Spænd herefter skruerne (A).

Breddejustering


For at ændre bredde på armlænet, løsner du skruen (B) og flytter herefter armlænet til ønskede position. Spænd herefter skruen.

Vinkeljustering opad/nedad

Hvis du vil justere vinkel på armlænet, løsner du vingeskruen (C) og flytter herefter armlænet til ønsket vinkel. Spænd herefter vingeskruen (C).

Vinkeljustering i sideled

Hvis du vil justere pladen sidelæns og i en vinkel, skal du løsne skruerne (D) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (D).

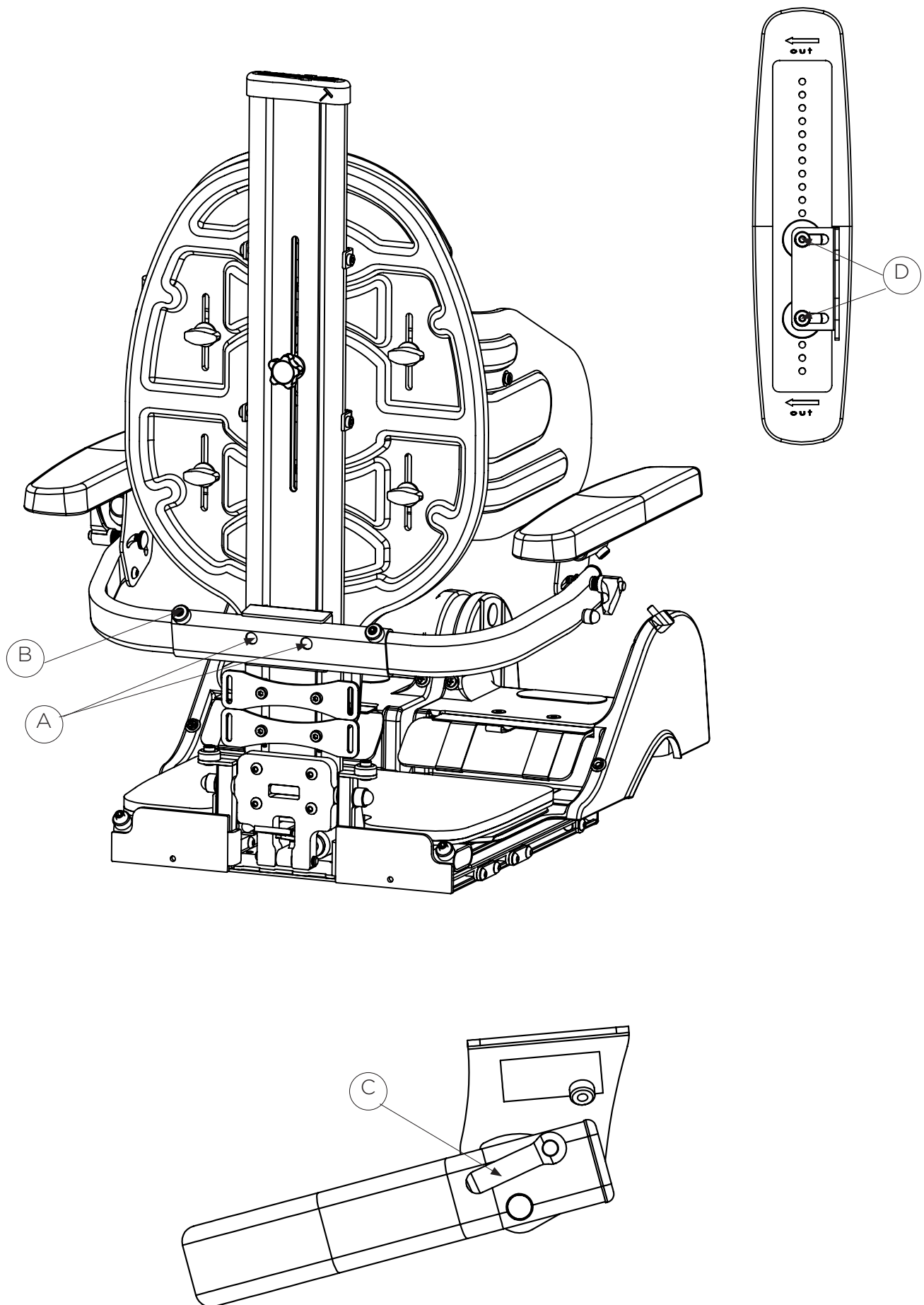

Armlæn fra ryg, vipbart

Montering af vipbare armlæn fra ryg

Inden montering af armlæn fra ryg, skal du tage justeringsnøglen af og eventuelle andre dele som kan sidde i vejen. Disse dele kan eksempelvis være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Isæt armlænsbeslagets profilmøtrikker i rygprofilens spor. Når du har opnået ønskede position stram skruerne (A). Monter om nødvendigt de dele, du har fjernet, for at kunne montere armlænsbeslaget.

Højdejustering

For at højdejustere armlænet løsner du skruerne (A) og flytter herefter armlænet til ønskede position. Spænd derefter skruerne (A).

Breddejustering

For at ændre bredden på armlænet løsner du skruen (B) og flytter herefter armlænet til ønskede position. Spænd herefter skruen.

Vinkeljustering opad/nedad


Om du vil justere vinkel på armlænet løsner du vingeskruen (C) og flytter herefter armlænet til ønskede vinkel. Spænd herefter vingeskruen (C).

Vinkeljustering i sideled

Hvis du vil justere pladen sidelæns og i en vinkel, skal du løsne skruerne (D) og flytte derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (D).

Den vipbare funktionen

For at vippe armlænet til siden, træk låsebolten (E) nedad og vip herefter armlænet væk. Sørg for, at der høres en kliklyd, når du slår armlænet tilbage. Mulighed for at indstille vinklen er givet ved tre-hullers position til låsebolten.

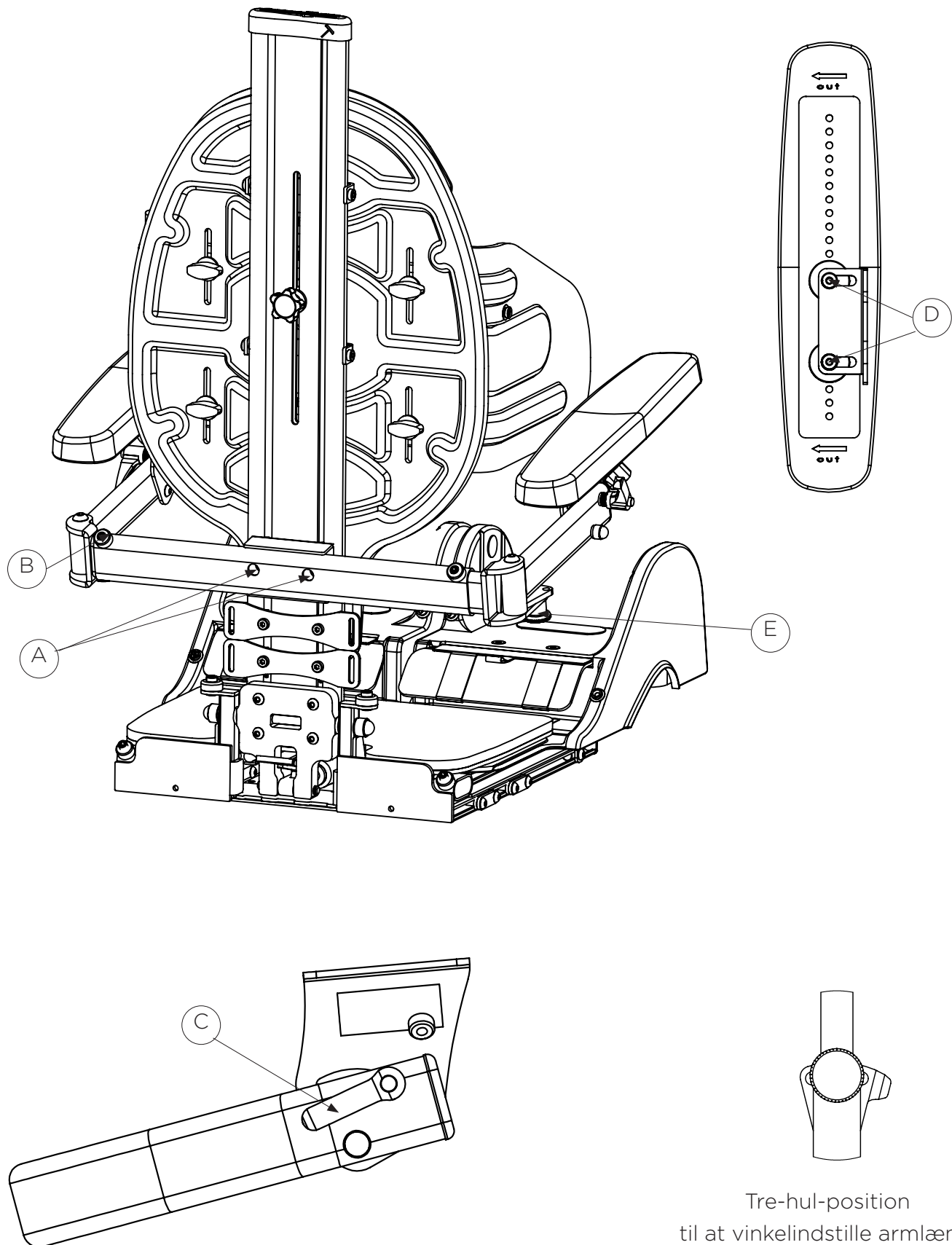

Tre-hul-position
til at vinkelindstille armlænet

Albuestop

Montering af albuestop

Monter albuestoppet ved hjælp af vingeskrue (A), skiven (B), afstandsstykket (D) og bolten (E). Bemærk, at bolten i kropsstøtten skal udskiftes med den medfølgende længere bolt. For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan kropsstøtten monteres, se side 24-25 i denne brugermanual. Sæt bolten (E) gennem kropsstøtten og rygpladen. Monter herefter distancestykke (D), armlænbeslag (C), skive (B) og til sidst vingeskrue (A).

Højdejustering af albuestop


For at højdejustere albuestoppet løsnes vingeskruen (A) og justeres til ønskede højde. Spænd vingeskruen (A) når du har opnået den ønskede position.

Breddejustering af albuestop

For at breddejustere albuestoppet løsnes skruerne (E) og justeres til ønskede bredde. Spænd vingeskruen (E) når du har opnået den ønskede position.

Polstring

Når polstringen skal vaskes, kan du nemt trække den væk fra den øverste armlænsplade ved at strække elastikken på bagsiden af polstringen. For at samle polstringen igen, træk polstringen over albueunderlaget og sørg for, at det er centreret på albueunderlaget.

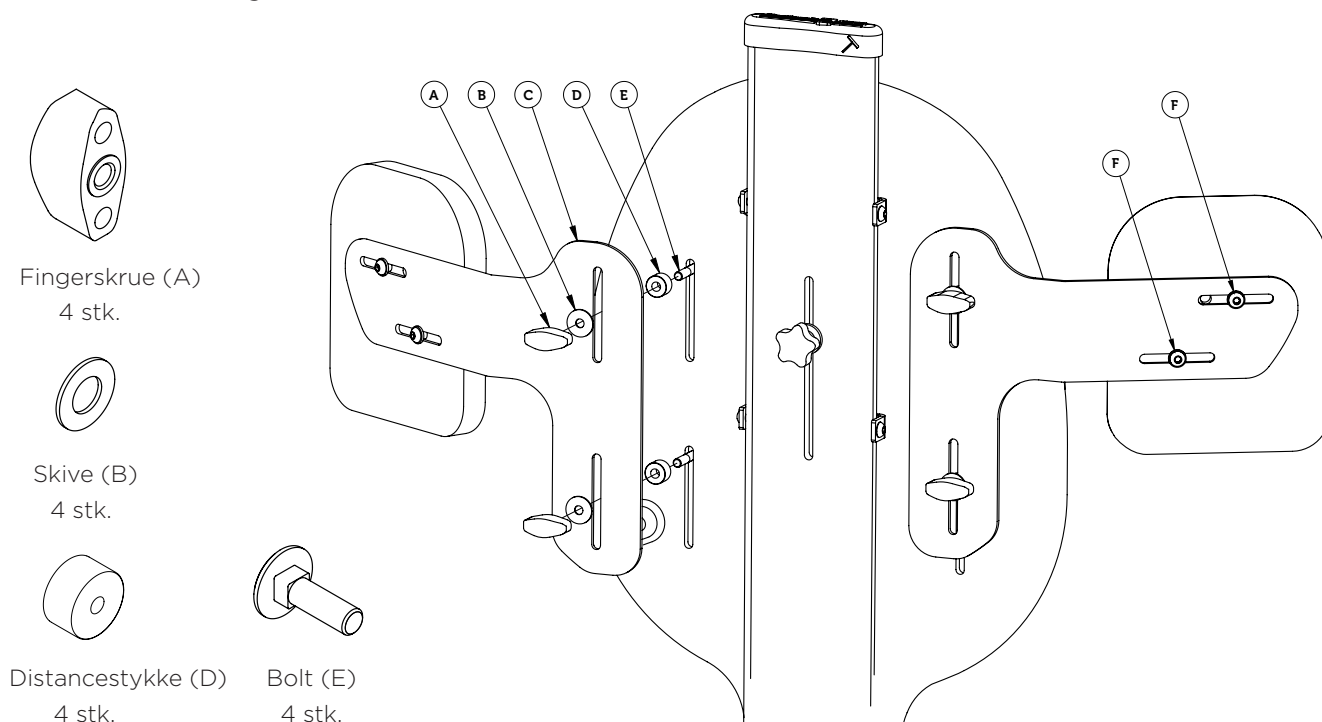


Bolten i kropsstøtten skal byttes ud med medfølgende længere bolte ved montering af albuestoppet.
Ved justering af albuestoppet løsnes kropsstøtten for justering.

Håndbøjle

Montering af håndbøjle

Bøjlen skubbes ind i et rør under armlænspladerne og låses med en vingeskrue (A) på begge sider. Bøjlen kan skubbes ud på brugerens venstre side og roteres væk, mens den højre side stadig er i monteringsrøret.

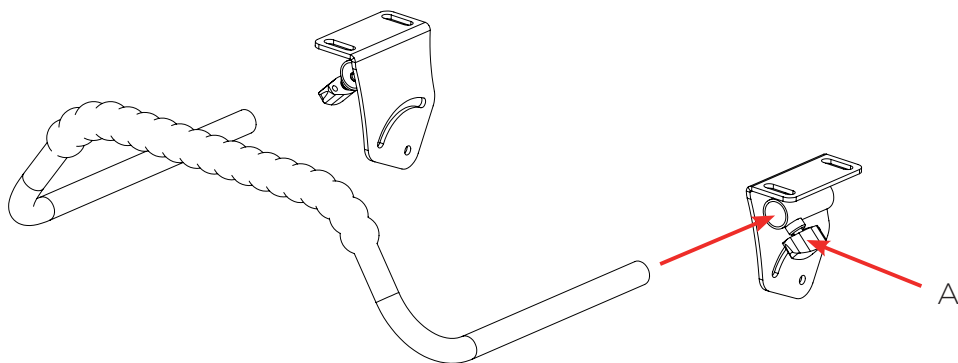

Bord, fast

Montering af bord


Placer bordet på armlænspladerne, og drej derefter bordets låsearm under armlænspladen. Låsearmen skal drejes, indtil den ender inde i kanten af armlænspladen.

Bytning af monteringshul

Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden bruges et af monteringshullerne under armlænets polstring i bordets bagkant. I grundversionen er låsearmen fastgjort til det midterste hul. For at skifte monteringshul skal du først løfte polstringen i bagkanten. Mærkningerne på den ydre bagkant af bordet viser kun bordets størrelse.




Pas på ikke at løfte bordet i forkanten.

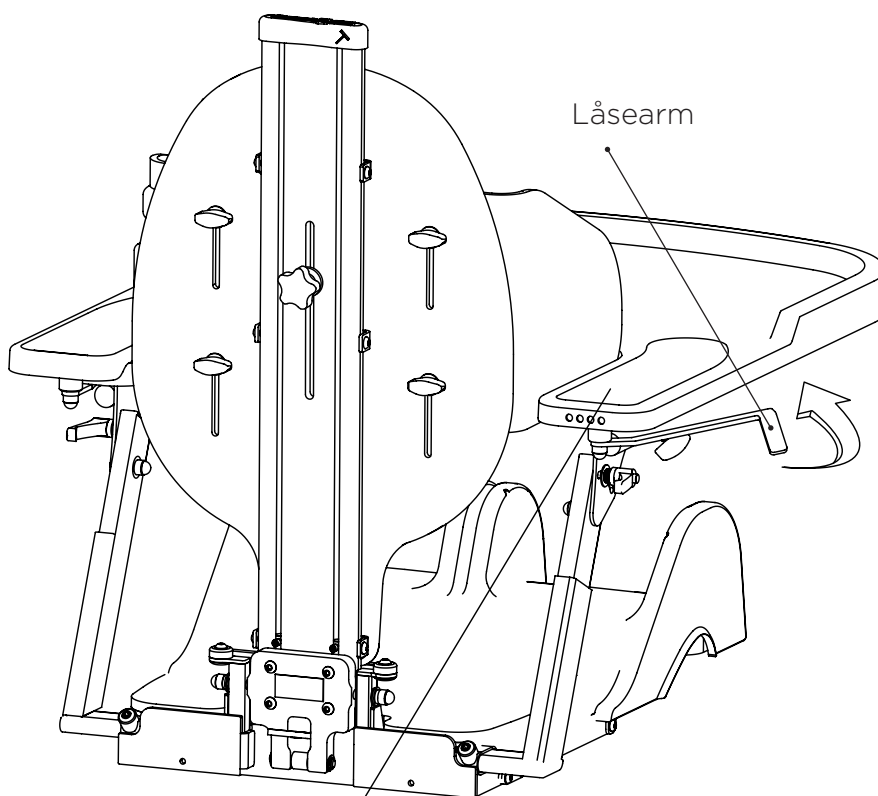

Monteringsbredder


Vælg mellem tre forskellige monteringshuller.

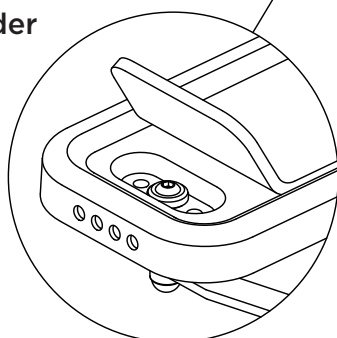

Bord, vipbart

Montering af bord, vipbart




For at montere det opklappelige bord skal bordets monteringsrør (A) sættes gennem røret (B) under armlænpladen. Skub bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladerne. Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet.

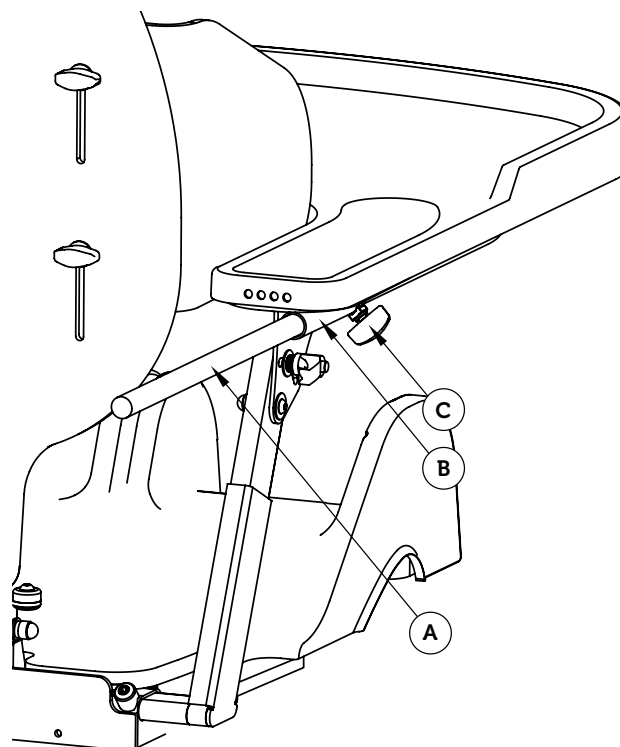

At anvende den vipbare funktion

For at vippe bordet til siden, løsnes først fingerskruen (C) lidt. Løft derefter bordet lidt og træk det fremad. Løft bordet yderligere og vip det til siden. Når bordet er i sin laveste position, skal du skubbe det tilbage igen og stramme fingerskruen (C).

- 1) Træk bordet ud
- 2) Løft og træk til siden
- 3) Fold helt ned, så bordet hænger og skyd derefter bordet tilbage mod den oprindelige position

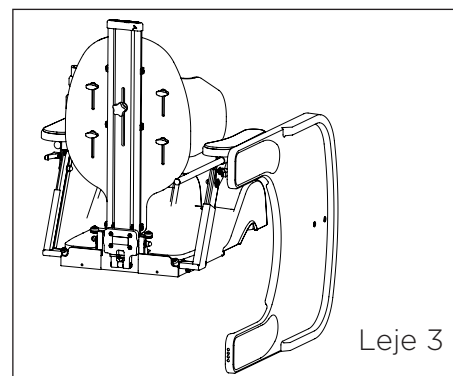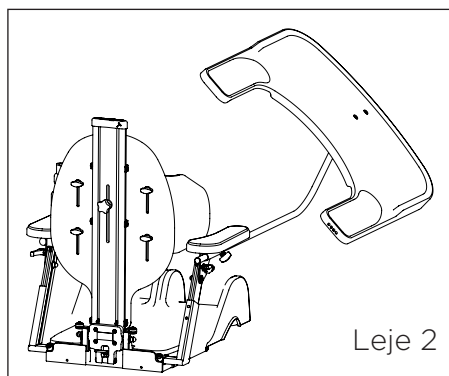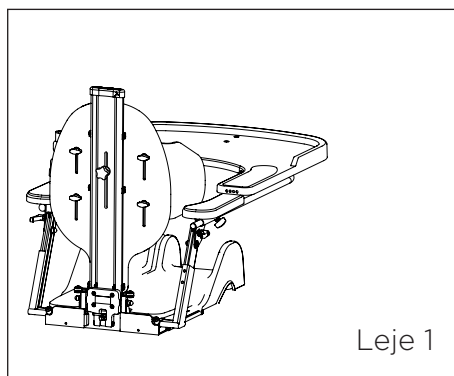

Glöm ej att dra åt fingerskrueet (C) efter fällning av bordet.
Om låsarmar används, ska disse vridas in under armlænsplattan.



Se till att dra bordet tillräckligt långt framåt vid sidofällning
så att brukaren ej skadas.

Bord, forstærket monteringsbeslag

Montering af forstærket bord

For at montere det forstærkede bord skal du sætte bordets monteringsrør (A) gennem røret (B) under armlænspladen. Skub derefter bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladerne.

Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet. Drej derefter låsearmen ind, indtil den passer inden i kanten af armlænspladen.

Breddejustering af forstærket bord

I stedet for at justere bredden på armlænene, kan du vælge at justere bredden på bordets monteringsbeslag, så det passer med monteringsrørene i armlænsbeslagene.



For at justere bredden på bordet, løsnes skruerne (D) lidt og justeres til ønsket position. Spænd derefter skruerne (D).



Hvis ikke en breddejustering i bordets beslag er tilstrækkelig, skal der muligvis foretages en justering af armlænets bredde.

Forstærket bord

Set nede fra

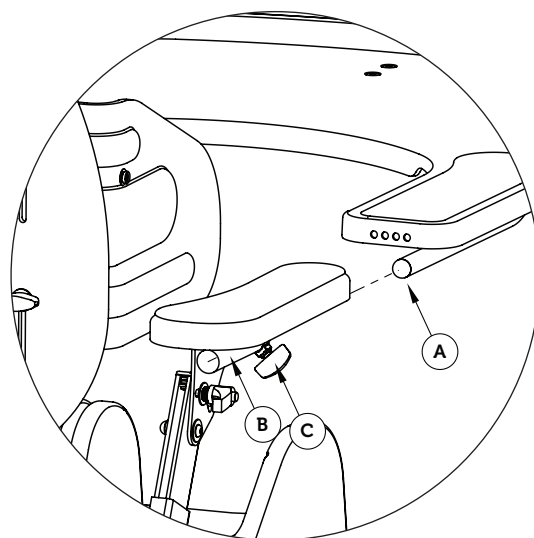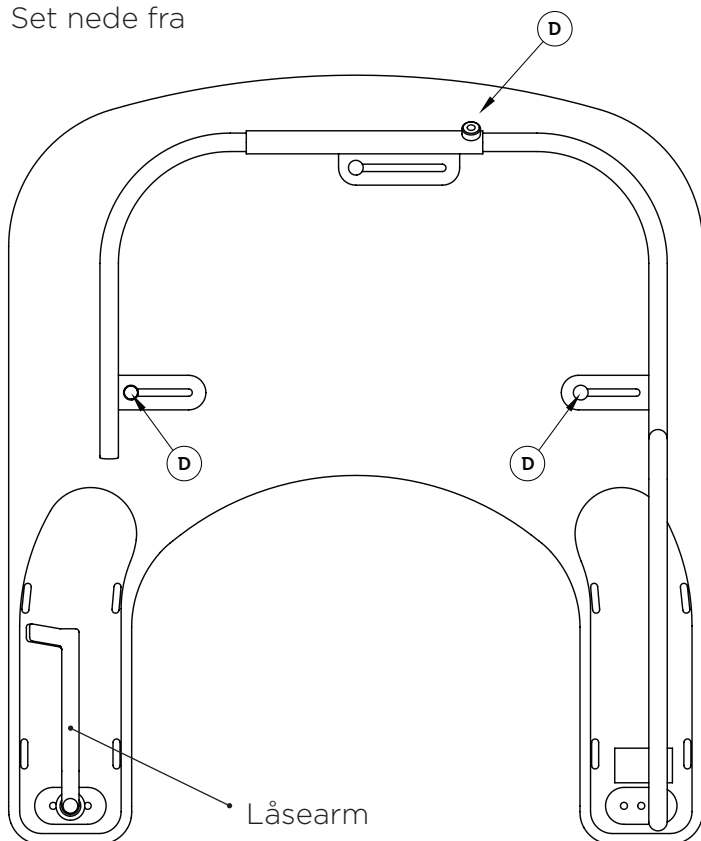


Støttebord

Montering af bordet

Placer bordet på armlænspladerne (B) og juster bredden og dybden på armlænene, så de sidder rette sted under støttebordet.

Vrid herefter bordets låsearm (A) ind under armlænspladen.

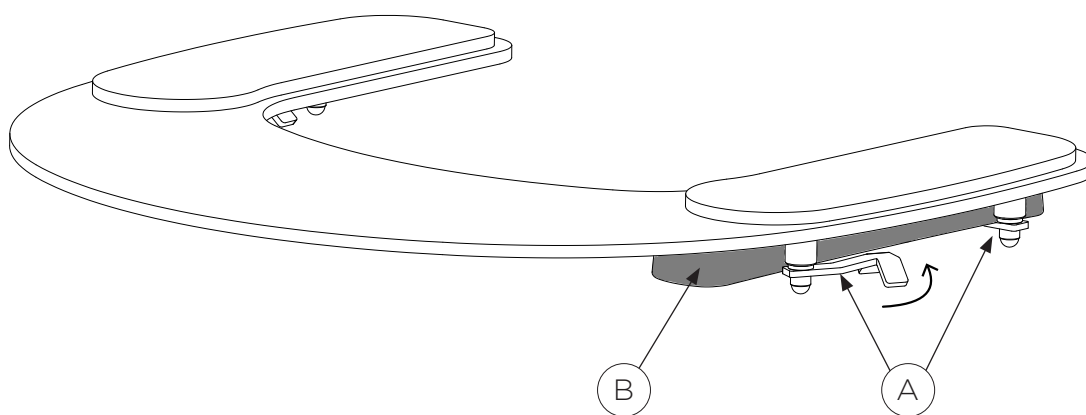

Fodstøtte

Montering af fodstøtte

Uanset variant af fodstøtte foregår monteringen på samme måde. Start med at fjerne endehætten (A) fra bendelsprofilen (B), og sæt derefter profilmøtrikkerne (C) i, så de er midt i de eksisterende huller i bendelsprofilen (B). Fastgør derefter fodstøtten ved at skrue skrue(rne) (D) fast i profilmøtrikkerne (C) gennem hullerne i benprofilen (B).



Du behøver ikke at afmontere bendelen fra profilen for at montere fodstøtten.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (G) i form af en profilmøtrik er monteret i bunden af fodstøtteprofilen indenfor endeaflutningen. Sikkerhedsstoppet (G) kan bruges til at finde tilbage til en forindstillet højdeposition.



Monter et ekstra sikkerhedsstop overfor fodstøtten i fodstøtteprofilens spor for let at finde tilbage til en alternativ højdeposition (f.eks. med eller uden sko).

Justering af vinkel ved knæleddet

Når fodstøtten er monteret i bendelsprofilen er der mulighed for at vinkeljustere fodstøtten ved knæleddet. Løsn vingeskruen (E) og juster til ønskede vinkel. Spænd herefter vingeskruen.

Justering af vinkel ved fodled

Når fodstøtten er monteret i bendelsprofilen er der mulighed for at vinkeljustere fodstøtten ved fodleddet. Løsn skruen (F) og juster til ønskede vinkel. Spænd herefter skruen.

Justering af fodpladens højde


For højdejustering løsen på vingeskruen (H) og juster fodpladen til ønskede højde.

Alternativ montering af fodstøtte

Hvis du vil komme tættere på knæleddet, er der en alternativ monteringsmetode, hvor du monterer fodstøttebeslaget på den modsatte side af benprofilen (B).



For justering ved benlængdeforskel eller abduktion, bruges delt fodstøtte. Se også kapitel Sædedel.

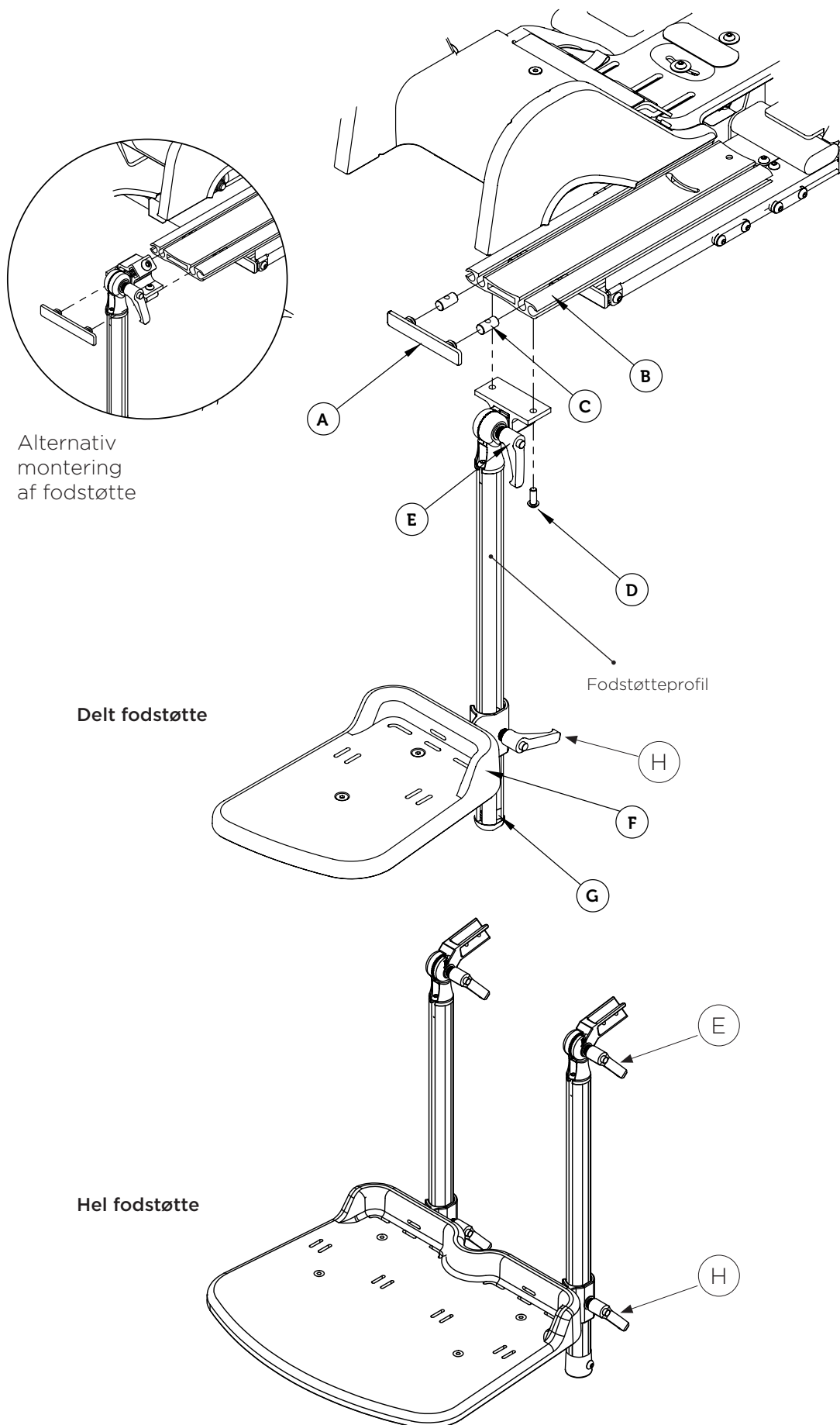

Fodstøttebeslag

Fast fodstøttebeslag (1)

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) for at justere til ønskede højde. Spænd herefter vingeskruen.

For at vinkeljustere ved fodledet løsner du skruen (E) og justerer til ønskede vinkel. Spænd herefter skruen.

Fjedrende fodstøttesadapter (2)

For at højdejustere fodstøtten løsner du skruen (D) og eventuelt skrue (E), for herefter at justere til ønskede højde. Spænd skruen (D). Vælg længde på affjedringen ved at justere skruen (E) til ønskede position og spænd den.

For at vinkeljustere ved fodleddet løsner du skruen (E) og justerer til ønskede vinkel. Spænd herefter skruen.



Fjederens modstand kan justeres med en skruetrækker ved at skruer på skruen i fjedrepakken (F).


Opklappelig fodstøttebeslag (3)

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) for at justere til ønskede højde. Spænd herefter vingeskruen. For at anvende den opklappelige funktion, løft fodstøttepladen i forkanten.

Kugleledsadapter (4)

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) for at justere til ønskede højde. Spænd herefter vingeskruen.

For at anvende kugleledsfunktionen løsner du først skrue (B) og (C) og justerer til ønskede position. Spænd herefter skrue (B) og sikkerhedslås positionen med skruen (C).

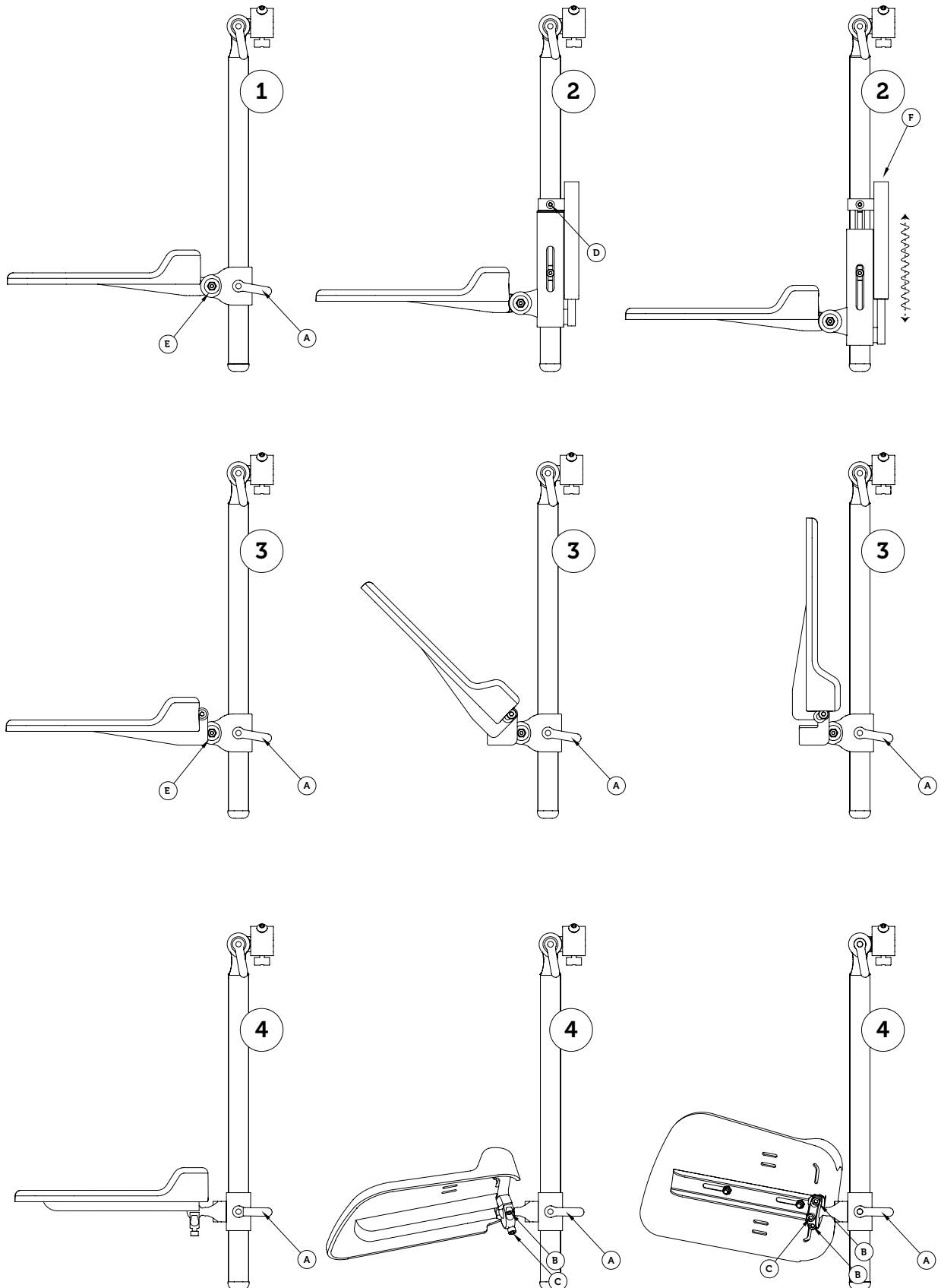


Fodkasse dobbeltstang

Montering af fodkasse ved efterbestilling

Udskift den nuværende fodplade med den medfølgende. Eftersom fodkassen er designet på en sådan måde, at den passer til både enkelt stang og dobbelt stang, skal fodpladen bores afhængigt af den type fodplade, du har.

For at montere fodkassen skal du starte med at indsætte profilmøtrikken (A) på fodkassen (B) i fodstøttebeslaget (C). Justér derefter fodstøtten (D) til den ønskede højde, og stram fingerskruen (E). Juster den ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres gennem rillen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring, og kontroller, at alle skruer er strammet korrekt.



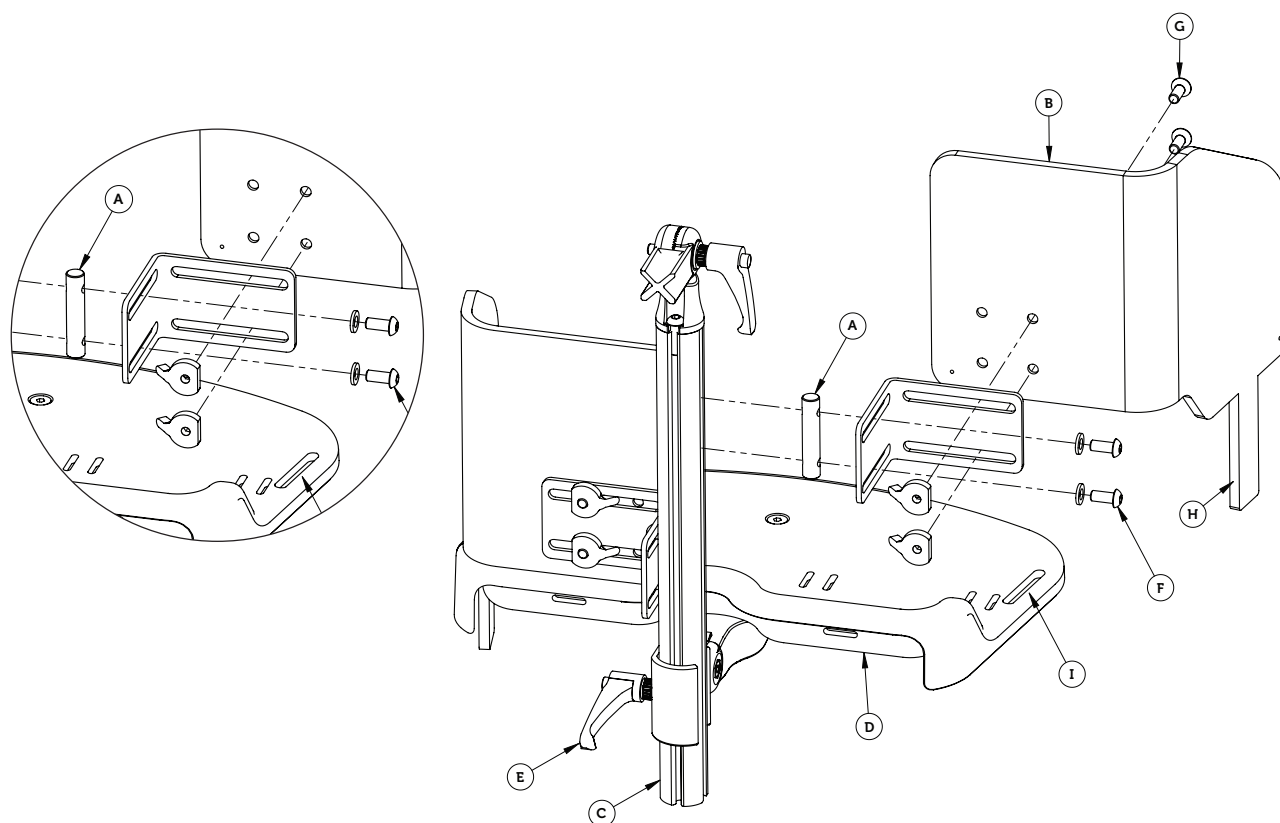


Plaststangen (H) kan efter justering til den ønskede højde afskæres eller varmes ind under fodstøttepladen efter dine egne ønsker. Under fodpladen er der også markeringer for borer.

Fra enkeltstang til dobbeltstang og vice versa

Som standard kommer fodkassen i størrelse 2, 3 og 4 formonteret til dobbeltstang og størrelse 1 er formonteret til enkeltstang.

For at skifte mellem de forskellige varianter, drej vinkelbeslaget (A) 180 grader og skift derefter siden for profilmøtrikken (B).

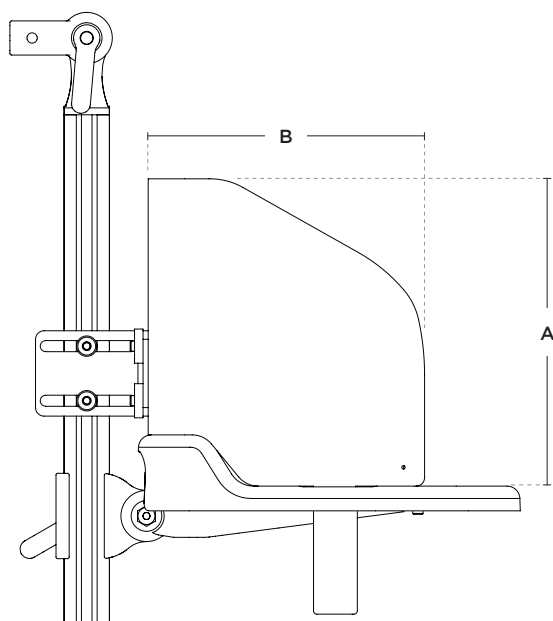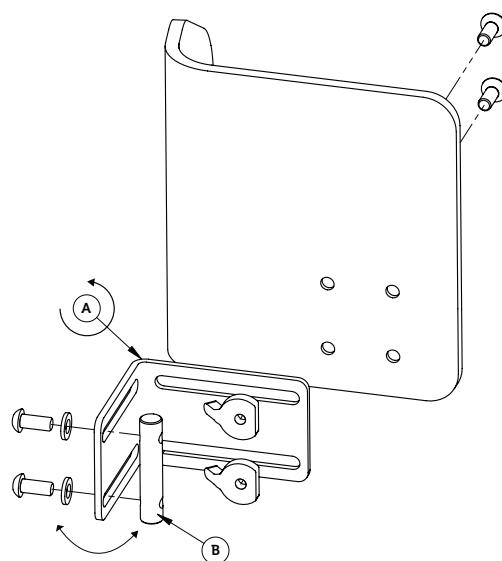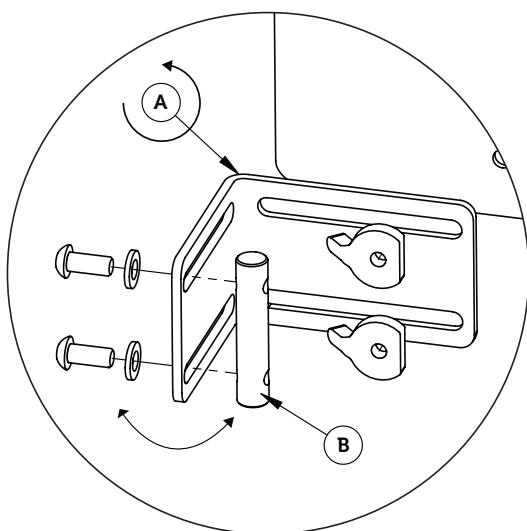

Tekniske data

Til hel / delt fodplade	Størrelse	Højde (A)	Dybde(B)
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Inden montering af lægstøtte er mulig, skal eventuelle fodstøtter fjernes. Begynd med at tage endehætten (G) af og løs herafter vingeskruen (F), som holder fodstøtten på plads på fodstøttesstangen. Spænd herefter fodstøttepladen og dennes beslag.

Monter lægstøtten ved at sætte profilmøtriken (C) ind i fodstøttestangen, juster til ønskede højde og spænd skruerne (E). Monter herefter fodstøtten og endehætten (G).



For genmontering af fodstøtte, se afsnittet fodstøtte.

Højde- og dybdejustering af lægstøtte


For at højde- og dybdejustere lægstøtten, løsner du skruerne (E) for herefter at justere til ønskede højde/dybde. Spænd herefter skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at breddjustere lægstøtten løsner du skruerne (A) og herefter justeres til ønskede bredde. Spænd herefter skruerne (A).



Glem ikke at sætte fodstøtten og endehætten tilbage efter montering af lægstøtte.

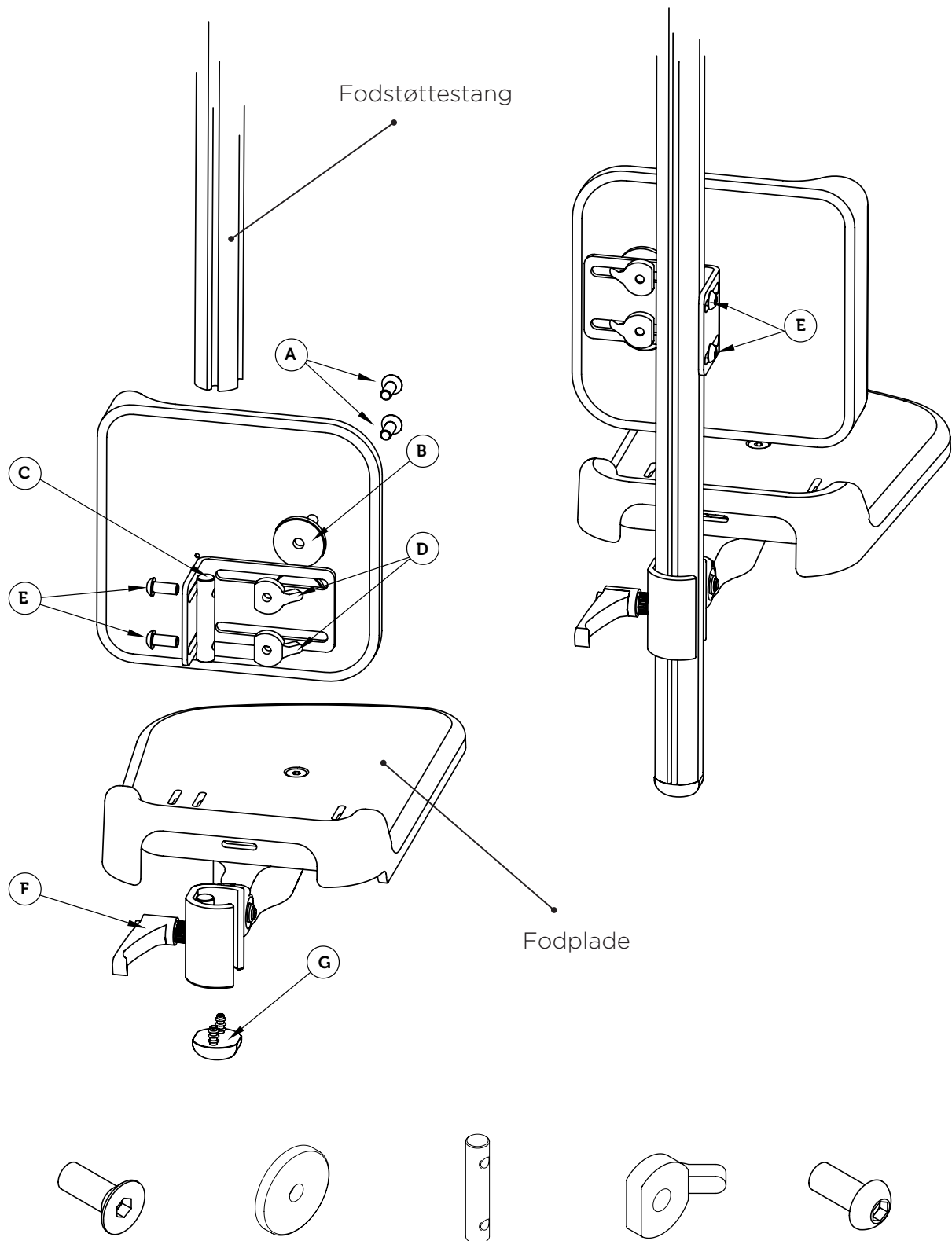

4 stk.

4 stk.

2 stk.

4 stk.


4 stk.

Kørebøjle

Montering af kørebøjle

Inden kørebøjlen monteres, skal du først fjerne justeringsnøglen og eventuelle andre dele, der kan være i vejen. Disse dele kan f.eks. være nakkestøtter og øvre monteringsbeslag.

Skub profilmøtrikkern på kørebøjlen ind i rillen på rygprofilen. Når du har nået den ønskede position, strammes skruerne (A). Monter om nødvendigt de dele, du har fjernet, for at kunne montere kørebøjlen.

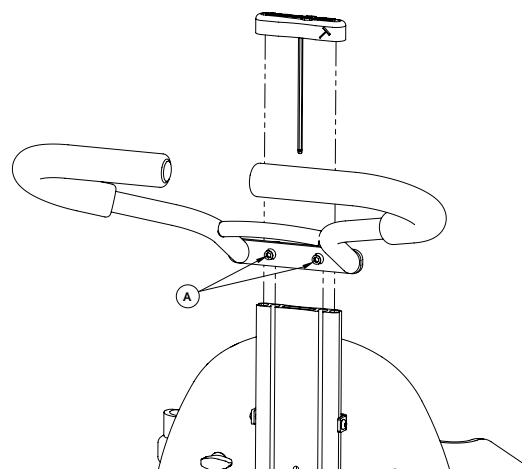

Højdejustering af kørebøjle


For at højdejustere kørebøjlen løsner du skruerne (A) og flytter herefter kørebøjlen till ønskede højde. Spænd skruerne (A) når ønskede højde er opnået.



Du behøver aldrig løsne skruerne helt for at højdejustere kørebøjlen, det er nok at løsne dem lidt.

Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe

- A) Fjern rygbetrækket.
- B) Fastgør lændestøtten på rygpolstringen (indenfor det markerede område) ved hjælp af medfølgende velcro
- C) Sæt rygpolstringen på plads.

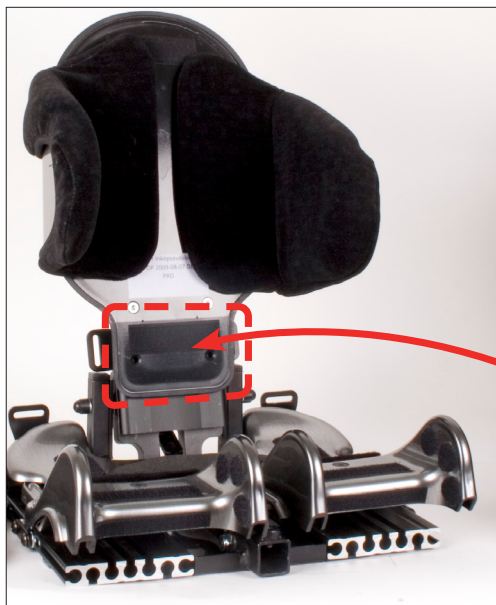

Lænde-
støttekile

Varmepakke

Varmepakke

Varmepakken opretholder automatisk kropstemperaturen og forhindrer afkøling i koldt vejr. Når kropstemperaturen er nået, slukker varmekappen for at spare energi. Hvis temperaturen falder, aktiveres den igen og varmes op til kropstemperatur.

De stik, der er monteret, er velvalgte, så det ikke skal være muligt at tilslutte forkert. Under ingen omstændigheder bør kontakter, batterier eller opladere udsættes for vand eller fugt.

Montering af varmekappe

Varmebetrækket monteres under sæde- og rygdelsbetrækket ved hjælp af velcro.

Varmebetræk

De installerede varmepuder har indbygget temperaturregulering med et temperaturområde fra + 27 ° C til + 32 ° C.

Isoleringen tåler både lave og høje temperaturer og påvirkes ikke af sollys, fugt eller kemikalier. Materialet i puden er flammehæmmende (FMVSS 302). Varmepuden er lavet af ventilerende materiale for at undgå kondens.

Batteri

Batteriet er genopladeligt (Ni-MH) og må kun oplades med den medfølgende oplader. Når batteriet er opbrugt, skal det efterlades til genbrug på din lokale genbrugsstation.



Batteriet skal efterlades til genbrug på din lokale genbrugsstation når den er forældet og ikke længere kan bruges.

Opladning af batteri

Følg nedenstående trin for at oplade batteriet korrekt.

1. Tilslut opladeren til en 230V, 50Hz stikkontakt.
2. Tilslut opladningsstikket til kontroldækslet.
3. Når batteriet er tilsluttet, blinker opladeren langsomt gult for at starte med en langsom opladning. Efter et stykke tid skifter opladeren til hurtig opladning, hvilket angives med et hurtigt blink i grønt.
4. Lad batteriet være tilsluttet, indtil lyset er konstant grønt, hvilket angiver, at opladningen er fuldført, og at batteriet oplades for vedligeholdelse.
5. Tag netledningen ud af stikkontakten.
6. Frakobl opladningsstikket fra kontroldækslet.

Information og instruktioner vedrørende varmekappe, se separat betjeningsvejledning.

Batteriet blinker gult

Hvis batteriet er gået i stykker, blinker lyset på opladeren hurtigt med et gult lys.

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelses-skrue og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet, så distributøren kan tage handling.

Transport i køretøj

Ved transport i bil, hvor Sharky Pro er monteret på kørestolsstel skal anvisninger fra producenten af kørestolsstellet følges.

Sikkerhedsbånd

En rem leveres til sædet med den hensigt at blive spændt fra sædets rygprofil og omkring kørestolsstellets kørebøjle. Sørg for, at denne rem er stabil og stram, inden kørsel.

Crashtestet og godkendt

Sharky Pro er crashtestet og godkendt i henhold til ISO 16840-4. Denne standard gør det muligt at montere siddesystemet på alle kørestolsstel, der er godkendt i henhold til ISO 7176-19, samtidig med at godkendelsen for kombinationen bevares.



Crashtest godkendelse gælder for belastningsvægt op til 75 kg.

Vedligeholdelses- og vaskeanvisninger

Dette produkt er et medicinsk udstyr beregnet til flere anvendelser. For at hjælpemidlet kan fungere sikkert og nå sin forventede levetid, er det derfor vigtigt at overvåge, vedligeholde og rengøre det. Ved udskiftning af dele i forbindelse med vedligeholdelse og service bør der altid anvendes originale dele fra Anatomic Sitt.

Definitioner:

Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse.

Afhjælpende vedligeholdelse refererer til foranstaltninger til at reparere et defekt produkt, en nødvedligeholdelse, der er vanskelig at planlægge i tide og ofte afhængig af produktets brug.

Service henviser til en simpel eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter for eksempel kontrol af skruer og fastgørelseselementer, bevægelige dele, generel slitage osv., samt mindre reparationer.

Forebyggende vedligeholdelse refererer til handlinger, der er foranlediget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne type vedligeholdelse kan ses som engangsforanstaltninger, der er planlagt med hensyn til tid, art og omfang. Dette produkt kræver ingen forebyggende vedligeholdelse i løbet af sin forventede levetid.

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt knapper.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsstellet
- Kontroller produktets stabilitet
- Kontroller produktets bevægelige dele, eksempelvis rygvinkling med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontroller bæltet og seler i forhold til slitage, funktion samt fastgørelse.

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Betræk og bælder / seler kan vaskes i 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For yderligere information, se aktuelle brugermanualer for hvert enkelt positioneringshjælpemiddel.

Service og vedligeholdelse

Service udføres primært for at forlænge produktets levetid og for at kontrollere, om der er behov for afhjælpende vedligeholdelse. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af dele skal originaldele fra Anatomic Sitt A/S altid bruges.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift.

For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller sikkerhedsbåndet på ryggen, at det er ubeskadiget og låses korrekt.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling. Både i forhold til justeringsmuligheder, mobilitet og låsning.
- Kontroller, at gaspatronen låses i den valgte position.
- Kontroller om nødvendigt slid på alle dele. Sørg for, at de låses/spændes ordentligt.
- Kontroller bælder og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges.

For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp / klud og antibakteriel, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bælder / seler. Polstring er en forbrugsartikel og bør udskiftes ved slid. Betræk og bælder / seler kan vaskes ved 60 ° C finvask. Følg separate vaskeanvisninger på produkterne. For mere information, se aktuelle brugermanualer for hvert positioneringshjælpemiddel.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklave ved 60 ° C i maksimalt 10 minutter.

Fjern betræk og bælder / seler ved rengøring af sædesystemet i håndvasken.

Tørring

Siddesystemet kan tørres i kabinet i max 70°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved renovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE -mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller alle produktfunktioner. Eller slidte dele, der skal udskiftes.

Sæde/rygdel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- ☐ Kontroller at rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronen låser i enhver placering.
- ☐ Kontroller polstring og udskrift efter behov.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Hovedstøtte:

- ☐ Kontroller betrækket og udskift efter behov.
- ☐ Kontroller at hovedstøtteledene låser.
- ☐ Kontroller fæstet på hovedstøtten, at det fungerer.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlænets justeringer. At det kan justeres i højde, dybde og bredde.
- ☐ Kontroller armlænsbeslagene, at de låser, som de skal.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Sikkerhedsrem:

- ☐ Kontroller sikkerhedsremmen på ryggen, at det ikke har skader og at det låser.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Gaspatroner sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leverings-adresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres inden for 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Montering og justeringsinstruktioner

Fast monteringsskruesæt	s. 17
Monteringsbeslag til hoftebælte	s. 34

Revisionsfortegnelse

rev. 2.0 - 2021-03-09
rev. 2.1 - 2021-05-26
rev. 2.2 - 2021-10-18
rev. 2.3 - 2021-12-21
rev. 2.3 - 2023-02-20
rev. 2.4 - 2023-09-13
rev. 2.5 - 2023-11-29
rev. 2.6 - 2024-02-29

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

www.instagram.com/anatomicsitt

