



Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,
service, vedligeholdelse og renovering



Denne brugsanvisning henviser til Zitzi Starfish Mini - hygiejnestolen med tilbehør. For en komplet oversigt over det tilsigtede tilbehør, se produktets bestillingsinformation.

Indholdsfortegnelse

Producent	3	Ryg	19
Specialtilpasning.....	3	Armlæn	20
Introduktion	4	Bord fast.....	21
Indledning	4	Støttebord	21
Korrespondance - mærkning	4	Hovedstøtte	22
CE-mærkning - klassificering	4	Kørebøjle	22
Overensstemmelseserklæring.....	4	Kropsseler	23
Tilsigtede formål.....	4	Hoftebælte	25
Symbolfortegnelse	5	Fodstøtte.....	26
Produktmærkning.....	6	Lægstøtte	27
Sikkerhedsinstruktioner	7	Bremse / Hjul	28
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Anti-tip støtte	28
Advarsler og forholdsregler.....	7	Potte.....	29
Kontrol før brug	9	Urinskjold	29
Begrænsninger.....	10	Sammenfatning og efterkontrol.....	30
Afklemningsrisiko.....	10	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner ...	31
Kombinationer	10	Kontrol før brug	31
Afvisninger/tilbud	10	Vedligeholdelse.....	31
Tekniske data/ydeevne.....	11	Service og vedligeholdelse af stel	32
Tilpasning og specialtilpasning.....	12	Renovering	33
Monterings- & justeringsinstruktioner ..	13	Affaldssortering	36
Sædedel.....	14	Garanti og retur.....	36
Justering af sædedybde	15	Revision.....	37
Sædehøjde	16		
Hofte-/rygvinkling	17		
Tiltning af sædeenhed	18		

Producent

Produktet er fremstillet af Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgsadresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 7

www.anatomicsitt.dk

Specialtilpasning



Afkryds i feltet ved eventuel specialtilpasning af produktet.

CE-mærkningen ophører med at gælde ved specialtilpassede produkter.



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at kunne udnytte Zitzi Starfish Mini til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT om produkterne. Du finder serienummeret på siddepladens bagerste del.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com.

Tilsigtede formål

Zitzi Starfish Mini er en toilet- og badestol på hjul, der er designet til at muliggøre personlig hygiejne for personer, der har svært ved at bruge et almindeligt toilet eller brusebad. Stolen har flere justeringsmuligheder og kan udstyres med forskelligt tilbehør for at opnå en bestemt siddestilling. Zitzi Starfish Mini er et flergangsprodukt.

Symbolfortegnelse

	Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv.		Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
	Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.		Angiver at produktet er medicinsk udstyr
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet		Angiver producentens reference-nummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres
 www.anatomicstitt.com	Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.		Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres..
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses for at få vigtige sikkerhedsoplysninger, om f.eks. advarsler, der ikke står på etiketten på det medicinske udstyr.		Unik produktidentifikator, der muliggør entydig identifikation af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato .		Angiver at produktet er CE mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.		Mærkat på kørehåndtaget. Angiver betjening for tiltvinkling
	Mærkat på armlæn. Angiver den maksimale afstand, du kan justere støtten i bredden.		

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt




MD **Starfish Mini stl. 2** → Produktnavn
Starfish Mini size 2

REF **690112** 2025-08-15 **SN** **70382**
 7 322476 901123 → Stregkode (EAN-13 eller REF samt SN)
 Maxlast 80 kg → Max belastningsvægt

Anatomic Sitt i Norrköping AB   → UDI-bærere: QR-kode (GS1-128)
 Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
www.anatomicsitt.com 
UDI (UDI=GTIN+(21)SN) (01)07322476901123(21)70382 → UDI= GS1-128

Etiket på tilbehør

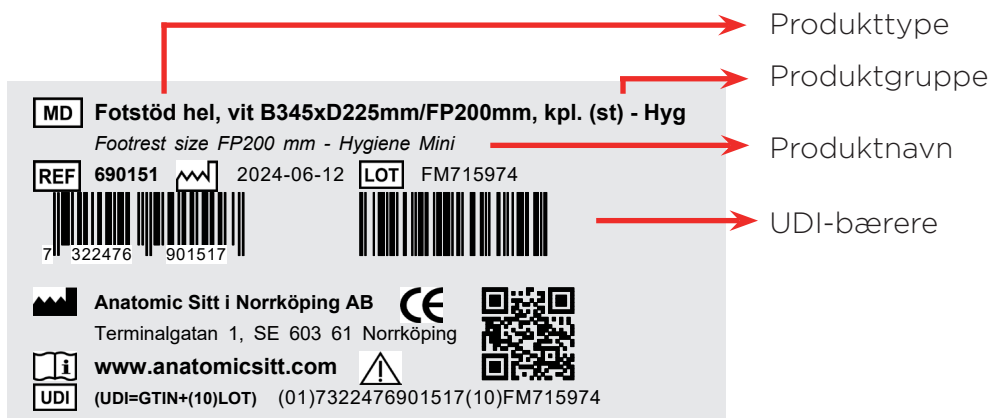

MD **Fotstöd hel, vit B345xD225mm/FP200mm, kpl. (st) - Hyg** → Produkttype
Footrest size FP200 mm - Hygiene Mini → Produktgruppe

REF **690151** 2024-06-12 **LOT** **FM715974** → Produktnavn
 7 322476 901517 → UDI-bærere

Anatomic Sitt i Norrköping AB  
 Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
www.anatomicsitt.com 
UDI (UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322476901517(10)FM715974

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslutninger om tilpasning/specialtilpasning skal træffes af autoriseret medicinsk personale og udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på et hjælpemiddelcenter eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer, tilpasning og afprøvning af hjælpemidlet skal altid udføres af autoriseret medicinsk personale (specialister på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid være med til at afprøve produktet samt foretage en risikovurdering før brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontrollér produktets tilsigtede funktionalitet, før du overdrager det til en bruger.



Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller tilsvarende er ansvarlig for at instruere brugeren og/eller andre personer i de nærmeste omgivelser i sikker brug af produktet. Kontrollér altid produktets funktion før brug.



Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren bør afbalancere det valgte sæde for at sikre, at enhver risiko for at tippe er elimineret. Anti-tip-støtter kan bestilles, hvis det er nødvendigt.



Justeringer må kun foretages som beskrevet i denne vejledning.



Efter alle monterings- og justerings eller servicearbejde skal alle fastgørelses-skruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

-  Bremserne skal altid være låst, når man stiger ind og ud af bad- og toiletstolen.
-  I nogle tilfælde kan hjulene kollideres med fodpladen. Hjulenes styreegenskaber kan blive påvirket, og det kan være nødvendigt at ændre fodpladens indstillinger.
-  Brug aldrig fodpladen, når du stiger ind og ud af hjælpemidlet.
-  Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme, når du sænker og hæver sædehøjden og ændrer hældningen. Stik ikke hænderne ind under sædet, når du foretager justeringer.
-  Udvis forsigtighed, og vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte, når du bruger chassiset på skrånende overflader. Produktet må kun parkeres på vandrette og plane overflader.
-  Løft altid i stellet. Løft aldrig i hjælpemidlet med brugeren i.
-  Udfør aldrig service mens produktet er i brug.
-  Vær opmærksom på, at hvis brugeren griber fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud fra hjælpemidlet, kan der ske en forskydning af tyngdepunktet, hvilket kan medføre en øget risiko for at vælte.
-  Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnittet Begrænsninger for aktuel maxlast.
-  Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.
-  Udfør altid en kontrol efter brug for at opdage rødmø eller trykmærker på brugeren.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip støtter.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Tjek hjulenes tilstand, og at de sidder godt fast.
- Tjek produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontrollér justeringen af kablerne til tilt og rygvinkel for at sikre, at de fungerer korrekt.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxlast

Den maksimale belastningsvægt er 80 kg.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned.

Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør

Kombinationer

For at produktet skal bevare sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic SITT. Se produktets bestillingsformular for eventuelt tilbehør og billede for reservedele.

Afvigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT A/S og landets kompetente myndighed

Tekniske data / Ydeevne

Starfish Mini

BAD- OG TOILETSTOL

Længde	670 mm
Bredde	500 mm
Frigang toilet (utiltet)	425 / 450 / 475 mm


Tilt	25° bagud, 5° fremad alt. 30° bagud, 0° fremad
------	---

Hjul	100 mm
------	--------

Max brugervægt	65 kg
----------------	-------

Max belastningsvægt	80 kg
---------------------	-------


Rammefarve	RAL 9010
------------	----------

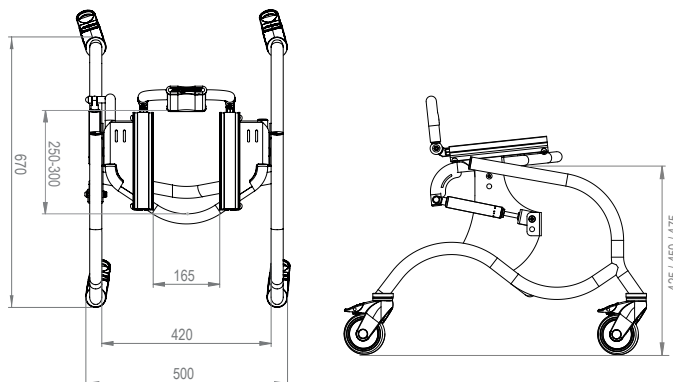

SÆDEDEL

STØRRELSE	SÆDEDYBDE	SÆDEBREDDE
-----------	-----------	------------

Str. 1	230-280 mm	220 mm
Str. 2	280-330 mm	220 mm
Str. 3	330-370 mm	260 mm

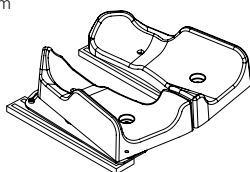


RYG

STØRRELSE	RYGHØJDE	KROPSBREDDE	RYGPROFIL
-----------	----------	-------------	-----------


Str. 1	300 mm	180 mm	350 mm
Str. 2	350 mm	200 mm	400 mm
Str. 3	400 mm	220 mm	450 mm

Hofte-/rygvinkel samtlige størrelser:
60° bagud, 20° fremad

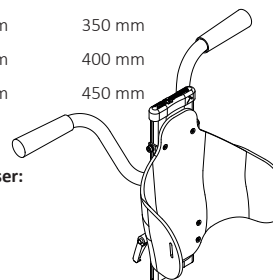


FODSTØTTE

	Varenr.	BxD	Stang
Hel	690151	345x225	250 mm
	690152	380x260	300 mm
	690153	380x300	350 mm

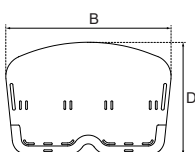


Delt	690161	155x190	250 mm
	690171		
	690162	160x220	300 mm
	690172		
	690163	180x255	350 mm
	690173		

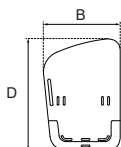


ARMLÆN

Størrelse	Mål mellem armlæn
Armlæn str. 1	180 - 260 mm
Armlæn str. 2	220 - 320 mm

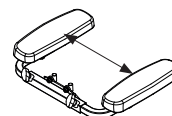


BORD

	MÅL			
Bord std.	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			

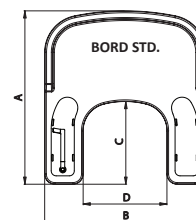


Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			

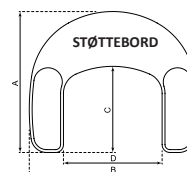


FODKASSE

A (højde fra fodplade)	
Str. 1	180 mm
Str. 2	210 mm
Str. 3	240 mm

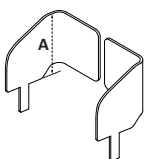

LÆGSTØTTE

B x H	
Str. 1	140 x 100 mm
Str. 2	140 x 120 mm
Str. 3	150 x 150 mm

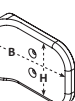

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Fodstøtteprofilens længde kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.

Længden af armstøtteprofilen kan afkortes, så den passer bedre til brugeren. Husk at flytte mærkaten, der angiver det maksimale justeringsområde.

Længden på rygstøtteprofilen kan afkortes. Profilen må aldrig være kortere end den længde, der kræves for at passe til alle ryglænspladebeslagene.

Urinskjoldet kan skæres til i den ønskede længde.

Risikovurdering


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

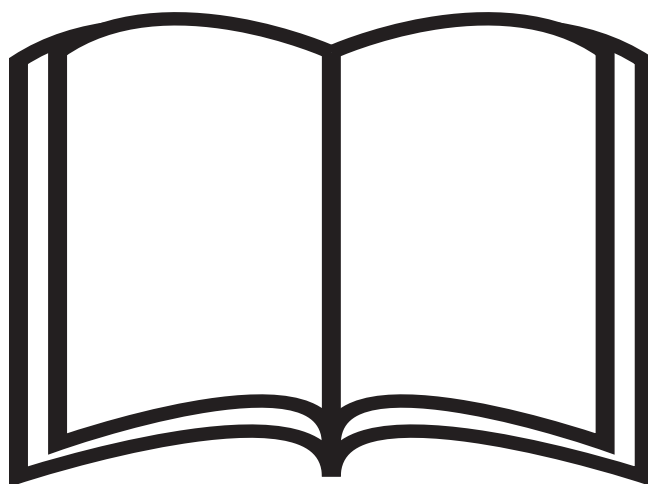

Værktøj

Justeringsnøglen, som du har brug for, til at udføre justeringer, findes integreret i toppen af rygprofilen (4 mm unbrakonøgle).

Værktøjet fungerer som beskyttelse af rygprofilen og skal sættes tilbage, når den ikke bruges.



Sædedel


Sædedelens bredde og dybde kan justeres.
Fjern polstringen for at få adgang til skruerne (A) + (B).

Justering af sædebredde

Løsn lidt på skruerne (A) + (B).
Sædedelene kan nu justeres ca. 3 cm i beslag bagtil på hver side ved hjælp af skruerne (A). Lås skruerne (A) og (B) efter justering.

Justering af sidedybde:

Løsn lidt på skruerne (A) + (B).
Sædedelene kan justeres op til 2,5 cm i dybdeled. Sædedelene skal justeres lige meget og være parallelle.
Lås skruerne (A) og (B) efter justering.

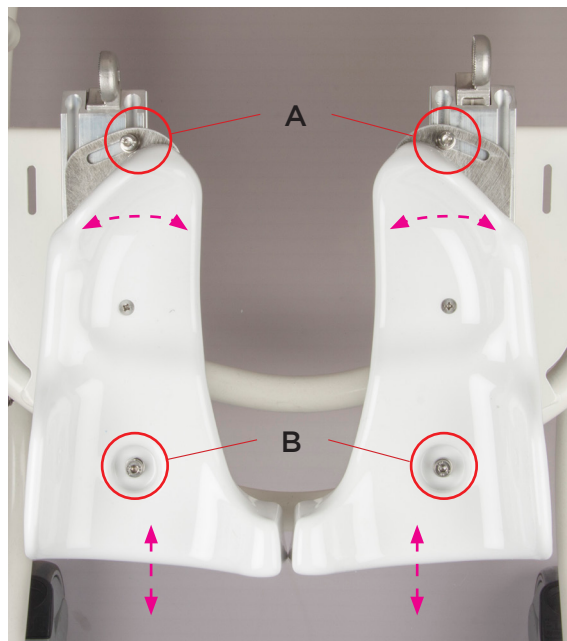

Pas på ikke at skrue skruerne helt ud!



Justering af sædedybde

Justering af sædedybden gøres ved at ryglænet flyttes bagud samtidigt med at fodstøtten flyttes fremad eller omvendt. Derved undgås ubalance i sædesystemet med øget risiko for at vælte.

Øg sædedybden

Løsn skruerne (A) og træk tagleddet lidt ud mod ryglænet (B).

Spænd derefter skruerne (A).

Løsn skruerne (C) og træk tagleddet lidt ud mod fodstøtten (D).

Spænd derefter skruerne (C).


Mindsk sædedybden

Løsn skruerne (A) og skub tagleddet lidt ind mod ryglænet (B).

Spænd derefter skruerne (A).

Løsn skruerne (C) og skub tagleddet lidt ind mod fodstøtten (D).

Spænd derefter skruerne (C).

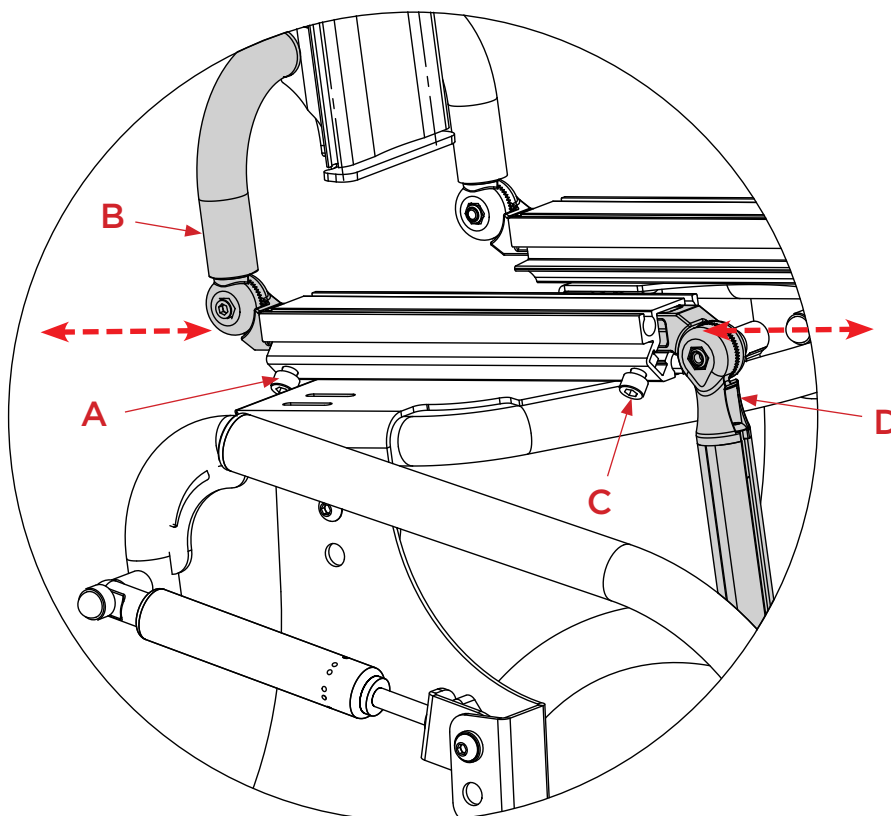


Sitshöjd

Højdejustering

Sædeenheden kan justeres 2.5 cm op eller ned inden brugeren sættes i sædet. Skru skruen (A) af på begge sider. Løft sædet til hullet over eller under standardhullet. Sæt skruen (A) i og skru sammen.



Justering må aldrig ske med brugeren i sædet.

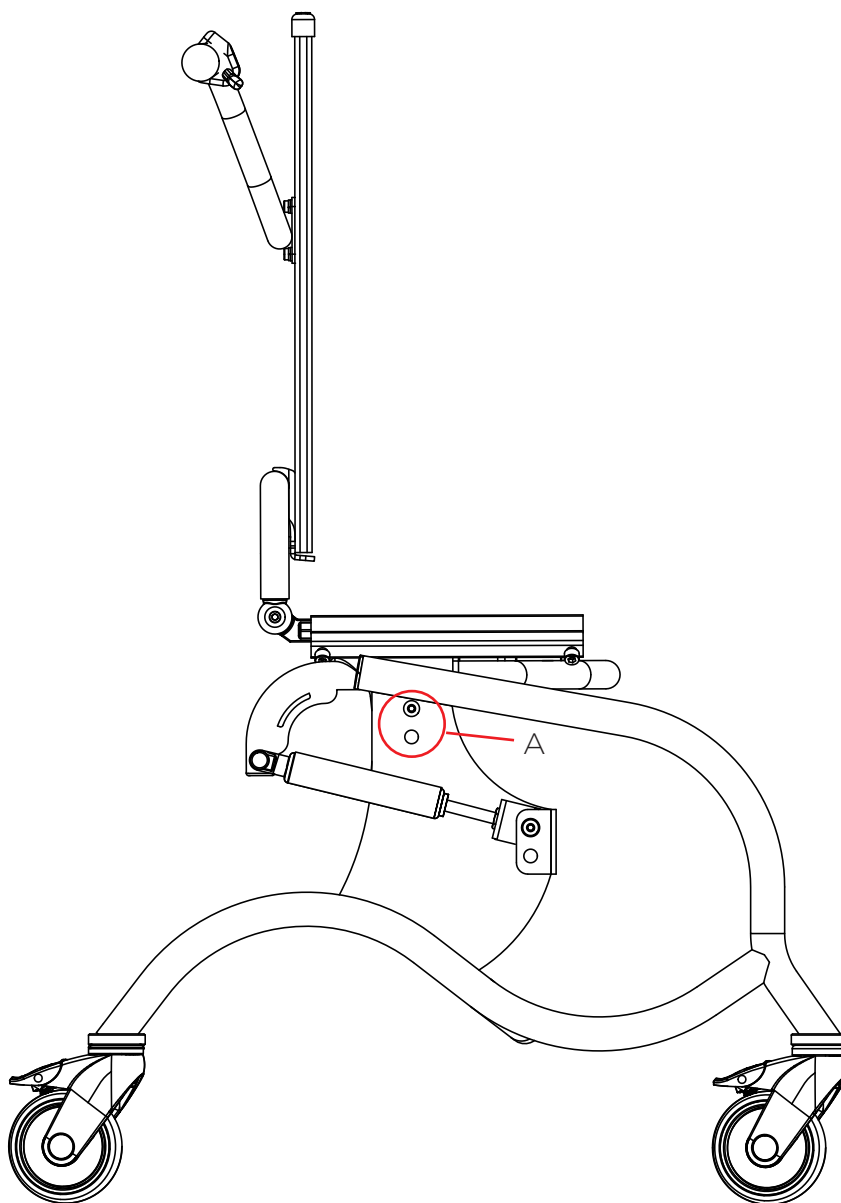


Hofte-/rygvinkling

Hoftevinklen kan justeres ved hjælp af unbrakonøglen og tagleddene (A) på begge sider. Vinklen må kun justeres, så den passer til sædets hoftevinkel og må ikke justeres med brugeren i sædet. Unbrakonøglen er øverst på rygprofilen (B).



Justering må aldrig ske med brugeren i sædet.

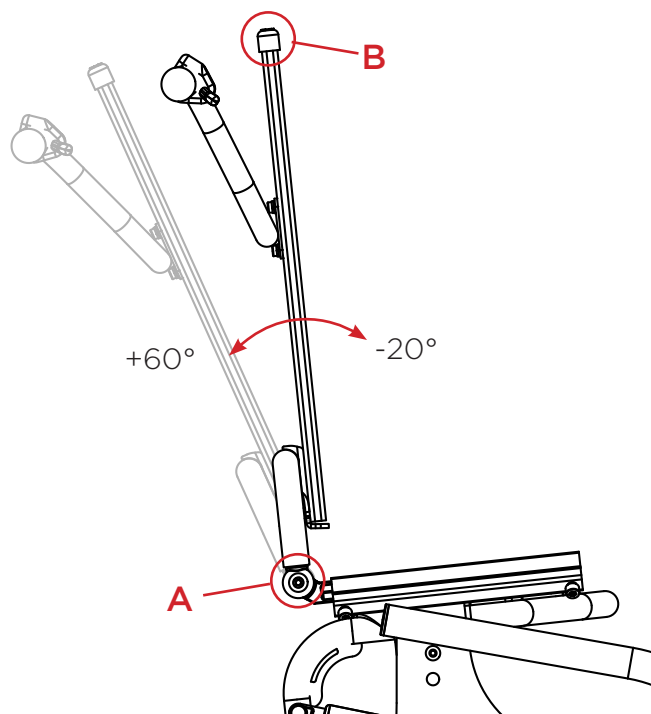


Tiltning

Når hele sædet skal vinkles (tiltes), skal du sørge for at have et fast greb om kørebøjlen, mens du trykker på udløseren for gaspatronen (A).

For at ændre rygvinkelområdet (V) fra (-5° til +25°) til (0° til +30°), skal du flytte skruen (B) til det nederste hul.

Indstil sædet til den ønskede vinkel, og slip udløseren(A). Hold øje med brugeren og sørg for, at intet er i fare for at komme i klemme eller på anden måde komme til skade.

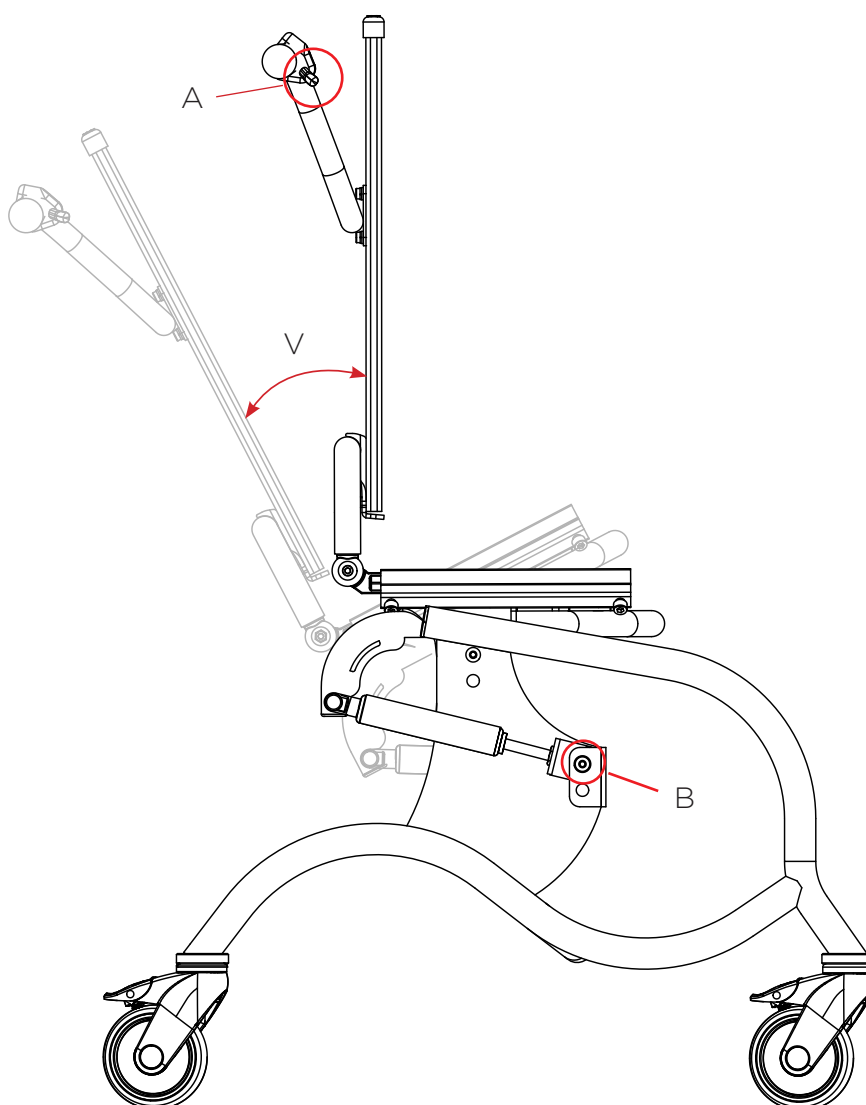


Sørg for at wiren til udløseren til gaspatronen altid løber frit efter justering.

Ryg

Justering i højde

For at justere ryggen i højden, løsn de to skruer (A) og vingeskruerne (B) som fæster ryggen på rygprofilen.


Juster søjlen til den ønskede højde, og spænd skruerne og vingeskruerne.

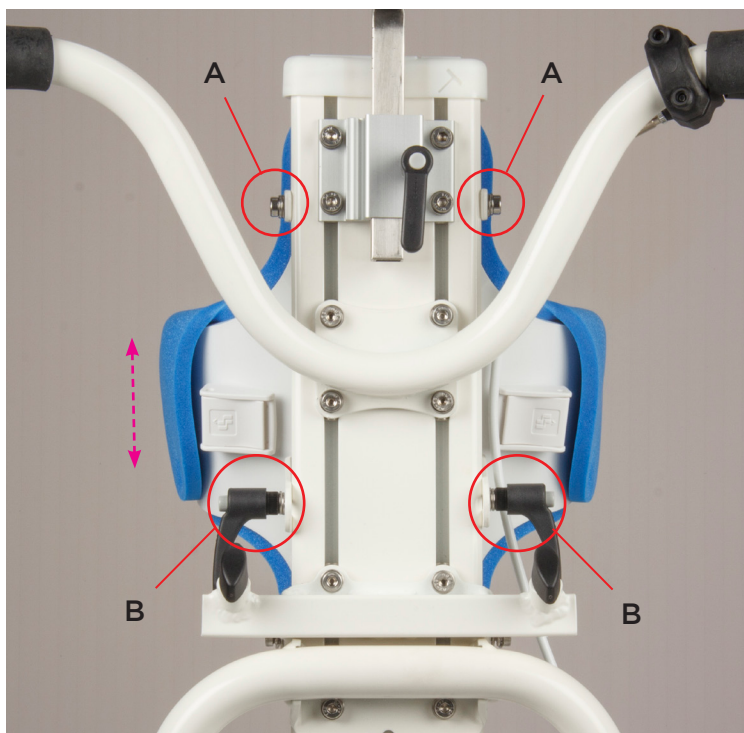

Justering af vinkel

For at justere ryggen i dybden, løsn vingeskruen (B), der fastgør rygpladen til rygprofilen. Skub rygpladen ud af profilen til den ønskede vinkel.

Spænd vingeskruen.

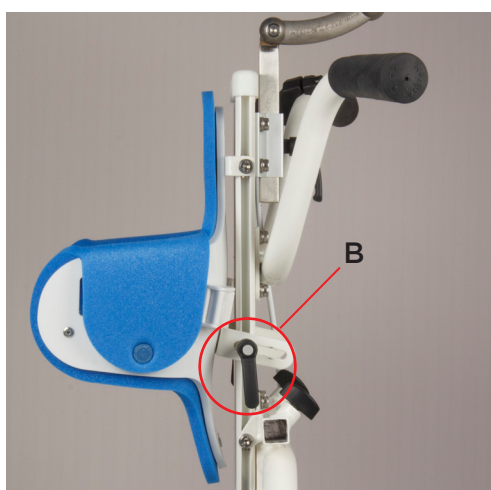

Armlæn

Montering, armlæn

Armstøtten skal monteres på rygprofilen. Monter armlænsbeslaget som vist på billedet. Juster til den ønskede højde. Spænd derefter skruerne (A)

Justering af armlænsbredde


Løsn fingerskruen (B). Juster til den ønskede bredde. Stram derefter fingerskruen.

Dybdejustering, armlæn

Løsn fingerskruen (C). Juster til den ønskede position. Stram derefter fingerskruen

Aftagning/påsætning af armlænet

Løsn fingerskruen (B). Træk armlænet ud af sidebeslaget. Påsætning sker omvendt.

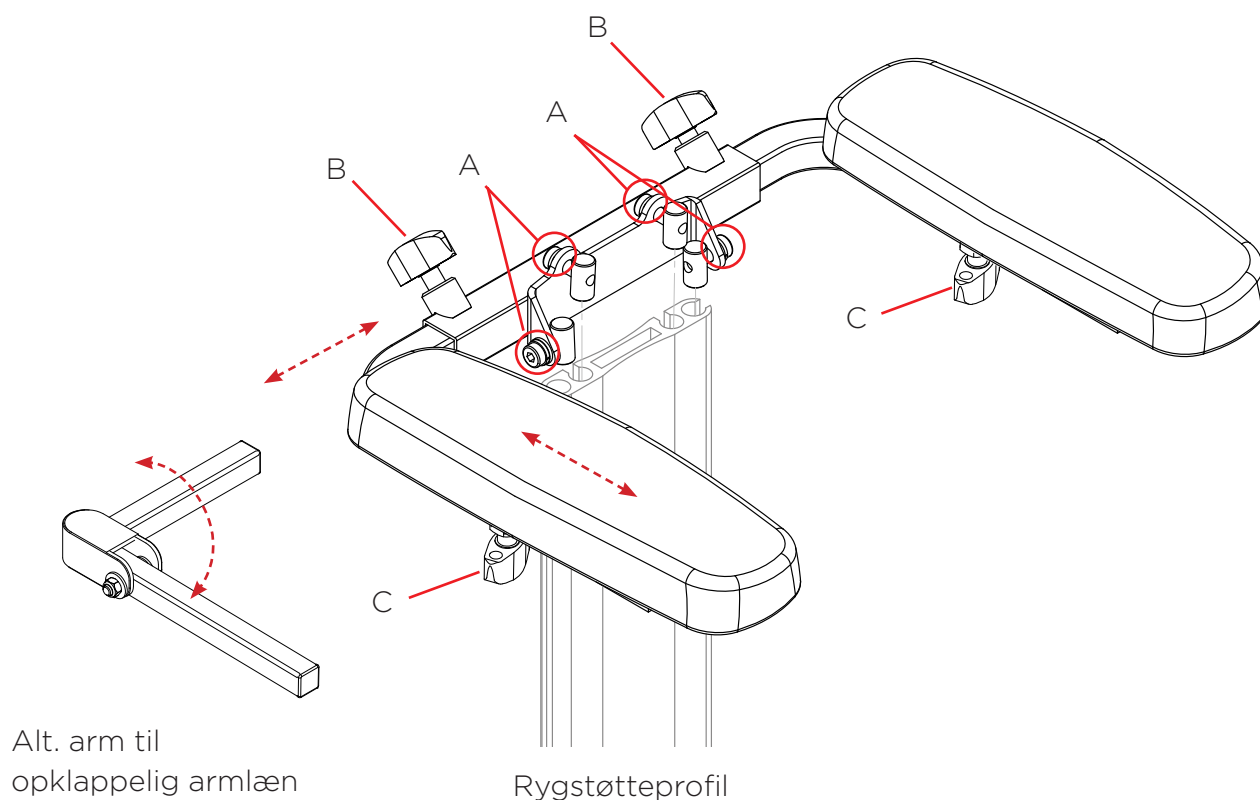


Armlænets justering i bredden må ikke ske udenfor MAX-markeringerne.



Bord fast (passer kun armlæn ryg)

Montering af bord

Læg bordet på armlænspladerne (B) og juster bredden og dybden på armlænet, så de ender lige under bordet. Vrid bordets låsearm (A) ind under armlænspladen.

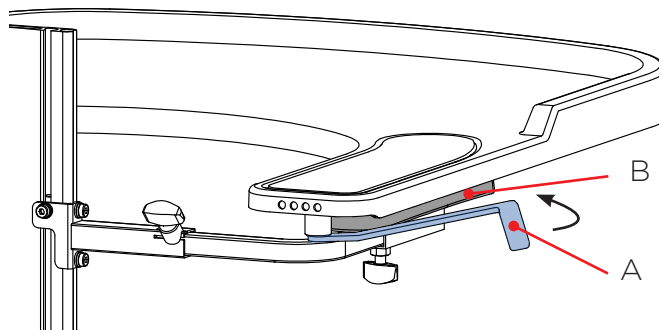

Ændring af monteringshul

Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden skal du bruge det valgte monteringshul under armlænets polstring på bagsiden af bordet. I basisversionen er låsearmen fastgjort i det midterste hul. For at ændre monteringshullet skal du først løfte polstringen i bagkanten. Markeringerne på bordets ydre bagkant angiver kun bordets størrelse.




Pas på ikke at løfte bordet foran, altså i bordets forkant.

Støttebord (passer kun til armlæn ryg)

Montering af bordet

Læg bordet på armlænspladerne (B) og juster bredden og dybden på armlænet så de placeres korrekt under støttebordet. Drej herefter bordets låsearme (A) ind under armlænspladen.

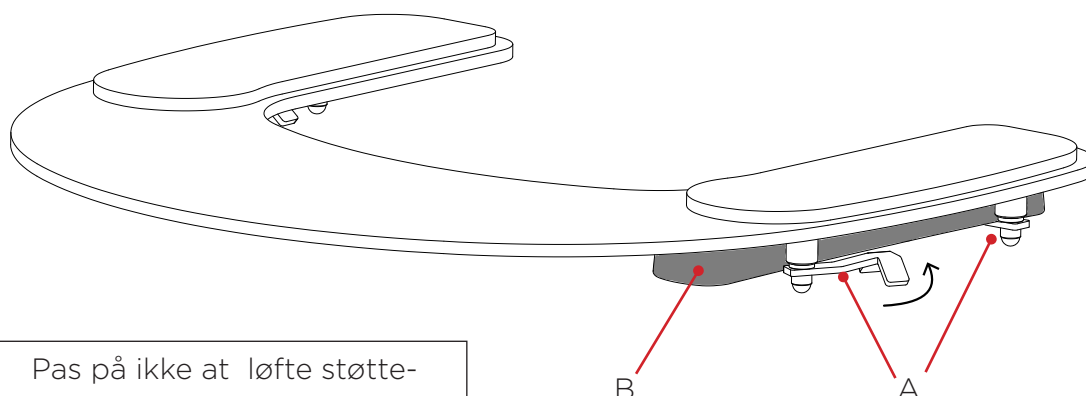


Pas på ikke at løfte støttebordet i forkanten.

Hovedstøtte

Montering / justering af hovedstøtte

- * Fjern den beskyttende hætte på rygprofilen.
- * Monter hovedstøttefæstet (B) i rygprofilens spor i ønskede højde.
- * Løsn skruerne (A) netop så meget, at det er muligt at justere med hånden.
- * Sæt brugeren i sædet og juster til ønskede position.
- * Stram samtlige skruer samt fingerskruen (C) og sæt endestoppet/værktøjet tilbage på rygprofilen.

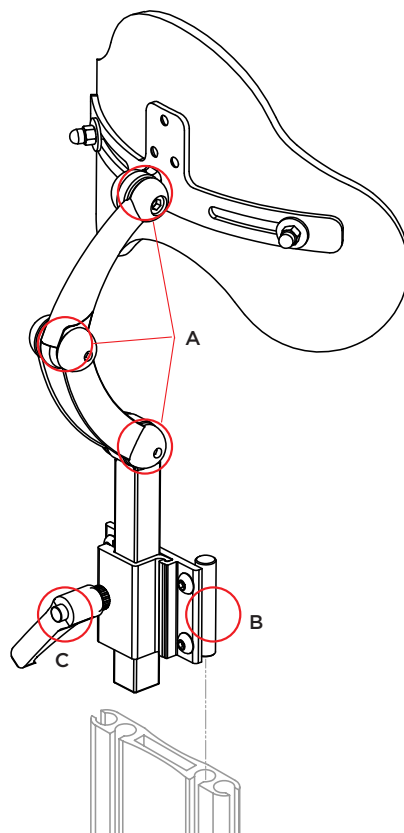


Hovedstøtten er enkel at fjerne:

- * Løsn fingerskruen (C) for at fjerne hovedstøtten.

Kørebøjle

Løsn skruerne (A) så meget, at profilskruerne (B) kan trækkes ind i profilen (C). Juster til den ønskede højde, og stram derefter skruerne (A).

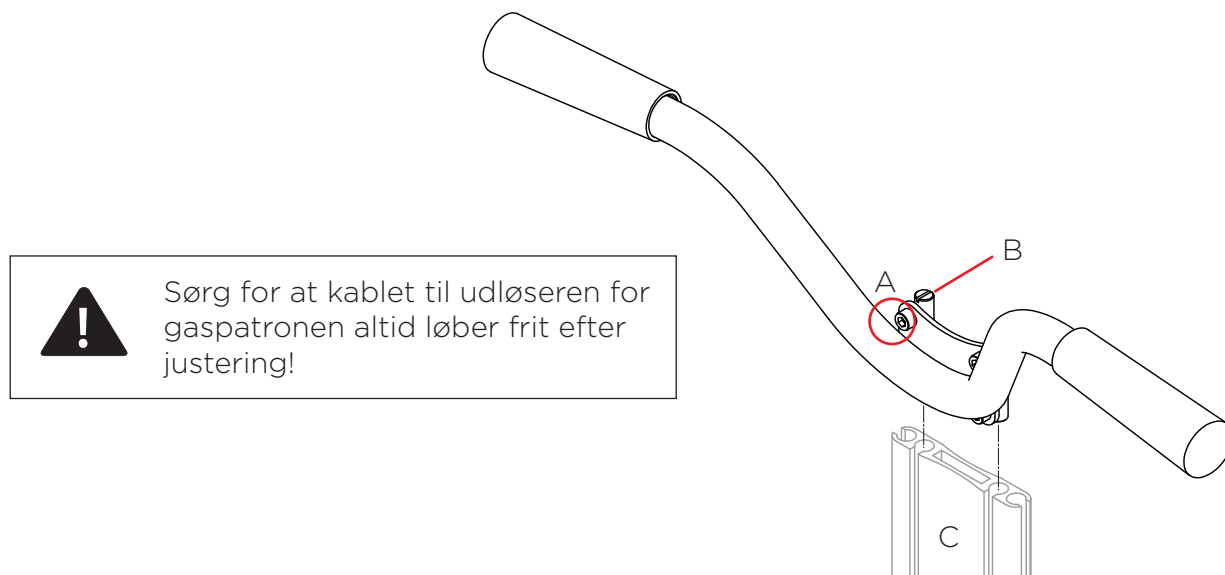


Kropsseler

Montering af kropsseler


Øvre fæste til Sternumstøtte, H-sele (billede 1):

- Fjern justeringsnøglen øverst på rygprofilen.
- Monter øvre beslag ved at føre profilskrue (B) ned i profilens spor, se billede 1.
- Åben spændet (A), træk fæstebåndet ind igennem hullet i beslaget og gennem spændet og lås spændet.

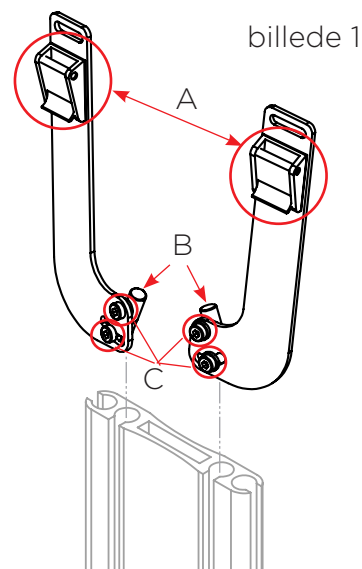


Nedre fæste til Sternumstøtte/H-sele mm:

Fæstet kommer formonteret længst nede på rygprofilen (billede 2). Fastgør stroppen ved hjælp af Tri-glide metoden og spændet, se billede 3.

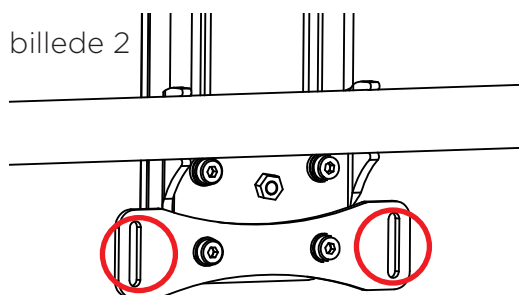

billede 3 Montering med Tri-glide spænde.

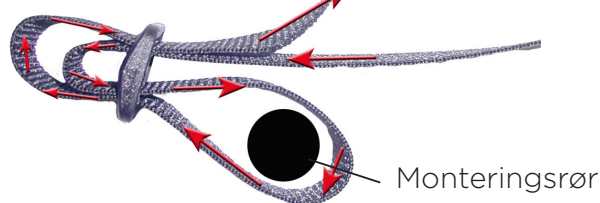

Justering af brystseler (Sternumstøtte, H-sele mm.)

Sæt brugeren i sædet og løsn unbrakoskruen, se pos. C, billede 1.

- Juster armene, så trækretningen på de øverste fastgørelsespunkter er i samme højde som skulderpartiet.
- Spænd de øverste skruer (C) iht. billede 1.
- Juster til den ønskede bredde ved at vinkle fladjernet til højre eller venstre. (Sørg for, at der er plads nok til halsen.)
- Spænd de nederste skruer (C) iht. billede 1.
- Juster brystselen i højden, så puderne giver optimal trykaflastning.



Sørg for at der er tilstrækkelig plads ved halsen!



OBS! Brystsele og brystbælte skal **altid** anvendes i kombination med et hoftebælte!

Montering af øvre selebeslag 690335 (billede 1)

Løsn hovedstøtten.

Beslaget (A) monteres på nakkestøtte stangen, se billede.

Genmonter hovedstøtten i sit fæste i ønskede højde.


Skub derefter beslaget (A) til den ønskede højde og fastgør det med låseskruen (B).

Justering af kropsseler (Sternumstøtte, H-sele mm.)

Åbn spænde (C).

Før selens øverste fastgørelsesrem (D) gennem spændet (C) og lås det.

billede 1

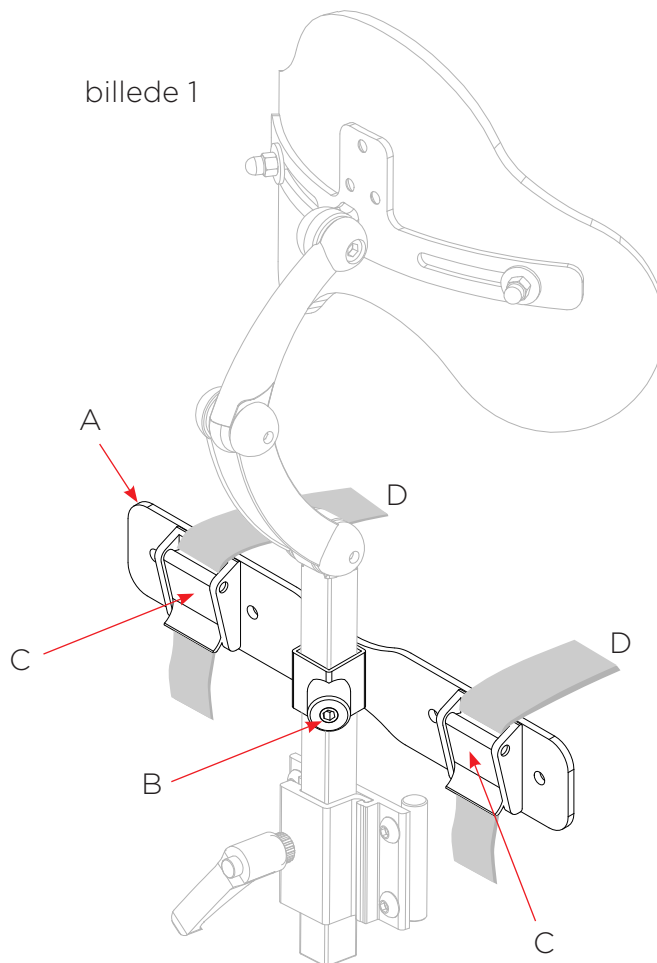


Ændring af bredden på selens fastgørelse

Beslaget (A) har 3 alternative breddejusteringer for at selen skal ligge korrekt over skuldrene. Spænderne (C) kan skrues af beslaget og flyttes til det ønskede par huller:

1, 2 eller 3 (se billede 2).


billede 2

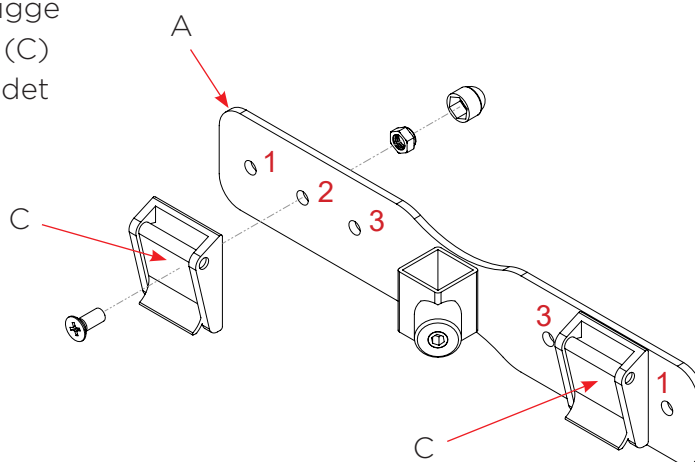

Hoftebælte

Montering:

Monter fæstebåndet til bæltet med Tri-glide spændet ved et eller flere fæstepunkter, som på billedet nedenfor.

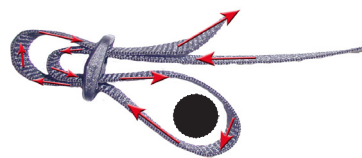


Tri-glide metoden

Anbefalinger til hoftese:le:

2-punkts bælte: Pos B

4-punkts bælte: Pos A + C

Se også brugervejledning-
en til hofteselen.

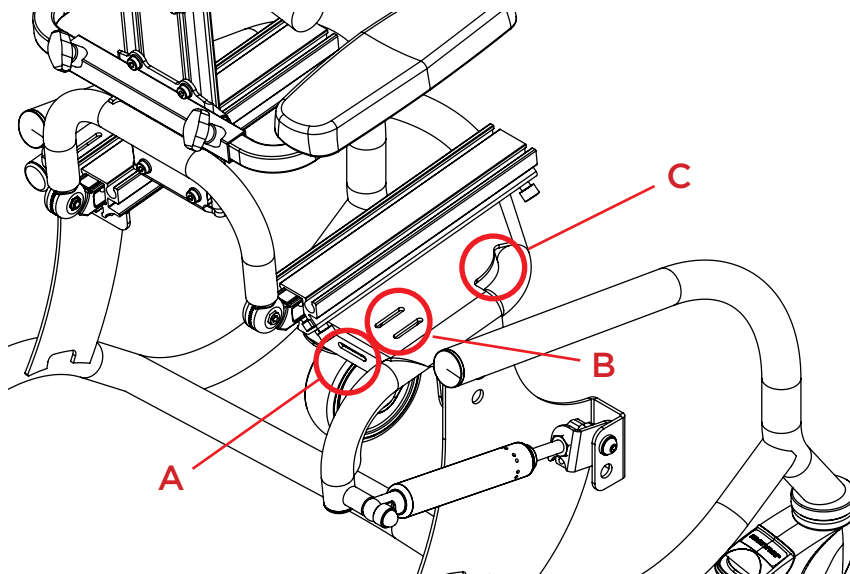

Justering:

- Spænd bæltet på begge sider af spændet for at centrere det.
- Juster bæltepuderne for at de giver optimal trykaflastning.
- Såfremt fastgørelsesstropperne er for lange, skal du klippe det overflødige strop af og brænde enderne.


Fodstøtte

Montering / afmontering af fodstøtten

- Før fodstøtten ind i profilen
se billedet
- Spænd låseskruen (A).

Vinkeljustering ved knæleddet

- Løsn vingeskruen (B).
- Juster til ønskede vinkel.
- Spænd derefter vingeskruen.

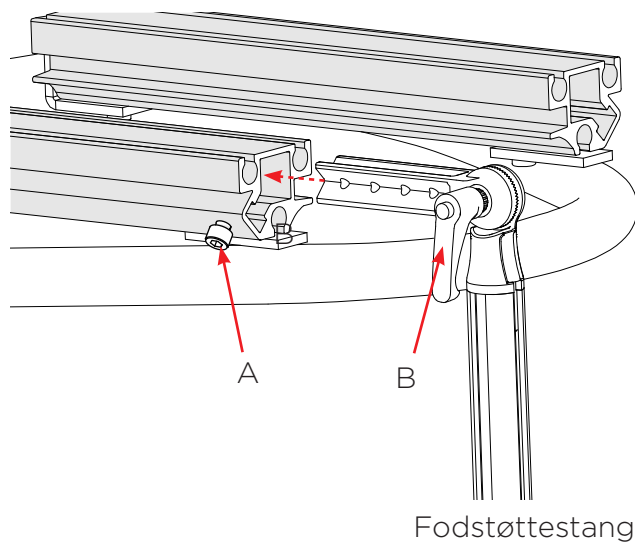


For at undgå risikoen for, at fodstøtten kolliderer med chassiset, bør fodstøtten indstilles, når sædet vippes fremad

Opklappeligt fodstøttebeslag

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) en smule for at justere til ønskede højde. Spænd herefter vingeskruen.

For justering af vinklen ved fodled løsner skruen (B). Juster til ønskede vinkel og spænd herefter skruen (B).

Brug klap-op-funktionen for at løfte fodstøttepladen foran.

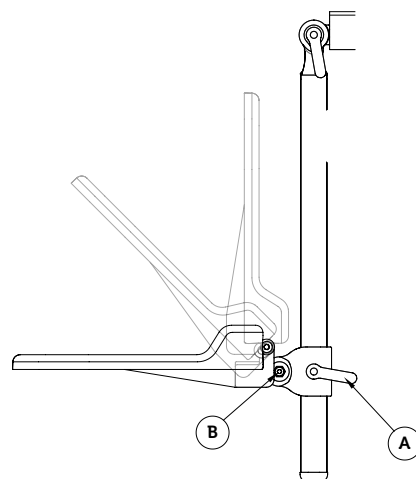

Lægstøtte

Montering

Inden montering af lægstøtten skal du først fjerne eventuelle fodstøtter. Løsn vingeskruen (F), der holder fodstøtten på plads på fodstøttestangen. Træk derefter fodstøttepladen og dens beslag nedad


Monter lægstøtten ved at skubbe profilskruerne (C) ind i fodstøttestangen, juster til ønskede højde og spænd skruerne (E). Sæt derefter fodstøtten på plads igen.

Højdejustering

For at højdejustere lægpladen løsner du skruerne (E) og herefter justerer du til ønskede højde. Spænd herefter skruerne (E).

Breddejustering

For at breddejustere lægstøtten løsner du skruerne (A) og herefter justerer du til ønskede bredde. Spænd herefter skruerne (A).

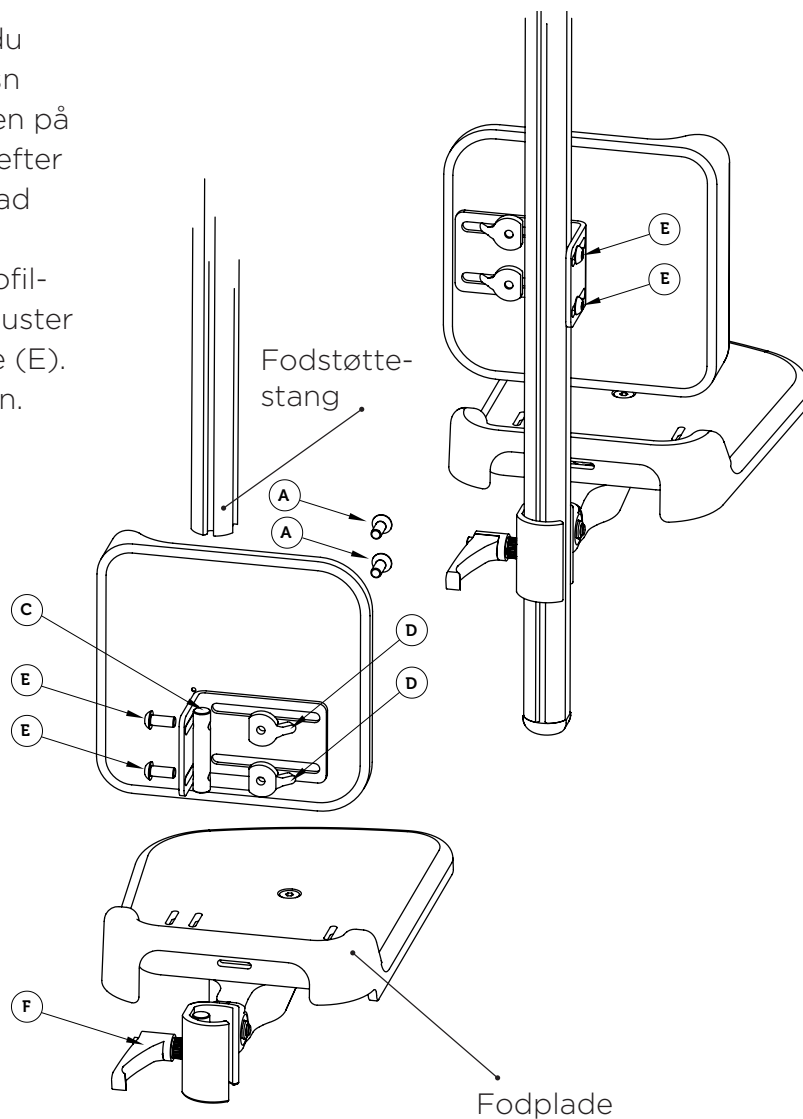


Bremse / Hjul

Låsning af hjul

Tryk bremsegrebet (A) ned med foden for at låse hjulet (se billedet).

Flip låsegrebet op for at frigøre hjulet.

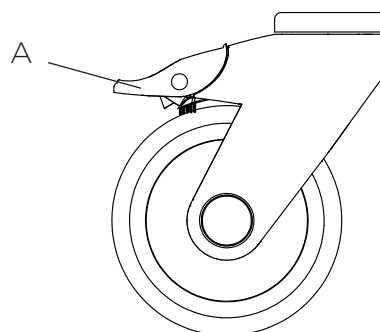

Anti-tip støtter


Montering af anti-tip støtten

Afmonter hjulet ved at skrue skruen (A) og skiven (B) af.

Skrue stopskruen (C) i.

Prøv at holde anti-tip støttebeslaget (D), så det store hul er mod det større hul i chassiset, og stopskruen går ind i det mindre hul på anti-tipsikringsbeslaget uden at stikke igennem. Hvis stopskruen stikker igennem, skal du skrue den lidt mere ind.


Hvis skruen sidder for langt inde, så den ikke forhindrer anti-tip støtten i at dreje, skal den skrues lidt ud. Hold anti-tip støtten på samme sted, og sæt nu skruen (A) ind gennem skiven (B) og hjulet, før skruen trækkes gennem anti-tip støtten og skrues fast i chassiset.

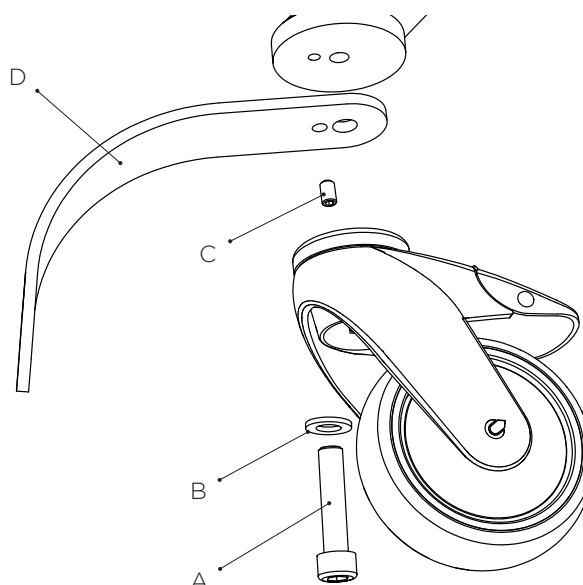

Potte

Montering

Monter potten ved at skubbe kanterne ind i rillerne (A) på bagsiden af holderen. Skub potten, indtil den møder røret ved forkanten.

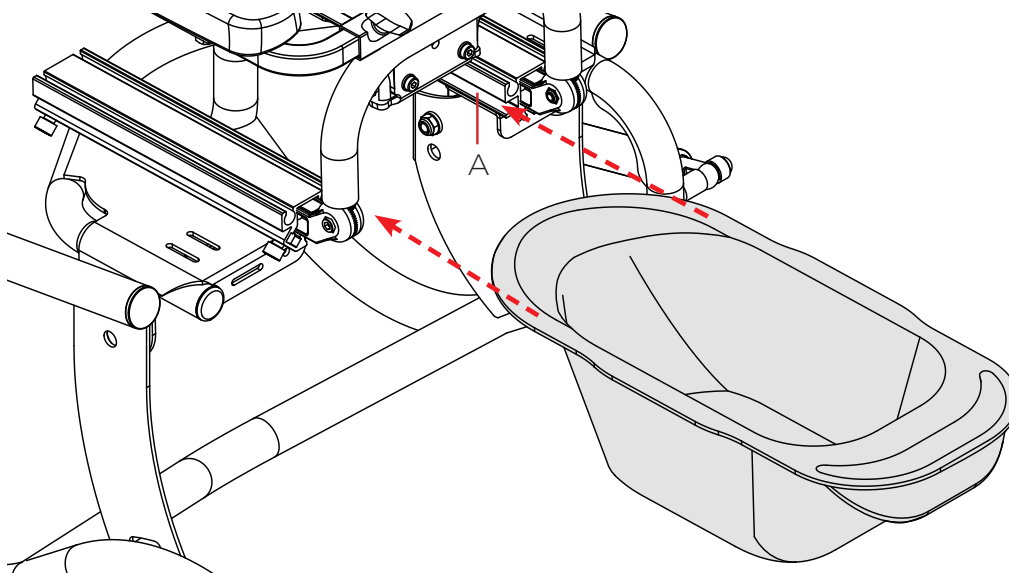

Tilt ikke stolen bagud, når du bruger potten!

Urinskjold

Montering

Monter urinskjoldet ved at klemme det fast mellem bensektionerne og stramme stroppen omkring et stelrør for at placere skjoldet bedre. Mål højden på urinskjoldet, så det passer til brugeren. Hvis der bruges potte, skal du klippe overskydende materiale i bunden af skjoldet, så den nederste kant hviler mod bunden af potten.



Opsummering og opfølgning

Efter montering og/eller justering skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugsanvisningen og fungerer efter hensigten.

Kontrollér indstillingerne af produktet og dets tilbehør for at sikre, at brugeren har en korrekt siddeposition.

Efter enhver form for montering, justering eller servicearbejde skal alle fingerskruer, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontrollér, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at tippe er elimineret.

Hvis der bemærkes defekter, må du ikke bruge produktet. Kontakt din forhandler af hjælpemidlet for handling.

Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontrollér produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Tjek især skruer, møtrikker og samt fingerskruer.
- Kontrollér at sædet er ordentligt fastsat på chassiset
- Kontrollér produktets stabilitet
- Kontrollér funktionen på eventuelle anti-tip støtter
- Kontrollér bremsearmenes funktion.
- Kontrollér hjulenes tilstand.
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. for mobilitet og låsning.
- Kontrollér justering af kablerne til tilt og rygvinkling, så disse fungerer korrekt.
- Kontrollér bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der bemærkes defekter, må du ikke bruge produktet. Kontakt din forhandler af hjælpemidlet for handling.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler

Efter badning/brusebad løsnes al polstring for at forhindre, at fugt og vand samler sig nedenunder, og hele produktet tørres.

Service samt vedligeholdelse af chassiset

For at sikre tryk og sikker drift, bør der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn/service varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængig af produktets brug og slid, men det anbefales mindst en gang hver 6. måned.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se pkt Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen. Ved udskiftning af dele skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic SITT.

Ved hver service lejlighed skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan repareres, skal produktet tages ud af drift. For rengøring af produktet, se afsnittene Pleje og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer
- Kontrollér at sædet er ordentligt fastsat på understellet
- Kontrollér at eventuelle anti-tip støtter fungerer
- Kontrollér bremsearmenes funktion
- Funktionstest og smør alle bevægelige dele som f.eks. led, kabler, hjul, knapper osv. Brug passende olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray osv.).
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, sædetilt, højdejustering, mm. Både med hensyn til justerbarhed, mobilitet og låsning.
- Kontrollér, at stemplerne låser i den valgte position.
- Kontrollér, at kablerne er korrekt placeret og korrekt justeret
- Kontroller hjulenes funktion samt at de sidder fast. På hjul med låsefunktion, kontroller at denne fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle i låst leje.
- Kontrollér at stolen ruller tilfredsstillende.
- Kontrollér evt. slitage på alle led, tagled og beslag. Vær sikker på at de låser, som de skal.
- Kontroller bæltet og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Efterkontrol

Når servicen udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til instruktionerne og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges. For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicstitt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør produktet med en svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende stoffer eller opløsningsmidler.

Fjern polstring og bælte eller seler. Polstring er en forbrugsvare og bør udskiftes, når det er nødvendigt. Polstring kan maskinvaskes ved maks. 60°C. Maskinens tromle skal dog være stor nok til at forhindre, at polstringen mister sin form, og polstringen bør ikke centrifugeres. Polstret skal lufttørres (MÅ IKKE tørretumbles, centrifugeres eller tørres i et tørreskab).

Bælte og seler kan vaskes i en 60°C skånevask, men må ikke tørretumbles eller tørres i et tørreskab. Brug en vaskepose. Bemærk: For mere information, se den aktuelle brugsanvisning for den respektive positioneringshjælp.

Zitzi Starfish Mini kan rengøres i et vaskeskab: 90°C i 3 minutter.

Ved rengøring af chassiset i vaskeskabet skal det fastgøres og placeres på højkant med hjulene låst. Fjern enhver polstring, bælte eller seler.

Kontroller ved reovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader/slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnittet Begrænsninger i brugervejledningen), når du vurderer, om produktet er egnet til istandsættelse.

Udskift ødelagte, slidte eller revnede dele. Brug kun originale dele fra Anatomic Sitt. Reservedele kan bestilles i henhold til den separate reservedelsliste/split tegning for det pågældende produkt. For at produktet kan beholde sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun monteres med reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S.

Funktionstest og smør alle bevægelige dele som f.eks. led, kabler, hjul, knapper osv. Brug egnet olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray osv.).

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også findes.

Touch-up-maling

For at forhindre rustskader eller forbedre ridser kan hvid touch-up-maling bestilles hos Anatomic Sitt A/S.

Artikelnummer: 689736, Touch-up-maling RAL9010 - Starfish Pro Mini.

Kontrolpunkter

Generelt:

- ☐ Kontrollér hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontrollér samtlige af produktets funktioner.

Chassis/Stel:

- ☐ Kontrollér, at alle skruer og møtrikker er spændt.
- ☐ Kontrollér, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- ☐ Kontrollér at tilt- og rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronerne låser i valgte leje.
- ☐ Kontrollér at kablerne er korrekt placeret og korrekt justeret.

Hjul:

- ☐ Kontrollér, at hjulboltene er spændt korrekt.
- ☐ Kontrollér at svinghjulene drejer frit og at lejerne ikke sidder fast.
- ☐ Kontrollér at hjul med låsefunktion fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle i låst position.
- ☐ Kontrollér at stolen ruller tilfredstillende.

Fodstøtte:

- ☐ Foretag funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Tjek for slitage på alle låseled, og sørg for, at de låser korrekt.

Hovedstøtte:

- ☐ Kontroller polstring og udskift ved behov.
- ☐ Kontroller at hovedstøtteledene låser.
- ☐ Kontroller at beslaget på hovedstøtten låser.

Armlæn:

- ☐ Kontrollér armlænets indstillinger for højde, dybde og bredde.
- ☐ Kontroller armlænets fastgørelseselementer, så de låses korrekt.

Øvrigt tilbehør:

- ☐ Kontrollér alle dele efter slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontrollér eventuelle låse og indstillingsmuligheder.

Opfølgning

Når renoveringen er afsluttet, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til instruktionerne og fungerer efter hensigten. Kontrollér også, at mærkning, etiketter og advarselssymboler er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et brugt produkt skal afmonteres og genbruges. Dele skal adskilles efter materialetype og bringes til en genbrugsstation eller tilsvarende. Batterier og gaspatroner sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Garantien gælder generelt i et (1) år mod fabrikationsfejl fra leveringsdatoen eller efter aftale. Garantien dækker ikke udefrakommende påvirkninger eller unormal håndtering. For at garantien kan behandles, skal den defekte vare returneres. Vedlæg altid følgesedlen.

For at kunne vurdere reklamationen bedst muligt skal produktet være tørt og rengjort, når det returneres.

Beskriv fejlen og dens årsag så detaljeret som muligt. Gør krav på garantireparation eller eventuel garantiombytning. Vedlæg en kopi af fakturaen, og oplys, at produktet skal returneres til dig efter reparation. Angiv leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Der findes en reklamationsformular på vores hjemmeside.

Pak det tørre og rene produkt godt ind for at beskytte det mod eventuelle stød under transporten. Glem ikke at notere forsendelsesnummeret eller lignende på dine dokumenter. På den måde kan du spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

Returnering

Forkert bestilte eller forkert leverede varer skal returneres inden for 20 dage efter leveringsdatoen. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Angiv årsagen til, at du returnerer dine varer. Der findes returformularer på vores hjemmeside.

Pak produktet godt ind for at beskytte det mod eventuelle stød under transporten. Glem ikke at notere forsendelsesnummeret eller lignende på dine dokumenter. Dette er så du kan spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

Bemærk venligst, at specialfremstillede produkter ikke kan returneres!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændringer foretaget.

Etiket på hovedprodukt

Opdateret eksempel

s.6

Revisionsfortegnelse

ver. 1.0 2025-05-02

SE

Anatomic Sitt AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

Følg os på



World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

