

ZITZI STARFISH PRO






Zitzi Starfish Pro

En kombineret bade- og toiletstol. Stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder for at give en suveræn støtte og positionering.

Trin 1. Bækken- & benpositionering


Kombinationen af et korrekt indstillet sidde-system, sædebrønd, effektivt hoftebælte og en god støtte til sacrum giver forudsætningerne for at mindske fremadskridning, hvilket fordrer aktivitet og postural kontrol. Siddesystemet er trinløst indstillelig i sædedybden og i abduktion/adduktion, hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og samtidigt lader brugeren vokse med siddesystemet.

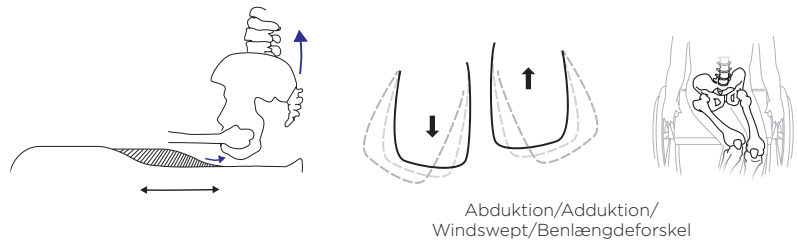

Trin 2. Hoftebæltets placering


Et korrekt monteret positioneringsbælte giver forudsætning for at positionere bækkenet og mindske risikoen for fremadskridning.

Vi tilbyder positioneringsbælter i forskellige materialer, modeller og størrelser

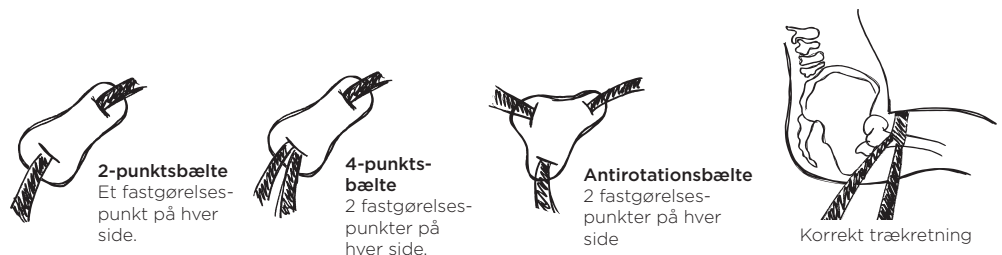

Trin 3. Trepunktspositionering

Justerbare kropsstøtter sammen med f.eks. hoftestøtte skaber gode forudsætninger for at optimere positionering af kroppen. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har mulighed for både at korrigere og bibeholde positionen

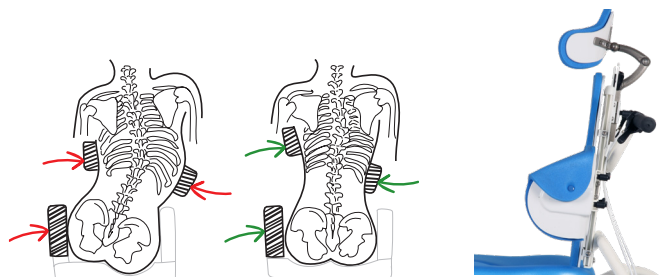

Positioneringsseler

Sammen med hoftebæltet er H-seler eller sternumseler med til at holde overkroppen mod ryglænet. Selerne modvirker rotation af overkroppen og er i mange tilfælde altafgørende for en god hovedkontrol.



Sternumstøtte

- Giver koncentreret støtte over sternum
- Modvirker fremadfald




H-sele

- Giver støtte til både skulderparti og overkrop samt modvirker rotation
- Passer også godt til borgere, som bruger sonde

Trin 4. Hoftevinkeljustering

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt en beroligende effekt ved extensionsspasticitet. Ryggen er stilbar i hoftevinklen, hvilket kan bryde spasticiteten og flexledet bevarer den gode siddestilling.

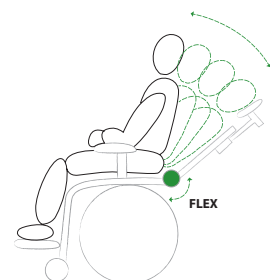

Manuelt stel

Hovedstøtte

Den tre-leddet hovedstøttestang giver optimale justeringsmuligheder. Hovedstøtten er også højdejusterbar.

Billedet viser:

Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt siddedel) med justerbar ryg og kørehåndtag.

Kørebøjle

Ingår som standard.

Positionering

Justerbare beslag til montering af sele.

Kropsstøtter

Individuelt justerbare kropsstøtter.

Højdejusterbar ryg

Til opnåelse af postural kontrol.

Hele konstruktionen er rustfri.

Manuel justerbar højde af sædedelen.

Fodstøtte

Mange forskellige fodstøtte-varianter tilbydes som tilbehør.




Multi-Justerbar ryg

Muliggør bedre postural kontrol, hvilket mindsker risikoen for fejlstillinger samt øger mulighederne for aktivitet. Vi har her mulighed for både at korrigere samt bibeholde positioneringen ud fra de rette siddestillingsmæssige principper.

Indstillelig tilt og hoftevinkel

Fast støtte er nødvendig for at positionere brugeren og skabe en funktionel siddestilling. Ryggen kan enkelt indstilles i en ønsket vinkel.



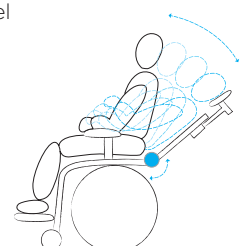




Tekniske data

Passer brugerhøjde	Størrelse 1 ca. 120-145 cm	Størrelse 2 140-175 cm	Størrelse 3 170-200 cm
Stel med hel sædedel	Sædedel hel str. 1	Sædedel hel str. 2	Sædedel hel str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (med betræk) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Størrelse hygiejnehul (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Stel med delt sædedel	Sædedel delt str. 1	Sædedel delt str. 2	Sædedel delt str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredde bendel m betræk (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Størrelse hygiejnehul (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigang toilet, Man. stel	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigang toilet, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sædehøjde, Man. stel**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sædehøjde, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5° til +30°	-5° til +30°	-5° til +30°
Hofte-/rygvinkel	-10° til +35°	-10° til +35°	-10° til +30°
Stel, bredde (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Stel, længde (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigang	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vægt inkl. hovedstøtte, fodstøtte, armlæn	31 kg	33 kg	35 kg
Max brugervægt Man. stel:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brugervægt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

* Max sædebredde fås, når sædedelene er monteret i yderspor på sædepladen
 ** ekskl. betræk

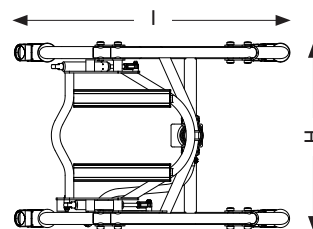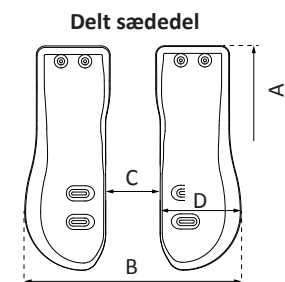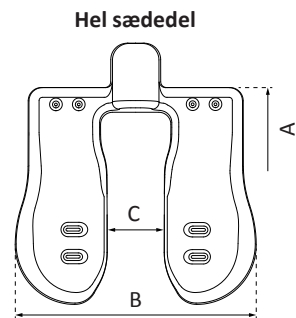

Rammefarve: RAL 9010

RYG	højde (mm)	Kropsstøtte (mm)
Plast (E) Profil	Bredde (F) Dybde (G)Højde (H)	
Str. 1	460 450	210-300 140 210
Str. 2	560 550	240-340 170 230
Str. 3	660 650	300-400 200 260

Kropsstøttebeslaget justeres frit i højdeleddet på rygprofilen. Hver kropsstøtte kan justeres individuelt 85 mm i højdeled og 45 mm i sideled.

BORD	Mål
Bord std.	A B C D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm
Str. 4	660 x 600 x 320 x 385 mm
Str. 5	660 x 650 x 320 x 435 mm
Støttebord	A B C D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm
Str. 5	620 x 740 x 380 x 440 mm

Fodstøtte	mål B x D
Hel str. 1	345 x 225 mm
Hel str. 2	380 x 255 mm
Hel str. 3	380 x 310 mm
Delt str. 1	160 x 220 mm
Delt str. 2	180 x 255 mm
Delt str. 3	180 x 305 mm

Str:	1	2	3
Stangens længde	30	40	40 cm

STARFISH ARMLÆN	
Armlæn fra ryg	mål indenfor armlæn
Armlæn str. 1	30 - 42 cm
Armlæn str. 2	36 - 48 cm
Armlæn str. 3	44 - 54 cm

Hoftestøtte	A x B x C (min-max)
Str. 1-2	220 x 140 x 350-450 mm
Str. 3	260 x 165 x 410-510 mm

Højdejusterbart stel

Hovedstøtte

Den tre-leddet hovedstøttestang giver optimale justeringsmuligheder. Hovedstøtten er også højdejusterbar.

Billedet viser:

Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt siddedel) med justerbar ryg og kørehåndtag.

Positionering

Justerbare beslag til montering af sele.

Kørebøjle

Indgår som standard.

Kropsstøtter

Individuelt justerbare kropsstøtter.

Højdejusterbar ryg

Til opnåelse af postural.

Hele konstruktionen er rustfri.

Tiltbart sæde

Manuel eller elektrisk styring

Højdejusterbart sæde

Justerbar højde på sædedelen ved hjælp af pumpe eller el.

Fodstøtte

Mange forskellige fodstøttevarianter tilbydes som tilbehør.




Polster/betræk

Zitzi Starfish Pro serien har et trykaflastende polster/betræk. Denne form for polster er special fremstillet til hygiejnesituationer og er både væske- og smudsafvisende samtidig med at det føles behageligt mod kroppen.

Justerbare bendele

Man kan vælge sædedel, hvor man trinløst kan abducere eller adducere bendelene. Sædet kan justeres i dybden, for at opnå en så optimal understøttelsesflade i siddestillingen som mulig, og samtidig lade brugeren vokse med hjælpemidlet. Muligheden tilbydes nu også til kateterisering, eftersom der er bedre plads mellem bendelene.

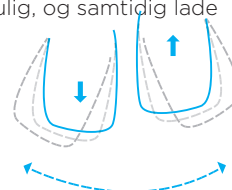

Tilbehør Starfish Pro



Hovedstøtte



Øvre selebeslag



Øvre monteringsbeslag sele



Justerbar ryg/justerbare kropsstøtte



Urinskjold med og uden rem



Potte



Stænkskærm



Lægstøtte og polstring



Fodstøtte



Delt fodstøtte kugleleds-adapter



Hoftebælte



Antirotationsbælte



Sternumstøtte



H-sele



Armbind



Ankelbæspænding Basic



Armlænsplade str. 1




Armlænsplade str. 2-3



Armlæn rygprofil



opklappeligt armlæn

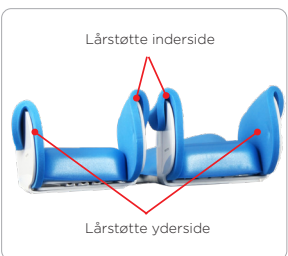

Lårstøtte inder-/yderside



Polstring ekstra aflastende

ZITZI™ STARFISH PRO

Individuelle tilpasningsmuligheder giver et godt udgangspunkt for at opnå en god siddestilling i en bad- og toiletstol, og Zitzi Starfish Pro tilbyder unikke muligheder for individuel tilpasning, uden at gå på kompromis med støtte og siddestilling.



Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Fax 86 17 01 75
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com
www.facebook.com/AnatomicSITT.dk
youtube.com/anatomicsitt