



Zitzi
Starfish Pro



Brugervejledning

Brugervejledning, monterings-/justeringsvejledning,
service, vedligeholdelse og renovering



Denne brugsanvisning henviser til Zitzi Starfish Pro-hygienestolen med tilbehør. For en komplet oversigt over det tilsigtede tilbehør, se produktets bestillingsinformation.

Indholdsfortegnelse

Producent	3	Ryg	25
Specialtilpasning.....	3	Hoftevinkel.....	26
Introduktion	4	Tilt af sædeenhed	27
Indledning	4	Hoftestøtte	28
Korrespondance - mærkning	4	Armlæn ryg (delt beslag).....	29
CE-mærkning - klassificering	4	Armlæn ryg (helt beslag).....	30
Overensstemmelseserklæring.....	4	Armlæn stel.....	31
Tilsigtede formål.....	4	Bord fast.....	32
Symbolfortegnelse	5	Støttebord	32
Produktmærkning.....	6	Hovedstøtte	33
Sikkerhedsinstruktioner	7	Kørebjæle	33
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Kropsseler	34
Advarsler og forholdsregler.....	7	Hoftebælte	36
Kontrol før brug	9	Fodstøtte.....	37
Begrænsninger.....	10	Lægstøtte	39
Afklemningsrisiko.....	11	Fodkasse	40
Kombinationer	11	Broms på hjul	41
Afvisninger/tilbud	11	Anti-tip støtte	41
Tekniske data/ydeevne.....	12	Potte.....	42
Tilpasning og specialtilpasning.....	13	Erinskjold.....	43
Monterings- & justeringsinstruktioner ..	14	Stænk skjold	44
Stel	15	Opsummering og opfølgning	45
Sædedel.....	23	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner.	46
Abduktions-/adduktionsstøtte	24	Kontrol før brug	46
		Service og afhjælpende vedligeholdelse..	47
		Renovering	48
		Affaldssortering	51
		Garanti og retur.....	52
		Revision.....	53

Producent

Produktet er fremstillet af Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgsadresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 7

www.anatomicsitt.dk

Specialtilpasning



Afkryds i feltet ved eventuel specialtilpasning af produktet.

CE-mærkningen **ophører med** at gælde ved specialtilpassede produkter.



Introduktion

Indledning

Tillykke med dit nye hjælpemiddel. Vi håber, du får stor glæde af produktet. For at kunne udnytte Zitzi Starfish Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgaver kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT om produkterne. Du finder serienummeret på siddepladens bagerste del

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk

Tilsigtede formål

Zitzi Starfish Pro er en højdejusterbar toilet- og brusestol med hjul, der er designet til at muliggøre personlig hygiejne for personer, der har svært ved at bruge et almindeligt toilet eller brusebad. Stolen har flere justeringsmuligheder og kan udstyres med forskelligt tilbehør for at opnå en bestemt siddestilling. Zitzi Starfish Pro er et flergangsprodukt.

Symbolfortegnelse

	Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger mv		Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres
	Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.		Angiver at produktet er medicinsk udstyr
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet		Angiver producentens reference-nummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres
 www.anatomicsitt.com	Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.		Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver, at brugsanvisningen skal læses for at få vigtige sikkerhedsoplysninger, om f.eks. advarsler, der ikke står på etiketten på det medicinske udstyr.		Unik produktidentifikator, der muliggør entydig identifikation af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato		Angiver at produktet er CE mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.		Mærkat på kørehåndtaget. Angiver betjening til rygvinkling
	Specificerer, at elektroniske produkter ikke bør håndteres som almindeligt affald.		Mærkat på kørehåndtaget. Angiver betjening til tiltvinkel
 Rygvinkellås Back angle lock	Mærkat på stellet. Angiver betjeningslementer til låsning af rygvinklen		For at identificere en patienttilsluttet del af type BF (for elektrisk udstyr til medicinsk brug).
	Angiver at produktet er dobbelt-isoleret, det vil sige efter isolationsklasse II	IPX6	Beskyttelse mod sprøjtende vand med kraftigere stråle, for eksempel højtryksspuling.
	Mærkat på armlæn og hoftestøtte. Angiver den maksimale afstand, du kan justere støtten i bredden.		

Produktmærkning

Etiket på hovedprodukt

MD	Zitzi Starfish Pro Hydraulisk, siddel delad stl. 2			→ Produkt navn
	<i>Starfish Pro Hydr. seat divided size 2</i>			
REF 689417		2023-11-15	SN 62722	→ Stegkode (EAN-13 eller REF samt SN)
				→ Max belastningsvægt
			Maxlast 150kg	
	Anatomic Sitt i Norrköping AB			→ UDI-bærere: QR-kode (GS1-128)
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping			
	www.anatomicsitt.com			→ UDI= GS1-128
UDI	(UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322476894178(21)62722			

Etiket på tilbehør

MD	Höftstöd stl. 1-2 kpl. (par) - Starfish Pro			→ Produkt navn
	<i>Hipsupport size. 1-2 - Starfish Pro</i>			
REF 689481		2023-11-01	LOT FM712928	→ Stegkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
				
	Anatomic Sitt i Norrköping AB			→ UDI-bærere: QR-kode (GS1-128)
	Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping			
	www.anatomicsitt.com			→ UDI= GS1-128
UDI	(UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322476894819(10)FM712928			

Sikkerhedsinstruktioner

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslutninger om tilpasning/specialtilpasning skal træffes af autoriseret medicinsk personale og udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på et hjælpemiddelcenter eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer, tilpasning og afprøvning af hjælpemidlet skal altid udføres af autoriseret medicinsk personale (specialister på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid være til stede og afprøve produktet samt foretage en risikovurdering før brug.

Advarsler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontrollér produktets tilsigtede funktionalitet, før du overdrager det til en bruger.



Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller tilsvarende er ansvarlig for at instruere brugeren og/eller andre personer i de nærmeste omgivelser i sikker brug af produktet. Kontrollér altid produktets funktion før brug.



Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller en person med tilsvarende kompetence og viden om brugeren bør afbalancere det valgte sæde for at sikre, at enhver risiko for at tippe er elimineret. Anti-tip-støtter kan bestilles, hvis det er nødvendigt.



Justeringer må kun foretages som beskrevet i denne vejledning.



Efter alle monterings- og justerings eller servicearbejde skal alle fastgørelses-skruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

-  Bremserne skal altid være låst, når man stiger ind og ud af bad- og toiletstolen.
-  I nogle tilfælde kan hjulene kollideres med fodpladen. Hjulenes styreegenskaber kan blive påvirket, og det kan være nødvendigt at ændre fodpladens indstillinger.
-  Brug aldrig fodpladen, når du stiger ind og ud af hjælpemidlet.
-  Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme, når du sænker og hæver sædehøjden og ændrer hældningen. Stik ikke hænderne ind under sædet, når du foretager justeringer.
-  Udvis forsigtighed, og vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte, når du bruger chassiset på skrånende overflader. Produktet må kun parkeres på vandrette og plane overflader.
-  Løft altid i stellet. Løft aldrig i hjælpemidlet med brugeren i.
-  Udfør aldrig service mens produktet er i brug.
-  Vær opmærksom på, at hvis brugeren griber fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud fra hjælpemidlet, kan der ske en forskydning af tyngdepunktet, hvilket kan medføre en øget risiko for at vælte.
-  Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnittet Begrænsninger for aktuel maxlast.
-  Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.
-  Udfør altid en kontroll efter brug for at opdage rødmø eller trykmærker på brugeren.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er forsvarligt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip støtter.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Tjek hjulenes tilstand, og at de sidder godt fast.
- Tjek produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. med hensyn til bevægelighed samt låsning.
- Kontrollér justeringen af kablerne til tilt og rygvinkel for at sikre, at de fungerer korrekt.
- Kontroller bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxlast

Den maksimale belastningsvægt er 150 kg.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned.

Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Andre risici

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør

Kombinationer

For at produktet kan bevare sin CE -mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S. Se produktets bestillingsgrundlag for muligt tilbehør og reservedelsliste.

Produktet kan dog monteres med CE-mærkede seler/bælter og hovedstøtter/nakkestøtter fra en anden leverandør med bibeholdt CE-mærkning, hvis nedenstående punkter er opfyldt:

- Det skal fremgå af tredjepartsdokumentation, at kombinationen er mulig og godkendt (at tredjepartsproduktet er beregnet til brug på toilet- og badestole, og at tredjepart godkender brugen på andres toilet- og badestole).
- At sædesystemets originale fastgørelsespunkter anvendes og at seler/bælter samt hovedstøtter/nakkestøtten er fastgjort til befæstelserne beregnet til denne bad- og toiletstol fra Anatomic Sitt A/S. Beslagene skal passe til det aktuelle tredjepartsprodukt. Ingen påvirkning/tilpasning kan foretages på et hvilket som helst af produkterne for at muliggøre kombinationen.
- Monteringsvejledning for nakkestøtter og bælter/seler fra Anatomic Sitt A/S skal følges og findes under afsnittet Monterings- og justeringsinstruktioner senere i denne dokumentation. Der må derfor ikke monteres andre produkter eller tilbehør tredjeparts produkt.

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering når produkter fra forskellige leverandører er kombineret. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren eller personer i dets nærhed

Afvielser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT A/S og landets kompetente myndighed




Tekniska data / Prestanda

Starfish Pro

Passar brukarlängd	Storlek 1 ca. 120-145 cm	Storlek 2 140-175 cm	Storlek 3 170-200 cm
Chassi med hel sittdel	Sittdel hel stl. 1	Sittdel hel stl. 2	Sittdel hel stl. 3
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (med foder) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Storlek hygienuttag (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Chassi med delad sittdel	Sittdel delad stl. 1	Sittdel delad stl. 2	Sittdel delad stl. 3
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredd bendel m foder (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Storlek hygienuttag (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigång toalett, Man. chassi	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigång toalett, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sitthöjd, Man. chassi**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sitthöjd, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5° till +30°	-5° till +30°	-5° till +30°
Höft-/ryggvinkel	-10° till +35°	-10° till +35°	-10° till +30°
Chassi, bredd (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Chassi, längd (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigång	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vikt inkl. huvudstöd, fotstöd, armstöd	31 kg	33 kg	35 kg
Max brukarvikt Man. chassi:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brukarvikt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

* Max sittbredd fås när sittdelarna är monterade i ytterspår på sittplattan


** exkl. foder

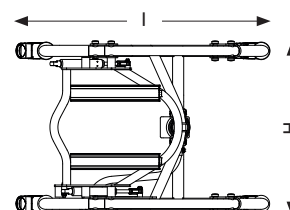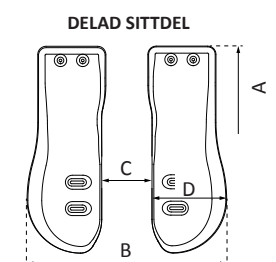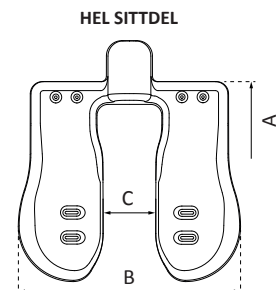

Ramfärg: RAL 9010


RYGG	höjd (mm)		BÅLSTÖD (mm)		
	Plast (E)	Profil	Bredd (F)	Djup (G)	Höjd (H)
Stl. 1	460	450	210-300	140	210
Stl. 2	560	550	240-340	170	230
Stl. 3	660	650	300-400	200	260

Bålstödsfästet justeras fritt i höjdläget på ryggprofilen. Varje bålstöd kan justeras individuellt 85 mm i höjdläget och 45 mm i sidled.

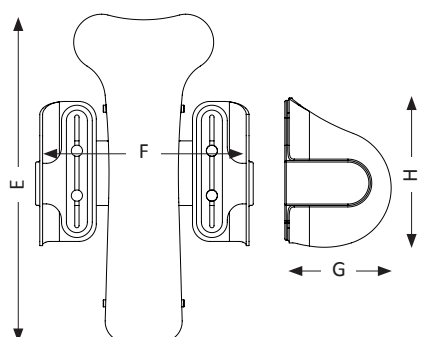



STARFISH ARMSTÖD

Armstöd från rygg	mått innanför armstöd
Armstöd stl. 1	30 - 42 cm
Armstöd stl. 2	36 - 48 cm
Armstöd stl. 3	44 - 54 cm

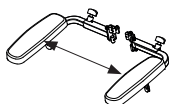


BORD

Bord std.	MÅTT			
	A	B	C	D
Stl. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Stl. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Stl. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			
Stl. 4	660 x 600 x 320 x 385 mm			
Stl. 5	660 x 650 x 320 x 435 mm			
Stödbord	A	B	C	D
Stl. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Stl. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Stl. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			
Stl. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm			
Stl. 5	620 x 740 x 380 x 440 mm			

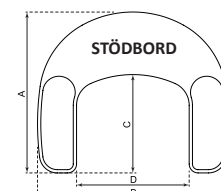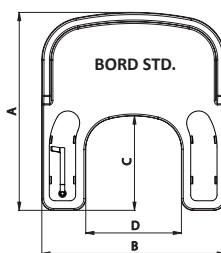

FOTSTÖD

FOTSTÖD	mått B x D
Helt stl. 1	345 x 225 mm
Helt stl. 2	380 x 260 mm
Helt stl. 3	380 x 300 mm
Delat stl. 1	160 x 220 mm
Delat stl. 2	180 x 255 mm
Delat stl. 3	180 x 305 mm

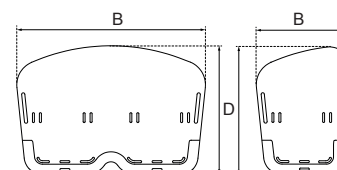


Hel fotplatta

Delade fotplattor

Stl.	1	2	3
Stagets längd	30	40	40 cm

HÖFTSTÖD

	A x B x C (min-max)
Stl. 1-2	220 x 140 x 350-450 mm
Stl. 3	260 x 165 x 410-510 mm

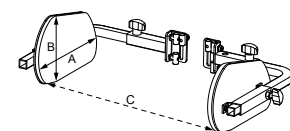

Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Fodstøtteprofilens længde kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.

Længden af armstøtteprofilen kan afkortes, så den passer bedre til brugeren. Husk at flytte mærkaten, der angiver det maksimale justeringsområde.

Længden på hoftestøtteprofilen kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.
Husk at flytte mærkaten, der angiver det maksimale justeringsområde.

Længden på rygstøtteprofilen kan afkortes. Profilen må aldrig være kortere end den længde, der kræves for at passe til alle ryglænspladebeslagene.

Urinskjoldet kan skæres til i den ønskede længde.

Risikobedømmelse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruktioner


Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljø om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

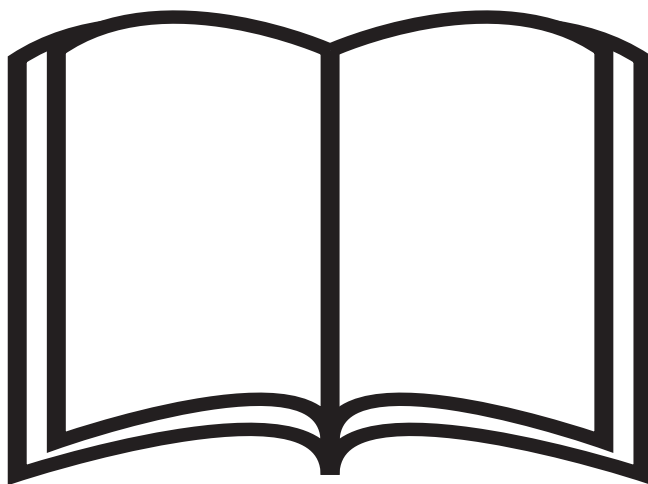

Stel

Manuelt stel

Siddeenheden skal justeres til ønskede højde inden borgeren placeres i sædet. Løsn vingeskrue (A) på begge sider. (Position (B) er ikke helt spændt, men hjælper med at styre vejen i rillen). Løft sædet ud af rillen og placer sædet i rillen til ønskede højde. Sørg for at trykke sædet ordentligt ned i rillen. Afslut med at stramme vingeskrue (A).

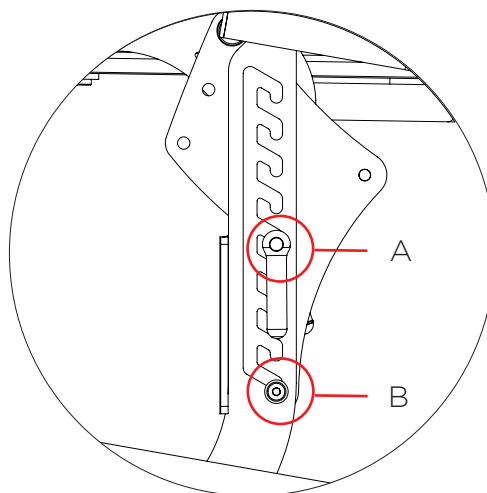


Højde-/sænkbart stel - gaspatron

Siddeenheden kan hæves eller sænkes til ønskede højde. Dette gøres ved at pumpe på pedalen (C). Sørg for at pumpe med bløde bevægelser for at hævelsen skal blive behagelig for brugeren. For at sænke enheden, placeres foden under pedalen og trykkes opad.



Var opmærksom på eventuel afklemningsrisiko!

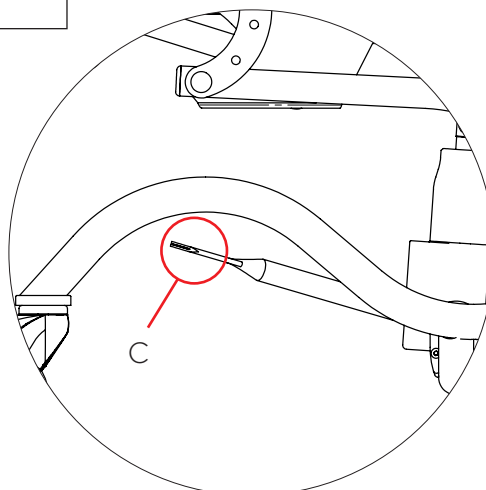

Højde-/sænkbart stel med elektrisk aktuator

Sædehøjden er regulerbar og justeres med en elektrisk fjernbetjening (A).
Tiltning gøres med et greb på håndtaget.



Varenr. 690705-690707
(se side. 17-19)



Varenr. 689710-689712
(se side. 20-22)

Højde-/sænkbart stel og tiltning med elektrisk aktuator

Varenr. 690710-690712 (se side 17-19)

Sædehøjden og tilt er justerbare og justeres med en elektrisk fjernbetjening (A):



Manøvrering med fjernbetjening

Sædehøjde og tilt justeres med fjernbetjeningens 4 knapper:



• Opad pil - Hæver sædet

• Nedad pil - Sænker sædet




• Opad pil - Tilter (vipper) hele sædet bagud.

• Nedad pil - Tilter (vipper) hele sædet fremad.



Vær opmærksom på eventuel afklemningsrisiko!

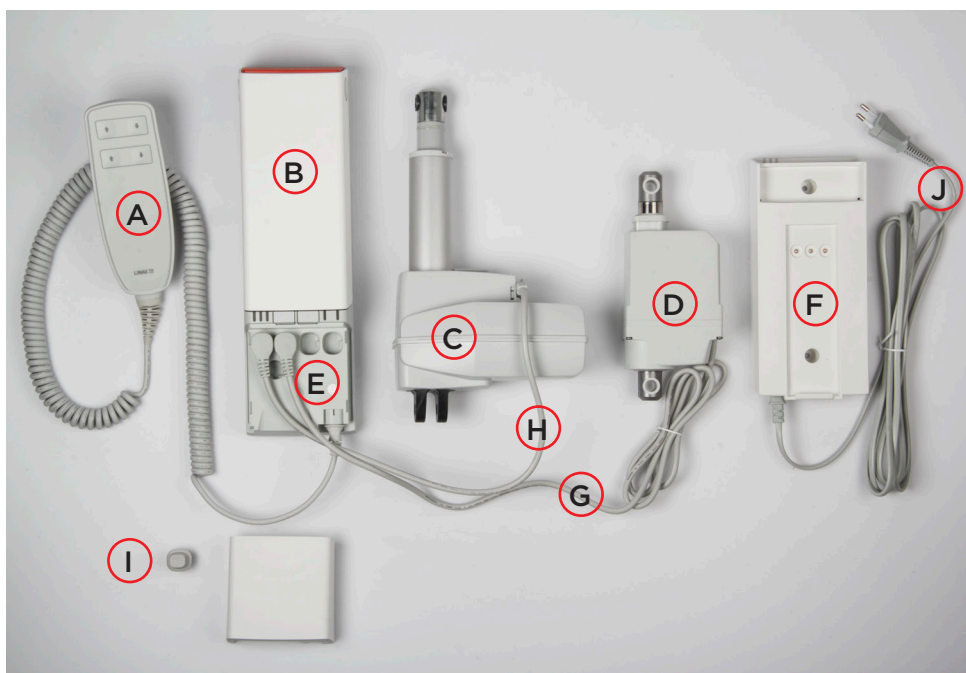


Komponenter:

- A - Håndkontrol
- B - Batteri
- C - Aktuator Løft
- D - Aktuator Tilt
- E - Styreenhed
- F - Lader
- G - Motorkabel Tilt
- H - Motorkabel Løft
- I - Sikkerhedsprop
- J - Ladekabel

Nødstop

Strømmen kan om nødvendigt nemt afbrydes ved at trykke på batteriets store røde knap (1).

Nødstopfunktionen deaktiveres ved, at de to sideknapper (2) på batteriet trykkes ind samtidig.

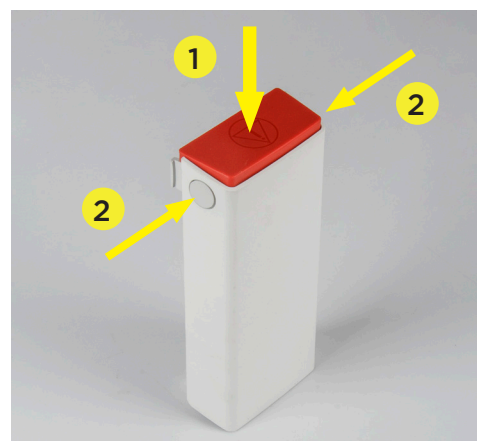

Frigør batteriet

Batteriet aftages ved, at de to grå sideknapper (2) trykkes ind samtidig. Fold derefter batteriet ud, og træk det opad.

Sæt batteriet i

Batteriet skubbes ind i bunden af styreenheden. Tryk derefter batteriet ind, så det klikker på plads i holderen.




Batteriets status

Når batteriet sættes i styreenheten vises batteriets status med lysdioder.



De grønne lysdioder viser opladningsniveauet

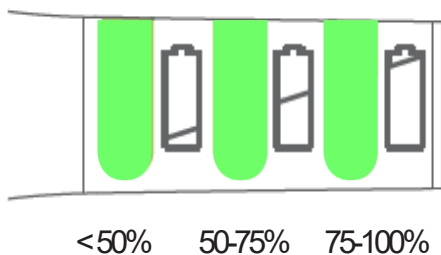

De gule lysdioder viser at nødstop er aktiveret.




Se separate brugsanvisninger, hvis andre lyskombinationer vises.



Opladning af batteri

Batteriet oplades i den separate oplader (3).
Fjern batteriet fra stolen som beskrevet ovenfor. Sæt batteriet i opladeren.
Tilslut det til en stikkontakt (220 V) ved hjælp af kablet (4) (tryk opladerkablet fast ned i opladeren for at sikre en god forbindelse og en tæt forsegling).

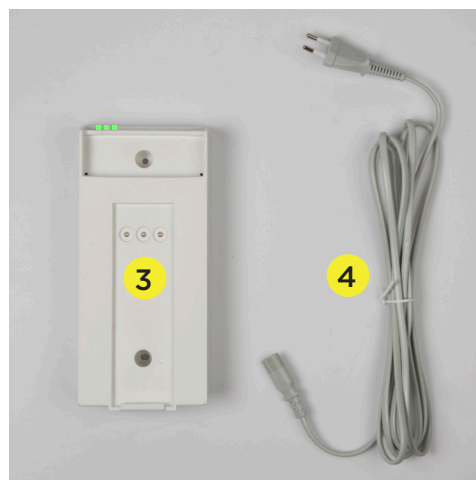


Opladningsindikator


Når batteriet oplades, vises dette ved 1-3 LED'er på toppen af opladeren (5).
Et konstant lys indikerer opladningsniveauet, og et blinkende lys indikerer det aktuelle niveau.

For eksempel:



Opladning er 2/3 færdig
dvs. ca. 70-90 %

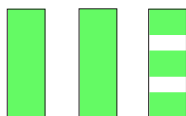

Hvis ingen lys er tændt, er
batteriet ikke tilsluttet, eller
der er ingen strømforsyning.

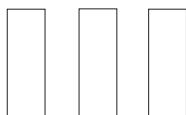


Hvis alle lamper blinker, er
batteriets temperatur for
høj eller for lav.

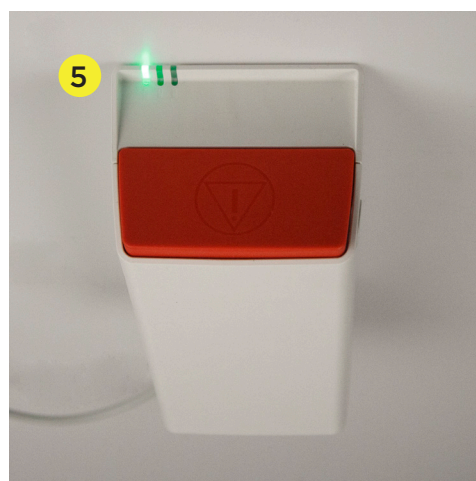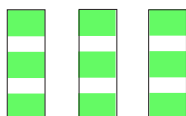

Betjening uden håndbetjening

Betjening uden håndbetjening
Knapperne (6) og (7) kan bruges til
at hæve eller sænke stolen (port 1 i
betjeningsenheden).

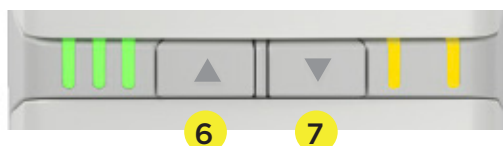

Højde-/sænkbart stel (varenr. 689710-689712) - aktuator

Sædeenheden er højdejusterbar og justeres med en elektrisk fjernbetjening (D):



- Opad pil hæver siddepladen
- Nedad pil sænker siddepladen



Var opmærksom på eventuell klämrisk!



Ingående komponenter Indgående komponenter

- D - Fjernbetjening
- E - Batteri
- F - Aktuator
- G - Kontrolbox
- H - Batterikabel
- J - Tilslutningskabel
- K - Opladningskabel
- L - Styrekabel



Tilkoblinger

Fjernbetjeningen (D1) tilsluttes kontrolboxen.

Batterikablet (H1) tilsluttes kontrolboxen og batteriet (H2).

Styrekablet (L1) tilsluttes i kontrolboxen og (L2) i aktuatoren (F).

Tilslutningskablet (J1) kobles til kontakten på kontrolboxen. Fastgør tilslutningskablet med kabelforbindelser i rammen så kontakt (J2) er rettet nedad for at undgå opsamling af vand.

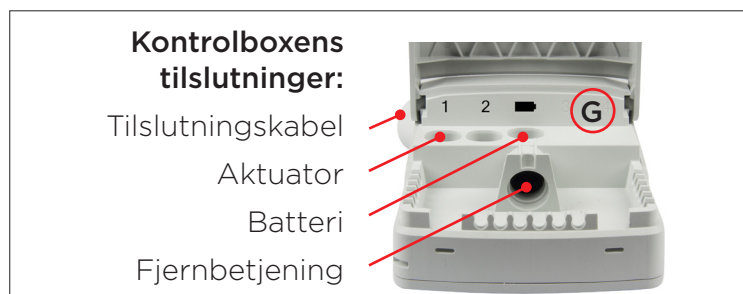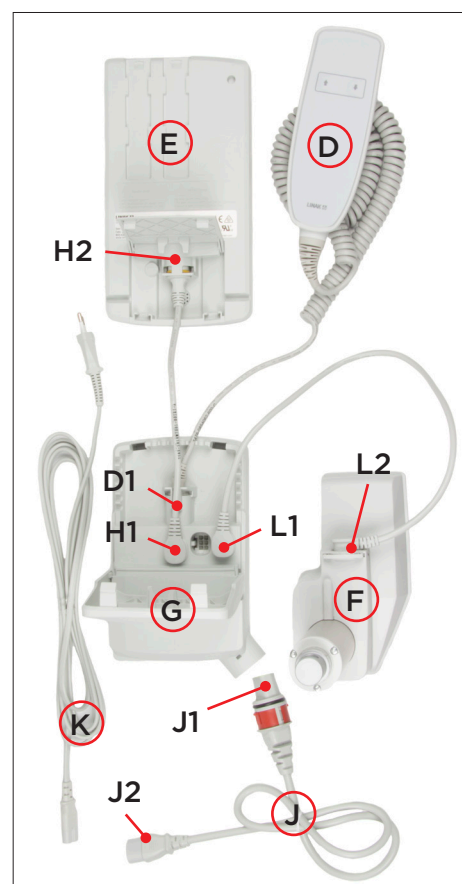

Opladning af batteri

Tilslut opladningskabel (K) til tilslutningskabel (J2) og til et stik (220 V).

Første gang du oplader batteriet, skal det lade i mindst 24 timer. Det er meget vigtigt at batteriet aldrig aflades helt, eftersom det derefter kan gå i stykker.

Højde-/sænkbart chassi (varenr. 689710-689712) - aktuator

Batteriet til Starfish Pro med aktuator leveres altid fuldopladet.



Opladning af batteriet skal ske mindst hver 6. måned.


Anbefalinger

- Aflad ikke batteriet helt.
- Overskrid ikke opbevaringstemperaturen, eftersom det vil forkorte batteriets levetid.
- Overskrid ikke arbejdscyklusen (se produktetiketten) eftersom det vil forkorte batteriets levetid, reducere ydelsen og til sidst aktivere temperaturbeskyttelse.
- Hvis batteriet er helt afladt, oplad batteriet til opbevaring.

Kontrolboks CA40

Kontrolboksen er udstyret med en LED-indikering (A) for el- eller batteridrift.

LED-farve	Indikerer
Grøn	Tilslut til el-nettet
Orange	Batteriet tilsluttet, aktiveret med fjernbetjening. Systemet fungerer.
Ingen lys	Batteriet tilsluttet, ikke aktiveret med håndkontrol. eller kontrolboxen er ikke tilsluttet til el-nettet.

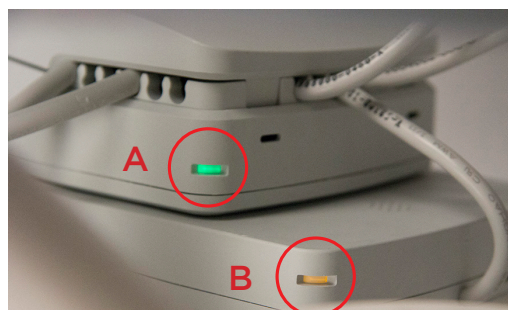

Batteri BA21

- Driftscyklus: 10 % (2 minutters kontinuerlig anvendelse fulgt af 18 minutter ikke i brug)
- Opladningstid: ca 10 timer
- Driftstemperatur: + 5° C til + 30° C
- Opbevaringstemperatur: -10° C til +40° C (+ 10° C til + 25° C anbefales)

Batteriet er udrustet med LED-indikering (B)

LED-farve	Indikerer
Fast gul	Opladning
Ingen lys	Helt opladt batteri
Blinkende gul	Fejl ved opladning

Høj-/sænkbart chassi (art.nr. 689710-689712) - ställdon

Summefunktion

Summen forekommer, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen, og strømmen af batteriet er lavt.

Summen kan også aktiveres af kontrolboksen for at signalere andre forhold. Dette styres af kontrolboksens programmer.

Beskyttelse mod dyb afladning

- Batteriet har beskyttelse mod dyb afladning for at beskytte batteriets levetid. Beskyttelsen aktiveres, når batteriet er afladet.
- Oplad batteriet for at afslutte den dybe afladning. Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet før brug.

Hvis batteriet er helt uopladet, starter opladningen med meget lav hastighed for at beskytte batteriet. I dette tilfælde blinker den gule LED.

Hvis batteriet ikke holder op med at blinke og begynder at oplade normalt inden for 12 timer (LED - Lysegul) er batteriet defekt og skal udskiftes.

Følg i sådanne tilfælde instruktionerne

Sikkerhedsfunktion

Batteriet indeholder flere mekanismer for at beskytte brugeren fra skade ved ukorrekt anvendelse.

Ved overophedning aktiveres en termisk beskyttelse. Der er ingen strøm til rådighed, før batteriet er vendt tilbage til sin normale temperatur.

Overophedning kan ske ved omfattende anvendelse, ved høj temperatur eller ved overskridelse af batteriets minimums kapacitet.


Vejledende driftscyklus: ca. 10 % (2 minutters kontinuerlig brug efterfulgt af 18 minutter uden brug).

Siddedel

Sædebredde, sædedybde, benlængdeforskel og benabduktion kan nemt justeres. Fjern polstringen og huludfyldningen for at få adgang til skruerne (A).


Breddejustering af siddedelen

Løsn skruerne (A) en smule. siddedelene kan nu let justeres ca. 3 cm sideværts i hver side. Hvis der er behov for en større justering, kan hele siddedelen trækkes helt ud af profilerne, og profilskruerne (B) skubbes derefter ind i profilernes ydre riller (C) som vist på billedet nedenfor, hvilket giver 3,5 cm ekstra bredde i hver side. Den samlede breddejustering er ca. 13 cm. Spænd skruerne (A) efter justering.

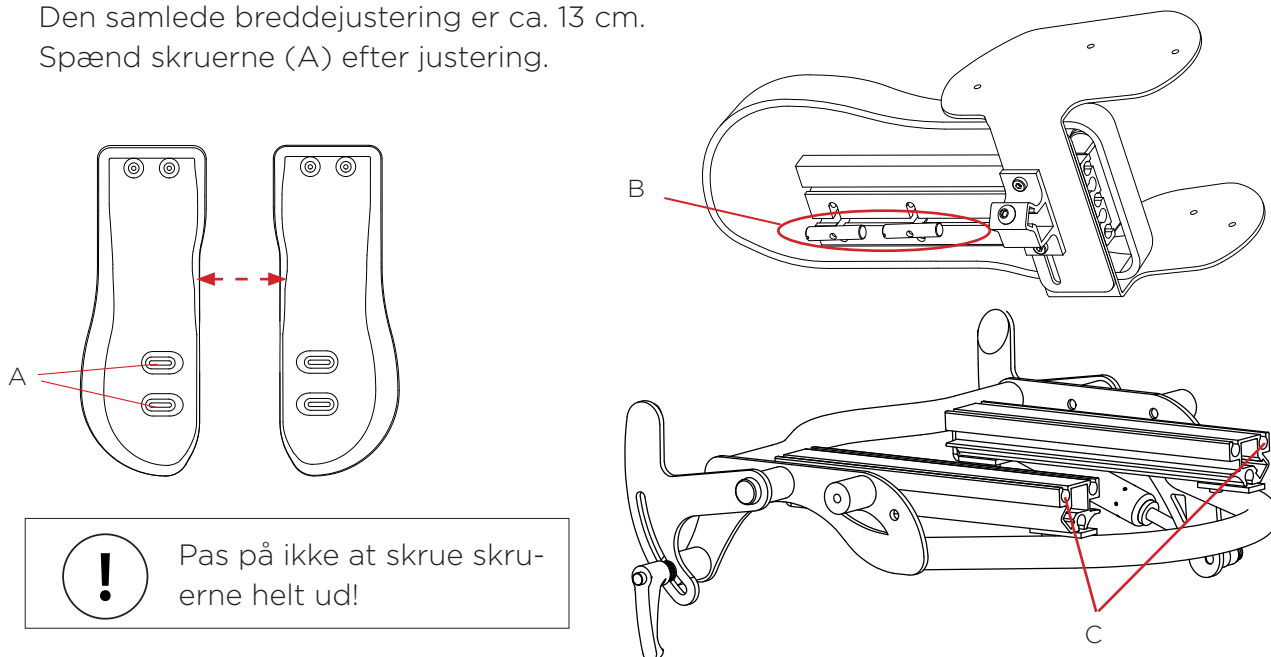

Justering af sædedybde/abduktion:

Løsn skruerne (A) så at bendelene kan justeres med hånden. Juster bendelene. Spænd skruerne (A).

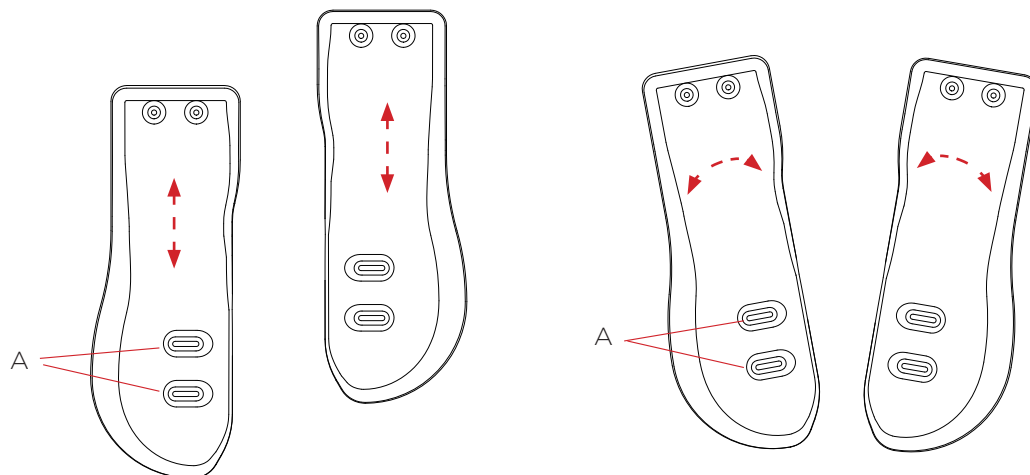


Abduktions-/adduktionsstøtte

Montering

Skrue skrue (A) ud, og sæt støtten i, så du kan se hullerne gennem rillerne på støtten. Skru derefter skrue gennem rillerne og ind i hullerne for at fastgøre støtten.

Justering

Løsn skrue (A) lidt, så du kan skubbe støtten i slidsen. Juster dem til ønskede position, og stram derefter skrue.

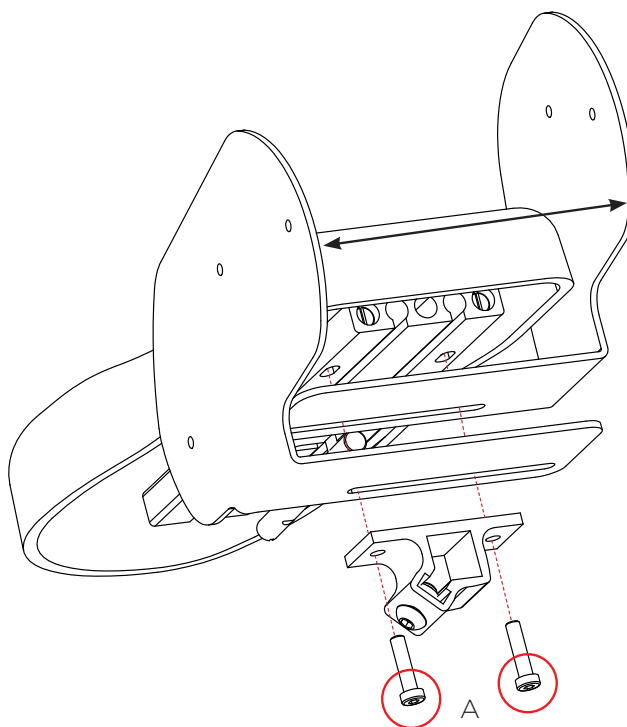


Ryg

For at justere rygpladen (A) skal du løsne de fire skruer (B), der fastgør pladen til bagprofilen. Juster pladen til den ønskede højde, og stram skruerne (B).


Justér højden på kropsstøttebeslaget ved at løsne de fire skruer (C), som fastgør beslaget på rygprofilen. Juster til ønskede højde og spænd skruerne (C).

Kropsstøtten kan nu finjusteres ved at løsne fingerskruen (D). Juster kropsstøtten til ønskede position og spænd skruen (D).

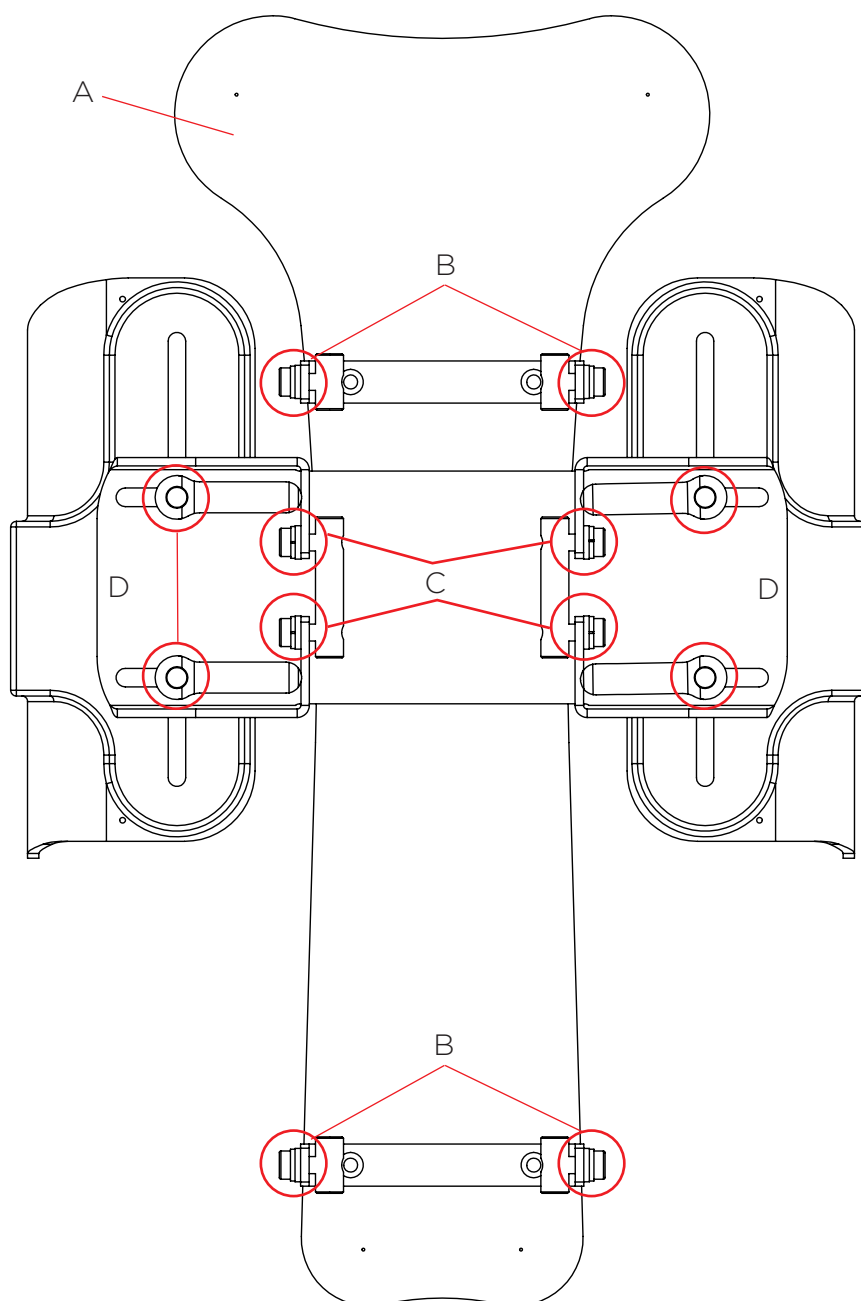

Hoftevinkel


Ved justering af hoftevinklen: Start med at løsne sikkerhedshåndtaget (A). Sørg for at have et fast greb om kørehåndtaget, mens du trykker på gaspatronudløseren (B). Juster ryggen til den ønskede vinkel, og slip aftrækkeren (B). Afslut med at stramme sikkerhedshåndtaget (A).

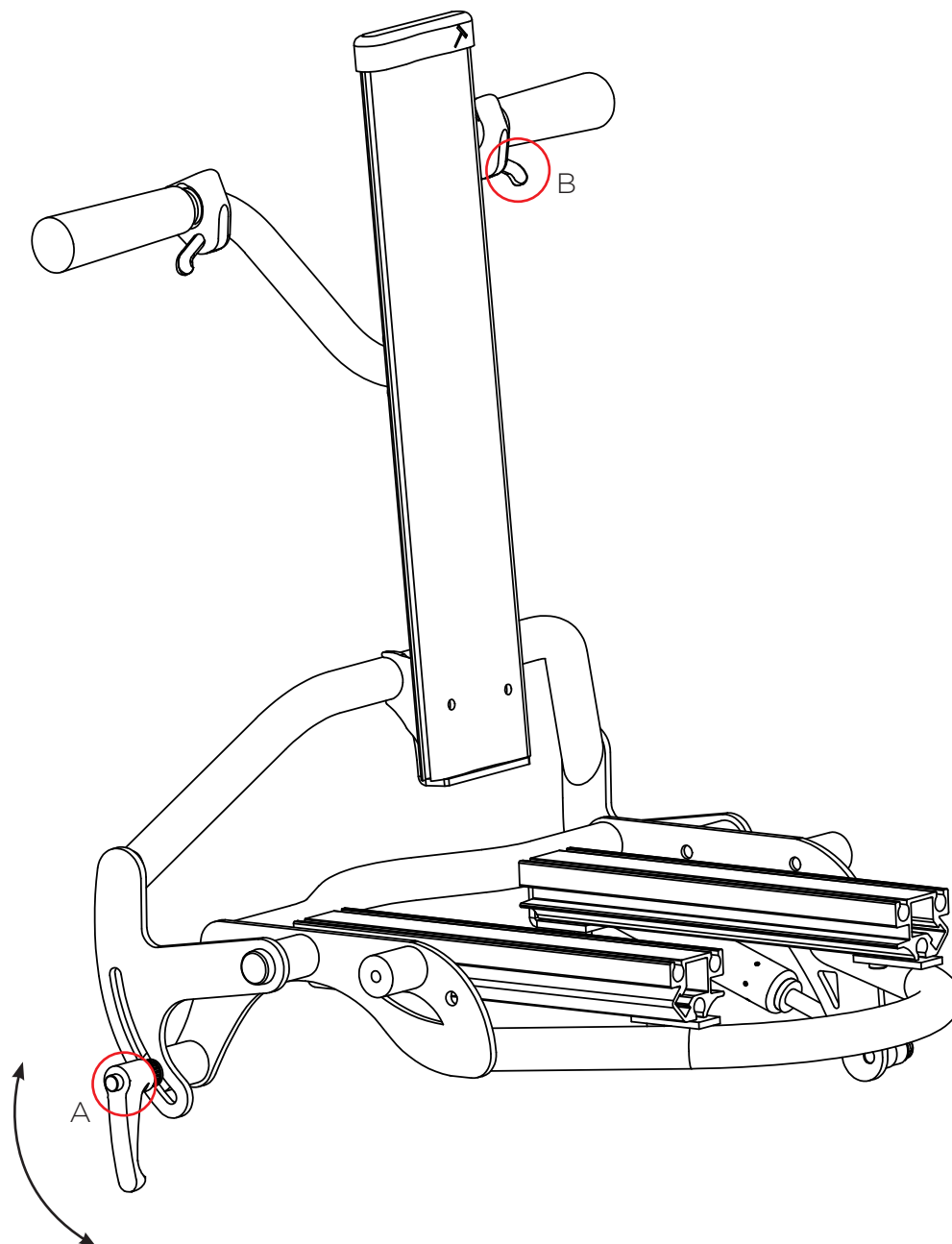

Sørg for at kablet til udløseren til gaspatronen altid løber frit efter justering og husk at stramme sikkerhedshåndtaget!

Tilt af sædeenhed

Når sædevinklen skal justeres, sørg for at have et stabilt greb om kørebøjlen samtidigt med at udløseren til gaspatronen (A) trykkes ind. Juster sædet til ønskede vinkel og slip udløseren (A). Hold øje med brugeren og sørg for at intet risikerer at komme i klemme eller på anden måde tager skade. Hvis elektrisk tilt er tilgængelig, skal du bruge håndbetjeningen (se side 17).

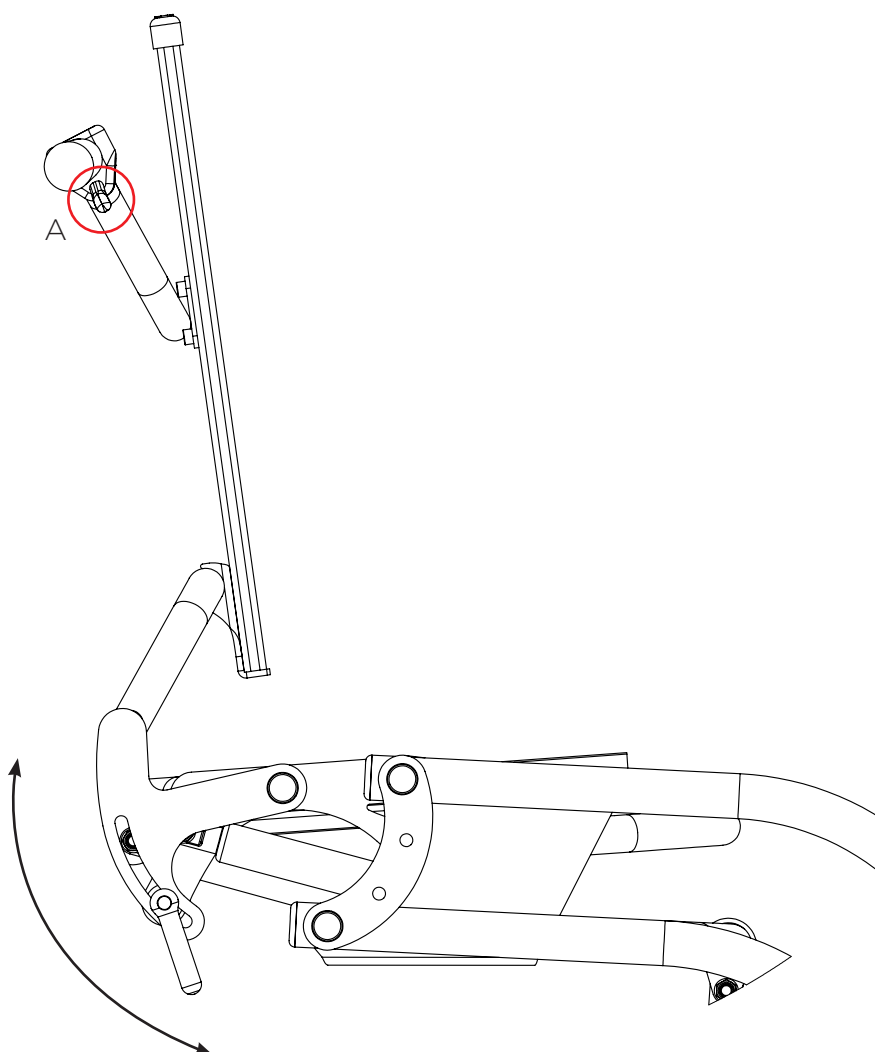


Sørg for at kablet til udløseren til gaspatronen altid løber frit efter justering.

Hoftestøtte

Hoftestøtten skal monteres i den nederste del af rygprofilen over den nederste rygbøjle. Først skal rygpladens profilskruer løsnes med skruerne (A). Skub rygpladen op, så skruen (B) kommer til syne, og fjern skruen og møtrikken (C). Rygprofilen løsnes fra rammen ved at løsne skruerne (D). Løft rygprofilen ud af rammebeslaget. Det nederste rygbeslag til rygdelen skal derefter fjernes, ved at fjerne skruerne (E). Sæt derefter profilskruerne ind i hoftestøttebeslaget (F), og skub det op til den ønskede højde under armlænsbeslaget. Stram skruerne (G). Sæt rygbeslaget (A) tilbage på rygdelen, og spænd skruerne. Sæt rygprofilen tilbage i rammen, og spænd skruerne (B, C og D). Skru rygpladen med skruerne (E) ind i rygbeslaget, og juster den til den ønskede højde.

Justering:

Juster hoftestøtten i højdeleddet med skruerne (G), sideleddet med fingerskruen (H) og dybdeleddet med fingerskruen (I).

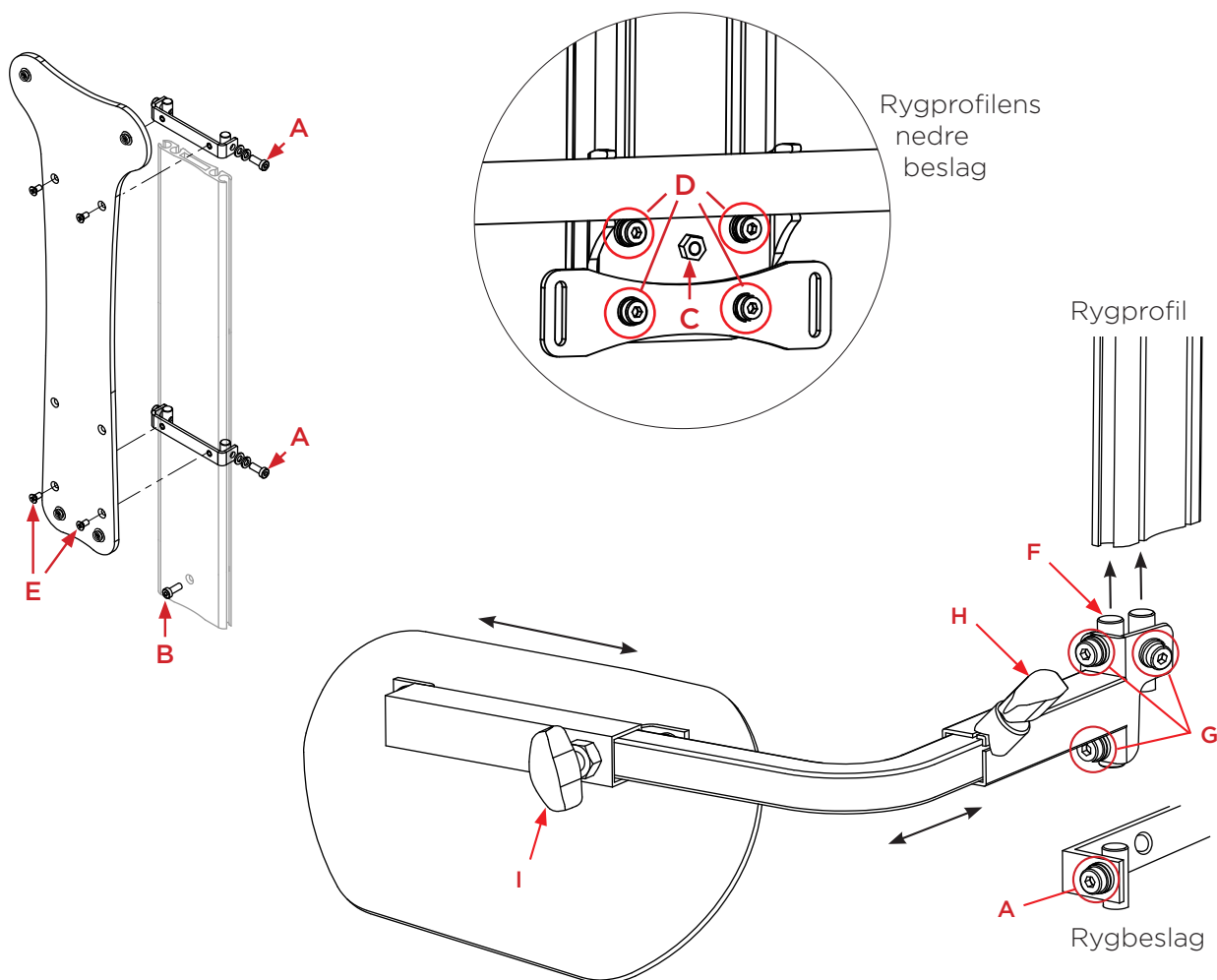

Bredden på hoftestøtten må ikke justeres ud over MAX-mærkerne.



Armlæn ryg (delt beslag)

Montering, armlæn

Armstøtten skal monteres på rygprofilen. Monter armlænsbeslaget som vist. Juster til den ønskede højde. Spænd derefter skruerne (A)

Justering af armlænsbredde


Løsn fingerskruen (B). Juster til den ønskede bredde. Stram derefter fingerskruen.

Dybdejustering, armlæn

Løsn fingerskruen (C). Juster til den ønskede position. Stram derefter fingerskruen

Aftagning/påtagning af armlænet

Løsn fingerskruen (B). Træk armlænet ud af sidebeslaget. Påtagning sker omvendt.

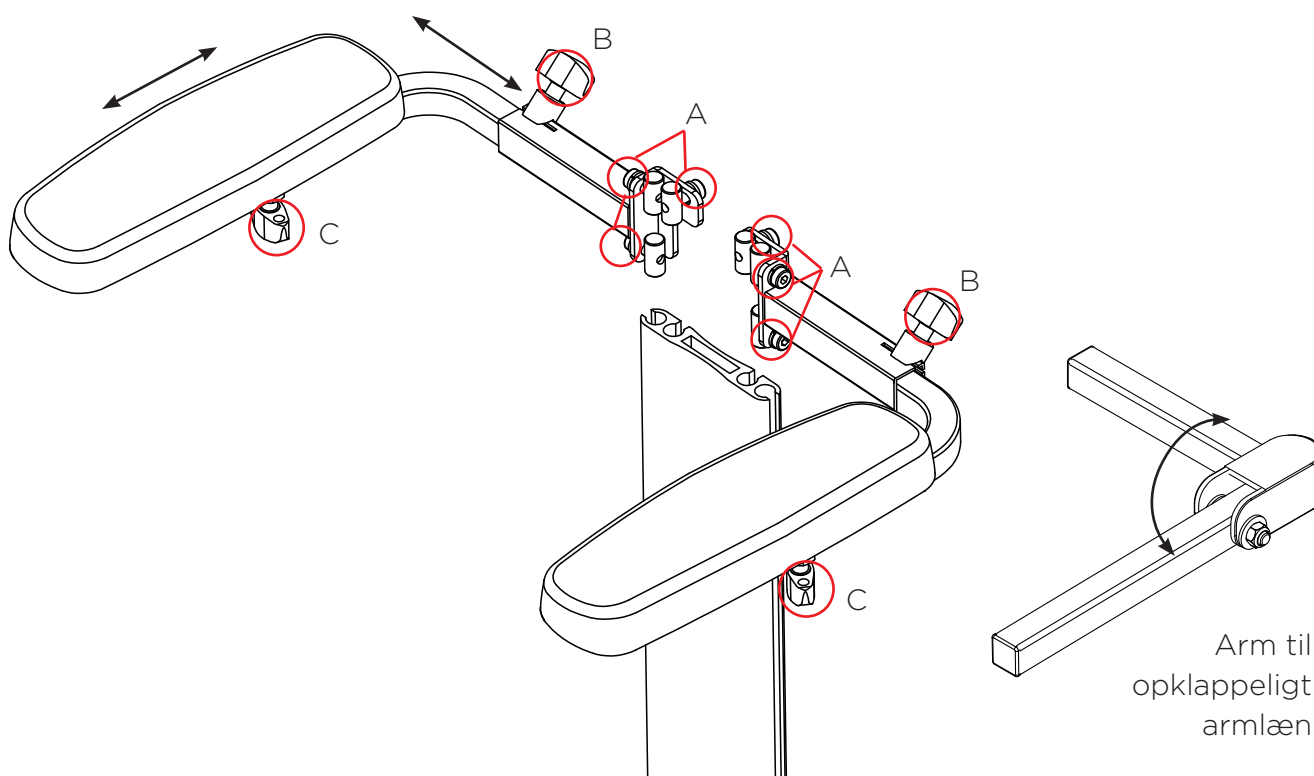

Armlænets justering i bredden må ikke ske udenfor MAX-markeringerne.



Armlæn ryg (helt beslag)

Montering, armlæn

Armlænen ska monteras på ryggstödsprofilen. Montera armlänsfästet enl. billede. Justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (A)

Justering afa armlänsbredde


Lösen fingerskruen (B). Juster til ønskede bredde. Spænd herefter fingerskruen.

Dybdejustering, armlæn

Lösen fingerskruen (C). Juster til ønskede bredde. Spænd herefter fingerskruen.

Aftagning/påtagning af armlænet

Lösen fingerskruen (B). Træk armlænet ud af sideledet. Påtagning sker omvendt.

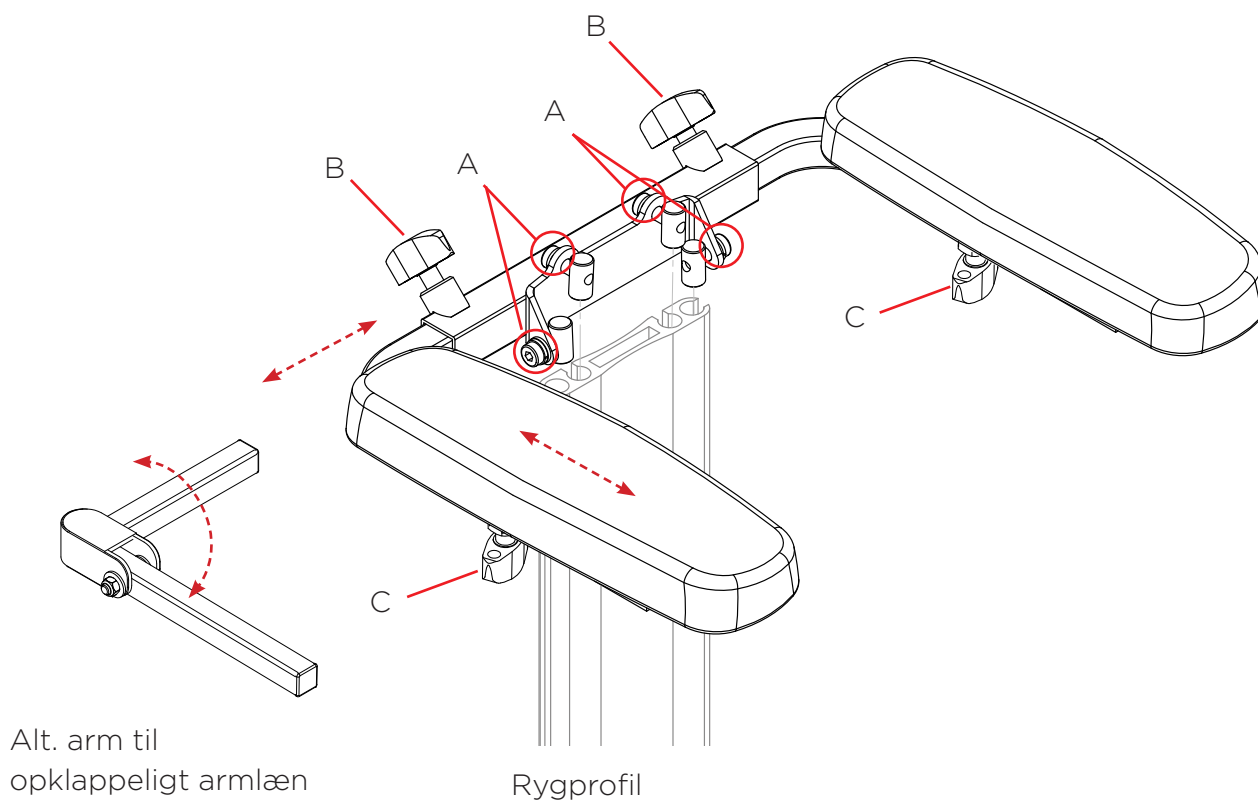

Armlænets justering i bredden må ikke komme udenfor MAX-markeringerne.




Armlæn chassi

Montering på manuelt stel

Armlænet skal monteres på sidepladen (A).
Montere skruerne (B) gennem de forsænkede huller i pladen, gennem distancepladen (C) og ind i gevind hullerne på armlænene.

Opklapning af armlæn

Armlænene kan drejes bort. Træk armlænet skråt opad og bagud. væk fra rammen, indtil støtten falder i hak.

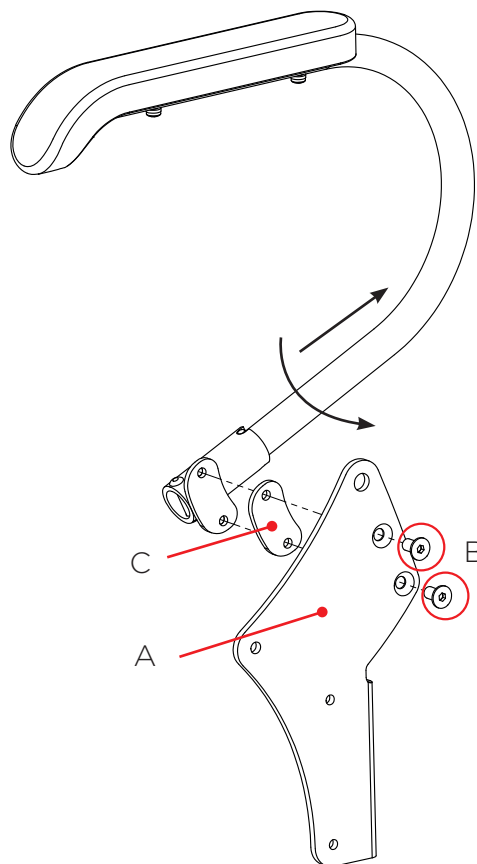


Montering på hydraul/el chassi

Armlænen ska monteras på det yttre sidoblecket (A). Montera skruvarna (B) genom de centrala hålen på blecket och in i de gängade hålen på armlänet.

Nedklapning af armlæn


Armlænene er udsvingbare. Træk armlænet diagonalt opad og bagud. Drej derefter støtten væk fra chassiet, indtil støtten hæfter sig fast i den næste åbning.

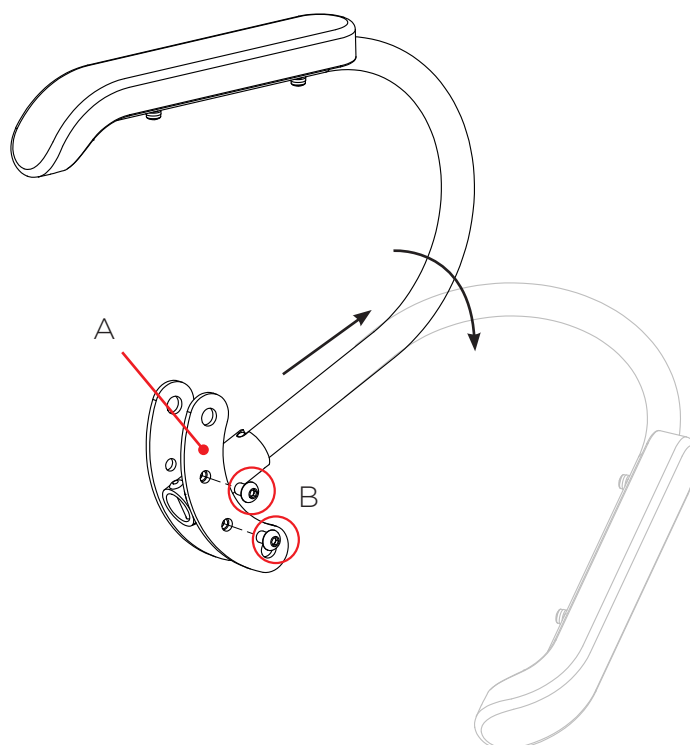

Bord fast (passer kun armlæn ryg)

Montering af bord

Læg bordet på armlænspladerne (B) og juster bredden og dybden på armlænet, så de ender lige under bordet. Vrid bordets låsearm (A) ind under armlænspladen.

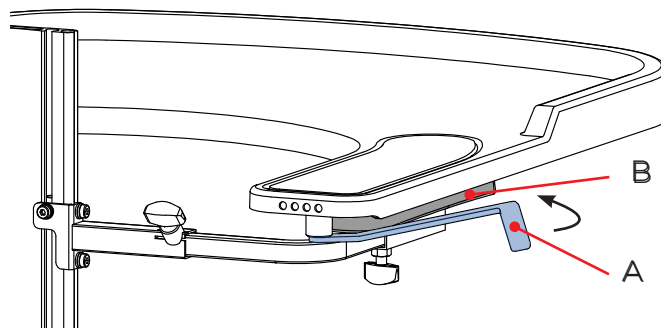

Ændring af monteringshul

Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden skal du bruge det valgte monteringshul under armlænets polstring på bagsiden af bordet. I basisversionen er låsearmen fastgjort i det midterste hul.

For at ændre monteringshullet skal du først løfte polstringen i bagkanten. Markeringerne på bordets ydre bagkant angiver kun bordets størrelse.




Pas på ikke at løfte bordet foran, altså i bordets forkant.

Støttebord (passer kun til armlæn ryg)

Montering af bordet

Læg bordet på armlænspladerne (B) og juster bredden og dybden på armlænet så de placeres korrekt under støttebordet. Drej herefter bordets låsearme (A) ind under armlænspladen.

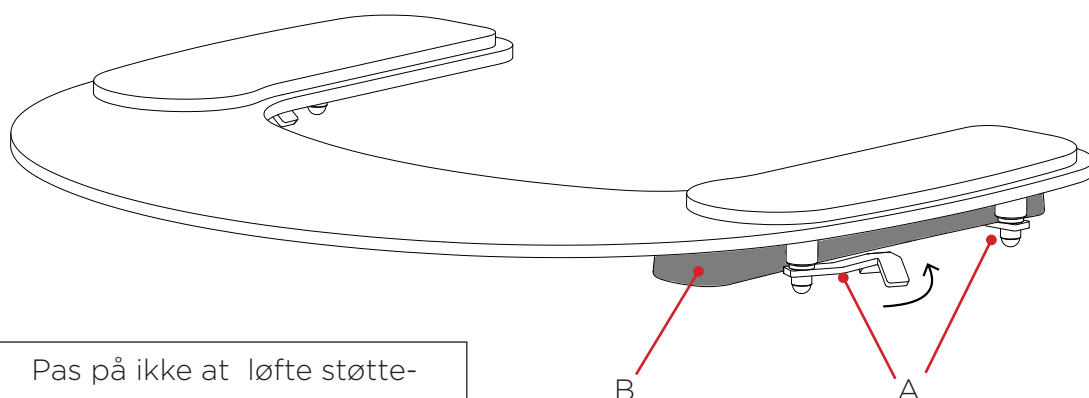

Pas på ikke at løfte støttebordet i forkanten.


Hovedstøtte

Montering / justering af hovedstøtte

- * Fjern det beskyttende hætte på rygstangen.
- * Monter hovedstøttesbeslag (B) på rygstangen.
- * Løsn skruerne (A) netop så meget, at det er muligt at justere med hånden.
- * Sæt brugeren i sædet og juster till ønskede position.
- * Stram samtlige skruer samt fingerskruen og sæt den beskyttende hætte tilbage igen.

Hovedstøtten er enkel at fjerne:

- * Løsn fingerskruen (C) for at fjerne hovedstøtten.

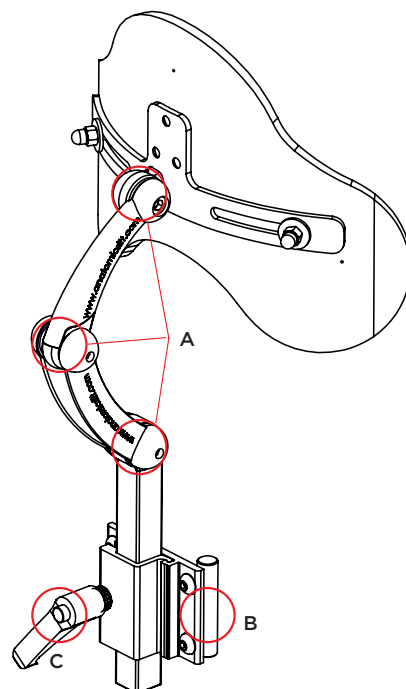


Kørebjølle

Løsn skruerne (A) så meget, at profilskrue (B) kan trækkes ind i profilen (C). Juster til den ønskede højde, og stram derefter skruerne (A).



Sørg for at kablet til udløseren for gaspatronen altid løber frit efter justering!

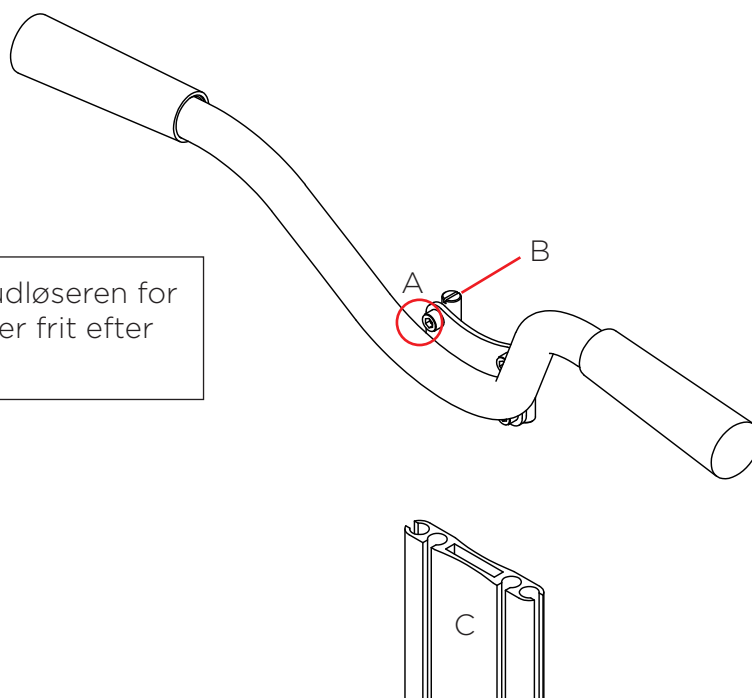


Kropsseler

Montering af Kropsseler


Øvre fæste til Sternumstøtte, H-sele (billede 1):

- * Fjern plasthætten fra rygprofilen.
- * Monter øvre fæstestang som på billede 1.
- * Åben spændet (A), træk fæstebåndet ind igennem hullet i beslaget og gennem spændet og lås spændet.

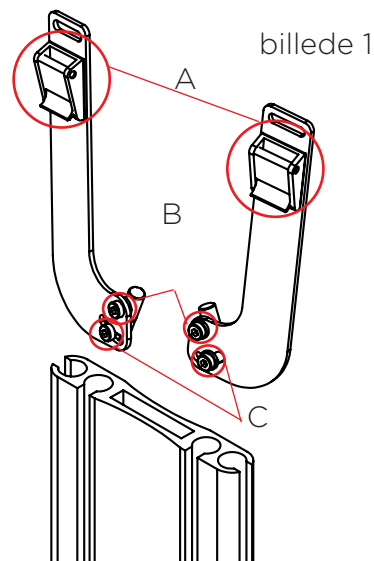

Nedre fæste til Sternumstøtte/H-sele: (billede 2)

Nedre fæste kommer formonteret og indgår i stolen.
Lås båndet ved hjælp af "Tri-glide" spændet, se billede 3.

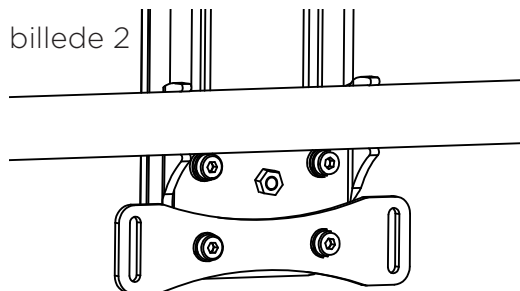

Justering af brystseler (Sternumstøtte, H-sele)

Sæt brugeren i sædet og løsn unbrakoskruen enl. pos. B & C, billede 1.
Juster armene, så trækretningen på de øverste fastgørelsespunkter er i samme højde som skulderpartiet.

- Skru skruen ind i henhold til pos. B, billede 1.
- Juster til den ønskede bredde ved at vinkle fladjernet til højre eller venstre (sørg for, at der er plads nok til halsen).
- Lås skruen i henhold til pos. C, billede 1.
- Juster bæltepuderne i højden for at give optimal trykaflastning.

Opfølgning:

- Sørg for, at der er plads nok til halsen.
- Trykket på båndet.
- Placeringen af bæltepuderne.




Sørg for at der er tilstrækkelig plads ved halsen!



En brystsele skal altid anvendes i kombination med et hoftebælte.


Montering af øvre selebeslag 690335 (billede 4)

Fjern hovedstøtten.
Skub beslaget (A) op på hovedstøttestangen som vist i figur 4.
Monter hovedstøtten igen i dens beslag i den ønskede højde.
Skub derefter selebeslaget (A) til den ønskede højde og fastgør det med låseskruen (B).
Justering af selen (bryststøtte, H-sele osv.)
Åbn spænden (C).
Før selens øverste rem (D) gennem spænden (C) og lås den fast.

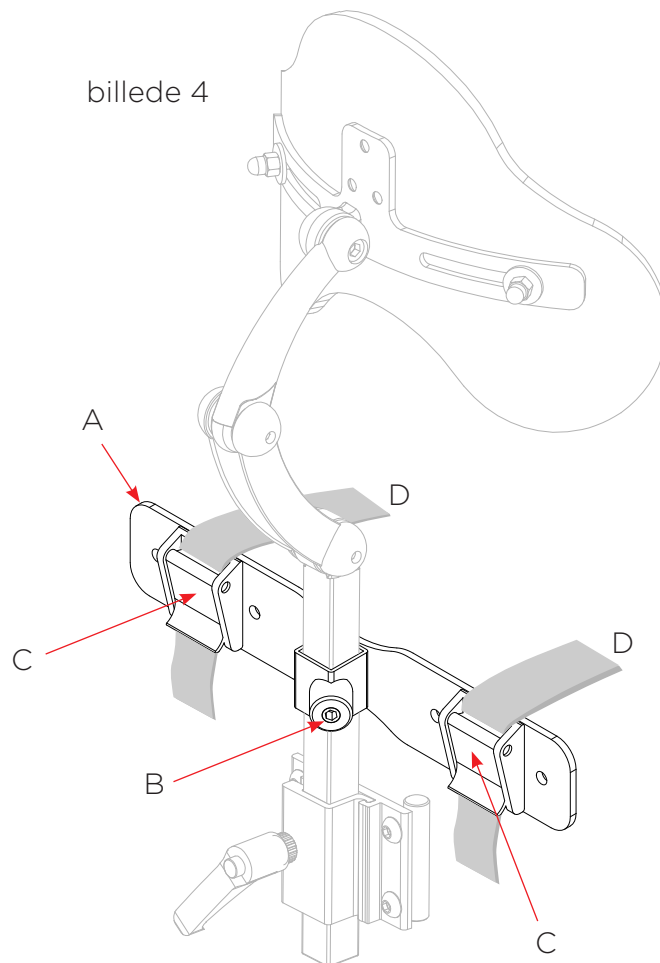

Ændring af bredden på selens fastbespændingspunkter

Beslaget (A) har 3 alternative breddejusteringer for at selen skal ligge korrekt over skulderpartiet.
Spænderne (C) kan skrues løs fra beslaget og flyttes til ønskede huller: 1, 2 eller 3 (se billede 5).

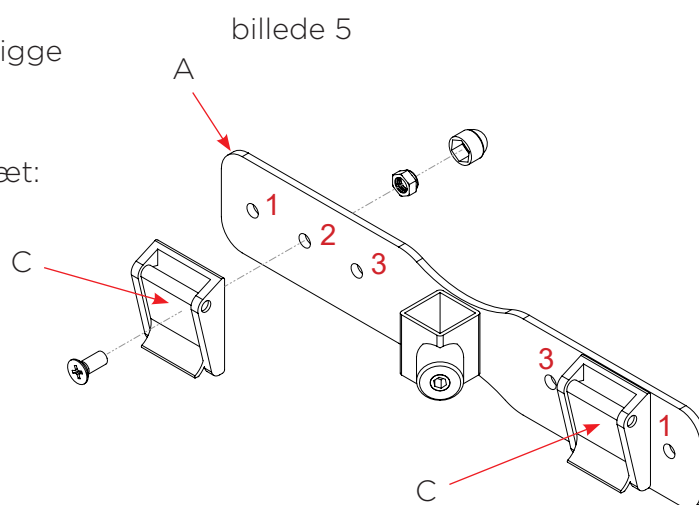

Hoftebælte

Montering:

Sæt fastgørelsesstropperne på bæltet med de påsatte »Tri-glide«-spænder omkring et eller begge fastgørelsespunkter som vist nedenfor.

Starfish Pro t.om. 2022



Anbefalede fastgørelsespunkter




2-punktsbælte




4-punktsbælte

Starfish Pro efter 2022

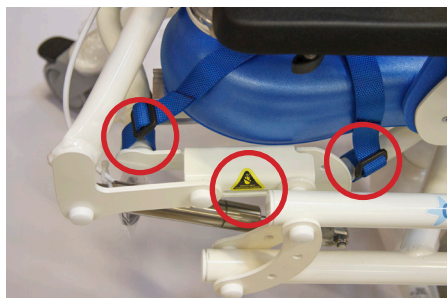

Anbefalede fastgørelsespunkter

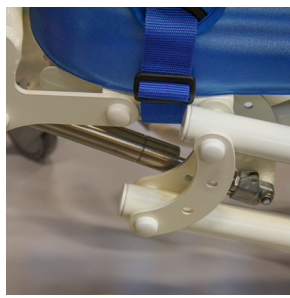


2-punktsbælte



4-punktsbælte

Brug Tri-glide-metoden som vist til højre.

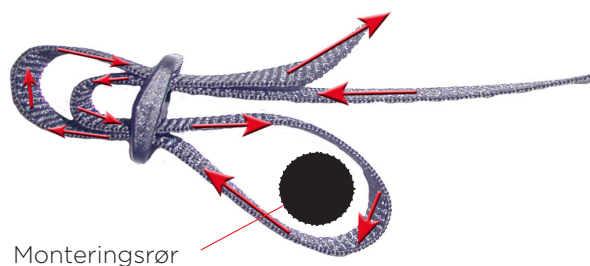


Justering:

- * Stram bæltet på begge sider af spændet for at få det centreret.
- * Juster bæltepuderne, så de giver optimal trykaflastning.
- * Hvis båndene er for lange, kan du klippe det overskydende bånd af og brænde enderne.

Fotstöd

Påtagning / Aftagning af fodstøtte

- Skub fodstøtten ind som vist.
- Spænd fingerskruen (A). Hvis der er behov for en mere permanent fastgørelse, kan fingerskruen udskiftes med skruer (C) (følger med stolen ved levering).
- Løsn fingerskruen (A) og træk benstøtten ud for at fjerne den.

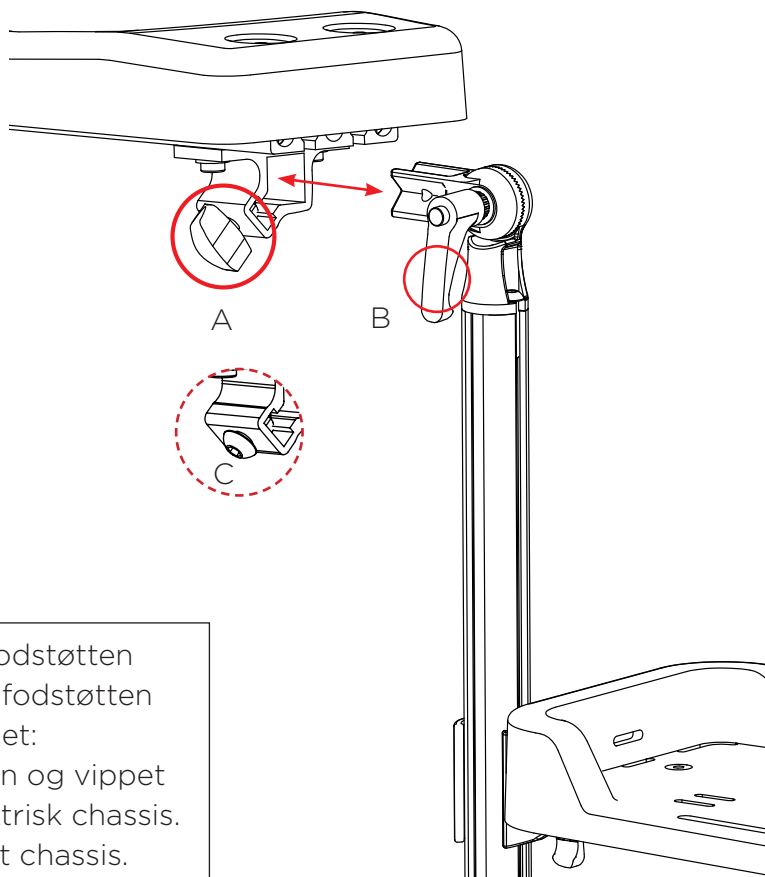

Vinkeljustering ved knæled

- Løsen italienskrue (B).
- Juster til ønskede vinkel.
- Spænd herefter italienskrue.




For at undgå risikoen for, at fodstøtten kolliderer med chassiset, skal fodstøtten indstilles, når sædet er indstillet:

- I den lavest mulige position og vipet fremad for hydraulisk/elektrisk chassis.
- Vippes fremad for manuelt chassis.

Fast fodstøttebeslag

For at justere højden på fodstøtten skal du løsne italienskrue (A) en smule for at justere til den ønskede højde. Stram derefter italienskrue.

For at justere vinklen ved anklen løsnes skruen (B) en smule. Juster til den ønskede vinkel, og stram derefter skruen (B).

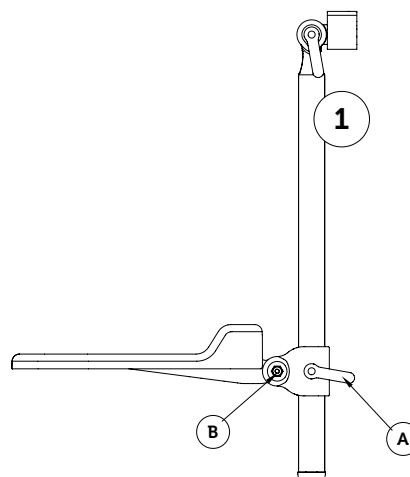


Fjedrende fodstøtteadapter

For at justere højden på fodstøtten skal du løsne skruen (D) en smule og derefter justere til den ønskede højde. Stram skruen (D).

For at justere vinklen ved anklen løsnes skruen (C) en smule. Juster til den ønskede vinkel, og stram derefter skruen (C).




Fjedermodstanden kan justeres med en skruetrækker ved at skrue på skruen i fjederpakken (E).

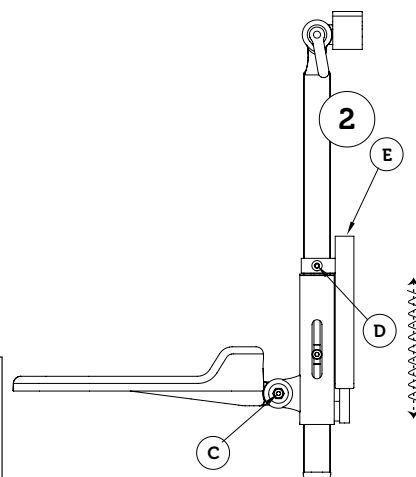

Opklappeligt fodstøttesbeslag

For at højdejustere fodstøtten løsner du vingeskruen (A) en smule for at justere til ønsket højde. Spænd herefter vingeskruen.

Brug klap-op-funktionen for at løfte fodstøttepladen foran. For at justere vinklen ved fodleddet skal du løsne skruen (B) en smule. Juster til den ønskede vinkel, og stram derefter skruen (B).

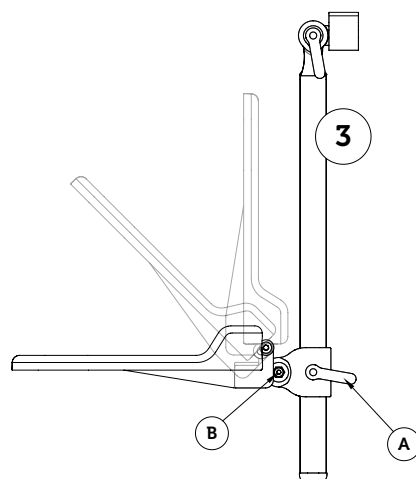


Kugleledsadapter

For at justere højden på fodstøtten skal du løsne vingeskruen (A) en smule og justere til den ønskede højde. Stram derefter vingeskruen.

For at bruge kugleledsfunktionen skal du først løsne skruerne (B) og (C) og justere til den ønskede position. Stram derefter skruerne (B), og fastgør positionen med skruen (C).

For at justere fodpladen i dybden løsnes skruerne (D) en smule.

Juster til den ønskede position, og stram derefter skruerne (D).

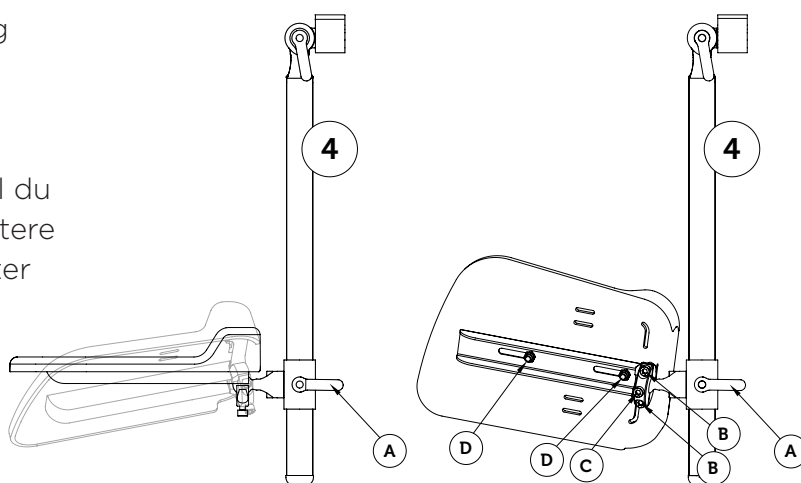

Lægstøtte

Montering

Før du monterer lægstøtten, skal du først fjerne eventuelle fodstøtter. Løsn vingeskruen (F), der holder fodstøtten på plads på fodstøttestangen. Træk derefter fodstøttepladen og dens beslag nedad.


Monter lægstøtten ved at skubbe profilskruerne (C) ind i fodstøttestangen, juster til ønskede højde og spænd skruerne (E). Sæt derefter fodstøtten på plads igen.

Højdejustering

For at justere højden på lægstøtten skal du løsne skruerne (E) en smule og derefter justere til den ønskede højde. Stram derefter skruerne (E).

Breddejustering

For at justere bredden på lægstøtten skal du løsne skruerne (A) en smule og derefter justere til den ønskede bredde. Stram derefter skruerne (A).

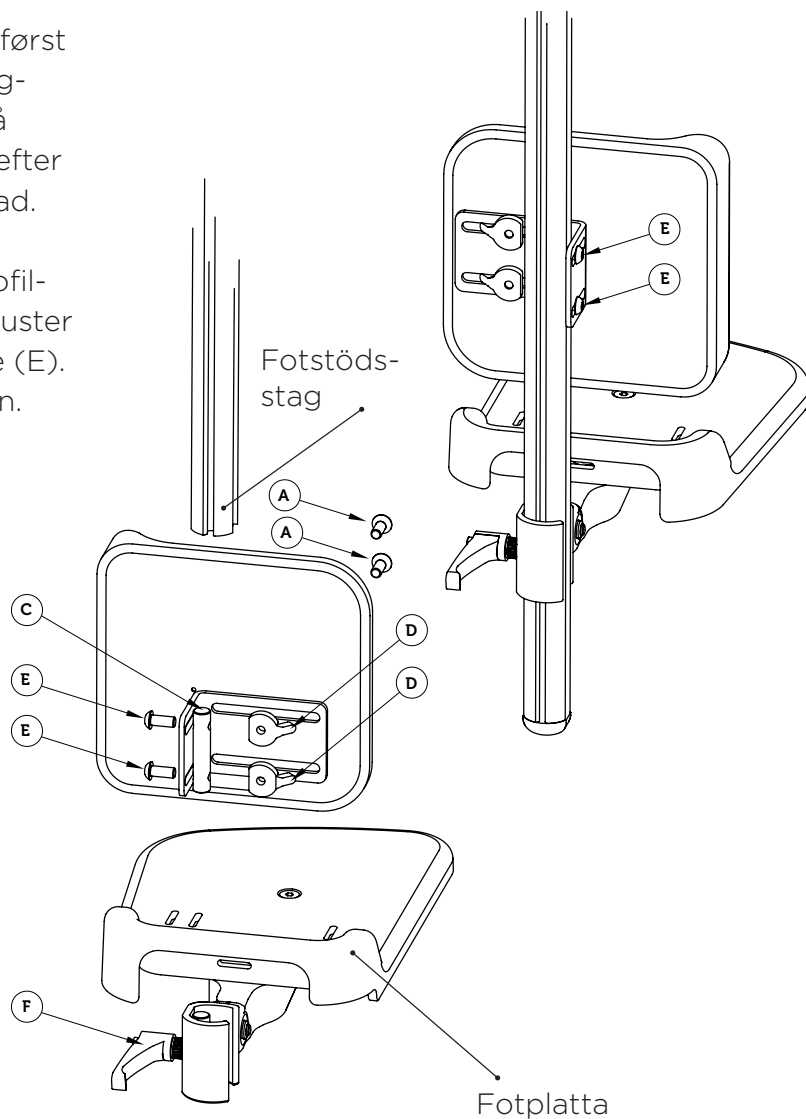


Fodkasse

Fodkasse dobbeltstang

For at montere fodkassen skal du starte med at indsætte profilmøtrikken (A) på fodkassen (B) i fodstøttestangen (C). Slindstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og stram vingeskruen (E).

Juster fodstøtten til den ønskede højde og bredde ved hjælp af skruerne (F) og (G).

Plastbeslaget (H) på fodkassen skal føres igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring og kontroller, at alle skruer er strammet korrekt.

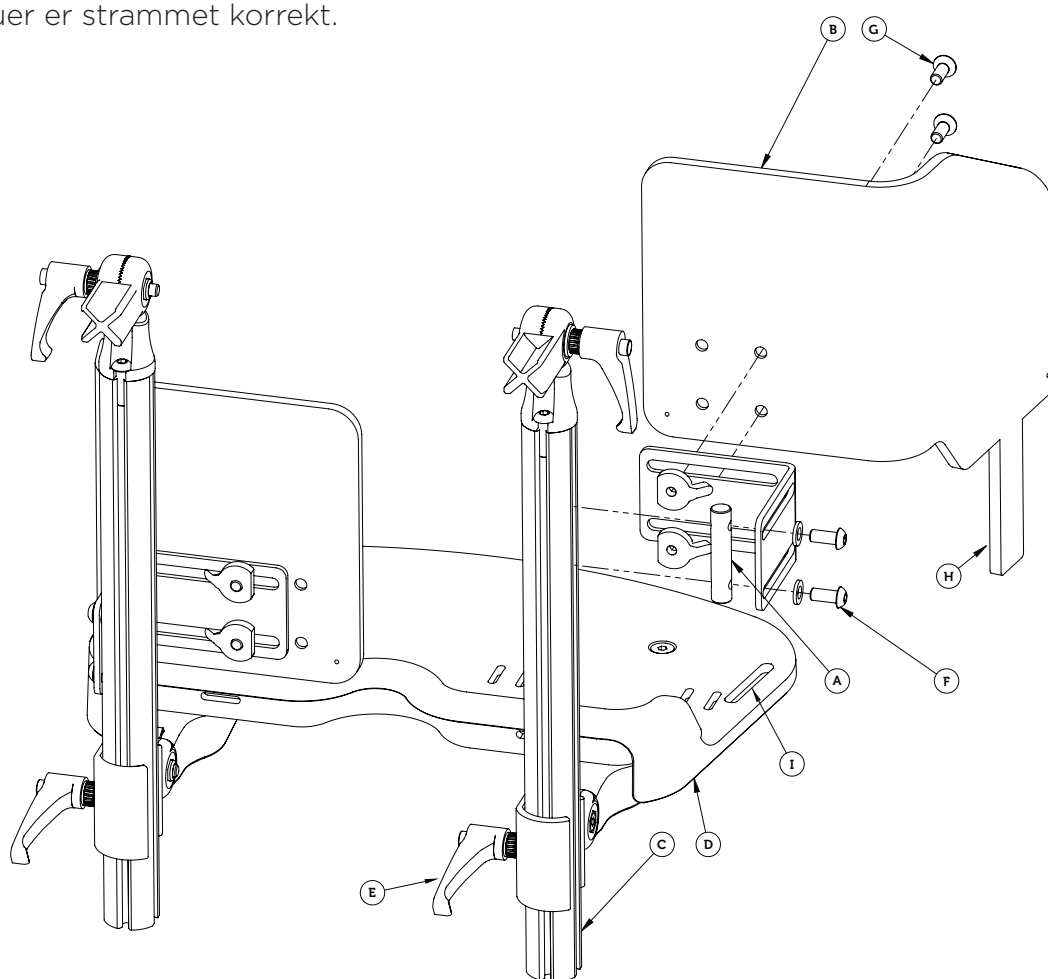


Efter justering til den ønskede højde kan plaststangen (H) efter indjustering af ønskede højde kappes eller varmes ind under fodstøttepladen efter egne ønskemål.

Bremse på hjul

Låsning af hjul

Tryk bremsegrebet (A) ned med foden for at låse hjulet (se billedet).

Flip læsegrebet op for at frigøre hjulet.

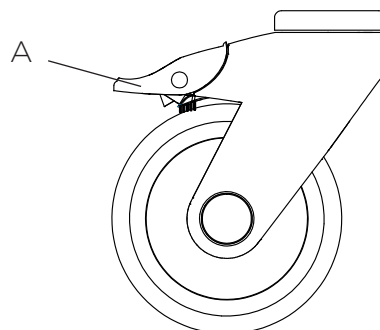

Anti-tip støtte

Montering af anti-tp støtten


Afmonter hjulet ved at skrue skruen (A) og skiven (B) af.

Skrue stopskruen (C) i.

Prøv at holde anti-tip støttebeslaget (D), så det store hul er mod det større hul i chassiset, og stopskruen går ind i det mindre hul på anti-tipsikringsbeslaget uden at stikke igennem.

Hvis stopskruen stikker igennem, skal du skrue den lidt mere ind.

Hvis skruen sidder for langt inde, så den ikke forhindrer anti-tip støtten i at dreje, skal den skrues lidt ud. Hold anti-tip støtten på samme sted, og sæt nu skruen (A) ind gennem skiven (B) og hjulet, før skruen trækkes gennem anti-tip støtten og skrues fast i chassiset.

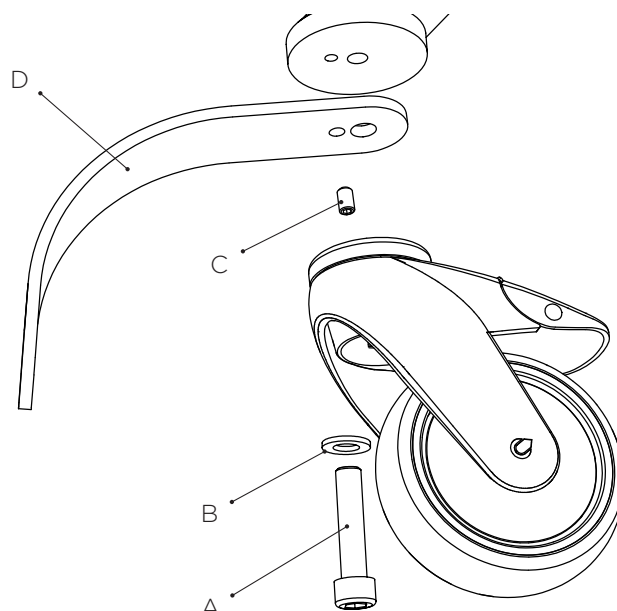

Afmontering af anti-tp støtten

Afmonter hjulet ved at skrue skruen (A) og skiven (B) af.

Skrue stopskruen (C) ud.

Fjern anti-tip støtten (D) og skru hjulet fast med skruen (A) og skiven (B).



Potte

Montering

Monter potten ved at skubbe kanterne ind i rillerne (A) på bagsiden af holderen. Skub potten, indtil den møder røret ved forkanten.




Tilt ikke stolen bagud, når potten bruges!

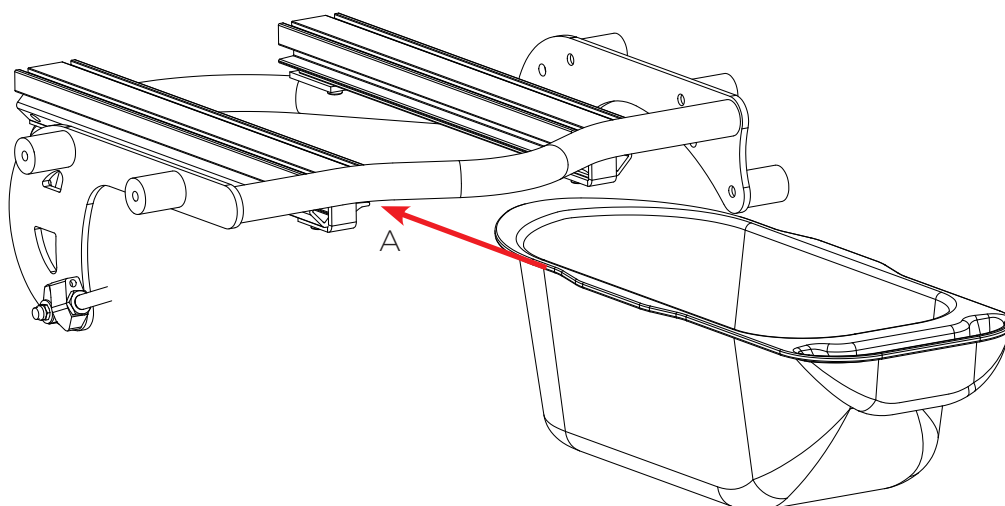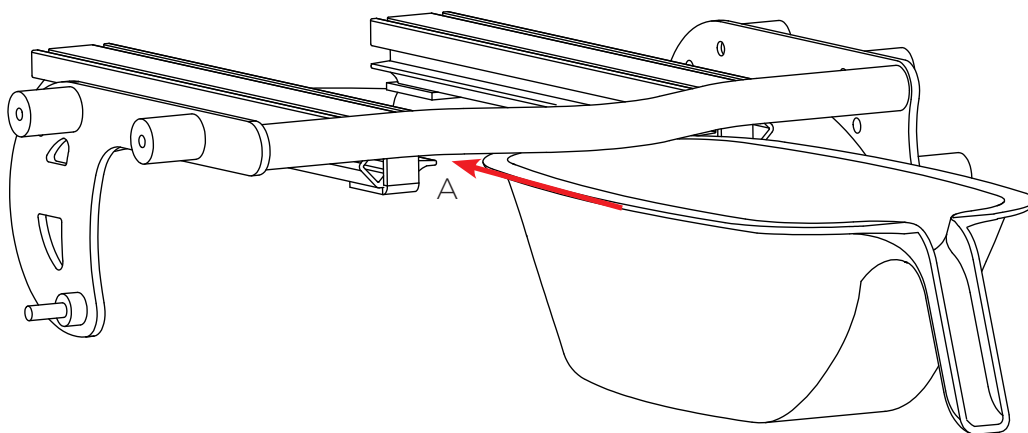

Urinskjold

Urinskjold uden rem

Monter urinskjoldet ved at klemme det fast mellem bensektionerne. Mål højden på urinskjoldet, så det passer til patienten. Hvis der bruges potte, skal du klippe overskydende materiale i bunden af skjoldet, så den nederste kant hviler mod bunden af potten.

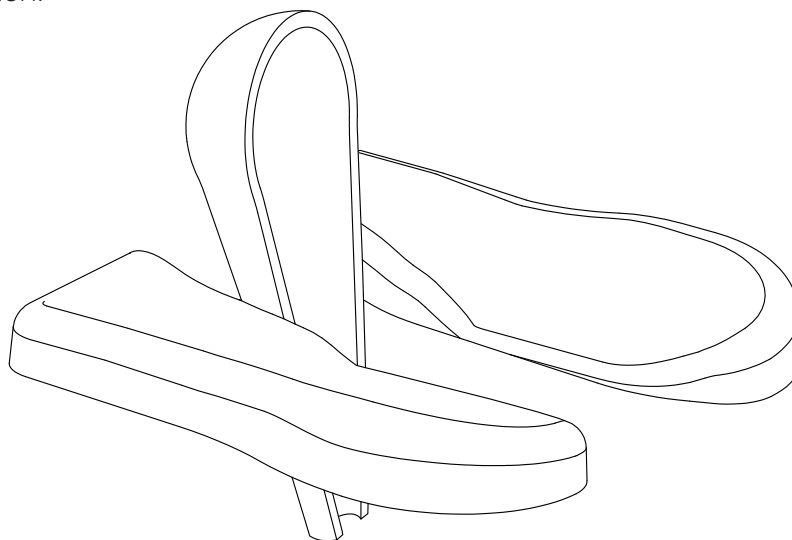

Urinskjold med rem

Monter urinskjoldet ved at klemme det fast mellem bensektionerne og stramme stroppen omkring et stelrør for at placere skjoldet bedre. Mål højden på urinskjoldet, så det passer til patienten. Hvis der bruges potte, skal du klippe overskydende materiale i bunden af skjoldet, så den nederste kant hviler mod bunden af potten.



Monteret urinskjold med rem rundt om rammerør ved delt siddedel.




Monteret urinskjold med rem rundt om rammerør ved hel siddedel.

Stænkskjold

Montering

Monter stænkskjoldet ved at skubbe kanterne ind i rillerne (A) på bagsiden af holderen. Skub stænkskjoldet ind, indtil den møder røret foran.

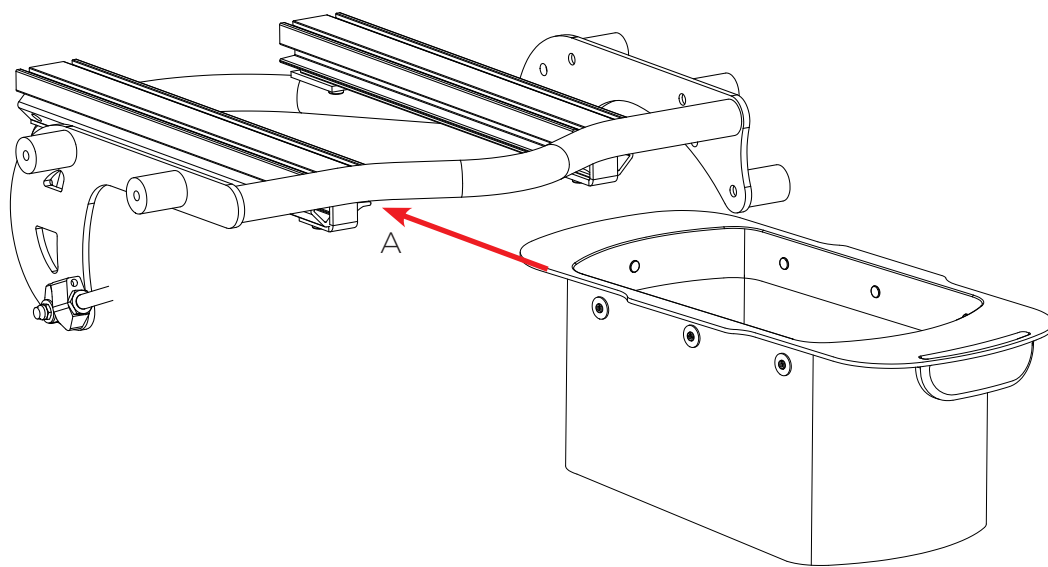

Opsummering og opfølgning

Efter montering og/eller justering skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugsanvisningen og fungerer efter hensigten.

Kontrollér indstillingerne af produktet og dets tilbehør for at sikre, at brugeren har en korrekt siddeposition.

Efter enhver form for montering, justering eller servicearbejde skal alle fingerskruer, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontrollér, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at tippe er elimineret.

Vedligeholdelses- og plejeinstruktioner

Dette produkt er et medicinsk udstyr beregnet til flergangsbrug. For hjælpemidlet skal fungere sikkert og nå den anslåede levetid, er det vigtigt med tilsyn, vedligeholdelse og rengøring. Ved udskiftning af dele ifm vedligeholdelse og service, skal der altid anvendes originale dele fra Anatomic Sitt.

Definitioner: Generelt skelnes der mellem afhjælpende vedligeholdelse, service og forebyggende vedligeholdelse

- Med **afhjælpende vedligeholdelse** refereres til foranstaltninger til reparation af et ødelagt produkt, en akut vedligeholdelse, svær at planlægge i tide og ofte afhængig af produktets brug.
- **Service** henviser til et enklere eftersyn, der kan forlænge produktets levetid. Dette omfatter for eksempel kontrol af skruer og fastgørelseselementer, bevægelige dele, generel slitage etc. samt mindre reparationer.
- Med **forebyggende vedligeholdelse** refereres til handlinger forårsaget af forudsigelige begrænsninger i produktets ydeevne. Denne form for vedligeholdelse kan ses som tiltag af engangskaraktér, der er planlagt i forhold til tid, art og omfang. For dette produkt kræves ingen forebyggende vedligeholdelse i produktets forventede levetid.

Kontrol før brug

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och rengöring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontrollér produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Tjek især skruer, møtrikker og samt fingerskruer.
- Kontrollér at sædet er ordentligt fastsat på chassiet
- Kontrollér produktets stabilitet
- Kontrollér funktionen på eventuelle anti-tip støtter
- Kontrollér bremsearmenes funktion.
- Kontrollér hjulenes tilstand.
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. for mobilitet og låsning.
- Kontrollér justering af kablerne til tilt og rygvinkling, så disse fungerer korrekt.
- Kontrollér bælte og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der opdages fejl, må du ikke bruge produktet. Kontakt din hjælpemiddel-distributør for at få afhjulpeth problemet.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler

Efter badning/brusebad løsnes al polstring for at forhindre, at fugt og vand samler sig nedenunder, og hele produktet tørres.

Service og afhjælpende vedligeholdelse

Service udføres primært for at forlænge produktets levetid og for at kontrollere, om der er behov for afhjælpende vedligeholdelse. Behovet for service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slitage, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af ødelagte, slidte eller revnede dele, må du kun bruge originale dele fra Anatomic Sitt, så produktet bevarer sin CE-mærkning. Reservedele kan bestilles i henhold til den separate reservedelsliste/splittegning for det pågældende produkt.

Ved hvert serviceeftersyn skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er fejl, som påvirker sikkerheden, og som ikke kan udbedres, skal produktet tages ud af drift.

For rengøring af produktet, se afsnittet "Vedligeholdelse".

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer
- Kontrollér at sædet er ordentligt fastsat på understellet
- Kontrollér at eventuelle anti-tip støtter fungerer
- Kontrollér bremsearmenes funktion
- Funktionstest og smør alle bevægelige dele som f.eks. led, kabler, hjul, knapper osv. Brug passende olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray osv.).
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, sædetilt, højdejustering, mm. Både med hensyn til justerbarhed, mobilitet og låsning.
- Kontrollér, at stemplerne låser i den valgte position.
- Kontrollér, at kablerne er korrekt placeret og korrekt justeret
- Kontrollér hjulenes funktion, og at de er sikre. På hjul med låsefunktion skal du kontrollere, at den fungerer. Hjulene må ikke kunne rulle i låst position.

- Kontrollér at stolen ruller tilfredstillende.
- Kontrollér evt. slitage på alle led, tagled og beslag. Vær sikker på at de låser, som de skal.
- Kontroller bæltet og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Tillæg for el-funktioner

- Kontrollér at aktuatorerne og batterierne er korrekt monteret og i god stand.
- Kontrollér at kabler, stik og tætningsringe er intakte og uden synlige skader.
- Kontrollér at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Opfølgning

Efter service skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til instruktionerne og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges. For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomicstt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp/klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bæltet/seler. Polstring er en forbrugsvare og skal udskiftes, når det er nødvendigt. Polstring kan vaskes i maskine ved maks. 60 °C. Maskinens tromle skal dog være stor nok til at forhindre, at polstringen mister sin form, og polstringen må ikke centrifugeres. Polstringen skal lufttørres (må IKKE tørretumbles, centrifugeres eller tørres i et tørreskab).

Bæltet og selerne kan vaskes i en 60°C skånevask, men må ikke tørretumbles eller tørres i et tørreskab. Brug en vaskepose. BEMÆRK! Se mere information i den relevante brugsanvisning for hvert positioneringshjælpemiddel.

Produktet kan rengøres i et vaskekabinet:

- Starfish Pro Manuel og Hydraulisk: 90°C i 3 minutter.
- Starfish Pro El: 60°C i 3 minutter

Når chassiset rengøres i et vaskekabinet, skal det være fastgjort og placeret lodret med låste hjul. Fjern polstring, bæltter eller seler.

Starfish Pro El - Brug rengøringsmidler, der ikke fjerner fedtet.

Før vask: Kontrollér, at alle elektriske forbindelser er sat i, og at dækslerne er lukket (de skal pege nedad for at undgå vandansamlinger). Sænk basen til den laveste position. Brug ikke en damprenser, og ret ikke højtryksspuleren direkte mod de elektriske komponenter. Produktet er IP-klassificeret: IPX6

Kontroller ved reovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader/slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnittet Begrænsninger i brugervejledningen), når du vurderer, om produktet er egnet til istandsættelse.

Udskift ødelagte, slidte eller revnede dele. Brug kun originale dele fra Anatomic Sitt. Reservedele kan bestilles i henhold til den separate reservedelsliste/Split tegning for det pågældende produkt. For at produktet kan beholde sin CE-mærkning, må hjælpemidlet kun monteres med reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S.

Funktionstest og smør alle bevægelige dele som f.eks. led, kabler, hjul, knapper osv. Brug egnet olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray osv.).

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også findes.

Touch-up-maling

For at forhindre rustskader eller forbedre ridser kan hvid touch-up-maling kan bestilles hos Anatomic Sitt A/S.

Artikelnummer: 689736, Touch-up-maling RAL9010 - Starfish Pro.

Kontrolpunkter

Generelt:

- ☐ Kontrollér hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontrollér hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.

Chassi/Stel:

- ☐ Kontrollér, at alle skruer og møtrikker er spændt..
- ☐ Kontrollér, at stolens justeringsmuligheder fungerer.
- ☐ Kontrollér at tilt- og rygvinklingsfunktionen fungerer og at gaspatronerne låser i valgte leje.
- ☐ Kontrollér at kablerne er korrekt placeret og korrekt justeret.
- ☐ Kontrollér at gaspatronen fungerer, som den skal.
- ☐ Kontrollér polstringen og udskift ved behov.

Hjul:

- ☐ Kontrollér, at hjulboltene er spændt korrekt.
- ☐ Kontrollér at svinghjulene drejer frit og at lejerne ikke sidder fast.
- ☐ Kontrollér at hjul med låsefunktion fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle i låst position.
- ☐ Kontrollér at stolen ruller tilfredstillende.

Fodstøtte:

- ☐ Foretag funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Tjek for slitage på alle låseled, og sørg for, at de låser korrekt.

Hovedstøtte:

- ☐ Kontrollér polstring og udskift efter behov.
- ☐ Kontrollér at hovedstøtteleddene låser.
- ☐ Kontrollér fæstet på hovedstøtten, for at sikre at den låser.

Armlæn:

- ☐ Kontrollér armlænets indstillinger for højde, dybde og bredde.
- ☐ Kontroller armlænets fastgørelseselementer, så de låses korrekt.

Øvrigt tilbehør:

- ☐ Kontrollér alle dele efter slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontrollér eventuelle låse og indstillingsmuligheder.

Elektriske funktioner:

- ☐ Kontrollér at aktuator og batterier er ordentligt monterede og i god stand.
- ☐ Kontrollér, at ledninger, stik og tætningsringe er intakte og uden synlige skader.
- ☐ Kontrollér, at håndbetjeningen og opladeren er i god stand og fungerer.

Opfølgning

Når renoveringen er afsluttet, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til instruktionerne og fungerer efter hensigten. Kontrollér også, at mærkning, etiketter og advarselssymboler er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et brugt produkt skal afmonteres og genbruges. Dele skal adskilles efter materialetype og bringes til en genbrugsstation eller tilsvarende. Batterier og gaspatroner sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For at kunne vurdere reklamationen bedst muligt skal produktet være tørt og rengjort, når det returneres.

Beskriv fejlen og dens årsag så detaljeret som muligt. Gør krav på garantireparation eller eventuel garantiombytning. Vedlæg en kopi af fakturaen, og oplys, at produktet skal returneres til dig efter reparation. Angiv leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Der findes en reklamationsformular på vores hjemmeside.

Pak det tørre og rene produkt godt ind for at beskytte det mod eventuelle stød under transporten. Glem ikke at notere forsendelsesnummeret eller lignende på dine dokumenter. På den måde kan du spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

Returnering

Forkert bestilte eller forkert leverede varer skal returneres inden for 20 dage efter leveringsdatoen. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Angiv årsagen til, at du returnerer dine varer. Der findes returformularer på vores hjemmeside.

Pak produktet godt ind for at beskytte det mod eventuelle stød under transporten. Glem ikke at notere forsendelsesnummeret eller lignende på dine dokumenter. Dette er så du kan spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

Bemærk venligst, at specialfremstillede produkter ikke kan returneres!

Revision

Der er foretaget følgende ændringer i denne version af brugervejledningen.

Fodkasse

Nyt kapitel

s. 40

Revisionsfortegnelse

ver. 2.0 - 2020-06-11

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-12-21

ver. 2.3 - 2023-01-17

ver. 2.4 - 2023-02-23

ver. 2.5 - 2023-05-24

ver. 2.6 - 2023-11-29

ver. 2.7 - 2024-04-19

ver. 2.8 - 2025-02-27

ver. 2.9 - 2026-01-09

SE

Anatomic Sitt AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

Følg os på



**Anatomic
SITT™**