

Zitzi Starfish Pro




Reservdelslista..... sida

Vagga.....	2
Elpaket.....	3
Pumpkolv	4
Gaskolvtilt.....	5
Sittdel hel	6
Sittdel delad	7
Ryggstöd/Sacrumstöd.....	8
Bålstöd	9
Huvudstöd	10
Sidojusterbart huvudstödsfäste.....	11
Armstöd från chassi.....	12
Armstöd från rygg.....	13
Armstöd uppfällbar	14
Armstöd skålade	15
Bord	16
Stödbord	17
Supportbeslag	18
Lårstöd	19
Höftstöd.....	20
Fotstöd helt/uppfällbart	21
Fotstöd delat/uppfällbart/kulled.....	22
Fotstödsstag	23
Vadstöd.....	24
Potta.....	25
Kisskydd / Stänkskydd.....	26
Länkhjul / Tippskydd.....	27
Körbåge	28
Etikettplaceringar	29



Starfish Pro - Vagga

Huvudartiklar:

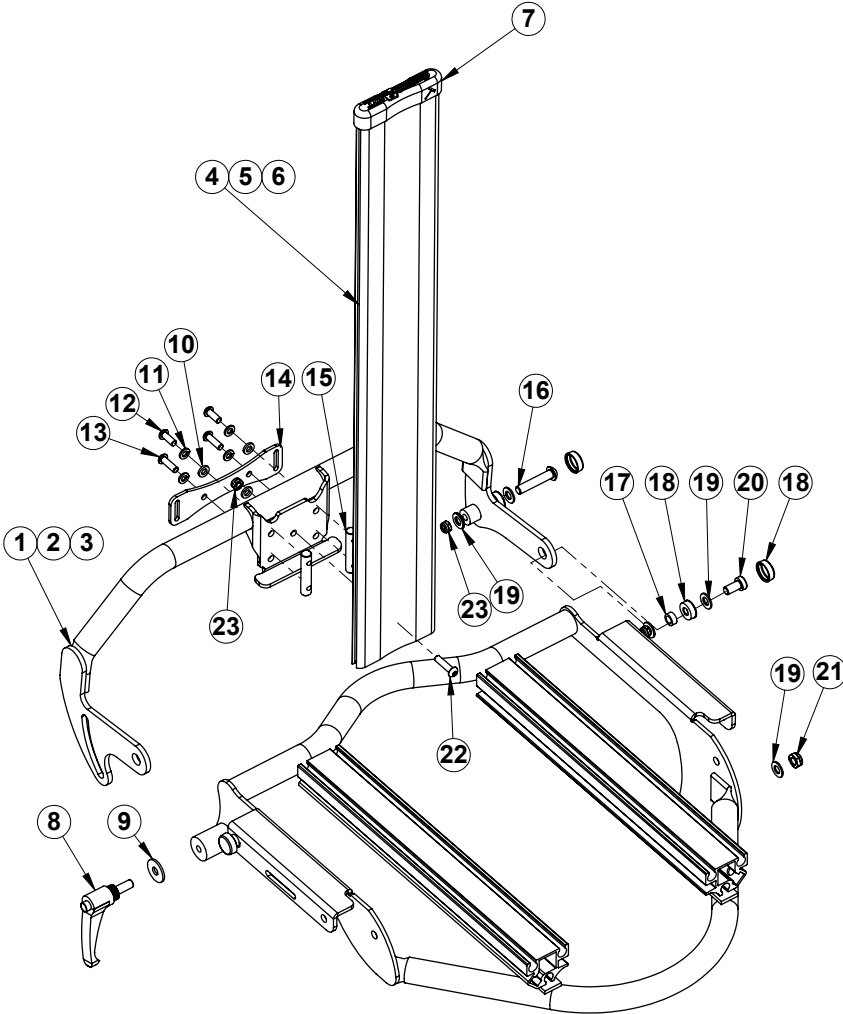


Pos	Art.nr	Benämning	Info
1	689593	Ryggbåge stl. 1 - Starfish pro	
2	689594	Ryggbåge stl. 2 - Starfish pro	
3	689595	Ryggbåge stl. 3 - Starfish pro	
4	212545	Ryggprofil 45 cm (st) - Clozitt/Starfish	Stl. 1
5	212555	Ryggprofil 55 cm (st) - Clozitt/Starfish	Stl. 2
6	212565	Ryggprofil 65 cm (st) - Clozitt/Starfish	Stl. 3
7	689168	T-nyckel 4mm - Zitz Clozitt	
8	159621	Spakvred M8x20 (arm 63 mm), RF	
9	144437	Bricka M8 RF - 8,4x20x2	
10	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5	
11	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6	
12	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16	
13	132950	Skruv M6 RF - Låg insex M6x20	
14	689281	Nedre monteringsbleck, sele (Hundben)	
15	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50mm	
16	131840	Skruv M8 RF - Kullrig insex M8x40	
17	689590	Bussning ryggbåge - Starfish Pro	
18	133115	Skruvskydd (snäpphätta) kpl. M8 Starfish Pro	
19	143601	Bricka M8 RF - 8,4x16x1,6	
20	132961	Skruv M8 RF - Låg insex M8x25	
21	137008	Låsmutter M8 RF	
22	131625	Skruv M6 RF - Kullrig insex M6x25	
23	137006	Låsmutter M6 RF	

Starfish - Elkit

Huvudartiklar:


689690

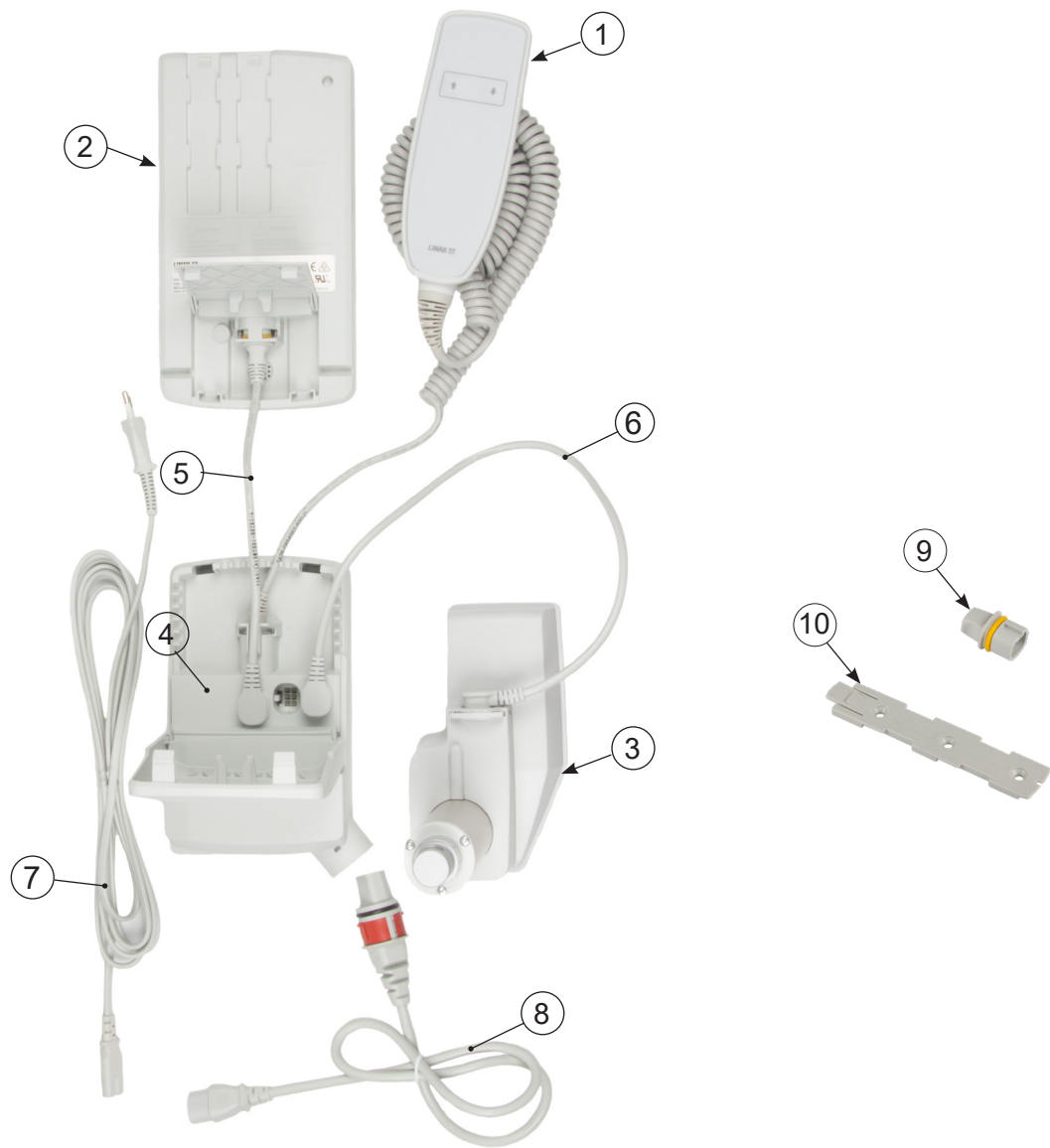

Pos	Art.nr	Benämning
1	689743	Handkontroll HB 81 - Starfish Pro
2	689742	Batteri BA 21 - Starfish Pro
3	689741	Ställdon LA40 - Starfish Pro
4	689740	Kontrollbox CA30 - Starfish Pro
5	689746	Batterikabel - Starfish Pro
6	689739	Styrkabel - Starfish Pro
7	689744	Laddningskabel EU 3m - Starfish Pro
8	689750	Anslutningskabel - Starfish Pro
9	689748	Blindplugg RAL 7035 - Starfish Pro
10	689747	Fäste platt FAF - Starfish Pro


Starfish Pro - Pumpkolv

Huvudartiklar:
689780 - 689783

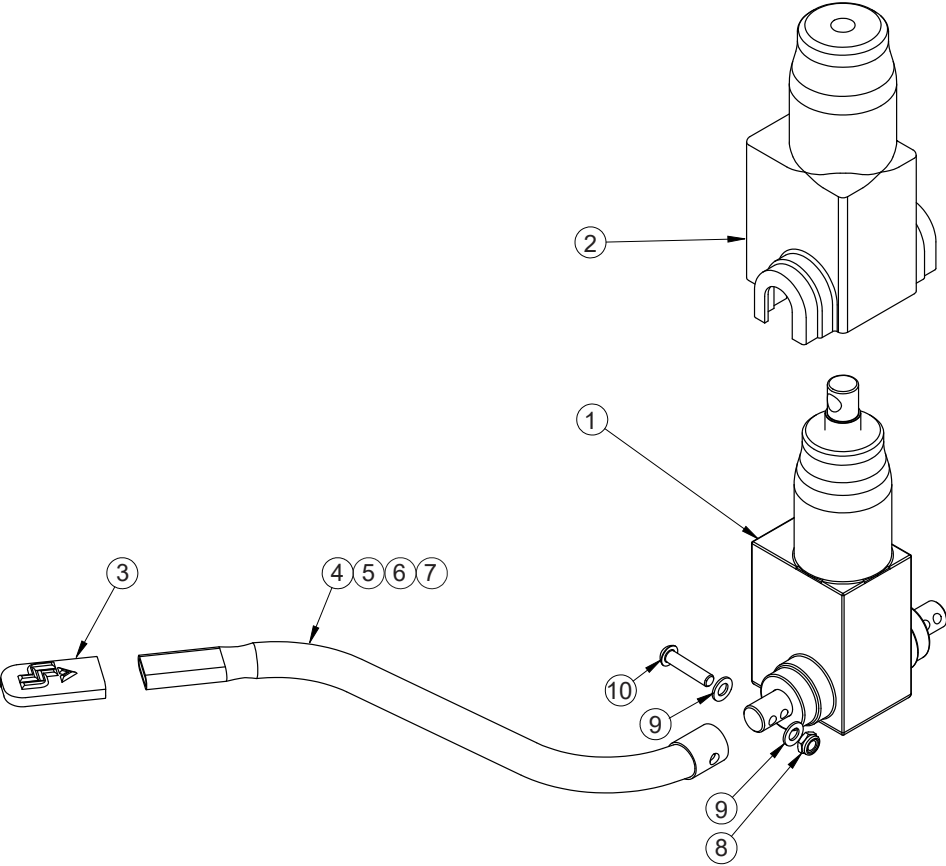

Pos	Art.nr	Benämning
1	915070	Pumpkolv (MK5) - Starfish Pro
2	915071	Hus till pumpkolv (MK5) - Starfish Pro
3	689601	Ändavslut fotpedal - Starfish Pro
4	689606	Fotpedal stl. 1-2 hö. exkl. ändavslut - Starfish Pro
5	689607	Fotpedal stl. 3 hö. exkl. ändavslut - Starfish Pro
6	689608	Fotpedal stl. 1-2 vä. exkl. ändavslut - Starfish Pro
7	689609	Fotpedal stl. 3 vä. exkl. ändavslut - Starfish Pro
8	137008	Låsmutter M8 RF
9	143601	Bricka M8 RF - 8,4x16x1,6
10	131840	Skruv M8 RF - Kullrig insex M8x40


Starfish Pro - Gaskolvtilt

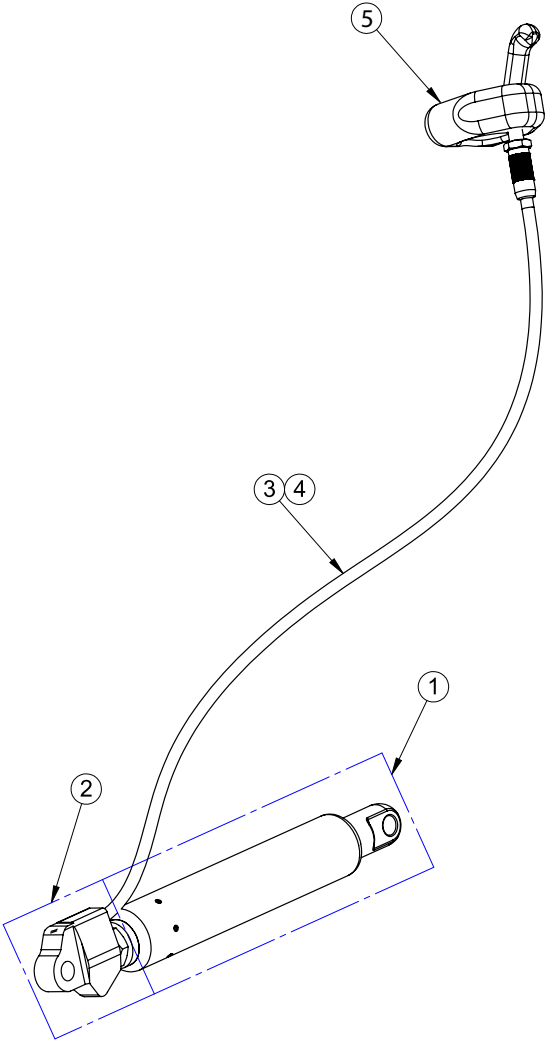

Pos	Art.nr	Benämning	Info
1	915014	Gaskolv 235mm - 600N rostfri - Starfish	
2	915027	Aktiveringshus till vajer	
3	387034	Vajer, tilt 80/88cm, vit	Till stl. 1
4	387035	Vajer, tilt 95/103cm, vit	Till stl. 2-3
5	387016	Handtag, tilt svart (22mm) - samtliga underreden	

Starfish Pro - Sittdel hel


Huvudartiklar:
689981 - 689983
689921 - 689923

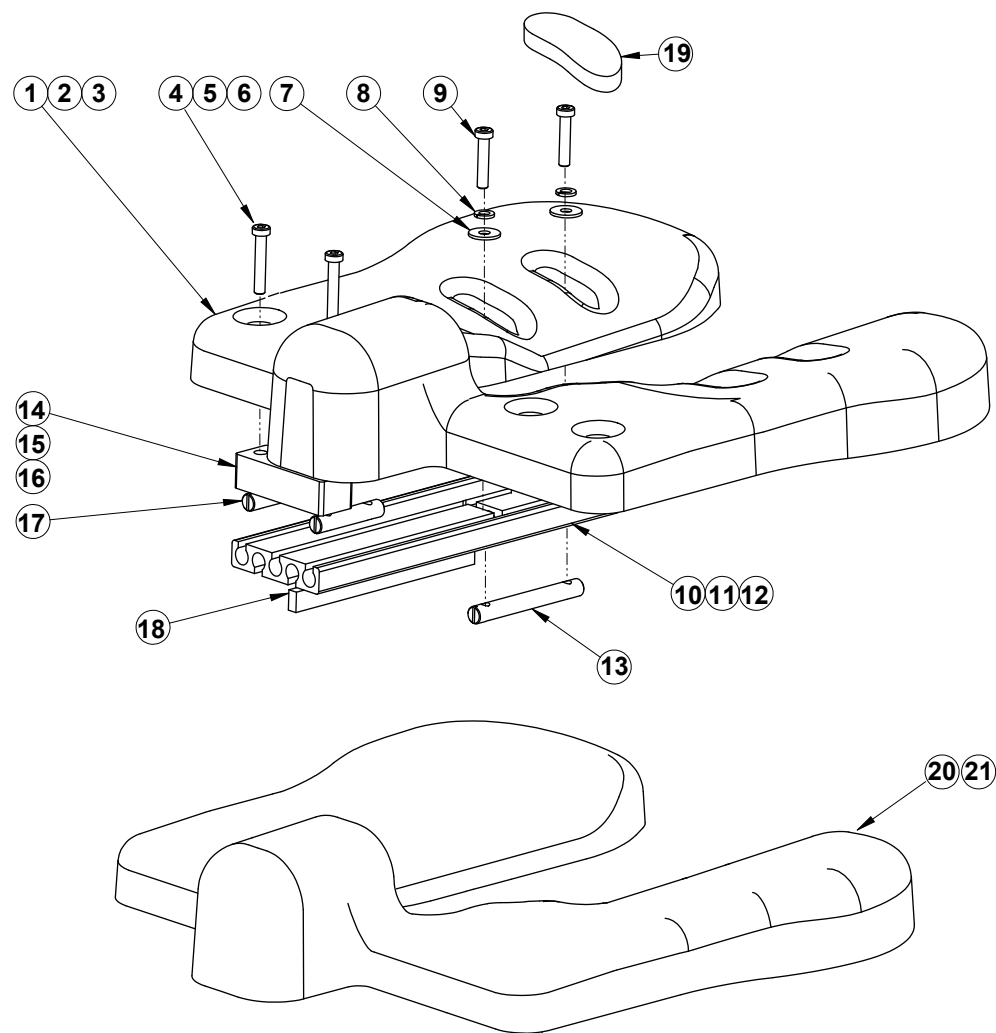

Pos	Art.nr	Benämning
1	689621	Plast, sittdel hel stl. 1 (st) - Starfish Pro
2	689622	Plast, sittdel hel stl. 2 (st) - Starfish Pro
3	689623	Plast, sittdel hel stl. 3 (st) - Starfish Pro
4	132953	Skruv M6 RF - Låg insex M6x35
5	132954	Skruv M6 RF - Låg insex M6x40
6	132955	Skruv M6 RF - Låg insex M6x45
7	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
8	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
9	132952	Skruv M6 RF - Låg insex M6x30
10	689651	Profil bendel stl. 1
11	689652	Profil bendel stl. 2
12	689653	Profil bendel stl. 3
13	136009	Sargsprint M6 RF - Dubbel 82mm
14	689656	Distans bendel stl. 1 - Starfish Pro
15	689657	Distans bendel stl. 2 - Starfish Pro
16	689658	Distans bendel stl. 3 - Starfish Pro
17	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50mm
18	689603	Spårfyllnad profil - Starfish Pro
19	689695 689699	Hålfyllnad sittdel 51x27x14mm - Starfish Pro Hålfyllnad sittdel 51x27x7mm - Starfish Pro
20	689671 689672 689673	Polstring std, sittdel hel stl. 1 (st) Polstring std, sittdel hel stl. 2 (st) Polstring std, sittdel hel stl. 3 (st)
21	689541 689542 689543	Polstring extra avlastning, sittdel hel stl. 1 (st) Polstring extra avlastning, sittdel hel stl. 2 (st) Polstring extra avlastning, sittdel hel stl. 3 (st)

Starfish Pro - Sittdel delad


Huvudartiklar:
689926 - 689928

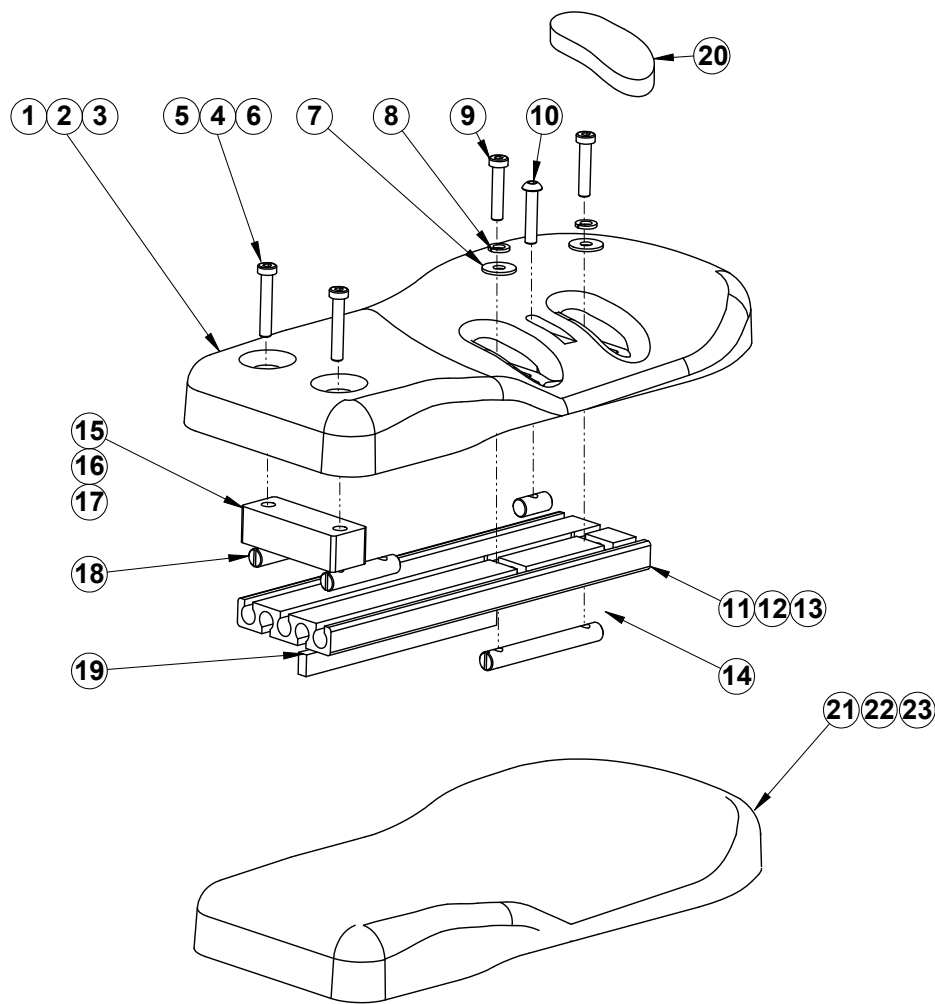

Pos	Art.nr	Benämning
1	689931	Plast, sittdel delad stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689932	Plast, sittdel delad stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
2	689933	Plast, sittdel delad stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689934	Plast, sittdel delad stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
3	689935	Plast, sittdel delad stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
	689936	Plast, sittdel delad stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
4	132953	Skruv M6 RF - Låg insex M6x35
5	132954	Skruv M6 RF - Låg insex M6x40
6	132955	Skruv M6 RF - Låg insex M6x45
7	143812	Bricka M6 RF - 6,4x18x1,6
8	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
9	132952	Skruv M6 RF - Låg insex M6x30
10	131630	Skruv M6 RF - Kullrig insex M6x30
11	689651	Profil bendel stl. 1
12	689652	Profil bendel stl. 2
13	689653	Profil bendel stl. 3
14	136009	Sargsprint M6 RF - Dubbel 82mm
15	689656	Distans bendel stl. 1 - Starfish Pro
16	689657	Distans bendel stl. 2 - Starfish Pro
17	689658	Distans bendel stl. 3 - Starfish Pro
18	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50mm
19	689603	Spårfyllnad profil - Starfish Pro
20	689695	Hålfyllnad sittdel 51x27x14mm - Starfish Pro
	689699	Hålfyllnad sittdel 51x27x7mm - Starfish Pro
21	689954	Polstring std, sittdel delad stl. 1 hö. (st)
	689955	Polstring std, sittdel delad stl. 1 vä. (st)
	689956	Polstring std, sittdel delad stl. 2 hö. (st)
	689957	Polstring std, sittdel delad stl. 2 vä. (st)
	689958	Polstring std, sittdel delad stl. 3 hö. (st)
	689959	Polstring std, sittdel delad stl. 3 vä. (st)
22	689549	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 1 hö. (st)
	689550	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 1 vä. (st)
	689551	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 2 hö. (st)
	689552	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 2 vä. (st)
	689553	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 3 hö. (st)
	689554	Polstring extra avlastning, sittdel delad stl. 3 vä. (st)
24	689770	Polstring PU, sittdel delad stl. 1 hö. (st)
	689771	Polstring PU, sittdel delad stl. 1 vä. (st)
	689772	Polstring PU, sittdel delad stl. 2 hö. (st)
	689773	Polstring PU, sittdel delad stl. 2 vä. (st)
	689774	Polstring PU, sittdel delad stl. 3 hö. (st)
	689775	Polstring PU, sittdel delad stl. 3 vä. (st)

Starfish Pro - Ryggstöd och Sacrumstöd

Huvudartiklar:
689431 - 689433
689435 - 689437

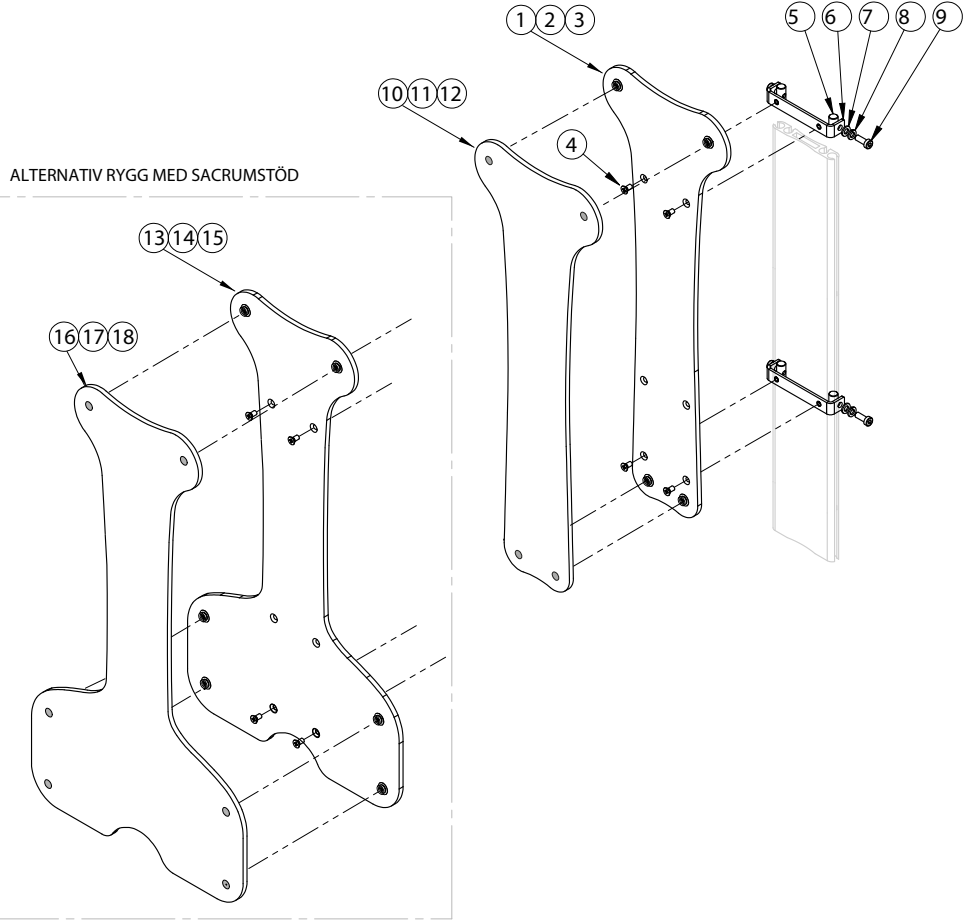


Pos	Art.nr	Benämning
1	689631	Plast, ryggdel stl. 1 (st) - Starfish Pro
2	689632	Plast, ryggdel stl. 2 (st) - Starfish Pro
3	689633	Plast, ryggdel stl. 3 (st) - Starfish Pro
4	132910	Skruv M5 RF - Försänkt stjärn M5x10
5	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
6	689185	Ryggbygel vit kpl.
7	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
8	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
9	132949	Skruv M6 RF - Låg inset M6x16
10	689581	Polstring std, ryggdel stl. 1 (st) - Starfish Pro
11	689582	Polstring std, ryggdel stl. 2 (st) - Starfish Pro
12	689583	Polstring std, ryggdel stl. 3 (st) - Starfish Pro
13	689537	Plast, rygg m. sacrumstöd stl. 1 (st) - Starfish Pro
14	689536	Plast, rygg m. sacrumstöd stl. 2 (st) - Starfish Pro
15	689535	Plast, rygg m. sacrumstöd stl. 3 (st) - Starfish Pro
16	689587	Polstring std. ryggdel m. sacrumstöd stl. 1 (st) - Starfish Pro
17	689586	Polstring std. ryggdel m. sacrumstöd stl. 2 (st) - Starfish Pro
18	689585	Polstring std. ryggdel m. sacrumstöd stl. 3 (st) - Starfish Pro

Starfish Pro - Bålstöd, förstärkt bålstöd, vikbart bålstöd, bred

Huvudartiklar:

689441 - 689444

689446 - 689455

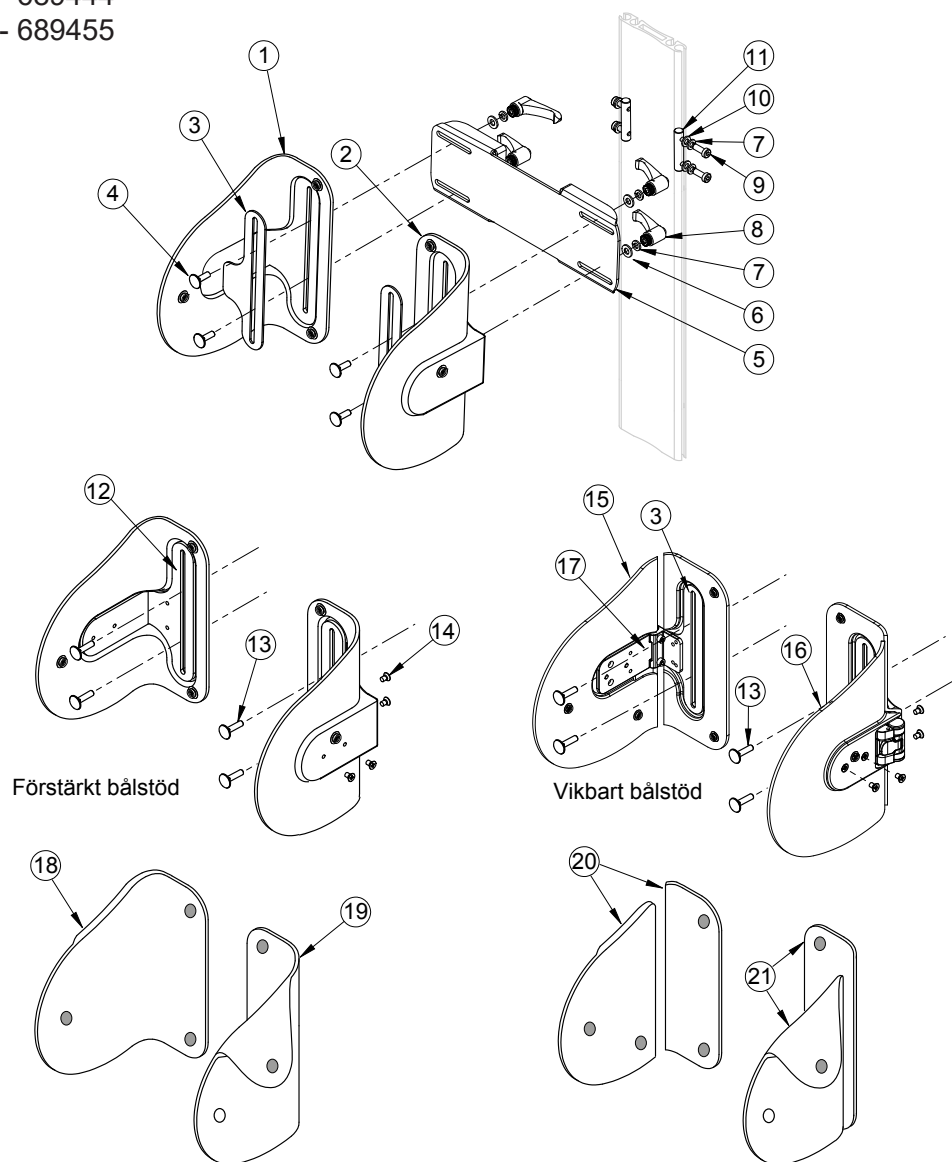

Pos	Art.nr	Benämning
1	689939	Plast bålstöd stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689941	Plast bålstöd stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689943	Plast bålstöd stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
2	689940	Plast bålstöd stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
	689942	Plast bålstöd stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
	689944	Plast bålstöd stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
3	689640	Spårförstärkning bålstöd stl. 1-3 - Starfish Pro
4	167621	Vagnsbult M6 RF - M6x20
5	689571	Bålstödsbeslag stl. 1 - Starfish Pro
	689572	Bålstödsbeslag stl. 2 - Starfish Pro
	689573	Bålstödsbeslag stl. 3 - Starfish Pro
	689574	Bålstödsbeslag bred - Starfish Pro
6	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
7	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
8	160600	Spakvred M6 hona (arm 44 mm)
9	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
10	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
11	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50mm
12	689639	Bålstödsförstärkning stl. 1-3 - Starfish Pro
13	167626	Vagnsbult M6 RF - M6x25
14	132908	Skruv M5 RF - Försänkt stjärn M5x8
15	689948	Plast bålstöd vikbart, stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689950	Plast bålstöd vikbart, stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689952	Plast bålstöd vikbart, stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
16	689949	Plast bålstöd vikbart, stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
	689951	Plast bålstöd vikbart, stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
	689953	Plast bålstöd vikbart, stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
17	285274	Beslag vikbart bålstöd (svart) - Zitzi Pro
18	689960	Polstring std, bålstöd stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689962	Polstring std, bålstöd stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689964	Polstring std, bålstöd stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
19	689961	Polstring std, bålstöd stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
	689963	Polstring std, bålstöd stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
	689965	Polstring std, bålstöd stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
20	689969	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689971	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689973	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
21	689970	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
	689972	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
	689974	Polstring std, bålstöd vikbart, stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro

Breda bålstöd använder:

art. nr 689454 Bålstöd stl. 2 bred kpl. - har 689573 Bålstödsbeslag stl 3

art. nr 689444 Bålstöd stl. 3 bred kpl. - har 689574 Bålstödsbeslag bred


art. nr 689455 Bålstöd förstärkt stl. 2 bred kpl. - har 689573 Bålstödsbeslag stl 3

art. nr 689449 Bålstöd vikbart stl. 2 bred kpl. - har 689573 Bålstödsbeslag stl 3

art. nr 689450 Bålstöd vikbart stl. 3 bred kpl. - har 689574 Bålstödsbeslag bred

Starfish Pro - Huvudstöd


Huvudartiklar:
689456 - 689458

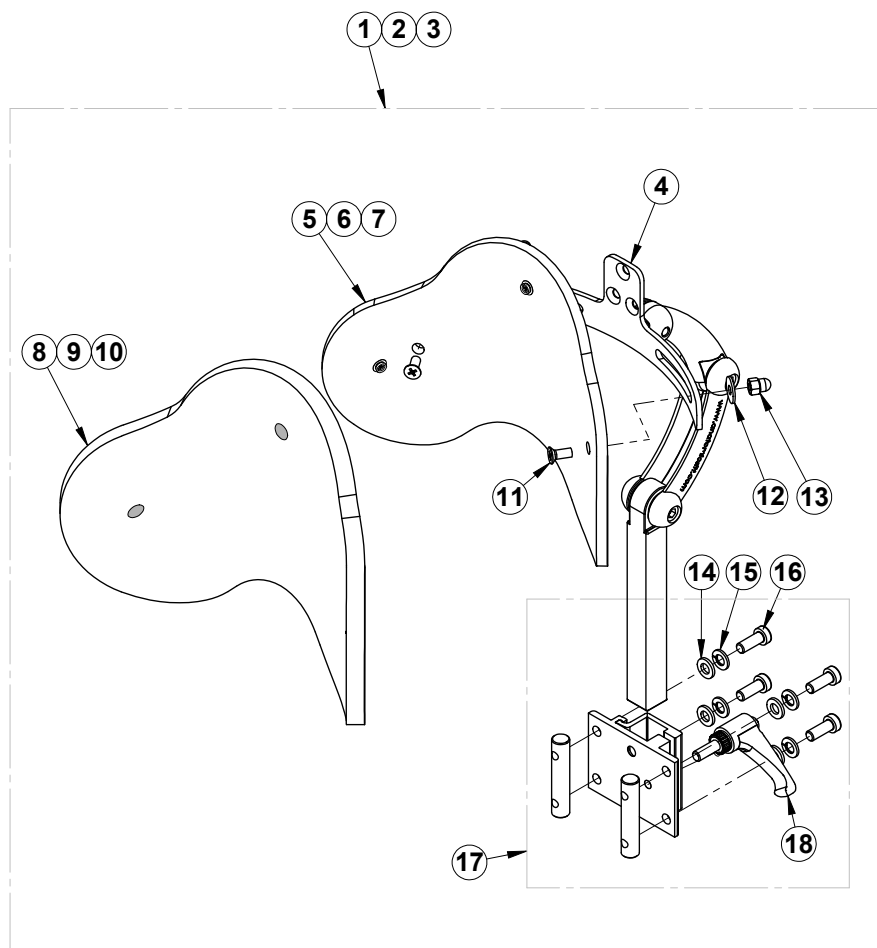

Pos	Art.nr	Benämning
1	689456	Huvudstöd stl. 1 lång kpl. (st) -Starfish Pro
2	689457	Huvudstöd stl. 2 kpl. (st) -Starfish Pro
3	689458	Huvudstöd stl. 2 lång kpl. (st) -Starfish Pro
4	213195	Treledat huvudstödsstag stl. 1 (120mm stag)
5	689236	Huvudstödsplatta stl. 1 lång - Clozitt
6	689238	Huvudstödsplatta stl. 2 - Clozitt
7	689240	Huvudstödsplatta stl. 2 lång - Clozitt
8	689232	Polstring, huvudstöd, stl. 1 långt - Clozitt
9	689233	Polstring, huvudstöd, stl. 2 - Clozitt
10	689234	Polstring, huvudstöd, stl. 2 långt - Clozitt
11	132912	Skruv M5 RF - Försänkt stjärn M5x12
12	143811	Planbricka M5 RF - 5,3x15x1,2
13	133305	Kupolmutter M5 RF
14	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
15	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
16	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
17	689246	Huvudstödsfäste, kpl. - Clozitt
18	159615	Spakvred M6x16 (arm 44 mm), RF

Starfish Pro - Sidojusterbart huvudstödsfäste


Huvudartiklar:
689245

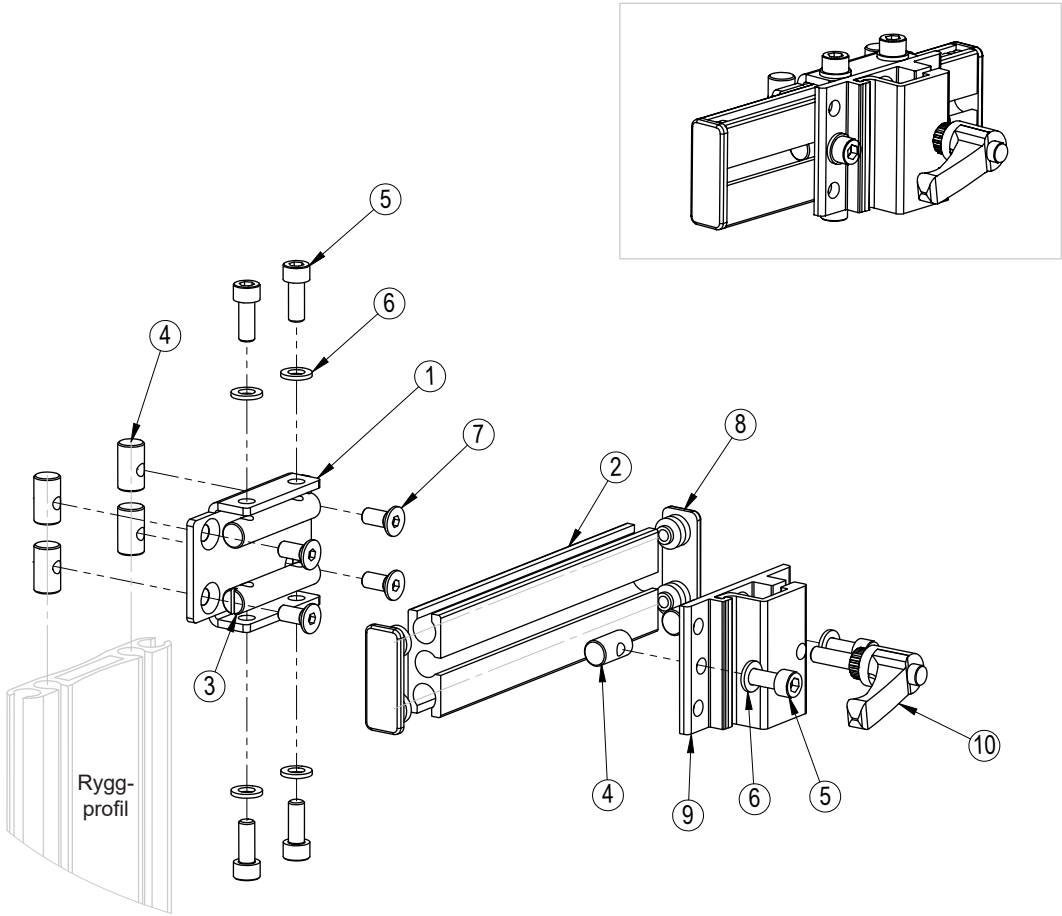

Pos	Art nr	Benämning
1	152755	Basplåt till justerbart huvudstödsfäste, rostfri
2	152751	Profil till justerbart huvudstödsfäste, rostfri
3	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50 mm
4	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18 mm
5	126616	Skruv M6 - Hög M6x16 MC6S FZB
6	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
7	132616	Skruv M6 RF - Försänkt insex M6x16
8	145003	Ändavslut till rektangulär trespärsprofil, svart (40x15 mm)
9	152702	Beslag Huvudstöd
10	159615	Spakvred M6x16 (arm 44 mm), rostfri

Starfish Pro - Armstöd från chassi


Huvudartiklar:
689465 - 689466

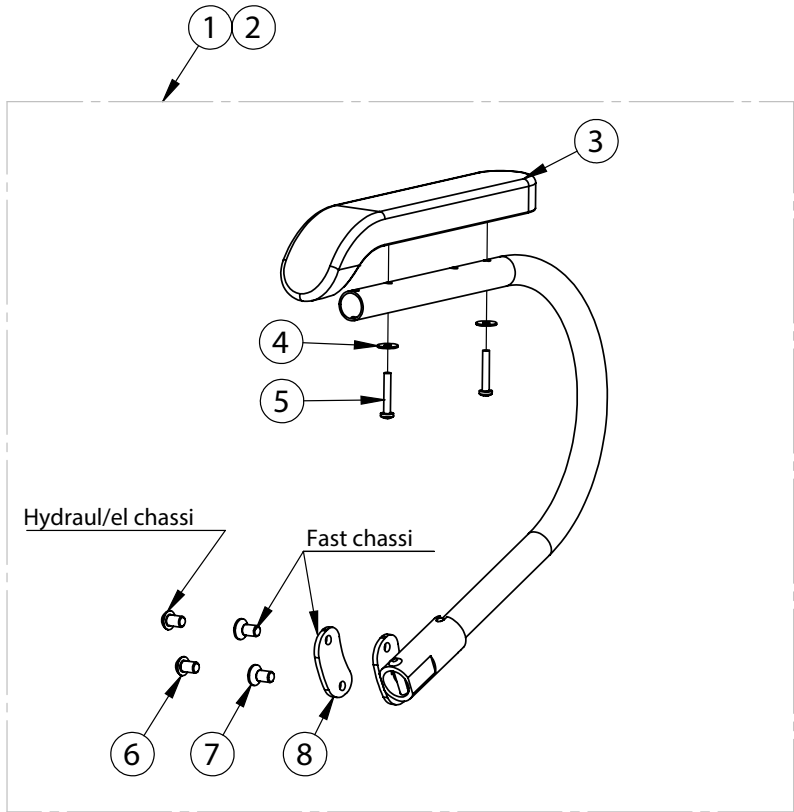

Pos	Art.nr	Benämning
1	689907	Armstöd Chassi stl. 1-2 hö. (st) - Starfish Pro
	689908	Armstöd Chassi stl. 1-2 vä. (st) - Starfish Pro
2	689909	Armstöd Chassi stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
	689910	Armstöd Chassi stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
3	990069	Armstödsplatta 270x50x25mm - Zitzi
4	143811	Planbricka M5 RF - 5,3x15x1,2
5	132945	Skruv M5 RF - Försänkt stjärn M5x30
6	131816	Skruv M8 RF - Kullrig insex M8x16
7	132985	Skruv M8 RF - Försänkt insex M8x16
8	689618	Fästbricka för hylsa, beslag armstöd chassi (st) - Starfish Pro

Starfish Pro - Armstöd från rygg


Huvudartiklar:
689461 - 689463

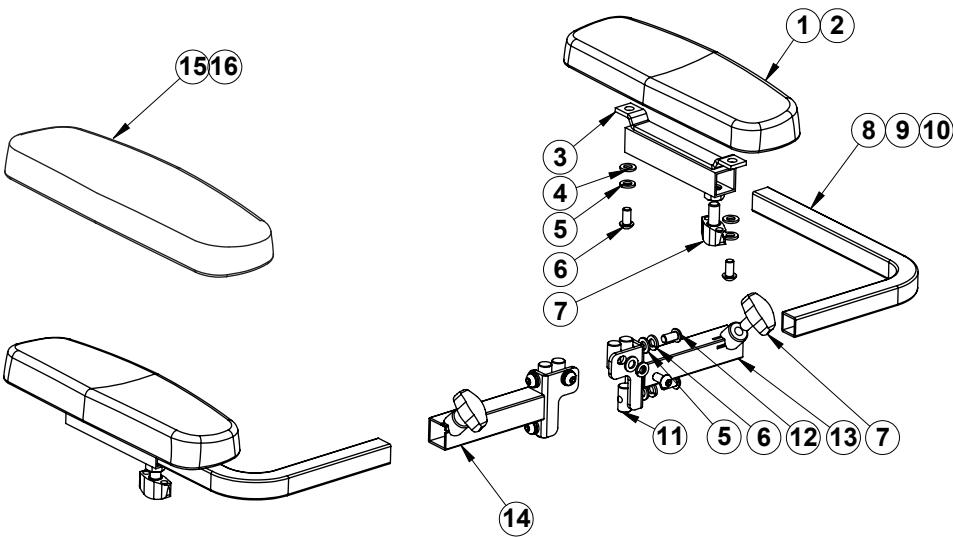

Pos	Art.nr	Benämning
1	990065	Armstödsplatta stl. 1, 230x75mm
2	990064	Armstödsplatta stl. 2, 330x75mm
3	689610	Beslag armstödsplatta (st) - Starfish Pro
4	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
5	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
6	131612	Skruv M6 RF - Kullrig insex M6x12
7	158822	Vingvred II Rostfri M8x16
8	689265	Armstödsstag, stl. 1
9	689267	Armstödsstag, stl. 2
10	689269	Armstödsstag, stl. 3
11	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
12	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
13	689275	Armstödsfäste hö.
14	689273	Armstödsfäste vä.
15	689575	Polstring, std armstödsplatta 230x75mm (par) - Starfish Pro
16	689576	Polstring, std armstödsplatta 330x75mm (par) - Starfish Pro

Starfish Pro - Armstöd uppfällbar


Huvudartiklar:
869565 - 689567

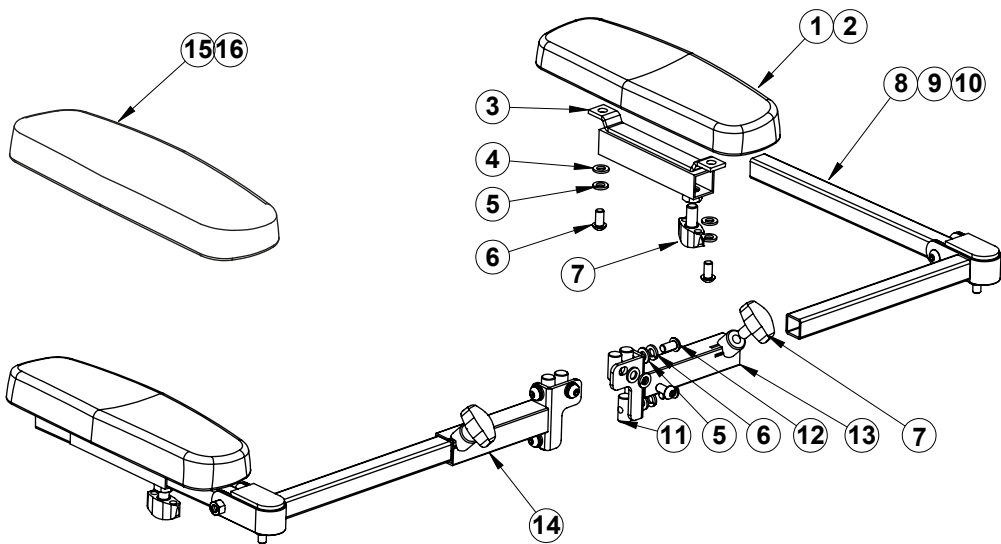

Pos	Art.nr	Benämning
1	990065	Armstödsplatta stl. 1, 230x75mm
2	990064	Armstödsplatta stl. 2, 330x75mm
3	689610	Beslag armstödsplatta (st) - Starfish Pro
4	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
5	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
6	131612	Skruv M6 RF - Kullrig insex M6x12
7	158822	Vingvred II Rostfri M8x16
8	689991	Armstödsstag uppfällbar, stl. 1, hö. - Starfish
	689992	Armstödsstag uppfällbar, stl. 1, vä. - Starfish
9	689993	Armstödsstag uppfällbar, stl. 2, hö. - Starfish
	689994	Armstödsstag uppfällbar, stl. 2, vä. - Starfish
10	689995	Armstödsstag uppfällbar, stl. 3, hö. - Starfish
	689996	Armstödsstag uppfällbar, stl. 3, vä. - Starfish
11	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
12	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
13	689275	Armstödsfäste hö.
14	689273	Armstödsfäste vä.
15	689575	Polstring, std armstödsplatta 230x75mm (par) - Starfish Pro
16	689576	Polstring, std armstödsplatta 330x75mm (par) - Starfish Pro

Starfish Pro - Armstöd skålade


Huvudartiklar:
689467 - 689469

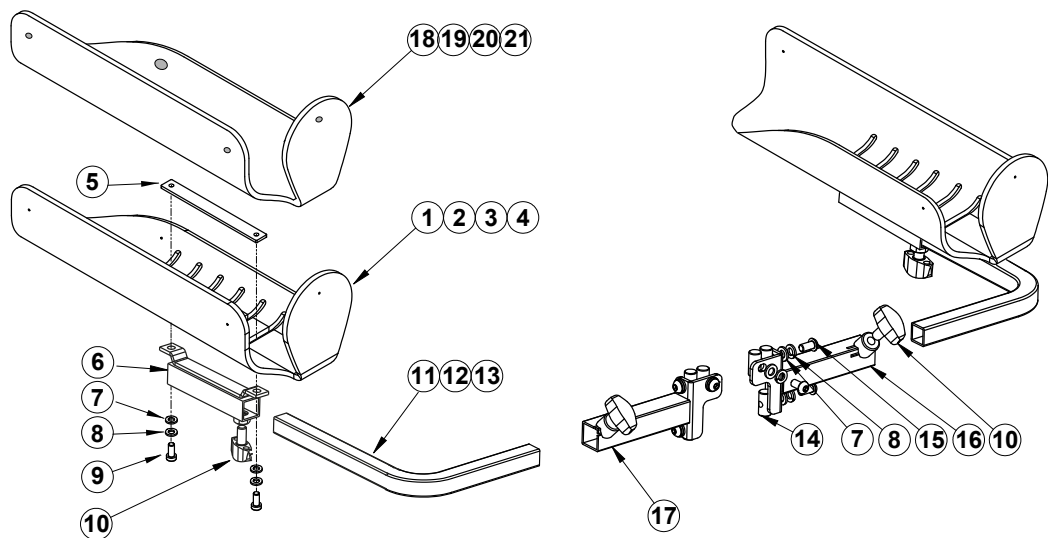

Pos	Art.nr	Benämning
1	689917	Plast armstöd skålade (325mm) hö. - Starfish Pro
2	689918	Plast armstöd skålade (325mm) vä. - Starfish Pro
3	689919	Plast armstöd skålade (370mm) hö. - Starfish Pro
4	689920	Plast armstöd skålade (370mm) vä. - Starfish Pro
5	689470	Gängbricka Armstödsplatta skålade stl 1-2 Hygien
6	689610	Beslag armstödsplatta (st) - Starfish Pro
7	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
8	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
9	131616	Skruv M6 RF - Kullrig insex M6x16
10	158822	Vingvred II Rostfri M8x16
11	689265	Armstödsstag, stl. 1
12	689267	Armstödsstag, stl. 2
13	689269	Armstödsstag, stl. 3
14	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
15	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
16	689275	Armstödsfäste hö.
17	689273	Armstödsfäste vä.
18	689976	Polstring std, armstöd skålade (325mm) hö. - Starfish Pro
19	689977	Polstring std, armstöd skålade (325mm) vä. - Starfish Pro
20	689978	Polstring std, armstöd skålade (370mm) hö. - Starfish Pro
21	689979	Polstring std, armstöd skålade (370mm) vä. - Starfish Pro


Starfish Pro - Bord

Huvudartiklar:
990252 - 990255

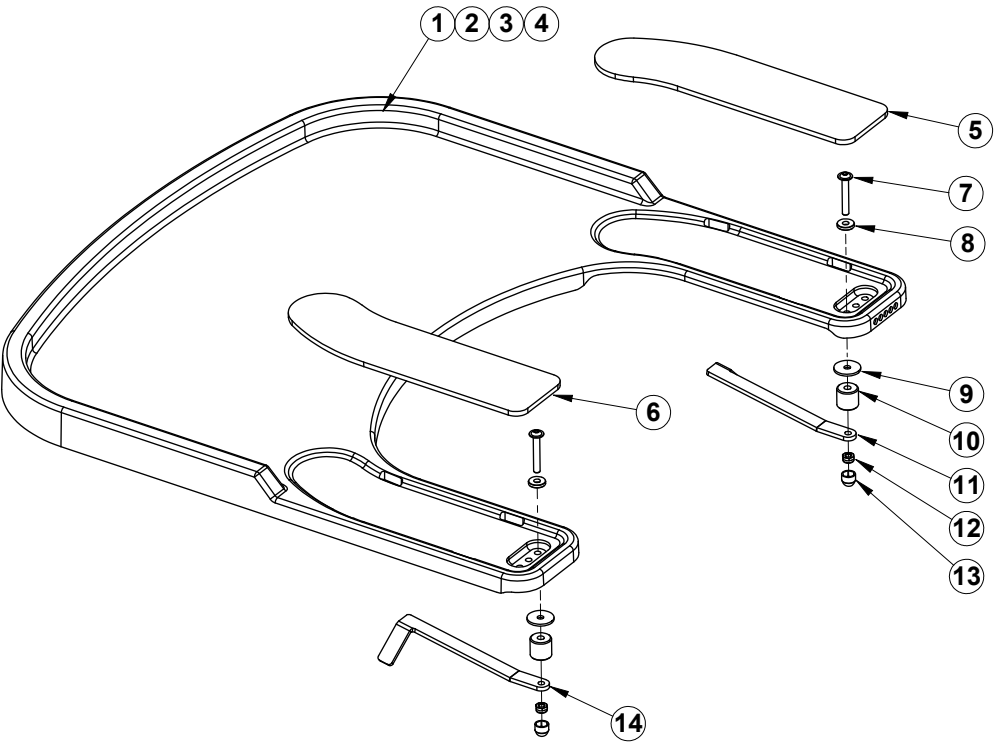


Pos	Art.nr	Benämning
1	285347	Bord stl. 2 (endast plast) - Zitzi
2	285348	Bord stl. 3 (endast plast) - Zitzi
3	153261	Bord stl. 4 (endast plast) - Zitzi
4	153262	Bord stl. 5 (endast plast) - Zitzi
5	285802 285804 153355	Polstring bord stl. 2 hö. (st) - Zitzi Polstring bord stl. 3 hö. (st) - Zitzi Polstring bord stl. 4-5 hö. (st) - Zitzi
6	285803 285805 153356	Polstring bord stl. 2 vä. (st) - Zitzi Polstring bord stl. 3 vä. (st) - Zitzi Polstring bord stl. 4-5 vä. (st) - Zitzi
7	138640	Skruv M6 RF - Kullrig m. fläns inset M6x40
8	111001	Distans plast 16x3xM6
9	990061	Gummibricka 6.2x25x2
10	111022	Distans Alu 20x19xM6, till bord
11	152775	Låsarm lång svart, hö. till bord
12	137006	Låsmutter M6 RF
13	133106	Mutterskydd M6
14	152776	Låsarm lång svart, vä. till bord
15	152783	Arm lång hö. kpl. till bord - Zitzi
16	152784	Arm lång vä. kpl. till bord - Zitzi

Grå positioner är ej beställningsbara styckvis. De ingår i satserna 15 & 16.

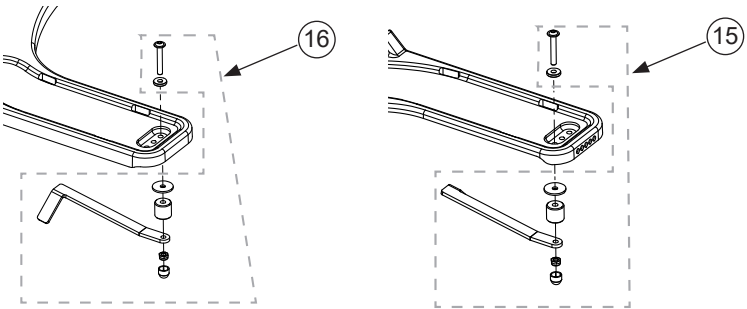


Starfish Pro - Stödbord

Huvudartiklar:
990203 - 990205

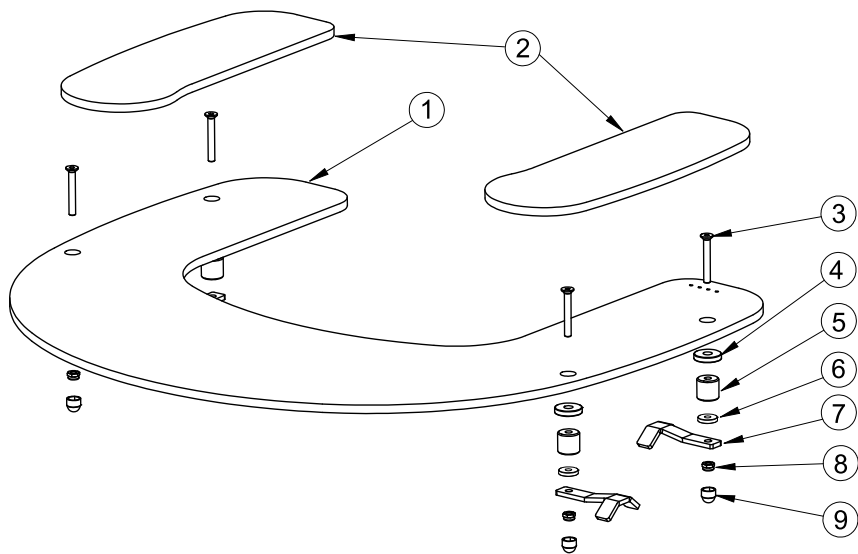


Pos	Art.nr	Benämning
1	990283	Plast stödbord transparent stl. 3 - Zitzi
	990284	Plast stödbord transparent stl. 4 - Zitzi
	990289	Plast stödbord transparent stl. 5 - Zitzi
2	990287	Polstring stödbord stl. 3-5 Hö.
	990288	Polstring stödbord stl. 3-5 Vä.
3	132645	Skruv M6 RF - Försänkt inset M6x45
4	990061	Gummbricka 6.2x25x2
5	111022	Distans Alu 20x19xM6, till bord
6	111001	Distans plast 16x3xM6
7	385317	Låsarm bord - Zitzi
8	137006	Låsmutter M6 RF
9	133106	Mutterskydd M6
10	152785	Låsarm kpl. till stödbord - Zitzi

Grå positioner är ej beställningsbara styckvis. De ingår i satsen 10.

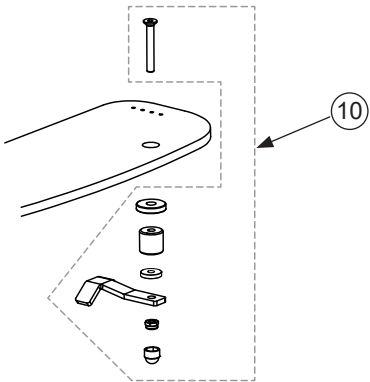

Starfish Pro - Övre monteringsbeslag


Huvudartiklar:
689284

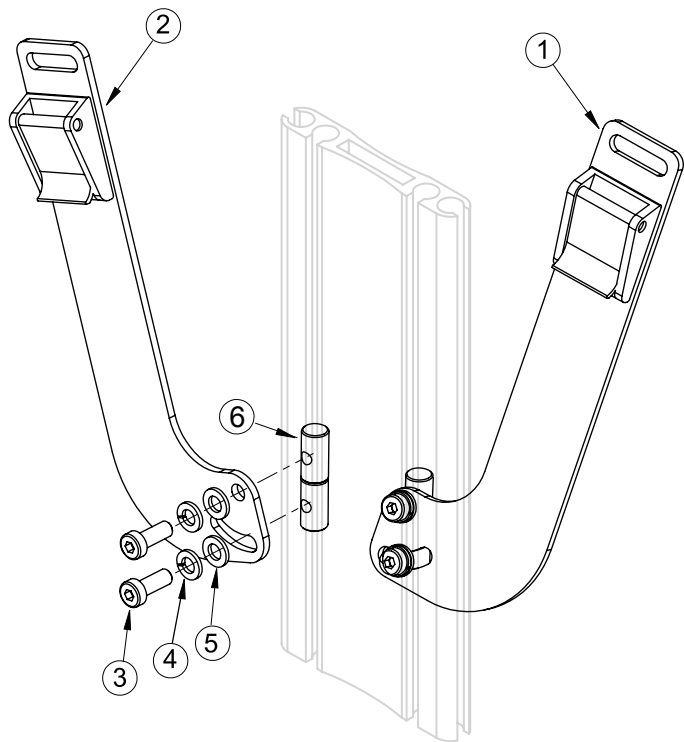

Pos	Art.nr	Benämning
1	689897	Övre monteringsbeslag, (200mm), hö. (st)
2	689898	Övre monteringsbeslag, (200mm), vä. (st)
3	132949	Skruv M6 RF - Låg inset M6x16
4	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
5	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
6	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm

Starfish Pro - Lårstöd

Huvudartiklar:
689471 - 689473
689476 - 689478

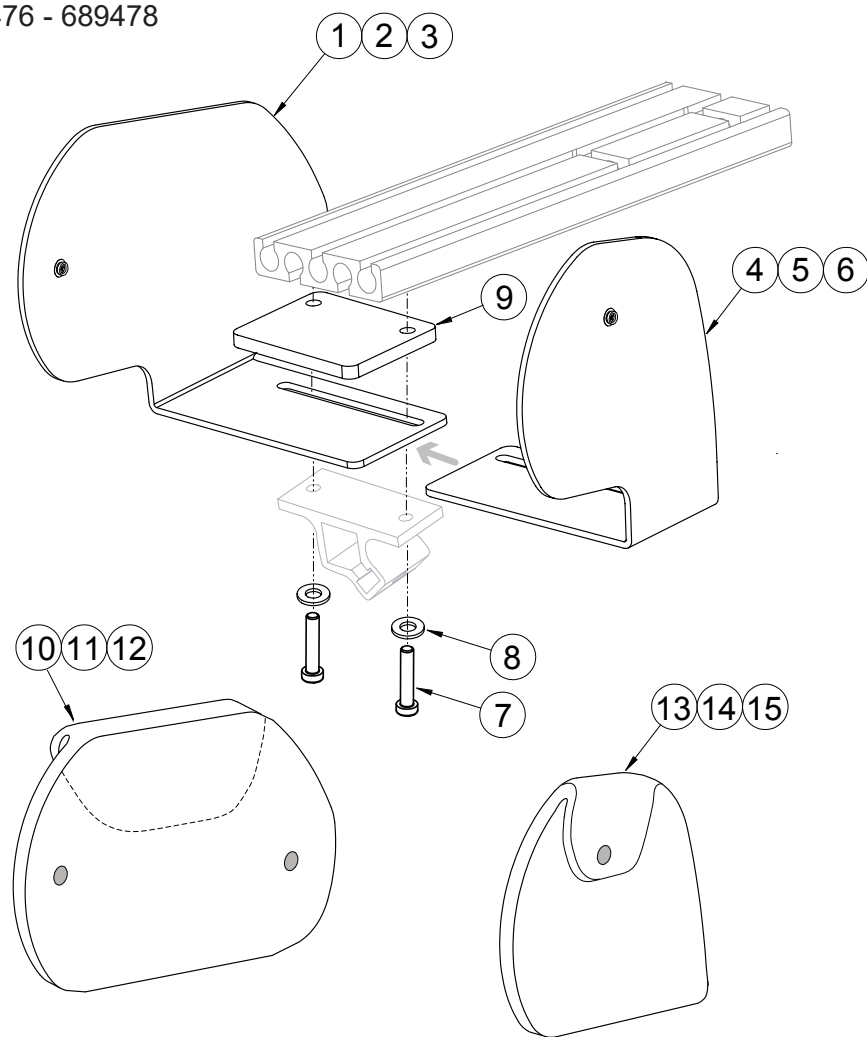


Pos	Art.nr	Benämning
1	689363	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 1 hö.
	689364	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 1 vä.
2	689365	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 2 hö.
	689366	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 2 vä.
3	689367	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 3 hö.
	689368	Plåt lårstöd utsida bendel stl. 3 vä.
4	689223	Plåt lårstöd insida bendel stl. 1 hö.
	689224	Plåt lårstöd insida bendel stl. 1 vä.
5	689225	Plåt lårstöd insida bendel stl. 2 hö.
	689226	Plåt lårstöd insida bendel stl. 2 vä.
6	689227	Plåt lårstöd insida bendel stl. 3 hö.
	689228	Plåt lårstöd insida bendel stl. 3 vä.
7	132952	Skruv M6 RF - Låg insex M6x30
8	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
9*	689602	Distans lårstöd stl. 2-3 - Starfish Pro
10	689791	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689792	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
11	689793	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689794	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
12	689795	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
	689796	Polstring std, lårstöd utsida, stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro
13	689785	Polstring std, lårstöd insida, stl. 1 hö. (st) - Starfish Pro
	689786	Polstring std, lårstöd insida, stl. 1 vä. (st) - Starfish Pro
13	689787	Polstring std, lårstöd insida, stl. 2 hö. (st) - Starfish Pro
	689788	Polstring std, lårstöd insida, stl. 2 vä. (st) - Starfish Pro
14	689789	Polstring std, lårstöd insida, stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
	689790	Polstring std, lårstöd insida, stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro

* Pos 9 användes ej på storlek 1.

Starfish Pro - Höftstöd

Huvudartiklar:
689481, 689483

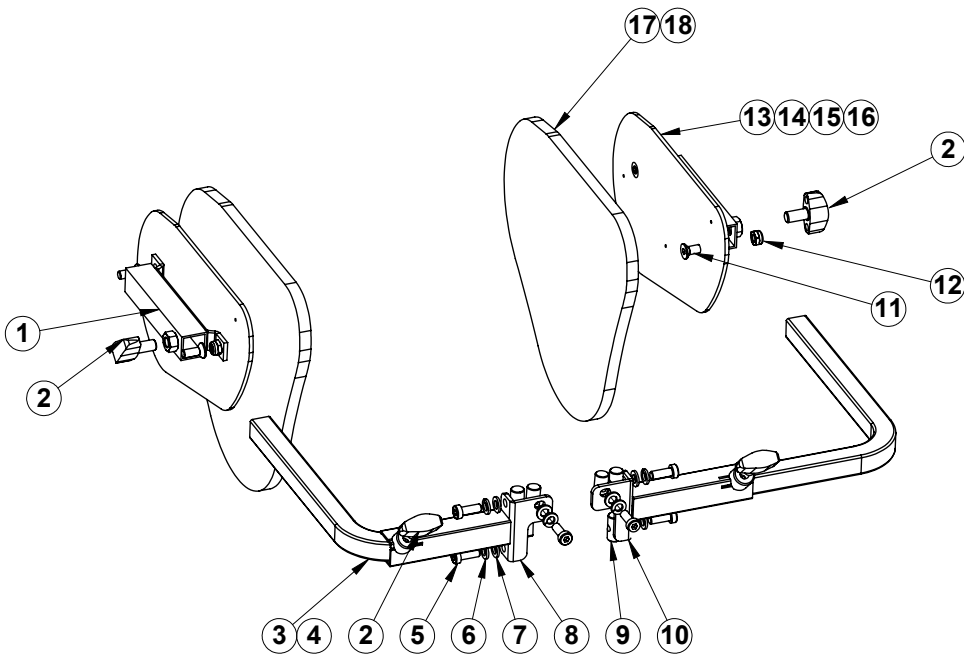


Pos	Art.nr	Benämning
1	689610	Beslag armstödsplatta (st) - Starfish Pro
2	158822	Vingvred II Rostfri M8x16
3	689267	Armstödsstag, stl. 2
4	689269	Armstödsstag, stl. 3
5	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
6	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
7	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
8	689273	Armstödsfäste vä.
9	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
10	689275	Armstödsfäste hö.
11	132616	Skruv M6 RF - Försänkt insex M6x16
12	137006	Låsmutter M6 RF
13	689684	Plast höftstöd, stl. 1-2 hö. - Starfish Pro
14	689685	Plast höftstöd, stl. 1-2 vä. - Starfish Pro
15	689686	Plast höftstöd, stl. 3 hö. - Starfish Pro
16	689687	Plast höftstöd, stl. 3 vä. - Starfish Pro
17	689890	Polstring std, höftstöd, stl. 1-2 hö. (st) - Starfish Pro
	689891	Polstring std, höftstöd, stl. 1-2 vä. (st) - Starfish Pro
18	689892	Polstring std, höftstöd, stl. 3 hö. (st) - Starfish Pro
	689893	Polstring std, höftstöd, stl. 3 vä. (st) - Starfish Pro

Starfish Pro - Fotstöd hel fast / hel uppfällbart


Huvudartiklar:

689486 - 689488

689496 - 689498

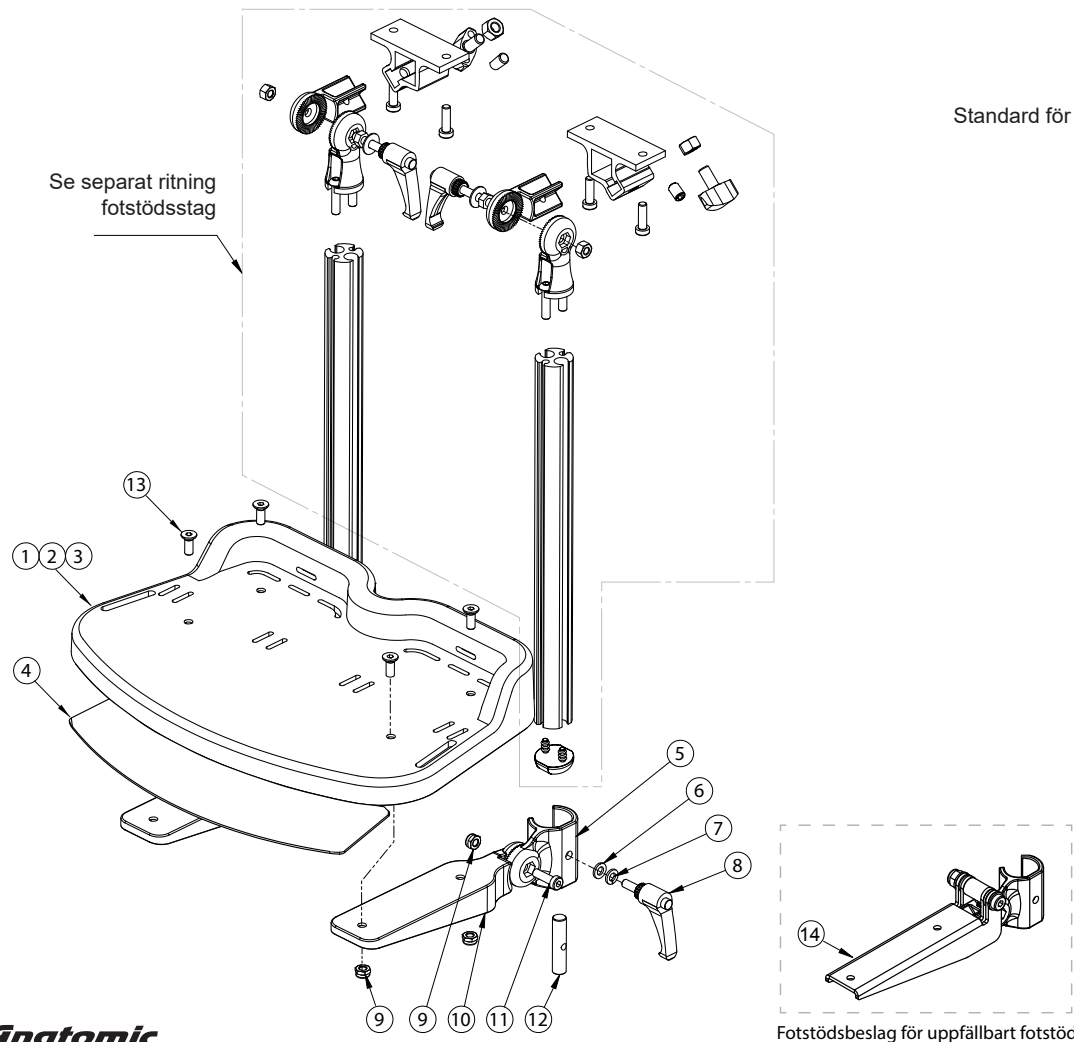

Pos	Art.nr	Benämning
1	990232	Plast fotstödsplatta hel, vit, stl. 2 B345xD225mm (st)
2	990233	Plast fotstödsplatta hel, vit, stl. 3 B380xD260mm (st)
3	990234	Plast fotstödsplatta hel, vit, stl. 4 B380xD300mm (st)
4	990243	Förstärkningsplåt fotstödsplatta hel, vit, stl. 3
5	213170	Taggled 8 (Rundprofil)
6	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
7	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
8	159615	Spakvred M6x16 (arm 44 mm), rostfri
9	137006	Låsmutter M6 RF
10	152291	Fotstödsbeslag, fast - Zitzi
11	132950	Skruv M6 RF - Låg inset M6x20
12	136007	Sargsprint M6, 45 mm, Enkel, RF
13	132616	Skruv M6 RF - Försänkt inset M6x16
14	689202	Fotstödsbeslag, uppfällbar
15	689511	Polstring blå, fotstödsplatta hel, B345xD225mm (st)
	689512	Polstring blå, fotstödsplatta hel, B380xD260mm (st)
	689513	Polstring blå, fotstödsplatta hel, B380xD300mm (st)

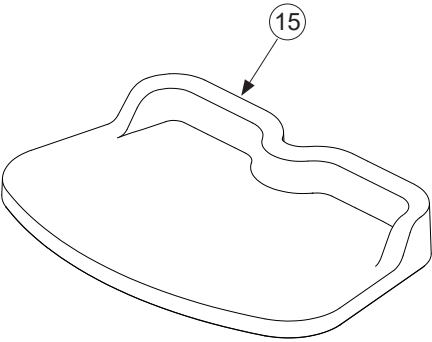


Starfish Pro - Fotstöd delad fast / delad uppfällbart / delad kullad

Huvudartikel:


689491 - 689493

689501 - 689503


689506 - 689508

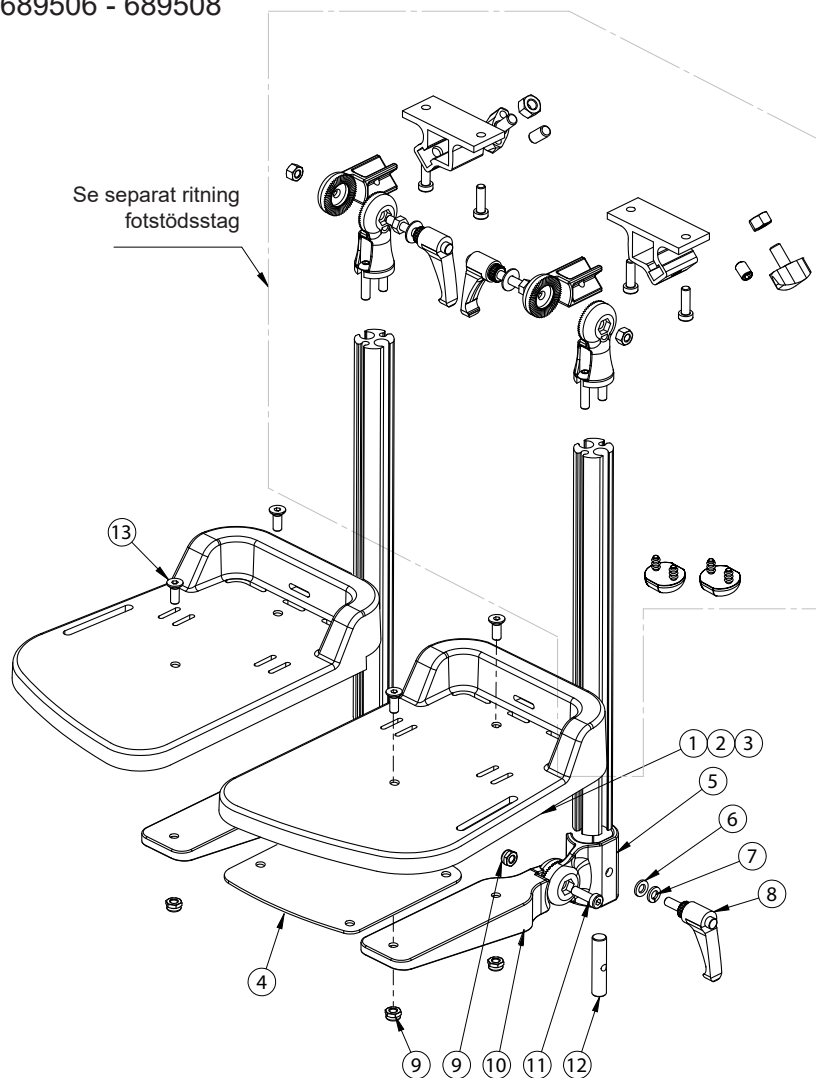

Standard för stl. 4

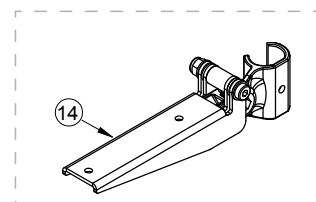


Fotstödsbeslag för uppfällbart fotstöd

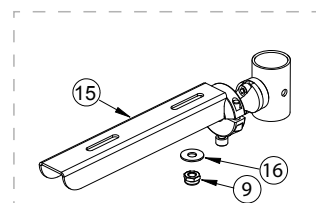


Fotstödsbeslag för kulladat fotstöd

Pos	Art.nr	Benämning
1	990305	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B160xD220mm, hö. (st)
	990306	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B160xD220mm, vä. (st)
2	990307	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B180xD255mm, hö. (st)
	990308	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B180xD255mm, vä. (st)
3	990309	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B180xD305mm, hö. (st)
	990310	Plast, fotstödsplatta delad, vit, B180xD305mm, vä. (st)
4	990246	Förstärkningsplåt fotstödsplatta delad, vit, stl. 3-4 (st)
5	213170	Taggled 8 (Rundprofil)
6	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
7	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
8	159615	Spakvred M6x16 (arm 44 mm), rostfri
9	137006	Låsmutter M6 RF
10	152291	Fotstödsbeslag, fast (st) - Zitzi
11	132950	Skruv M6 RF - Låg insex M6x20
12	136007	Sargsprint M6 RF - Enkel 45mm
13	132616	Skruv M6 RF - Försänkt insex M6x16
14	689202	Fotstödsbeslag, uppfällbar (st)
15	689186	Fotstödsbeslag, kullad hö. (st)
	689187	Fotstödsbeslag, kullad vä. (st)
16	143812	Bricka M6 RF - 6,4x18x1,6
17	689516	Polstring blå, fotstödsplatta delad, B160xD220mm (par)
	689517	Polstring blå, fotstödsplatta delad, B180xD255mm (par)
	689518	Polstring blå, fotstödsplatta delad, B180xD305mm (par)

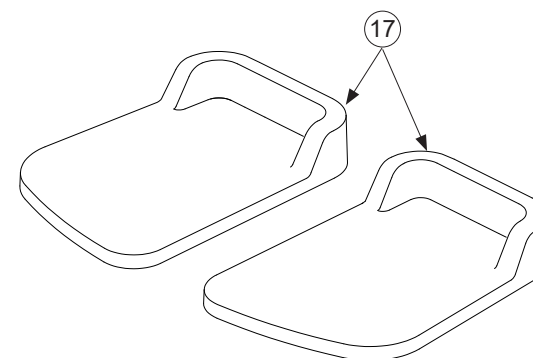

Starfish Pro - Fotstödsstag

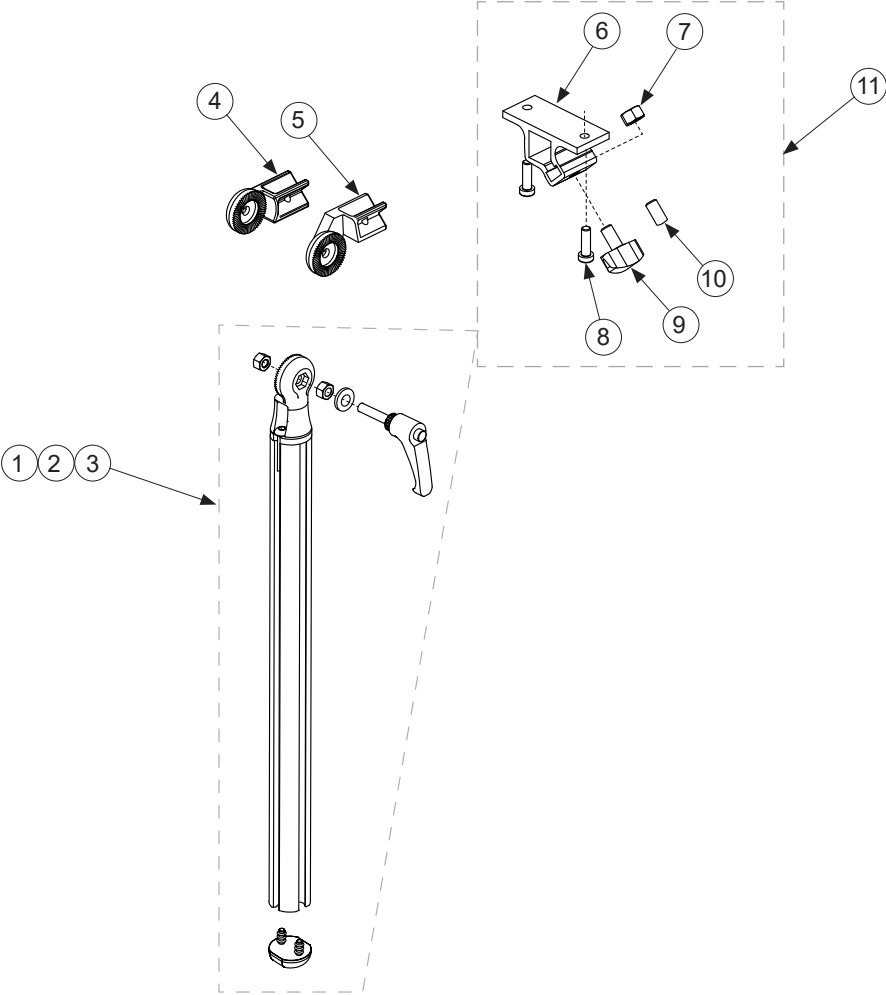


Pos	Art.nr	Benämning
1	689868	Fotstödsprofil vit 30 cm kpl. (st) - Clozitt/Starfish
2	689869	Fotstödsprofil vit 40 cm kpl. (st) - Clozitt/Starfish
3	689864	Fotstödsprofil vit 50 cm kpl. (st) - Clozitt/Starfish
4	213130 213133 213135	Taggled 3 (Fyrkant 30 mm lång) Taggled 3 (Fyrkant 80 mm lång) Taggled 3 (Fyrkant 150 mm lång)
5	213131 213134 213136	Taggled 3 Vinklad (Fyrkant 30 mm lång) Taggled 3 Vinklad (Fyrkant 80 mm lång) Taggled 3 Vinklad (Fyrkant 150 mm lång)
6	689650	Fotstödsfäste - Starfish pro
7	137003	Mutter M8 RF
8	132950	Skruv M6 RF - Låg insex M6x20
9	158822	Vingvred II Rostfri M8x16
10	130912	Stoppskruv M6 RF - insex M8x12
11	689860	Fotstödsfäste kpl. (st) - Starfish

Starfish Pro - Vadstöd

Huvudartiklar:


689520 - 689522

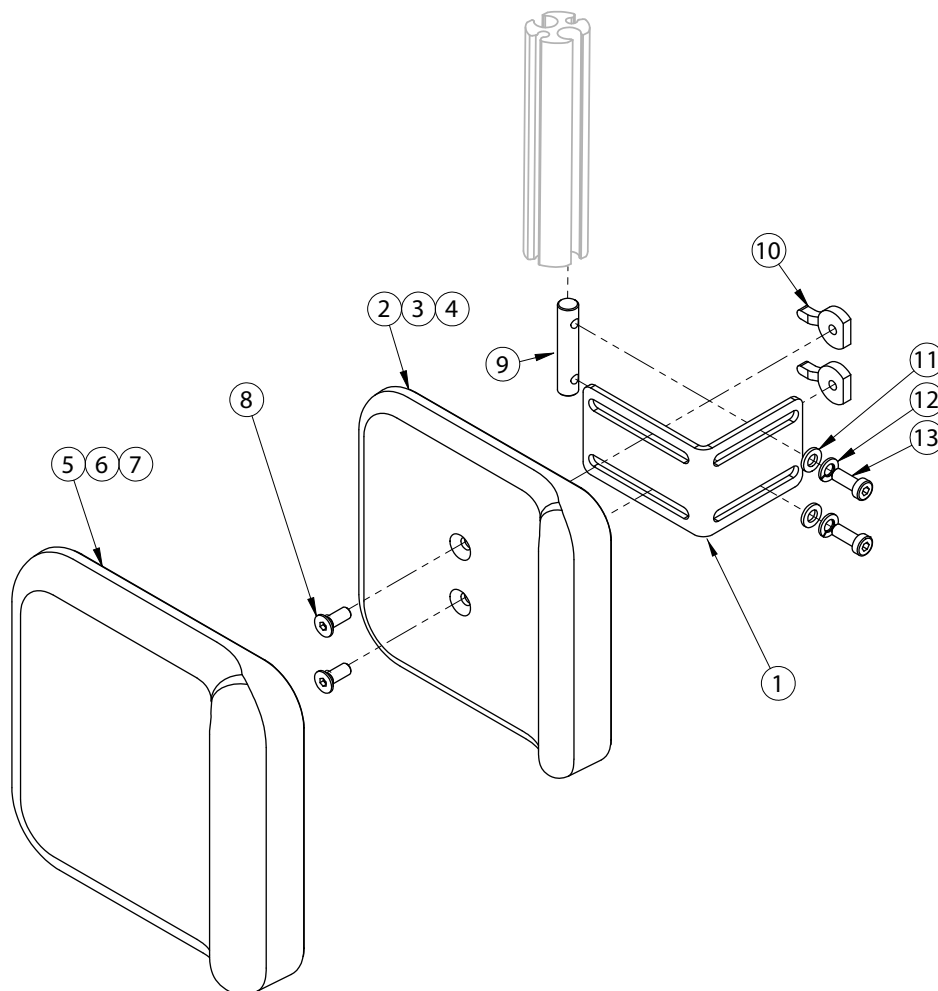



Pos	Art.nr	Benämning
1	689209	Vadstödsfäste vit - Clozitt
2	689641	Vadstödsplatta vit plast stl. 1 - Starfish Pro
3	689642	Vadstödsplatta vit plast stl. 2 - Starfish Pro
4	689643	Vadstödsplatta vit plast stl. 3 - Starfish Pro
5	689523	Polstring std, vadstöd stl. 1 (par) - Starfish Pro
6	689524	Polstring std, vadstöd stl. 2 (par) - Starfish Pro
7	689525	Polstring std, vadstöd stl. 3 (par) - Starfish Pro
8	132616	Skruv M6 RF - Försänkt insex M6x16
9	136008	Sargsprint M6 RF - Dubbel 50mm
10	689214	Spårmutter M6, RF (glidmutter)
11	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5
12	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
13	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16

Starfish Pro - Potta

Huvudartiklar:
689526 - 689529
689557, 689559

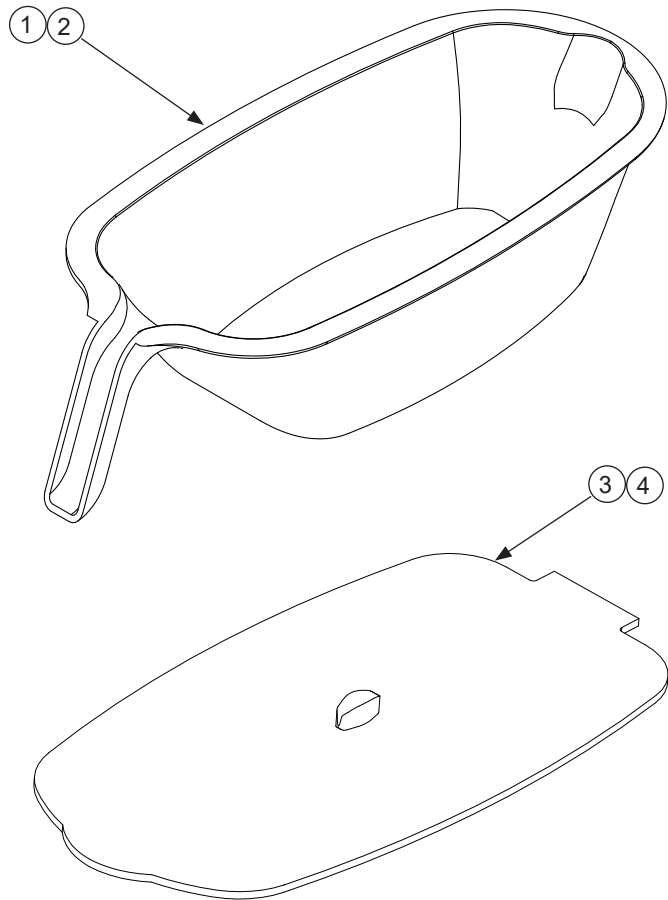

Pos	Art.nr	Benämning
1	689526	Potta stl. 1-2 - Starfish Pro
2	689527	Potta stl. 3 - Starfish Pro
3	689528	Lock Potta stl. 1-2 - Starfish Pro
4	289529	Lock Potta stl. 3 - Starfish Pro
5	689557	Potta stl. 1-3
6	689559	Lock Potta stl. 1-3

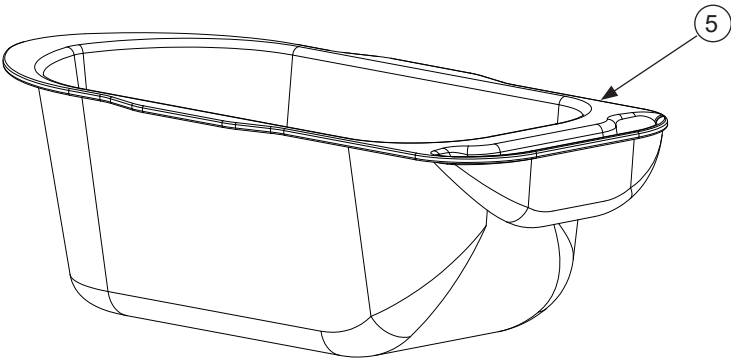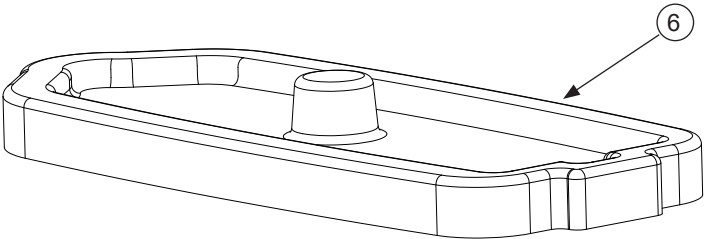


Starfish Pro - Kiskydd och Stänkskydd

Huvudartiklar:


689533 - 689534

689538 - 689539

689530, 689560

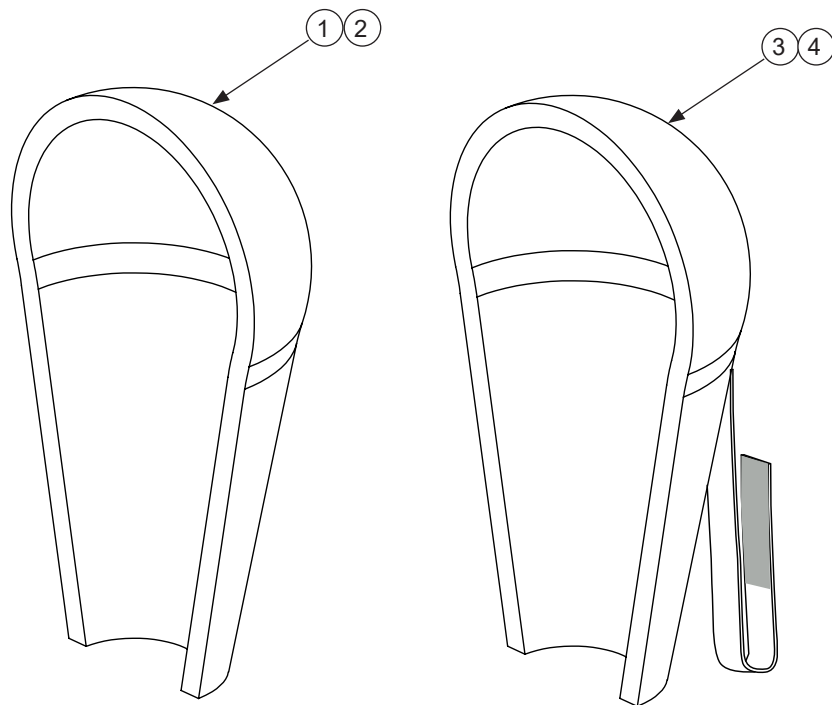


Pos	Art.nr	Benämning
1	689533	Kiskydd stl. M - Starfish Pro
2	689534	Kiskydd stl. L - Starfish Pro
3	689538	Kiskydd stl. M med fästrem - Starfish Pro
4	689539	Kiskydd stl. L med fästrem - Starfish Pro
5	689530	Stänkskydd stl. 1-2 - Starfish Pro
6	689560	Stänkskydd stl. 3 - Starfish Pro

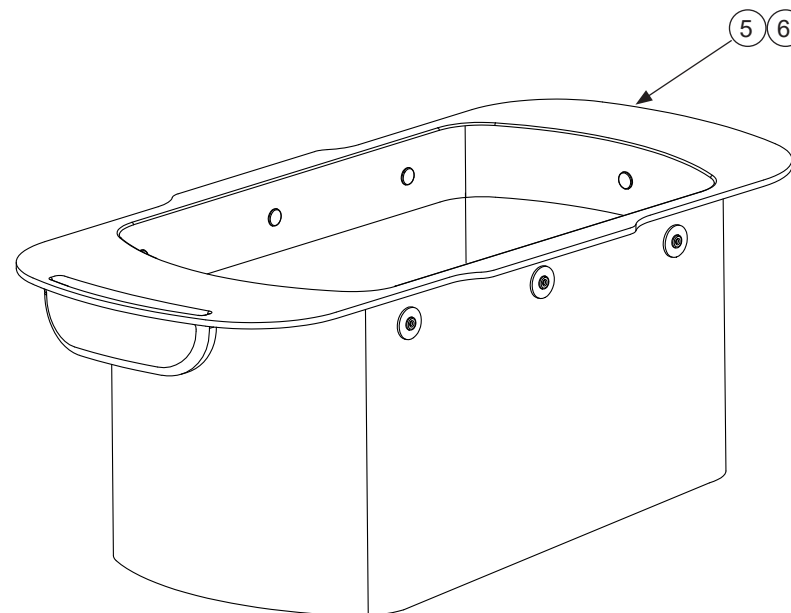

Starfish Pro - Länkhjul, Tippskydd


Huvudartiklar:
689655

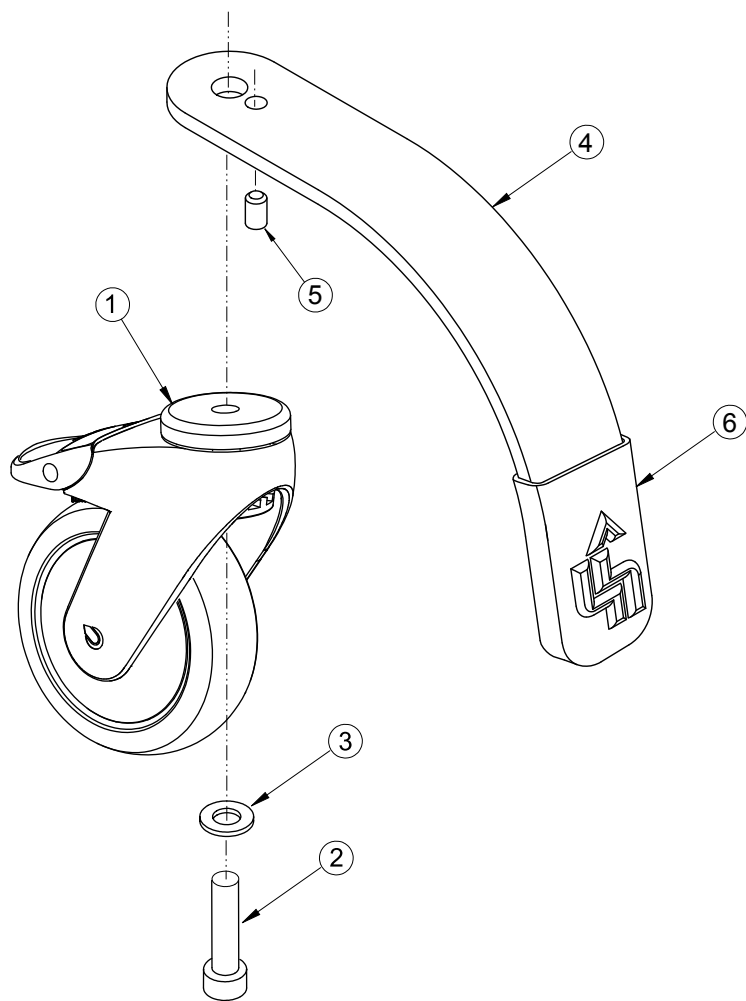

Pos.	Art.nr	Benämning
1	212153	Hjul 100mm, svart broms (st) - Clozitt/Starfish Pro
2	128050	Skruv M10 RF - Hög inset M10x50
3	143603	Bricka M10 RF - 10,5x24x2,5
4	689655	Tippskydd (par) - Starfish Pro
5	130611	Stoppskruv M6 RF - Plan inset M6x10
6	689601	Ändavslut fotpedal - Starfish Pro

Starfish Pro - Körbåge

Huvudartiklar:
689555

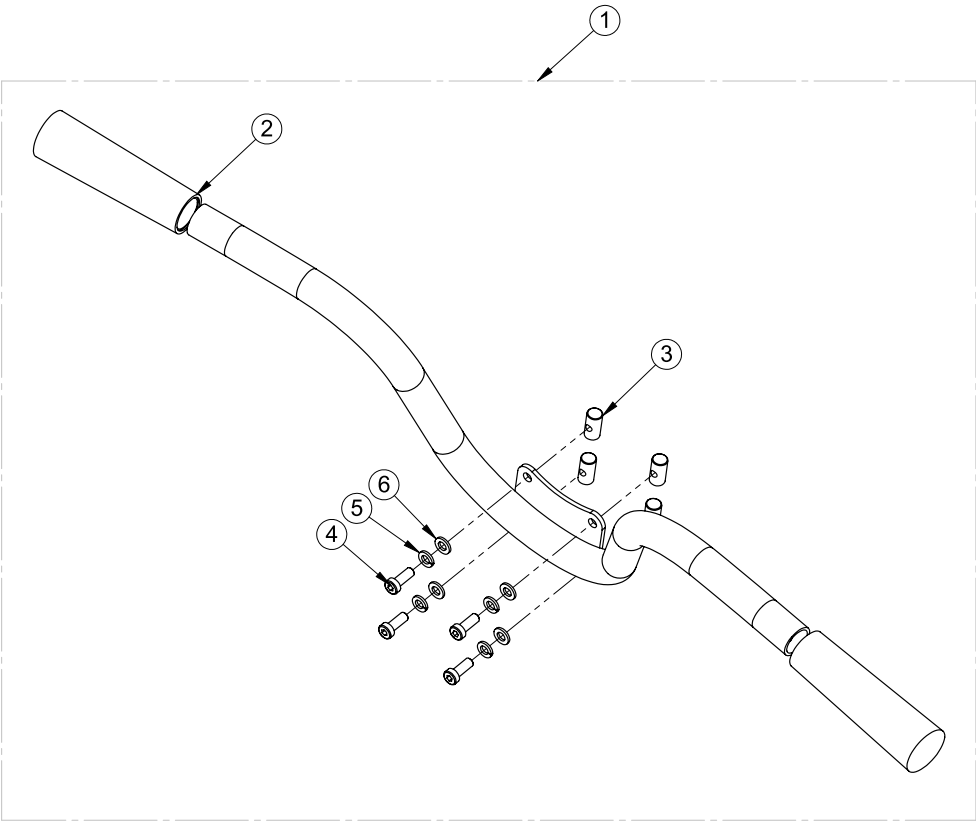

Pos	Art.nr	Benämning
1	689555	Körbåge vit (infästn. ryggprofil) - Starfish Pro
2	387078	Gummigrepp till körhandtag Pro
3	136006	Sargsprint M6 RF - Enkel 18mm
4	132949	Skruv M6 RF - Låg insex M6x16
5	142630	Fjäderbricka M6 RF - 6,1x11,8x1,6
6	143600	Bricka M6 RF - 6,4x12x1,5

Starfish Pro - Etikettplaceringar

Pos	Art.nr	Sida	Art.nr
1	Huvudprodukt - serienummer	Vänster	
2	Chassi	Höger	
3	Ryggdel	Mitten	
4	Bålstöd	Höger	
5	Armstöd rygg	Höger	
6	Höftstöd	Höger	
7	Vadstöd	Höger	
8	Fotstöd delat	Höger	
9	Fotstöd helt	Under	
10	Sittdel	Höger	
11	Huvudstöd	Höger	
12	SF gummi logo	Bål + Huvud	915788
13	SF liten logo	Mitten	915784
14	Klämrisk	Hö + Vä	915787
15	Starfish logo	Hö + Vä	915786
16	Ryggvinkling	Vänster	915947
17	Tilting	Höger	915948
18	Vred ryggvinkling	Höger	915946
19	Max-läge	Hö + Vä	916031

