

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB. **Postadresse:** Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-60006 Norrköping
Besøgsadresse: Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping. **Telefon:** 011-161800 **Mail:** info@anatomicsitt.com **Web:** anatomicsitt.com
Produktet forhandles i Danmark af: Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup. **Telefon:** 86 17 01 74,
Mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk **Web:** anatomicsitt.dk. **Eudamed-registreringsnummer/SRN:** SE-MF-000002240



Armbind forhindrer "overstræk" og at armene ikke havner udenfor siddesystemet eller kørestolen.
 Læs hele brugervejledningen igennem inden brug.

Indledning: Dette produkt fra Anatomic SITT er et positioneringshjælpemiddel i Support-serien, tilbehør designet til positionering på forskellige hjælpemidler. For at du kan udnytte hjælpemidlets fulde potentiale, er det vigtigt, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Dette gælder for alle personer i brugerens nærhed. Gem brugsanvisningen til senere brug. Nye udgaver kan downloades fra vores hjemmeside: www.anatomicsitt.com. Revisionen er angivet sammen med datoen øverst på siden.

Korrespondence - mærkning: På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne.

CE-mærkning - klassificering: Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745

Overensstemmelseserklæring: Produktet opfylder kravene til medicinsk udstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. Se den aktuelle EU-overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør www.anatomicsitt.com/dokument

Avsædta ändamål: Hjælpemiddel til positionering af arm eller hånd siddende i medicinsktekniske produkter såsom eksempelvis i kørestol, siddesystem, arbejdsstol, flytbar bad/toiletstol, klapvogn eller lignende.

Sikkerhedsforeskrifter

- ⚠ Armbind skal altid anvendes i kombination med et hoftebælte.
- ⚠ Montering skal altid udføres af kvalificeret fagpersonale.
- ⚠ Beslut om Anpassning/specialtilpasning skal altid træffes af kvalificeret fagpersonale og udføres af kvalificeret fagligt personale (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- ⚠ Indstillinger, justeringar samt test og afprøvning af hjælpemidlet skal altid udføres af kvalificeret fagpersonale (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- ⚠ Bevilliger af hjælpemidlet eller person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren og hjælpemidler skal altid udføre en risikoanalyse inden anvendelse.
- ⚠ Produktet skal monteres og tilpasses af medicinsk kvalificeret fagpersonale.
- ⚠ Positioneringsserien Support er ikke beregnet til at erstatte tilsyn udført af sundhedspersonale.
- ⚠ Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- ⚠ Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet bruges.
- ⚠ Kontroller altid brugeren efter brug for at opdage rødme på patienten.

Kontrol før brug

- Eventuel slidtage på remme, søm og spænder
- At velcroen låser
- At båndene er ordentligt monterede

Levetid

Produktets forventede levetid er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktionerne i denne brugsanvisning følges. Den faktiske levetid kan dog variere afhængig af hvor hyppigt og intensivt produktet bruges, men er max 10 år.

Tilpasning og specialtilpasning - anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om der er tale om en tilpasning eller en specialtilpasning. En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er en specialtilpasning. Tilpasninger må kun foretages af en person, der anses for kvalificeret til opgaven, og bør altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning

Kapning af rem, (brænd enderne for at undgå at remmen trevler).

Risikoanalyse

Bemærk, at der altid skal laves en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel.

Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i dets nærhed, at bruge efter tilpasning.

Mærkning

Produktet bør forsynes med en indikation af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Montering

Ved montering af Anatomic Sitt positioneringshjælpemiddel: Hovedhjælpemidlet skal være tiltænkt til at blive brugt sammen med positioneringshjælpemidlet.

- Hovedhjælpemidlets originale fastgørelsespunkter/beslag skal anvendes.
- Beslagene passer til positioneringshjælpemidlet uden risiko for beskadigelse.
- Monteringsvejledningen skal følges, se dokumentationen til både hovedhjælpemidlet og positioneringshjælpemidlet.

Armbindets trækretning skal være diagonal for at forhindre "overstrækning" og samtidig give bevægelsesfrihed. Et passende fastgørelsespunkt kan være omkring kørestolens rammerør, armlænsbeslag eller på ydersiden af sædesystemet (se billede).

1. Monter armbindet på et passende sted ved hjælp af de medfølgende spænder.

Alt. 1: Skrues i siddesystemet: Ved montering i siddesystemet skrues medfølgende åbnelige båndlås fast på et passende sted.

Alt. 2: Montering rundt om rør: Ved montering rundt om rammerør, træk stroppen gennem den medfølgende Tri-glide-spænde som vist på billedet

2. Juster længden for brugerens bevægelsesområde ved fastgørelsespunkterne.
3. Stram remmen ved håndledet. Sørg for, at armpolstringen er placeret, så den giver maksimal trykaflastning.

I tilfælde hvor hovedenheden ikke har fastgørelsesdele og/eller instruktioner til montering af positioneringshjælpemidlet, skal du kontakte Anatomic Sitt.

⚠ Kontrolrutine

Tjek patienten efter hver gang produktet er brugt for at opdage evt. hud rødme. Hvis dette sker, skal du stoppe med at bruge hjælpemidlet. Tjek jævnligt stropperne og sømmene, især ved fastgørelsespunkterne for at opdage evt. slitage.

Vaskeråd/Pleje

60°C, finvask. Ikke tørretumbles. Tørreskab lav temperatur, vi anbefaler hængetørring. For længere holdbarhed, vask i vaskepose. Støtteserien kan med fordel tørres af dagligt med en fugtig klud.

Placeringsanvisning/Genplacering

Produktet er mærket med Anatomic Sitt i tekst, der skal kunne læses forfra. Vaskeanvisningsmærket er placeret på bagsiden, som ikke skal være synlig under brug. For at forenkle og lette genmontering, f.eks. ved vask, tag et billede af den korrekte indstilling, når du prøver, og/eller lav et mærke med en tekstilpen.

Garanti

1 år mod fabrikationsfejl. Anvend kun reservdele bestilt fra Anatomic SITT.

Genbrug

En brugt del eller et brugt produkt skilles ad og skrottes. Delene skal adskilles efter materiale-type.

Symboler



Findes i brugervejledningen og gør f.eks. opmærksom på vigtige sikkerhedsoplysninger mv.



Læs altid brugervejledningen før brug.



Læs for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information.



Producent og fremstillingsdatoen.



Fremstillingsdatoen.



Fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.



Angiver at produktet er medicinsk udstyr.





Referensnummer/varenummer så det medicintekniske produkt kan identificeres.



Unik produktidentifikatorer, der muliggør entydig identifikation af specifikt medicinsk udstyr.



CE-mærket produkt ifølge rette EU-direktiv.

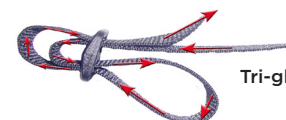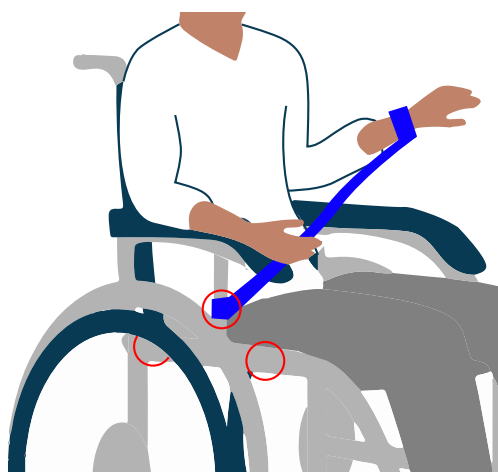

Tri-glide metoden (enkel)

Vaskesymboler



Håndvask



Maskinvask 60°C



Tåler ikke klorblegning



Tåler ikke tørretumbling



Må ikke stryges



Må ikke kemisk renses