

SYMMETRISLEEP





SYMMETRISLEEP

Et led i 24 timers postural omtanke

SYMMETRISLEEP KAN GØRE EN FORSKEL

SymmetriSleep er et alsidigt lejringsystem af komponenter, som kan tilpasses for at give individuel støtte til enhver. SymmetriSleep muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge lige, under forudsætning af at deres krop er fleksibel nok, til at blive rettet ud. Liggesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigere allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

SymmetriSleep muliggør en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer. Tilbehøret kan gradvist introduceres i takt med at tolerancen øges. SymmetriSleep er designet til at understøtte de biomekaniske rotationskræfter i en positiv retning.

Her nedenfor ses eksempler på SymmetriSleep® i praksis.

Anne, når hun ligger uden SymmetriSleep:



Anne ligger på ryggen med SymmetriSleep:



Anne ligger på siden med SymmetriSleep:



En anden mulighed, når man ligger på siden med SymmetriSleep, er vores knæholder.



SYMMETRISLEEP KAN:

- Bruges af børn, unge og ældre.
- Benyttes ved sideleje, rygleje og maveliggende.
- Hjælper til at fastholde kroppens symmetri og beskytter diverse led mod den destruktive effekt af tyngdekraften i yderstillinger i løbet af natten.
- Bruges på forskellige typer madrasser - også tryksårsforebyggende
- Muliggøre en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer
- Forebygge forværring af deformiteter.
- Være med til at korrigere eksisterende problemer, når det bruges som en del af et 24-timers positioneringsprogram.



HVORDAN BRUGES SYMMETRISLEEP?

Symmetrisleep er nemt og enkelt at bruge. Systemet placeres bare ovenpå en seng. Når velcro lagenet, den tryksårsforebyggende topmadras og det strækbare lagen er på plads, er liggesystemet klart til brug. Det foretrækkes og letter forflytningen at sengens underlag er plant.


Når brugeren er klar til det, monteres støtter og puder for at give den rette positionering.

Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i systemet, tilpasses SymmetriSleep liggesystem fleksibelt til brugeren.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil. Nogle foretrækker at montere dem, mens brugeren sover.

SymmetriSleep er ligeledes enkelt at rengøre, og så er det let at transportere.

SYMMETRISLEEP OVERORDNEDE DELE:

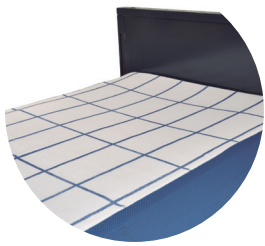

1

VELCROLAGEN

Vores velcrolagen giver et stabilt grundlag for at man kan opbygge med støtteelementer og puder til et sikkert og fleksibelt liggesystem, som sikrer ensartet støtte og korrekt kropsholdning.



2

POSITIONERINGSBESLAG

Disse farvekodede støtteelementer tilføjes, når brugeren er klar. Systemet opbygges ud fra brugerens behov i stedet for at brugeren skal tilpasse sig en forudbestemt form. Beslagene er intuitive at montere og kræver ingen kompliceret opsætning. Mange foretrækker at justere dem, når brugeren sover.




3

TRYKFORDELENDE AIRMANTLE® TOPMADRAS MED COOLOVER®

Airmantle® er et specialiseret støttelag, som reducerer tryk for at øge komfort og beskyttelse under søvn. I modsætning til traditionelle materialer som bikubestrukturmateriale eller skum tilbyder Airmantle temperaturregulering og styring af mikroklimaet.

AIRMANTLE® SUPPORT LAYER

Airmantle er et temperaturregulerende alternativ til en almindelig topmadras, der skaber et lag af luft omkring brugeren, så sved kan fordampe.

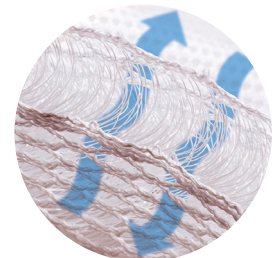

4

COOLOVER® LAGEN

Vi har udviklet dette innovative materiale for at give terapeuter bedre mulighed for at kontrollere en slutbrugers mikroklima. Dette materiale er i stand til både at absorbere og frigive varme, hvilket skaber en stabil kropstemperatur og reducerer risikoen for vævsskader.



5

PUDER

Et stort udvalg af puder i hestesko-, aflange- og cylinderformer giver alsidig støtte. Puderne er fyldt med granuleret memoryskum, og de fremmer dynamisk aflastning og kan nemt justeres for personlig komfort. CoolOver-betræk sikrer effektiv regulering af mikroklimaet, selv ved længere tids brug.

VÆLG AIRMANTLE BASE:



CoolOver Advanced Airmantle

For dem, der ønsker det højeste niveau af temperaturregulering, giver kombinationen af CoolOver Advanced-teknologi og det tykke 3D-strikkede nylon med åben vævning maksimal luftgennemstrømning, så varme og fugt kan ledes væk.

PU Airmantle

Giver samme trykaflastning og komfort som standard Airmantle, men tilføjer et beskyttende overfladelag af polyurethan (PU). Dette gør det nemt at rengøre, beskytter de underliggende positioneringsbeslag og velcrolagnet og sikrer god hygiejne, samtidig med at korrekt støtte og alignment bevares for brugere med begrænset mobilitet.



Ny PU Airmantle med CoolOver Advanced

PU Airmantle med CoolOver Advanced kombinerer den rengøringsvenlige og beskyttende PU-overflade med den kølende og mikroklimaregulerende effekt fra CoolOver Advanced-laget. Den er ideel til brugere, der har gavn af aktiv temperatur- og fugtstyring, hvilket beskytter huden og giver komfort, hygiejne og optimal trykaflastning.

VÆLG POSITIONERINGSBESLAG:



Standard positioneringsbeslag/ bogstøtter

I mere end 30 år har den centrale støtte i SymmetriSleep været bygget op omkring disse faste beslag, som skånsomt guider brugeren til optimal positionering. De er beklædt med en komfortabel luftudvekslingspude med mulighed for CoolOver-betræk for forbedret temperaturregulering.

Standard-positioneringskomponenterne kan placeres efter behov for at give individuelt tilpasset støtte til den enkelte brugers unikke behov.

De fås i størrelserne small, medium, medium/large og extra large, så der findes forskellige muligheder afhængigt af brugerens kropsmål og det nødvendige støtteniveau.

Nye konturerede positioneringsbeslag

Vores nye konturerede positioneringsbeslag er udviklet til beskyttelse af kropsform ved understøttet liggende positionering og er designet til at følge kroppens anatomiske form.

Ved at øge kropskontakten og give forbedret proprioceptiv feedback leverer de mere optimal støtte. De kan støtte brystkassen i rygleje, følge kroppens naturlige kurver, reducere lateral kompression fra flade støtter samt hjælpe med derotation af bækken eller brystkasse.

I modsætning til traditionelle støtter tilpasser disse komponenter sig brugerens unikke kropsform i stedet for at kræve, at brugeren tilpasses systemet. De fås i størrelserne medium og medium-til-large.



VÆLG SYMMETRISLEEP PUDER:

SymmetriSleeps alsidige positioneringspuder er designet til at forhindre hud-mod-hud-kontakt, reducere varme og forbedre komforten natten igennem. De omfordeler tryk for at beskytte sart væv og mindske risikoen for trykskader.

Puderne er fyldt med granuleret memoryskum, som gør det nemt at justere for individuel komfort og sikrer konstant kontakt for effektiv trykaflastning. Hver pude har et indvendigt PU-betræk og fås med Standard-, CoolOver Advanced- eller SafeSleep® yderbetræk.



C & D AFLANGE PUDER

Placér bag knæene i rygleje for at forhindre “wind sweeping” eller frøstilling, eller mellem benene i sideleje for at holde hofter, knæ og ankler i korrekt position.



F, G & G+ RULLEPUDER

Kan placeres mellem knæene for at holde anklerne adskilt og forhindre adduktion, eller under læggene for at aflaste hælene og reducere risikoen for trykskader. Ved komplekse sideleje-positioner kan ruller lagdeles oven på Airmantle for at spejle brugerens kroppsstilling og give øget støtte samt sansefeedback, ud over hvad beslagene alene kan tilbyde.



SIDELEJRINGSBORD

Giver mere fast støtte til brugere, der har behov for større stabilitet, end en pude kan tilbyde i sideleje. Den aftagelige, højdejusterbare benstøtte muliggør individuel positionering og holder benene adskilt. Det fremmer aktivt luftcirkulation mellem benene, samtidig med at det giver optimal linjering og støtte til hofternes stabilitet.



KNÆHOLDER - RYGLIGGENDE MONOBLOCK

Giver målrettet støtte til at reducere frøstilling, windsweeping og indadrotation. Kan anvendes over eller under knæet med omsluttende puder, der begrænser udadrotation, samt central monoblock-polstring for skånsom abduktion i hoften og øget hoftestabilitet.



FIRKANTET PUDE

Placérs mellem biceps eller underarmen for at forhindre hud-mod-hud-kontakt og reducere risikoen for vævsskader.



EL, EM & ES HESTESKO PUDER

Placeres komfortabelt bag knæene som et alternativ til en aflang pude og hjælper med at forhindre udadrotation af benene. De kan også placeres bag hovedet for at opretholde korrekt midtlinjekontrol, mens de mindre hestesko-puder kan placeres i albuebøjningen for at reducere hud-mod-hud-kontakt og støtte bevægelighed i overekstremiteterne.



FODSTØTTESYSTEM

Fodstøttesystemet består af en solid kile i memoryskum med tre sider, som muliggør positionering i flere vinkler afhængigt af individuelle behov. Det kan også anvendes til aflastning og derotation under Airmantle.



KNÆHOLDER - ROLLING MONOBLOCK


Anvendes ved overgange fra rygleje til sideleje for at forhindre, at det øverste ben krydser midtlinjen, beskytte hoftens ledbånd og bevare korrekt positionering af underekstremiteterne.

GOD LEJRING ER GODT GIVET UD

Vi sover næsten en tredjedel af livet, og en del personer med problemer i bevægeapparatet tilbringer de fleste af døgnets timer i sengen. Det er derfor vigtigt, at man også i sin seng er bedst muligt positioneret.

Det er meget vigtigt, at en borger har den bedst mulige siddestilling i sin kørestol, men det er lige så vigtigt, at vedkommende også positioneres optimalt alle de timer, vedkommende ikke sidder i sin kørestol. Et 24 timers positionerings program kan gøre en forskel.

Her ses eksempler på knæpuder og fodkile.

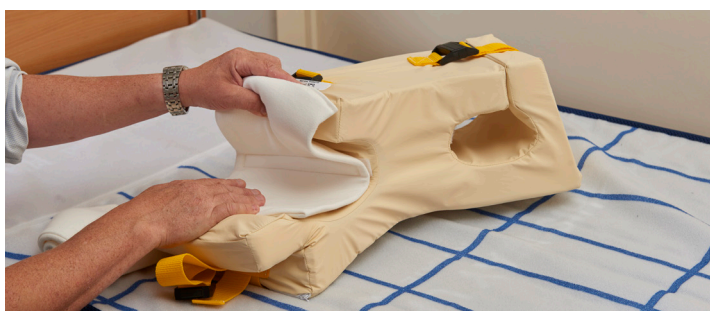

Knæpuderne, som er vist ovenfor, sørger for at stabilisere benene i en god stilling, når man ligger på ryggen. Vi har to forskellige slags knæpuder. En, som bruges til rygliggende stilling og en, som giver mulighed for at man kan dreje/trille om på siden og samtidig bevare den gode stilling. Den er derfor rigtig god for meget urolige personer, som vender sig meget, men som fortsat har behov for støtte.

“SymmetriSleep virker ved at sprede belastningen over et større overfladeareal og dermed reducere lokalt tryk.

Når SymmetriSleep benyttes, har kroppen mulighed for at være afslappet og har de bedste betingelser for søvn og restitution.”

Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

