



LEONARDO & GALILEO



Plads til etiket!

Kryds
her!


Sæt kryds i ruden hvis der er
foretaget specialtilpasninger.
CE-mærkning gælder ikke!

Producent:
Rehatec® Dieter Frank GmbH
In den Kreuzwiesen 35
69250 Schönau/Odenwald
Tyskland



INDHOLD


2:1 Grundindstilling, gaspatron – Galileo	7:1 Tromlebremse
2:2 Alt. drivhjulspacering – Galileo	8:1 Antitip
2:3 Grundindstilling, sædehøjde/dybde – Galileo	8:1 Tippepedal
3:1 Grundindstilling, gaspatron – Leonardo	9:1 Fodstøtte
3:2 Alt. drivhjulspacering – Leonardo	10:1 Montering af sæde på fæsetplade
4:1 Vinkeljustering svinghjulsgaffel	10:2 Vedligeholdelse
4:2 Vinkeljustering, kørebøjle	11:1 Kontrol
5:1 Vinkeljustering/ sammenklapning, kørehåndtag	11:2 Mærkning
6:1 Sædekip – Galileo	11:3 Garanti
6:2 Sædekip – Leonardo	11:4 Siddesystemer der passer til Galileo og Leonardo
6:1 Højdejustering, kørebøjle	11:5 Afmontering/skrotning
6:2 Quick release, drivhjul	11:6 Tekniske data
6:3 Armlæn	

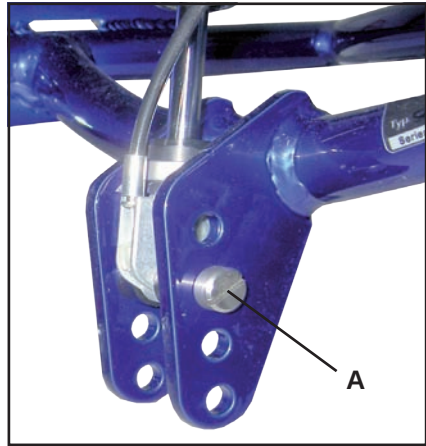

2:1 Grundindstilling, gaspatron

Det nederste fæste på gaspatronen kan monteres i fire forskellige højder alt efter hvilken hældning man ønsker på sædepladen. (Montering i det nederste hul giver mest bagud kip).

- * Løsn skruen vist pos. A
- * Flyt til den ønskede position.
- * Stram skruen vist pos. A.

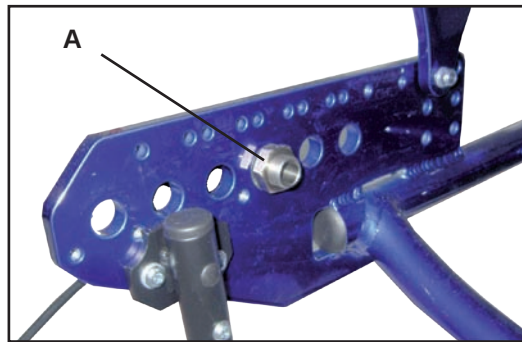

2:2 Alt. drivhjulplacering

For at fastholde et korrekt tyngdepunkt kan drivhjulet placeres i 6 forskellige dybde positioner.

Ændring af dybde position:


- * Løsn skruerne vist pos. A.
- * Flyt til den ønskede position.
- * Stram skruerne.

Tænk på at ændring af drivhjulplaceringen kan øge tip risikoen.

2:3 Grundindstilling, sædehøjde/dybde

Forreste del af sædet kan justeres i tre forskellige højder alt efter hvilken baseline man ønsker på sædepladen.

- * Løsn skruen vist pos. A
- * Flyt til den ønskede position.
- * Stram skruen vist pos. A.

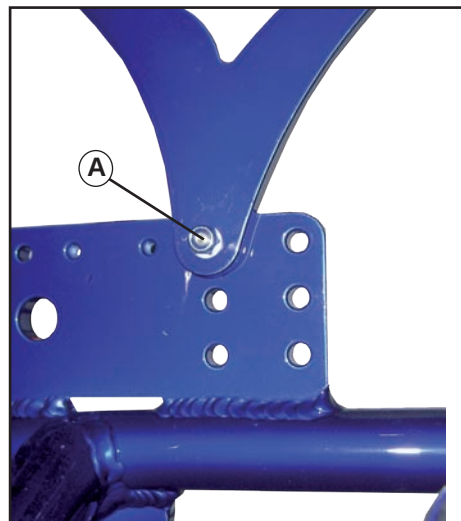

- * Udfør kontinuerligt kontrol som angivet under nedennævnte punkter
- * kontroller regelmæssigt funktionen af brems, kip samt øvrige bevægelige dele.
- * Kontroller regelmæssigt den almene tilstand på stellet samt at alle skruer er ordentligt spændt.
- * Kontroller at der ikke er skader på stellet. Udskift dele efter behov.
- * Separat kontrolprotokol findes på www.anatomicstt.com

11:2 Mærkning

Stellet er mærket med et unikt serienummer, som skal opgives ved korrespondence vedrørende produktet.

11:3 Garanti

Kørestolsstellet har 3 års garanti mod fabrikationsfejl. 2 års reklamationsret.

11:4 Produktet passer til siddesystemerne

Zitzi Delfi / Delfi Pro
Anatomic formstøbt sæde
Ønskes andre kombinationer så kontakt Anatomic SITT A/S.

11:5 Afmontering/skrotning

En brugt del eller produkt afmonteres og skrotes. Delene skal sorteres efter materiale. Ved evt. skrotning, sorter delene i metal, plast og brandbart.


Stellene er, sammen med siddesystemerne Sharky og Delfi, crashtestet og godkendt - ISO 7176-19 og ISO 10542 med brugere siddende i stolen.

11:6 Tekniske data

Max brugervægt inkl. siddesystem: 60 kg

Leonardo:	str. 0	str. 1	str. 2
Vægt:	18 kg	20 kg	22 kg
Længde A:	53 cm	53 cm	53 cm
Bredde B:	36 cm	39 cm	42 cm
Bredde C:	30 cm	33 cm	36 cm
Længde D:	39 cm	42 cm	45 cm
Kip bagud, max:	50°		
Sædehøjde- 5" / 20"	38-49 cm		
Max belast. vægt:	60kg		

Kip bagud, max:	50°			
Sædehøjde- 5" / 18"	34 cm			
Max belast. vægt:	75kg			
Galileo:	str. 0	str. 1	str. 2	str. 3
Vægt:	18 kg	20 kg	22 kg	22 kg
Længde- A:	53 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Bredde- B:	41 cm	44 cm	47 cm	50 cm
Bredde- C:	30 cm	33 cm	36 cm	39 cm
Bredde- D:	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm

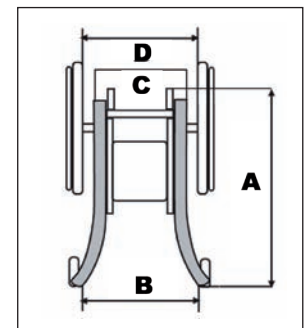

10:1 Montering af sæde på fæsteplade

Sædet monteres enkelt og sikkert på stellet ved hjælp af fæstepladen.

* Skub sædet ind i sidesporene forfra indtil det stoppes af den bagerste kant.


* Tryk låsepadlen ned og vrid den ret frem så den låser sædet fast, så det ikke kan glide fremad, Se billede.



Fæsteplade,
str. 3

Fæsteplade - Drej låsepadlen indtil du hører en "klik-lyd". Nu sidder sædet sikkert monteret på stellet.

Adapterplade - Skyd sædesystemet bagud indtil du hører en "kliklyd". Nu sidder sædet sikkert monteret på stellet.

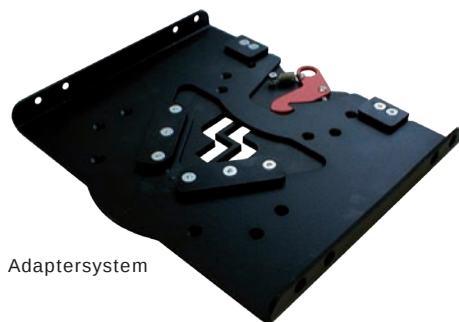

Adaptersystem

10:2 Vedligeholdelse

* Drivhjul: 4 – 5 bars lufttryk

* Svinghjul: 2 – 2,5 bars lufttryk

Rengøring af stellet:

Rengør stellet regelmæssigt med autoshampoo eller lignende. Ved kraftig tilsmudsning kan affedtningsmiddel bruges. (Tænk på miljøet! Brug biologisk nedbrydeligt affedtningsmiddel).

Serviceinterval:

Afhængig af brug og slid. Bør ske 1 gang om året. Se separat serviceanvisning, se www.anatomicsitt.com

Værktøj:

Værktøj som bør anvendes ved justering: unbraconøgler, skruenøglesæt, skruetrækker

-- LEONARDO --


3:1 Grundindstilling, gaspatron

Det nederste fæste på gaspatronen kan monteres i fire forskellige højder alt efter hvilket kip man ønsker på sædepladen.

* Løsn skruen vist pos. A

* Flyt til den ønskede position.

* Stram skruen vist pos. A.

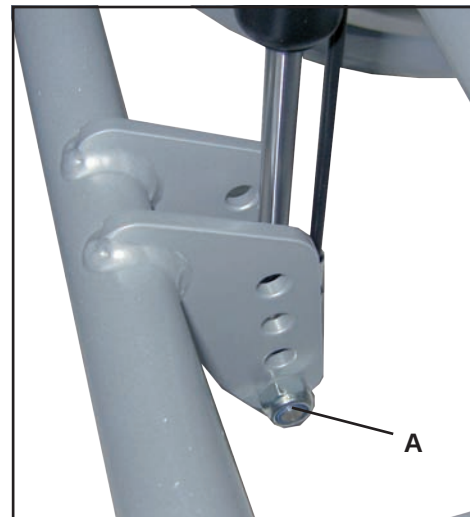

O
O
O
X I nederste leje er kippet:
+30 til - 30°

X
O
O
O I øverste leje er kippet:
+10 til - 50°

Når patronen justeres forandres sædehøjden op til 6 cm.

3:2 Alt. drivhjulsplacering


For at fastholde et korrekt tyngdepunkt kan drivhjulet placeres i 3 forskellige dybde positioner.

Forandring af dybde position:

* Løsn skruerne vist pos. A.

* Flyt til den ønskede position.

* Stram skruerne.

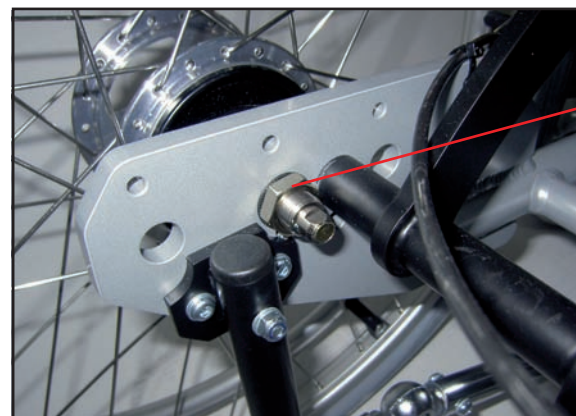


Tænk på at forandring af drivhjulsplaceringen kan øge tiprisikoen.

4:1 Vinkeljustering svinghjulsgaffel

Pos. A på svinghjulsgafflen skal være 90° i forhold til gulvet, (Se billede).


- * Løsn og roter de excentriske møtrikker til den korrekte vinkel opnås.
- * Stram skruerne.

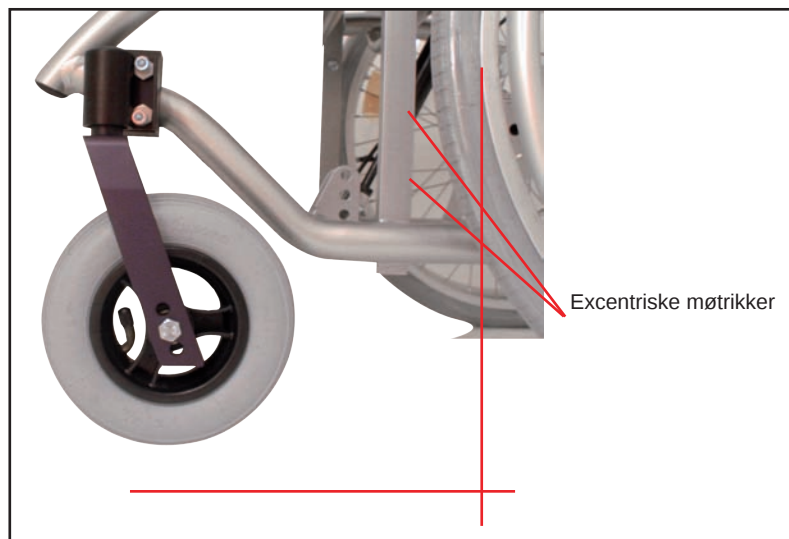

4:2 Vinkeljustering, kørebøjle

Kørebøjlen kan vinkeljusteres.

- * Løsn "fingerskruen" vist pos. A.
- * Drej kørebøjlen til den ønskede position.
- * Sikre dig at "tænderne" tar fat i hinanden.
- * Stram "fingerskruen".

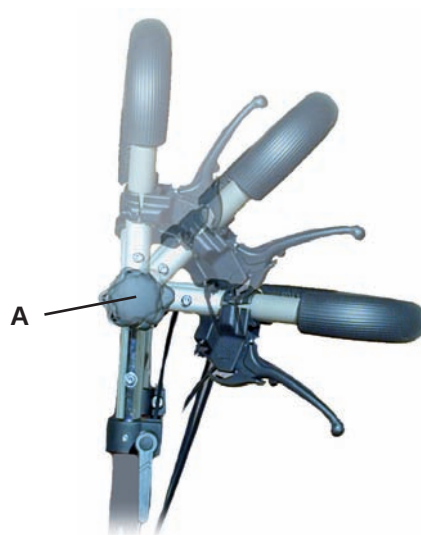


**FINGERSKRUE SKAL ALTID STRAMMES
EFTER JUSTERING.**

9:1 Tippepedal



Tippepedalen skal eksempelvis benyttes ved kantsten.

Monteres nemt med to skruer. Se billede

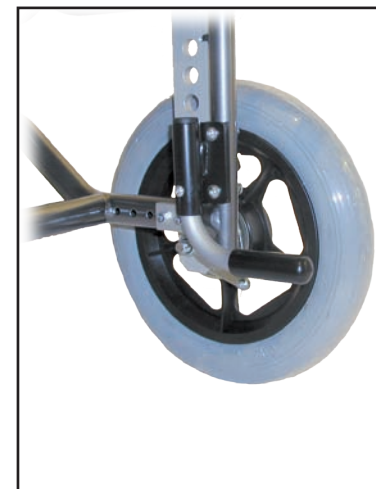

9:2 Fodstøtte

Tilbydes som fast & opklappelig, med hel eller delt fodplade

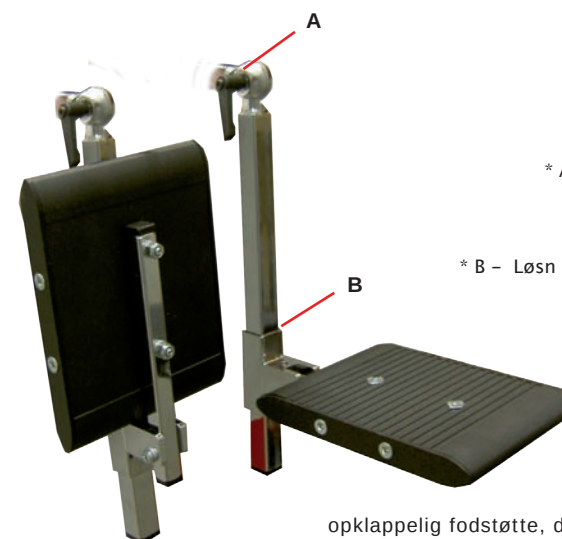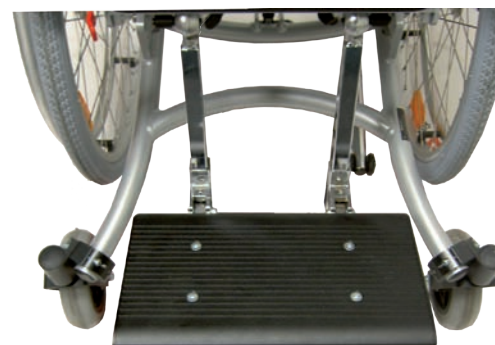

Justering af "opklappelig" fodstøtte:

* A – Løsn "fingerskruen", Juster vinklen.
Stram fingerskruen.

* B – Løsn skruerne, Juster til den ønskede højde.
Stram skruerne.

opklappelig fodstøtte, delt

8:1 Tromlebremse

Stellet er udstyret med tromlebremse som manøvreres af plejeren.

Låsning af hjul:

* Tryk bremsehåndtaget ind. Skyd den røde låseknop frem til det ønskede leje vist pos. A

Frigøring af hjul:



- * Tryk bremsehåndtaget ind.
- Låsningen slippes automatisk.
- * Slip bremsehåndtaget.

Kontroller at bremserne fungerer:

1. Tryk højre bremsehåndtag ind samtidig med at du skubber kørestolsstellet fremad, baghjulet skal bremse/ikke køre. Håndtaget skal ikke kunne trykkes helt ind mod kørebøjlen, der skal være et slip på 5–10 mm.
2. Gentag proceduren med venstre bremsehåndtag.
3. Fungerer bremsen ikke foretag følgende:

Kontroller at wirerne har den rette spænding. Wirerne må ikke have for lav spænding. Begynd med at justere skrue (B) indtil bremsen virker, som den skal. Virker det ikke, følg nedenstående instruktion.

- Spænd skruen (B) helt
- Løsn møtrik / skrue (D)
- Brems ved at løfte i "armen" (D), så wiren er i spænd, uden at bremsen er trukket.
- Spænd møtrik / skrue (D)
- Finjuster efterfølgende med skrue (B)

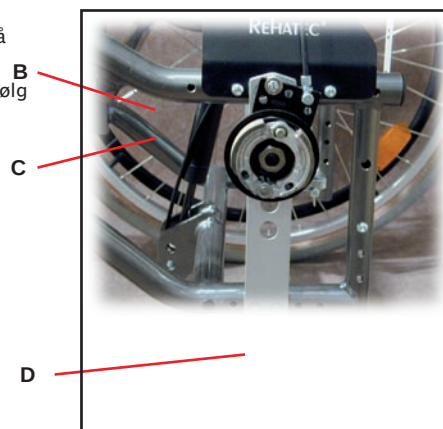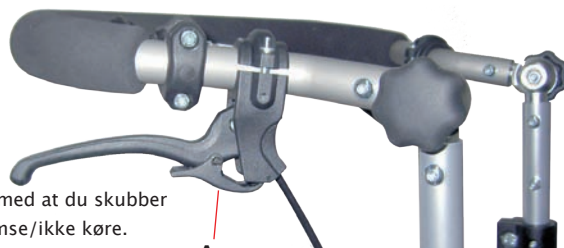

8:2 Antitip

Antitippet kan nemt vippes til siden – så det ikke er i vejen.

Træd antitippet ned og vrid det til siden. Vrid indtil det giver en "klik-lyd" så sidder det fast.

Træd så langt inde som muligt.

Stellene bør altid udstyres med antitip pga. deres mange indstillings- og tilpasningsmuligheder.




5:1 Vinkeljustering/ sammenklapning, kørehåndtag

Kørehåndtaget kan trinløst vinkeljusteres og klappes fremad ved transport.

Vinkeljustering:

- * Løsn "fingerskruen" vist pos. A.
- * Vinkel til den ønskede position.
- * Stram "fingerskruen".

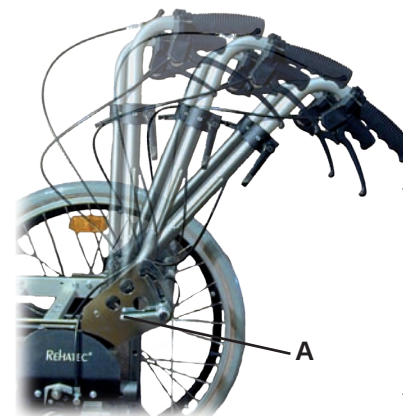

Sammenklapning:

- * Tryk på og klem "skydergrebet" vist pos. B sammen.
- * Skub kørehåndtaget fremad.


Opklapning:

- * Tryk på og klem "skydergrebet" vist pos. B sammen.
- * Klap kørehåndtaget op til den giver en "klik-lyd".

Transport:



Ved transport kan stellet løftes i rammen.

Ved fastgørelse i bilen, se separat brugsanvisning
OBS – Stræk kun stropperne, stram dem ikke.

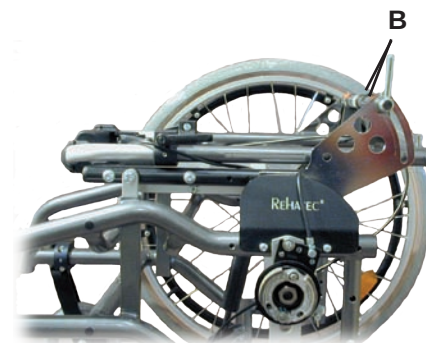

6:1 Sædekip – Galileo

-- GALILEO --

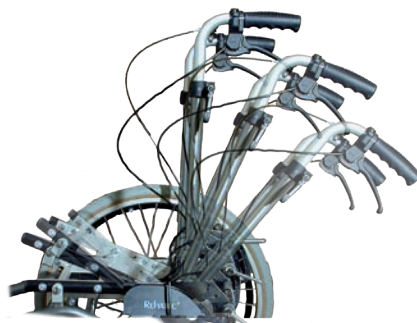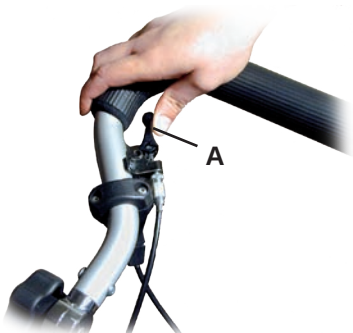

- * Tryk padlen vist pos. A ind for at frigøre gaspatronen til sædekippet.
- * Kip til den ønskede position, slip padlen.

Grundindstillingen af kiplejet kan ændres efter behov. Se punkt 2:2 og 3:1.

6:2 Sædekip – Leonardo

-- LEONARDO --



Kip:

- * Tryk padlen vist pos. B ind for at kipe sædet.
- * Kip til den ønskede position, slip padlen.

Sænke/Hæve:

- * Tryk padlen ind – skiftevis vist pos. A & B
- * Juster til den ønskede position, slip padlen.


For at ændre kip og sædehøjde, se punkt 3:1 & 3:2



7:1 Kørebøjle

Kørebøjlen kan højdejusteres trinløst.

- * Løsn "fingerskruen" vist pos. A.
- * Juster kørebøjlen til den ønskede højde.
- * Stram "fingerskruen".

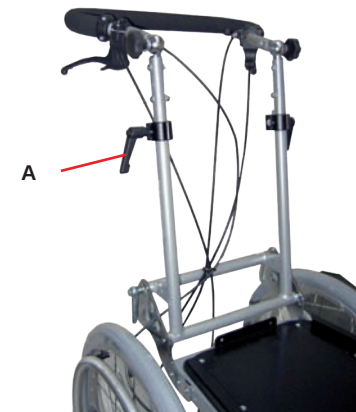

7:2 Quick release, drivhjul

Drivhjulene kan nemt fjernes under transport.

Afmontering:

- * Tryk og hold knappen inde vist pos. A.
- * Træk hjulet af.

Montering:

- * Tryk og hold knappen inde vist pos. A.
- * Skyd Quick release akslen ind i navet.
- * Slip knappen.



Kontroller at hjulet sidder fast ved at trække i det.

7:3 Armlæn

Montering:

Armlæn monteres på rygrørene.

- * Fjern kørebøjlen/håndtaget
- * Skyd armlænene på rygrørene.
- * Monter kørebøjlen/håndtaget

Justering:

- * Højdejustering (A)
- * Armlænsvinkel (B)



Vigtigt - Spænd altid fingerskruerne efter justering (B)