



Zitzi **DELFI PRO** Brugsanvisning

For at kunne udnytte Zitzi Delfi Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Dette produkt er udviklet til brugere med siddestillingsmæssige udfordringer og passer til mange forskellige diagnoser. Tilpasning af Zitzi Delfi Pro skal altid foretages af uddannet personale. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.



Indholdsfortegnelse

3	Værktøj	24	Fodstøtte
3	Montering/afmontering af ryg	25	Delt fodstøtte
4	Justering af sædedel	26	Fodstøtte, hel justerbar
6	Justering af hoftevinkel	27	Fodstøtte, delt justerbar
7	Justering af ryghøjde	28	Fodstøtte, opklappelig
8	Forstærket ryg	28	Fodstøtte, fjedrende fodstøtteadapter
9	Justerbare kropsstøtte	29	Lægstøtte
10	Vipbar kropsstøtte	30	Fodkasse enkelstang
11	Hovedstøtte	31	Fra enkelstang til dobbeltstang/Tekniske data
12	Vipbar hovedstøttebeslag	32	Boreanvisninger til hel fodstøtteplade
13	Sidejusterbart hovedstøttebeslag	33	Boreanvisninger til delt fodstøtteplade
14	Fæste Headpod	34	Ankelbæspænding
14	Fæste HeadActive	35	Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe
14	Fæste Pandebånd	36	Kørebøjle
15	Bækkenstøtte	37	Varmepakke
16	Hoftestøtte	38	Legebøjle
17	Hoftebælte	39	Kaleche
18	Montering af supportserien	40	Plansæde
19	Armlæn	41	Montering på stel
20	Albuestop	42	Adaptersystem universal
21	Bord, fast	43	Tekniske data
22	Bord, vipbart	44	Vedligeholdelsesvejledning
23	Bord, forstærket monteringsbeslag	45	Sammenfatning og efterkontrol
		46	Tilpasning og specialtilpasning
		47	Betingelser for salg



Produktet er et siddesystem som passer sammen med stel produceret af Anatomic SITT A/B.
Hvis du ønsker anden anvendelse, kontakt venligst Anatomic SITT A/S.

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke!



Værktøj



Værktøjsnøglen som du skal bruge til at udføre justeringer er placeret på toppen af rygprofilen, som du finder på bagsiden af stolen.
(4 mm Unbrakonøgle)



Montering/afmontering af ryg



 = Justeringsnøgle 

Ryggen er monteret med 4 unbrakoskruer. Før rygprofilen ned i samlemøtrikkerne og spænd de fire medfølgende skruer (rødmarkeret på billedet).

Ryggen er automatisk i den korrekte position ved hjælp af stoppet i rygprofilen.

**Vælg forstærket ryg
når brugeren har høj tonus**

Justering af sædedel

Sædedybde, benlængde forskel og abduktion / adduktion af benene kan nemt justeres. Start med at fjerne sædebetrækket for, at komme til justeringsskruerne.

Vær opmærksom på at du ikke skruer skrue helt ud, de skal blot løsnes.



Justering af sædebredde


For maksimal sædebredde skal tværmøtrikken være i "spor" 3 og for mindste sædebredde skal den være i "spor" 1. Bendelens profilmøtrik er som standard i spor 1.

1. Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. 2. Flyt bendelen til det ønskede "spor" og position i den bredere sædebredde. 3. Spænd skrue når den ønskede placering er fundet. Den bagerste skrue kan være nødvendigt at skrue lidt ud.





Benlængdeforskel

Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. Træk bendelen frem til ønskede position og spænd skruen.

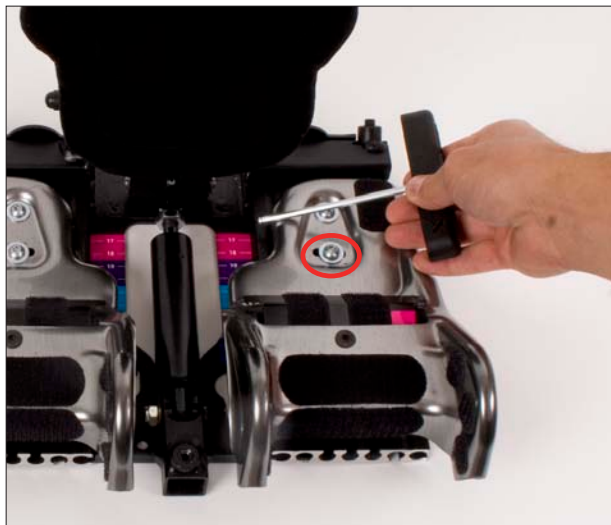


Justering af sædebrønd

Når man justerer sædets dybde, skal sædebrønden også justeres. Hvis sædets dybde justeres til 23 cm (grå område), skal sædebrønden også være i det grå område for, at have en korrekt størrelse sædebrønd og korrekt siddestilling. Løsen bendelens skrue med værktøjsnøglen. Træk sædebrønden til ønskede. Spænd skruen.

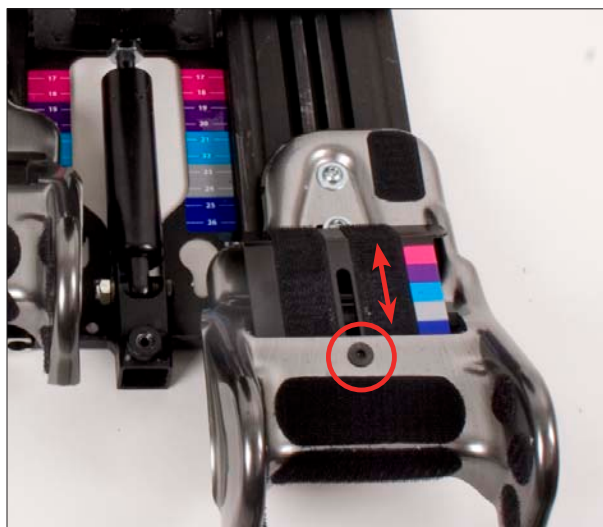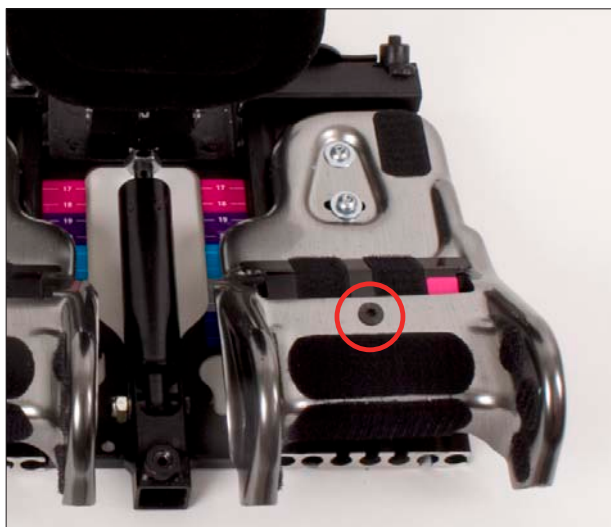


Abduktion og adduktion

Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. Før bendelen til ønskede position og spænd skruen, når du har den ønskede placering.

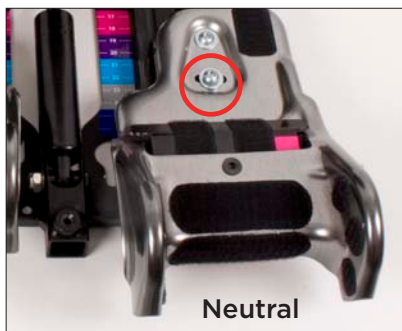

Justering af hoftevinkel

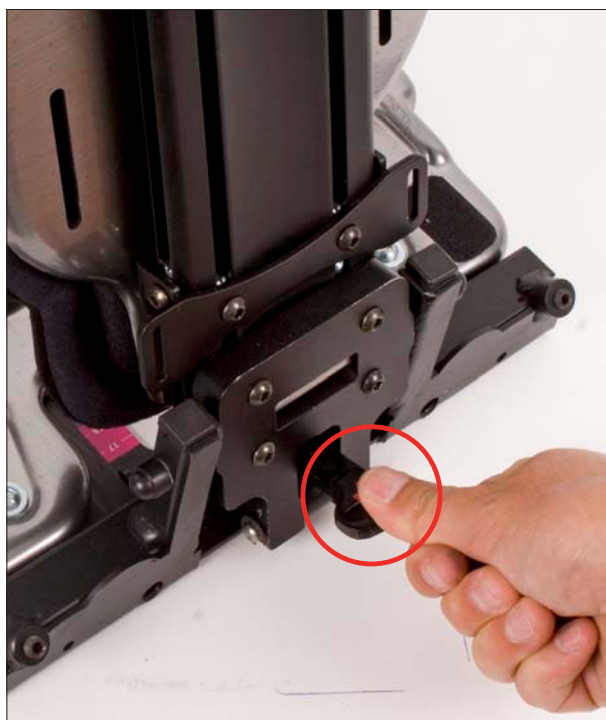

Placer først låsehåndtaget i aktivt leje ved at trække håndtaget lige ud og op.

For at justere vinklen på ryggen, skub håndtaget nedad og placer det i den ønskede position. Når den ønskede position er opnået, slip håndtaget og sæt det i "børnesikring".



Det er meget vigtigt at håndtaget er børnesikret (placeret nedad, når justering af rygvinkelen er fortaget.



Justering af ryghøjde




- Løsen unbrakoskruerne (A) på begge sider af rygprofilen (2 på hver side)
- Juster til den ønskede højde
- Spænd skruerne

Placer ryggen så du kan gøre brug af den indbyggede lændestøtte!



Forstærket ryg

Forstærkningspladen fæstes på rygpladen ved hjælp af dobbeltklæbende tape. Sørg for, at alle spor og huller er vinkelret mod hinanden. Pladen holdes på plads via de bolte som fæster i kropsstøtten i sporene.

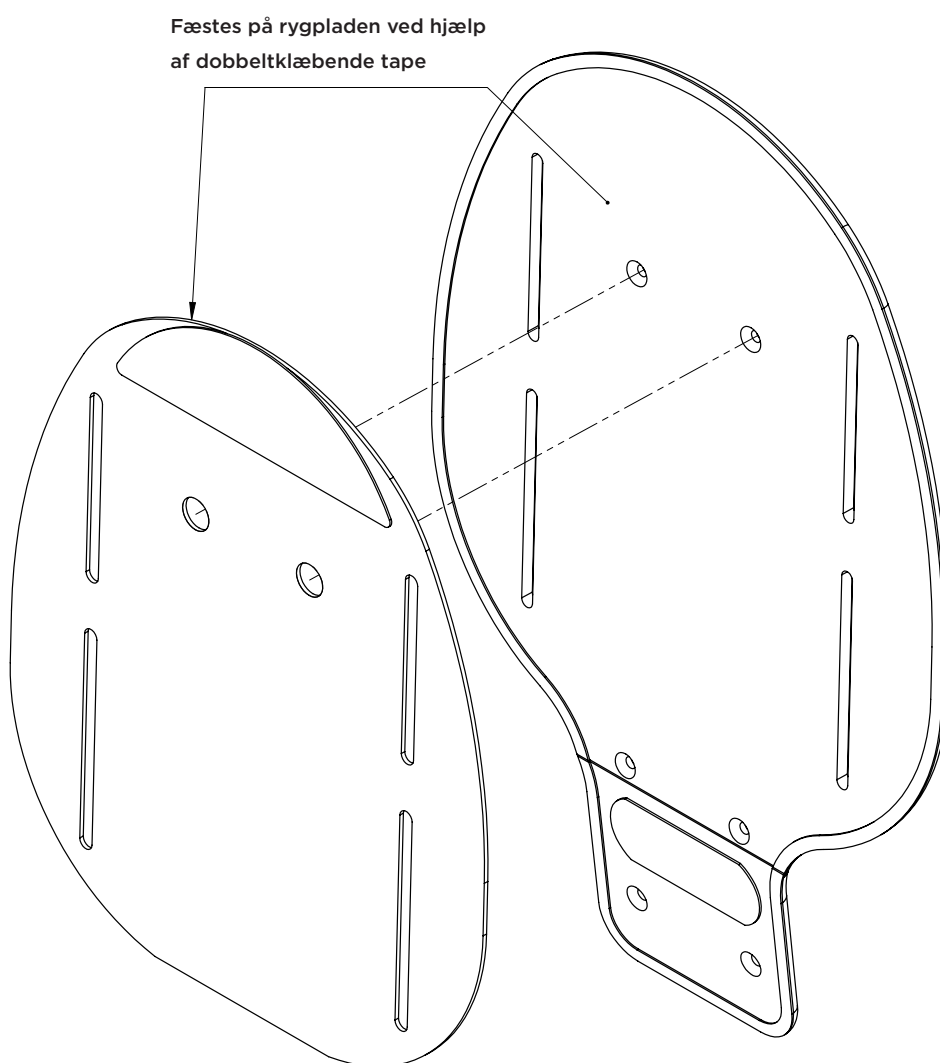

Justerbare kropstøtter


Montering af kropstøtter

Monter kropstøtterne med medfølgende beslag, distancestykker, skiver og fingerskruer (se billedet). Distancestykke skal placeres mellem kropstøtte og ryg, så betrækket ikke kommer i klemme.




Justering af kropstøtte

- Løsen fingerskruerne (to på hver side).
- Juster herefter kropstøttens bredde og højde.
- Spænd fingerskruerne, når den ønskede placering er opnået.

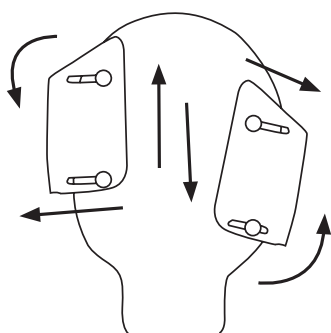


Fingerskrue

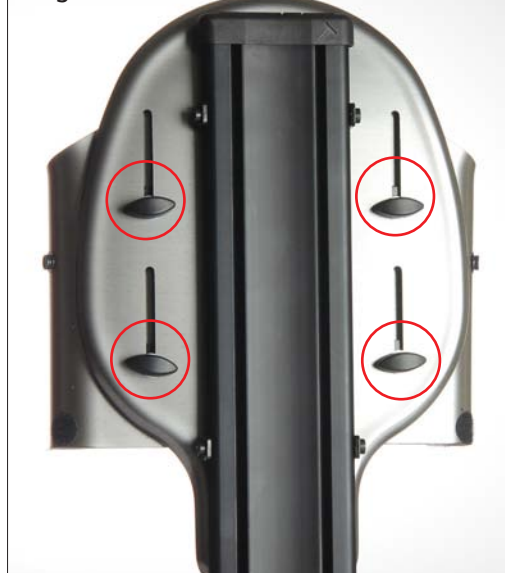

Vipbare kropsstøtter

Monter kropsstøtte

Monter kropsstøtterne med medfølgende beslag, distancestykker, skiver og fingerskruer (se billedet). distancestykke skal placeres mellem kropsstøtte og ryg, så betrækket ikke kommer i klemme.

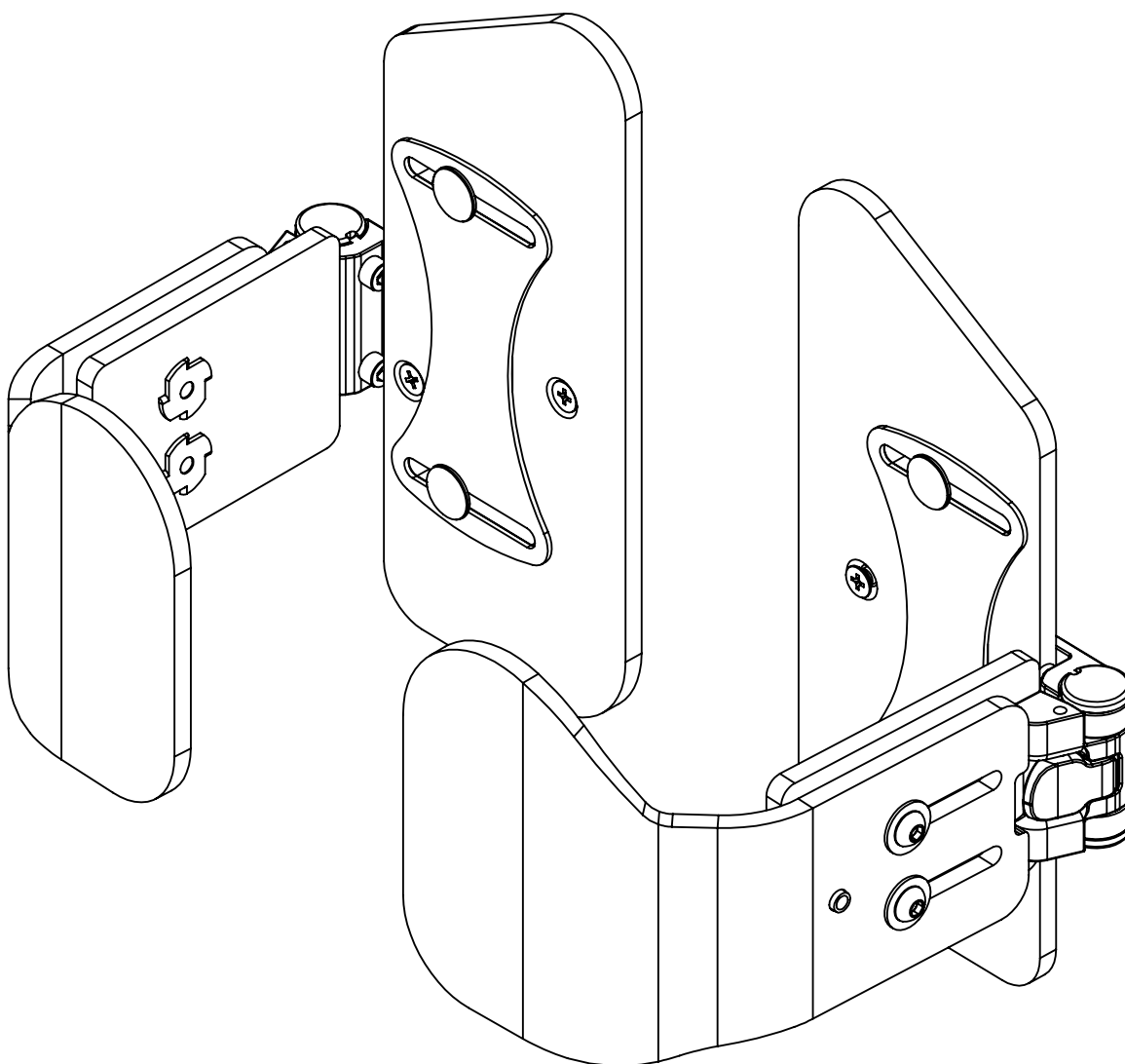

Hovedstøtte



(B) Fingerskrue og
højdejusteringshåndtag

A - Montering af hovedstøttebeslag

Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som sidder øverst på rygprofilen. Skub hovedstøttebeslaget ned i sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering. Spænd skruerne!

B - Monter hovedstøtten på beslaget og juster til den ønskede position. Stram fingerskruen.

C - Justering af hovedstøtten

Løsen justeringsskruerne en smule så du nemt kan justere med hånden. Når den ønskede position er opnået, stram skruerne (C).

Hvis hovedstøtten skal være højere, løsen fingerskrue (B) og juster hovedstøtten til den ønskede højde. Stram fingerskruen(B).

 = Justeringsnøgle 

(A) Hovedstøttebeslag, 4 profilmøtrikker.

Vipbart hovedstøttebeslag

Montering af vipbart hovedstøttebeslag

Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som sidder øverst på rygprofilen. Skub hovedstøttebeslaget ned i sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering. Spænd skruerne!

B - Monter hovedstøtten på beslaget og juster til den ønskede position. Stram fingerskruen.

C - Justering af hovedstøtten

Løsen sikkerhedssplitten for at kunne fjerne hovedstøtten. Ved låsning af det vipbare hovedstøttebeslag; sikker dig at at spitten går i hak og låser.



Sidejusterbart hovedstøttebeslag


Montering af sidejusterbart hovedstøttebeslag

Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som sidder øverst på rygprofilen. Skub det sidejusterbare hovedstøttebeslag ned i sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering. Spænd skruerne!

Monter herefter hovedstøtten i hovedstøttebeslaget, juster juster til den ønskede placering. Spænd skruerne!

Justering af hovedstøtten

For at sidejustere hovedstøtten løsner skruerne A (2 stk.). Ønskes yderligere justeringsmulighed, løsner da skruerne B (4 stk.). Spænd skruerne!

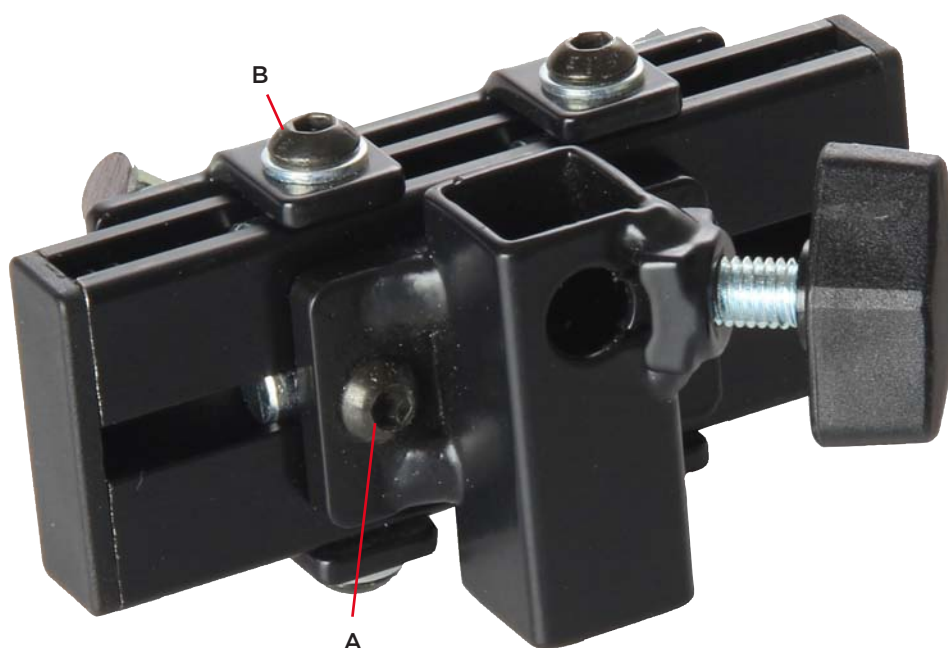

Fæste Headpod



Fæste HeadActive



Fæste Pandebånd



Løsen skruerne (A) og aftag nakkestøtten fra nakkestøttefæstet. Monter fæstet med medfølgende skruer (B) og spænd skruerne. Sæt efterfølgende nakkestøtten tilbage på nakkestøttebeslaget og spænd skruerne. (A).

Bækkenstøtte



Montering af bækkenstøtte

Inden du kan montere bækkenstøtten skal du fjerne hættten (A). Skru skruen ud (B) og fjern herefter hættten.

Monter bækkenstøtten der hvor hættten (A) sad og fastgør den med skrue (B).

Justering af bækkenstøtte


For at vinkeljustere bækkenstøtten, løsen skrue (B), (C) eller (D) afhængig af hvilke indstillinger du ønsker at foretage. For at højdejustere Bækkenstøtte pladen skruer du skrue (E) ud og flytter pladen til ønskede position. Stram herefter skrue (E) igen.

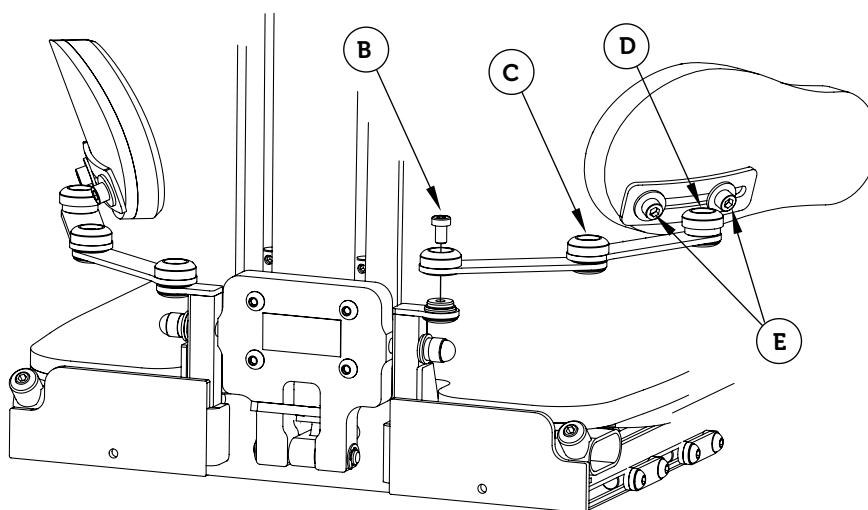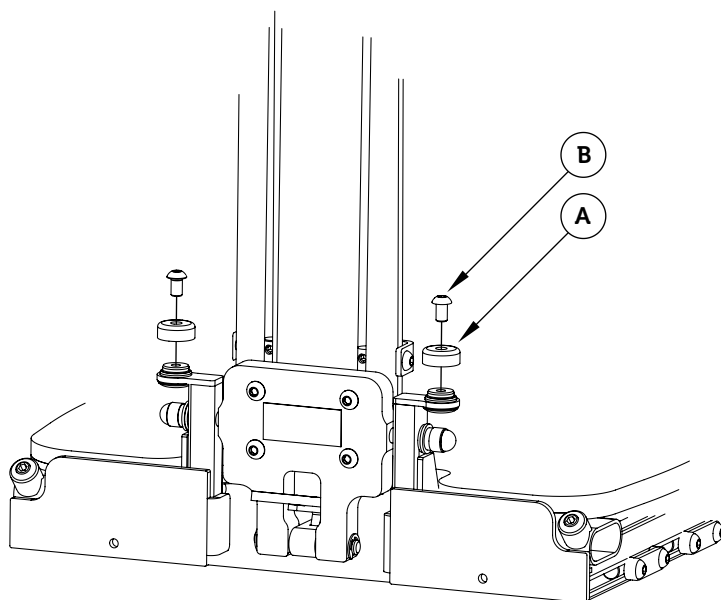

Hoftestøtte

Skru de to skruer ud som fastholder bendelen og udbyt disse til de skruer i medfølgende kit som er et trin (5mm) længere. Når du monterer de nye skruerne skal du lægge hoftestøtten mellem bendel og basen, som billedet viser (mellem de to sorte profiler for Sharky) så at hoftestøtten ligger mod basen.

Vælg hvilket spor i hoftestøtten du anvender beroende på hvor langt frem/tilbage du vil placere støtten, herefter justerer du støtten i siden inden du strammer skruerne ordentligt til.

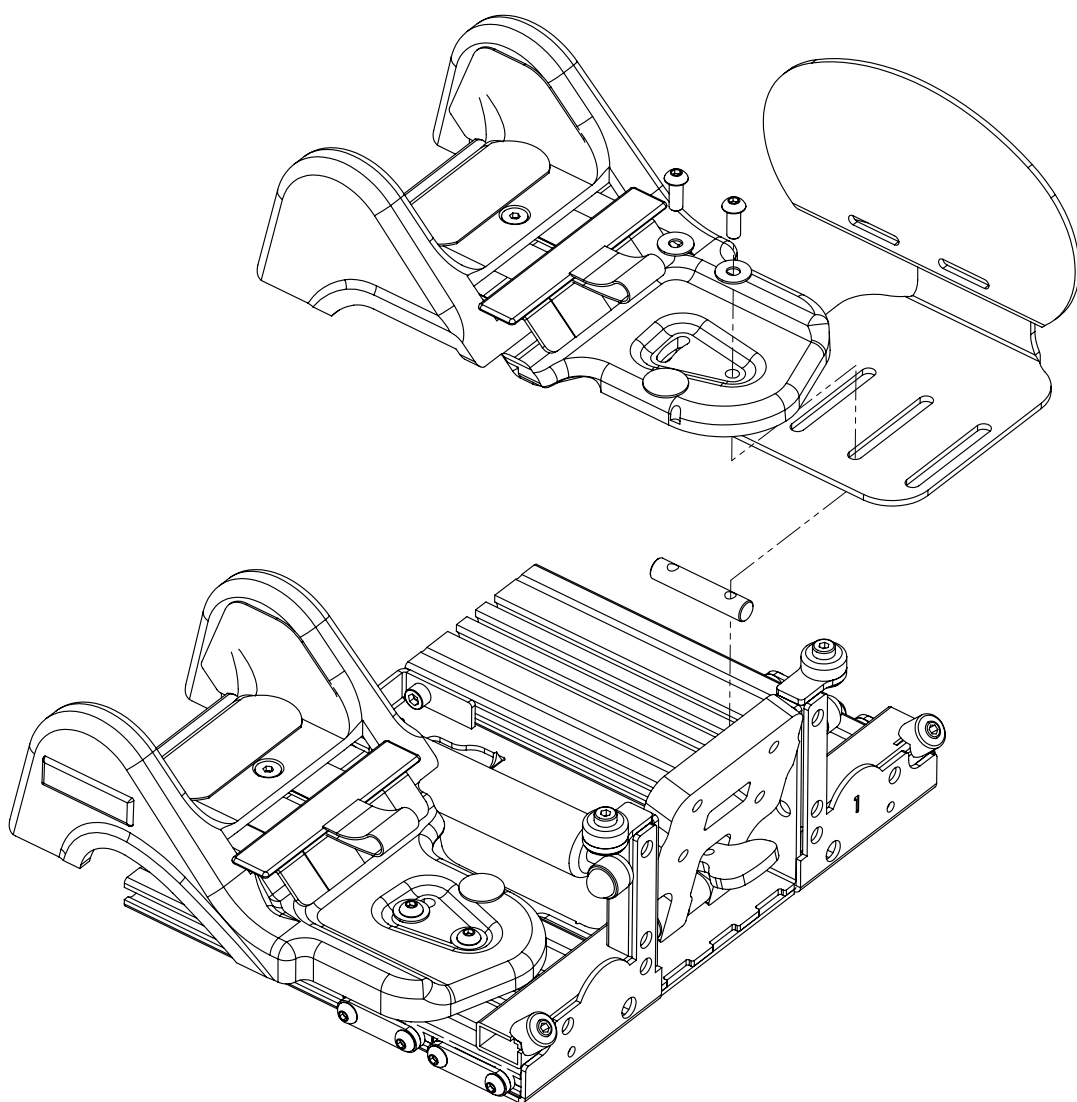


Hoftebælte

Justering af hoftebæltetsbeslag

For at flytte positionen på fastgørelsesbeslagene for hoftebæltet løsner du skrue (A) något og justerer til ønskede position. Spænd herefter skrue (A) igen.

Montering af hoftebælte


Når hoftebæltet skal monteres i hoftebæltebeslaget skal du anvende et tri-glidespænde. For montering efter tri-glidemetoden, gør som billedet viser.

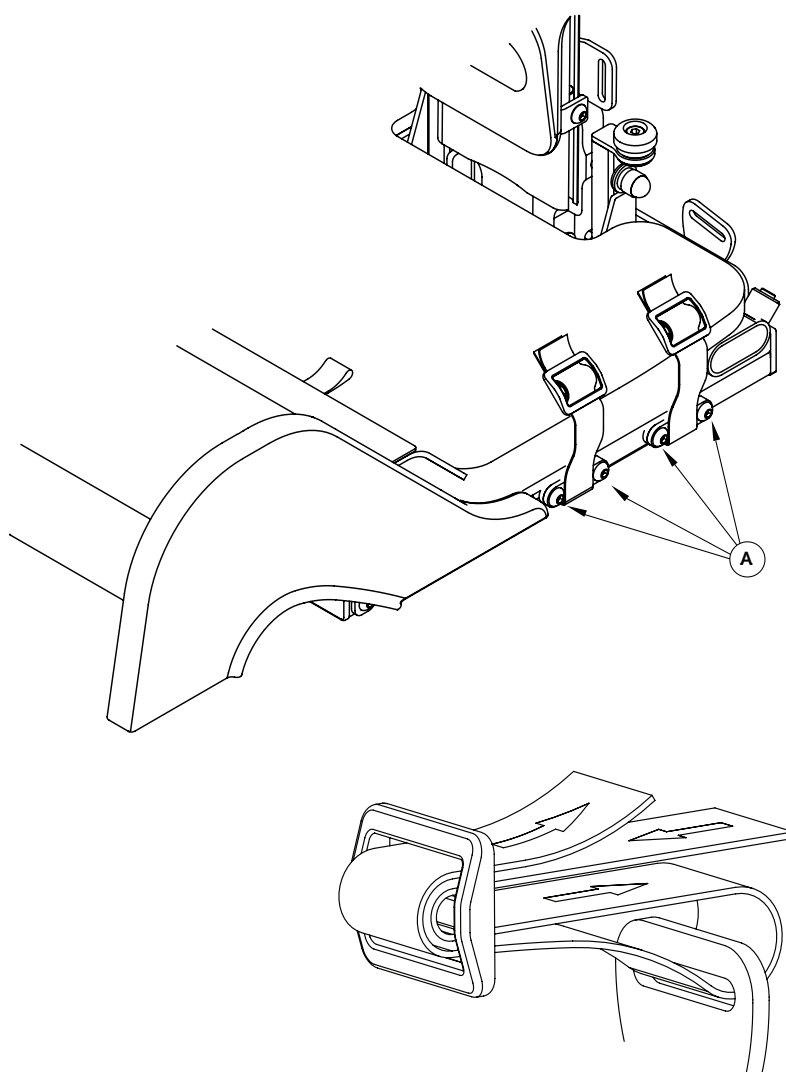

Tri-glidemetoden

Sikre dig at båndet ikke sikker i klemme.

Montering af supportserien

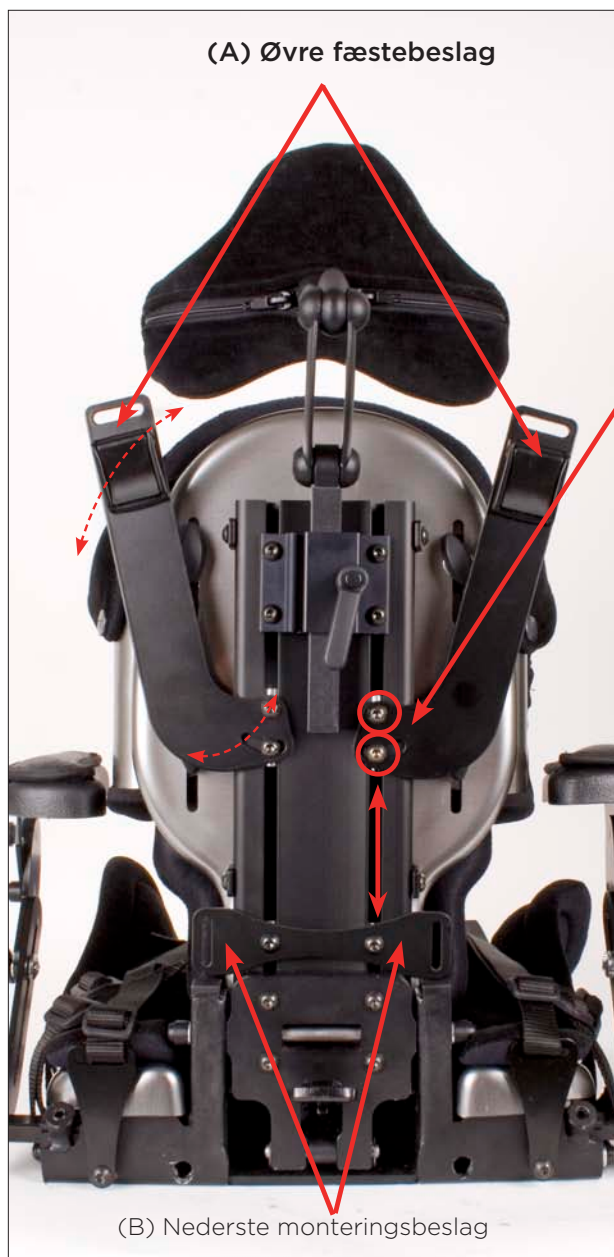

Montering af øvre fæstebeslag - A

Start med at fjerne værktøjsnøglen, der er placeret øverst på rygprofilen.

Skub de øverste monteringsbeslag ind på rygprofilens spor og find den rette placering.

Justering af øvre fæstebeslag

Løsen skruerne og foretag de ønskede justeringer. Højden på de øverste monteringsbeslag skal være placeret, så trækretningen er en smule over skulderområdet. Spænd skruerne.


Montering af sele

Træk selens øvre remme gennem sporet og i spændet. Træk herefter selens nedre fæstepunkter ind i det nedre beslag. Anvend Triglade spændet E.


Justering af trækretning og bredden

Løsen skruerne på det øverste monteringsbeslag og juster til den ønskede højde. Spænd de øverste skruer.

Juster vinklen og spænd skruerne.

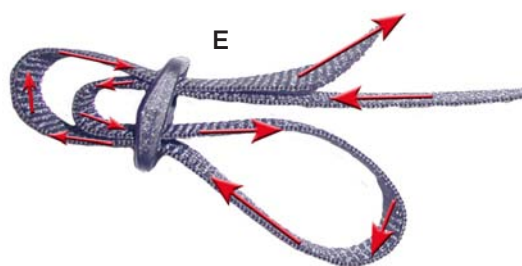

Alternativt nedre monteringsbeslag (tilvalg 285140)

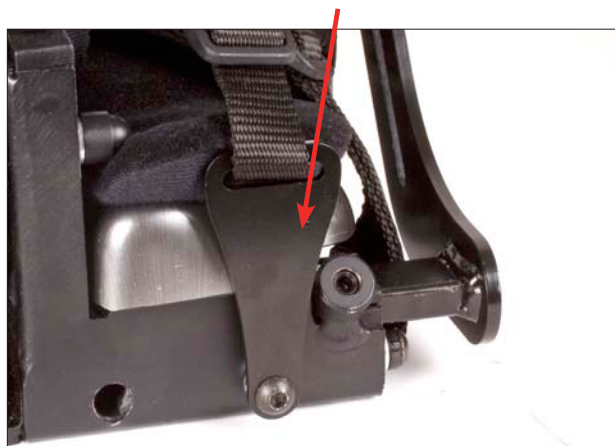

Sikrer dig, at der er nok plads til halsen, at puderne er rigtig placeret og at trykket er korrekt!

○ = Værktøjsnøgle 

Armlæn

For montering af armlæn, træk armlænene ind på beslaget på hver side af stolen. Spænd skruerne. Se position A.


Justering af bredde: Løsen skrue A juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Justering af dybden: Løsen skruerne B og C helt og juster til den ønskede position. Genindsæt og spænd skruen.

Rotation: Løsen skrue C juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Højdejustering af armlænsplade - D : Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position.

Vinkeljustering af armlænsplade - E : Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position.

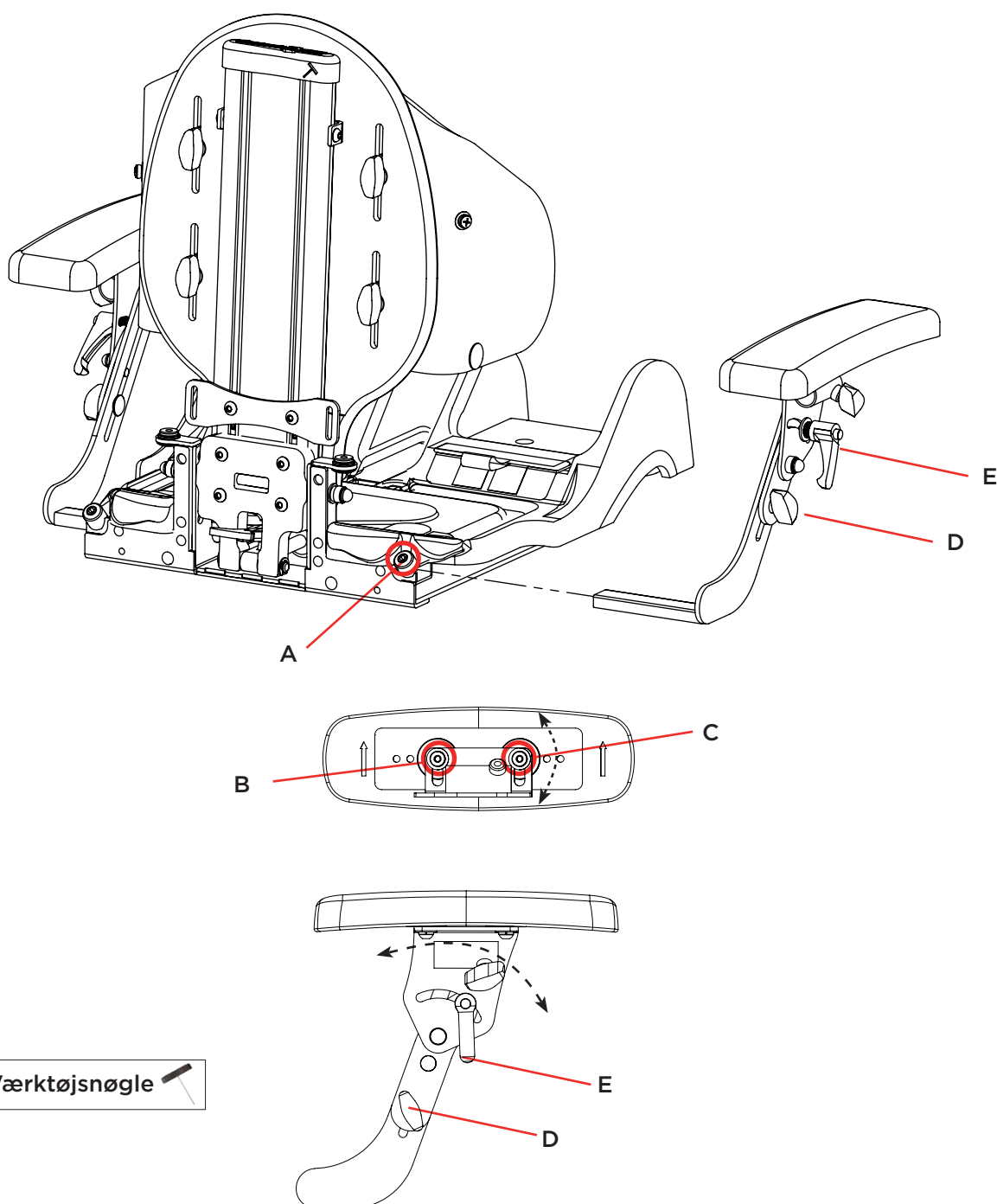

Albuestop

Montering af albuestop

Monter albuestoppet ved hjælp af fingerskrue (A), skiver (B), og bolte (D). Bemærk at boltene i kropsstøtten skal erstattes, med de medfølgende og længere bolte. For mere detaljeret information om hvordan man monterer kropsstøtten, se side 10 i denne brugsanvisning.

Stik boltene igennem (D) kropsstøtten og rygpladen. Fastgøres med albuestop beslaget (C), skive (B) og endeligt fingerskrue (A).

Højdejustering af albuestop


For at højdejustere albuestoppet løsner du fingerskruen (A) og justerer herefter til ønskede højde. Spænd fingerskruen (A) når du har opnået ønskede position.

Breddejustering af albuestop

For at breddejustere albuestoppet løsner du skruerne (E) og justerer herefter til ønskede bredde. Spænd skruerne (E) når du har opnået ønskede position.

Betrækket

Når betrækket trænger til at blive vasket, fjernes det nemt ved at trække i elastikken på bagsiden af albuestoppet. For at genmontere betrækket, træk betrækket over albuestoppet og sørg for at det sidder centreret på pladen på albuestoppet.

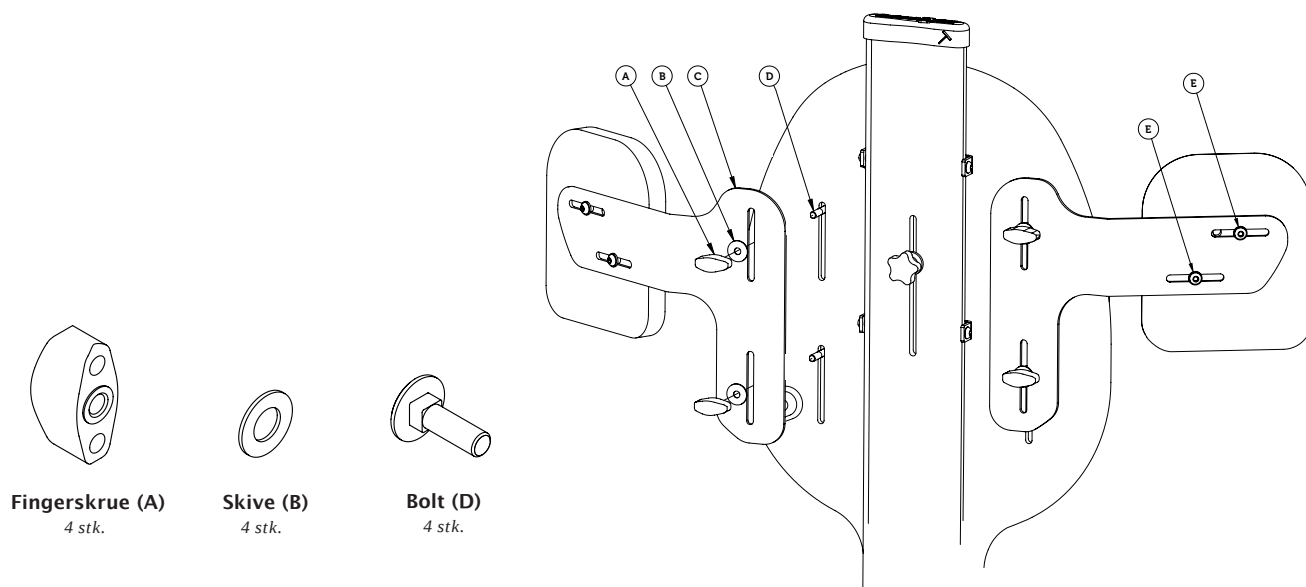

Bolten i kropsstøtten skal udbyttes med medfølgende længere bolte ved montering af albuestop.

Ved justering af albuestoppet løsnes kropsstøtten for justering.


Bord, fast

Montering af bord

Læg bordet på armlænsputerne og vrid herefter bordets låsearm under armlænspladen. Låsearmen skal drejes til den er indenfor kanten på armlænspladen.

Ændring af monteringshul

Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden, anvendes valgfrit monteringshul under armlænspolstringen i bordets bagkant. I grundudformningen er låsearmen isat midterhullet. For at ændre monteringshul skal du først løfte på polstringen i bagkanten. Marker-ingerne i bordets ydre bagkant viser bare hvilken størrelse bordet har.

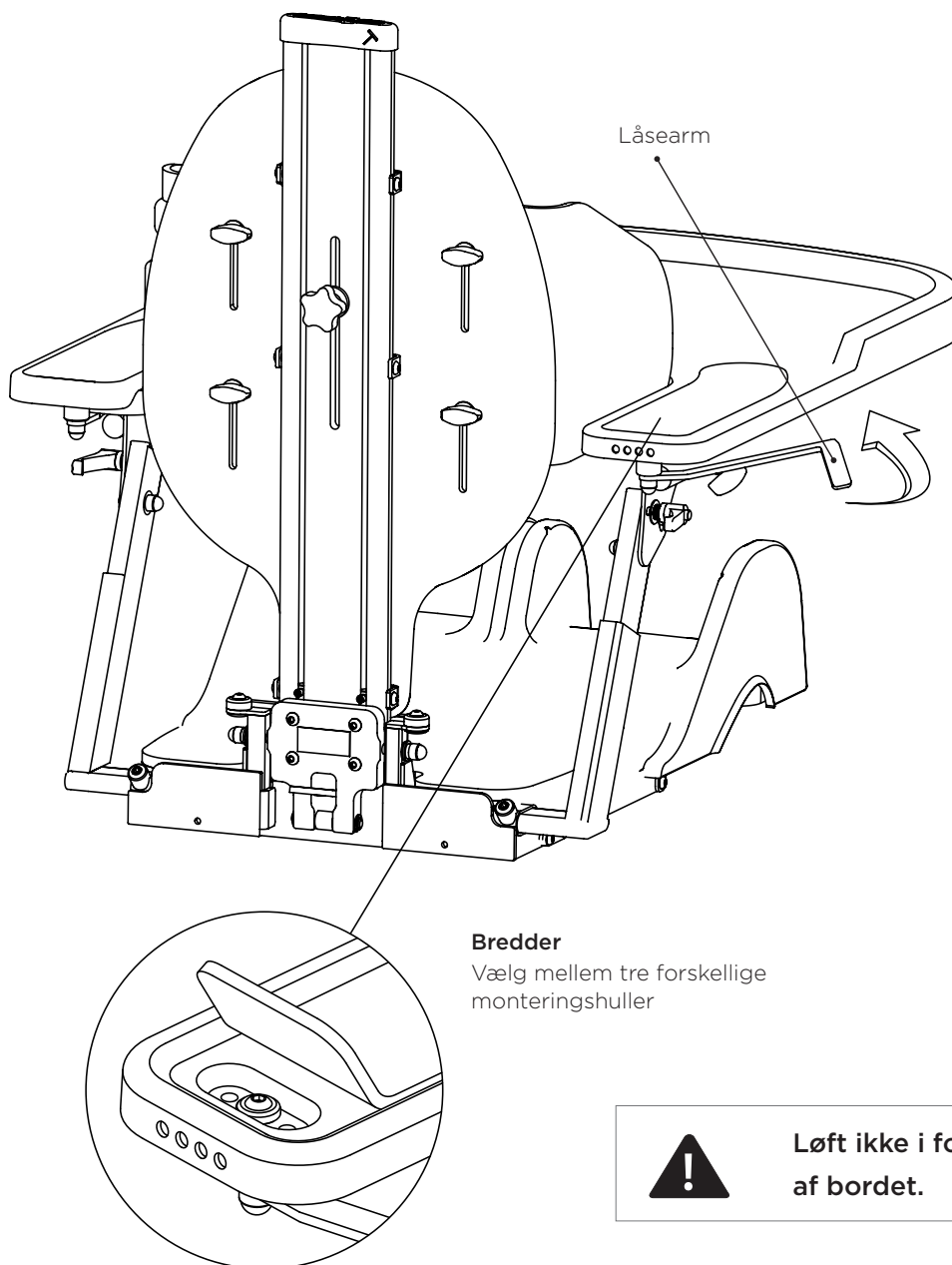

Bord, vipbart



Montering af bord, vipbart

Montering af sammenklappeligt bord, sæt monteringsbeslaget (A) gennem røret (B) som er placeret under armlænspladen. Skub bordet ind til den ønskede position og lad det hvile på armlænpladerne. Stram fingerskruen (C) for at fastgøre bordet.

At anvende den vipbare funktion

For at fælde bordet til siden løsnes først fingerskruen (C) lidt. Løft herefter bordet lidt og skub det fremad. Løft bordet yderligere og vip det til siden. Når bordet er i sin laveste position, skubber du det tilbage og strammer fingerskruen (C).

- 1) Skub bordet frem ad
- 2) Løft bordet yderligere og vip det til siden
- 3) Når bordet er i sin laveste position, skubber du det tilbage igen.

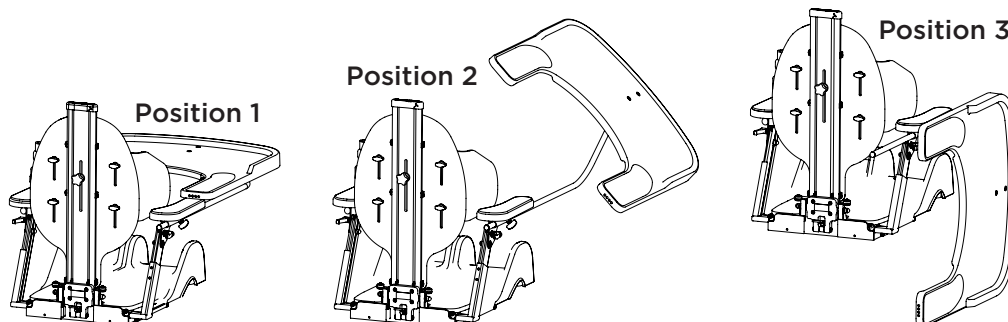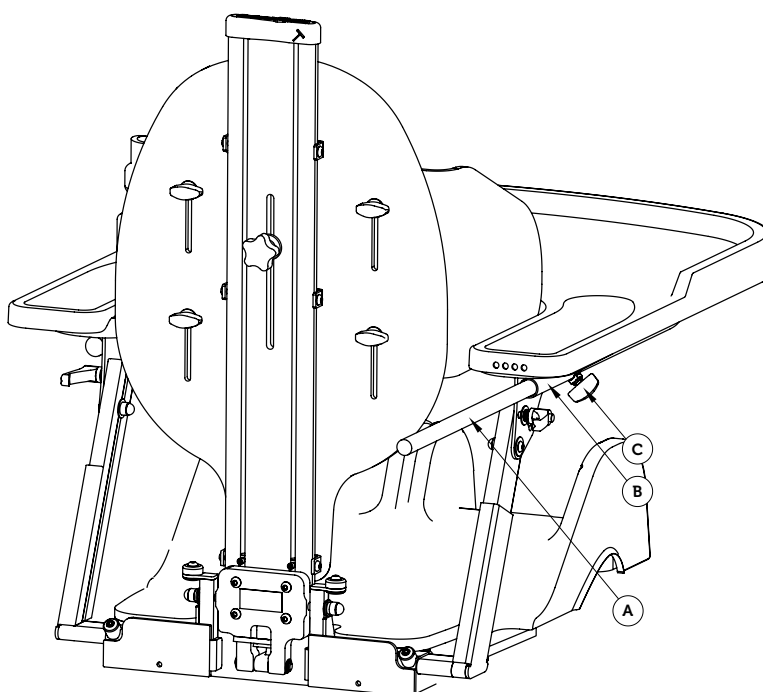

Husk at stramme fingerskruen (C) efter brug af vippefunktionen på bordet. Sørg for at bordet trækkes tilstrækkeligt langt fremad ved sideopklapning, så brugeren ikke skades.

Bord, forstærket monteringsbeslag

Montering af forstærket bord


For at montere bordet, sætter du monteringsrøret (A) gennem røret (B) som er placeret under armlænspladen. Skub herefter bordet til ønskede position og lad det hvile på armlænsputerne.

Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet. Vrid herefter låsearmen til den er indenfor kanten på armlænspladen.

Breddejustering af forstærket bord

I stedet for at breddejustere armlænen kan du vælge at breddejustere bordets monteringsbeslag så det passer til røret i armlænsbeslaget.

For at breddejustere bordet løsner du skruerne (D) lidt og justerer til ønskede position. Spænd herefter skruerne (D).

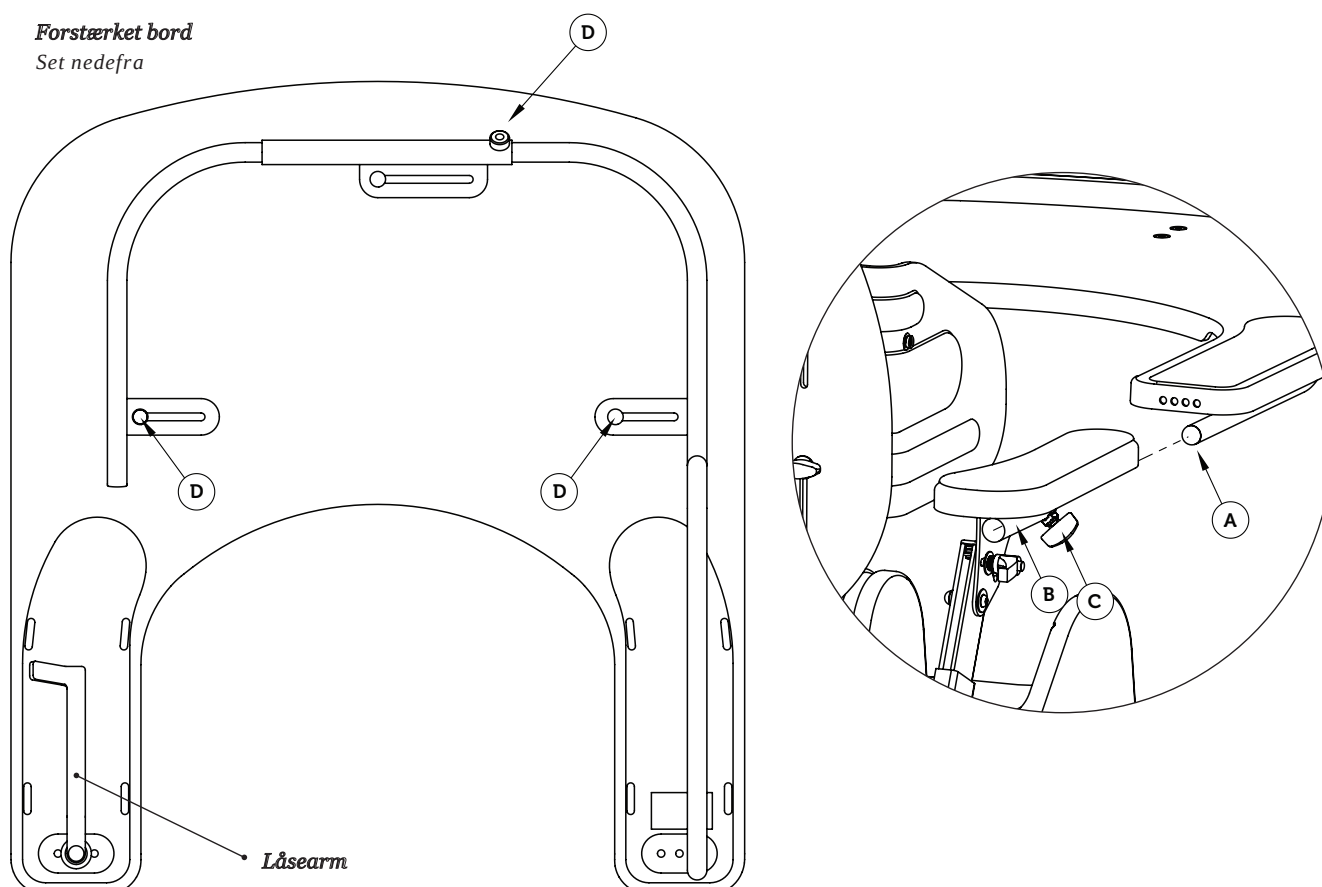

Hvis ikke breddejusteringen i bordets monteringsbeslag rækker kan en eventuel justering af armlænsbredden være nødvendig.

Fodstøtte



Montering af fodstøtte - A

Monter fodstøtten i bundprofilen. (firkantet rør)
Lås fodstøtten fast med fingerskruen.

Justering af vinkel af knæled - B

Løsen fingerskruen og juster herefter till ønskede vinkel. Lås fingerskruen, når ønskede vinkel er opnået.

Vigtigt - Efter justering skal "tænderne" passe ind i hinanden. Stram skruen hårdt!

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Højdejustering af fodplade - D

Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.



(A) Beslag, fodstøtte

(B) Fingerskrue til justering af knæledsvinkel




○ = Værktøjsnøgle

(C) Skrue til vinkeljustering

(D) Vred til højdejustering

Delt fodstøtte

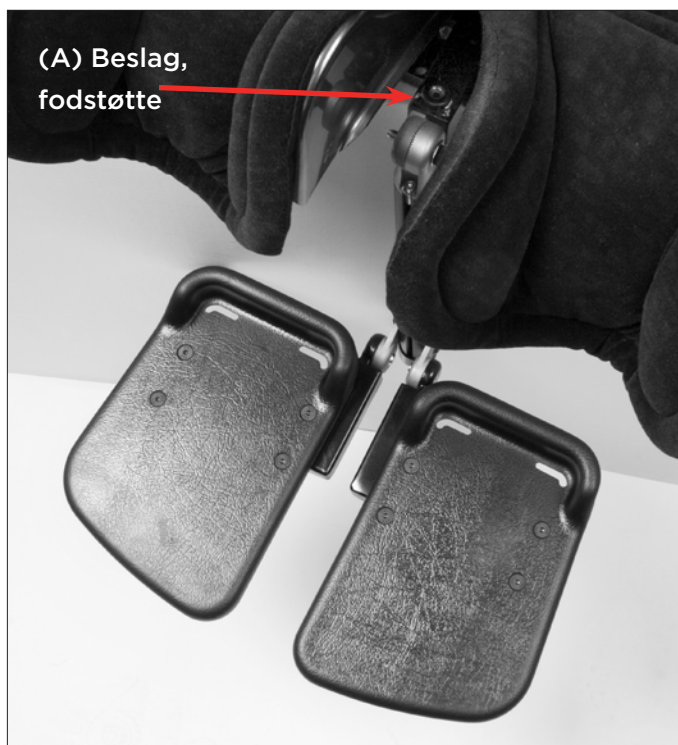

Montering af fodstøtte - A

Monter fodstøtten i beslaget (fyrkantet rør).
Fastgør fodstøtte med fingerskruen.

Justering af vinkel af knæled - B


Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Spænd fingerskrue når ønskede vinkel er opnået.

Vigtigt - Efter justering skal "tænderne" passe ind i hinanden. Stram skruen godt!

Højdejustering af fodplade - C

Løsen skrue (C), juster herefter til ønskede højde. Spænd skrue når ønskede vinkel er opnået.

○ = Værktøjsnøgle

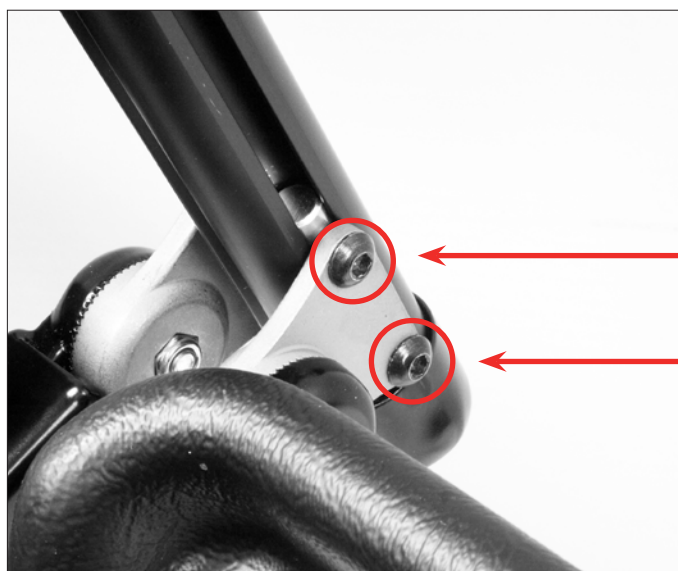

Fodstøtte, hel justerbar

Justering af vinkel af knæled - A

Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Højdejustering af fodplade - B


Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodplade - D

Fodpladens bredde og dybde kan justeres. Løsen unbrakoskruerne og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

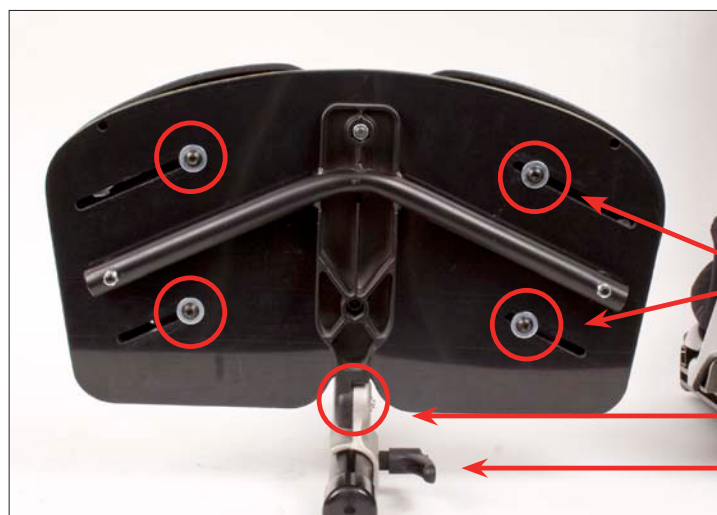

○ = Værktøjsnøgle

(D) Justeringsskruer til fodpladen

(C) Justeringsskrue til fodstøttevinkel

(B) Fingerskrue til justering af fodpladens højde

Fodstøtte, delt justerbar

Justering af vinkel af knæled - A

Løsen fingerskruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Højdejustering af fodplade - B

Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af vinkel ved fodled - C

Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodplade - D

Fodpladerne kan justeres både i bredde og dybde! Løsen skruerne og juster herefter till ønskede position. Stram skruerne når ønskede vinkel er opnået.



(C) Justeringsskruer til fodstøttens vinkel

(D) Justeringsskruer til fodpladen

Fodstøtte, opklappelig

Montering af fodstøtte - A

Monter fodstøtten ved at skubbe den ind i fodstøttebe-
slaget (firkantet rør). Spænd skruen forsvarligt efter
montering.

Justering af vinkel ved knæled - B


- Løsen fingerskruen, se position B
- Juster til ønskede vinkel
- Spænd fingerskruen

Højdejustering af fodplade - C

- Løsen fingerskruen, se position C
- Juster til ønskede højde
- Spænd skruerne.

Justering af vinkel ved fodled - D

- Løsen skruen og juster herefter til ønskede vinkel.
- Spænd skruen når ønskede vinkel er opnået.

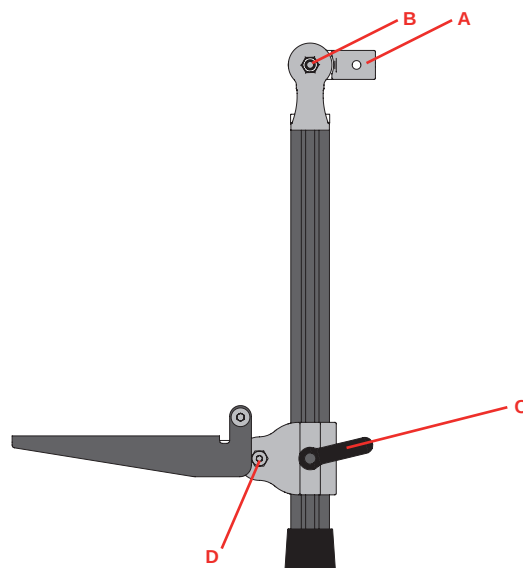

 = Værktøjsnøgle 

Fodstøtte, fjedrende fodstøtteadapter

Fjedrende fodstøtte


Zitzi Delfi Pro kan udstyres med en fjedrende fodstøtte
for at bryde eventuel spasticitet og skabe en dynamisk
siddestilling.

Højdejustering

Løsen skrue, se position A.

Vinkeljustering på fodstøtte


Løsen skrue, se position B og vinkel fodstøtten til ønskede
vinkel.

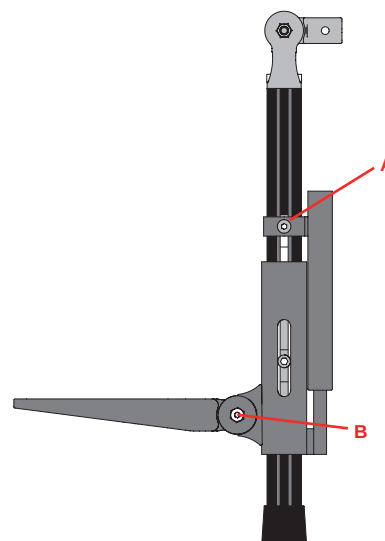

For at flexfunktionen skal fungere optimalt skal fodstøttestangen pege nedad.

Lægstøtte

Løsen skruerne A for at justere til ønskede højde og dybde. Spænd skruerne når ønskede indstilling er opnået. Løsen skruerne B for at justere bredden på lægstøttepladerne. Spænd skruerne, når ønskede indstilling er opnået.

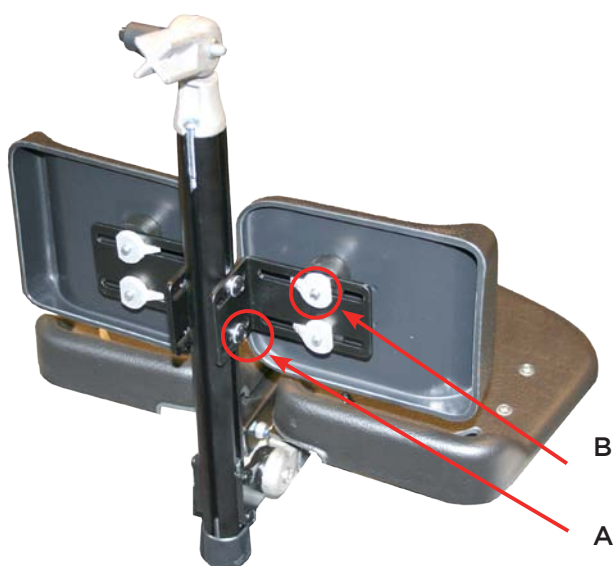

 = Værktøjsnøgle 

Fodplade enkelstang

Montering af fodkasse med enkelstang ved efterbestilling

Udbyt nuværende fodplade med den medfølgende. Eftersom fodkassen er konstrueret på en sådan måde at den passer både til enkelstang og dobbeltstang skal der bores i fodpladen afhængig af hvilken type fodplade du har.


For at montere fodkassen starter du med at skubbe profilmøtrikken (A) ind på fodkassen (B) i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd italienergribet (E).

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal ned igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere medfølgende polstring og kontroller at alle skruer er ordentligt spændte.

Montering af fodkasse med enkelstang ved bestilling med fodstøtte

For at montere fodkassen skal du starte med at skubbe profilmøtrikken (A) på fodkassen (B) ind i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd italienergribet (E).

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at Montere medfølgende polstring og kontrollere at alle skruer er ordentligt spændte.

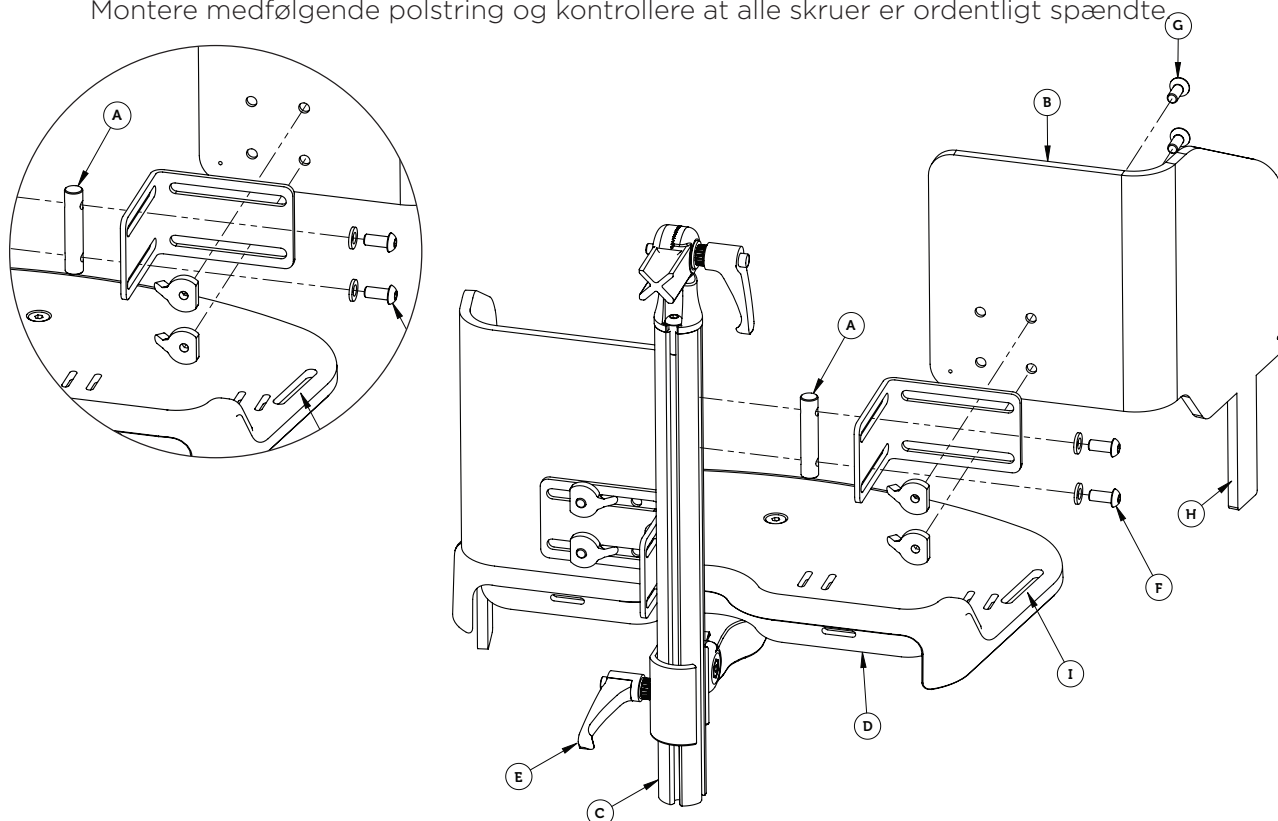

Plaststangen (H) kan efter justering af ønskede højde skæres af eller varmes ind under fodstøttepladen efter egne ønskemål.



Markeringer for borehul er markeret under fodpladen.

Fra enkelstang til dobbeltstang


Fra enkelstang til dobbeltstang og vice versa

Som standard kommer fodkassen i følgende størrelser 2, 3 og 4 til montering på dobbeltstang og størrelse 1 til montering på enkelstang.

For at ændre mellem de forskellige varianter, skal du vende vinkelbeslaget (A) 180 grader og herefter bytter side på profilmøtrikkerne (B).

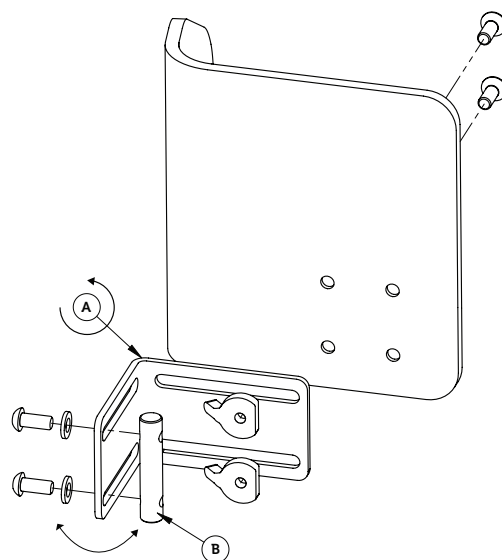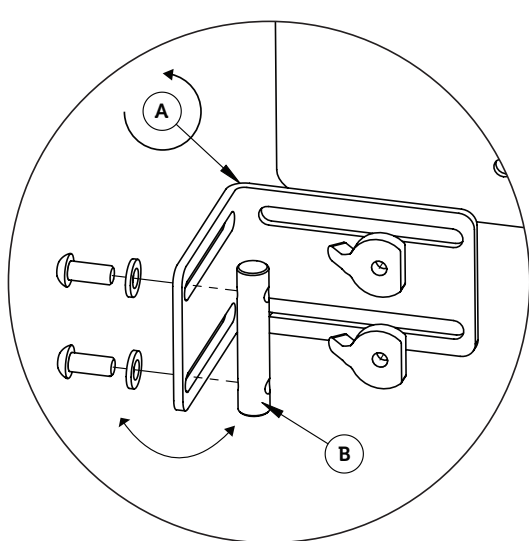


Tekniske data

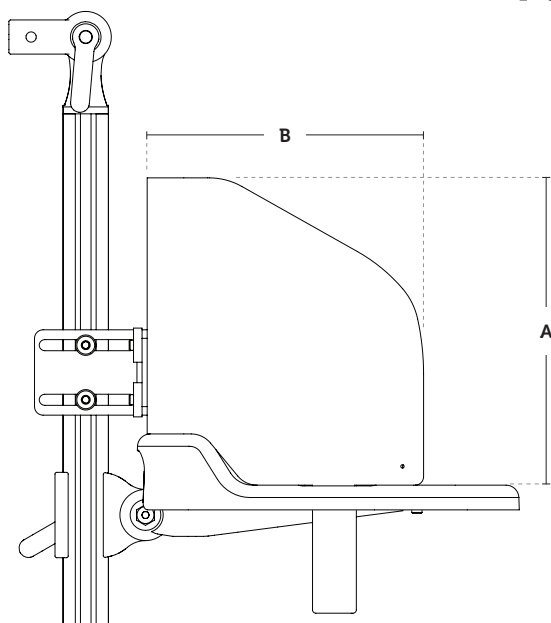

hel / delt fodplade	Str.	Højde (A)	Dybde (B)
990041 / 990046	1	140 mm	130 mm
990042 / 990047	2	170 mm	160 mm
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

Boreanvisninger til hel fodstøtteplade


Størrelse 1

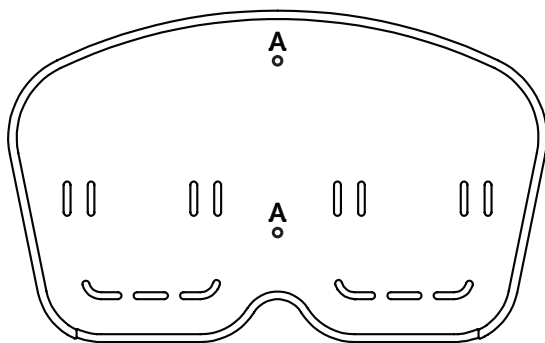

(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang

Størrelse 2

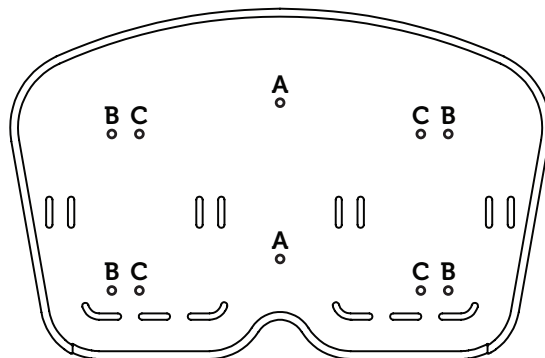

(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang


(B)

Seabass Pro
dobbelstang

(C)

Clozitt
dobbelstang

Størrelse 3

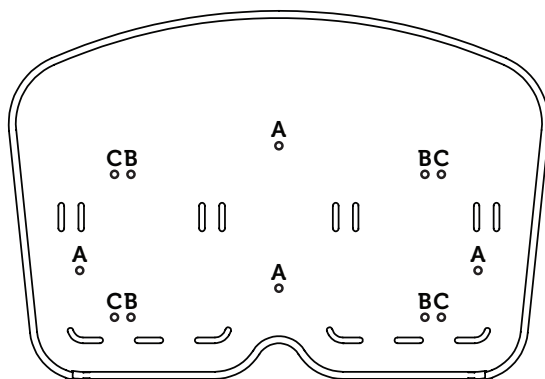

(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde enkelstang


(B)

Seabass Pro
dobbelstang

(C)

Anatomic formstøbt sæde &
Clozitt dobbelstang

Størrelse 4

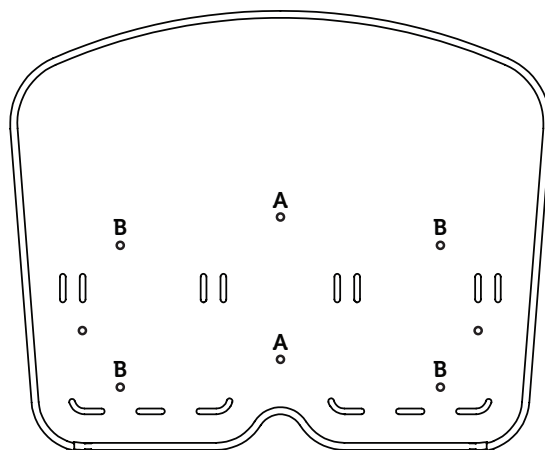

(A)


Anatomic formstøbt
sæde, enkelstang

(B)

Anatomic formstøbt
sæde, dobbelstang

Boreanvisninger til delt fodstøtteplade

Størrelse 1

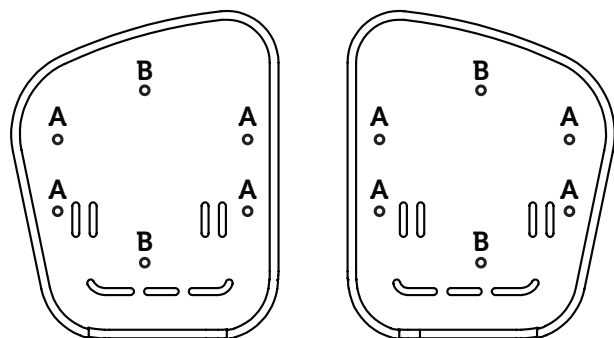


(A)

Delfi Pro & Anatomic
formstøbt sæde, enkelstang

(B)

Anatomic formstøbt
sæde, dobbeltstang

Størrelse 2

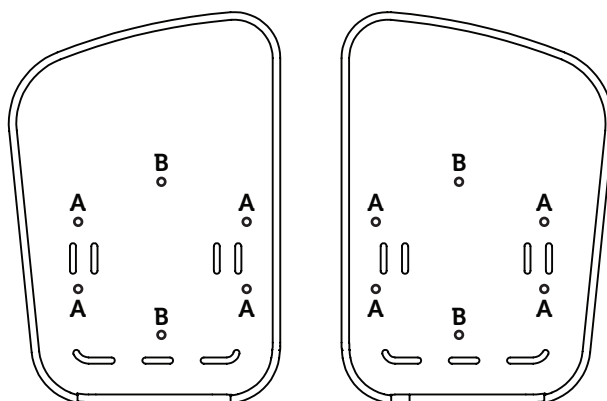


(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang

(B)

Seabass Pro, Clozitt, Anatomic
formstøbt sæde & Sharky Pro
dobbeltstang

Størrelse 3

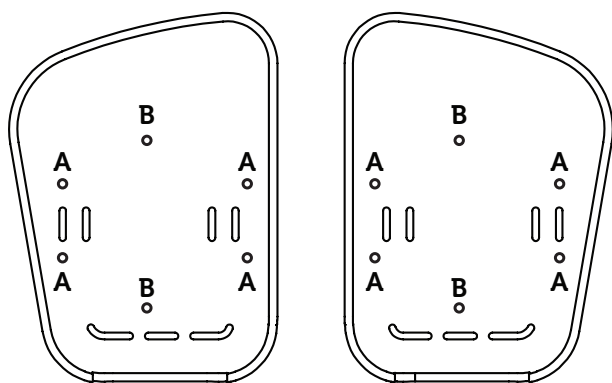


(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang

(B)

Seabass Pro, Clozitt
& Anatomic formstøbt sæde
dobbeltstang

Størrelse 4

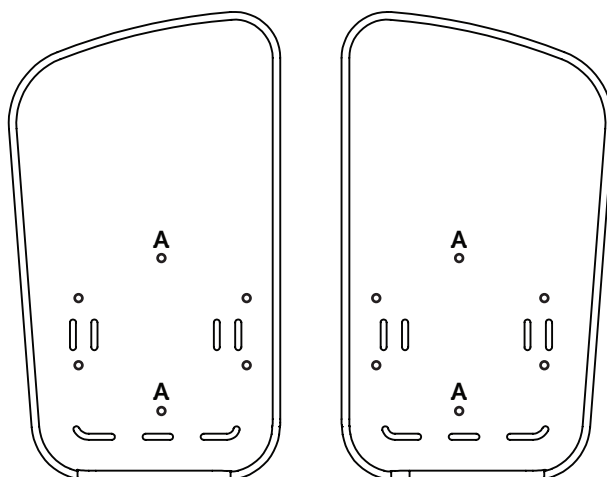

(A)

Anatomic formstøbt sæde
dobbeltstang

Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding.

Montering af ankelbespændinger på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.



Kontroller at polstringen sidder som den skal på ankelbespændingen.

Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe




- A) Fjern rygpulstringen.
- B) Fastgør lændestøtten på rygpulstringen (indenfor det markerede område) med hjælp af medfølgende velcro.
- C) Sæt rygpulstringen på plads.



Lændestøttekile

Kørebøjle

- 1) Aftag t-nøglen fra rygprofilen.
- 2) Sæt profilmøtrikkerne (A) i sporene på rygprofilen og før kørebøjlen til ønskede position.
- 3) Spænd skruerne.

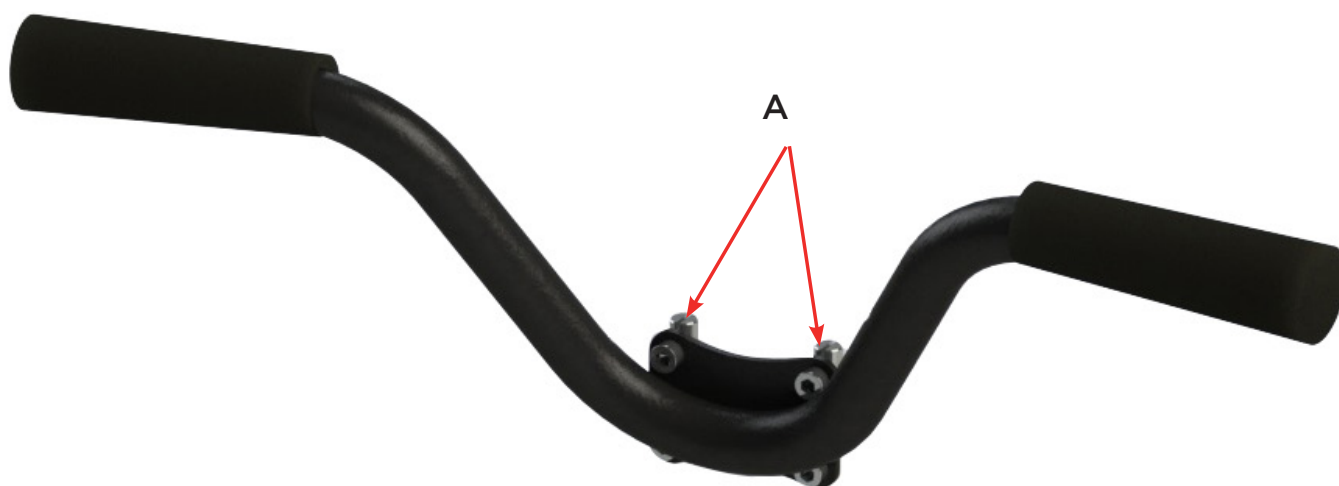

Varmepakke




- A) Sædedelspude
- B) Rygpude
- C) Batteri og kontroldåse

- Varmepuderne fastgøres på betrækket med velcro.

Varmepakken holder kropstemperaturen oppe og forhindrer afkøling ved koldt vejr. Når kropstemperaturen opnåes slår varmekappen fra for at spare energi. Hvis temperaturen falder aktiveres systemet igen og varmer på ny op til kropstemperatur.

Legebøjle

Beslaget til legebøjlen skal monteres på rygprofilen. Udskift det eksisterende endestykke øverst på rygprofilen med det der følger med legebøjlen. (Endestykket er forboret så det letter monteringen). Skub beslaget til legebøjlen ned i rygprofilen B. Lås herefter legebøjle's beslags position ved at anvende skrue C. Når beslaget er på plads og i låst position, skubber du legebøjlen ned i position D.

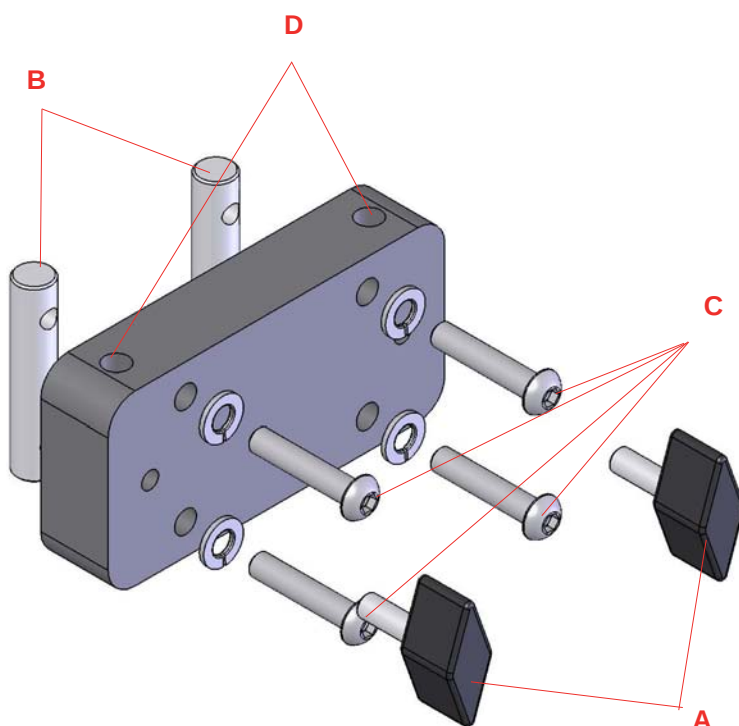


Montering af hovedstøtte ved anvendelse af legebøjle

Hvis der også skal monteres hovedstøtte, monteres hovedstøttebeslaget på fæstet til legebøjlen. Fastgør med lange skrue og fjederskiver.

Kaleche


Montering af kaleche

Begynd med at afmontere eventuel hovedstøtte. Løsen herefter skruerne (A) og før profilmøtrikkerne ind i (B) profilen. Juster til rette højde og spænd skruerne. Kalechen kan afmonteres fra fæstet ved at løsne italienergrebet (C) og spænde kalechen i siden.

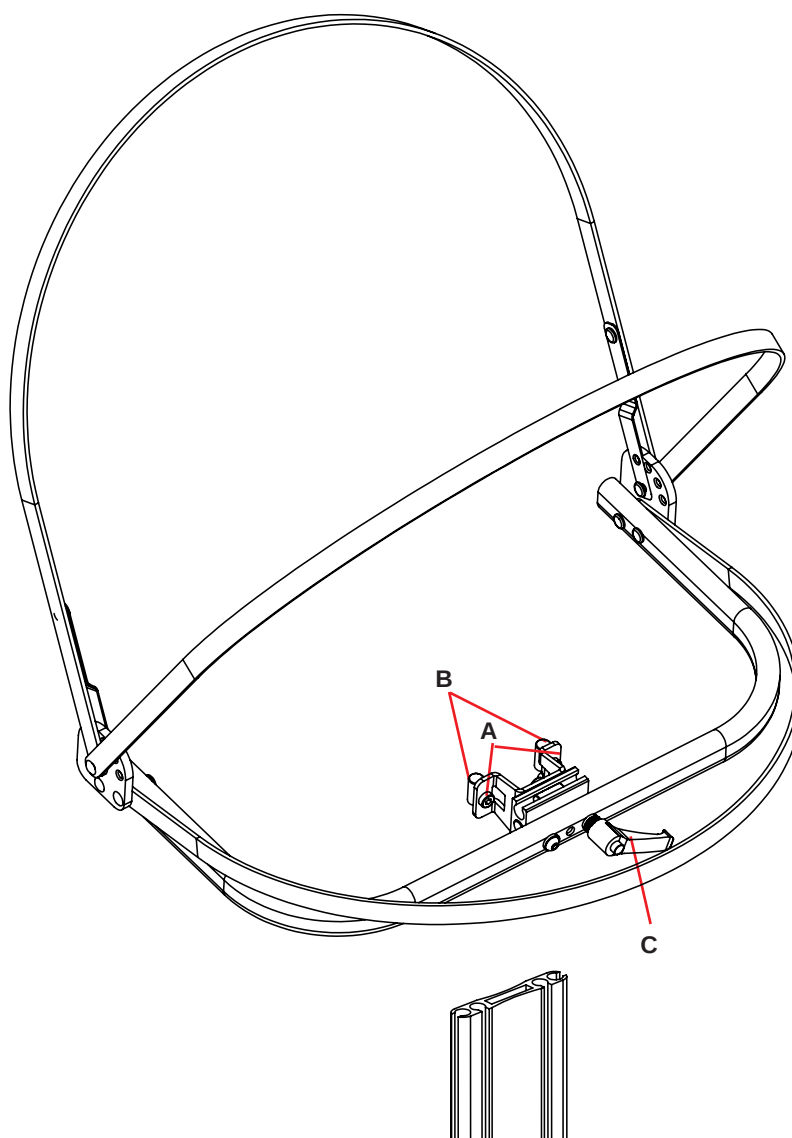

Plansæde

Skru træplade, distancestykker og profilmøtrikker sammen.
Skru alle 4 profilmøtrikker ind i profilen, se billedet og spænd
herefter skruerne ordentligt til.

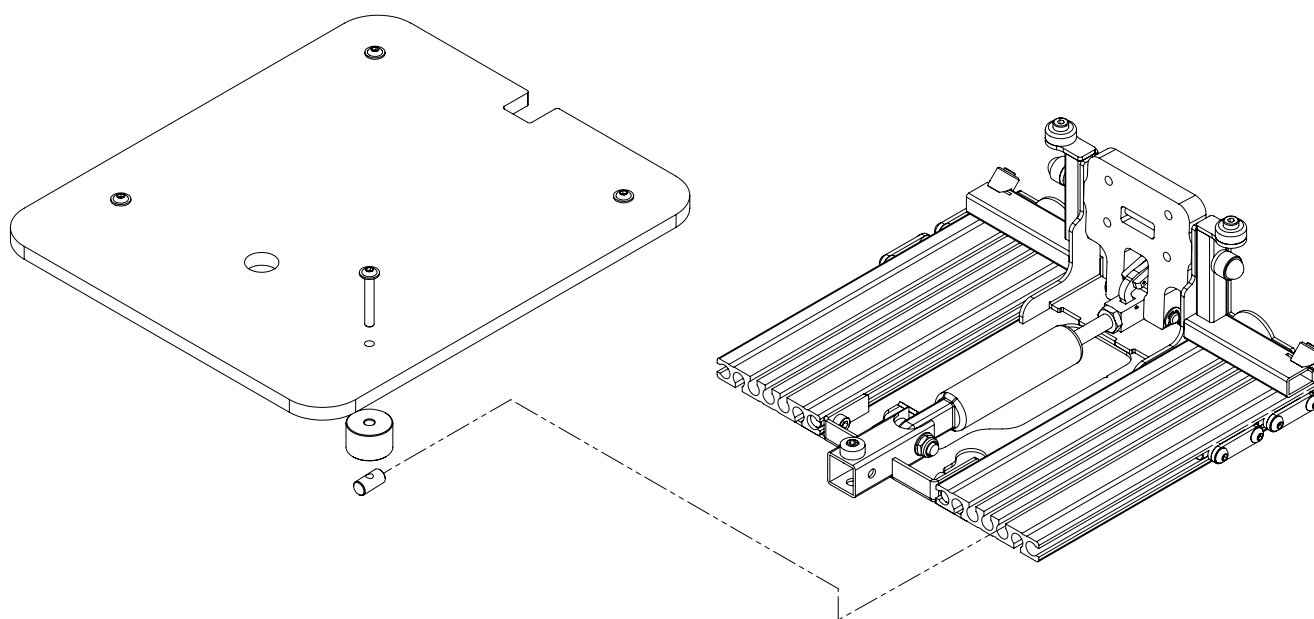


Montering på stel

Montering af fæsteplade:

Monter fæstepladen med de medfølgende skruer, spændeskiver og låsemøtrikker på stellets fæsteplade.

Montering af Delfi Pro:

Siddesystemet monteres enkelt og sikkert på stellet ved hjælp af en fæsteplade. Fæstepladen har 2 stk. styretapper som gør at siddesystemet sidder på plads og beholder siddesystemets position. Se billedet. Tryk herefter siddesystemet tilbage indtil det stopper og du hører et klik. Spænd herefter låseknopperne under sædepladen for at fastholde siddesystemets position.

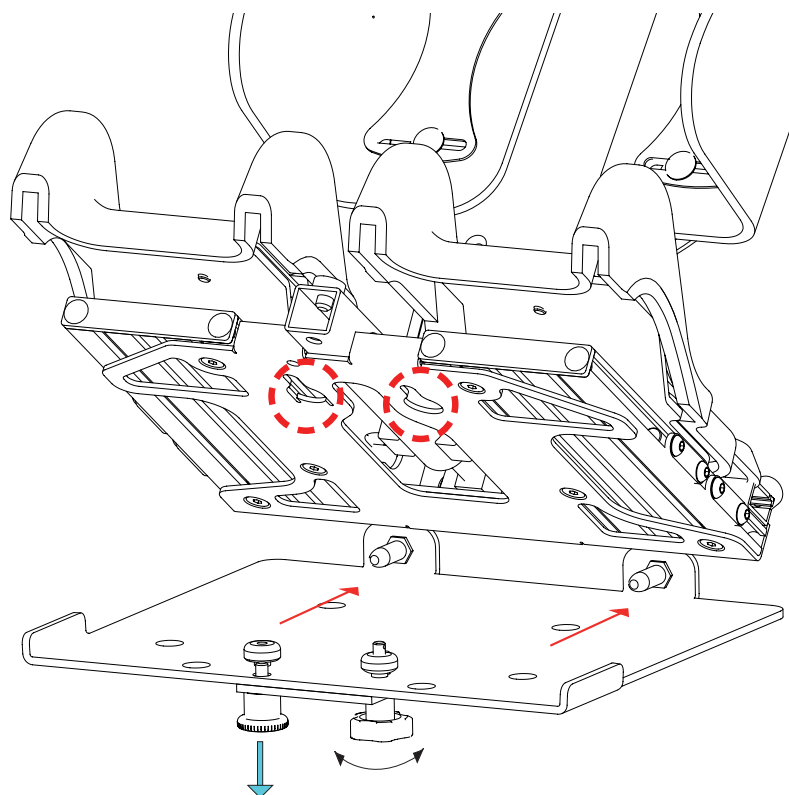

 Hulmønster

 Trækretning


 Træk nedaf for at åbne

 Vrid



OBS! Sørg for at låsen låser ordentligt og at låseknopperne er ordentligt spændt!

Adaptersystem universal

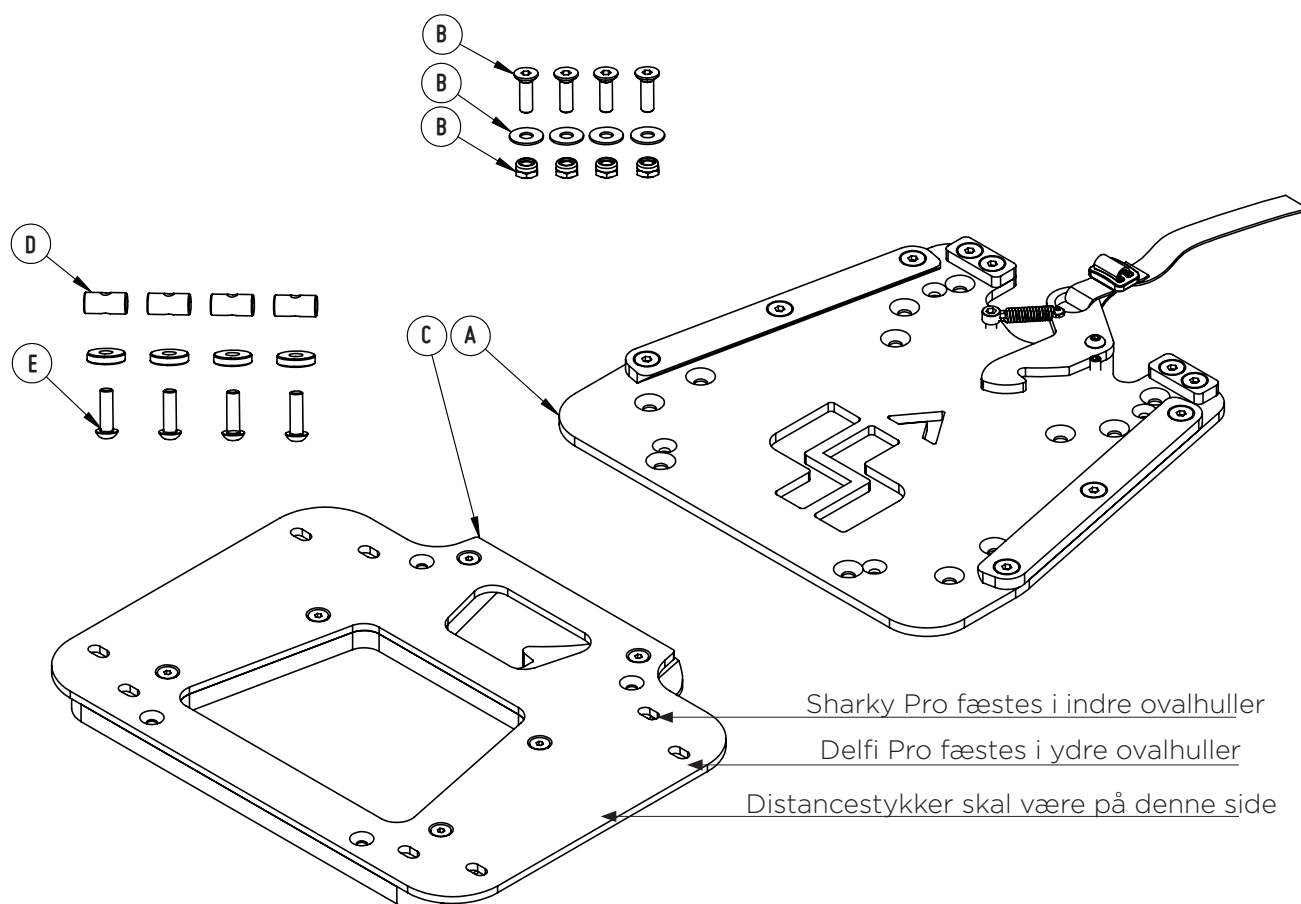

Montering med adaptersystem

Begynd med at montere basepladen (A) på stellet ved at skrue den fast med medfølgende skruer, skiver og møtrikker (B).

Monter herefter adapterpladen (C) ved at skubbe låsemøtrikkerne (D) ind i sporet på siddesystemets underside. Spænd skruerne (E) når ønskede position er opnået.

Når adapterpladens respektive baseplade er monteret på siddeystemet og stel, kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt påsat når en kliklyd høres.



Sikre dig at siddesystemet sidder ordentligt fast på stellet inden anvendelse.

TEKNISKE DATA DELFI PRO


Zitzi Delfi Pro	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Brugerlængde, ca cm:	60-80	70-100	90-130	120-160	140-160
Sædebredde cm:	24, 27, 30	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Sædedybde cm:	14 - 20	17 - 27	24 - 34	30 - 40	37 - 45
Axilhøjde cm:	17 - 27	17 - 27	24 - 34	30 - 40	37 - 45
Hoftevinkel samtlige størrelser -12° til +26°					

Armlæn

	A x B
Str. 1	230 x 75 mm
Str. 2	230 x 75 mm
Str. 3	230 x 75 mm


	C
Str. 1	140-205 mm
Str. 2	140-205 mm
Str. 3	190-280 mm

Mål fra toppen af sædedelen


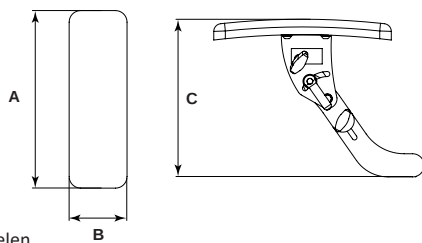


Bækkenstøtte

	A x B
Str. 1	150 x 70 mm
Str. 2	200 x 100 mm

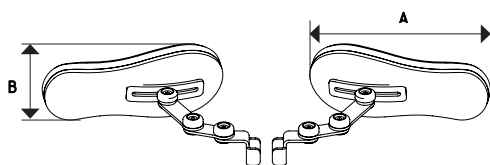


Hovedstøtte

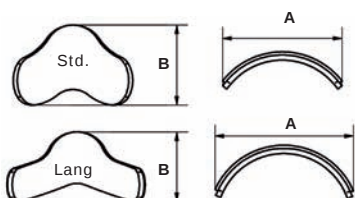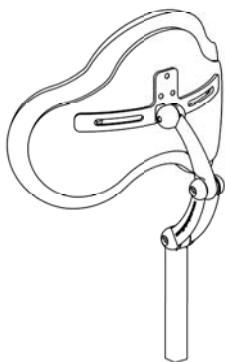

	A	B
Hovedstøtte str. 1	220 x 150 mm	
Hovedstøtte str. 1 lang	280 x 160 mm	
Hovedstøtte str. 2	240 x 190 mm	
Hovedstøtte str. 2 lang	280 x 210 mm	

JUSTERBAR RYG

Alle mål er opmålt med polstring

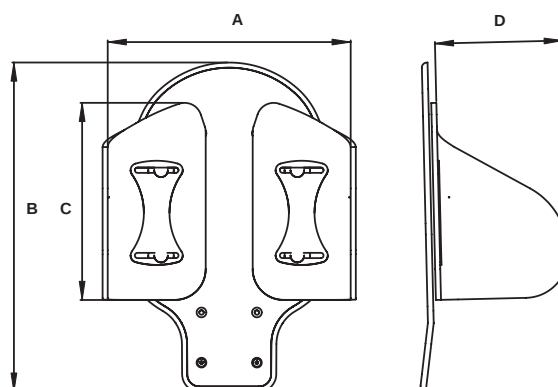


	A
Ryg str. 0	140 - 220 mm
Ryg str. 1	170 - 260 mm
Ryg str. 2	190 - 280 mm
Ryg str. 3	220 - 310 mm

	B x C
Ryg str. 0	340 x 160 mm
Ryg str. 1	340 x 195 mm
Ryg str. 2	385 x 230 mm
Ryg str. 3	450 x 245 mm

	D
Ryg str. 0	125 mm
Ryg str. 1	125 mm
Ryg str. 2	150 mm
Ryg str. 3	175 mm


Sædedel

Windswept

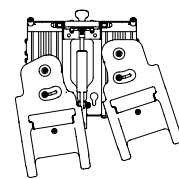


Windswept:
Windswept mulighed 9°

Abduktion/Adduktion

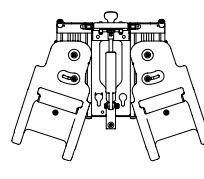


Abduktion:
Samtlige størrelser 0° til +18°
Adduktion:
Samtlige størrelser 0° til -9°

Benlængde

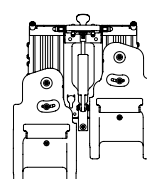


Fodstøtte

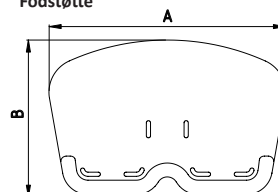

	A x B
Hel str. 0	320 x 260 mm
Hel str. 1	315 x 195 mm
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm

	A x B
Helt justerbar str. 1	155 x 190 mm
Helt justerbar str. 2	160 x 220 mm
Helt justerbar str. 3	180 x 255 mm

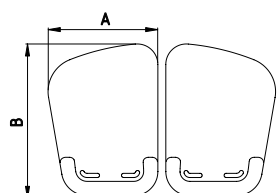


	A x B
Delt str. 1	155 x 190 mm
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm

	A x B
Delt justerbar str. 1	155 x 190 mm
Delt justerbar str. 2	160 x 220 mm
Delt justerbar str. 3	180 x 255 mm

BORD

Mål

	A	B	C	D
Bord str. 1	480 x 450 mm		240 x 250 mm	
Bord str. 2	540 x 515 mm		260 x 290 mm	
Bord str. 3	570 x 570 mm		280 x 340 mm	

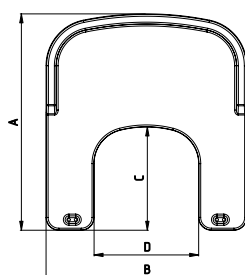

Vedligeholdelsesvejledning

Serviceintervaller

For at hjælpemidlet skal fungere korrekt og sikkert bør regelmæssig service og kontrol udføres. Behovet for service skifter og skal bedømmes fra gang til gang afhængig af brug og slid. Kontroller alle bevægelige dele og skruer for slitage. Service skal altid foretages af professionelt og kvalificeret personale. Du er altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Rengøring og vaske instruktion

Plast og metal dele kan tørres af med en fugtig klud, eller vaskes med antibakteriel vaskemiddel eller lignende. Tænk grønt, tænk på miljøet!
Anvend biologisk nedbrydelige vaskemidler.

Puder, betræk og bæltepuder kan vaskes ved 60° skånevask og må ikke tørretumbles men kan tørres i tørreskab. Følg instruktionen på de respektive vaskeanvisninger. Samme regler gælder for positioneringsseler og hoftebælter fra Anatomic SITT A/S.

Kontroller jævnligt og udfør vedligeholdelse hvis nødvendigt.

Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt

Gaspatronen bør bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion. Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst en gang hver 6. måned. Ydermere skal produktet opbevares, så patronerne er placeret nedad eftersom gaspatronens forsegling brydes og gøre, at den ikke kan udløses.

Værktøj

Værktøjet (4 mm unbrakonøgle) bruges til at lave justeringer med. Den er integreret i toppen af rygprofilen.

Garanti

2 års reklamationsret i henhold til købeloven. mere detaljeret information ses på side 39 i denne brugsanvisning.

Kombinationer

Zitzi Delfi Pro og tilbehør er CE-mærkede produkter, som kan kombineres med samtligt af det tilbehør, som beskrives i denne brugsanvisning. Zitzi Delfi Pro passer bl.a. sammen med stel som Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro og Snapper. For øvrige kombinationer kontakt venligst Anatomic SITT A/S.

Reservdele

For at CE-mærkningen af Zitzi Delfi Pro skal være gyldig, kan siddesystemet kun udstyres med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.

Renovering

Renovering af siddesystemet må kun foretages med originale dele fra Anatomic SITT A/S.



Obs!

Efter renovering, check altid, at produktet ikke er specialtilpasset, før den sendes til en ny bruger.

Mærkning

Zitzi Delfi Pro med tilbehør er et CE-mærket produkt.

Et unikt serienummer er placeret på en etiket, som sidder under ledhuset.

Dette serienummer skal oplyses ved korrespondence vedrørende produktet.

Genbrug

En brugt del eller produkt, skal afmonteres og kasseres. Delene skal herefter sorteres efter materiale type, metal, plast og brændbare stoffer (tekstiler). Gaspatron sorteres som farligt materiale.

Opsummering

Opfølgning

Udfør kontinuerligt opfølgning angivet under hvert punkt. Du bør kontrollere nedenstående punkter hver gang brugeren skal anvende hjælpemidlet.

- Kontroller regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.
- Kontroller regelmæssigt slitage på stropper og bæltepuder.
- Kontroller at balancering på stellet er korrekt.
- Kontroller indstillinger på tilbehør, så brugeren har en korrekt siddeposition.
- Sæt ikke brugeren i siddesystemet før du hører en kliklyd ved monteringen af siddesystemet på et stel med adaptersystem.

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang en Zitzi Delfi Pro ændres, skal man vurdere, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring indenfor CE-mærkningen. Alle andre ændringer er specialtilpasninger. Tilpasningerne må kun foretages af en person, der anses for at være kvalificeret til opgaven og bør altid ske på en professionel måde. CE-mærket betyder, at produktet opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerhedskrav.

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren at anvende efter tilpasning.

Produktet bør mærkes med oplysninger om det er tilpasset til en specifik bruger, så produktet ikke fejlagtigt antages for at være et produkt i standard-udførelse.

Tilpasninger som kan foretages på Delfi Pro

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren at anvende efter tilpasning.

Afkortning af fodstøtteprofiler

Fodstøtteprofilens længde kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.

Afkortning af rygprofiler

Rygprofilens længde kan afkortes. Profilen må aldrig blive så kort, at alle rygbeslagene ikke kan monteres.

Betingelser for salg

Garanti

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Reklamation

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returning af produkter

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen.

Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returning mere end 20 dage efter levering

Tilbagebetaling på 80% af faktura beløbet

Returning mere end 60 dage efter levering

Tilbagebetaling på 60% af faktura beløbet

Returning mere end 150 dage efter levering

Tilbagebetaling på 40% af faktura beløbet

Returning mere end 360 dage efter levering

Der ydes ingen refusion

⚠ Specialtilpassede produkter kan ikke returneres

SE**Anatomic SITT AB (tillverkare)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK**Anatomic SITT A/S**

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI**Rehaco OY**

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL**Anatomic SITT Nederland BV**

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wideanatomicsitt.cominfo@anatomicsitt.comfacebook.com/anatomicsittyoutube.com/anatomicsitt